


VARYFLEX KÄYTTÖOHJE

Joustosäädettävä seisomaline

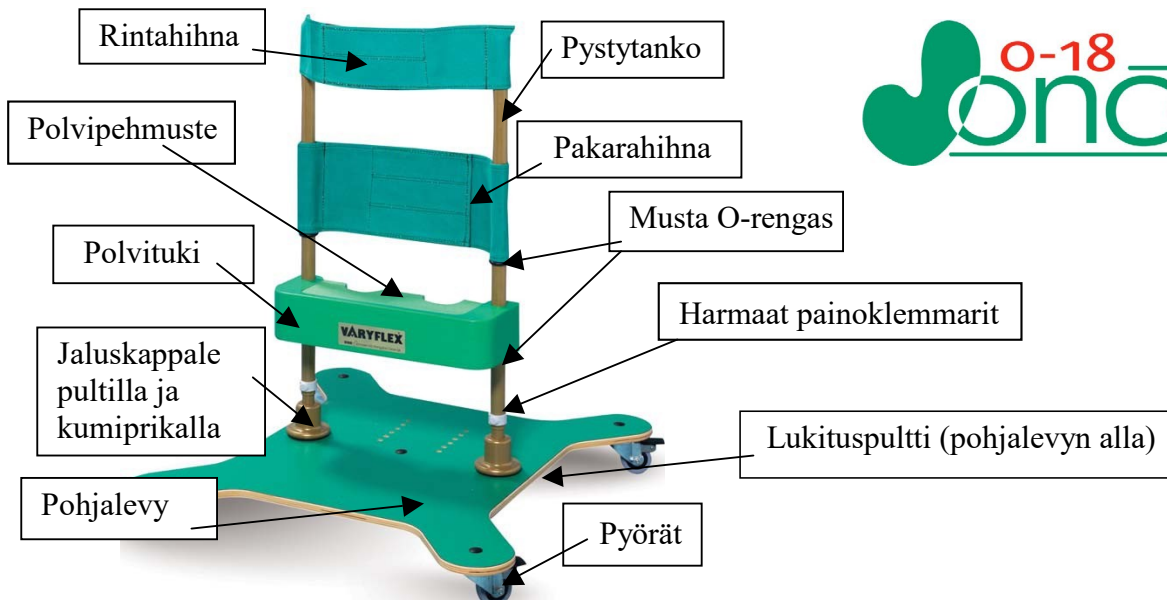

Varyflex-seisomalinieneen säätäminen käyttäjälle Korkeussäätö

Ensin mitataan lapsen pituus lattiasta kainaloon ja pystytangot säädetään siten, että niiden yläpäävät ovat juuri ja juuri tämän mitan alapuolella; harmaat painoklemmarit poistetaan pystyputkien alaosasta, valitaan ohuemmissa putkissa näkyvistä rei'istä sopiva reikä ja klemmari asennetaan kohtaan, joka tuottaa sopivan korkeuden.

Polvituen säätäminen

Polvituki säädetään siten, että se tukee patellajännettä ja lukitaan tälle korkeudelle tuen alla olevien mustien kumirenkaiden avulla.

Kantapäätuen säätäminen

Kantapäätuki säädetään ruuvien avulla asentoon, joka pitää jalan oikeassa asennossa polvitukeen nähden.

Tukihihnan säätäminen

Aluksi varmistetaan, että rintakehähihna on mukavasti juuri kainaloiden alapuolella, sitten säädetään ja kiinnitetään pakarahihna mahdollisimman tiukalle lapsen takamuksen taakse ja tuetaan tähän asentoon mustien kumirenkaiden avulla.

Rungon jouston säätäminen

Varyflex toimitetaan jäykimmässä säädössään. Säätäminen edellyttää telineen kääntämistä siten, että rungon alla olevaan lukituspulttiin päästään käsiksi.

Jouston lisäämiseksi molempia lukituspultteja kierretään **6 mm:n kuusiokoloavaimella vastapäivään**

Suurin mahdollinen jousto syntyy yhden kierroksen verran kiertämällä.

Molempia pultteja suositellaan kierrettäväksi vain neljänneskierroksen verran kerrallaan, mikä jälkeen tarkistetaan syntynyt joustoaste.

Joustavuutta vähennetään kiertämällä lukituspultteja neljänneskierroksen verran kerrallaan **myötäpäivään**.

Tärkeä huomautus

Ensiksikin suositellaan, että Varyflex-telineessä vietettävä aika on rajoitettu ja käyttöaikaa lisätään asteittain päivä päivältä. Varyflex-telinettä on myös tarpeen säätää lapsen kasvun myötä.

Lisävarusteet

Varyflex-telineen käyttöaluetta voidaan laajentaa hyödyntämällä alla lueteltua laajaa lisävarustevalikoimaa:

1. Pyöräsarja
2. Pöytä.
3. Kaksinkertaiset rinta- ja pakarahihnat.
4. Kantapään kohdistuskappaleet.
5. Jalkahihnat.
6. Jalkojen erottimet.
7. Asennon epäsymmetrisyyden tukihihnat.
8. Poikittainen tukitanko.
9. Lisäsovituksia voidaan arvioinnin jälkeen sallia, ja **Varyflex** voidaan toimittaa jäykkänä seisomalinieneen koodilla 'RIGY'

Terapeutit tietävät, että lapset, jotka eivät seiso, saavat huomattavaa hyötyä seisovaan asentoon tukemisesta. Tämä auttaa parantamaan lihasjänteyttä ja luuston kehittymistä, mahdollistaa erilaisten yksinkertaisten toimintojen suorittamisen, antaa itseluottamusta ja sallii painovoiman vaikuttaa eri elimiin. Nämä hyödyt ovat usein myös eduksi ruuansulatuskanavan toiminnalle, jolloin lapsen ruuansulatus paranee.

Lasten kliiniseen tilaan vaikuttavat lisäksi monenlaiset seikat, kuten se, ovatko he pitkiä vai lyhyitä, aktiivisia vai passiivisia. Tällaisten erojen huomioon ottaminen edellyttää seisomatelineen mahdollisimman runsasta säädettävyyttä – 'jouston' säädettävyys on **Varyflex**-telineen ainutlaatuinen ominaisuus.

Tavanomaiset seisomatelineet voivat mahdollistaa kaikki edellä kuvatut edut, mutta monille lapsille on epämukavaa olla tuettuna luonnottoman jäykkään asentoon, jolloin he saattavat joskus muuttua vähemmän yhteistyökykyisiksi. Kontrolloimaton jousto saattaa vastaavalla tavoin olla joillekin lapsille pelottavaa.

Koska lapsen halukkuus ja innostunut osallistuminen on onnistumisen olennainen edellytys, tarvitaan vaihtoehto jäykkyydelle ja kontrolloimattomalle joustavuudelle. **Varyflex**-teline, jossa on mahdollista säätää joustavuus/jäykkyysastetta, tarjoaa ideaalisen ratkaisun ja tekee siitä parhaan vaihtoehdon kaikille seisomatelinetä tarvitseville lapsille.

KÄYTTÄJÄN MAKSIMIPAINO 35 KG

JULKAISUAJANKOHTA ELOKUU 2015.

DCS Joncare Limited tarjoaa arviointipalvelun, jonka avulla voidaan tehdä tarkoituksenmukaiset valinnat **Varyflex**-telineen soveltuvuudesta ja sen lisävarustevalikoimasta. Yhtiö suosittelee vahvasti, että arvioinnit suorittaa jälleenmyyjä-verkoston henkilöstö lapsen oman pätevän terapeutin valvonnassa.

Vastuuvapauslauseke

Varyflex ei välttämättä täytä **kaikkien** seisomaraajoitteisten lasten tarpeita. Seisomaraajoitteiden kompleksisen luonteen huomioiden ei esitetä väitteitä, joiden mukaan **Varyflex** ehdottomasti korjaisi, hillitsisi tai estäisi skolioosia. **Varyflex**-telinettä tulee käyttää ainoastaan pätevän terapeutin valvonnassa tehdyn arvioinnin jälkeen.

Jälleenmyyjä

rehaco.

Rehaco Oy

Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu

040 705 5886

info@rehaco.fi



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

