



Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic Sitt AB:n valmistamien alustojen kanssa. Mikäli haluatte muita käyttötarkoituksia, ottakaa yhteyttä maahantuojaan.

**Zitzi****DELFI PRO**

Ennen kuin käytät Zitzi Delfi Pro -tuotetta, On tärkeää, että luet tämän oppaan. Tämä koskee kaikkia käyttäjiä.

Tuote on tarkoitettu henkilöille joilla on istuin ongelmia ja sopii moniin eri diagnooseihin.

Istuimen sovituksen voi tehdä ainoastaan lääketieteellisesti pätevä henkilö.

Lisätietoja maahantuojalta.


**Tillverkare / Manufacturer**

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-60006 Norrköping

SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00



check
here!

Mikäli tuotetta on räätälöity, CE merkintä ei ole voimassa ja se pitää poistaa tuotteesta.

Sisällysluettelo

Valmistuserä/Painos 1 2011 05 16

FI1301-1

Työkalut	2:1	Jaettu ja säädettävä jalkatuki	15:1
Selkäosan kiinnitys	2:2	Jalkatuki, ylöskääntyvä	16:1
Istuimen säädöt	3:1	Jalkatuki, pallonivel sovitin	16:2
Lonkan kulman säädöt	5:1	Jalkatuki, joustava sovitin	16:3
Selkänojan korkeuden säädöt	6:1	Pohjetuki	17:1
Säädettävä selkänoja	7:1	Nilkkapidike	17:2
Lantiotuki	8:1	Ristiselkätuki	17:3
Lantiovyö	8:2	Työntökaari	18:1
Ylävöiden kiinnitys	9:1	Lämmityslaite	18:2
Käsinoja	10:1	Pään tuki	19:1
Olkavarren tuki	11:1	Lelunripustin	20:1
Pöytä	11:2	Aurinkosuoja	20:2
Jalkatuki	12:1	Kehikkoon kiinnittäminen	21:1
Erilliset jalkatuet	13:1	Kiinnityslevyt	22:1
Säädettävä jalkatuki	14:1	Huolto	23:1
		Tekniset tiedot	24:1



Visiting address Stohagsgatan 26, 602 29 NORRKÖPING, SWEDEN
Postal address Box 6137, SE600 06 NORRKÖPING, Phone +46 (0)11-16 18 00, fax 011-16 20 05
www.anatomicsitt.com





2:1 Työkalut

Kuusiokoloavain (4 mm) on liitetty selkänojan yläosaan ja sitä voidaan käyttää säätöjen tekoon.



2:2 Selkäosan kiinnitys

○ = Säätöpultit



Selkänoja kiinnitetään neljällä pultilla. Lukitse runko kiristämällä pultit. Selkänoja asettuu automaattisesti oikeaan kohtaan.

3:1**Istuimen säädöt** = Säätöpultit


Istuimen syvyys, jalkojen pituuden ero ja jalkojen loitonnus/lähennys ovat helposti säädettävissä. Aloita irrottamalla istuinlevyn päällinen, että pääset käsiksi säätöpultteihin.

Huomaa, että PULTTEJA EI TULE KOSKAAN IRROTtaa KOKONAAN, vaan ainoastaan löysätä niitä.

**3.1.1 Istuimen leveyden säätäminen**

Istuinta levennetään ja kavennetaan säätämällä jalkaosia.

- Löysää kahta pulttia kuusiokoloavaimella.
 - Siirrä jalkaosia haluttuun uraan.
 - Kiristä pultit, kun haluttu leveys on saavutettu.
- (Jalkaosat ovat oletuksena urassa 1)

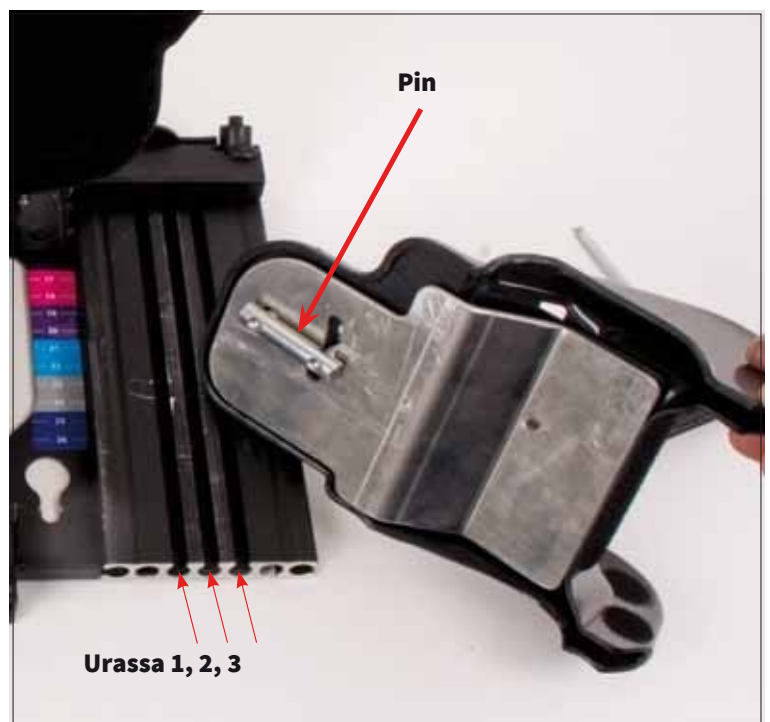 = Säätöpultit

4.1.2 Jalkojen pituuden ero

Löysää kahta pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan.
Kistä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu.



4.1.3 Istuimen kaarevuuden säätäminen

Säätäessäsi istuimen syvyyttä, tulisi säätää myös istuimen kaarevuutta.
Esimerkki; jos istuimen syvyys on säädetty 23 cm:n kohdalle (harmaa alue), tulisi myös kaarevuuden olla harmaalla alueella, jotta oikea kaarevuus säilyy.

Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan.
Kistä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu.

○ = Säätopultit 



5.1.4 Loitonnus ja lähennys – Pultti B

Löysää pulttia kuusiokoloavaimella ja siirrä jalkaosat haluttuun uraan.

Kiritä pultit, kun haluttu kohta on saavutettu.

 = Säätöpultit



Neutraali




Loitonnus




Lähennys

5:1 Lonkan kulman säädöt

Reunan aktivoimiseksi, vedä se suoraan ulos ja sitten ylös. Säättääksesi selkänöjan kulmaa työnnä reunaa alas ja aseta se haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, päästä reunasta irti ja laita se "lapsilukkotilaan".

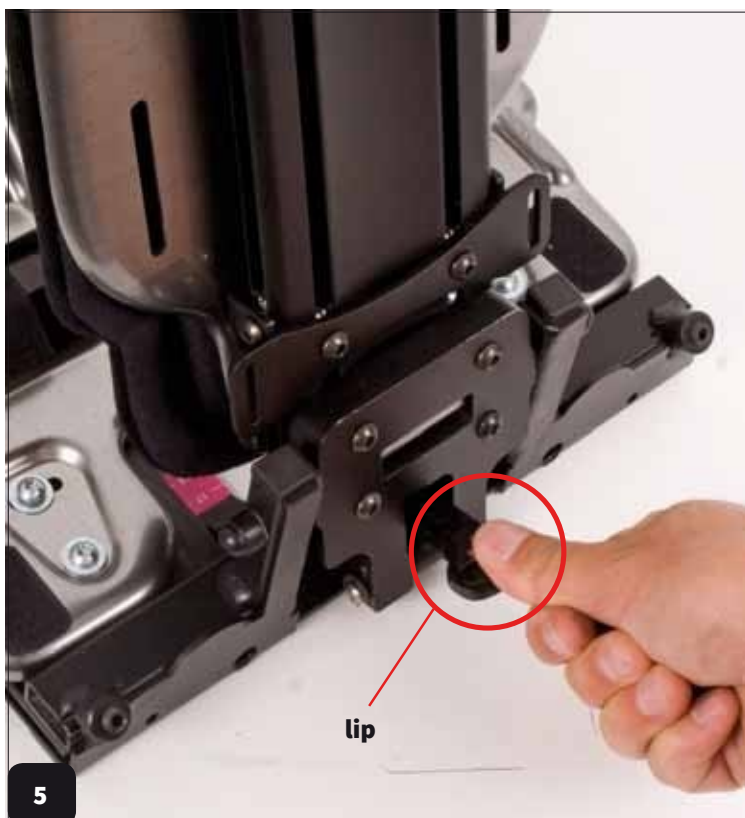

On erittäin tärkeää, että vapautusvipu on lapsilukkotilassa alas laskettuna, kun säädöt on tehty.

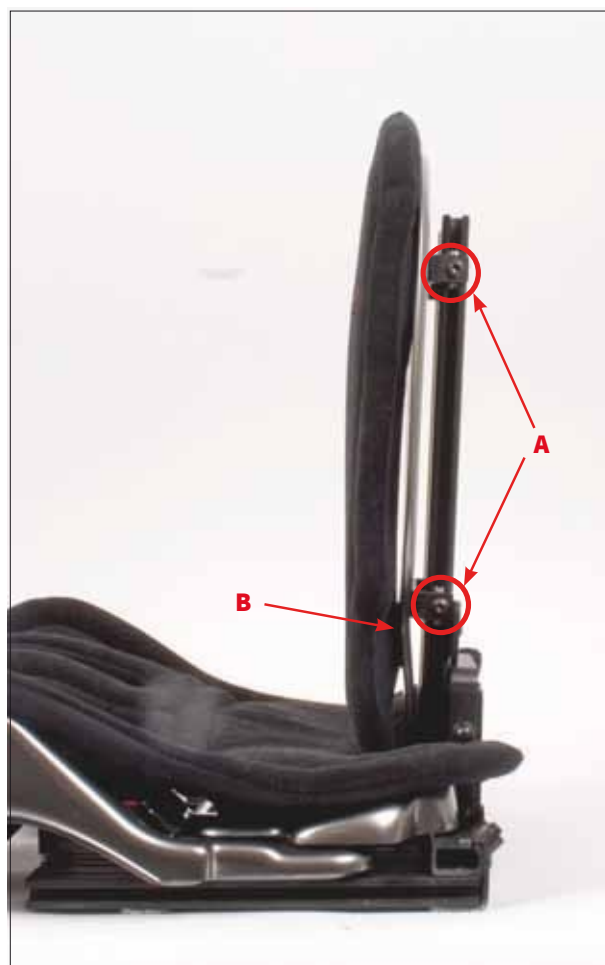

6:1 Selkänojan korkeuden säätäminen



= Säätöpultit



- Löysää pultteja (A) rungon kummaltakin puolelta (2 kummallakin puolella).
- Säädä haluttu korkeus.
- Kiristä pultit.

Aseta selkänoja niin, että voit hyödyntää integroitua lannetukea!

7:1 Säädettävä selkänoja



Rintapehmusteiden kiinnitys

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| A - Rintalevy | D - Pultti |
| B - Prikka | E - Väli |
| C - Nuppi | F - Erikoisvahva kannatin |
| | G - Selkänoja |

Kiinnitä osat seuraavassa järjestyksessä:

- Aseta osa F A:han.
- Työnnä D:n läpi E:hen.
- Vedä selkärengin uran läpi.
- Aseta prikka paikalleen ja laita sen päälle nuppi.
- Kiinnitä kankaat/pehmusteet ja lukitse nuppi.




Säädöt

Löysää nuppeja (2 kummallakin puolella, Yht. 4 kpl) ja siirrä selkänoja haluttuun kohtaan. Kiristä nupit, kun haluttu kohta on saavutettu.

Nupit



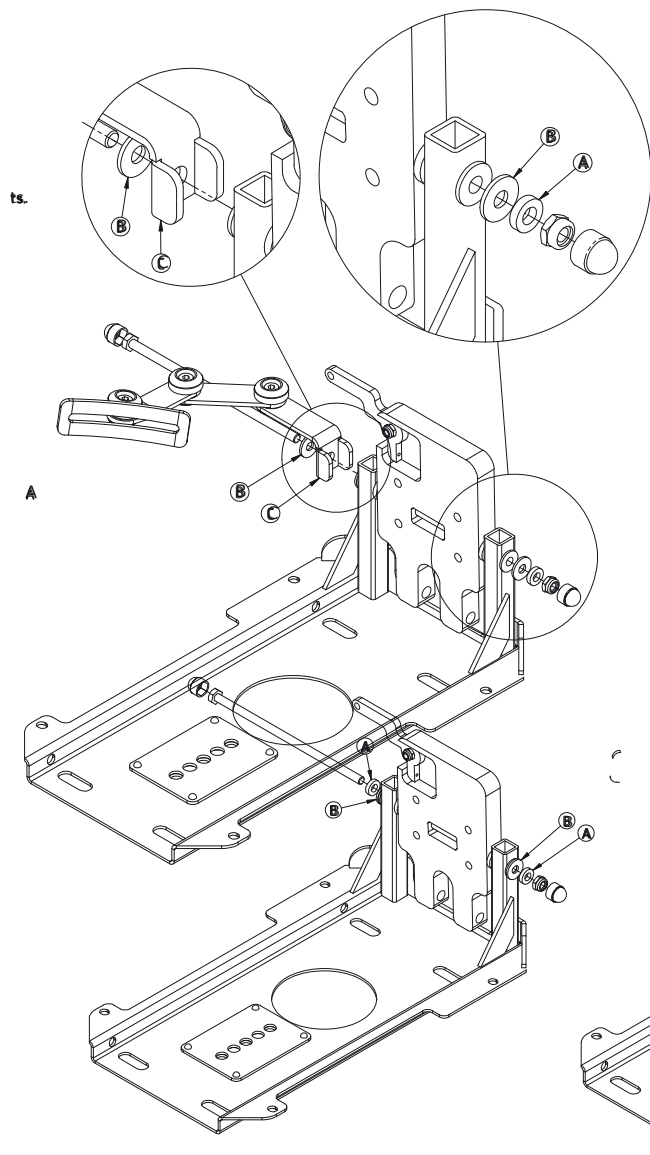


8:1 Lantiotuki

Irrota pitkä ruuvi ja vedä se ulos.

Poista paksu aluslevy (A) - lantiotuki (C) menee paikoilleen.

Aluslevyt (B) tulee asentaa lantiotuen (C) ulkopuolelle.

Laita ruuvi takaisin paikoilleen.

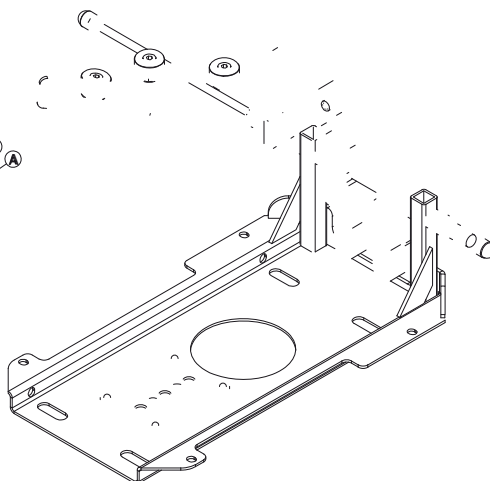

8:2 Lantiovyö

○ = Säätöpultit



A - Säättääksesi lantiovyötä löysää pulitti A. Sääda kannatin ja kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pulitti A.



A

9:1 Ylävöiden kiinnitys

○ = Säätepultit



Kiinnitys, ylempi kiinnityskannatin - A

Aloita irrottamalla rungon yläosaan kiinnitetty kuusiokoloavain. Työnnä seuraavaksi ylemmät kiinnityskannattimet haluttuun kohtaan rungon uralla.

Then push the upper mounting brackets to desired
& +7 8+&*

Ylempien kiinnityskannattimien säädöt

Löysää pultteja ja tee halutut säädöt. Ylempien kiinnityskannattimien korkeus tulisi säätää niin, että ne asettuvat hieman hartiatason yläpuolelle. Kiristä pultit.


Remmin kiinnitys

Vedä remmi uran läpi solkeen. Käytä mukana tulevia Triglode-solkia E.

Mikäli pään tuen kannatin on irrotettu paikaltaan, muista asettaa se paikoilleen ennen remmien kiinnitystä.

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen

Löysää ylemmän kiinnityskannattimen pulttia ja säädä haluttu korkeus. Kiristä pultti. Säädä kulma haluttuun asentoon ja kiristä pultti.

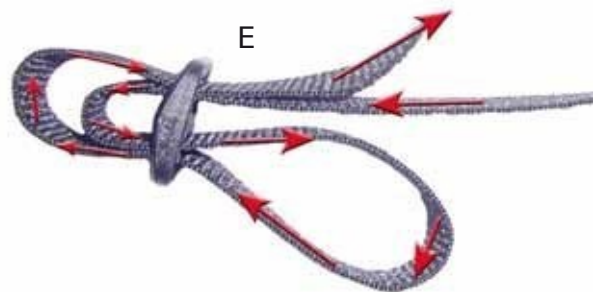

Varmista seuraavat asiat :

- * niskalle on tarpeeksi tilaa
- * pehmusteet ovat oikeissa paikoissa
- * paine on oikea.

(A) Ylä-kiinnike



(B) Alakiinnike



10:1 Käsinoja

Kiinnittäessäsi käsinojaa, vedä käsinoja tuolin sivussa olevaan kannattimeen. Kiristä pultti.


Leveyden säätö – A: Löysää pulttia A ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti.

Syvyyden säätö – B: Löysää pulttia B ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti.

Korkeuden säätö, käsinojan levy – C: Löysää nuppia ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä nuppi.

Kulman säätö, käsinojan levy – D: Löysää nuppia ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä nuppi.

Pehmuste – E: Löysää tarrakiinnitystä vaihdon tai puhdistuksen yhteydessä.

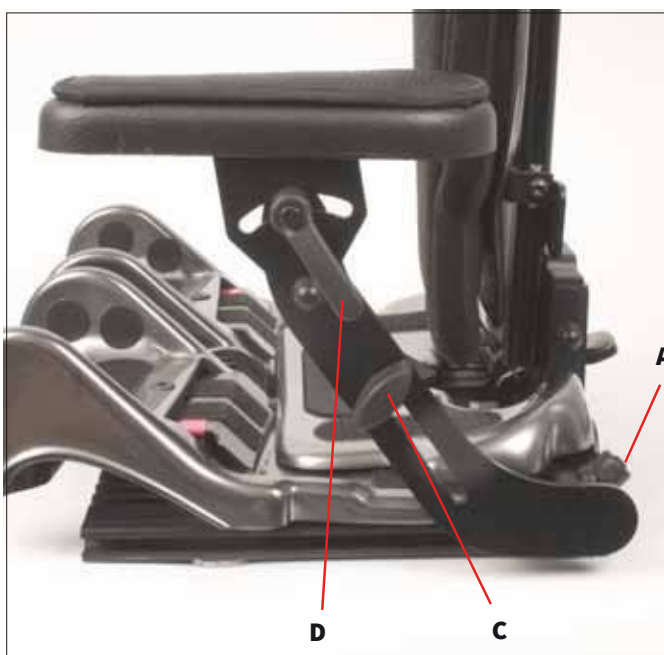

 = Säätöpulttit 

11:1 Olkavarren tuki

Asentaminen

- * Irrota ruuvit (A) ja vaihda niiden tilalle kaksi pidempää ruuvia.
- * Käytä lukitus priikkaa ja asenna ne pidemmillä ruuveilla.
- * Asenna olkavarsi tuki käsinojan tukeen asettamalla olkavarsi tuki käsinoja levyn ja tuen väliin.
- * Kiristä ruuvit (A) hyvin.

Korkeus säätö

- * Löysää nuppi (B) ja säädä haluttu korkeus.
- * Kiristä nuppi.

Kulman säätö

- * Löysää ruuvi (C) ja säädä haluttuun kulmaan.
- * Kiristä ruuvi (C) hyvin.

HUOMIO! Olkavarren tukirauta on muotoiltu oikealle ja vasemmalle.



11:2 Pöytä

Aseta pöytä käsinojen päälle, työnnä pöydän kannattimet alas ja käännä pöytä käsinojan levyn alle. Pöydän kiinnityskannattimia tulisi työntää niin, että pöytä mahtuu käsinojan levyn alle.

Käytettäviä kiinnitys vaihtoehtoja on 3, riippuen selkänojan ja käsinojen leveydestä. Pöydässä on sovitin asennettuna keskimmäiseen reikään.



Aseta pöytä käsinojen levyjen alle niin, että pöydän takaosa on kiinni käsinojen takaosassa.



Työnnä pöytää alas niin, että tanko kääntyy esteettä ja käännä tanko käsinojan levyn alle.



Työnnä tankoa niin pitkään että se lukittuu paikalleen, minkä jälkeen päästä irti tangosta.





12:1 Jalkatuki

Polvinivelen säätäminen - A

Löysää nuppia (A) ja säädä haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.

Tärkeää - Hammasrattaiden täytyy osua limittäin toistensa kanssa. Kiristä pultti hyvin!

Korkeuden säätäminen, jalkalevy - B

Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.

Kulman säätäminen, jalkanivel - C

Löysää nuppia (C) ja säädä haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä nuppi.



○ = Säätöpultit





Polvinivelen säätäminen - A

Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti, kun haluttu asento on saavutettu.

Tärkeää - Hammasrattaiden täytyy osua limittäin toistensa kanssa. Kiristä pultti kunnolla!

Korkeuden säätäminen - B

Löysää pulttia (B) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti, kun haluttu asento on saavutettu.


Kulman säätäminen, jalkanivel - C

Löysää pultti (C) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä pultti kun haluttu asento on saavutettu.



(A) Kiinnitys, jalkatuki

(B) Kulmansäätönuppi, polvinivel

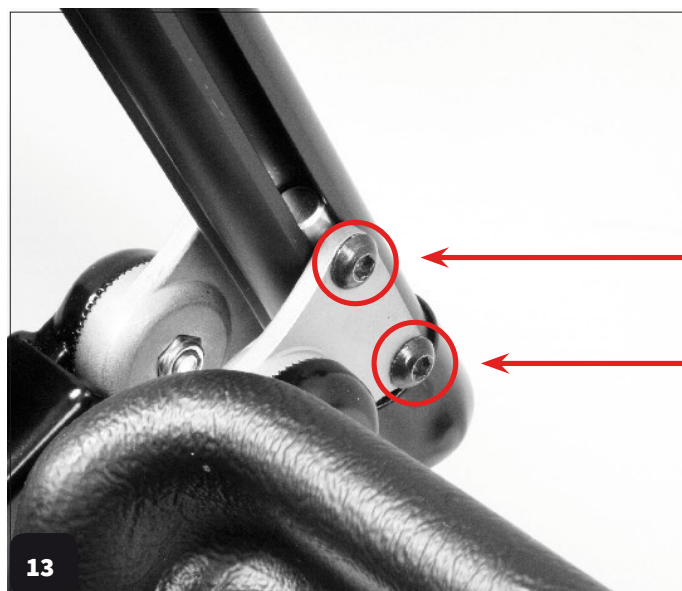

(C) Ruuvi

(D) Ruuvi

14:1 Säädettyä jalkatuki

Kulman säädöt, polvinivel - A

Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Korkeuden säädöt, jalkalevy - B

Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Kulman säädöt, jalkanivel - C


Löysää pulttia (C) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Jalkalevyn säätäminen - D

Jalkalevyjen korkeus ja syvyys ovat säädettävissä.
Löysää pultteja (D) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.



Jalkatuen kiinnitys

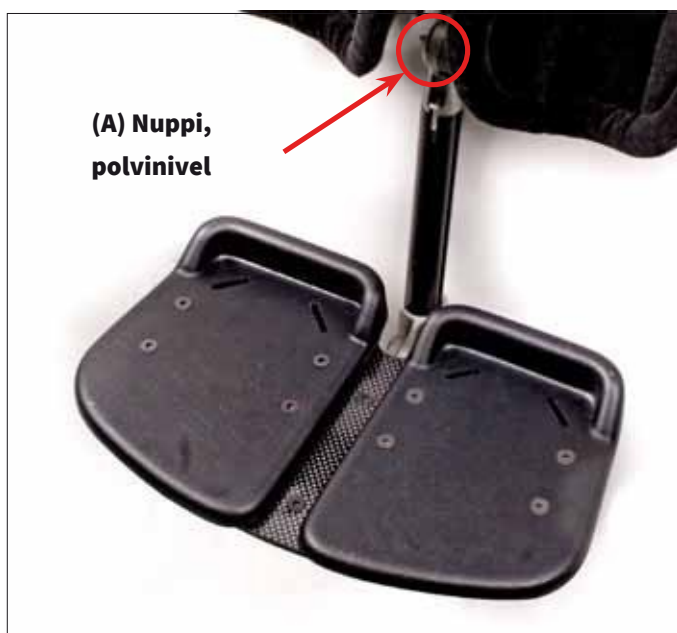

(A) Nuppi,
polvinivel



○ = Säätepultit



(D) Jalkalevyn säätäminen

(C) Kulman säädöt, jalkanivel

(B) Korkeussäädöt, jalkalevy

15:1 Jaettu ja säädettävä jalkatuki

Kulman säädöt, polvinivel – A

Löysää pulttia (A) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Korkeuden säädöt, jalkalevy – B

Löysää nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Kulman säädöt, jalkanivel – C

Löysää pulttia (C) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultti.

Jalkalevyn säätäminen – D

Jalkalevyjen korkeus ja syvyys ovat säädettävissä.
Löysää pultteja (D) ja säädä haluttuun asentoon.
Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.



Footrest attachment

○ = Säätöpultti



(D) Jalkalevyn säätäminen

(C) Kulman säädöt, jalkanivel

(B) Korkeussäädöt, jalkalevy



16:1 Jalkalauta- Ylöskääntäytyvä

Jalkalaudan asennus - A


Asenna jalkalauta työntämällä se jalkalaudan kiinnitykseen
Lukitse ruuvi kunnolla asennuksen jälkeen.

Kulmasäädöt, polvinivel - B

- * Löysää nuppia (B)
- * Sääda haluttu kulma
- * Kiristä nuppi

Korkeus säädöt, jalkalevy - C

- * Löysää nuppia (C)
- * Sääda haluttu korkeus
- * Kiristä nuppi (C)

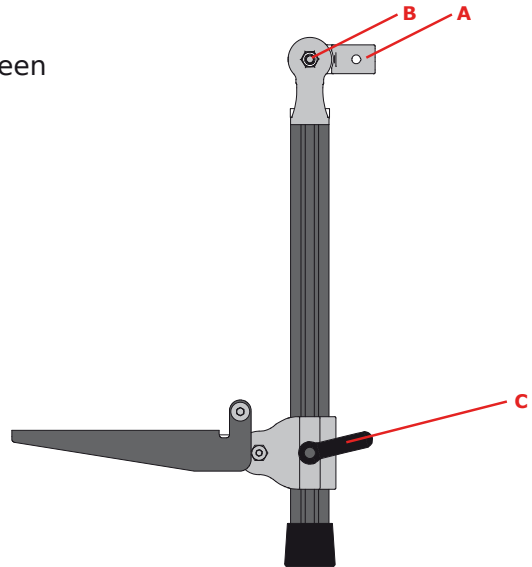

16:2 Jalkatuki – pallonivel kiinnitys

Korkeus säätö, jalkalauta (A):


- Löysää ruuvit (A)
- Sääda haluttu korkeus
- Kiristä ruuvit

Syvyys säätö, jalkalauta (B):

- Löysää ruuvit (B)
- Sääda haluttu syvyys
- Kiristä ruuvit (B)

Kulman säätö (C):

- Löysää ruuveja (C) tarpeeksi säätääksesi niitä käsin.
- Sääda haluttu kulma
- Kiristä ruuvit.

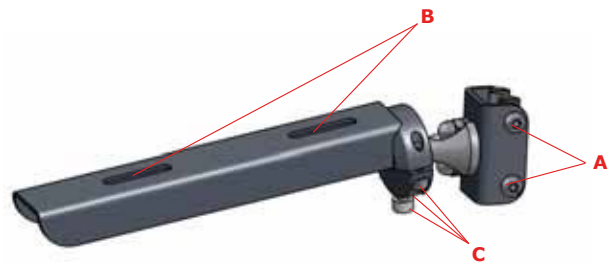

16:3 Jalkalauta – Joustava jalkalaudan liitin

Joustava jalkalauta

Zitzi Delfi Pro voidaan varustaa joustavalla jalkalauta liittimellä estämään lihasjännitystä ja dynaamisen istuma asennon saavuttamiseksi.

Jalkalaudan asennus


Irrota päälyssuoja (profiili) ja asenna jalkalauta.

Joustava (C)

Täyden joustavuuden saavuttamiseksi, ruuvi (B) tulisi sijoittaa alimmaksi.

Korkeus säätö

Löysää ruuveja (C) ja sääda haluttu kulma.
Kun haluttu kulma on saatu, kiristä ruuvi.

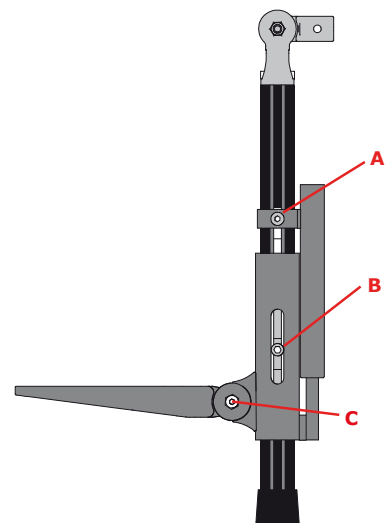

Parhaan mahdollisen jouston saavuttamiseksi, jalkalaudan tuen pitää osoittaa alaspäin.



17:1 Pohjetuki

 = Säätopultit



A1 - Irrota päädyssä oleva kumiosa.

A2 - Löysää pultit ja irrota jalkatuki.

B1 - Työnnä pohjetuki jalkatuen pidikkeeseen.

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.

C1 - Säättääksesi leveyttä käytä pulttia (C).

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä pultit.



17:2 Nilkkapidike

Nilkkapidike

Kiinnitä nilkkapidike jalkalevyssä valmiina oleviin aukkoihin (A). Kiinnitä nilkkapidike jalkanivelen ympärille niin, että avoin osa osoittaa eteenpäin ja kiristä tarranauha. Tämän jälkeen säädä nilkkapidikkeen korkeus jalan molemmin puolin olevilla soljilla.



Varmista, että pehmusteet ovat oikeissa paikoissa!



17:3 Lantio tuki


A) Irrota selkäosan vuori

B) Kiinnitä lantiotuki (merkityn alueen sisälle) mukana olevalla tarranauhalla

c) Laita selkäosan vuori takaisin.



Lantio tuki

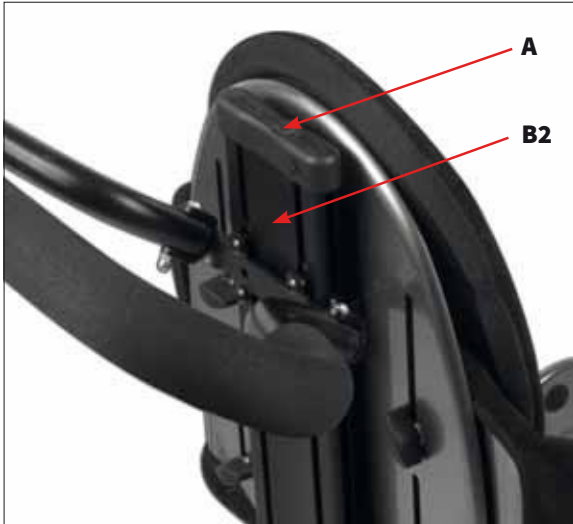


18:1 Työntökaari

Irrota kuusiokoloavain selkäosan yläosasta

Asenna tapit (B) selkäosan uriin (B2)

Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvit.

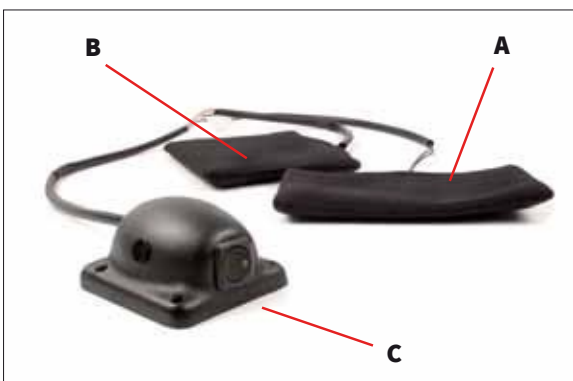

18:2 Lämmityslaite

- A) Istuinlevy
- B) Selkälevy
- C) Akku ja käsiohjain

* Lämmityslaite on kiinnitetty vuoreen tarranauhalla.

Lämmityslaite pitää kehon lämpötilan tasaisena ja estää potilaan kylmettymisen.

Kun normaali kehon lämpötila on saavutettu, lämmityslaite menee automaattisesti pois päältä.

Mikäli potilaan kehon lämpötila laskee, lämmityslaite kytkeytyy taas automaattisesti päälle.

 = Säätöpulttit**A - Päätuken kannattimen kiinnitys**

Aloita irrottamalla rungon yläosaan kiinnitetty kuusiokoloavain.

Työnnä päätuken kannatin haluttuun kohtaan rungon uralla. Kiristä pultit!

B - Kiinnitä päätuki kannattimeen ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä nuppi.

C - Päätuken säätäminen


Löysää säätöpultteja niin, että voit tehdä säädöt helposti käsin. Kiristä pultit (C), kun haluttu asento on saavutettu.

Jos päätuken pitää olla korkeammalla, löysää nuppia (B), säädä päätuki halutulle korkeudelle ja kiristä nuppi (B).



(B) Korkeudensäätönuppi


(A) Päätuken kannatin,
4 pulttia tapeilla

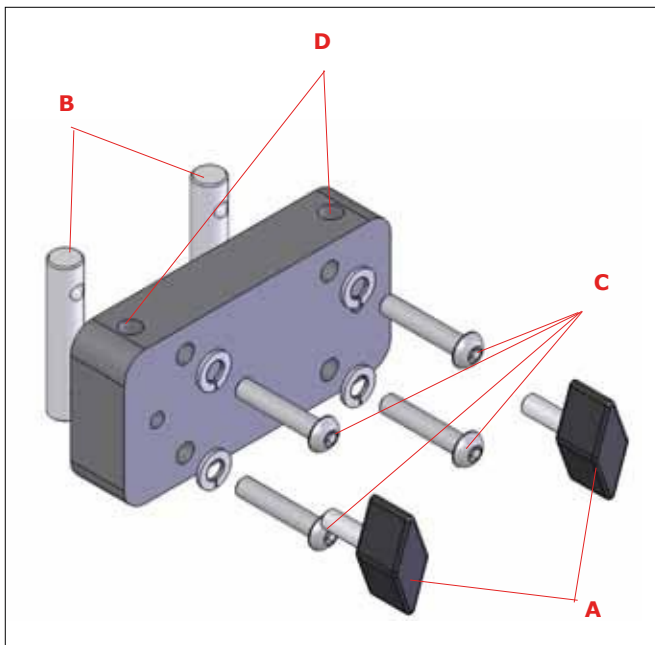

20:1 Leluripustin

Leluripustimen kannatin tulisi kiinnittää selkänojaan. Vaihda rungon takana yläosassa olevat päätysuojat leluripustimen mukana tulleisiin. Osat on porattu, jotta kiinnitys onnistuu helposti. Työnnä leluripustin runkoon selkänojan taakse (D). Lukitse leluripustimen kannatin runkoon (C). Työnnä leluripustinta alas ja lukitse käyttäen sorminuppia (A).

Kiinnittäessäsi päätukea tulisi päätuen kiinnitin liittää yhteen leluripustimen kannattimen kanssa. Käytä pidempiä ruuveja (B) ja jousiprikkaa!

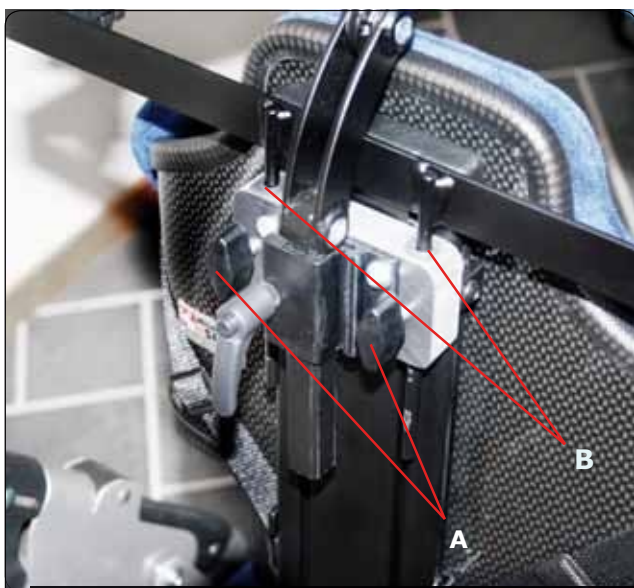


20:2 Aurinkosuoja

Aurinkosuoja tulee kiinnittää samaan kannattimeen leluripustimen kanssa. Näitä ei voi yhdistää. Kannattimen kiinnitys, ks. s. 10.

Päätuki tulee irrottaa ennen aurinkosuojan kiinnitystä. Päätuen irrotus, ks. s. 10.

Aurinkosuojan kiinnitys:

- Löysää nuppeja kummaltakin puolelta (A).
- Työnnä aurinkosuoja kannattimeen (B).
- Kiristä nupit (A).

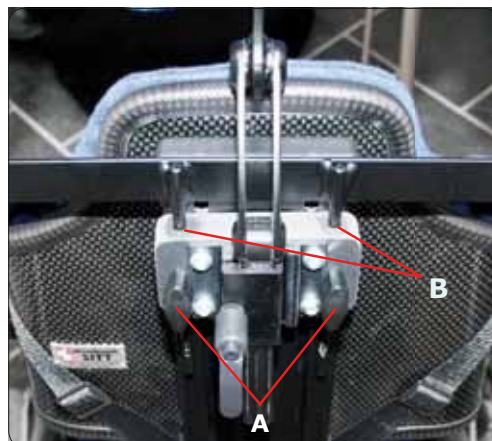


21:1**Kehikkoon kiinnittäminen****Kiinnityslevyllä**

Katso kuva oikealla.


Levy kiinnitetään neljällä pultilla.

Säädä levyn paikka syvyys suunnassa ja kiristä pultit.

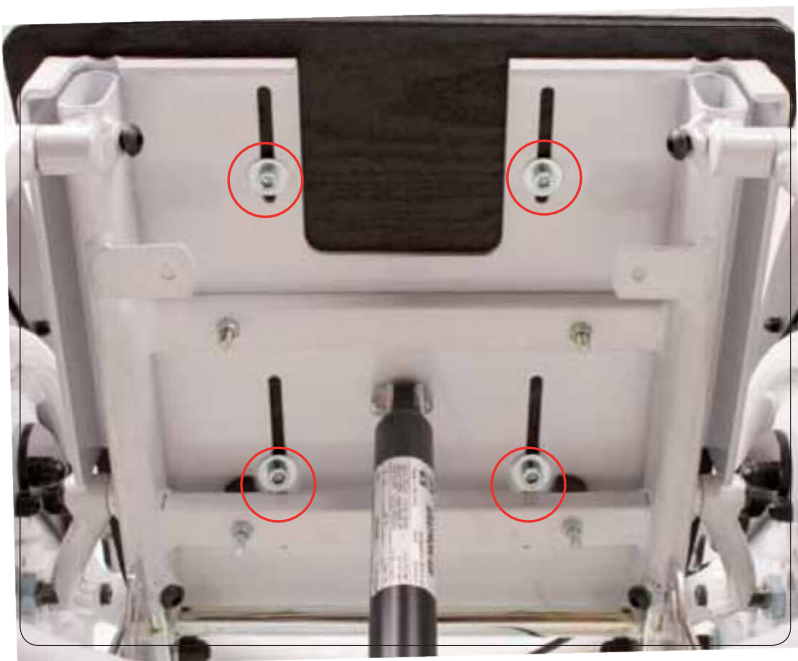

Istuinjärjestelmä voidaan kiinnittää helposti kehykseen kiinnityslevyllä. Kiinnityslevy on varustettu kahdella pultilla, jotka pitävät istuinjärjestelmän paikallaan. Kiinnityslevyn alapuolella oleva nuppi pitää huolen siitä, että istuinjärjestelmä pysyy oikeassa asennossa.

Työnnä istuinjärjestelmää kuvan mukaisesti. Työnnä, kunnes kuulet naksahduksen. Kiristä tämän jälkeen istuinlevyn alla oleva nuppi kiertämällä sitä myötäpäivään varmistaaksesi, että istuinjärjestelmä pysyy paikallaan.

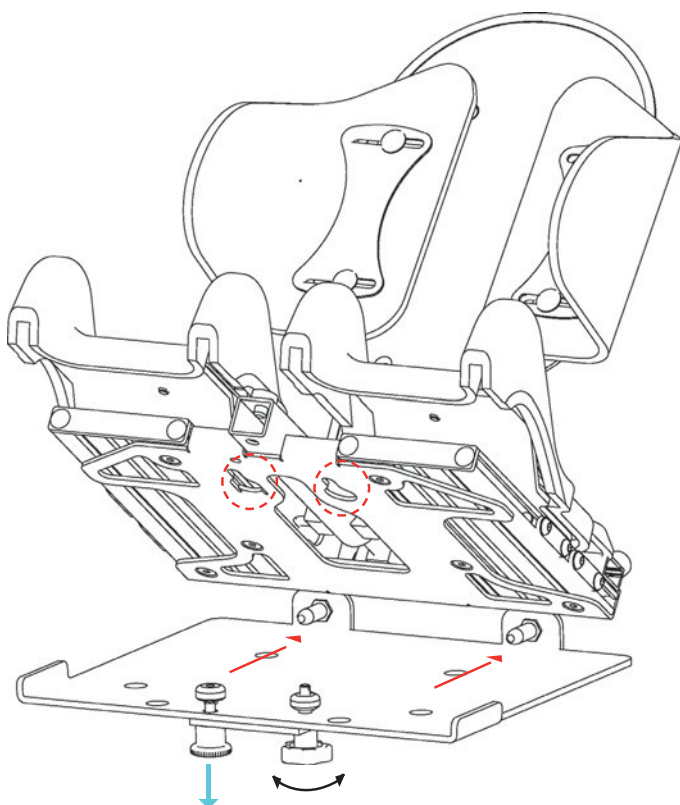**Reikäkuvio****Vetosuunta****Vedä alaspäin****Nuppi**



22:1

Kiinnityslevyt

- A) **Asennuslevy**
Runkoon asennusta varten
- B) **Asennus järjestelmä, yleismalli**
Istuin järjestelmään asennusta varten
- C) **Asennusjärjestelmä**
Sovitin levy ja asennus levy yhdessä
- D) **Asennusjärjestelmä ja "Panda" - liitin R82 alusta malleihin**

Huolto-ohjeet

HUOMIO! Tärkeää!

Revenneet osat

Yhteenveto ja jatkotarkistukset

23:1 Huolto

Pehmuste ja vyöpehmusteet: 60°, kylmäpesu. Älä käytä kuivausrumpua tai kuivauskaappia. Muovi- ja metalliosat: Pyyhi lika pois kostealla rätillä.

Kaasujousta tulisi käyttää säännöllisesti toiminnallisuuden ylläpitämiseksi. Kun tuotetta ei käytetä, jousi pitäisi aktivoida vähintään kerran kuudessa. Lisäksi tuotetta varastoitaessa, varmista että männänvarsi sijoitetaan osoittamaan alaspäin. Mikäli näin ei ole, kaasujousen tiiviste saattaa mennä rikki ja jousi ei toimi.

 **Tärkeää! Aktivoi kaasujousi säännöllisesti!**

Tarkista kaikki liikuteltavat osat repeämien varalta. Vaihda tarvittaessa.

HUOMIO! Tarkista kaasumännän toimivuus perusteellisesti.

Jos sinulla on kysyttävää mihin tahansa istuinjärjestelmän osaan liittyen, voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon valmistajaan tai tuotteen maahantuojaan.

Käytettyjen osien eri materiaalit tulisi erotella ja viedä kaatopaikalle.

Material type	Part
Metallia	Runko, jalkatuen, käsinojan ja istuinlevyn kannattimet, pään tuen kannatin.
Muovia	Istuin- ja selkäosa, pöytä, jalkalevy.
Tulenarkaa	Kangas, vuori, lantiovyö, remmit.

Suorita tuotteelle ohjeessa kuvaillut tarkistukset säännöllisesti.

- * Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.
- * Tarkista säännöllisesti remmit ja pehmusteet kulumien varalta.
- * Älä aseta lasta istuimeen ennen kuin kuulet naksahduksen kiinnittäessäsi tuolia aluskehikkoon.
- * Älä kallista tuolia liikaa eteenpäin lapsen istuessa tuolissa.

Yhdistelmät

Zitzi Delfi Pro on CE-merkitty tuote, jonka voi yhdistää minka tahansa tässä käyttöohjeessa mainitun lisäosan kanssa. Zitzi Delfi Pro sopii mm seuraaviin kehikkoihin: Zitzi Flipper Pro, Seabass Pro, Mika, Flizzy, Galileo, Zitzi Flipper, Leonardo ja Zitzi Wave. Muiden yhdistelmien osalta, ota yhteyttä maahantuojaan.

Varaosat

Vain Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia tulee käyttää.

Merkinnät

Zitzi Delfi Pro ja tässä käyttöohjeessa mainitut lisäosat ovat CE-merkittyjä tuotteita. Sarjanumero on sijoitettu selkäpehmusteen Sisällä olevaan muovilevyyn.

Takuu

Yhden vuoden takuu valmistusvirheille.

24:1

Tekniset tiedot

	"	#
Istuimen leveys (cm)	24, 27, 30	26, 29, 32
Istuimen syvyys (cm)	19-29	25-35
Jalkojen pituuden ero (cm)	10	10
Kainalokorkeus (cm)	24-32	27-39
Kainalosta selän yläosaan (cm)	2,5-7,5	2,5-9,5
Rinnan leveys (cm)	17-26	19,5-28,5
Rinnan syvyys (cm)	11	14
Kallistus (astetta)	-12/+26	-12/+28

rehaco.



Visiting address Stohagsgatan 26, 602 29 NORRKÖPING, SWEDEN
Postal address Box 6137, SE600 06 NORRKÖPING, Phone +46 (0)11-16 18 00, fax 011-16 20 05
www.anatomicsitt.com

