





ZITZI GUPPY

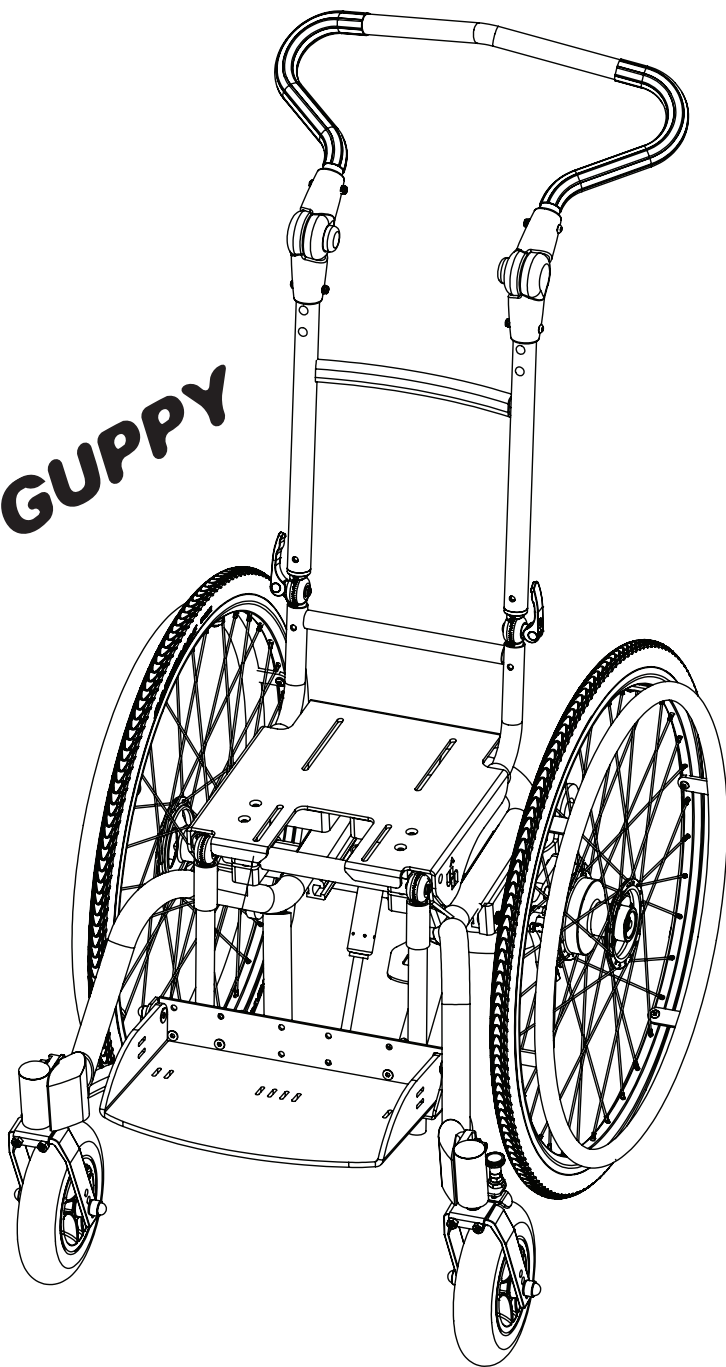

KÄYTTÖOHJE

Zitzi Guppy

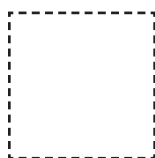

Huom!

Yllä oleva ruutu tulee ruksata, mikäli tuotteeseen on tehty yksilöllisiä muutoksia.

CE-merkintä ei tällöin ole enää voimassa ja tulee poistaa.



Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan alustarunkona yhdessä Anatomic Sitt AB:n toimittamien istuinjärjestelmien kanssa.
Mikäli muunlaiset käytöt ovat tarpeen, kääntykää Anatomic SITT AB:n puoleen.

Turvallisuus

Johdanto

Zitzi Guppyn kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä käyttöohje huolellisesti. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän läheisyydessä. Zitzi Guppyn säätäminen tulee aina tapahtua sellaisen henkilön toimesta, joka on perehtynyt lääkinällisiin laitteisiin. Mikäli tarvitsette lisätietoja, kääntykää maahantuojaan tai Anatomic SITT AB:n puoleen.

Käyttöympäristö

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kuljetusalustana Anatomic SITT AB:n valmistamien istuimien kanssa. Jos on tarvetta muunlaiseen käyttöön, ota ystävällisesti yhteyttä Anatomic SITT AB.

Yhteydenpito

Zitzi Guppy lisävarusteineen ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Laitekohtainen sarjanumero sijaitsee rungon alaosassa olevassa etiketissä. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Zitzi Guppy on törmäystestattu ja hyväksytty standardin 7176-19 mukaisesti 70 kg:n painolla ajoneuvossa.



Huom!

Tuotteen määrännyt henkilö tai vastaava henkilö, jolla on tarvittava pätevyys ja tiedot välineestä ja käyttäjästä, suorittaa aina riskinarvioinnin ennen käyttöä.

Mikäli tässä analyysissä ilmenee, että saattaa olla olemassa vakavan loukkaantumisen riski, ei käyttäjää milloinkaan saa jättää ilman valvontaa hänen käyttäessään Guppyä.

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic SITT AB

Postiosoite Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

Käyntiosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping

Puhelin 011-161800

Fax 011-162005

Sähköposti info@anatomicsitt.com

Verkkosivut anatomicsitt.com

Opastusvideoita youtube.com/anatomicsitt

Seuraa meitä facebook.com/anatomicsitt

Sisällysluettelo

Turvallisuus.....	3	Jarru.....	16
Johdanto	3	Rumpujarru	16
Istuinosa.....	6	Jarrujen kytkeminen päälle	16
Kiinnityslevyn asentaminen.....	6	Jarrujen vapauttaminen.....	16
Istuimen kallistus	7	Jarrujen vianetsintä.....	16
Istuimen kallistus	7	Rumpujarrun asentaminen	18
Käsinoja.....	8	Pysäköintijarru.....	20
Asentaminen runkoon	8	Pysäköintijarrun asentaminen.....	20
Korkeussäätö.....	8	Pysäköintijarrun käyttäminen.....	20
Leveyssäätö	8	Jalkatuki.....	21
Kallistussäätö ylös- ja alaspäin	8	Jalkatuen asentaminen.....	21
Syvyyssäätö	8	Turvapidätin	21
Työntökaari	10	Polvinivelen kulman säätäminen.....	21
Työntökaaren asentaminen	10	Jalkatuen korkeussäätö.....	21
Työntökaaren syvyyssäätö.....	10	Jalkalevyn kiinnitysmekanismit	22
Työntökaaren kallistussäätö.....	10	Kiinteä.....	22
Työntökaaren kokoontaittaminen	10	Jousitettu jalkalevyn kiinnitin	22
Pikalukituspyörät	12	Ylöstaittuva jalkalevyn kiinnitin	22
Pikalukituspyörien asentaminen	12	Kuulaniveladapteri	22
Pyörän irrottaminen	12	Pohjetuki.....	24
Kelauspyörät	13	Pohjetuen asentaminen	24
Pyörän asema	13	Pohjetuen korkeussäätö.....	24
Tukipyörä	14	Pohjetuen leveyssäätö.....	24
Tukipyörän asentaminen.....	14	Kaatumaeste	25
Pyörän asentaminen pyöränhaarukkaan	14	Kaatumaesteen asentaminen	25
Tukipyörän sijoitus	14	Kaatumaesteen käyttäminen.....	25
Tukipyörän haarukan asento.....	15	Kippauspoljin	26
Tukipyörän kulmansäätö.....	15	Kippauspolkimen asentaminen	26
		Kippauspolkimen käyttäminen.....	27

Kiinnityssrj kuljetukseen ajoneuvoissa 27

Etukannattimen asentaminen	27
Takakannattimen asentaminen	27
Turvasilmukan asentaminen.....	27
Kiinnityssarjan käyttäminen	27

Suuntalukko28

Suuntalukon asentaminen.....	28
Suuntalukon kytkeminen päälle	28
Suuntalukon vapauttaminen.....	28

Kurasuojat..... 30

Kurasuojien asentaminen	30
Kurasuojan säätäminen	30

Kuljettaminen ajoneuvossa31

Ohjeita autossa kuljettamista varten .	31
Törmäystestattu ja hyväksytty	31

Kunnossapito-ohjeet.....32

Huoltovälit.....	32
Puhdistus- ja pesuohjeet	32
Kaasujousi.....	32
Takuu	33
Yhdistelmät	33
Varaosat.....	33
Merkinnät	33
Kierrättäminen.....	33

Kunnostaminen.....34

Huolto	34
Puhdistaminen.....	34
Viimeistely	34
Merkinnät	34
Pyörät.....	34
Maalipinta.....	34
Tukevuus.....	35
Putkirunko ja liitokset	35
Haarukat	35
Työntötanko ja työntökahva	35
Jarrut.....	35
Taittomekanismi ja kallistus.....	35
Toiminnan tarkastus.....	35

Mukauttaminen ja Yksilölliset muutostyöt.36

Ohjeita ja suosituksia.....	36
Sallitut muutostyöt	36
Riskinarviointi.....	36
Merkinnät	36

Myyntiehdot37

Takuu	37
Takuuvaatimukset	37
Tuotteiden palauttaminen	37

Tekniset tiedot38

Istuinosa


Kiinnityslevyn asentaminen

Istuinjärjestelmän kiinnityslevy on helppo asentaa alustalle neljällä (4) ruuvilla, prikalla ja mutterilla valittuihin uriin (A) alustan istuinlevyssä.

Aseta istuinjärjestelmän kiinnityslevy (B) alustan istuinlevyn (C) päälle ja työnnä mukana toimitettu ruuvi (D) levyn läpi. Kiinnitä sitten mutterilla ja prikalla (F) alustan istuinlevyn alapuolelta. Kiristä ruuvit (D) tiukkaan.



Huom! Kuvassa esitetään vain yhden kiinnityslevytyypin asennusohjeet. Lisätietoja kiinnityslevyistä on saatavissa valitun istuinjärjestelmän käyttöohjeista.

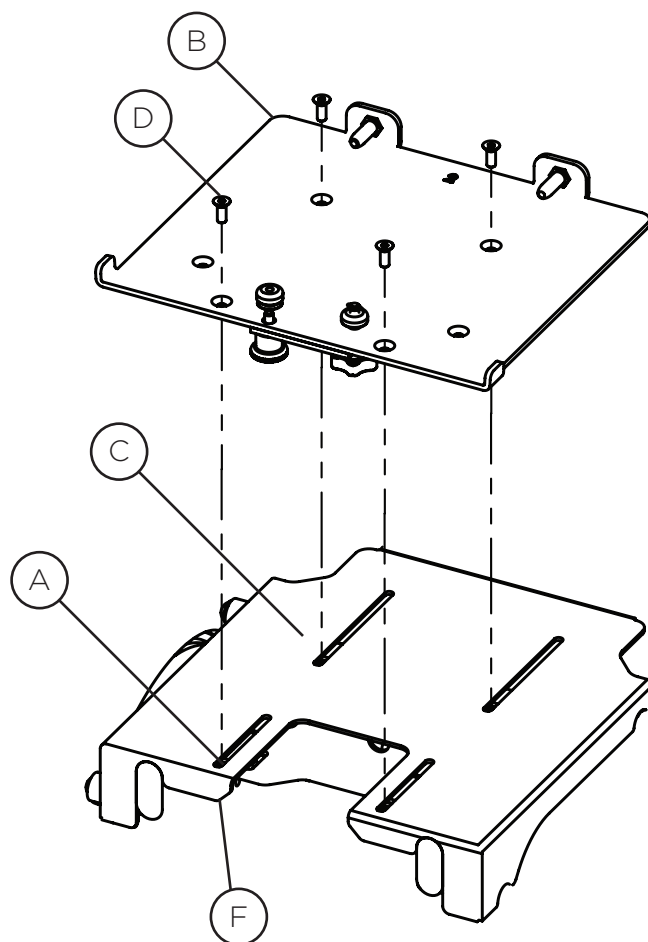

Istuimen kallistus

Istuimen kallistus

Istuinlevyn kallistuskulmaa voidaan säätää välillä 0-32°. Paina kallistusvipua (A) samalla kahvasta kiinni pitäen ja sitä ylöspäin nostaen tai alaspäin työntäen. Kun istuin on halutussa asennossa, päästetään irti kallistusvivusta (A).



Kallistuskulman palauttamiseksi neutraaliin asentoonsa painetaan kallistusvipua (A) ja kahvaa työnnetään ylös- ja taaksepäin.



Huom! Istuinta kallistettaessa tulee varoa puristuksiin joutumista.



Huom! Huomioi kohonnut kaatumisriski kallistuksen aikana.

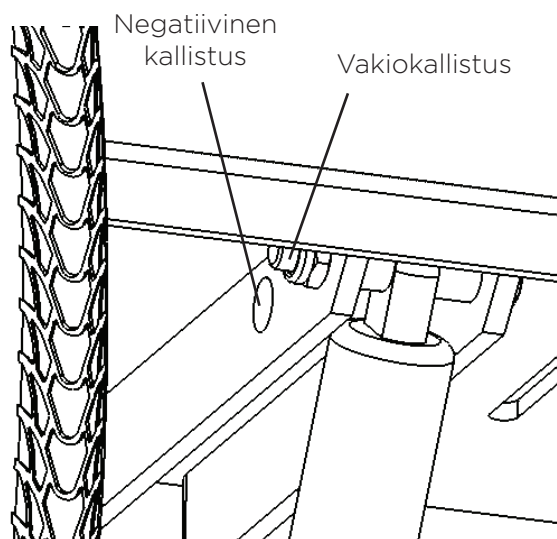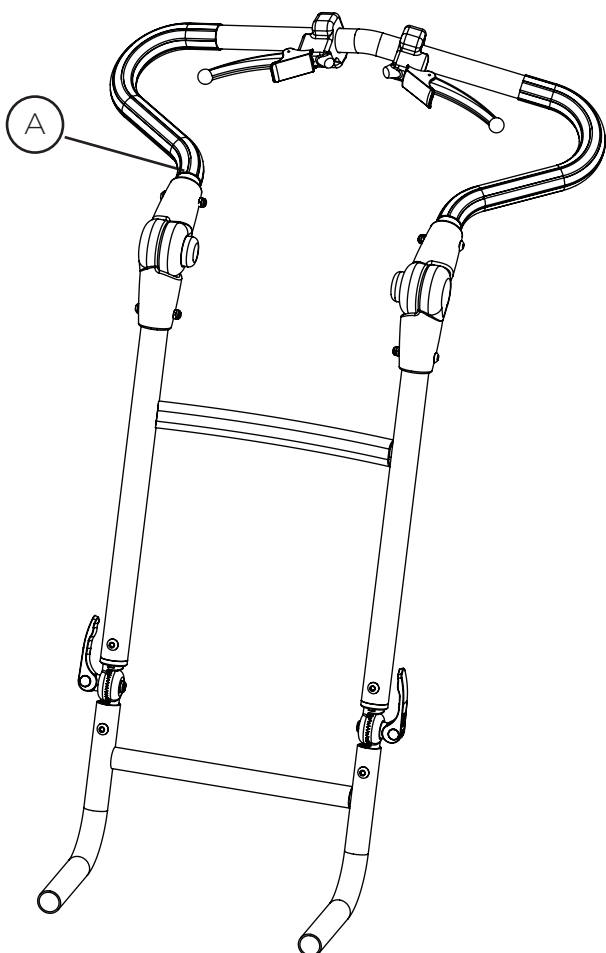

Käsinoja

Asentaminen runkoon

Avaa ruuvit (A) kokonaan kummallakin puolella. Asenna asennuskannatin kaaren päälle. Laita ruuvit (A) takaisin paikoilleen ja kiristä.

Korkeussäätö

Avaa ruuveja (A) ja säädä halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit.

Leveyssäätö



Avaa ruuveja (B) ja säädä haluttuun leveyteen. Kiristä ruuvit.

Kallistussäätö ylös- ja alaspäin

Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan säätövipua (C) ja suoritetaan säätö haluttuun kulmaan. Vastaavasti voidaan myös säätää käsinojien kannattimen kulmaa. Avaa ruuveja (A) ja säädä kulma kannattimessa olevan kolmen reiän (E) avulla.

Syvyyssäätö

Avaa käsinojan levyn alapuolella olevia ruuveja (D) ja säädä haluttuun kohtaan alapuolella olevien reikien avulla.

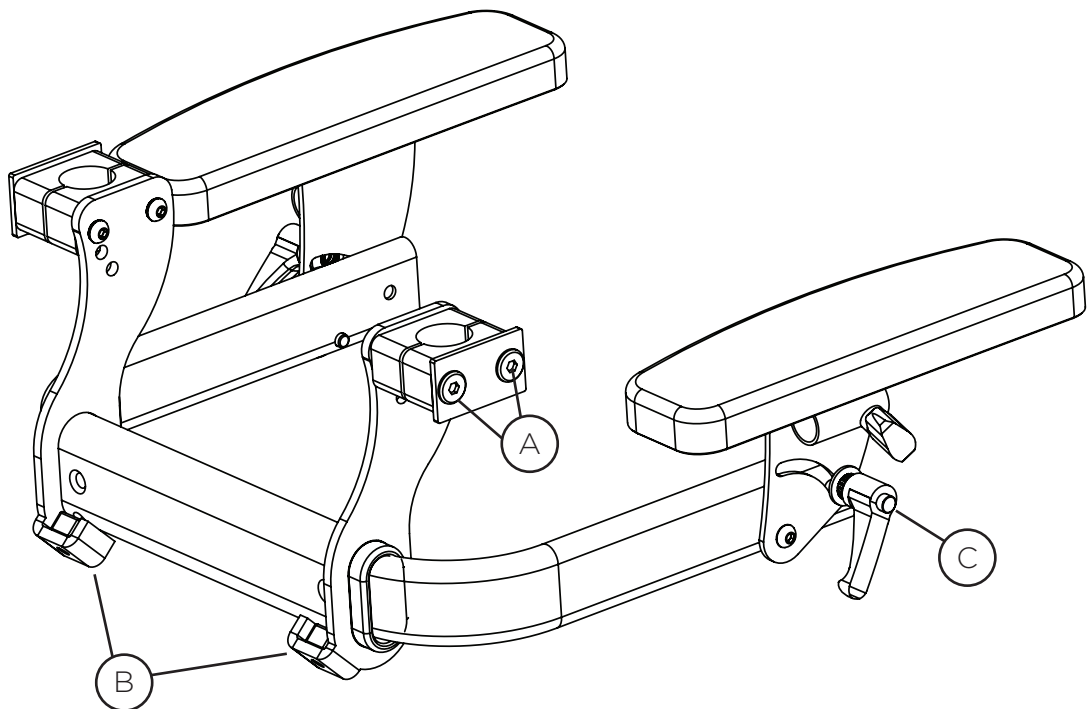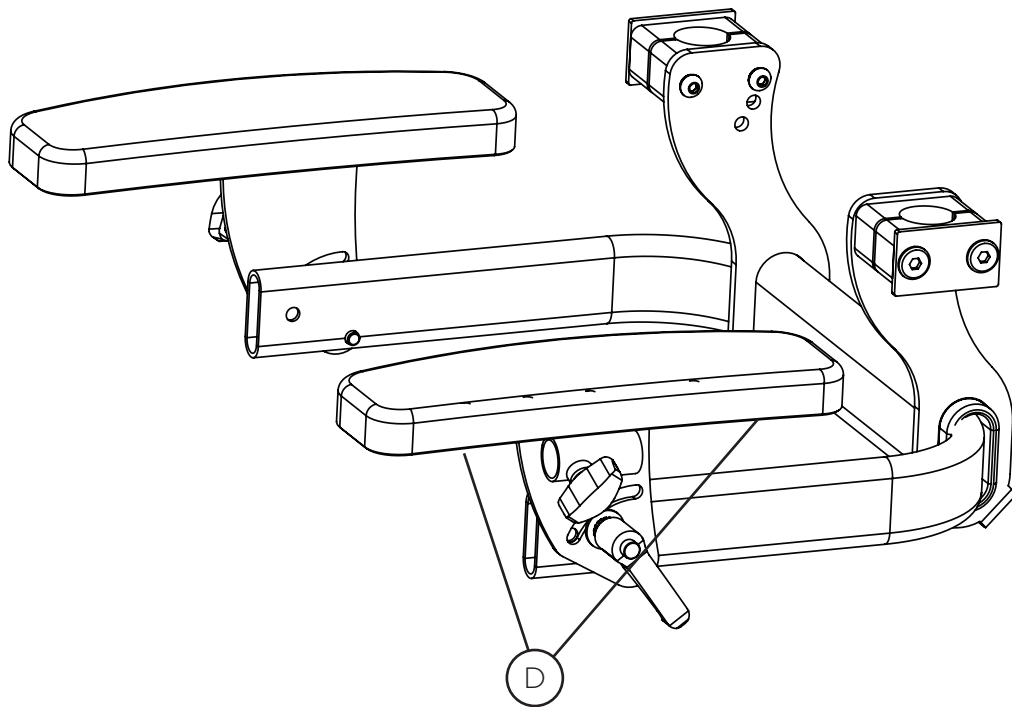

Työntökaari

Työntökaaren asentaminen

Työnnä työntökaaren alaosa (A) alustan takana istuinlevyn alla oleviin reikiin ja kiristä ruuvit (B). Valittavissa on neljä kiinteää asemaa.

Työntökaaren syvyysäättö

Työntökaaren säätämiseksi (suhteessa istuimeen nähden) avataan alustan takana istuinlevyn alla olevia ruuveja (B) ja säädetään haluttuun syvyyteen. Kiristä ruuvit (B)



Huomio! Ruuvien on mentävä yhteen neljästä työntökaarelle valittavissa olevasta kiinteästä asemasta.

Työntökaaren kallistussäätö

Kallistusta voidaan säätää käytettävästä istuinjärjestelmästä riippuen. Avaa säätövivut (C) molemmilta puolin. Sääda työntökaari haluttuun kulmaan ja kiristä säätövivut (C).



Huomio! Työntökaaren rungon tulee olla kosketuksissa istuimen selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.

Työntökahvan kallistussäätö


Paina työntökahvan sisäpuolella olevia painikkeita (D) ja suorita säätö.

Työntökaaren kokoontaittaminen

Avaa säätövivut (C) ja taita työntökaaren runkoa eteenpäin. Kiristä säätövivut (C).



HUOM! Älä ripusta laukkuja tai painavia esiteitä työntökaareen. Tämä yhdessä muiden tekijöiden kanssa, voi johtaa kuljetusalustan kaatumiseen taakse

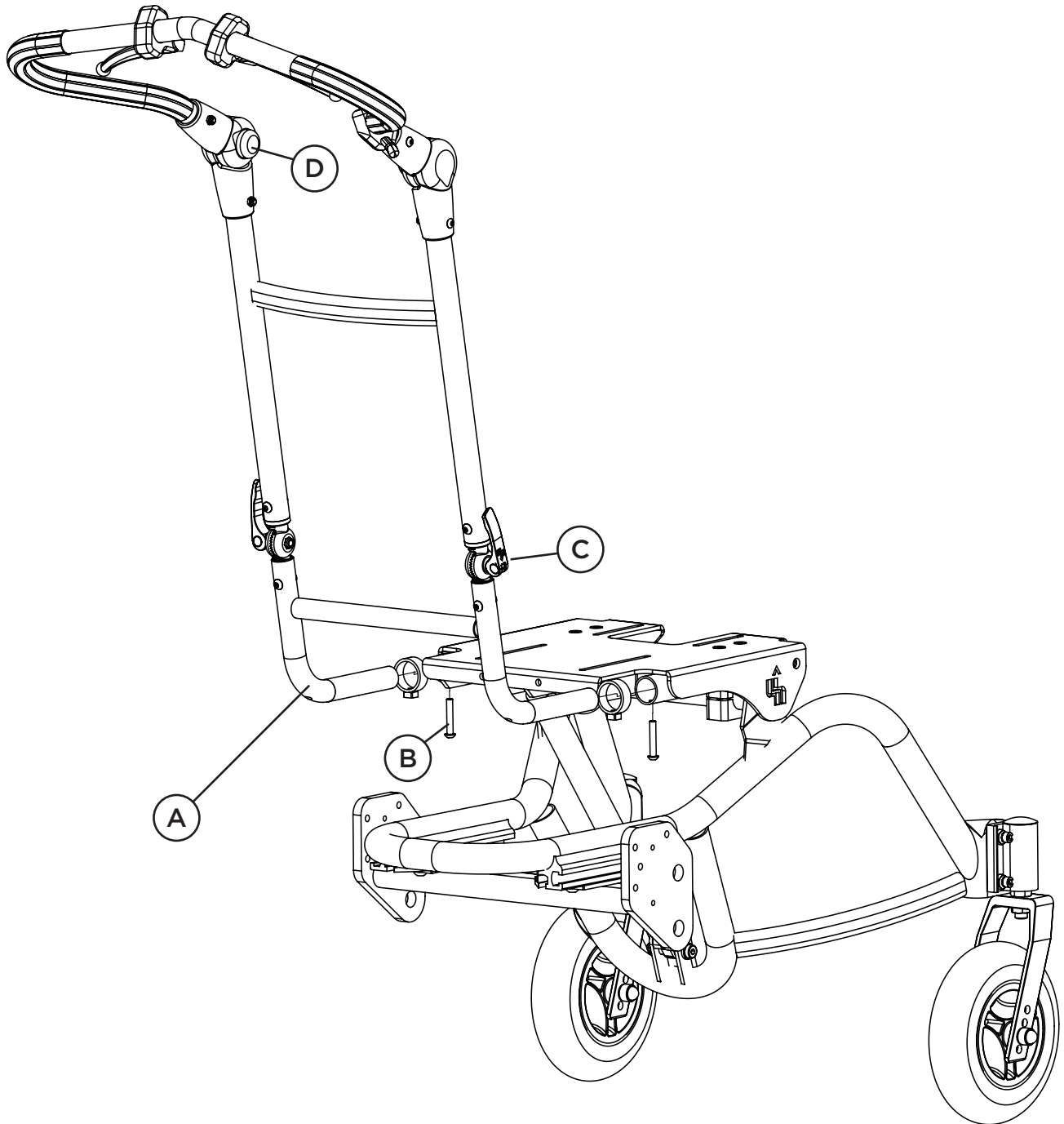

Pikalukituspyörät

Pikalukituspyörien asentaminen

Pyörät ovat helposti irrotettavissa alustasta, mikä voi olla hyödyllistä kuljetusta varten.


Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta (B) ja pidä se alaspainettuna. Paina pyörää, kunnes se ei mene enää pidemmälle. Vapauta painike (B). Varmista, että pyörä on kunnolla kiinni sitä ulospäin vetämällä pikalukituspainiketta (B) painamatta.



Huomio! Varmista, että pyörä on kunnolla kiinni yrittämällä vetää sitä ulospäin.

Pyörän irrottaminen

Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta (B) ja pidä se alaspainettuna samalla pyörää ulospäin alustasta vetäen.

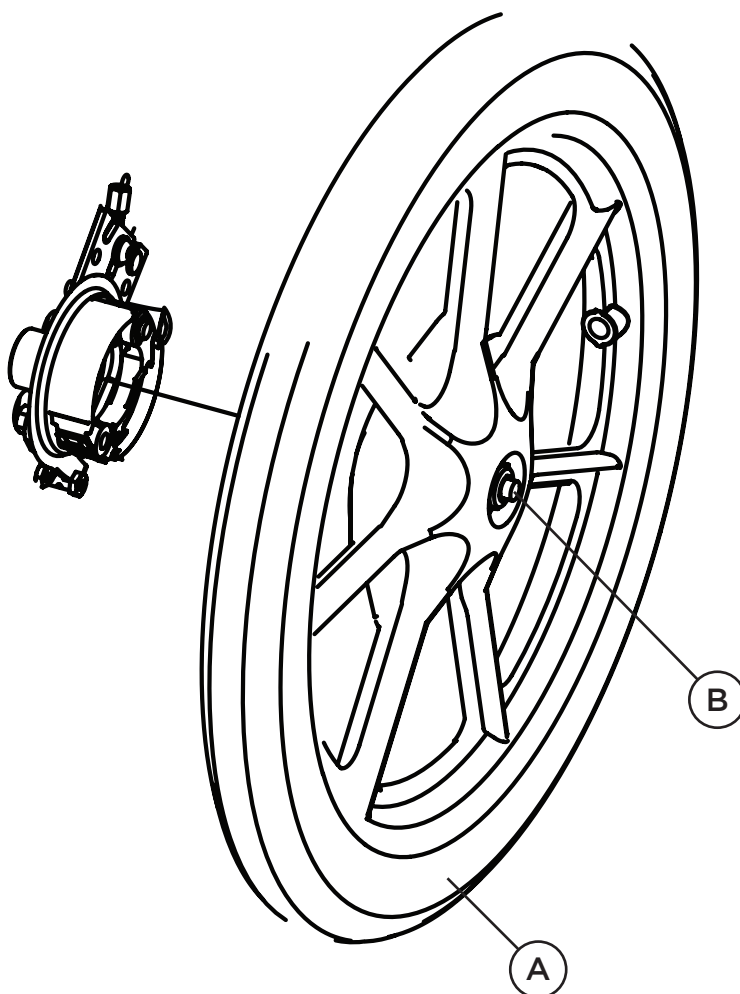

Kelauspyörät

Pyörän asema

Riippuen istuinjärjestelmän asemasta alustan istuinlevyllä on mahdollista säätää pyörän asemaa vaaka-akselilla painopisteen säilyttämiseksi ja vakauden parantamiseksi. Pyörän säätämiseksi oikeaan asemaan avataan neljä pyörän akselin alla sijaitsevaa ruuvia (A) ja suoritetaan säätö haluttuun kohtaan.

Varmista mittaamalla, että pyörän akseli on samalla kohdalla molemmilla puolella.

16" pyörät asennetaan reikiin B + C.

20", 22" ja 24" pyörät asennetaan reikiin D + E.


Pyörätuolin vakausominaisuuksia koskevia neuvoja ja apua on saatavissa jälleenmyyjältä.



Huomio! Että pyörän aseman muuttaminen saattaa lisätä kaatumisriskiä.



Huomio! Ruuveja ei tarvitse poistaa kokonaan. Riittää, että niitä hieman avataan.

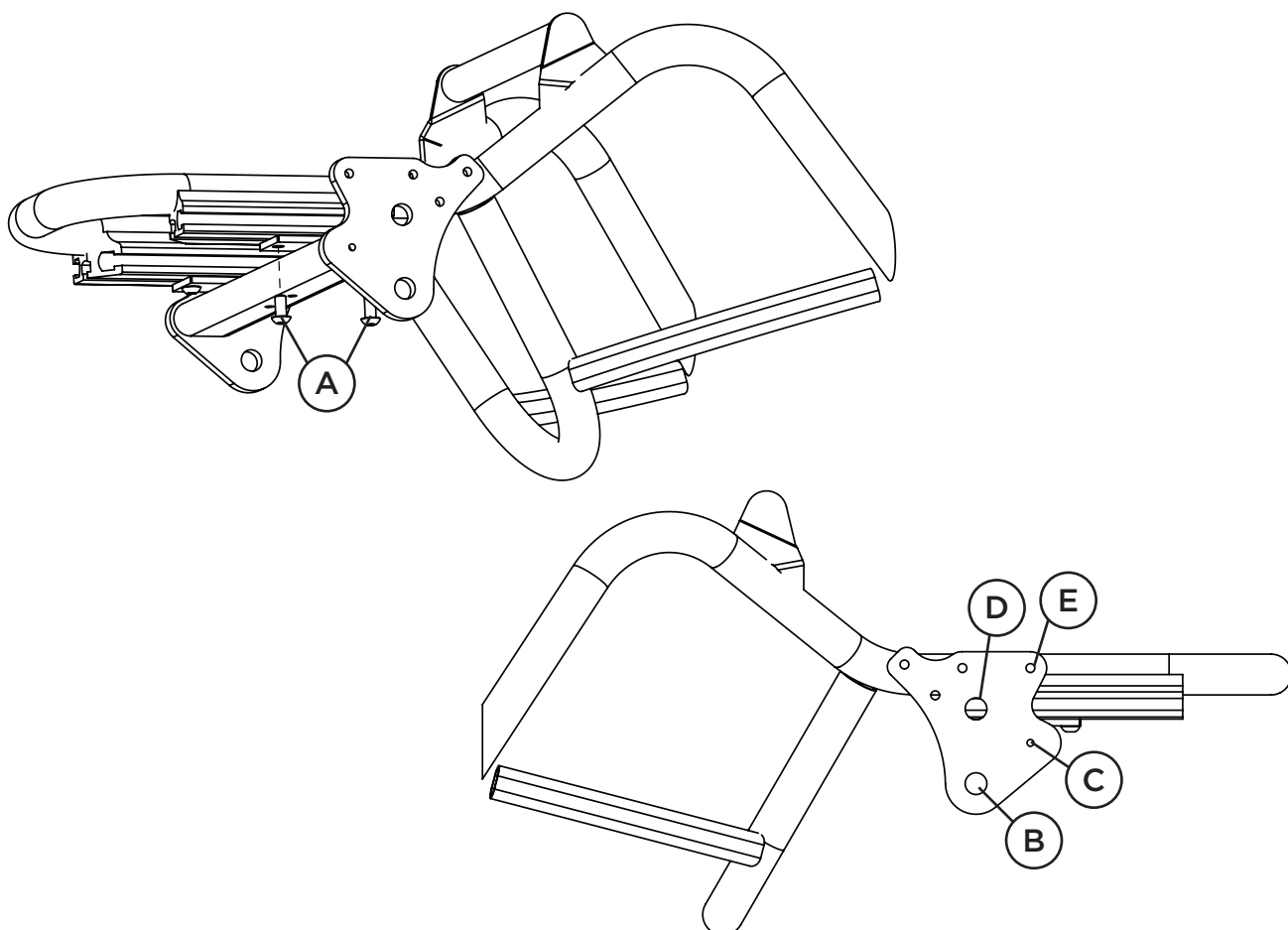

Tukipyörät

Tukipyörän asentaminen

Työnnä tappi (A) paikoilleen alustan alle kuvassa esitetyllä tavalla. Asenna sitten tukipyörän haakan runko (K) ruuvilla (B), prikalla (C) ja epäkeskomutterilla (D) ja kiristä

Pyörän asentaminen pyöränhaarukkaan

Asenna pyörä (F) johonkin viidestä mahdollisesta asemasta pyöränhaarukan runkoon (K), käyttäen mukana toimitettua akselia (G), prikkaa (H) ja lukkomutteria (I).


Aseta pyörä (F) pyöränhaarukkaan (K). Varusta akseli (G) prikalla (H) ja vie akseli jonkin viidestä reiästä ja edelleen pyörän läpi. Asenna toiselle puolelle prikka (H) ja lukkomutteri (I) ja kiristä. Laita lopuksi mutterin suojus (J) lukkomutterin päälle; ks. alla oleva kuva.

Tukipyörän sijoitus

Tukipyöriä voidaan säätää viidelle eri korkeudelle. Tämän avulla on mahdollista säätää tukipyörän korkeutta kelauspyörien aseman säätämisen jälkeen.



Huomio! Varmista, että ruuvit tulevat kunnolla kiristetyiksi säätämisen jälkeen.

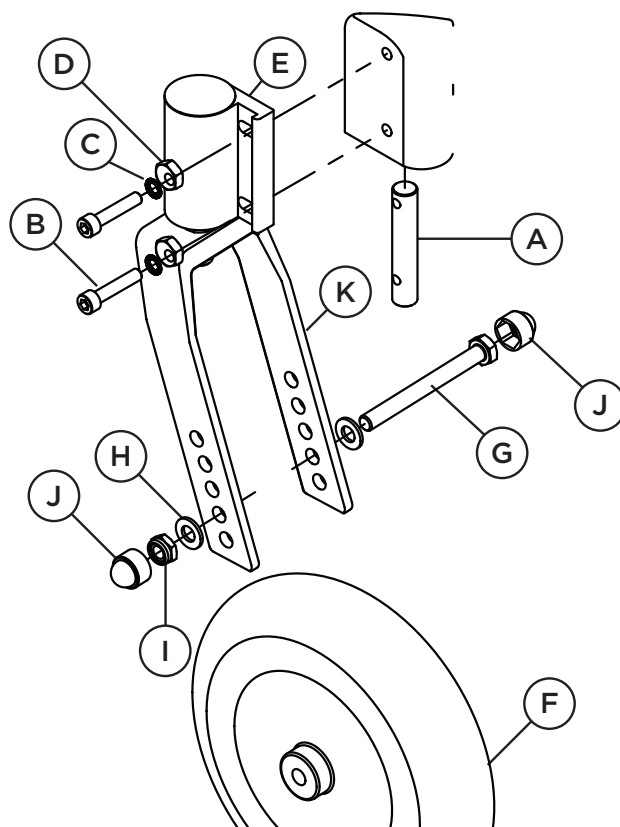

Tukipyörä

Tukipyörän haarukan asento

Tukipyörän haarukkaa (A) saatetaan joutua säätämään, mikäli pyörätuoli ei kulje moitteettomasti. Näin voi käydä, jos tukipyörän asemaa säädetään pyöränhaarukkaa (A) säätämättä.

Varmista, että tukipyörän kiinnityskappale (B) on 90°:n kulmassa alustaan (lattiaan) nähdessä kuvassa esitetyllä tavalla.


Tukipyörän kulmansäätö

Avaa ja kierrä tukipyörän kiinnityskappaleessa (B) olevia epäkeskomuttereita (C), kunnes kulma on säädetty oikein.

Kiristä ruuvit kunnolla haarukan säätämisen jälkeen.



Huomio! Varmista, että ruuvit tulevat kunnolla kiristetyiksi säätämisen jälkeen.

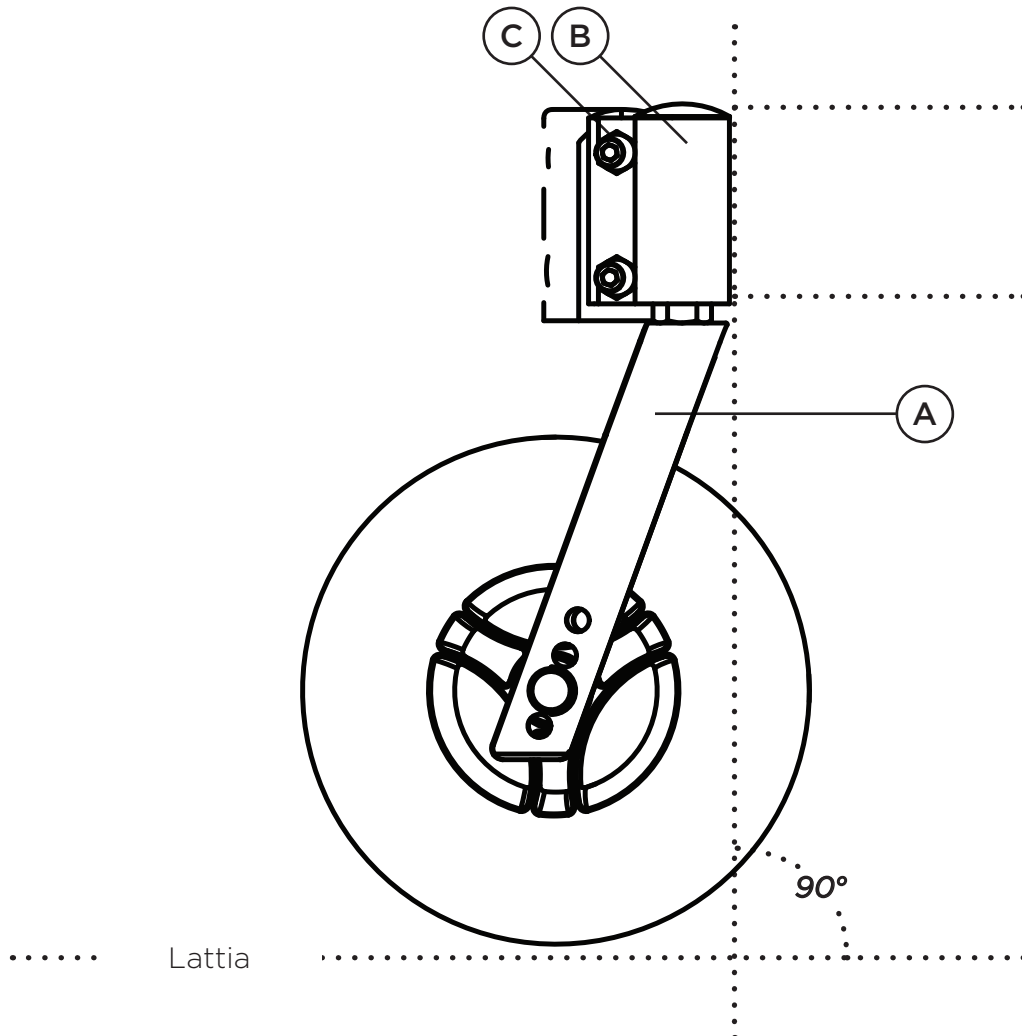

Jarru

Rumpujarru

Pyörät on varustettu rumpujarruilla, jotka avustaja voi kytkeä päälle. Tarkista aina ennen käyttöä, että jarrut toimivat moitteettomasti.

Purista oikeanpuoleista jarrukahvaa (A) samalla pyörätuolia eteenpäin työntäen. Jarrukahvaa (A) ei tulisi voida puristaa kiinni työntökahvaan. Jarrujen ollessa oikein säädetty tulisi väliin jäädä noin 5-10 mm:n väli.

Toista menettely vasemman jarrukahvan kanssa.

Jarrujen kytkeminen päälle

Purista jarrukahvaa (A) ja käännä punainen lukitsin (B) eteenpäin.



Jarrujen vapauttaminen

Purista jarrukahvaa (A), jolloin lukitsin avautuu automaattisesti. Päästä sitten irti jarrukahvasta

Mikäli jarrut eivät toimi

Tarkista molempien jarruvaijereiden kireys. Jos vaijeri on löysä, yritä kiristää se avaamalla ruuvia (C) ja kiristä sen jälkeen uudelleen. Mikäli tämä säätö ei ole riittävä, kokeile seuraavaa pikasäätöohjetta jarruvaijereiden kiristämiseksi.

- 1) Kiristä ruuvi (C) pohjaan saakka
- 2) Avaa mutteria (D)
- 3) Purista jarrua rumpujarrun vartta (E) nostamalla ja siirrä mutteri (D) edemmäksi vaijerilla
- 4) Kiristä mutteri (D) ja säädä kireys ruuvin (C) avulla

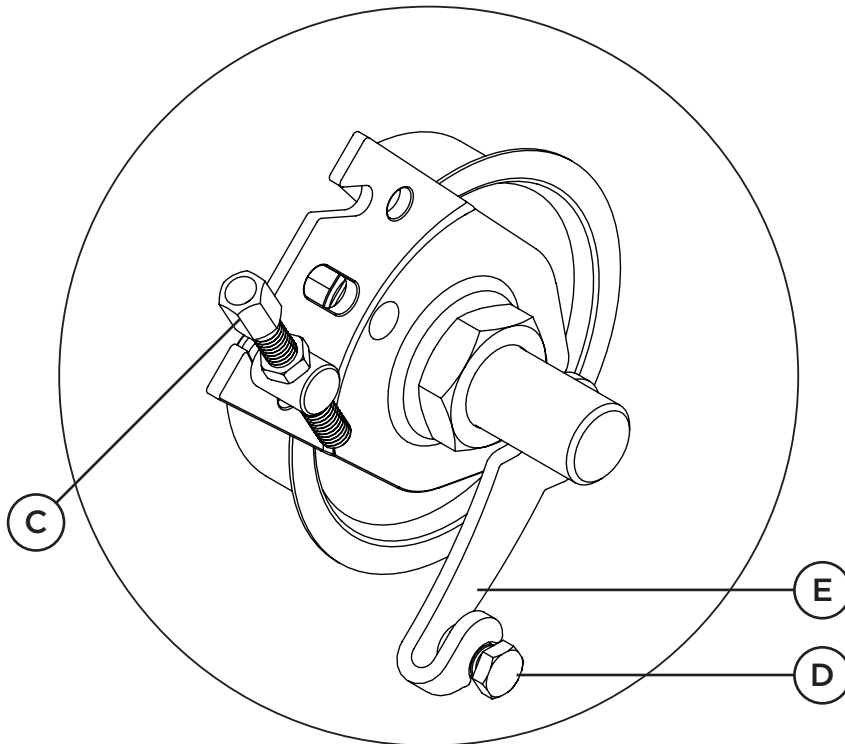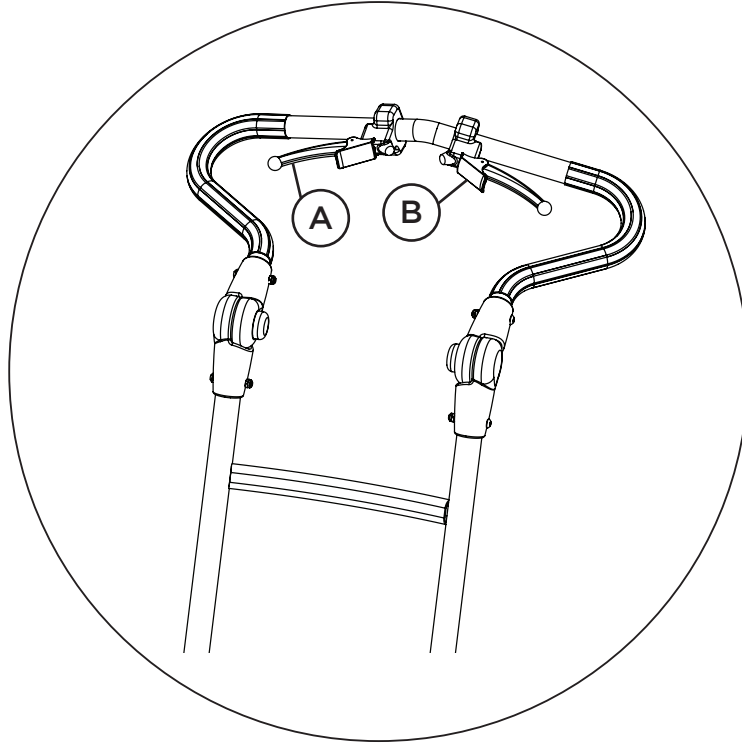

Rumpujarrun yksityiskohtainen kuva

Jarru

Rumpujarrun asentaminen

Rumpujarrun asentaminen edellyttää pyörän irrottamista pyörätuolista. Paina pikalukitusakselin painiketta ja vedä pyörä ja akseli irti rumpujarrusta, katso sivu 12.

Asenna rumpujarrut alustaan kiertämällä iso välikeholkki (A) rumpujarrun kiinnityspulttiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kiinnitä iso välikeholkki (A) suurella mutterilla (B) kuvassa esitetyllä tavalla. On tärkeää olla kiristämättä liikaa.

Sitten ruuvi (C) pannaan soikionmuotoiseen reikään ja pieni välikeholkki (D) kierretään ruuvin (C) päälle.

Kiristä ruuvi (C) prikan (E) ja mutterin (F) avulla, kuten kuvassa esitetään. Kiristä molemmat mutterit (B) ja (F). Varmista, että rumpujarru on kunnolla paikallaan.

Asenna pyörä takaisin pyörätuoliin (sivu 12), kun rumpujarrun säätäminen on tullut suoritetuksi.



Huomio! Mikäli on valittu 16” pyörät, ruuvi (C) ruuvataan suoraan levyyn.




Huomio! Mutteri (B) (ja ruuvi C, mikäli on valittu 16” pyörät) on varmistettava lukkoliimalla, kuten loctite 243 tai vastaavalla.



Huomio! Sivulla 12 on lisätietoja pikalukitusmekanismin käytöstä.



Huomio! Rumpujarru asennetaan samalla tavalla kaikkien pyöräkokojen yhteydessä.

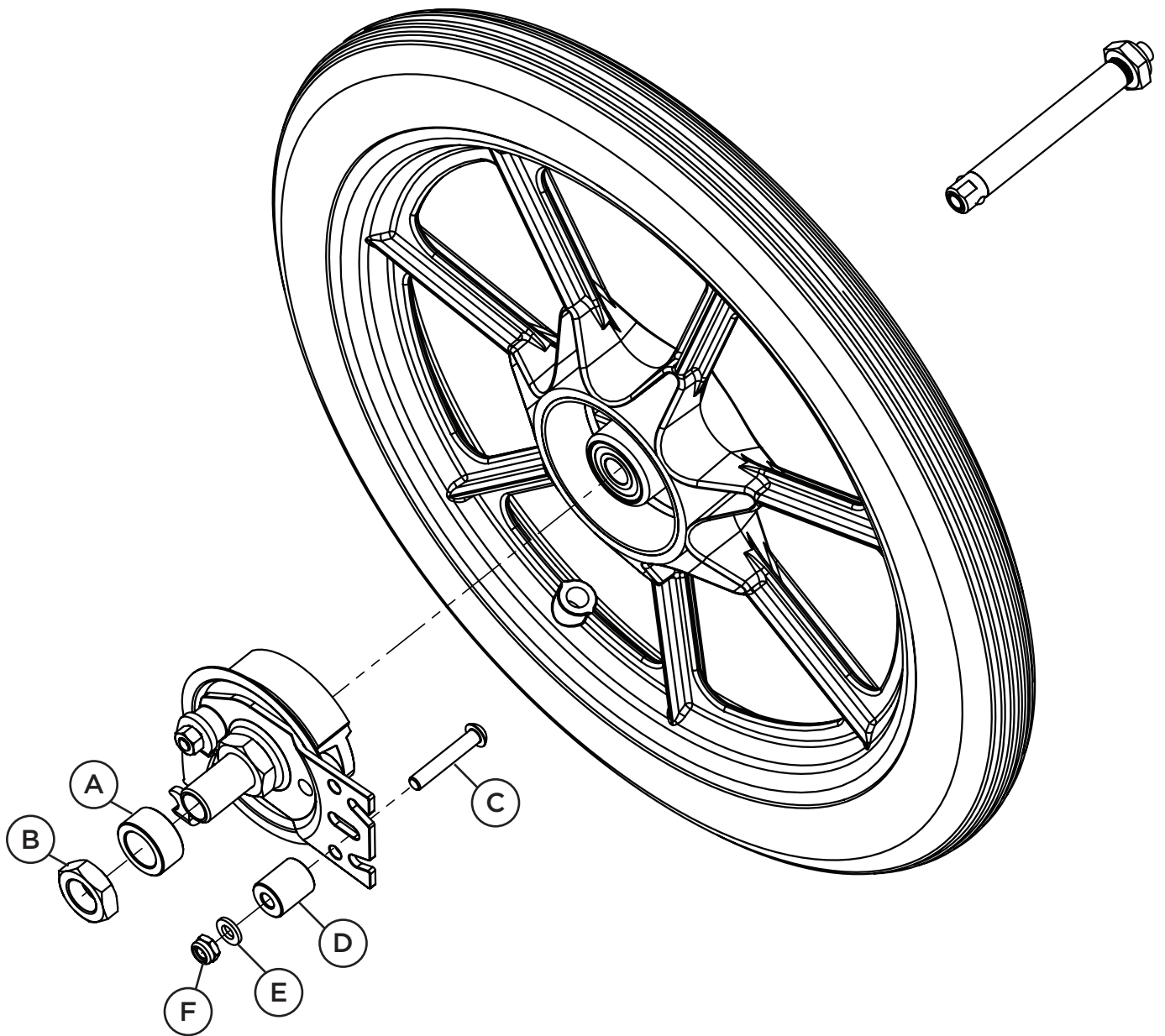

Pysäköintijarru

Käsi-jarrun asentaminen


Pysäköintijarrun kannattimen asentaminen tulee tehdä kuvassa esitetyllä tavalla alustan sivulla oleviin, tähän tarkoitukseen varattuihin reikiin mukana toimitetuilla ruuveilla (A), prikoilla (B) ja muttereilla (C).

Käsi-jarrua (D) voidaan tarvittaessa säätää avaamalla ruuveja (E) ja sen jälkeen käsi-jarrua eteen- tai taaksepäin kiskon päällä siirtämällä. Kun haluttu sijainti on saavutettu, kiristetään ruuvit (E).

Käsi-jarrun käyttäminen

Käsi-jarru (D) kytketään päälle jarruvipua eteenpäin painamalla.

Jarrut vapautetaan vetämällä vipu taakse.

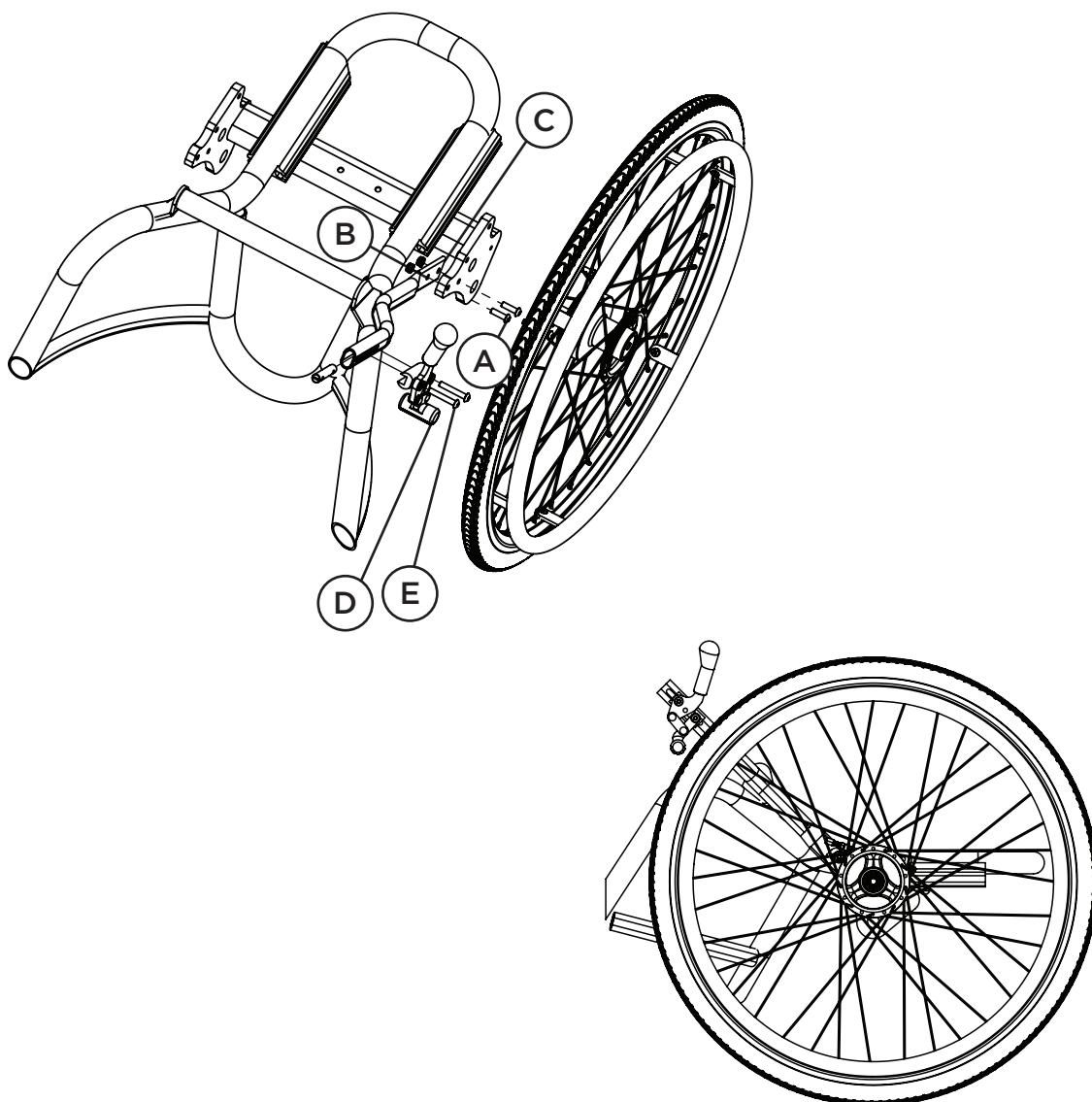

Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Työnnä jalkatuen kiinnitysputket (A) istuinlevyn alla oleviin etupuolisiin reikiin. Syvyyssäätöä varten on kaksi asemaa. Kiristä ruuvit (B) molemmilla puolin prikoilla ja muttereilla (C)



Huomio! Ennen asentamista on poistettava tiiviste istuinlevystä. Jalkatuen kannattimen paikalleen asettaminen on sen jälkeen helppoa.

Turvapidätin

Jalkatuen kannattimen alaosaan on asennettu sokka (D). Sokkaa voidaan myös käyttää ennalta säädetyn korkeusaseman palauttamiseen.




Vinkki! Asenna lisäsokka jalkatuen kannattimeen jalkatuen yläosaan, jolloin on helppoa löytää uudelleen vaihtoehtoinen korkeus (esim. kenkien kanssa/ilman kenkiä).

Polvinivelen kulman säätäminen

Kun jalkatuen kannatin on asennettu alustaan, voidaan jalkatuen kulmaa säätää polvinivelen kohdalta. Avaa ruuvia (E) hieman ja säädä kulma halutunlaiseksi. Kiristä ruuvi.

Jalkatuen korkeussäätö

Kun jalkatuen kannatin on asennettu alustaan, voidaan jalkatuen korkeutta säätää. Avaa kiristysnuppia (F) ja säädä korkeus halutunlaiseksi. Kiristä nuppi.

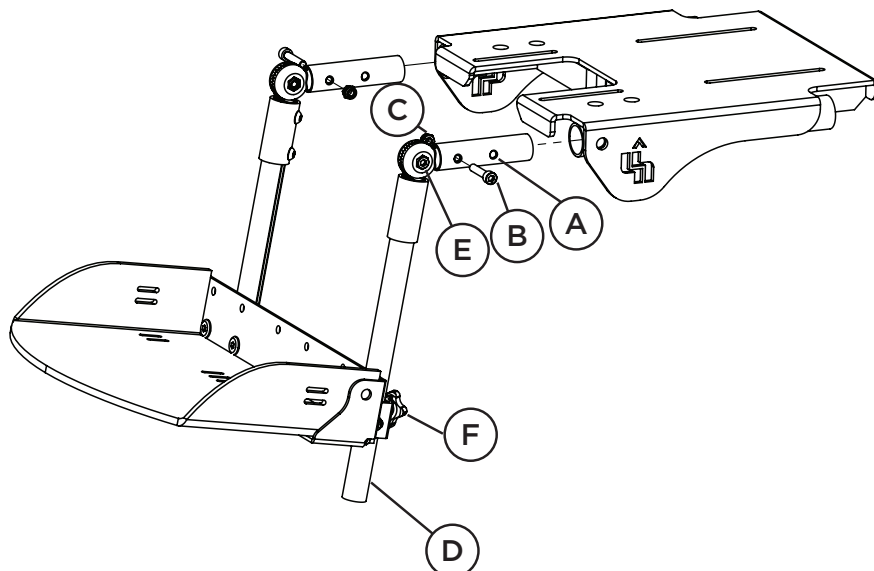

Jalkalevyn kiinnitysmekanismit

Kiinteä jalkalevyn kiinnitin (1)

Säätääksesi jalkalevyn korkeutta löysää vipuruuvia (A) hieman, säädä halutulle korkeudella ja kiristä vipuruuvi.

Jousitettu jalkalevyn kiinnitin (2)

Säätääksesi jalkalevyn korkeutta, löysää ruuvia (D) sen jälkeen ruuvia (E) hieman, Aseta halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit.

Valitse jousen pituus asettamalla ruuvi (E) toivottuun paikkaan ja kiristä ruuvi.



Vinkki! Jousituksen jäykkyyttä voi säätää ruuvimeisselillä säätämällä ruuvia (F) jousen kotelossa.

Ylöstaittuva jalkalevyn kiinnitin (3)




Säätääksesi jalkalevyn korkeutta löysää vipuruuvia (A) hieman, säädä halutulle korkeudella ja kiristä vipuruuvi.

Taittaaksesi jalkalevyn ylös, nosta jalkalevyn etureunasta.

Kuulaniveladapteri (4)

Säätääksesi jalkalevyn korkeutta löysää vipuruuvia (A) hieman, säädä halutulle korkeudella ja kiristä vipuruuvi.

Säätääksesi asentoa kulmanivelessä, löysää ruuvit (B) ja (C), aseta haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit (B) ja turvalukitse asento kiristämällä ruuvi (C).

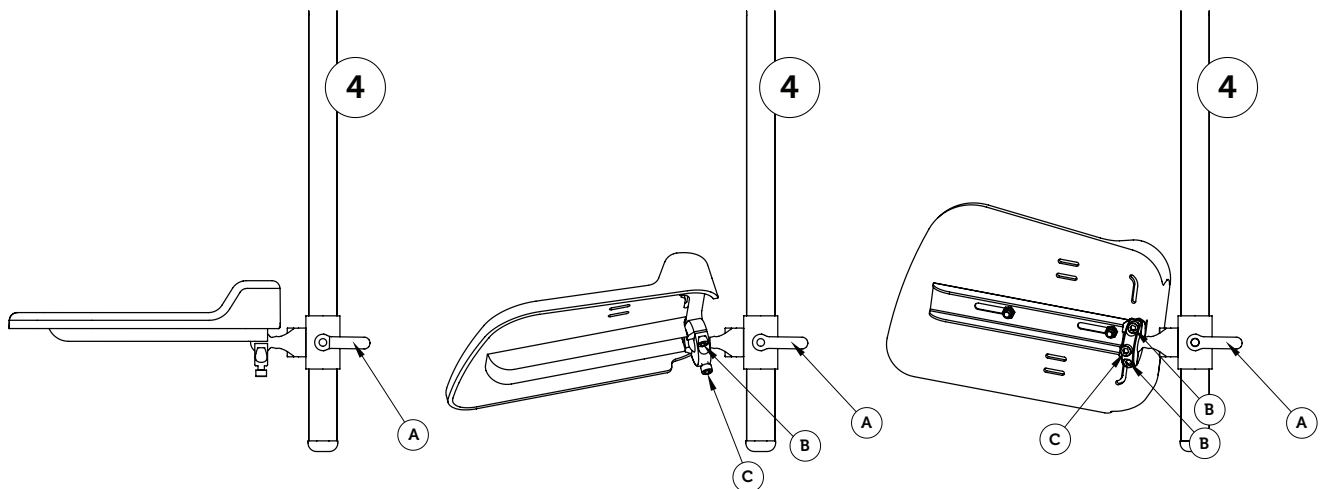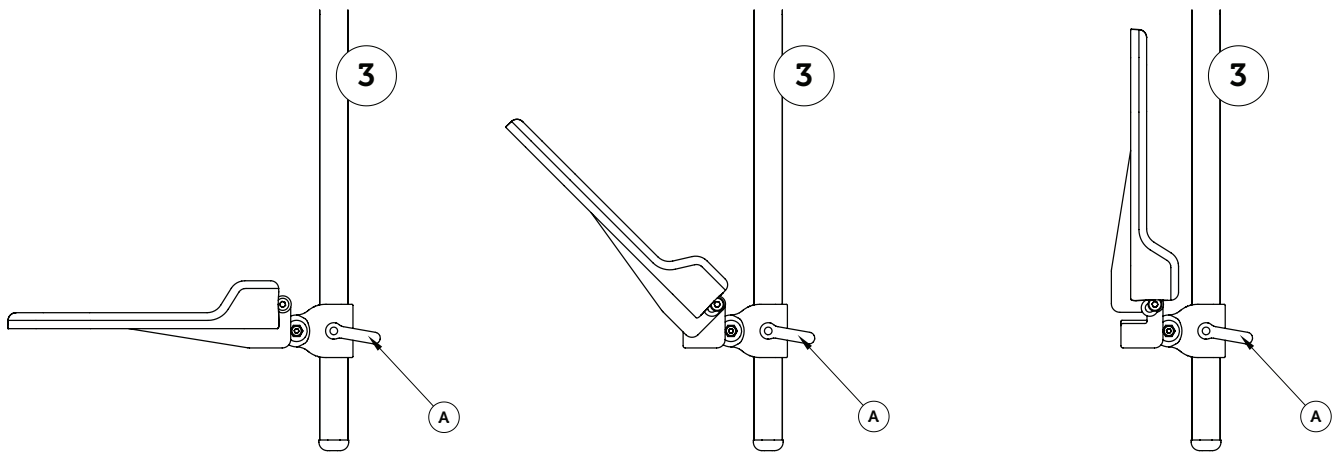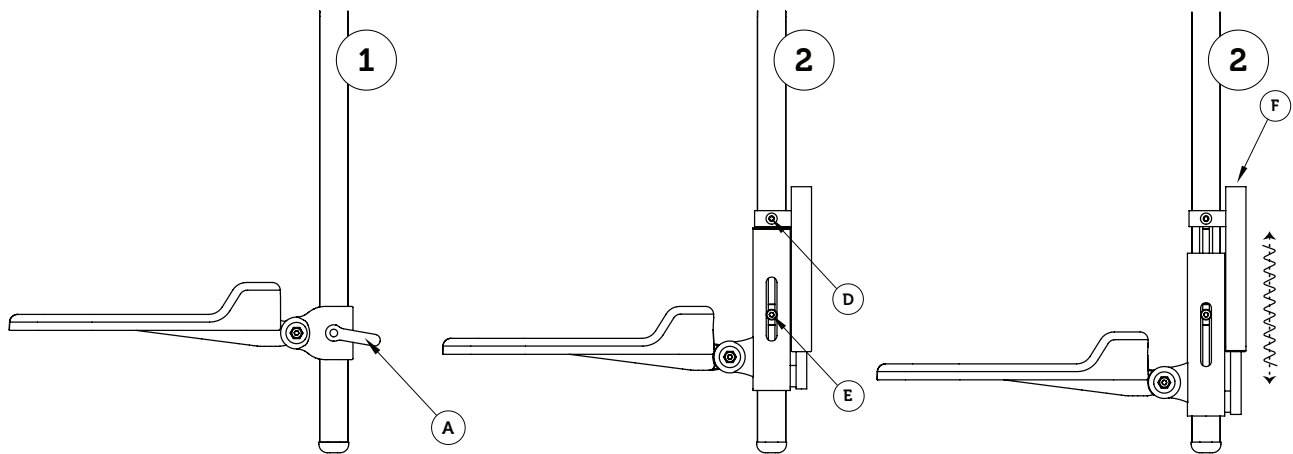

Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen


Asenna pohjetuki mukana toimitetuilla ruuveilla ja tapeilla jalkatuen kannattimeen kuvassa esitetyllä tavalla.

Pohjetuen korkeussäätö

Avaa ruuveja (A) hieman ja säädä korkeus halutunlaiseksi. Kiristä ruuvit (A).

Pohjetuen leveyssäätö

Avaa ruuveja (B) hieman ja säädä leveys halutunlaiseksi. Kiristä ruuvit (B).

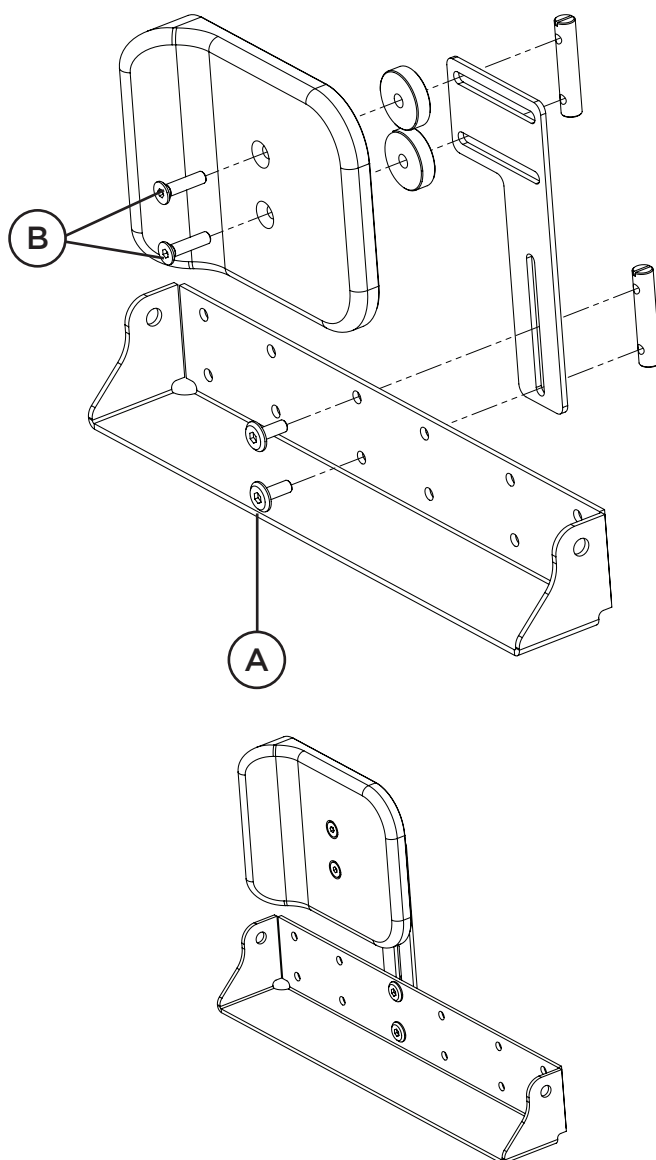

Kaatumaeste

Kaatumaesteen asentaminen

Asenna kaatumaeste pyöränakseliin kuvassa esitetyllä tavalla mukana toimitettuja ruuveja (A), priikkoja (B), muttereita (C) ja mutterinsuojusta (D) käyttäen.

Työnnä ruuvi (A) kaatumaesteen kannattimessa oleviin reikiin ja rungon läpi ja pane priikka (B) ja mutteri (C) vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvit. Pane lopuksi mutterinsuojukset (D) paikoilleen kuvassa esitetyllä tavalla.




Huomio! Zitzi Guppy tulee aina varustaa kaatumaesteellä, joka tarjoaa monia säätömahdollisuuksia.

Kaatumaesteen käyttäminen

Kaatumaestettä tulee käyttää, että alustan käyttäminen on turvallisempaa ja vakaampaa.

Kun kaatumaestettä ei käytetä, se on helppo kääntää pois paikaltaan kaatumaestettä varovasti jalalla painamalla ja sivuun kääntämällä. Pois kytkettäessä tulee pyrkiä painamaan kaatumaestettä jalalla mahdollisimman läheltä sen kannatinta.

Kaatumaestettä päälle kytkettäessä sitä on käännettävä, kunnes kuuluu loksahdus, joka osoittaa kaatumaesteen olevan oikeassa asennossa.

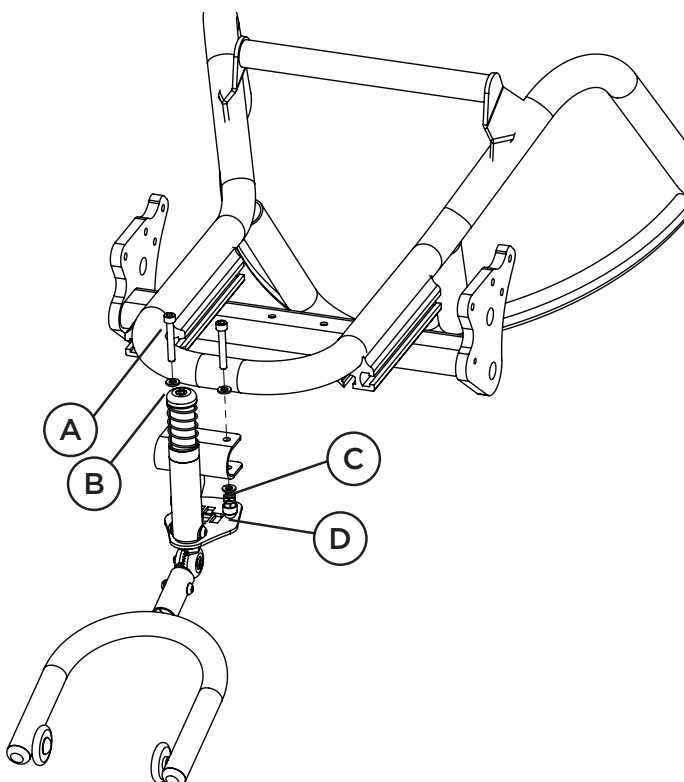

Kippauspoljin

Kippauspolkimen asentaminen

Asenna kippauspoljin (A) alustan sisäpuolelle kuvassa esitetyllä tavalla.

Kierrä mutterit paikoilleen ja lukitse kippauspoljin ruuveilla (B) ulkopuolelta.




Huomio! Kippauspoljin asennetaan normaalisti oikealle puolelle.

Kippauspolkimen käyttäminen

Kippauspoljin helpottaa alustan kohottamista tilanteissa, joissa se on tarpeen (esim jalkakäytävillä). Kippauspoljinta painetaan jalalla työntökahvasta samalla kiinni pitäen, ja alustaa varovasti taaksepäin vetäen, jolloin tilaa vapautuu tukipyörien alta.



Huomio! Työntötangosta tulee ottaa tukeva ote kippauspoljinta käytettäessä.

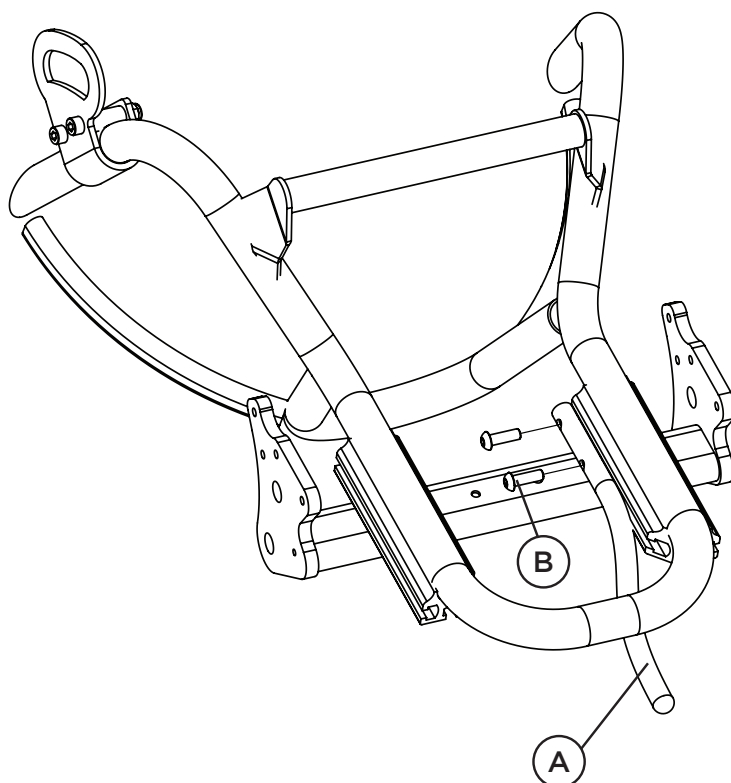

Kiinnityssarja kuljetukseen ajoneuvoissa

Etukannattimen asentaminen

Asenna kannatin alustaan ruuvilla (A) ja prikalla (B) kuvassa esitetyllä tavalla. Muista myös asentaa välikappale (C).

Takakannattimen asentaminen

Takakannatin asennetaan profiiliin ulkopuolelle alustan takana mukana toimitettuja ruuveja (D), prikkoja (E) ja muttereita (F) käyttäen kuvassa esitetyllä tavalla

Ajoneuvossa kuljetuksen kiinnityssarja

Katso kappale ”Kiinnityssarja kuljetukseen ajoneuvossa” lisätietojen ja suositusten saamiseksi kiinnityssarjan turvallisesta käytöstä.




Huomio! Työntötangon rungon tulee olla kosketuksissa istuimen selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Törmäystestattu ja hyväksytty standardin 7176-19 mukaisesti 70 kg:n painolle



Huomio! Törmäystestaus on voimassa kuormitukselle 70 kg asti.

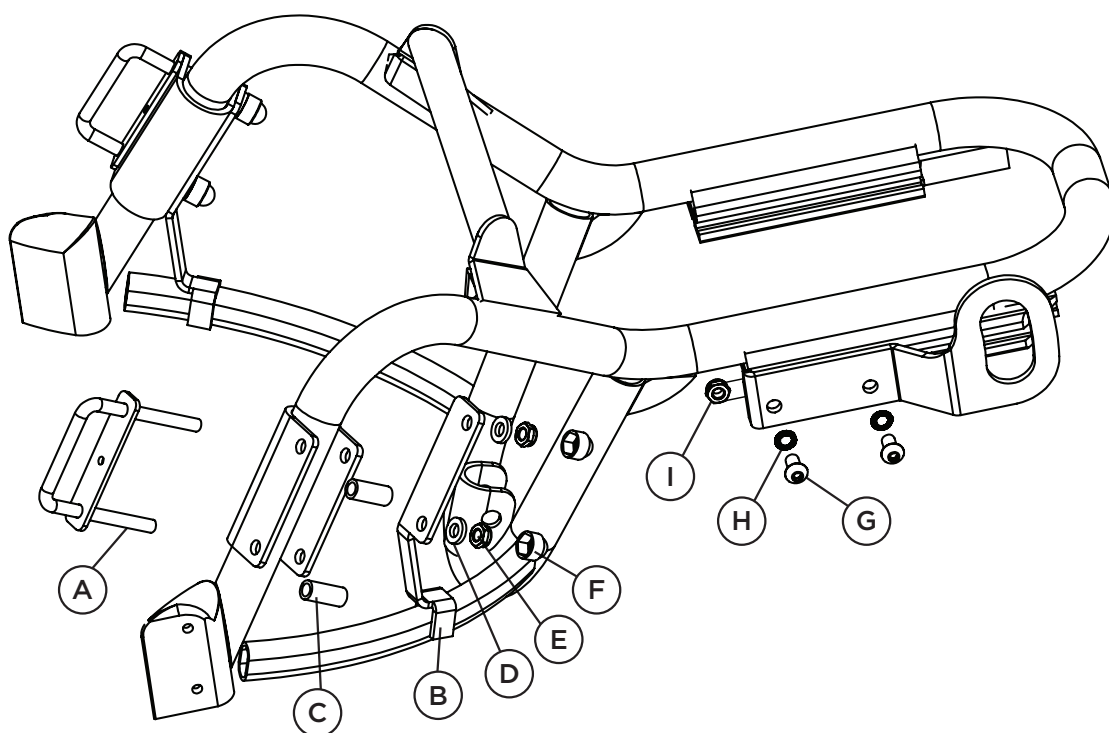

Suuntalukko

Suuntalukon asentaminen

Suuntalukko asennetaan tukipyöriin mukana toimitettujen osien avulla.

Aluksi irrotetaan tukipyörän kannatin (A) runkokiinnikkeestä (B) ruuvit (C) poistamalla.

Sitten otetaan kansisuojaus (D) pois tukipyörän kannattimesta (A) ja poistetaan keskipultti (E).

Sitten asennetaan suuntalukon osat (F) tukipyörän kannattimen (A) ja runkokiinnikkeen (B) väliin sekä tukipyörän kannattimen (A) ja pyöränhaarukan (G) väliin mukana toimitettuja osia kuvassa esitetyllä tavalla käyttäen.

Kun suuntalukko on asennettu, asenna tukipyörä takaisin paikalleen. Suuntalukkoa voidaan säätää varovasti ruuvien (J) avulla.

Lisätietoja tukipyörien asentamisesta löytyy sivuilta 18-21.

Suuntalukon kytkeminen päälle


Vedä lukitussokkaa (H) suoraan ylöspäin ja kierrä sen jälkeen 90° ja vapauta sokka (I) liikkuvassa osassa olevaan reikään. Varmista, että suunta on lukittunut.

Suuntalukon vapauttaminen

Vedä lukitussokkaa (H) suoraan ylöspäin ja kierrä sen jälkeen 90° ja vapauta sokka (I) liikkuvassa osassa olevaan reikään. Varmista, että suuntalukitus on vapautunut.



Huomio! Suuntalukko sopii ainoastaan 7" tukipyöriin.

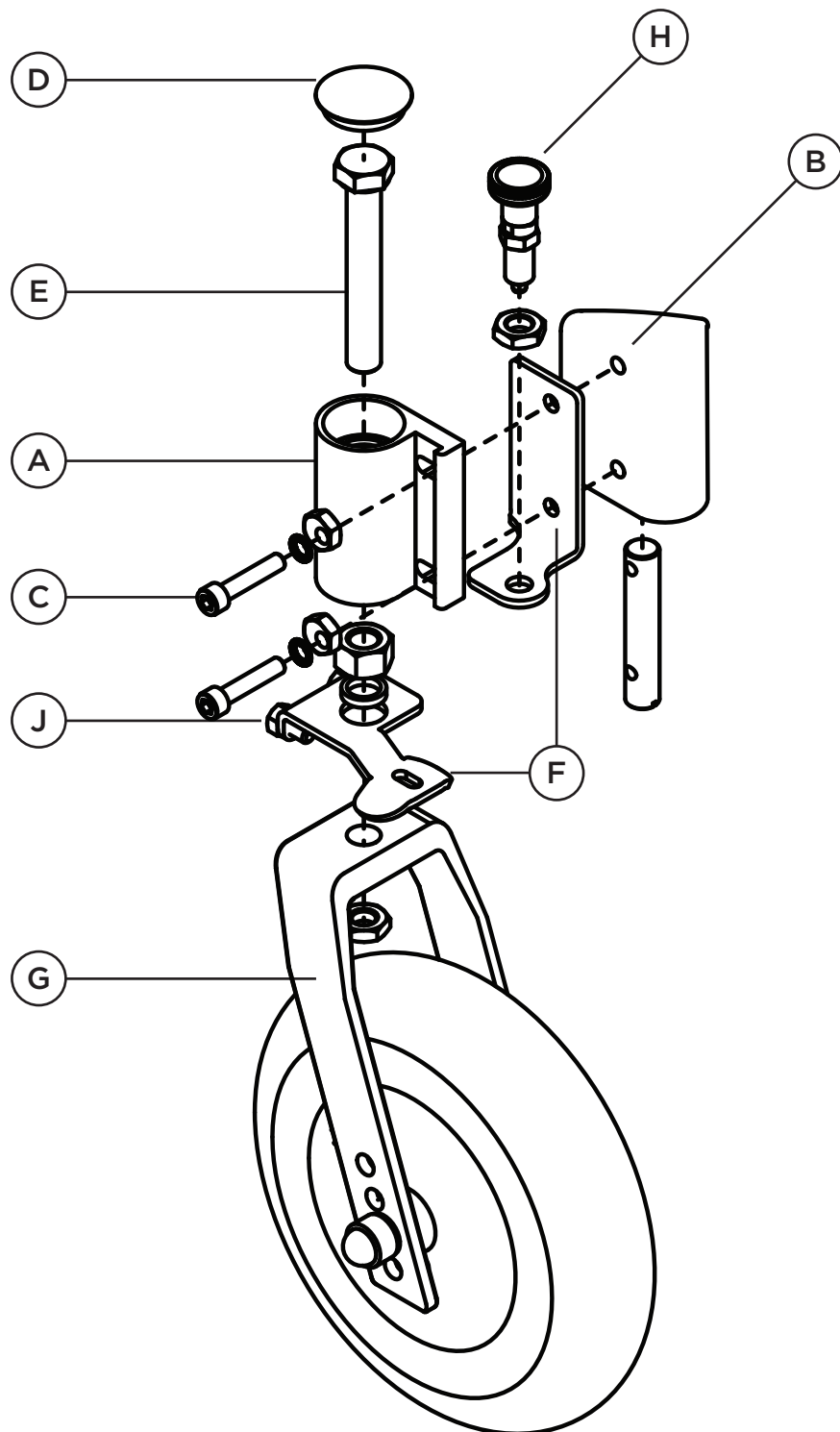

Kurasuojat

Kurasuojien asentaminen

Kurasuojat asennetaan mukana toimitetuilla ruuveilla (A), väliholkillla (B) ja muttereilla (C).

Irrota pyörää pikalukitustoiminnon avulla (ks. sivu 12) Avaa ruuvia, joka kiinnittää pyörintälukitsimen jarruun (katso sivu 20) ja poista väliholkki.


Asenna kurasuojat ja korvaa poistettu väliholkki mukana toimitetulla lyhyemmällä väliholkillla (B)

Kurasuojan säätäminen

Kurasuojien korkeutta voidaan säätää avaamalla ruuveja (D). Säädä korkeus halutuksi ja kiristä ruuvit (D) uudelleen.



Vinkki! Ruuveja (D) tarvitsee avata vain hieman.

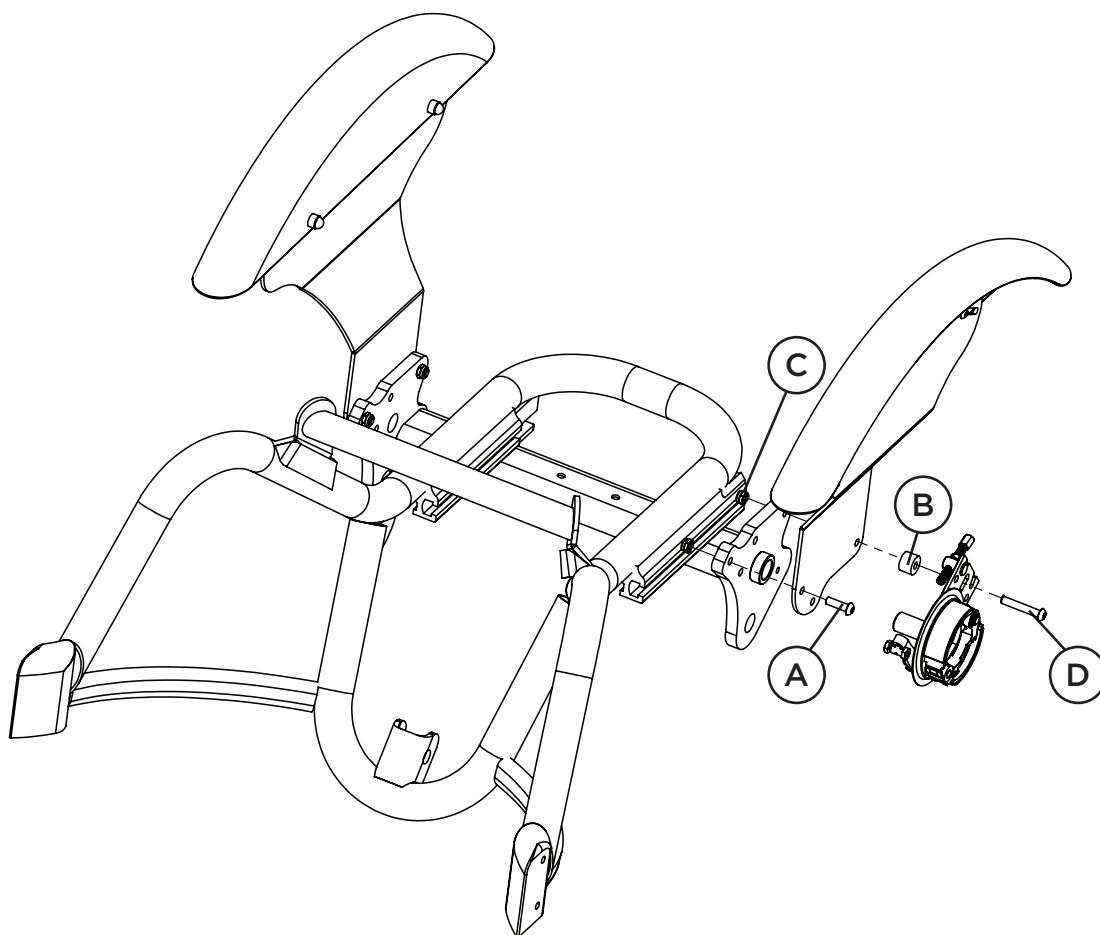


Kuljettaminen moottoriajoneuvossa

Ohjeita autossa kuljettamista varten

Kiinnittäminen tulee tehdä ISO 10542 -hyväksytyillä hihnoilla kuvassa merkittyjä kuljetuskiinnikkeitä käyttäen.

Guppy ylhäältä katsottuna.

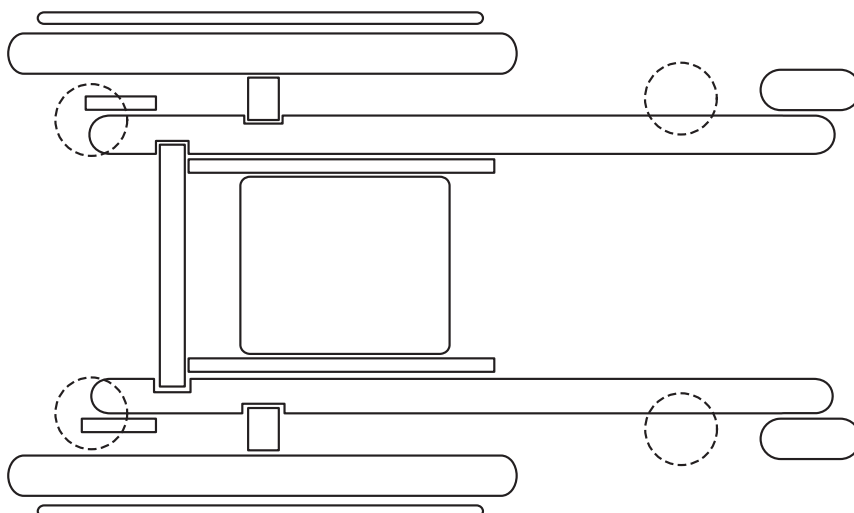

Huomio! Hihnan kiristäminen vain lievään kireyteen riittää.
Hihnojen liiallinen kiristäminen saattaa aiheuttaa rungon vääntymisen.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Törmäystestattu ja hyväksytty ISO-standardin 7176-19 mukaisesti 70 kg:n painoon saakka.



Huomio! Törmäystestin hyväksyntä on voimassa korkeintaan 70 kg:n painolle.



Kunnossapito-ohjeet

Huoltovälit

Pyörätuolin moitteeton toiminta edellyttää huollon ja tarkastusten säännöllistä suorittamista. Huollontarve riippuu käyttömäärästä ja kulumisesta. Tarkista, ettei liikkuvissa osissa ja kiinnityksissä ole kuluneisuutta. Huolto tulee aina jättää pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi. Epäselvissä tapauksissa voitte aina ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Puhdistus- ja pesuohjeet

Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä antibakteerisella pesunesteellä tai vastaavalla. Ajattele vihreästi, ympäristöasiat huomioiden! Käytä biohajoavia pesuaineita.

Tarkasta kunto säännöllisesti ja suorita huolto tarvittaessa.

Kaasujousi

Kaasujousen toiminnan säilyminen edellyttää sen säännöllistä käyttämistä. Mikäli tuotetta ei käytetä, tulisi kaasujousta käyttää vähintään 6 kuukauden välein. Ne on lisäksi säilytettävä siten, että jousen tanko osoittaa alaspäin. Muussa tapauksessa kaasujousen tiiviste voi murtua ja estää kaasujousen toiminnan.



Huomio! Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti

Takuu

1 vuosi valmistusvirheiden osalta. Lisätietoja myöntämästämme takuusta löytyy tämän käyttöohjeen sivulta 37.

Yhdistelmät

Zitzi Guppy ja sen lisävarusteet ovat CE-merkittyjä tuotteita, joita voidaan yhdistää kaikkiin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin lisävarusteisiin. Zitzi Guppy soveltuu käytettäväksi Zitzi Delfi Pro- ja Anatomic Sits -istuinjärjestelmien kanssa. Muiden yhdistelmien osalta ottakaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.

Varaosat

Zitzi Guppyn CE-merkinnän voimassaolon säilyminen edellyttää, että runkoon liitetään ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

Merkinnät

Zitzi Guppy ja sen lisävarusteet ovat CE-merkittyjä tuotteita. Laitekohtainen sarjanumero sijaitsee rungon alaosassa olevassa etiketissä. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Kierrättäminen

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityypin mukaisesti (metalli, muovi ja palavat osat (tekstiilit)). Kaasumäntä luokitellaan haitalliseksi materiaaliksi.



Huomio! Laitetta kunnostettaessa tulee aina tarkistaa, ettei siihen ole tehty henkilökohtaisia muutoksia ennen toimittamista uudelle käyttäjälle.

Kunnostaminen

Huolto

Säännöllinen huolto on tärkeää Guppyn turvallisen ja moitteettoman toiminnan kannalta. Huollon tarve vaihtelee käytöstä ja kulumisesta riippuen. Tarkasta kaikki liikkuvat osat ja kiinnitykset säännöllisesti. Guppyn kunnostamisessa tulee käyttää alkuperäisiä Anatomic SITT AB:n toimittamia osia.

Työ tulee aina jättää pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi. Mikäli tarvitsette neuvoja, voitte aina ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Kunnostuksen tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Kaikki tarkastettavat kohteet tulee läpikäydä vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Toiminnan tarkastus tulee suorittaa jokaisella Guppyn käyttökerralla.

Puhdistaminen

Maalatut pinnat, pyörät, tukipyörät ja kahvat puhdistetaan puhdistusliuoksella. Ohenteita, bensiiniä tai muita liuottimia ei saa milloinkaan käyttää.

Viimeistely

Pesun jälkeen kaikki johdot, ontelot valumisreiät tulee puhaltaa kuivaksi ja voidella kevyesti öljysuihkeella.

Merkinnät

Tarkista, että CE-merkintä on ehjä ja luettavissa. Merkintä sijaitsee putkirungossa.

Pyörät

Varmista, että tukipyörät ja kelauspyörät eivät ole kuluneita ja pyörivät vaivatta ja äänettömästi. Kelaus- ja tukipyörien säätämistä koskevia lisätietoja löytyy tämän käyttöohjeen sivuilta 14-21.

Maalipinta

Tarkista maalipinnan vauriot korroosion ja naarmujen syntymisen estämiseksi. Korjausmaalialia on tarvittaessa saatavissa Anatomic SITT AB:lta.

Tukevuus

Tarkista, että kaikki pyörät ovat tukevasti maassa, eikä runko ole vinossa. Kelaus- ja tukipyörien säätämistä koskevia lisätietoja löytyy tämän käyttöohjeen sivuilta 14-21.

Putkirunko ja osat

Hitsi- ja pulttiliitokset. Holkit ja saranat tulee käsitellä toiminaan äänettömästi. Voitele tarpeen mukaan. Tarkasta myös nupit, ruuvit ja muut kiinnitysosat. Vaihda tarvittaessa uusiin.

Haarukat

Varmista, että kiinnityksissä ja laakereissa ei ole välystä ja että ne toimivat vaivattomasti. Voitele etuhaarukat tarvittaessa.

Työntötanko ja -kahva

Varmista, että pehmuste ja kahvat ovat tukevia ja että työntötangon korkeus on säädettävissä. Tarkista myös kiristysnupin ja ruuvien kunto.

Jarrut

Varmista, että rumpujarru ja pysäköintijarru toimivat moitteettomasti. Lisätietoa jarruista löytyy tämän käyttöohjeen sivuilta 22-27.

Taittomekanismi ja kallistus

Varmista, että putkirunko ja työntötanko ovat vaivatta kokoontaitettavissa ja että yksikön kallistaminen on helppoa. Kallistamista koskevia lisätietoja löytyy sivuilta 8-9.

Toiminnan tarkistus

Toiminnan tarkistukseen sisältyvät pyörien, tukevuuden, jarrujen, työntökahvan ja -tangon läpikäynti.



Huomio! Laitetta kunnostettaessa tulee aina tarkistaa, ettei siihen ole tehty henkilökohtaisia muutoksia ennen toimittamista uudelle käyttäjälle.

Sovittaminen ja yksilölliset muutostyöt

Ohjeita ja suosituksia

Aina kun Zitzi Guppyyn tehdään muutoksia, on suoritettava arviointi sen määrittelemiseksi, onko kyseessä sovittaminen vai yksilöllinen muutostyö (kustomointi).

Sovittamista on jokainen muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut muutokset ovat yksilöllisiä muutostöitä. Ainoastaan tehtävään pätevä henkilö saa tehdä sovituksia, ja työ on aina suoritettava ammattitaitoisesti. CE-merkintä osoittaa tuotteen täyttävän kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Sallitut muutostyöt

Huomioi, että riskiarviointi on tehtävä aina apuvälineen säätöjen ja muutostöiden yhteydessä.

Tuote ei saa koskaan olla vaarallinen käyttää muutostöiden jälkeen.

Jalkatuen putkien katkaisu lyhyemmäksi käyttäjän tarpeen mukaisesti.

Reikä istuinlevyyn:

Istuinlevyyn saa porata reikiä asennusta varten. Kuitenkin vain seuraavia ohjeita noudattaen:

- ei enempää kuin 4 reikää
- ei suurempia reikiä kuin halkaisijaltaan 6,5mm
- reikä ei saa olla alle 15mm etäisyydellä olemassa olevista urista ja rei'istä.
- reikä ei saa olla alle 15mm etäisyydellä levyn reunasta

Riskinarviointi

On huomioitava, että lääkinnällisen apuvälineen sovittamiselle ja kustomoinnille on aina tehtävä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa sovittamisen jälkeen muuttua vaaralliseksi käyttää.

Merkinnät

Tuotteeseen on liitettävä merkintä siitä, että se on sovitettu tietylle käyttäjälle siten, ettei sitä voida erehdyksessä pitää perusmallisena tuotteena.



Huomio! CE-merkintä ei ole voimassa, mikäli tuotteeseen on tehty henkilökohtaisia muutoksia.

Myyntiehdot

Takuu

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu mitätöityy, jos tuotteelle on aiheutettu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia vaurioita tai sitä on käsitelty huolimattomasti. Takuuvaatimuksen prosessointi edellyttää viallisen tuotteen palauttamista valmistajalle. Mukaan tulee aina liittää alkuperäisen toimituksen pakkauslipuke.

Takuuvaatimukset

Vika ja sen mahdollinen aiheuttaja tulee kuvata mahdollisimman tarkkaan. Vaatikaa takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Mukaan tulee liittää kopio laskusta ja maininta, että tuote on palautettava käyttäjälle korjausten jälkeen. Tätä varten tulee ilmoittaa toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteiden palauttaminen

Viallisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet on palautettava 20 päivän sisällä toimituksesta. Mukaan tulee aina liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että laskusta.

Tuotteiden palauttamisen syy on mainittava.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteille, jotka on palautettu yli 20 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 80 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 60 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 60 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 150 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 40 % laskun summasta


Tuotteille, jotka on palautettu yli 360 päivän kuluttua toimituksesta

tuotteesta ei myönnetä hyvitystä



Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa

Tekniset tiedot

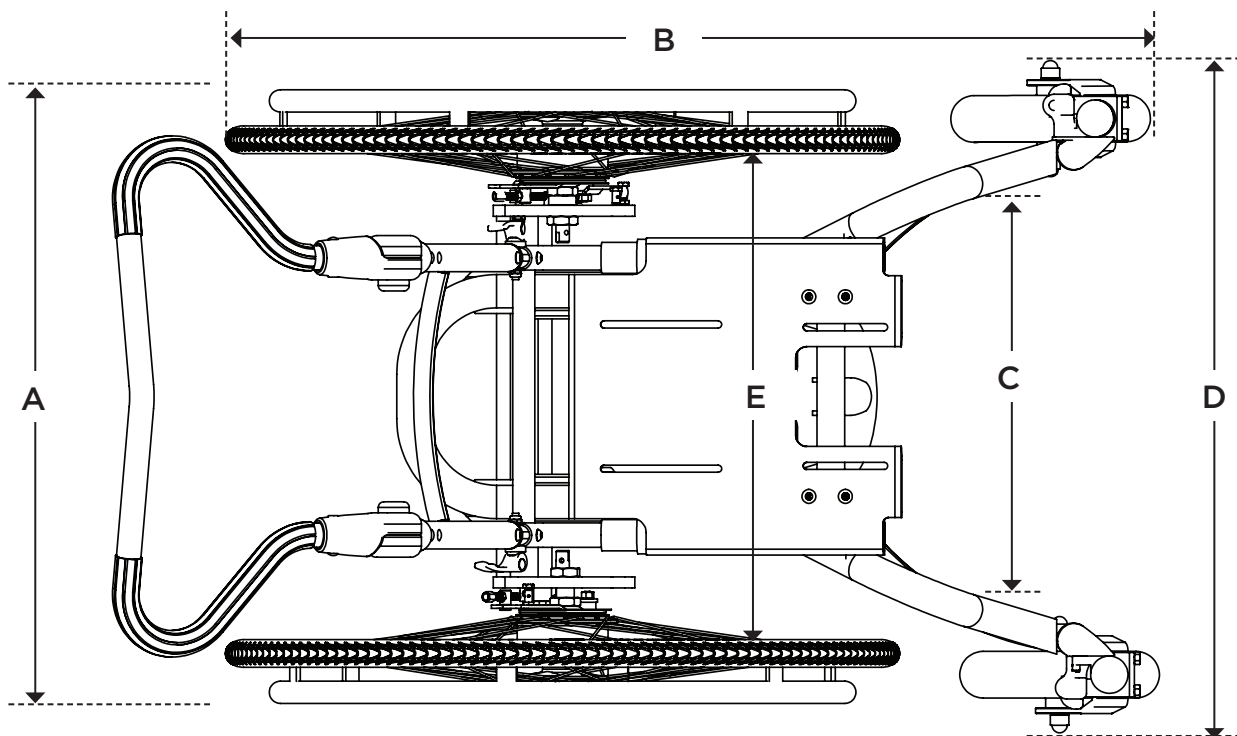

16" pyörillä (6" tukipyörät)

Koko	Kallistus	Istuin- korkeus	Paino	A	B	C	D	E
Koko 1	0-32°	46 cm	14 kg	51 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	41 cm
Koko 2	0-32°	46 cm	14 kg	56 cm	67-73 cm	41 cm	57 cm	46 cm

20"/22"/24" pyörillä (6" tukipyörät)

Koko	Kallistus	Istuin- korkeus	Paino	A	B	C	D	E	E kurasuojilla
Koko 1	0-32°	46 cm	15kg	57 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	43,5 cm	39,5 cm
Koko 2	0-32°	46 cm	15 kg	62 cm	71-82 cm	41 cm	57 cm	48,5cm	44,5 cm

Alustan kokonaispituus on riippuvainen pyörien sijainnista. C-mitta on eötetty tukipyörän haarukan korkeudelta.

SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Puh +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Tanska

Puh +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Alankomaat

Puh +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu

Puh: +35 840 775 22 88

info@rehaco.fi

www.rehaco.fi