

ZITZI™
STARFISH PRO



Käyttöohje

Zitzi Starfish Pro

Sisällysluettelo

Turvavarotoimenpiteet	3	Jalkatuki	18
Alustarunko	4	Jalkatuen asentaminen.....	18
Manuaalinen alustarunko	4	Polvikulman säätäminen	18
Korkeussäädettävä alustarunko	4	Kiinteän jalkatuen säätäminen	18
Pyörät	5	Joustavan jalkatuen asennus.....	19
Istuinosa	6	Ylös kääntyvän jalkatuen asennus	19
Istuinosan säätäminen	6	Sarana-adapteri	19
Istuimen syvyyden/loitonnuksen säätäminen.....	6	Pohjetuki	20
Loitonnuks/lähentämistuki	7	Pohjetuen asennus	20
Asennus	7	Pohjetuen korkeuden säätäminen	20
Säätäminen	7	Pohjetuen leveyden säätäminen	20
Lantiovyö	8	Alusastia	21
Asennus	8	Virtsasuojuus	22
Säätäminen	8	Huolto ja kunnossapito	23
Selkänoja	9	Huolto	23
Lantiokulma	10	Puhdistus- ja pesuohjeet	23
Istuinyksikön kallistus	11	Kaasujoysi	23
Lannetuki	12	Työkalut	23
Käsinoja	13	Takuu	23
Runkokäsinoja	14	Yhdistelmät	23
Asennus mekaaniseen alustaan	14	Varaosat	24
Asennus hydrauliseen/sähköiseen alustaan.....	14	Kunnostaminen	24
Työntökahva	15	Merkinnät	24
Päätuki	16	Kierrätys	24
Päätuen asentaminen/säätäminen	16	Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet	24
Kannattimien asentaminen	17	Seurantatarkastukset	24
Vöiden asennus/säätäminen	17	Sovittaminen ja yksilölliseksi muun-	25
		taminen	25
		Ohjeita ja suosituksia	25
		Sallitut muutostyöt	25
		Myyntiehdot	26
		Takuu	26
		Takuuvaatimukset	26
		Tuotteiden palauttaminen	26
		Tekniset tiedot	27

Turvavarotoimenpiteet

Johdanto

Zitzi Starfish Pro-suihkutuolin kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä ohjekirja huolellisesti. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän läheisyydessä.

Tuote on suunniteltu käyttäjille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia, ja soveltuu monille erityyppisille diagnooseille. Zitzi Starfish Pro -suihkutuolin säätäminen tulee aina tapahtua lääkinällisesti pätevän henkilön toimesta.

Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi istuinjärjestelmänä Anatomic SITT AB:n valmistaman alustan yhteydessä. Mikäli ilmenee tarvetta muunlaiseen käyttöön, ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

Correspondence

Zitzi Starfish Pro and its accessories are a CE marked product. A unique serial number is located on a label placed on the frame. This serial number should be aquoted in any correspondence regarding the product.

Tämä tuote on Anatomic SITT AB:n valmistama

Postiosoite	Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin	+46 11-161800
Fax	+46 11-162005
Sähköposti	info@anatomicsitt.com
Verkkosivut	anatomicsitt.com
Opastusvideot	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt



Tarkista ruudusta, onko tuotetta
MUOKATTU

CE-merkintä ei ole enää voimassa ja
se tulee poistaa



Tarran paikka


Alustarunko

Manuaalinen alustarunko


Istuinyksikkö voidaan asentaa halutulle korkeudelle ennen kuin potilas istuu tuolissa. Avaa vipu (A) molemmilta puolin (kohtaa (B) ei ole kiristetty tiukalle, mutta auttaa kaukaloa pysymään kiskoilla). Nosta istuin kiskoilta ja siirrä se halutulle korkeudelle. Varmista, että istuin menee kunnolla paikalleen rakoihin. Lopuksi vipu (A) kiristetään tiukalle.

Korkeussäädettävä alustarunko

Istuinosa on säädettävissä kaikille halutuille korkeuksille. Korkeutta säädetään pumpun vartta polkemalla. Painaminen on tehtävä pehmein liikkein siten, että säätäminen on käyttäjälle miellyttävää. Alustan laskemiseksi alas pumpun vartta painetaan jalalla ylöspäin varren alta.

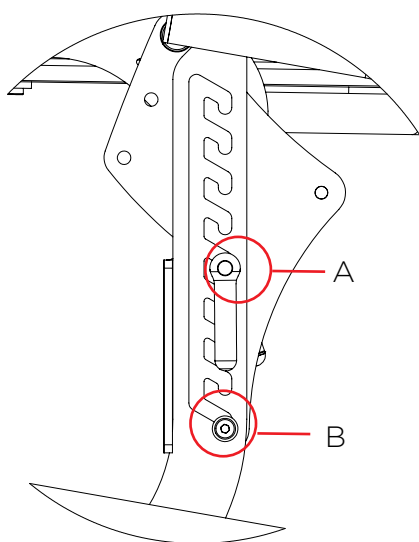

Manuaalinen alustarunko

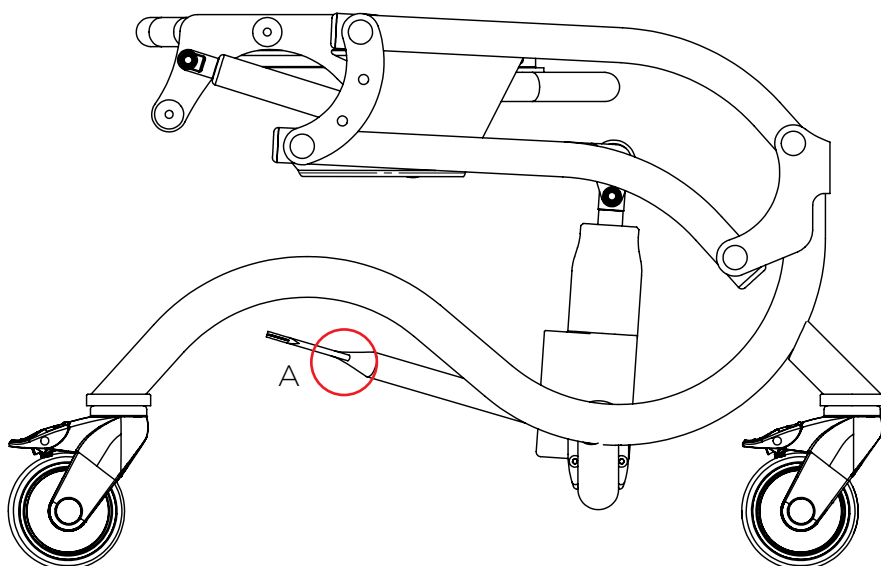


Korkeussäädettävä alustarunko

Pyörät

Pyörien lukitseminen

Pyörä lukitaan jarrukorvaketta (A) jalalla alas painamalla (ks. kuva). Jarru vapautetaan vetämällä korvaketta ylöspäin

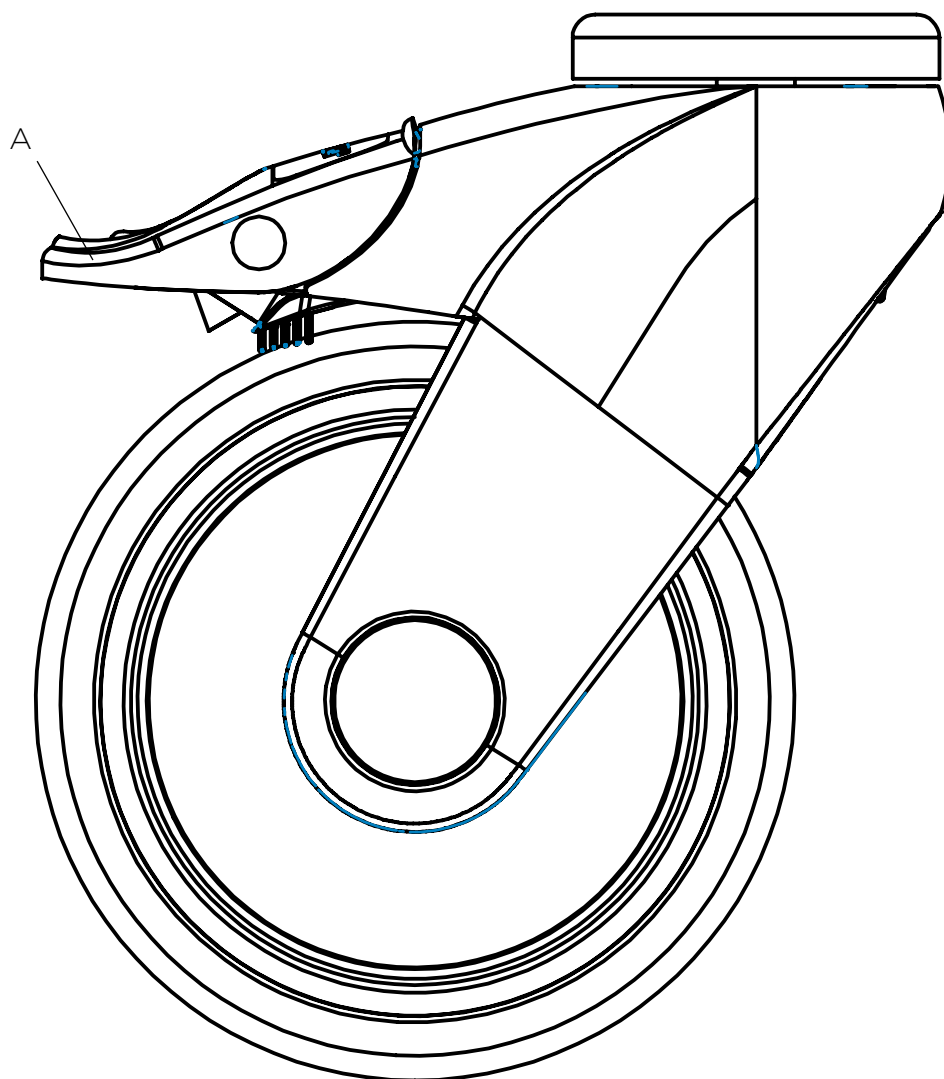

Istuinosa

Istuinosan säätäminen


Istuin on helppo säätää sopivaan syvyyteen, eripituisille jaloille ja alaraajojen loitontamiseksi/lähentämiseksi. Ruuveihin päästään käsiksi poistamalla päällinen.

Istuimen syvyyden/loitonnuksen säätäminen

Ruuvien (A) avaamisen jälkeen istuimen osia voidaan säätää käsin. Istuinosan säätöjen tultua suoritetuksi ruuvit kiristetään tiukalle.



Huomio! Varo ruuvaamasta ruuvejakokonaan irti!

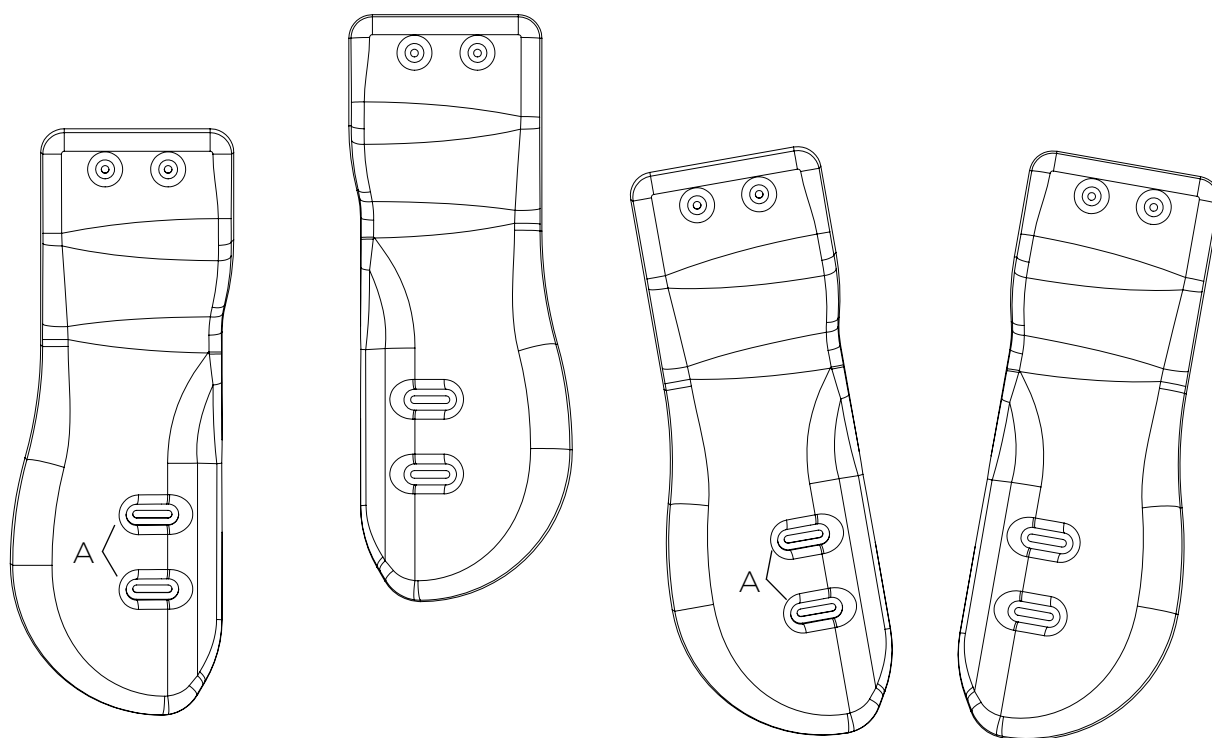


Loitonnuus/lähentämistuki

Asennus

Avaa ruuvit (A) ja asenna tuet siten, että näet ruuvinreiät hahlojen läpi. Asenna ruuvit hahlojen läpi reikiin.

Säätäminen

Avaa ruuveja (A) hieman siten, että voit siirtää tukea sivusuunnassa. Säädä tuki haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvit tiukalle.

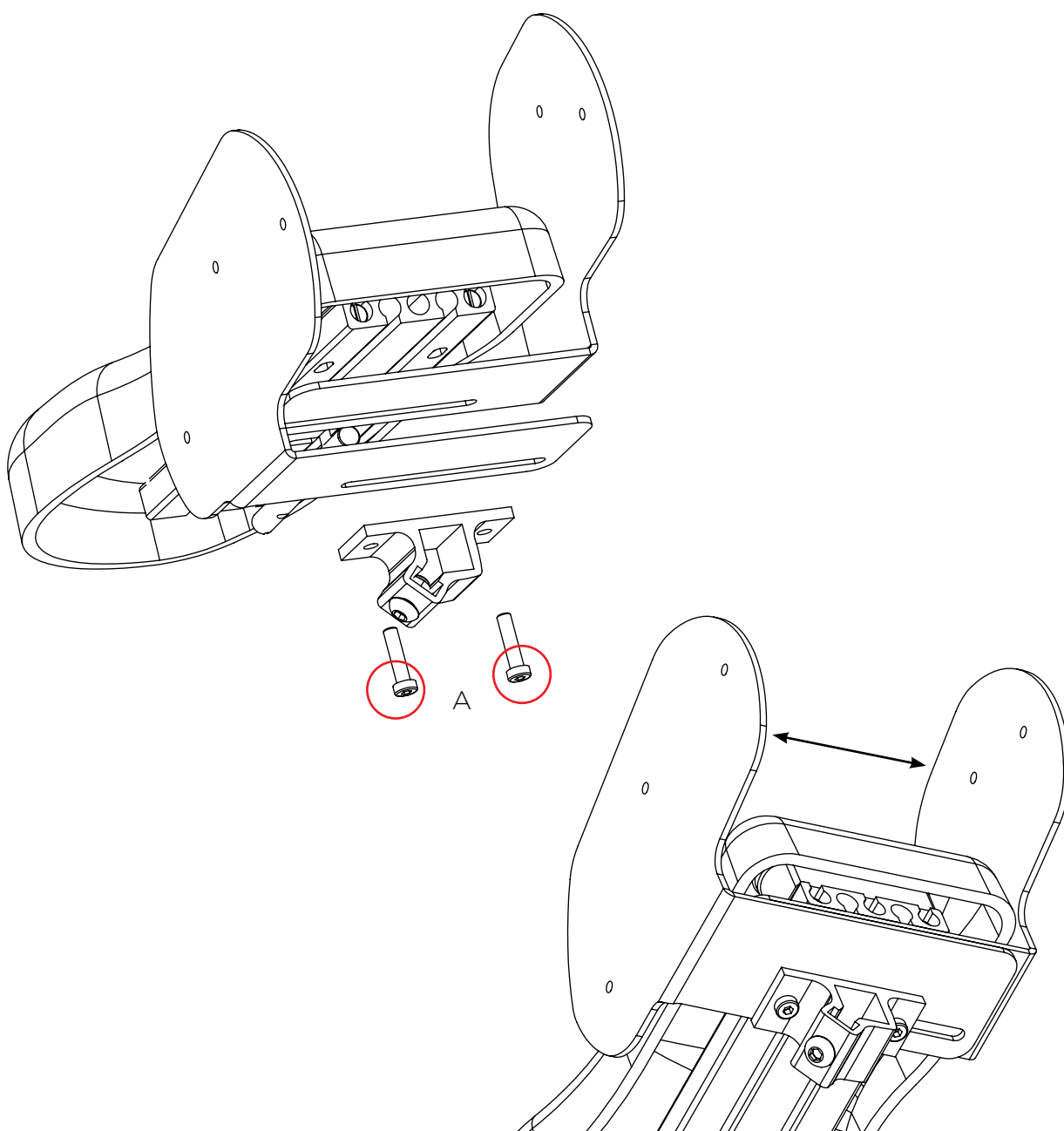


Lantiovyö

Asennus

Kiinnitä hihna lenkeistään.

Säätäminen

Vedä vyötä soljen molemmilta puolin siten, että solki tulee keskelle. Säädä pehmusteet siten, että paine tasaantuu hyvin. Mikäli hihnat ovat liian pitkät, turha osuus voidaan leikata pois ja hihnan päät polttaa.

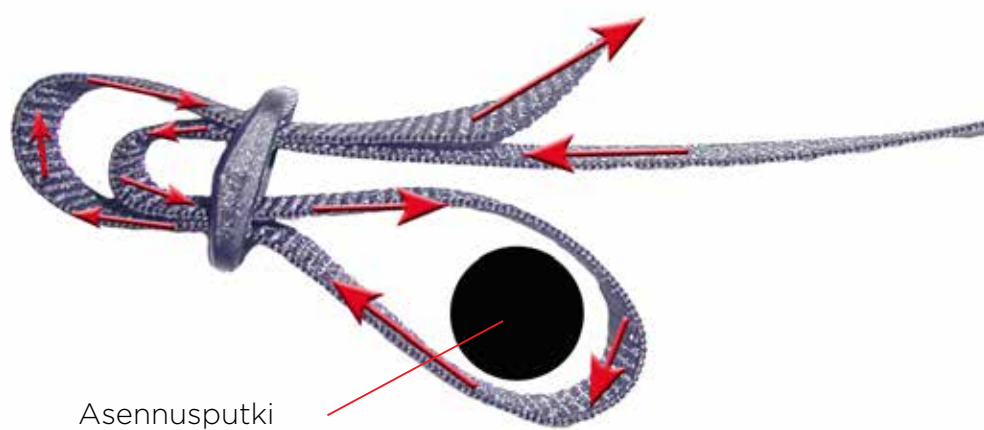


Selkänoja

Selkänojan (A) säätämiseksi avataan neljä ruuvia (B), jotka kiinnittävät selkäosan profiiliin. Säädä selkänoja halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (B) tiukalle.


Säädä vartalotuen korkeus karkeasti avaamalla neljä ruuvia (C), jotka kiinnittyvät profiiliin. Säädä halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (C) tiukalle.

Vartalotukea voidaan nyt kääntää avaamalla vipuja (D). Säädä vartalotuet haluttuun asentoon ja kiristä vivut (D) tiukalle.

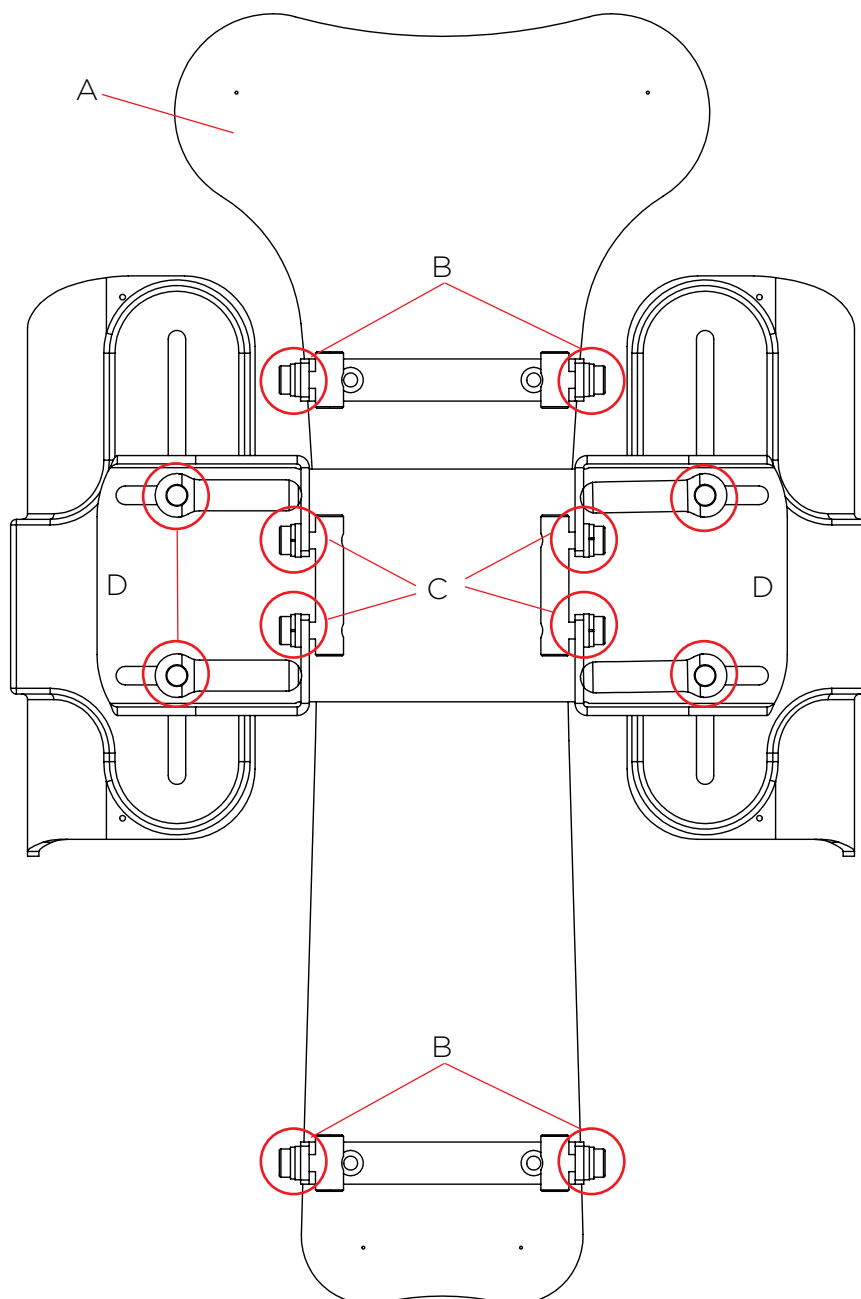

Lantion kulma


Lantiokulman säätäminen: aloita avaamalla lukitusvipu (A). Tartu samalla tukevalla otteella työntökahvasta ja paina kaasujousen liipaisinvipua (B). Säädä selkäosa haluttuun kulmaan ja vapauta kaasujousen vapautin (B). Kiristä turvaruuvi (A) kunnolla, kun säätö on tehty.

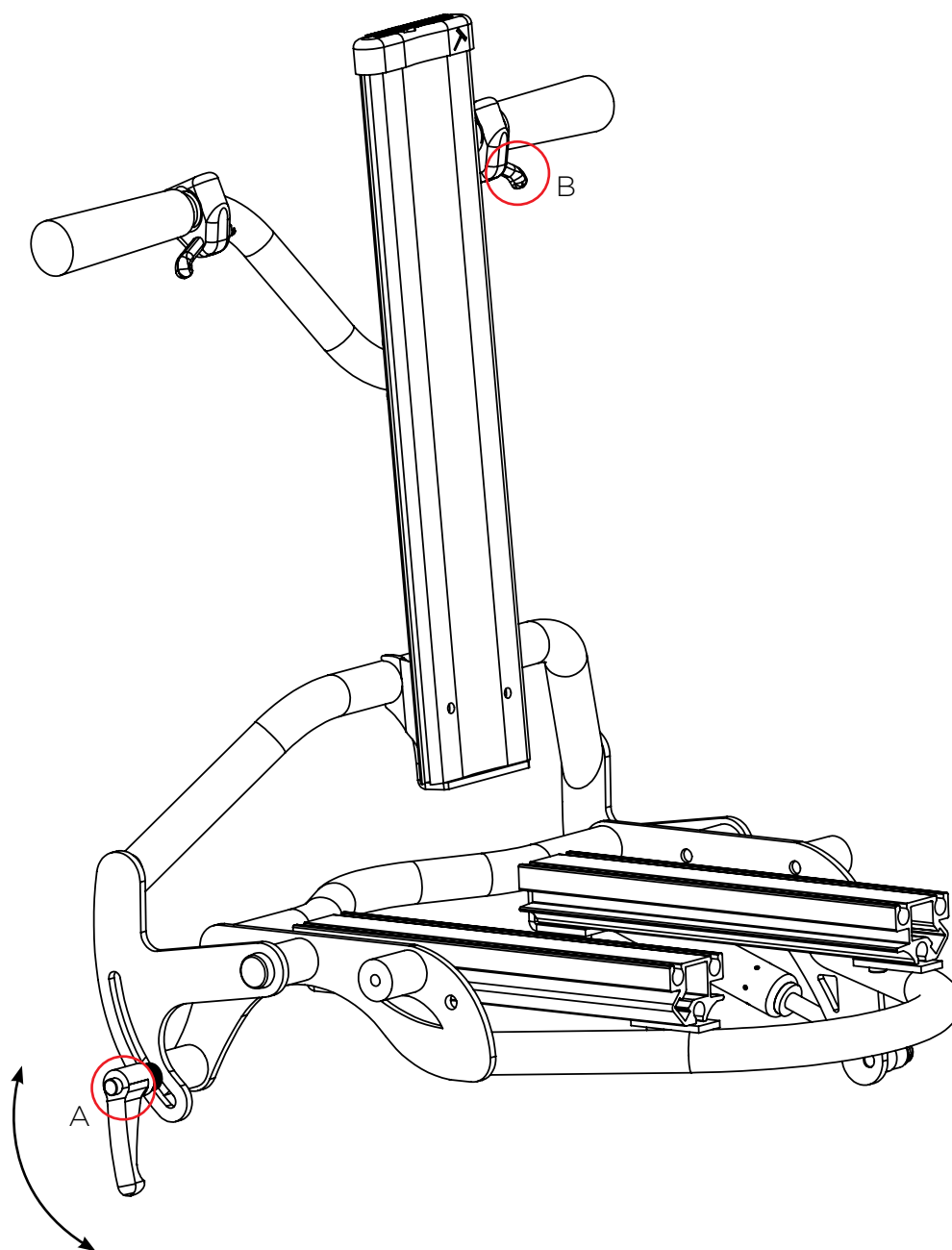

Huom! Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat vapaasti säädön jälkeen! Muista kiristää turvaruuvi!

Istuinyksikön kallistaminen


Kun on tarpeen säätää istuimen kallistusta, tartutaan tukevalla otteella työntökahvasta ja samalla painetaan kaasujousen liipaisinvipua (A). Istuin säädetään haluttuun kulmaan ja liipaisinvipu (A) vapautetaan. Tulee varmistaa, että potilas on säädön tekemisen aikana valvonnassa siten, ettei hän joudu puristuksiin eikä pääse loukkaantumaan.

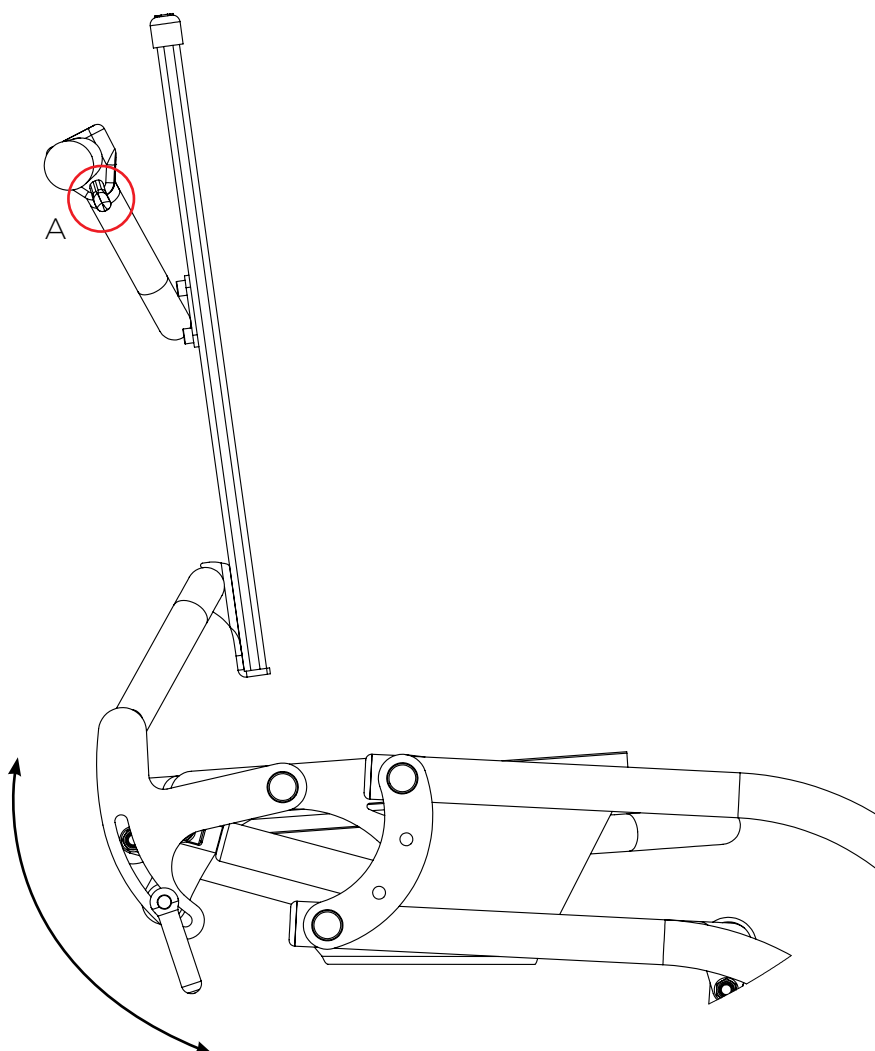

Huom! Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat vapaasti säädön jälkeen!

Lannetuki

Lannetuki asennetaan selkänojaprofiiliin alaosaan. Asenna tapit (A) paikoilleen ja liu'uta lannetuki halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit (B). Säädä kulmakannatin haluttuun kohtaan sivuttaissuunnassa. Kiristä nuppi (C). Säädä lannetuet syvyysuunnassa sopiviksi ja kiristä nuppi (D).

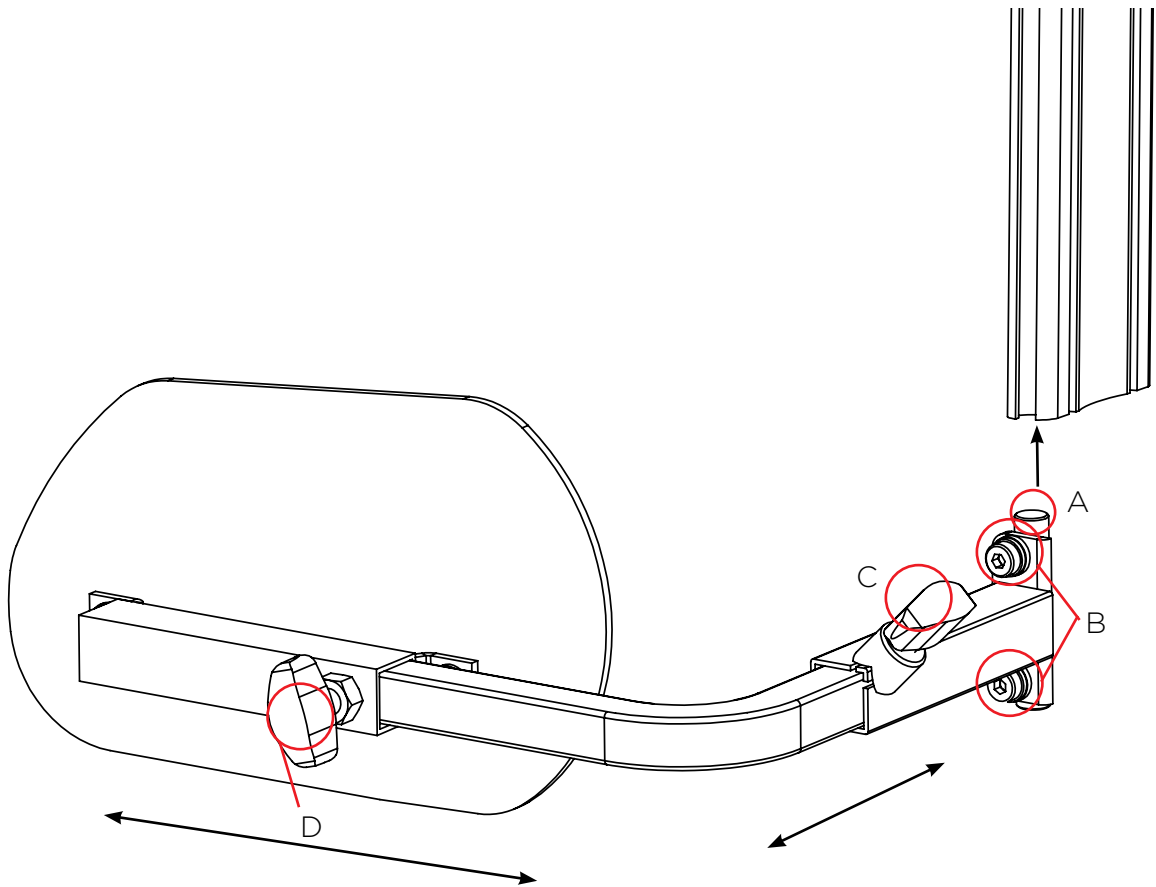

Käsinoja

Käsinojan asentaminen


Käsinoja asennetaan pystyprofiilin taakse kuvassa esitetyllä tavalla ja säädetään halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit (A) tiukalle.

Leveyssäätö

Avaa nuppi (B), säädä haluttuun leveyteen ja kiristä nuppi tiukalle.

Syvyyssäätö

Avaa nuppi (C), säädä haluttuun kohtaan ja kiristä nuppi tiukalle.

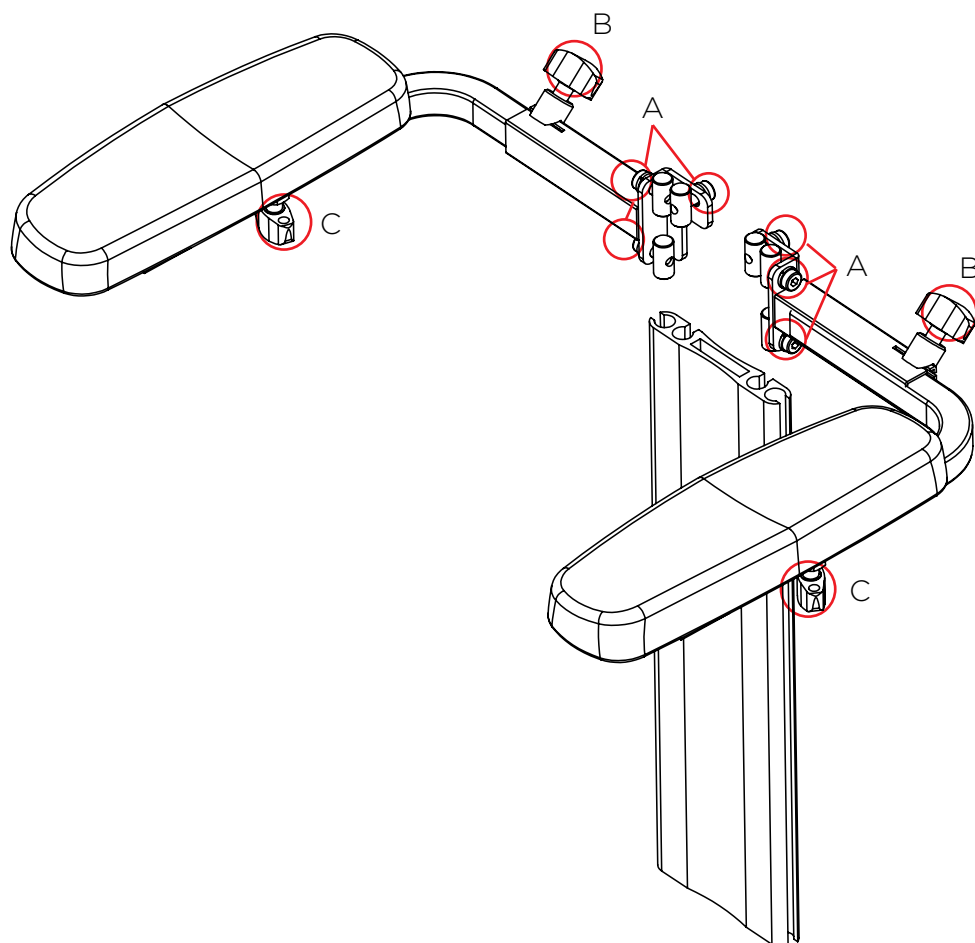


Runkokäsinoja

Asennus mekaaniseen alustaan

Käsituki asennetaan sivulevyyn (A). Aseta ruuvit (B) senkattuihin reikiin levyssä, aluslevyn (C) läpi sekä käsinojan levyssä oleviin kierteisiin.

Folding of the armrest

Vedä käsinojaa sivulle ja ylös. Kierrä kannatinta sitten poispäin rungosta, kunnes kannatin kiinnittyy seuraavaan koloon.

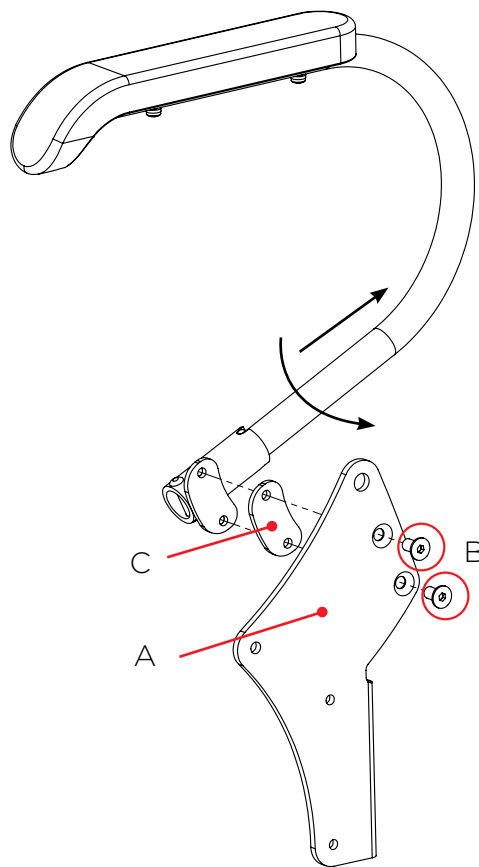


Mounting on a hydraulic/electric chassis

Käsinoja asennetaan sivulevyyn (A). Asenna ruuvit (B) levyssä oleviin keskireikiin ja käsinojassa oleviin kierteytettyihin reikiin.


Käsinojan taittaminen

Vedä käsinojaa sivulle ja ylös. Kierrä kannatinta sitten poispäin rungosta, kunnes kannatin kiinnittyy seuraavaan koloon.

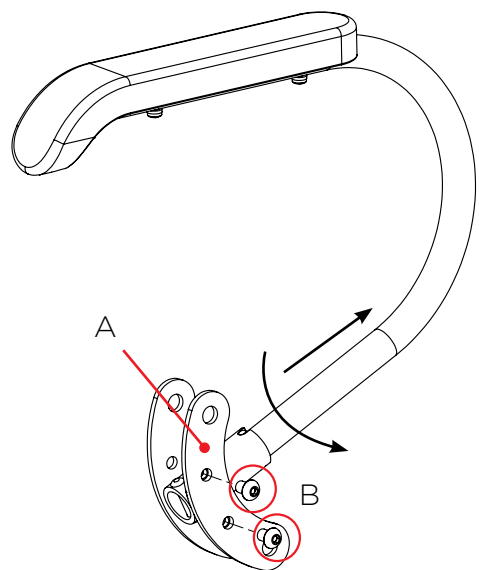

Työntökahva

Avaa ruuveja (A) sen verran, että pääset liu'uttamaan kannattimet (B) profiiliin (C).
Säädä kahva halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (A) tiukalle.

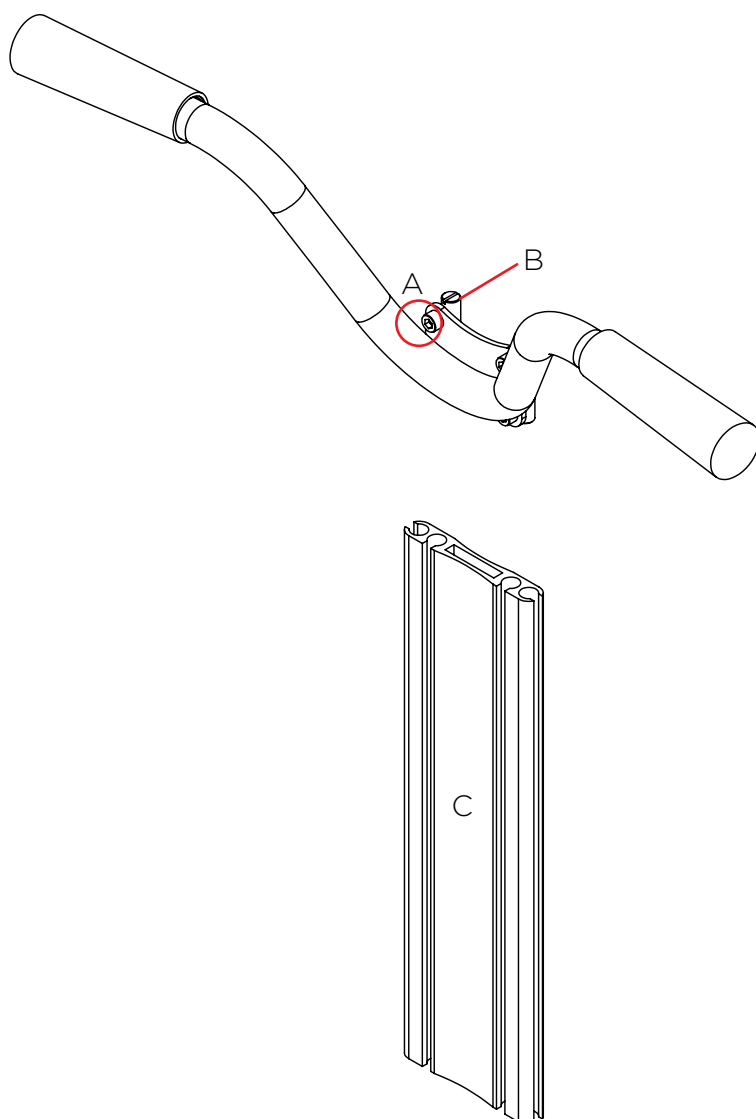

Huom! Tarkista, että kaasujousen vapauttimeen tulevat vaijerit liikkuvat vapaasti säädön jälkeen!


Päätuki

Päätuen asentaminen ja säätäminen

- Poista profiilissa oleva suojakansi.
- Asenna päätuen kannatin profiiliin.
- Avaa ruuveja (B) sen verran, että pääset siirtämään kannatinta kädellä.
- Säädä väli (A) sopivaksi potilaan istuessa tuolissa.
- Kiristä kaikki ruuvit ja kiristysnuppi tiukalle ja asenna suojakansi takaisin profiilin päälle.

Päätuen irrottaminen on helppoa:

- Avaa vipua (C) voidaksesi irrottaa päätuen.

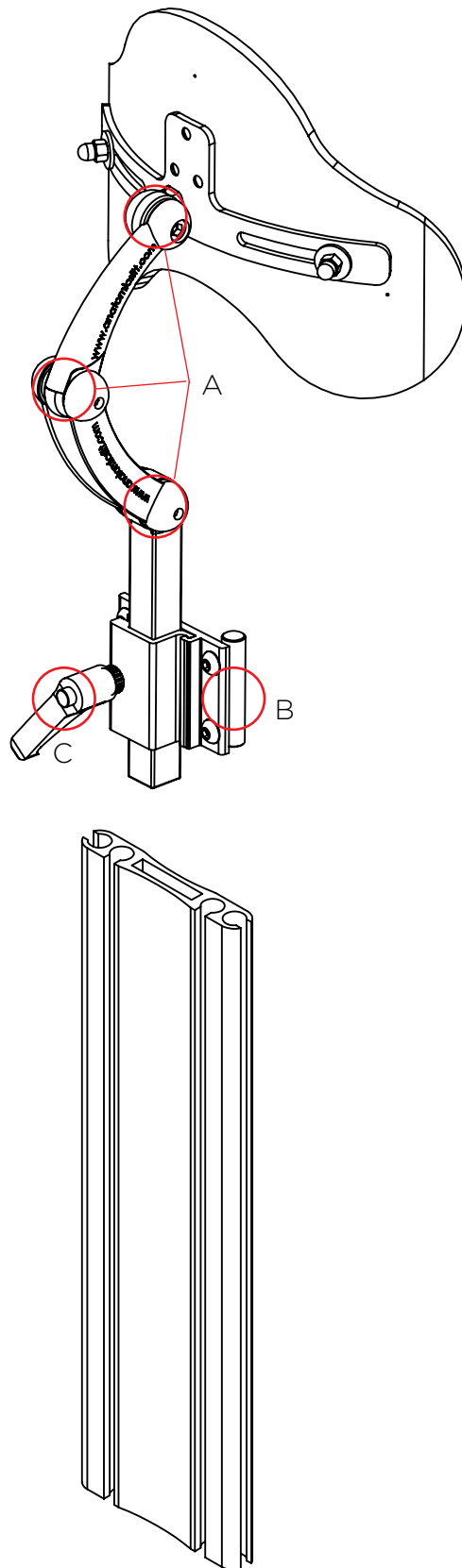


Kannattimien asentaminen

Vöiden (sternumliivi, nelipistevyö) asennus/säätäminen

Asennus:


Yläkannatin (kuva 1)

- Poista profiilissa oleva suojakansi.
- Asenna yläkannatin kuvassa 1 esitetyllä tavalla.
- Avaa solki (A), työnnä hihnat kannattimessa olevan hahlon sekä soljen läpi ja sulje solki.

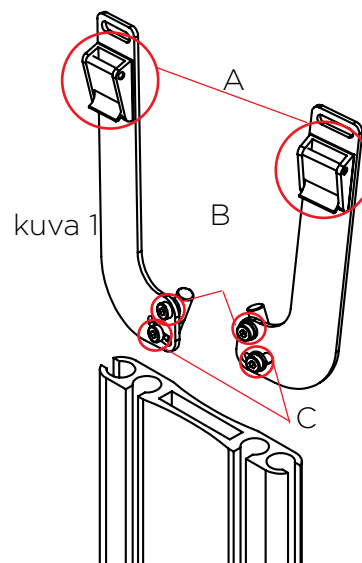


Alakannatin nelipistevyölle ja sternumliiville (kuva 2):

Alakannatin sisältyy aina tuolin perusvarustukseen. Hihna lukitaan triglide-liukusoljella kuvassa 3 esitetyllä tavalla.

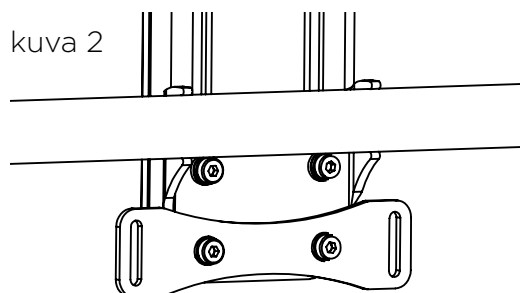

kuva 3

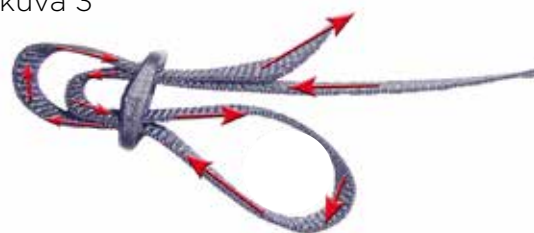

Adjustment:

Aseta potilas istuimeen ja avaa kuusiokoloruuvia, jotka on kuvassa 1 merkitty kirjaimella C. Säädä haarat niin, että veto- kulma yläasennuspisteissä on samalla korkeudella olkapäiden kanssa.

- Kiinnityksen tulisi vastata kuvassa 1 esitettyä asentoa.
- Säädä kappaleet haluttuun leveyteen niitä oikealla tai vasemmalle kääntämällä (varmistu, että niskalle jää riittävästi tilaa). Kiristä ruuvit, jotka on kuvassa 1 merkitty kirjaimella C.
- Säädä pehmusteiden korkeus siten, että paine tasaantuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Jälkitarkastus

- Varmista, että niskalle jää riittävästi tilaa.
- Tarkista hihnan kireys
- Tarkista pehmusteiden sijainti.



Varmista! Että niskalle jää riittävästi tilaa.


Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

- Asenna jalkatuki kuvassa esitetyllä tavalla.
- Kiristä ruuvi tiukalle (A)

Polvikulman säätäminen


- Avaa vipua (B).
- Säädä haluttuun kulmaan.
- Kiristä vipu tiukalle.

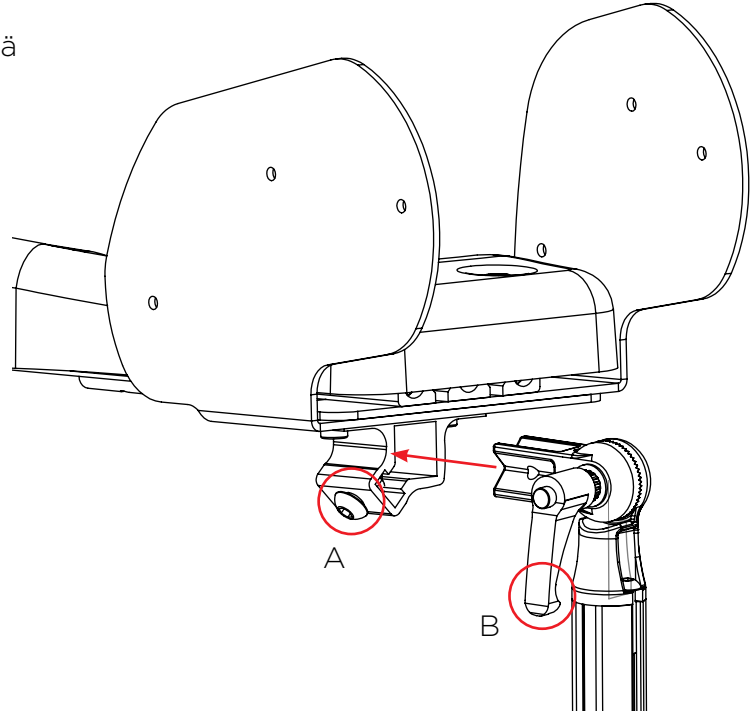

Kiinteän jalkatuen asennus

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) avataan sen verran, että tukea voidaan siirtää profiililla. Sen jälkeen säädetään haluttu korkeus ja vipu kiristetään tiukalle.

Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (B). Kulma säädetään ja ruuvi (B) kiristetään tiukalle.

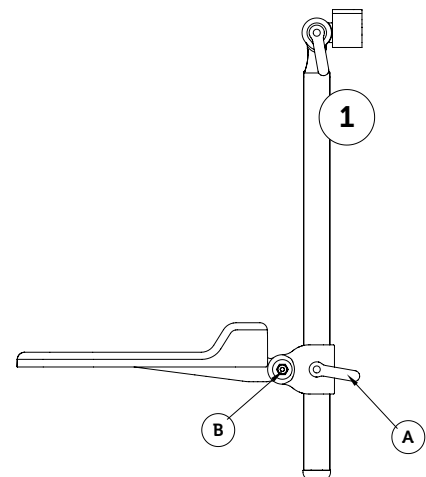


Joustavan jalkatuen asennus

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi ruuvia (D) avataan ja säädetään haluttu korkeus.

Kiristä ruuvi (D) tiukalle.

Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (C).

Kulma säädetään ja ruuvi kiristetään tiukalle.

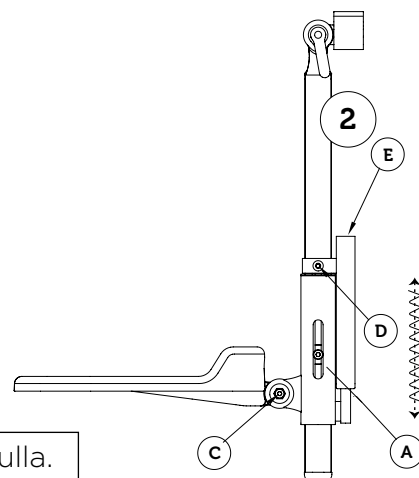

Vinkki! Jousen jäykkyyttä voidaan säätää ruuvin (A) avulla. Joustavan adapterin parhaan toiminnan kannalta profiiliin tulee olla pystysuorassa.

Ylös kääntyvän jalkatuen asennus


Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) avataan ja tuki säädetään haluttuun korkeuteen.

Vipu kiristetään tiukalle.

Jalkatuki taitetaan ylös etuosasta nostamalla.

Jalkatuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (B).


Kulma säädetään ja ruuvi (B) kiristetään tiukalle.

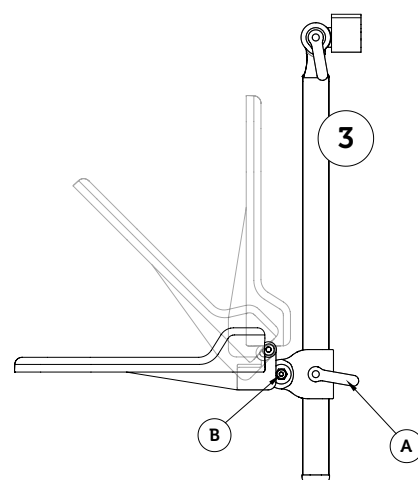

Saranoitu adapteri

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) avataan ja tuki säädetään haluttuun korkeuteen. Vipua kiristetään tiukalle.

Saranatoimintoa käytetään avaamalla ruuveja (B) ja (C) ja säätämällä tuki haluttuun asentoon. Ruuvit (B) ja (C) kiristetään tämän jälkeen tiukalle.

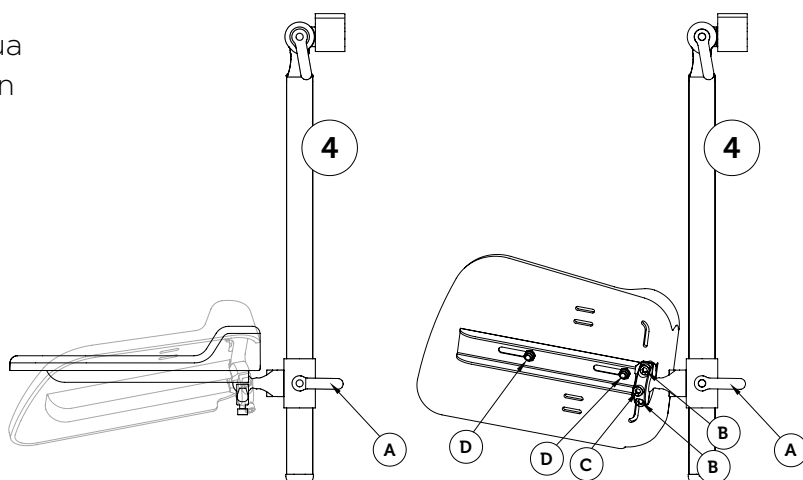

Säätääksesi jalkalevyn syvyyttä, löysää ruuvit (D). Aseta haluttuun paikkaan ja kiristä ruuvit huolella.

Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen

Ennen pohjetuen asentamista on mahdollinen asennettu jalkatuki poistettava. Avaa ruuvia (F), jolla jalkatuki kiinnittyy profiiliin ja vedä jalkatuki sitten alakautta irti.


Pohjetuki asennetaan liu'uttamalla osa (C) profiiliin, säätämällä halutulle korkeudelle ja kiristämällä ruuvit (E) tiukalle. Tämän jälkeen jalkatuki asennetaan takaisin paikalleen.

Pohjetuen korkeuden säätäminen

Pohjetuen korkeutta säädetään avaamalla ruuveja (E), minkä jälkeen tuki säädetään halutulle korkeudelle. Ruuvit (E) kiristetään tiukalle.

Pohjetuen leveyden säätäminen


Pohjetuen leveyttä säädetään avaamalla ruuveja (A), minkä jälkeen tuen leveys säädetään halutuksi. Ruuvit (A) kiristetään tiukalle.

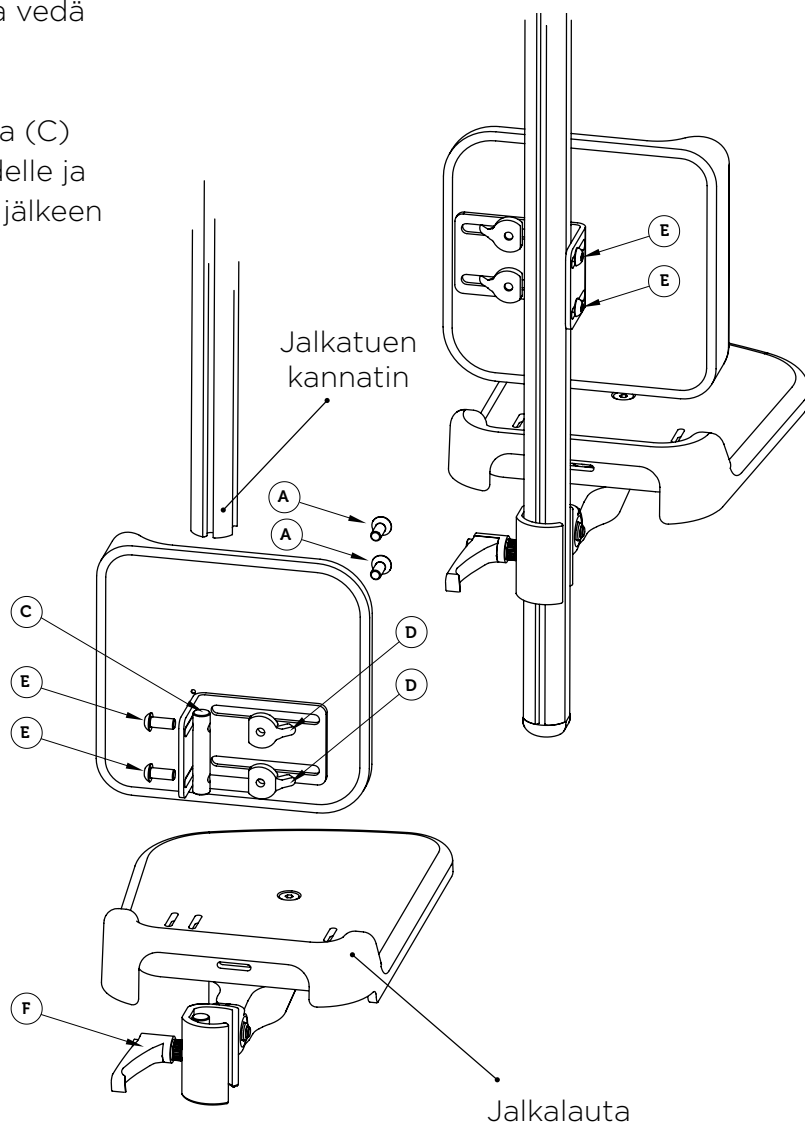

Alusastia


Alusastian asentaminen

Alusastia asennetaan paikalleen istuinosan alla oleviin kiskoihin (A) takaa. Alusastia työnnetään perille asti, kunnes se pysähtyy etuputkea vasten.

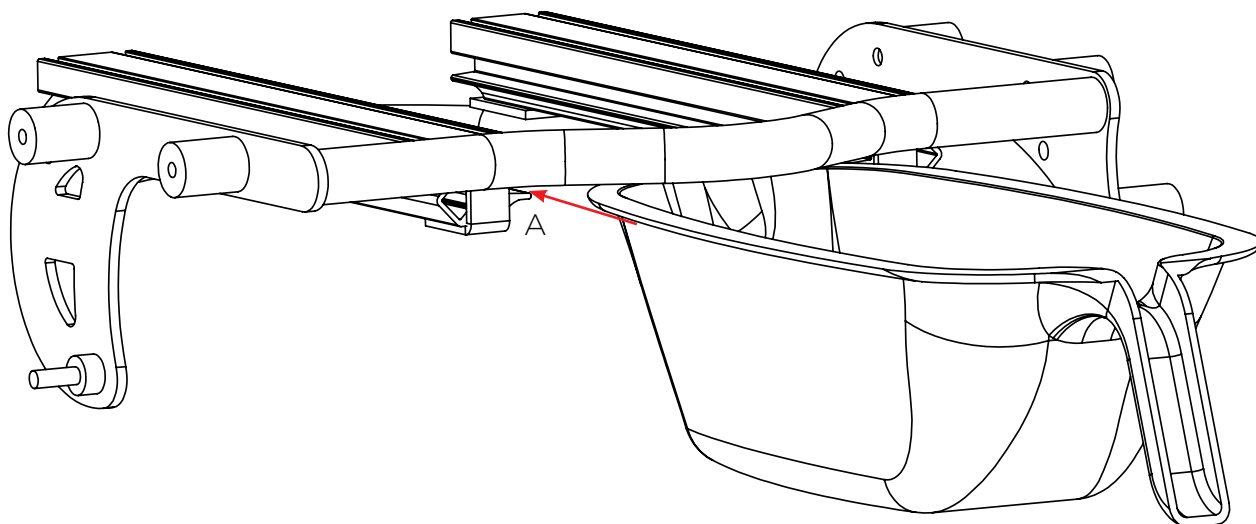

Virtsasuojus

Virtsasuojus asennetaan paikalleen kiilaamalla se jalkaosien väliin. Virtsasuojuksen korkeus säädetään potilaalle sopivaksi. Mikäli käytetään alusastiaa, leikataan virtsasuojuksen alaosa pois siten, että sen pohja lepää alusastian pohjan päällä.

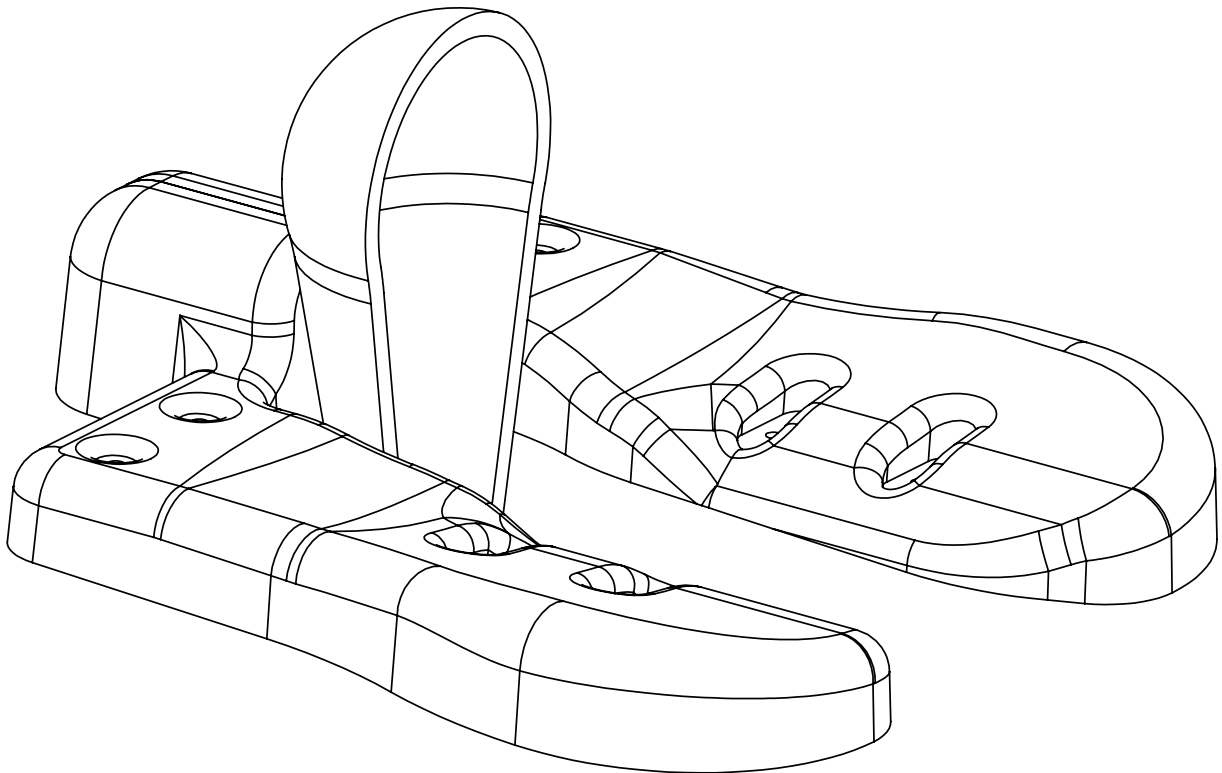

Huolto ja kunnossapito

Huolto

Zitzi Starfish Pro -suihkutuolin turvallinen ja moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa. Huollontarve on riippuvainen käytöstä ja kulumisesta. Kaikki liikkuvat osat ja kiinnitykset tulee tarkastaa säännöllisesti. Zitzi Starfish Pro -suihkutuolin kunnostamiseen tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä Anatomic SITT AB:n toimittamia osia. Työ tulee aina suorittaa ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön toimesta. Voitte aina kääntyä Anatomic SITT AB:n puoleen neuvoja tarvitessanne.

Puhdistus- ja pesuohjeet

Muovi- ja metalliosat pyyhitään kostealla rievulla tai pestään antibakteerisella pesuaineella tai vastaavalla. Ajattele vihreästi, ajattele ympäristöä! Käytä biologisesti hajoavia pesuaineita.

Vöiden pehmusteet pestään 60°C hienopesussa. Niitä ei saa laittaa kuivausrumpuun, mutta ne voidaan laittaa kuivauskaappiin. Tarkista ohjeet tuotteen pesuohjelapusta. Sama ohje pätee Anatomic SITT AB:n muihin asentovöihin.

Irrota istuin- ja selkäpehmusteet kylvyn/suihkun jälkeen, jotta ne kuivuvat.

Tarkista kunto säännöllisesti ja huolla tarvittaessa.

Kaasujousi

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti, jotta se pysyy toimintakykyisenä. Jos tuotetta ei käytetä, tulisi kaasujousi aktivoida vähintään kerran 6 kuukaudessa. Lisäksi tuote tulisi säilyttää niin, että kaasujousen varsi on alaspäin. Muuten kaasujousen sinetti voi mennä rikki ja kaasujousi lakata toimimasta.

Työkalut

Työkalu (kuusiokoloavain 4 mm) on integroituna selkäprofiilin yläpäädyssä.

Takuu

Yksi vuosi valmistusvirheiden osalta.

Yhdistelmät

Zitzi Starfish Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita, jotka voidaan yhdistää kaikkiin tässä ohjekirjassa kuvattuihin lisävarusteisiin. Muiden yhdistelmien osalta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.

Varaosat

Zitzi Starfish Pro -suihkutuolin CE-merkinnän voimassasäilyminen edellyttää Anatomic SITT AB:n toimittamien varaosien käyttämistä.

Kunnostaminen

Kunnostaminen on sallittua ainoastaan Anatomic SITT AB:n alkuperäisvaraosia käyttäen.



Huom! Kunnostamisen yhteydessä tulee aina ennen uusille käyttäjille lähettämistä varmistaa, ettei laite ole tilaustyönä kustomoitu.

Merkinnät

Zitzi Starfish Pro sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sarjanumero on merkitty kilpeen, joka sijaitsee istuinosan alla. Tämä numero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa yhteydenpidossa.

Kierrätys

Käytetty osa tai tuote tulee hajottaa ja purkaa, ja osat erotella materiaalityypin mukaan – metalli, muovi ja poltettava jäte (tekstiilit). Kaasumäntä lajitellaan haitallisena materiaalina.

Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Seurantatarkastukset

Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti. Seuraa- vat kohdat on tarkistettava jokaisella kerralla, kun potilas käyttää istuinapuvälinettä.

- Kussakin kohdassa mainitut tarkastustoimenpiteet tulee suorittaa säännöllisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.
- Tarkista hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus säännöllisesti.
- Istuinta ei saa kallistaa liiaksi eteenpäin potilaan istuessa siinä.

Sovittaminen ja yksilöllinen muuntaminen

Ohjeita ja suosituksia

Aina kun Zitzi Starfish Pro -suihkutuoliin tehdään jollakin tavalla muutoksia, on suoritettava arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä sovittaminen vai yksilölliseksi muuntaminen (kustomointi).

Sovitus on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut muutokset ovat kustomointia. Sovitukset kuuluvat ainoastaan tehtävään päteväksi katsotun henkilön toimesta ja aina suoritettava ammattitaitoisesti. CE-merkintä tarkoittaa tuotteen täyttävän kaikki keskeiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi käyttäjä sovituksen jälkeen.

Tuote tulee varustaa ilmoituksella, joka kertoo sen olevan sovitettu tietylle käyttäjälle siten, ettei sitä voida vahingossa katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.

Sallitut muutostyöt Starfish Pro:

Jalkatuen profiilin katkaisu

Profiili voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle sopivaksi.

Käsinojan profiilin katkaisu

Metallitanko voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle sopivaksi.

Selkänojanprofiilin katkaisu

Selkänojaa kannatteleva profiili voidaan katkaista lyhyemmäksi paremmin potilaalle sopivaksi. Profiilia ei milloinkaan saa lyhentää niin paljon, että selkäosan kiinnitys profiiliin estyy.

Pissasuojan leikkaus.

Pissasuojaa voidaan leikata haluttuun pituuteen.

Myyntiehdot

Takuu

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu mitätöityy, jos tuotteelle on aiheutettu ulkopuolisista tekijöistä johtuvia vaurioita tai sitä on käsitelty huolimattomasti. Takuuvaatimuksen käsittely edellyttää viallisen tuotteen palauttamista valmistajalle. Mukaan tulee aina liittää alkuperäisen toimituksen pakkauslipuke.

Takuuvaatimukset

Vika ja sen mahdollinen aiheuttaja tulee kuvata mahdollisimman tarkkaan. Vaatikaa takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Mukaan tulee liittää kopio laskusta ja maininta, että tuote on palautettava käyttäjälle korjausten jälkeen. Tätä varten tulee ilmoittaa toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteiden palauttaminen

Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet on palautettava 20 päivän sisällä toimituksesta. Mukaan tulee aina liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että laskusta. Tuotteiden palauttamisen syy on mainittava.

Varmistakaa, että tuote pakataan siten, että se on suojattu iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysnumero yhteydenpidossa/dokumentaatiossanne. Lähetys voidaan tämän avulla jäljittää, mikäli kuljetuksessa ilmenee ongelmia.

Tuotteille, jotka on palautettu yli 20 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 80 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 60 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 60 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 150 päivän kuluttua toimituksesta

hyvitys on 40 % laskun summasta

Tuotteille, jotka on palautettu yli 360 päivän kuluttua toimituksesta

tuotteesta ei anneta hyvitystä



Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa

Tekniset tiedot Starfish Pro

KÄYTTÄJÄTIEDOT

Käyttäjän pituus:

n. 120-145 cm

140-175 cm

170-200 cm

Runko istuinosan kanssa	Istuinosa koko 1	Istuinosa koko 2	Istuinosa koko 3
Istuimen syvyys	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Istuimen leveys	380 mm	450 mm	510 mm
Jalkaosan leveys, sis. tyyny	380 mm	450 mm	510 mm
	Erillinen istuinosa koko 1	Erillinen istuinosa koko 2	Erillinen istuinosa koko 3
Istuimen syvyys	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Istuimen leveys	350-410 (480*)mm	380-440 (510*)mm	390-450 (520*)mm
Jalkaosan leveys, sis. tyyny	165 mm	185 mm	200 mm
Hygienia-aukon koko	50-110 (180*)mm	40-100 (170*)mm	30-90 (160*)mm
WC-pöntön korkeus, man. runko	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
WC-pöntön korkeus, hydraul./sähkö	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Istuinkorkeus, man. runko	53-63 cm	53-63 cm	53-63 cm
Istuinkorkeus, hydraul./sähkö	53-78 cm	53-78 cm	53-78 cm
Kallistus	-5-30 grader	-5-30 grader	-5-30 grader
Lantio/selkänojakuulma	-10-35 grader	-10-35 grader	-10-30 grader
Alustarunko, leveys	540 mm	540 mm	590 mm
Alustarunko, pituus	690 mm	690 mm	790 mm
Pyörät	100 mm	100 mm	100 mm
Maavara	65 mm	65 mm	65 mm
Paino sis. päätuen, jalkatuen, käsinojan	31 kg	33 kg	35 kg
Käyttäjän maksimipaino man. runko:	120 kg	120 kg	150 kg
Käyttäjän maksimipaino hydraul./sähkötoim. runko:	100 kg	100 kg	120 kg

* Istuinosat asennettu ulompiin kiskoihin

SELKÄNOJA

Stl. 1: Selkänojan korkeus: 460 mm
Selkänojaprofiili: 500 mm

Stl. 2: Selkänojan korkeus: 560 mm
Selkänojaprofiili: 600 mm

Stl. 3: Selkänojan korkeus: 660 mm
Selkänojaprofiili: 700 mm

SIVUTUKI

Stl. 1: Vartalon leveys: 210-300 mm
Vartalon syvyys: 140 mm

Stl. 2: Vartalon leveys: 240-340 mm
Vartalon syvyys: 170 mm

Stl. 3: Vartalon leveys: 300-400 mm
Vartalon syvyys: 200 mm

Sivuttaissäätö +/- 85 mm

JALKATUKI

Jalkalauta (lev. x syv.)

Jalkatuki koko 1
345 x 225 mm

Jalkatuki koko 2
380 x 255 mm

Jalkatuki koko 3
380 x 310 mm

Jalkalauta (lev. x syv.)

Erill. jalkatuki koko 1
160 x 220 mm

Erill. jalkatuki koko 2
180 x 255 mm

Erill. jalkatuki koko 3
180 x 305 mm

Profiilin pituus

300 mm

400 mm

500 mm

SE

Anatomic SITT AB (manufacturer)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Visiting address

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Tel: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

