



SOFT PRO SERIES

Plus-/Mini-päätuki



Valmistaja:

Sunrise Medical, European Operations
West Midlands, UK



*Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan päätukena.
Mikäli halutaan muita käyttöjä, ottakaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.*



Besöksadress Stohagsgatan 26, 602 29 NORRKÖPING
Postadress Box 6137, 600 06 NORRKÖPING, tel. 011-16 18 00, fax 011-16 20 05
www.anatomicsitt.com

- 2.1 Tärkeitä huomioitavia seikkoja
- 2.2 Päätuen säätäminen
- 3.1 Asennuskannatin
- 3.2 Asennuskannatin 15x15
- 4.1 Joustoadapteri päätuen kannattimelle
- 5.1 Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle
- 5.2 "PRO" - kannatinjärjestelmä
- 5.3 "Linx"-kannatinjärjestelmä
- 5.4 Tukityynyn asentaminen
- 6.1 Kuulatangon asentaminen
- 6.2 Dynaaminen otsapanta
- 7.2 Aktiivinen otsapanta
- 8.1 Kasvojen sivutuen asentaminen
- 8.2 Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki
- 8.3 Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö
- 9.1 Seuranta
- 9.2 Kunnossapito
- 9.3 Hävittäminen
- 9.4 Yhteenveto/tarkastus
- 9.5 Varaosat
- 9.6 Takuu
- 9.7 Yhdistelmät

Päätuen kokeilu



Tärkeää

- * PLUSH/Mini-päätuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän lääkintähenkilökunnan tehtäväksi.
- * Päätukea tulee käyttää ainoastaan täydellisen, pään tukeamiseen tarkoitetun istuinjärjestelmän osana.
- * Ennen päätuen asentamista tulee käyttäjän tarpeet tutkia huolellisesti.

Istuma-asentoa määritettäessä suoritettavat kontrollit:

Monilla käyttäjillä on asymmetrinen istuma-asento ja/tai lantion taipumus siirtyä eteenpäin (kyfoottinen istuma-asento).

- * Aloita tarkistamalla, muuttuuko pään asento päivän aikana. Mikäli näin on, käyttäjä tarvitsee enemmän tukea päälle.
- * Tarkista lantion asento. On tärkeätä saada pään asento oikeaksi, koska se perustuu selän ja lantion asentoon. Käytä tarvittaessa tyynyä tai istuinvyötä asentotukena.
- * Tarkista, tarvitseeko käyttäjä tukea rintakehälle ja/tai olkapäille. Käytä tarvittaessa nelipistevyötä tai sternumliiviä.
- * Tarkista niskan ja pään liikkumisalue. Tarkista, ovatko asentovirheet pysyviä vai voidaanko niitä korjata.
- * Tarkista käyttäjän lihasjännitys ja pään asento.

2:1) Tärkeitä huomioitavia seikkoja

Oikealla olevassa kuvassa osoitetaan tärkeät kohdat, jotka on huomioitava tukea asennettaessa/kokeiltaessa.

Päätuen tulisi tukea päätä kohdissa A & B.

Vältä painon kohdistamista

C – Kartiolisäkkeeseen
(*Processus mastoideus*)

D – Kaulavaltimoon


E – Leukaan

A) Takaraivo

B) Niska

C) Kartiolisäke

D) Kaulavaltimo

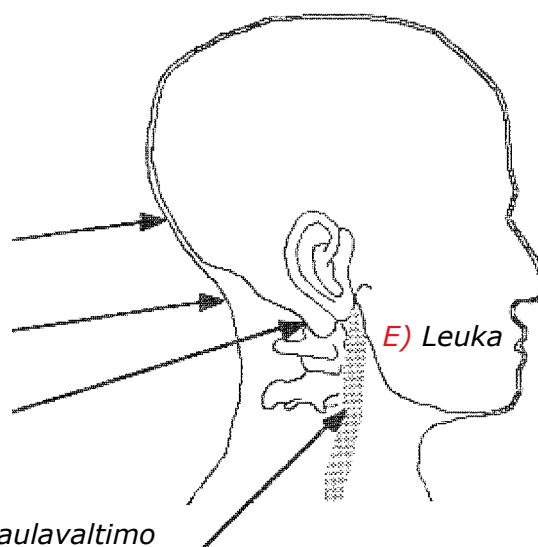

Varoitus!

Henkilöiden tapauksessa, joilla on vesipäisyys ja suntti, tulee konsultoida lääkäriä ohjeiden saamiseksi koskien sitä, kuinka paljon painoa suntin alueelle ja kaulan/niskan alueelle voidaan asettaa.

2.2 - Päätuen säätäminen

PLUSH-päätuki asennetaan palloniveleen, minkä johdosta säädettävyys on laajin mahdollinen. Pehmeuste koostuu pehmeästä ja jäykästä solumuovista. Tämä lisää mukavuutta ja vähentää ojentautumiseen liittyviä jännityksiä.

1. Adapterin korkeus.

2. Vaakatangon syvyys/kallistussäätö.

3. Päätuen säätö.

Kallistussäätö (3).



Koko päätuen syvyys/korkeussäätö (2).

Koko päätuen korkeussäätö (1).

3.1 - Asennuskannatin

Asennuskannatin




77038, 77039, 77041

A - Kuusiokoloruuvit

B - Tukikappale

C - Mutteri

D - Aluslevy

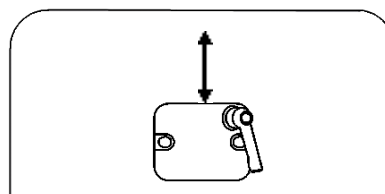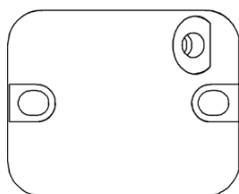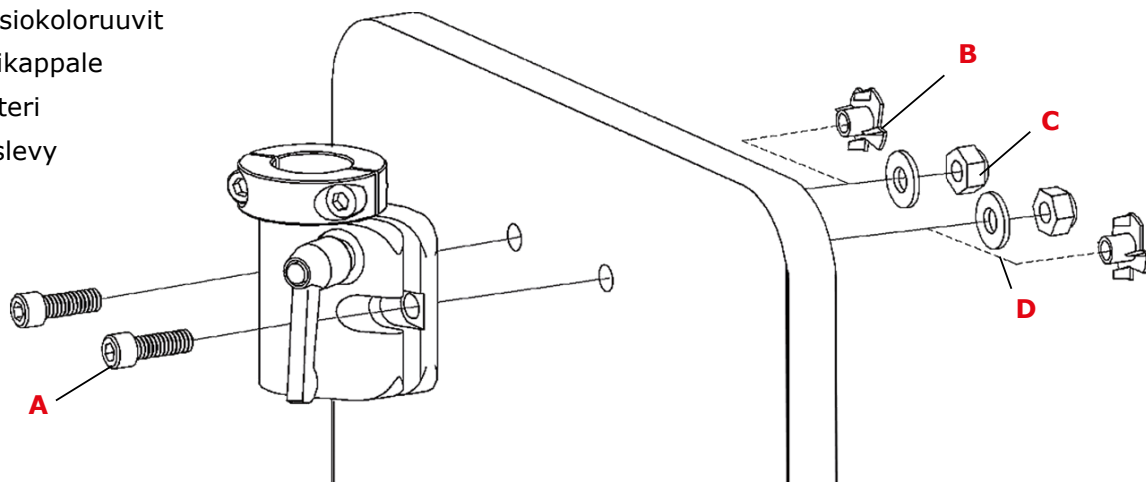

Suosittelu
asennuskorkeus
tuolin selkänojasta:
Pro - 50 mm
Linx - 220 mm
Lapsi - 50 mm

3.2 - Asennuskannatin 15x15

Asennuskannatin 15x15



70121

A - Kuusiokolokantaruuvi

B - Tukikappale

C - Mutteri

D - Aluslevy

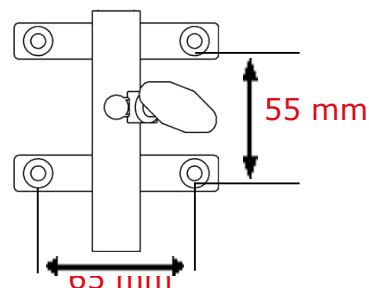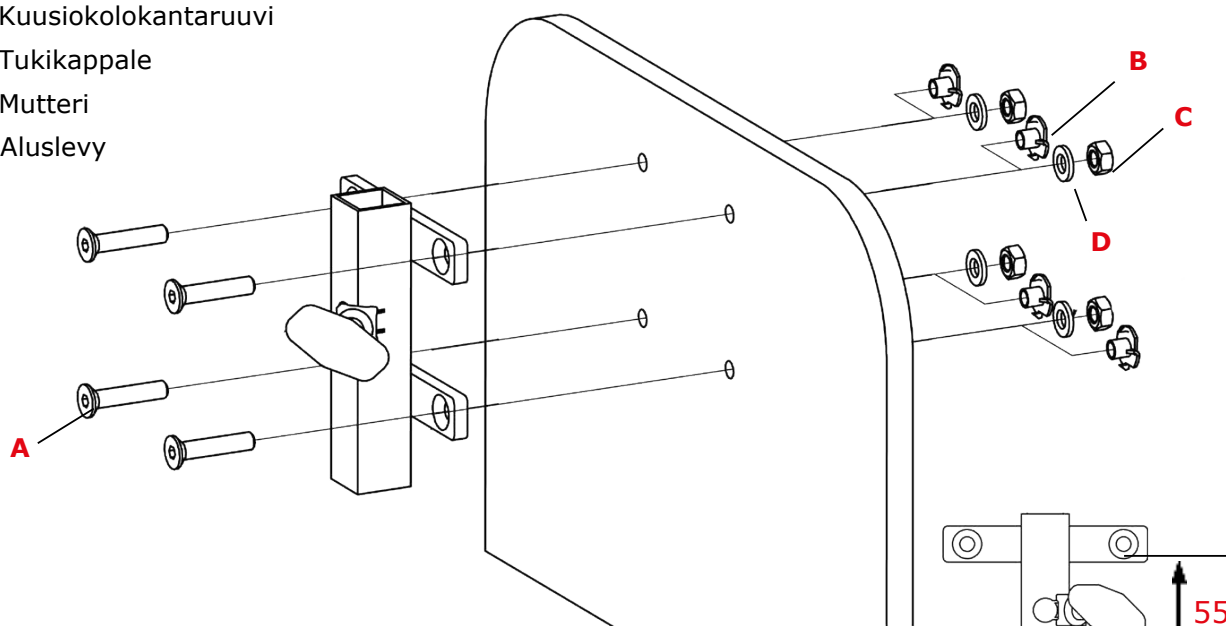

4.1 - Joustoadapteri päätuen kannattimelle

Joustoadapteri päätuen kannattimelle




77040

A - Kuusiokoloruuvit


B - Lukituskappale

C - Aluslevy

D - Mutteri

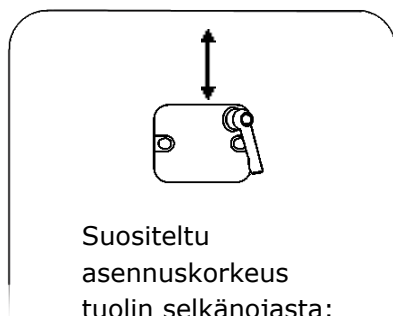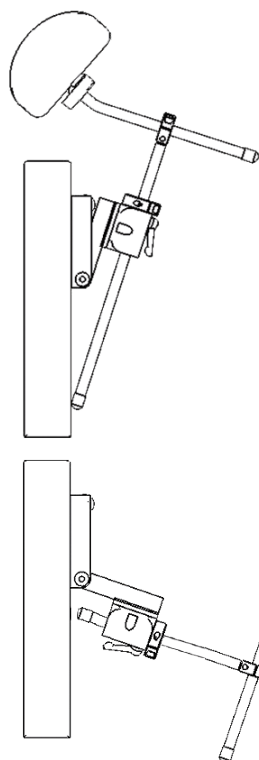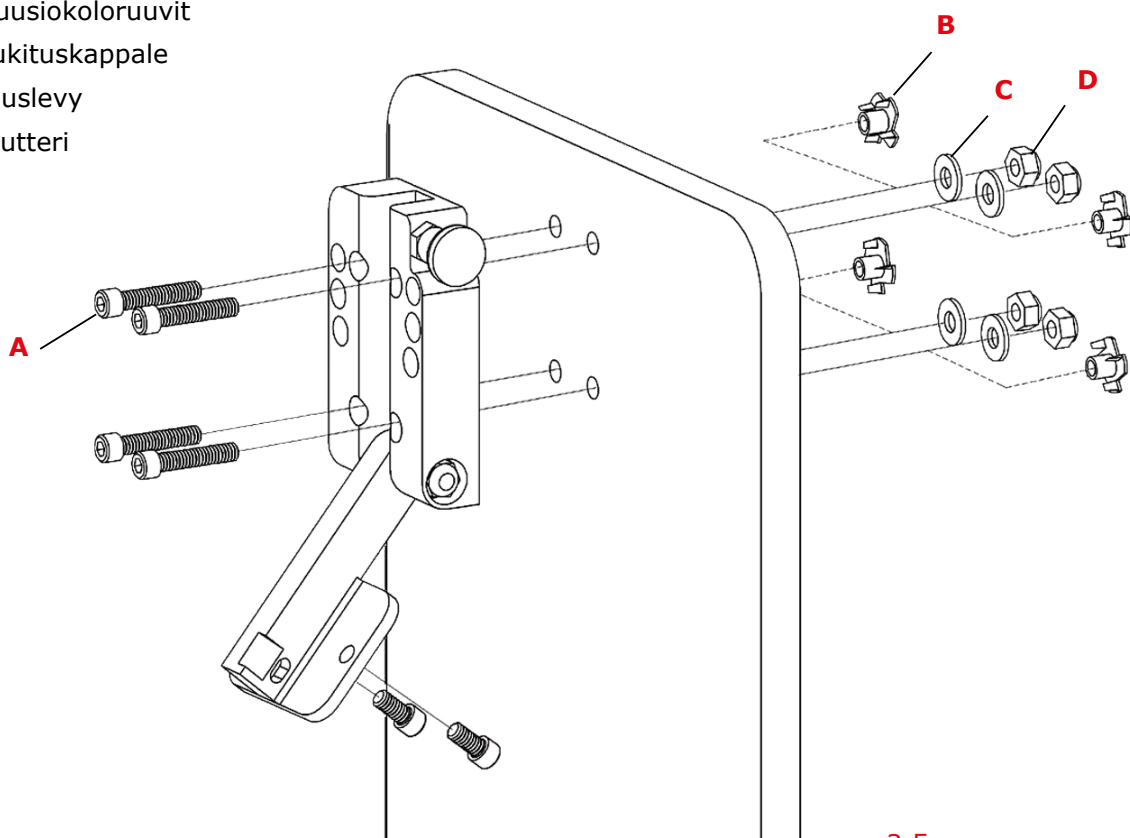

Suosittel
asennuskorkeus
tuolin selkänojasta:
Pro - 5 cm
Linx - 22 cm
Lapsi - 5 cm

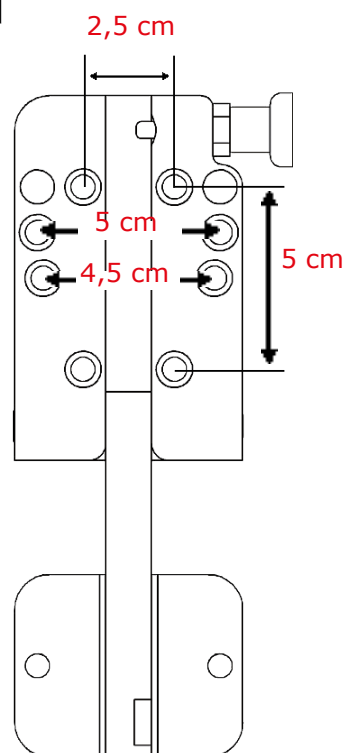


Huom:
Kannatinta voidaan lyhentää katkaisemalla se.

5.1 - Irrotettava asennuskappale kääntöversiolle

Päätuen kannattimen asentaminen

77038, 77039, 77041

Irrotettava päätuen kannatin asennetaan joustoadapteriin kuvan mukaisesti.



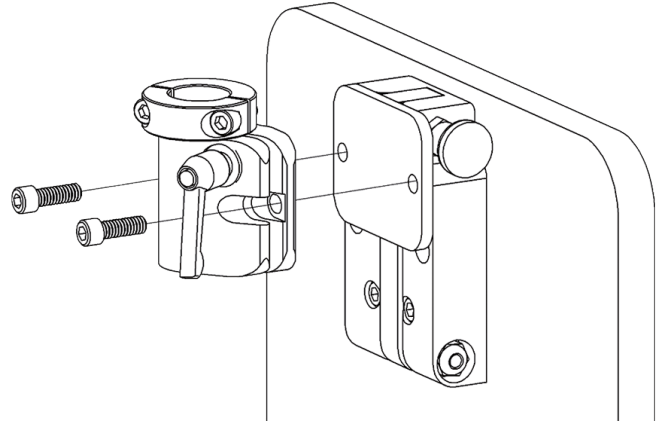


5.2 - "PRO" - kannatinjärjestelmä

Avaa vaakasäätökohdan suojus (B) ruuvitaltan tai kuusiokokoavaimen avulla


- A - Kuusiokolokantaruuvi kallistus- ja syvyyssäädölle
- B - Suojus
- C - Kiertymisenestorengas
- D - Kuusiokolokantaruuvi, kiertymisenestorengas
- E - Irrotettava kannatintanko (77021)
- F - Irrotettava kannatinosa Pro (77038)

- A - Kuusiokoloruuvit kallistus- ja syvyyssäädölle
- B - Suojus
- C - Kannatin (77028)
- D - Kiertymisenestorengas
- E - Kuusiokoloruuvit, kiertymisenestorengas
- F - Irrotettava kannatinosa Pro (70121)

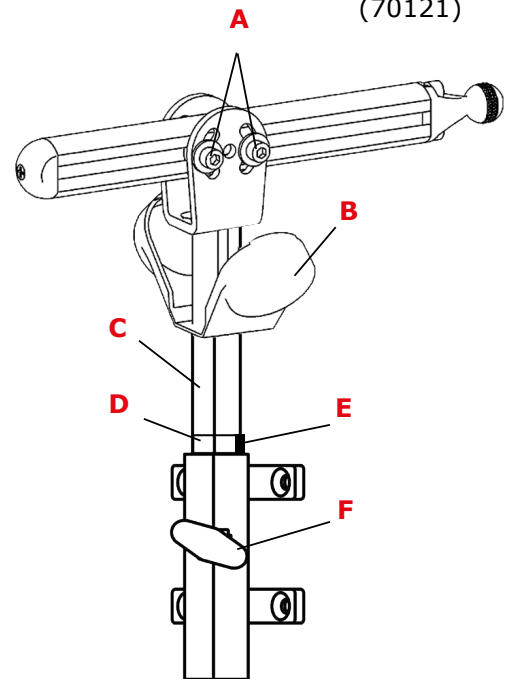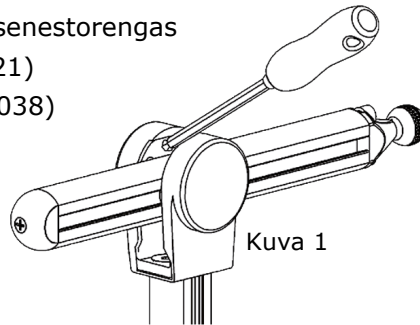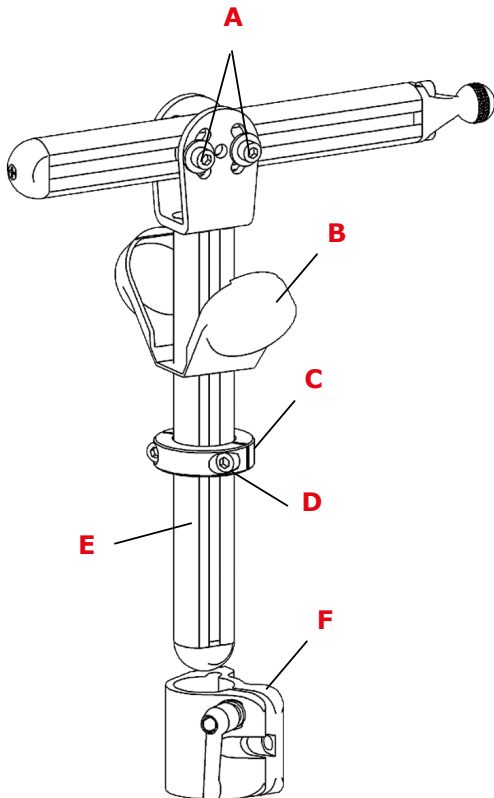


5.3 - "Linx"-kannatinjärjestelmä

- A – Kuusiokoloruuvi
- B – Kiertymisenestorengas
- C – Kuusiokoloruuvi korkeussäädölle
- D – Irrotettava kannatinosa Pro (77039)
- E – Kahva, irrotettava kannatinosa

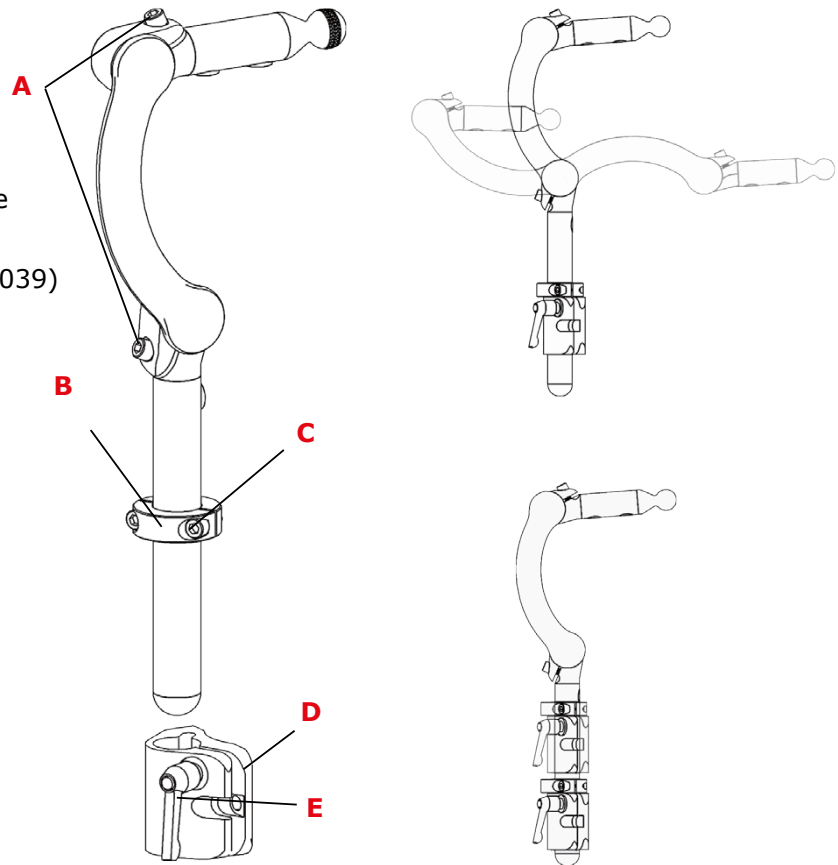

5.4 - Tukityynyn asentaminen

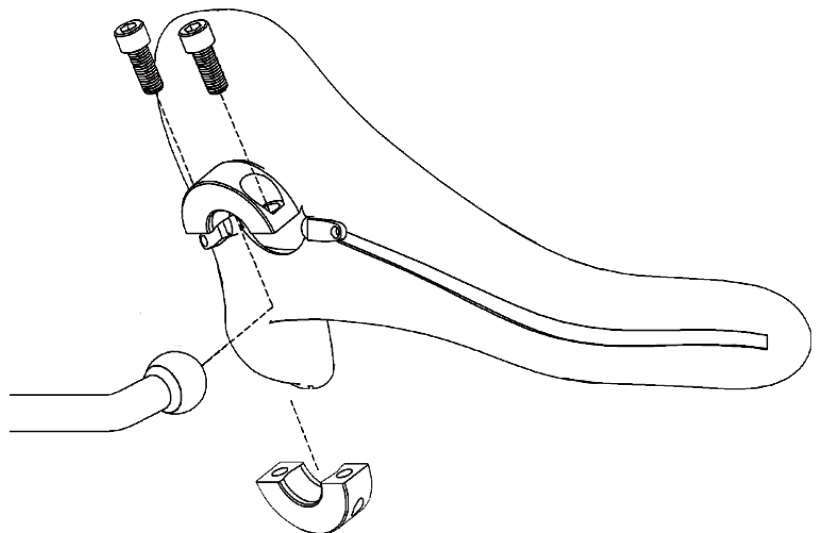

6.1 – Päätuکی



Tärkeää!

- * PLUSH/Mini-päätuken asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän terapeutin tai asentotukeen perehtyneen apuvälineteknologian toimittajan tehtäväksi.
- * Päätukeyä tulee käyttää ainoastaan täydellisen, pään tukemiseen tarkoitetun istuinjärjestelmän osana.
- * Ennen päätuken asentamista tulee käyttäjän tarpeet tutkia huolellisesti.

Tärkeää!

* PLUSH/Mini-päätuken asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän terapeutin tai asentotukeen perehtyneen apuvälineteknologian toimittajan tehtäväksi.

Sovittamista helpottaa, mikäli ainakin kaksi ihmistä osallistuu siihen. Toinen säätää päätukeyä ja toinen avustaa tukemalla käyttäjän pään haluttuun asentoon.

Kuva 1



Vaihe 1

Avaa ruuveja kohdissa A & B sen verran, että säätö on mahdollista tehdä käsin. Katso kuva 1.

Kuva 2



Vaihe 2

Työnnä päätukeyä varovasti eteenpäin, kunnes se koskettaa takaraivoa. Katso kuva 2. Kiristä ruuvit, ks. kuva 3.

Kuva 3



6.1 - Päätuoli

Vaihe 3




Kun säädöt on saatu sopiviksi, kiristä kaikki ruuvit. Varmista, että ruuvit kiristetään samaan kireyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen puolisko-kojen välit ovat yhtä suuret (ks. kuva).

Varmista, että ruuvit kiristetään samaan kireyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen puolisko-kojen välit ovat yhtä suuret.

A – Lukitusta tehostavat urat pallonivelessä ja kiristimessä.

B – Oikein kohdistettu – ruuvit yhtä kireällä

C – Väärä kohdistus.

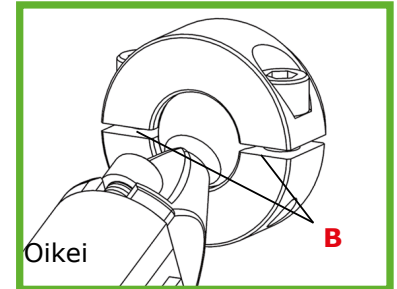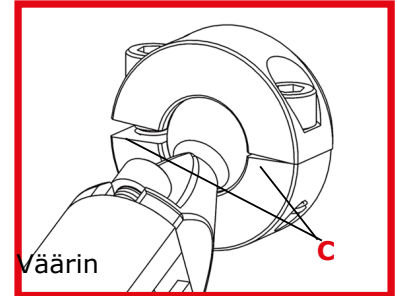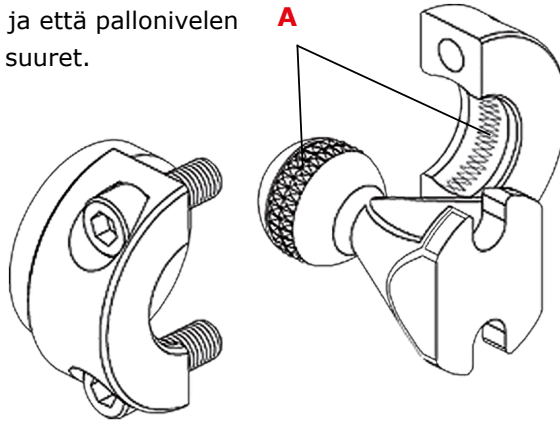

Vaihe 4

Pane muovisuojuks takaisin paikalleen, ks. A, kuva 5.

Kannatintankoa voidaan tarvittaessa lyhentää. Poista päätytulppa, katkaise tanko ja pane tulppa takaisin paikalleen.



Vaihe 5

Tarkkaile käyttäjää 15-30 minuutin ajan havainnoiden mahdollisia liikkeitä, jotka voisivat viitata kipuun tai epämukavuuteen. Varmista, ettei pää kaadu sivulle. Mikäli näin on, käyttäjä tarvitsee enemmän tukea istuessaan.

6.1 – Päätuiki




6.2 – Dynaaminen otsapanta


Dynaaminen otsapanta aikuiselle ja lapselle

77101 / 77102

- 1)** Varmista ennen otsapannan asentamista, että päätuiki on oikein asennettu.
- 2)** Kiinnitä pidike otsapannan kannattimeen (77105).
- 3)** Kiinnitä otsapantahihna pidikkeeseen. Ki-ristä ruuvit.


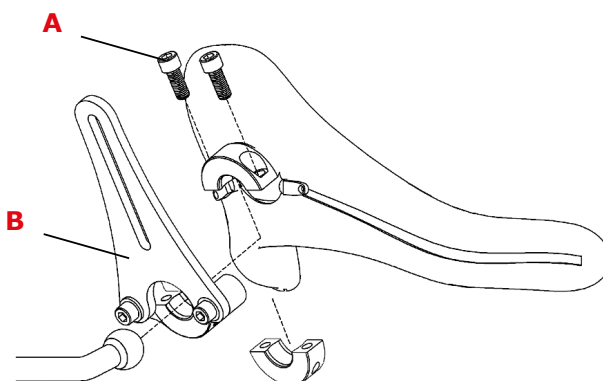


- A - Kuusiokoloruuvi
B - Pidike (77105)
C - Aluslevy

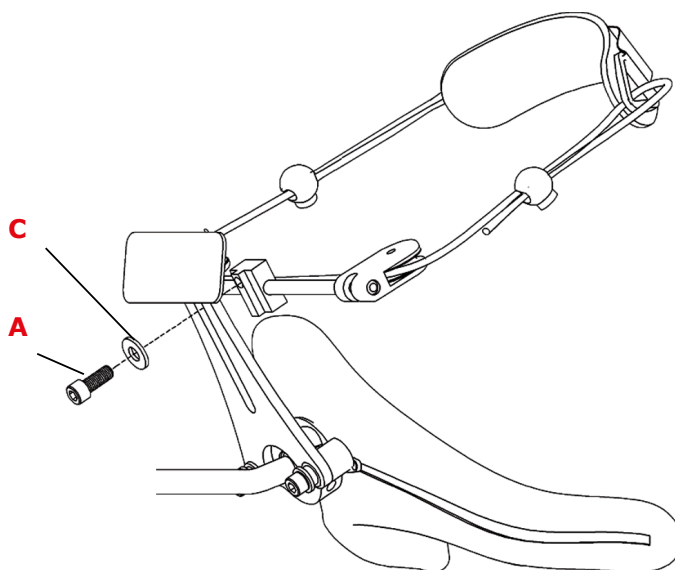

TÄRKEÄÄ!


Otsapannan säätämisessä on syytä käyttää apuna päteviä asentotukeen perehtyneitä terapeutteja tai apuvälineteknologian myyjää. Kaikki tämän järjestelmän kanssa työskentelevät henkilöt tulee kouluttaa sen oikeaan käyttöön. Otsapannan säätäminen oikein on äärimmäisen tärkeää. Panta ei saa olla niin kireällä, että seurauksena on ihon punoitusta, ärsytystä tai liiallista painetta. Panta ei myöskään saa olla niin löysällä, että se pääsee liukumaan silmien tai nenän päälle.

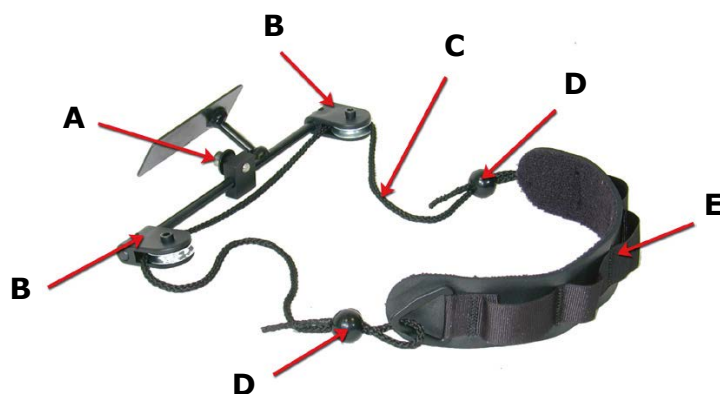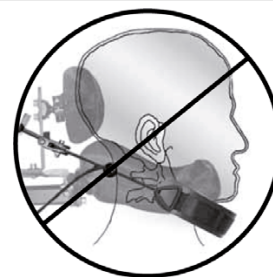

- A – Kuusiokoloruuvi
- B – Hihnapyörämekanismi
- C – Hihna
- D – Kireyden säädin
- E – Otsapanta

Liian alhaalla

Hihnapyörä liian alhaalla Panta liukuu silmien päälle

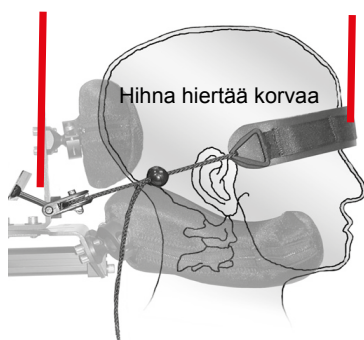


VÄÄRIN!

Hihnapyörät on asennettu liian alas, mikä aiheuttaa hihnan kulkemisen alhaalla yli korvien ja pannan laskeutumisen silmien päälle. Ratkaisu: kohota rullamekanismia poikittais-tankoa hieman ylöspäin säätämällä. Varmista myös, että kireys on riittävä.

Liian korkealla

Hihnapyörä liian korkealla Panta liukuu pään yli

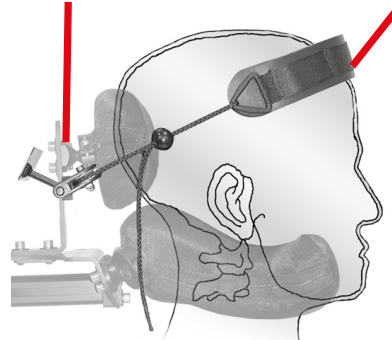


VÄÄRIN!

Hihnapyörät on asennettu liian ylös, mikä aiheuttaa hihnan liukumisen pään päälle. Ratkaisu: alenna rullamekanismia poikittais-tankoa hieman alaspäin säätämällä.

OIKEA ASENNUS

Oikea etäisyys on noin sormenleveys

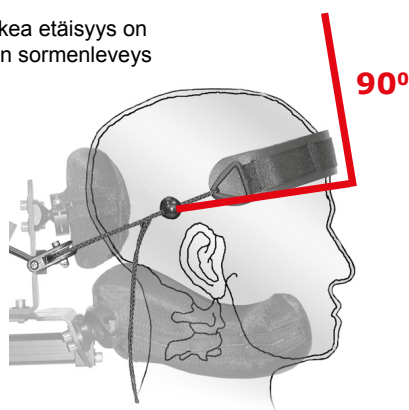

90°
Aseta otsapanta kulmakarvojen päälle

Staattisen otsapannan kokeilu

1) Pannan pukeminen: aseta käyttäjä tuoliin varmistaen, että päätuki on oikein asennettu. Käännä otsapanta pään päälle.

2) Hihnan kireyden säätäminen: kiristä panta hihnankiristimien avulla siten, että se on kauttaaltaan kiinni otsassa, muttei niin kireällä, että liiallinen paine aiheuttaisi punoitusta.

Varoitus: käyttäjän pään tulee tätä säätöä tehtäessä olla kokonaan kosketuksissa pään takana olevaan tukipehmusteeseen. Toimenpide on muussa tapauksessa vaarallinen ja päästää hihnan löystymään ja pannan putoamaan käyttäjän silmien tai nenän päälle.

3) Otsapannan vetosuunnan kulman säätäminen: säädä rakennelmaa ylös- tai alaspäin otsaan kohdistuvan vetosuunnan saamiseksi otsan kallistukseen nähden kohtisuoraan.



8.1 – Kasvojen sivutuen Plush-tukeen / yksittäinen alapehmuste / Mini-pehmuste

Sivutuet on suunniteltu toiminaan apuna pään tukemisessa sivulta käyttäjän auttamiseksi pitämään pää pystyssä. Tukityyny on kiinnitetty pallonivelellä, mikä antaa hyvän tuen ja mahdollistaa säätämisen käyttäjän tarpeiden mukaiseksi. Joustava rakenne ei estä näkemistä ja kuulemistä.

Kasvojen sivutuen asentaminen ja säätäminen kuuluu ainoastaan pätevän lääkintähenkilökunnan tehtäväksi.

Kasvojen sivutuen asentaminen:




- 1) Kiinnitä sivutuki kannatinlevyyn
- 2) Kiinnitä kannatinlevy tukityynyyn.
- 3) Kiinnitä kasvojen sivutuen kannatin pidikkeeseensä.
- 4) Asenna tuki paikalleen.

A - Kuusiokolokantaruuvi


B - Aluslevy

C - Mutteri


Kasvojen sivutuki, PLUSH:

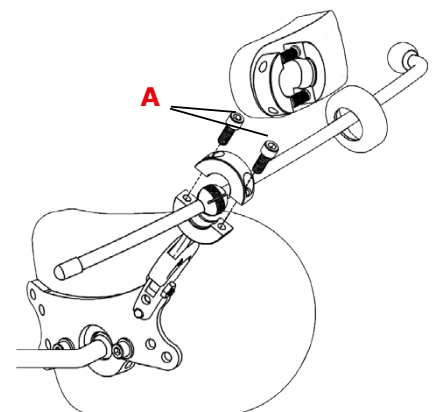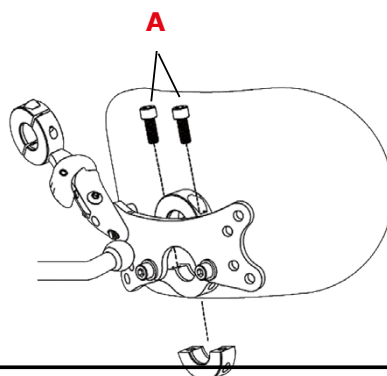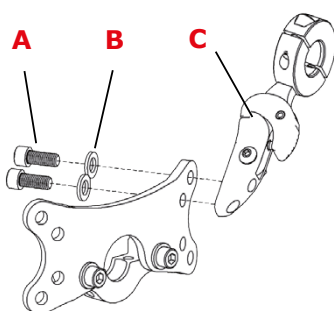

Kasvojen sivutukityyny, Mini:

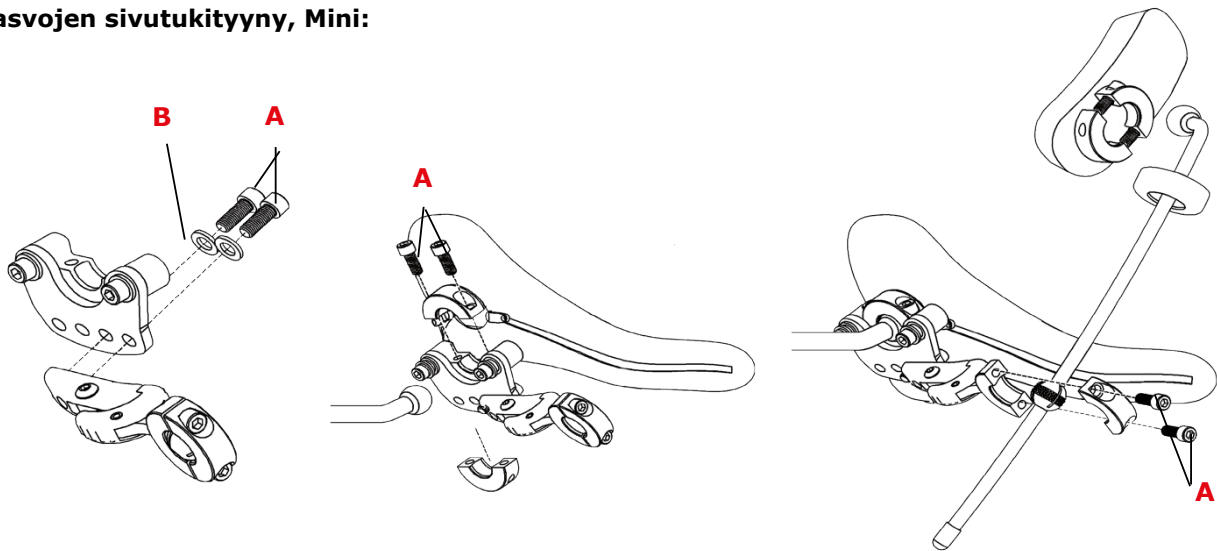


8.2 – Sivuun kääntyvä, painokytkimellä avattava tuki

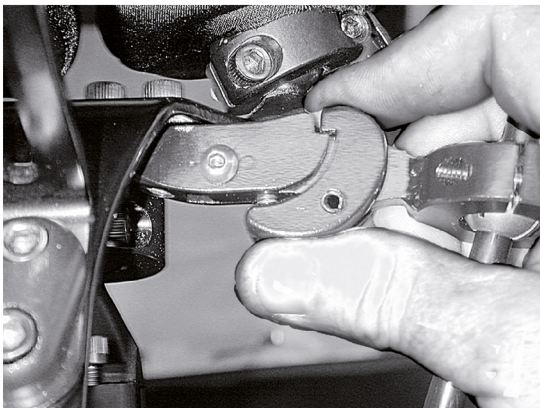

Avaaminen: tartu tuen sivusalvasta kuvassa esitetyllä tavalla. Paina peukalolla ja vedä etusormella.

Sulkeminen: paina sivuttaistankoa paikalleen, kunnes salpa lukkiutuu.

8.3 – Kasvojen sivuttaistuen asentosäätö

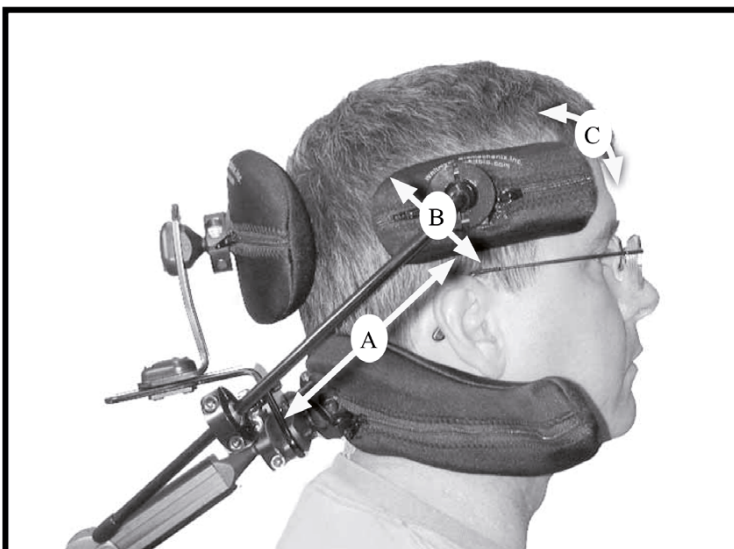

1) Varmista ennen tukityynyä asentamista, että päätuki on oikein asennettu.

2) Aseta käyttäjä istuimeen ja avaa kuusio-kantaruuveja, jotka kiinnittävät tukityynyä (ruuveja tulee avata sen verran, että osat pysyvät paikoillaan, mutta ovat helposti säädettävissä käsin).

Arviointi, joka on suoritettava ennen säätämisen jatkamista:

3) Säädä tukityynyä edellisessä kohdassa suoritetun arvioinnin mukaisiksi. Tukityyny tulee asettaa kohtiin, jossa ne eivät häiritse näkemistä tai kuulemistä, ja on myös varottava kohdistamasta painetta leukaan.

4) Kun tukityynyille on löydetty hyvä asento, säädöt kiristetään ruuveilla. Varmista, että ruuvit kiristetään samaan kireyteen molemmilla puolin ja että pallonivelen puoliskojen välit ovat yhtä suuret.

9.1 – Seuranta

Tärkeää!

Päätuen käyttäminen on lopetettava välittömästi, mikäli ilmenee rohtumaa. Käänny mahdollisimman pian lääkintähenkilökunnan puoleen säätöjen korjaamiseksi.

Tarkkaile käyttäjää päivän kuluessa mahdollisten lisäsäätöjen tarpeen havaitsemiseksi.

Huom!

Tarkkaile käyttäjää edelleen asennuksen ja säätämisen jälkeen. Mikäli käyttäjä kokee laitteen käytön epämukavaksi tai ilmenee rohtumaa, POISTA TUKI VÄLITTÖMÄSTI ja käänny pätevän lääkintähenkilöstön puoleen säätöjen korjaamiseksi.

9.2 - Kunnossapito

Päällykset ovat irrotettavissa ja voidaan konepestä 40 °C:ssa. Ällä käytä kuivausrumpua tai kuivauskaappia. Kuivaa metalliosat kostealla rievulla. Päällisiä tai solumuoveja voidaan tilata. Kunnossapito tulee suorittaa säännöllisin välein ja tarvittaessa.

9.3 - Hävittäminen

Tarkista kaikkien liikkuvien osien kuluneisuus tarpeen mukaan.

Erottele käytetyt osat materiaalityypin mukaan hävittämistä varten.

Metallia = selkänojan runko, jalkatuki, käsinoja, päätuki ym.

Muovia = istuin- ja selkänojan osat, pöytä, jalkalauta, tyyppikilpi ym.

Palavaa = päälliset, lantiovyö, nelipistevyö ym.

9.4 - Yhteenveto/Tarkastukset

- * Suorita tarkastukset ohjeiden mukaisesti.
- * Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat kireällä.
- * Tarkista säännöllisesti, etteivät tyynyt tai hihnat yms. ole vaurioituneet.

9.5 - Varaosat

Pro Series –päätukeen saa käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

9.6 - Takuu

Yhden vuoden takuu varmistusvirheiden osalta.

9.7 - Yhdistelmät

Pro Series –tuotteita saadaan yhdistää ainoastaan muiden Pro Series –tuotteiden kanssa. Muiden yhdistelmien osalta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Puh. +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05
Asiakastuki +46 11 16 18 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark
Puh. +45 86 17 01 74
Fax +45 86 17 01 75

FI

Rehaco Oy

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland
Puh: +35 840 775 22 88

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands
Puh. +31 344 63 45 40
Fax +31 344 62 33 61

World wide

Maaailma

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt