



nxt Seating Series –tyynyn käyttöohje

TAKUUKÄYTÄNTÖ

nxt Seating Series –tyynyllä on 24 kuukauden rajoitettu takuu toimituspäivästä alkuperäiselle ostajalle. Mikäli ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe, valmistaja korjaa tai korvaa osan harkintansa mukaan. Tämä rajoitettu takuu ei kata päivittäistä kulumista tai vahinkoa, joka johtuu varomattomasta käsittelystä, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai huolto- ja kunnossapito-ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Tyynynpäällisen takuu aika on 90 päivää. Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä tai valmistajan aiheuttamista virheistä johtuvat vahingot. Tämä takuu ei koske savukkeiden aiheuttamia palamisvaurioita, repeämiä päälliselle aiheuttavien terävien esineiden aiheuttamia vaurioita, eikä pesuohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvia vaurioita. Takuuvaatimukset ja -korjaukset tulee käsitellä lähimmän valtuutetun jälleenmyyjän kautta. Kopiota tuotteen ostajalle toimitetusta laskusta voidaan vaatia ennen takuuvaatimuksen käsittelemistä.

Käyttöohje

nxt Seating Series BioFit- ja NüFit-tyynyt

MYYJÄ: tämä käyttöohje ON ANNETTAVA tuotteen käyttäjälle.

KÄYTTÄJÄ: tämä käyttöohje tulee lukea ENNEN tuotteen käyttämistä ja säilytettävä myöhempää tarvetta varten.

I Yleistä

I.1 Symbolit

Tässä käyttöohjeessa on symboleja ja varoituksia, jotka koskevat vaaratilanteita tai toimintoja, jotka voisivat johtaa henkilö- tai aineellisiin vahinkoihin. Varoitusten merkitys selitetään alla.



VAARA

Varoitus viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, mikäli sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS

Noudatettava varovaisuutta. Tämä viittaa potentiaalisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa aineellisiin vahinkoihin tai vähäiseen vammaan, mikäli sitä ei vältetä.



Hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoja tehokkaan ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi.

I.2 Yleiskatsaus

Tärkeää tietoa

Paras tapa välttää painehaavoihin liittyviä ongelmia on ymmärtää niiden syyt ja oma roolinne ihon hoito-ohjelmassa. Yksilöllisiä rajoitteita ja tarpeita koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä terapeutin ja lääkärin puoleen. Kaikki tyynyt tulee valita huolella. Yhteistoiminta terapeutinne ja lääkärinne kanssa on paras tapa sen varmistamiseksi, että tyynyvalinta täyttää henkilökohtaiset tarpeenne. Kun henkilön tarpeet muuttuvat monimutkaisemmiksi, myös tyynyn valinnan tärkeys korostuu.

nxt Seating Series BioFit- ja NüFit-tyynyt

BioFit- ja **NüFit-**tyynyt on suunniteltu monikerroksista solumuovirakennetta hyödyntäen, joka kohdentaa ihon suojauksen sinne missä sitä eniten tarvitaan, ja sen ominaisuudet parantavat vakautta, tukevuutta ja mukavuutta.

Ulko- ja sisäpäällinen

Tyynjen ulkopäällinen on valmistettu verkkokangasmateriaalista, joka tuntuu istuessa viileältä ja on hengittävä. Saatavissa on myös inkontinenssipäällinen, joka on nestettä läpäisemätön ja helppo pyyhkiä puhtaaksi. Sisäpäällinen on nestettä läpäisemätön solumuovin suojaamiseksi. Päällisten säännöllistä puhdistamista ja tarkastamista suositellaan. Lisätietoja hoitoa ja kunnossapitoa koskevassa kappaleessa.

2 Turvallisuus

2.1 Käyttötarkoitus

nxt BioFit- ja **NüFit-**tyyny on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen asentotuen, tukevuuden ja mukavuuden.

2.2 Yleisluonteisia varoituksia



Tarkasta KAIKKI osat mahdollisten kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi. Mikäli kuljetusvaurioita havaitaan, ÄLÄ käytä tuotetta. Ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen/jälleenmyyjään lisäohjeiden saamiseksi.



VAROITUS

TÄTÄ TUOTETTA JA MITÄÄN SEN LISÄVARUSTEITA EI TULE KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET ON KOKONAAN LUETTU JA YMMÄRRETTY. MIKÄLI ETTE KYKENE YMMÄRTÄMÄÄN VAROITUKSIA, HUOMAUTUKSIA TAI OHJEITA, OTTAKAA YHTEYS TERVEYDENHOIDON AMMATILASEEN, JÄLLEENMYYJÄÄN TAI TEKNISEEN HENKILÖKUNTAAN ENNEN TÄMÄN VÄLINEEN KÄYTTÄMISTÄ – MUUSSA TAPAUKSESSA SEURAUKSENA SAATTAA OLLA LOUKKAANTUMINEN TAI VAURIOITUMINEN.

LISÄVARUSTEITA KOSKEVA VAROITUS

nxt Seating Series –tuotteet ovat erityisesti suunniteltuja ja valmistettuja käytettäväksi yhdessä **nxt**-lisävarusteiden kanssa. Valmistaja ei ole testannut muiden valmistajien suunnittelemaa lisävarusteita, eikä suosittele niiden käyttöä tämän tuotteen kanssa.

ASENNUSTA KOSKEVA VAROITUS

Kaikkien säätöjen, henkilökohtaisten sovitusten, korjausten tai huollon jälkeen ja ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki kiinnitysosat ovat tukevasti kiinni. Varmista, että istuintyyny on kunnolla paikallaan pyörätuolissa ennen käyttöä. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai vaurioituminen. Tyynyn asentaminen pyörätuoliin voi muuttaa pyörätuolin painopistettä ja tehdä pyörätuolista epävakaan, mikä voi potentiaalisesti johtaa loukkaantumiseen.

VAROITUS

Ihon kunto tulee tarkastaa usein aina uuden istuinjärjestelmän asentamisen jälkeen. Yksilöllisiä rajoitteita ja tarpeita koskeissa kysymyksissä tulee kääntyä terapeutin ja lääkärin puoleen. Yhteistoiminta terapeutinne ja lääkärinne kanssa on paras tapa sen varmistamiseksi, että tyynyvalinta täyttää henkilökohtaiset tarpeenne. **BioFit**-tyynyssä käytetään Visco Gel- ja elastista Visco-solumuovimateriaalia ja se on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan huoneenlämpötilassa. Mikäli se jätetään alhaisempaan lämpötilaan, sen on aina annettava lämmetä huoneenlämpöön ennen käyttöä. Erittäin kylmillä tai kuumilla pinnoilla istuminen voi vahingoittaa ihoa. Vältä teräviä esineitä ja altistamista voimakkaalle kuumuudelle ja avotulelle.

2.3 Painorajoitus: BioFit & NüFit 136 kg.

3 Käyttö

3.1 nxt BioFit- ja NüFit-tyynyjen asentaminen

1. Aseta tyyny siten, että materiaalitunnistuslaput ovat takana.
2. Kohdista tyynyn alla olevat tarrahihnat pyörätuolin istuimessa olevien vastaavien hihnojen kanssa.
3. Sijoita tyyny pyörätuolin istuimella mahdollisimman taakse.
4. Paina tyynyä varmistaaksesi, että tarrahihnat ovat tukevasti kiinnittyneet.
5. Aseta tyyny pyörätuoliin siten, että tyynyn perä, joka on tunnistettavissa sisältölappujen perusteella, on kannatinhihnan tai kiinteän istuimen takareunan tasalla. Varmista, että istuintyynyn pohjassa oleva tarrakiinnitys kiinnittyy pyörätuolin kannatinhihnan tai kiinteän istuimen vastaavaan.
6. Siirry pyörätuolissa olevalle tyynylle ja asetu mahdollisimman taakse tyynyllä. Varmista, että istut tyynyn sivuilla olevien paineenlievitysalueiden sisällä, jolloin istuinkyhmyt osuvat tyynyn paineenlievityssyvennyksiin.
7. Säädä jalkatuen korkeus sellaiseksi, että sääret lepäävät mukavasti tyynyn etupuolella. Jalkatuen tarkka korkeus on olennaisen tärkeää tyynyn optimaaliselle toiminnalle.

VAROITUS:



Mikäli ette kykene aikaansaamaan riittävää ihon suojausta, asennonhallintaa ja/tai ette jostain syystä kestä istumista tyynyn päällä, ottakaa yhteys jälleenmyyjään tai terveyden hoidon ammattilaiseen **nxt** Seating Series –tyynyn käyttöä koskevan päätöksen tekemiseksi.

Käytön aloittamisen aikataulu

Tyynyllä suositellaan istuttavan lyhyitä ajanjaksoja. Muista tarkastaa jokaisen käyttöjakson jälkeen visuaalisesti kaikki alueet, jotka ovat kosketuksissa tyynyyn. Mahdollinen punoituksen tulisi hävitä 10-30 minuutin kuluessa. Käännä lääkärin puoleen, jos punoitus jatkuu yli 30 minuutin ajan. Mikäli ihon tarkastuksissa ei ilmene yli 30 minuuttia säilyviä punoittavia alueita, istumisaikaa pidennetään asteittain (puolesta tunnista tuntiin päivittäin). Jatka ihotarkastusten tekemistä kunkin pidennetyn istumisajan jälkeen. Kahdesta neljään tuntiin pituiset jaksot ovat yleissuositus istuma-asennossa vietettäväksi maksimijaksi. Ihotarkastuksia tulee tehdä vähintään päivittäin, vaikka ihon kestäkyky olisikin osoitettu. Terveydenhoitoammatilaisen suosittelemia ajoittaisia paineenlievitystoimenpiteitä tulee jatkaa rutiinomaisesti.



VAROITUS:

Mikäli tyynyn käytön yhteydessä ilmenee yli 30 minuuttia jatkuvaa punoitusta, tulee tyynyllä istuminen lopettaa ja välittömästi kääntyä terapeutin tai lääkärin puoleen.

Jatkuvaa seurantaa suositellaan

Istuma-asennon ja ihon eheyden tarkastuttamista terveydenhoitoalan ammattilaisella suositellaan tehtäväksi vähintään kerran vuodessa tai aina kun painossa, asennossa tai yleisessä terveydentilassa tapahtuu muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa kykyynne istua turvallisesti, tukevasti ja toiminnallisesti.

4 Hoito ja kunnossapito

4.1 Puhdistaminen

Ulkopäällinen Comfair

Päällinen voidaan irrottaa pesemistä varten. Päällinen poistetaan varovasti avaamalla tyynyn takana/sivuilla oleva vetoketju. Vetoketju tulee sulkea ennen pesemistä. Konepesu hienopesuohjelmalla, käyttäen tavallista pesuainetta ilman valkaisua ja ripustuskuivausta tai rumpukuivausta alhaisessa lämpötilassa.

Ulkopäällinen Incontinent

Päällinen voidaan pyyhkiä kuivaksi kostealla pyyhkeellä. Päällinen voidaan lisäksi irrottaa pesemistä varten. Päällinen poistetaan varovasti avaamalla tyynyn takana/sivuilla oleva vetoketju. Vetoketju tulee sulkea ennen pesemistä. Konepesu hienopesuohjelmalla, käyttäen tavallista pesuainetta ilman valkaisua ja ripustuskuivausta tai rumpukuivausta alhaisessa lämpötilassa.

Sisäpäällinen

Päällinen voidaan pyyhkiä kuivaksi kostealla pyyhkeellä. Sisäpäällistä ei tule poistaa solumuovin päältä.

4.2 Tarkastus

Osat, joissa on verhoilumateriaaleja, solumuovia (mikäli käsiksupäästävissä) ja muoveja, tulee tarkastaa muodonmuutosten, korroosion, murtumien, kuluneisuuden ja kokoonpainumisen havaitsemiseksi.



VAROITUS:

ÄLÄ jatka tuotteen käyttämistä, jos ongelmia havaitaan. Korjaushuolto on järjestettävissä apuvälinemyyjänne välityksellä.

5 Käytön jälkeen

5.1 Uudelleenkäyttö



VAROITUS: loukkaantumisvaara

Ennen tuotteen siirtämistä eri käyttäjälle tuote on aina tarkastutettava vaurioiden havaitsemiseksi jälleenmyyjällä. ÄLÄ jatka tuotteen käyttämistä, jos ongelmia havaitaan. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla loukkaantuminen.

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi



Dynamic Health Care Solutions

753011 Second Line EHS,
Orangeville, ON L9W 5W4

T (866) 875-2877 • +1 519 942 8441

F (866) 875-2878 • +1 519 942 2186

www.DynamicHCS.com