



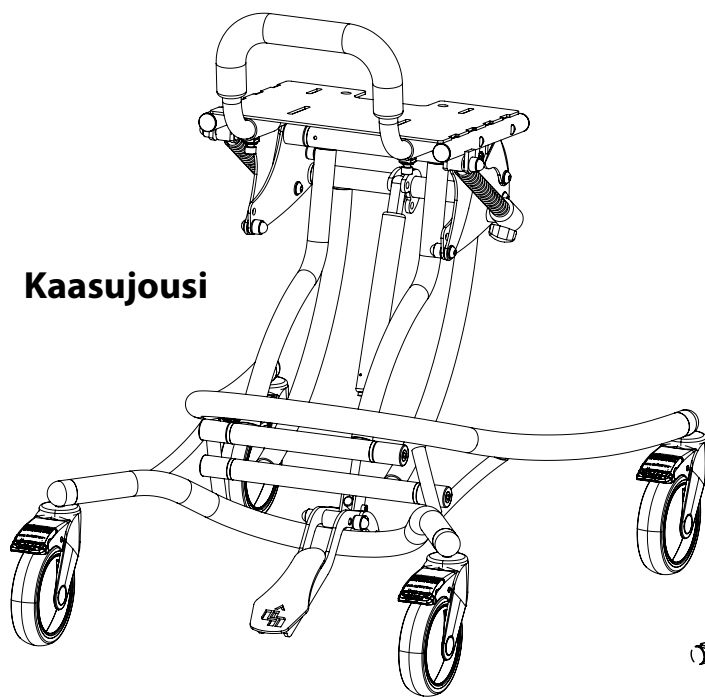

**Kaasuajousi**

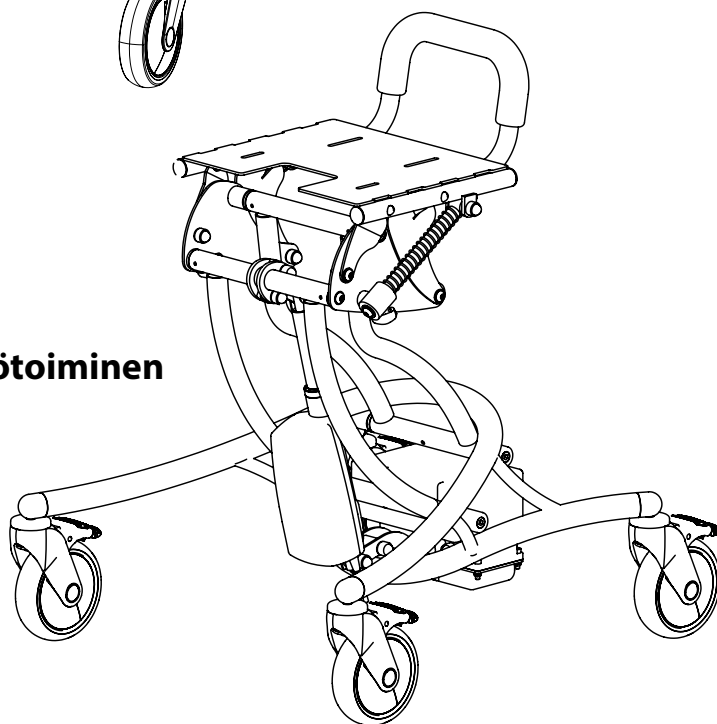

**Sähkötoiminen**



# **Käyttöohje**

## Zitzi Flipper Pro

# Sisällysluettelo

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Turvaohjeet .....                                                    | 3  |
| Säädettävä istuinkorkeus – Kaasujousi .....                          | 4  |
| Säädettävä istuinkorkeus – Sähkötoiminen .....                       | 5  |
| Akun lataaminen .....                                                | 6  |
| Elektroniikkakotelon liittäminen .....                               | 6  |
| Kallistustoiminto.....                                               | 7  |
| Työntötangot .....                                                   | 8  |
| Pysäköintijarru.....                                                 | 9  |
| Istuinjärjestelmän asentaminen .....                                 | 10 |
| Jalkatuki.....                                                       | 11 |
| Pohjetuki .....                                                      | 12 |
| Jalkakehikko.....                                                    | 13 |
| Vaihtaminen yhdestä kannatinputkesta<br>kahteen ja päinvastoin ..... | 14 |
| Porausohjeet yhtenäiselle jalkalaudalle.....                         | 15 |
| Porausohjeet erillisille jalkalautoille.....                         | 16 |
| Kunnosapito-ohjeet .....                                             | 17 |
| Kunnostaminen .....                                                  | 17 |
| Varaosat .....                                                       | 17 |
| Merkinnät .....                                                      | 18 |
| Takuu .....                                                          | 18 |
| Yhdistelmät & sopivat istuinjärjestelmät.....                        | 18 |
| Purkaminen & Hävittäminen .....                                      | 19 |
| Tekniset tiedot .....                                                | 19 |

# Turvaohjeet

## Johdanto

Voidaksenne täysin hyödyntää Zitzi Flipper Pron kaikkia ominaisuuksia on tärkeätä lukea tämä käyttöohje. Tämä koskee kaikkia käyttäjän kanssa toimivia henkilöitä. Tuote on tarkoitettu käyttäjille, joilla on istumista koskevia ongelmia, ja soveltuu monenlaisiin diagnooseihin. Zitzi Flipper Pron sovittaminen ja asentaminen kuuluu pätevän lääkintähenkilökunnan tehtäväksi.

Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

## Käyttötarkoitus

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic SITT AB:n valmistaman alustan kanssa.


Mikäli kyseessä on muunlainen käyttö, tulee ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

## Yhteydenpito

Zitzi Flipper Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sarjanumero löytyy toimilaitekotelon alla olevasta kilvestä. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikkien tuotetta koskevien yhteydenottojen yhteydessä.


## Tämä tuote on Anatomic SITT AB:n valmistama

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Postiosoite</b>     | Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping           |
| <b>Käyntiosoite</b>    | Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping |
| <b>Puhelin</b>         | +46 11-161800                                           |
| <b>Fax</b>             | +4611-162005                                            |
| <b>Sähköposti</b>      | info@anatomicsitt.com                                   |
| <b>Internet</b>        | anatomicsitt.com                                        |
| <b>Opastusvideoita</b> | youtube.com/anatomicsitt                                |
| <b>Seuraa meitä</b>    | facebook.com/anatomicsitt                               |

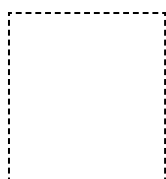

Rastita tämä ruutu, mikäli tuotteeseen on tehty yksilöllisiä muutoksia.

CE-merkintä ei tällöin ole voimassa ja tulee poistaa.

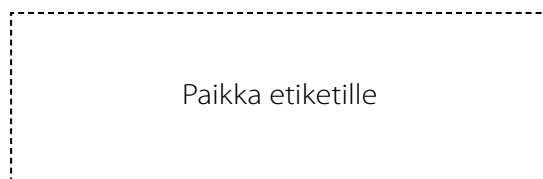

Paikka etiketille

# Säädettävä istuinkorkeus – Kaasujousi

Istuinkorkeus on säädettävissä välillä 23-61 cm.



Korkeuden säätäminen on helppoa polkimen avulla.

Tulee huomioida, että istuinjärjestelmää on aina tuettava kädellä sitä säädettäessä.

- Vapauta lukitus poljinta painamalla.
- Säädä korkeus halutunlaiseksi.
- Vapauta poljin, kun haluttu korkeus on saavutettu. Korkeus on nyt lukittu.



**Huom!** Varo sormien joutumista puristuksiin

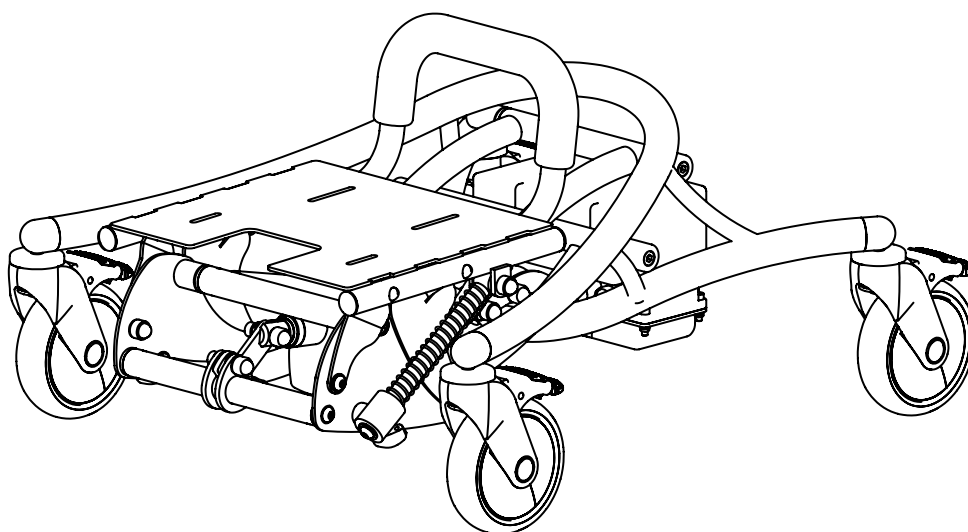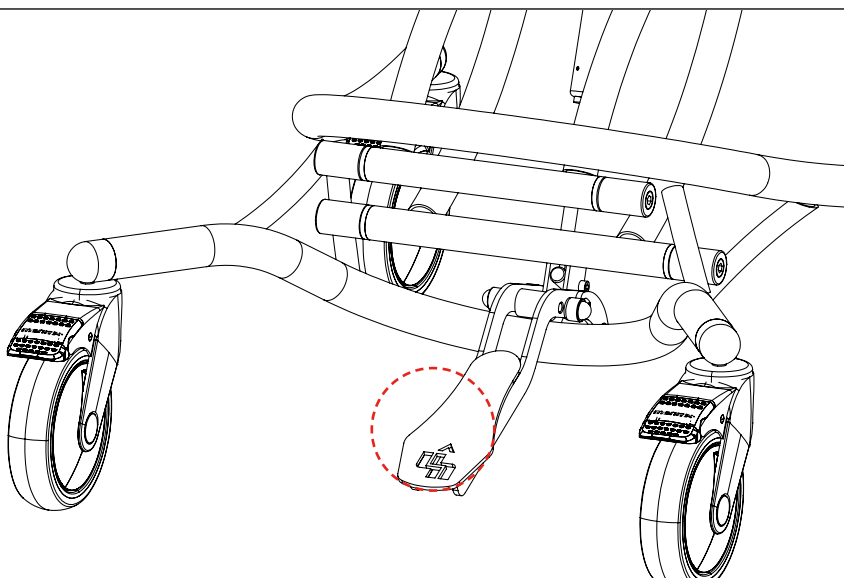

Zitzi Flipper Pro alimpaan tasoon säädettynä

# Säädettävä istuinkorkeus – Sähkötoiminen



Istuinkorkeus on säädettävissä välillä 23-61 cm.

Korkeuden säätäminen on helppoa sähkötoimisen käsiohjaimen avulla.


Tulee huomioida, että istuinjärjestelmää on aina tuettava kädellä sitä säädettäessä.



**Huom!** Varo sormien joutumista puristuksiin

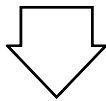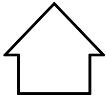


- Ylös-nuoli kohottaa istuinlevyä
- Alas-nuoli laskee istuinlevyä alaspäin

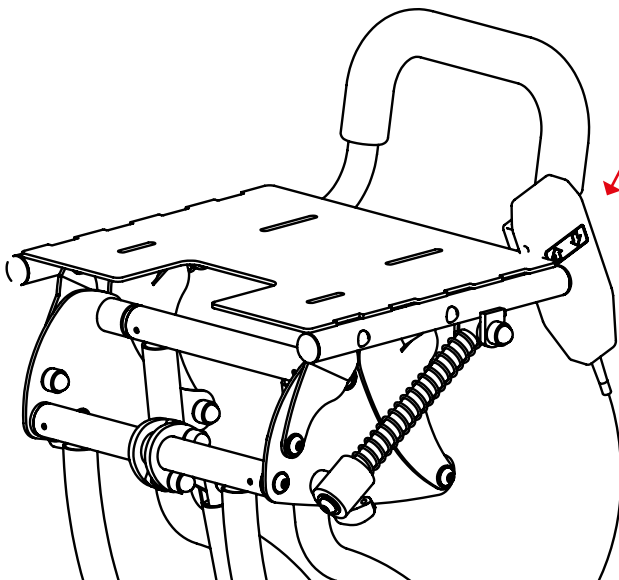

## Akun lataaminen

Liitä laturin virtajohto normaaliin seinäpistokkeeseen (220 V).

Liitä laturin johto sitten käsiohjaimen sivulle. Akkua on ennen ensimmäistä käyttökertaa ladattava vähintään 24 tuntia. Akkua ei milloinkaan saa päästää täysin purkautumaan, sillä se voi tällöin vaurioitua.

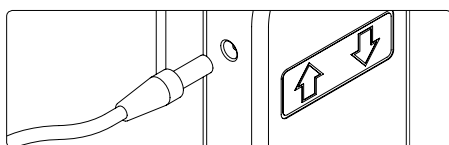

Laturin liitäntäpistoke on käsiohjaimen sivulla.



**Akkua on ennen ensimmäistä käyttökertaa ladattava 24 tunnin ajan.**  
**Sen jälkeen akku tulee ladata joka yö.**  
**Akkua ei milloinkaan saa päästää täysin purkautumaan.**

## Elektroniikkakotelon liittäminen

Elektroniikkakoteloä liitettäessä tulee nostimen toimilaite liittää kotelon sisäänmenoon, joka on merkitty numerolla 1.

Sähkötoimisen kallistustoiminnon yhteydessä käytetään erilaista elektroniikkakoteloä ja ohjainta. Kallistustoiminnon toimilaite liitetään tällöin numerolla 2 merkittyyn sisäänmenoon.




**KÄSIOHJAIN**



**TOIMIKAITE (KALLISTUS) lisävaruste**




**TOIMILAITE (NOSTIN)**

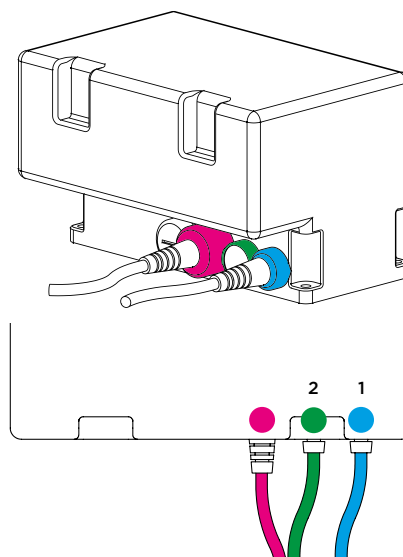

# Kallistustoiminto

## Kallistustoiminto

Flipper Pro –alustassa on kaksi kallistusasettoa, jotka säädetään istuinlevyn sivulla olevien reikien avulla. Kun kaasujousi kiinnitetään alempaan reikään (ks. kuva), saadaan aikaan kallistus välillä 0° - 30°. Mikäli jousi kiinnitetään ylempään reikään, saadaan aikaan -5° - 25°:n kallistus.

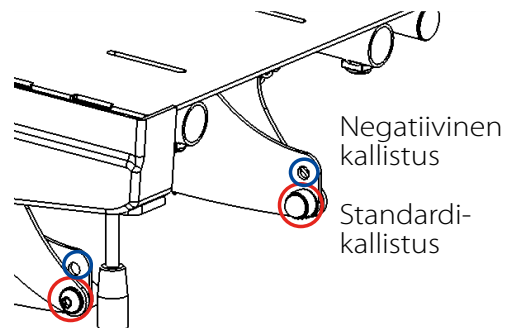


## Kallistaminen kaasujousen avulla

Istuinlevyn kallistuskulma on säädettävissä välillä 0-30°, ja säätö tapahtuu avaamalla nuppia (A) ja painamalla vipua (B) ja sitten painamalla istuinlevyä alas- ja eteenpäin. Haluttu kulma lukitaan vapauttamalla vipu (B) ja lukitus varmistetaan kiristämällä nuppi (A).



**Huom!** Istuimen kulman palauttamiseksi alkuasentoonsa nuppia (A) löysätään, painetaan vipua (B) ja istuinlevyä vedetään ylös- ja taaksepäin kahvasta tarttumalla.

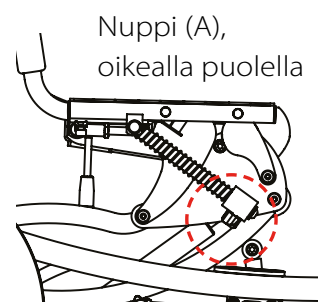

## Palautus jousen avulla


Istuinlevyn sivulla oleva jousi avustaa istuinlevyn palauttamisessa alkuasentoonsa.

## Varmistus

Tarkista aina, että kallistus on lukittu halutun kulman säätämisen jälkeen.

## Lukitus

Nuppi (A) on aina lukittava säätämisen jälkeen.

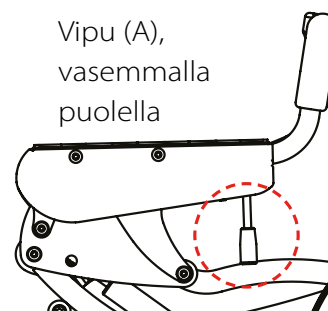


**Huom!** Varo sormien joutumista puristuksiin

## Sähkötoiminen kallistus

Istuinlevyn kallistusta voidaan säätää välillä 0-30° nuppia (A) avaamalla ja painiketta (C) painamalla levyn kallistamiseksi eteenpäin ja painiketta (D) painamalla levyn kallistamiseksi taaksepäin. Käsiohjaimen painike haluttu kallistus on saavutettu. Lukitse nuppi (A) kallistuksen lukitsemiseksi.

Käsiohjain

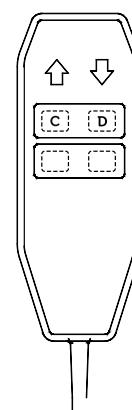


**Huom!** On hyvin tärkeätä, että nuppi (A) avataan ennen sähkötoimisen kallistuksen käyttämistä.

# Työntötangot


## Työntökahvan asentaminen

Työntökahva liitetään paikalleen työntämällä se runkoon. Tämän jälkeen ruuvit kiristetään tiukalle.

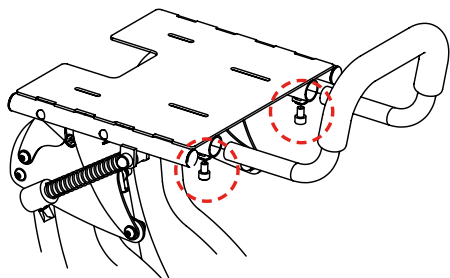

## Työntötangon liittäminen Zitzi-runkoon

Liitä työntötanko runkoon. Kiristä ruuvit tämän jälkeen tiukalle yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

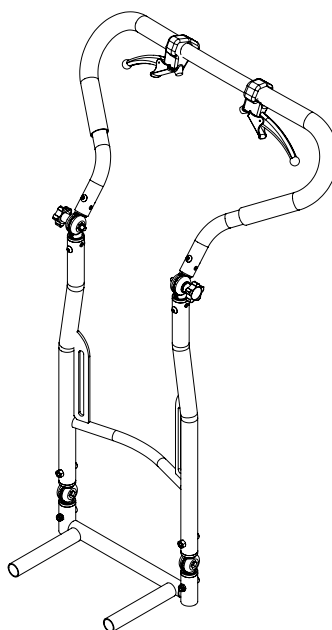




## Suuren työntötangon asentaminen

Suuri työntötanko asennetaan putkirungon ja takapyörien väliin. Ruuvit vaihdetaan kokoon M10x45 ja tangon ja rungon väliin laitetaan palkki.

Itse tanko liitetään putkien päihin.

Takapyörien kiinnittämiseen tulee käyttää kierrelukitetta (Loctite).

Välikeholkkia käytetään vain koon 3 Flipper Pro:ssa.

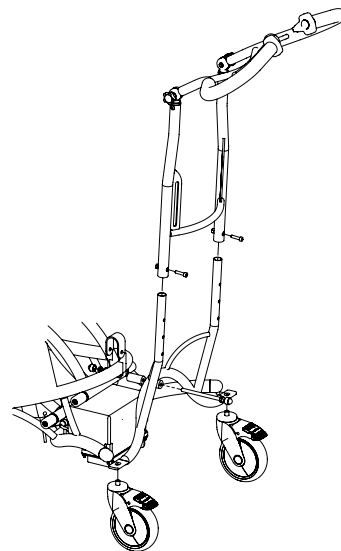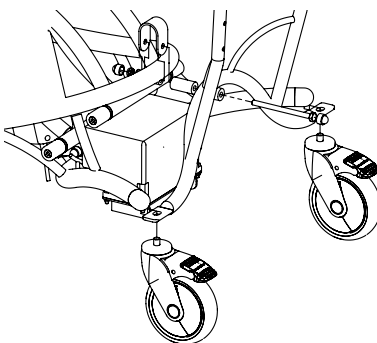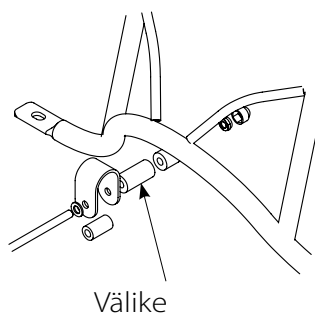


# Pysäköintijarru


## Jarrun lukitseminen ja vapauttaminen

Pyörät lukitaan jarrupolkimen takareunasta painamalla, ja vapautetaan polkimen etureunaa painamalla.


Pyörien ollessa lukittuina sekä niiden pyöriminen että pyörimissuunta on lukittu.

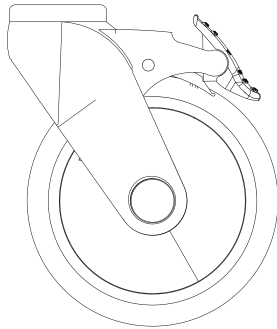

Lukittu jarru

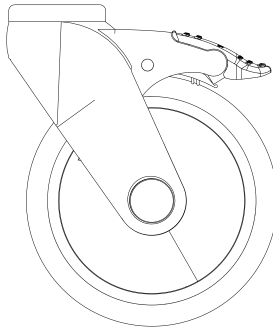

Lukitsematon jarru

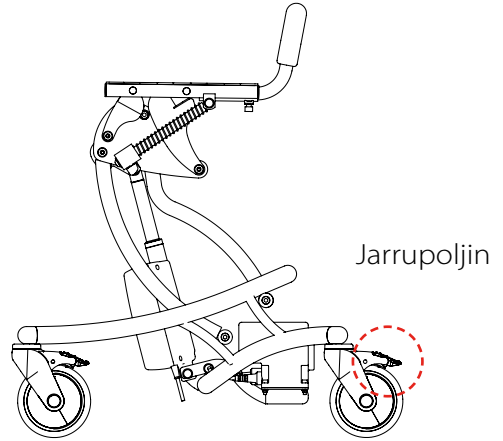

### Pikaohje

- **Lukitseminen**  
Pyörät lukitaan jarrupolkimen takareunasta painamalla
- **Vapauttaminen**  
Pyörät vapautetaan lukituksesta jarrupolkimen etureunasta painamalla


# Istuinjärjestelmän asentaminen

Istuinjärjestelmä on helposti liitettävissä Zitzi Flipper Pro –alustalle asennuslevyn avulla. Asennuslevyssä on 4 pulttia, joiden avulla levy pysyy paikallaan, ja kiristäminen tapahtuu asennuslevyn alla olevan kiristysnupin avulla.

Istuinjärjestelmä työnnetään paikalleen kuvassa esitetyllä tavalla. Istuinjärjestelmää painetaan taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen lokahtaen. Tämän jälkeen kiristetään istuinlevyn alla oleva nuppi.



**Huom!** Varmista, että salpa lukkiutuu kunnolla paikalleen ja nuppi tulee kiristetyksi!

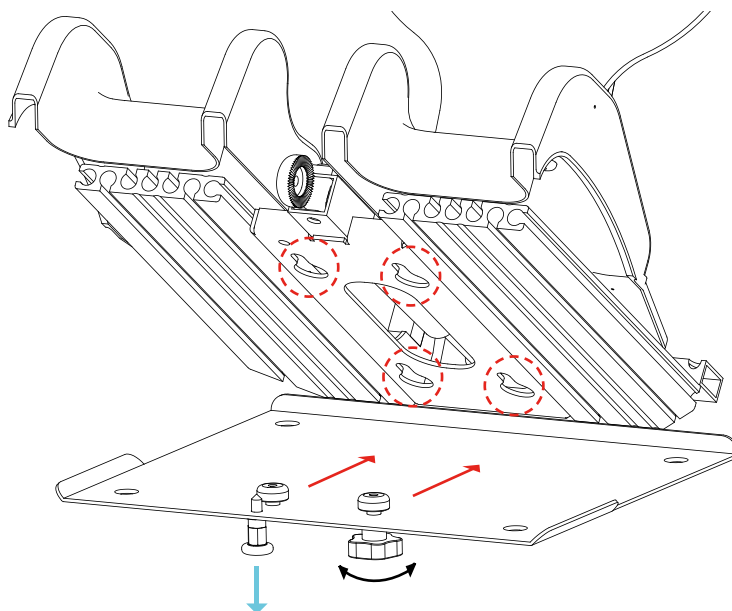

Lukitusreikä



Avaaminen alaspäin vetämällä



Vetosuunta



Nuppi

# Jalkatuki

## Jalkatuen kannattimen asentaminen – A


Profili kiinnitetään mukana toimitetuilla ruuveilla jalkatuen kannattimeen istuinlevyn alle istuinlevyn etureunassa oleviin reikiin.

## Polvikulman säätäminen – B

Avaa nuppia (B) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi tiukalle.



**Tärkeää!** "Hampaiden" on osuttava kohdalleen. Kiristä pulitti tiukalle!

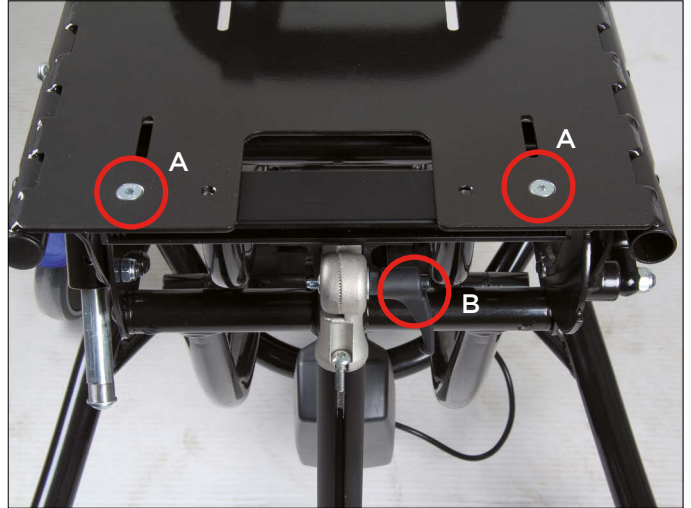


## Jalkalaudan kallistussäätö - C

Avaa nuppia (C) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi tiukalle.


## Jalkalaudan korkeussäätö - D

Avaa nuppia (D) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi tiukalle.

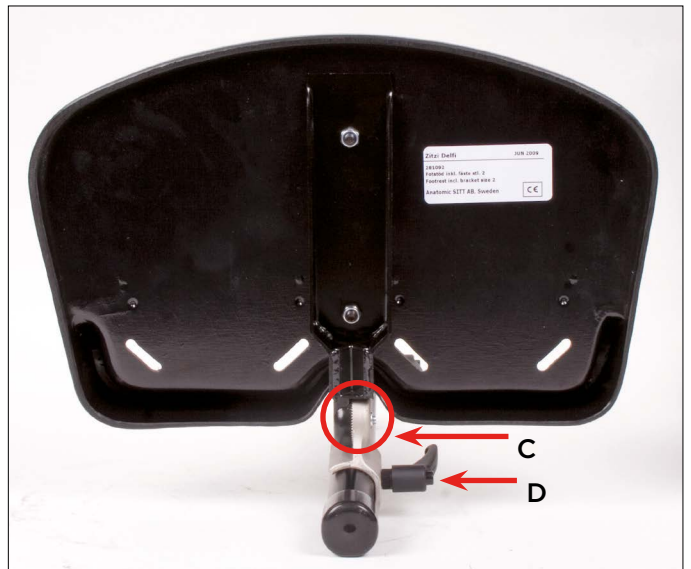

## Jalkalaudan korkeussäätö - E

Avaa nuppeja (E) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi tiukalle.

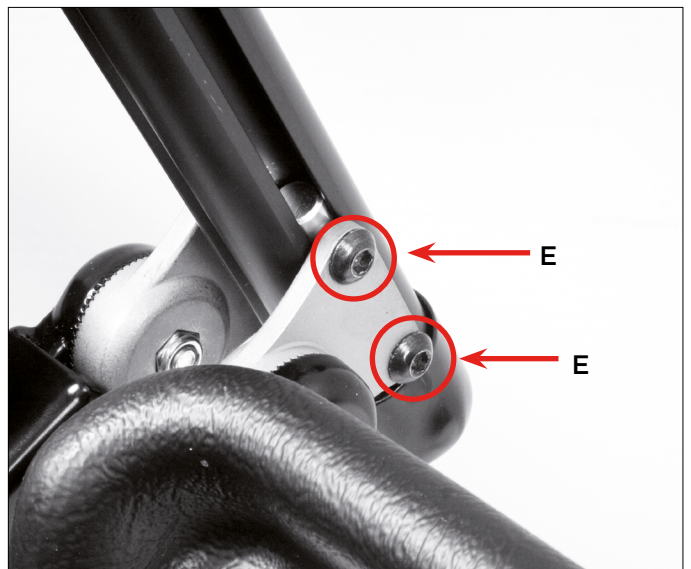


# Pohjetuki

Avaa ruuveja A päästäksesi säätämään tuen halutulle korkeudella ja syvyydelle.

Kiristä lopuksi tiukalle.

Avaa ruuveja B päästäksesi säätämään tuen halutulle leveydelle.

Kiristä lopuksi tiukalle.

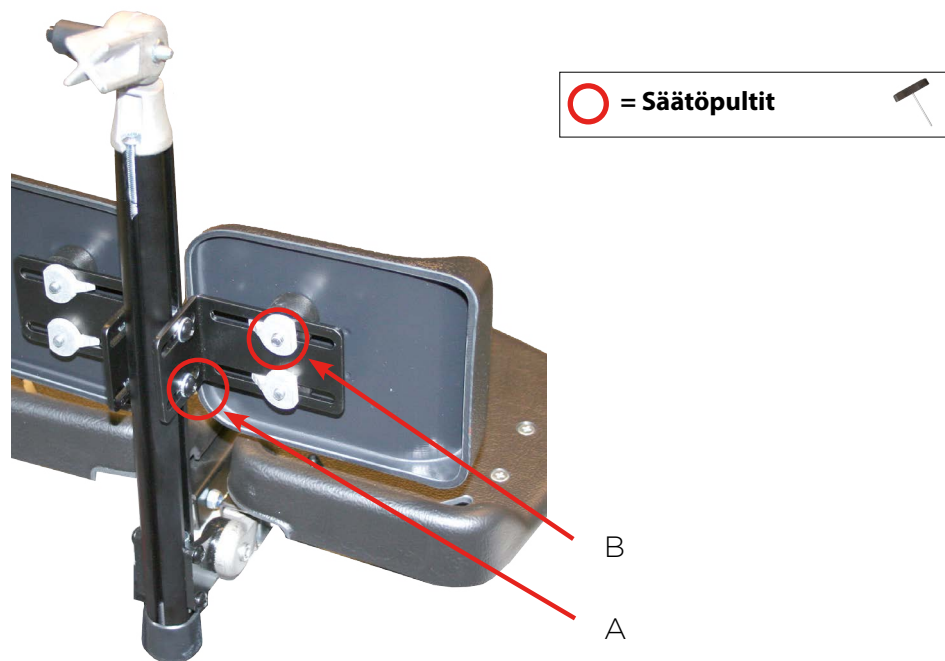

# Jalkakehikko

## Jalkakehikon (yksi kannatinputki) asentaminen jälkikäteen tilattuna

Koska jalkojen tukikehikko on suunniteltu sopivaksi sekä yhden että kahden kannatinputken järjestelmiin, on jalkalautaan porattava reiät sivuilla 15-16 annettujen ohjeiden mukaisesti riippuen siitä, millainen jalkalauta on käytössä.


Jalkakehikon asentamiseksi tappimutteri (A) kiinnitetään ensin jalkatuen kannattimessa (C) olevaan jalkakehikkoon (B). Sen jälkeen jalkatuki (D) säädetään sopivalle korkeudelle ja vipu (E) kiristetään.

Jalkakehikon korkeus ja leveys säädetään sopivaksi ruuvien (F) ja (G) avulla. Jalkakehikon muovinen uloke (H) työnnetään jalkalaudassa olevan aukon (I) läpi. Lopuksi asennetaan mukana toimitettu pehmuste ja kaikkien ruuvien kireys tarkistetaan.

## Jalkakehikon (yksi kannatinputki) asentaminen jalkatuen kanssa tilattuna

Jalkakehikon asentamiseksi tappimutteri (A) kiinnitetään ensin jalkatuen kannattimessa (C) olevaan jalkakehikkoon (B). Sen jälkeen jalkatuki (D) säädetään sopivalle korkeudelle ja vipu (E) kiristetään.

Jalkakehikon korkeus ja leveys säädetään sopivaksi ruuvien (F) ja (G) avulla. Jalkakehikon muovinen uloke (H) työnnetään jalkalaudassa olevan aukon (I) läpi. Lopuksi asennetaan mukana toimitettu pehmuste ja kaikkien ruuvien kireys tarkistetaan.

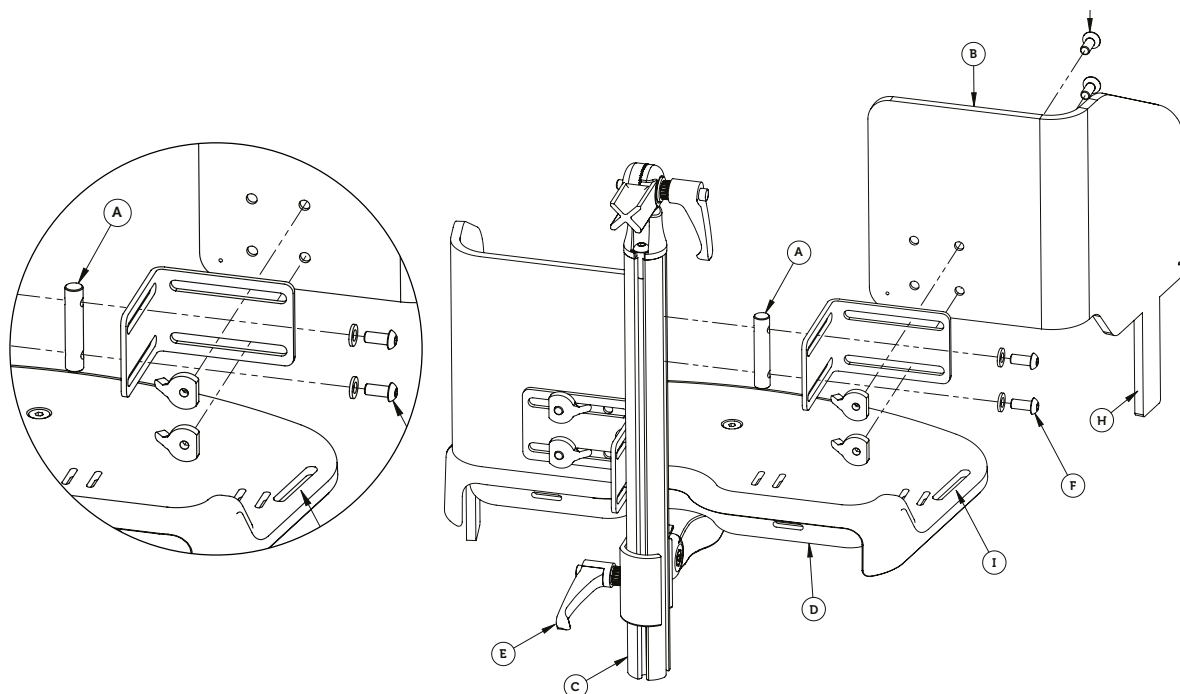


Muovinen uloke (H) voidaan säätämisen jälkeen tarpeen mukaan katkaista tai kuumentamalla taittaa jalkalaudan alle. Porausreikien merkinnät löytyvät myös jalkalaudat alta.


# Vaihtaminen yhdestä kannatinputkesta kahteen ja päinvastoin

Jalkojen tukikehikko toimitetaan normaalisti esiasennettuna kahdelle kannatinputkelle kokoihin 2, 3 ja 4, kun taas koko 1 on esiasennettu yhdelle kannatinputkelle.

Vaihtaminen näiden vaihtoehtojen kesken tapahtuu kääntämällä kulmalevy (A) 180 astetta ja vaihtamalla sen jälkeen tappimutteri (B) toiselle puolelle.

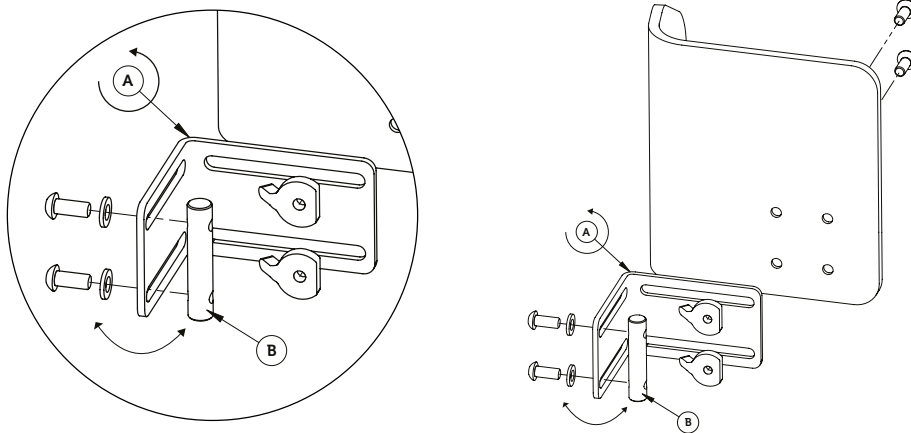

## Tekniset tiedot yhtenäiselle ja erillisille jalkalautoille

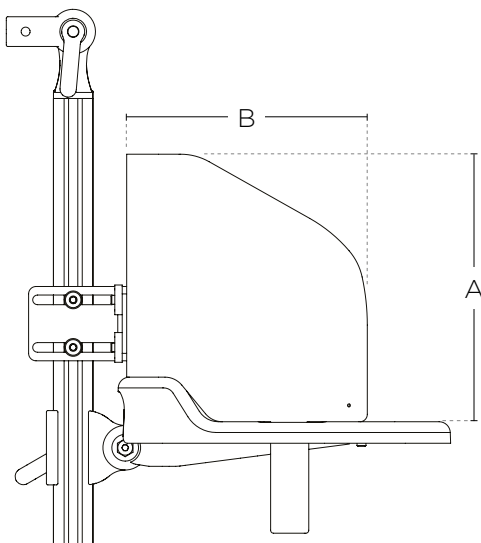


### Jalkalauta

| Yhtenäinen /Erillinen | Koko | Korkeus (A) | Syvyys (B) |
|-----------------------|------|-------------|------------|
| 990041 / 990046       | 1    | 140 mm      | 130 mm     |
| 990042 / 990047       | 2    | 170 mm      | 160 mm     |
| 990043 / 990048       | 3    | 205 mm      | 190 mm     |
| 990044 / 990049       | 4    | 235 mm      | 240 mm     |


# Porausohjeet yhtenäiselle jalkalaudalle

Koko 1

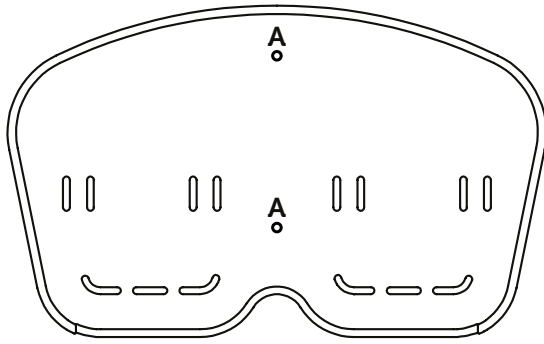


(A)  
Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella

Koko 2

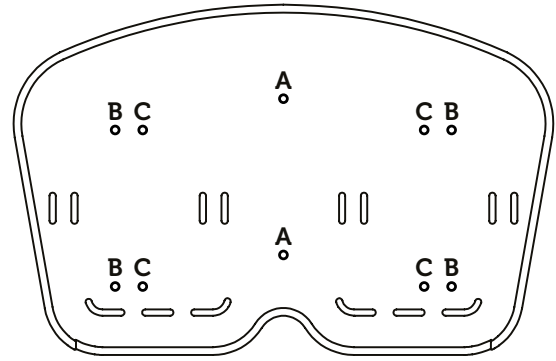


(A)  
Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella  
(B)  
Seabass Pro  
kahdella  
kannatinputkella  
(C)  
Clozitt  
kahdella  
kannatinputkella

Koko 3

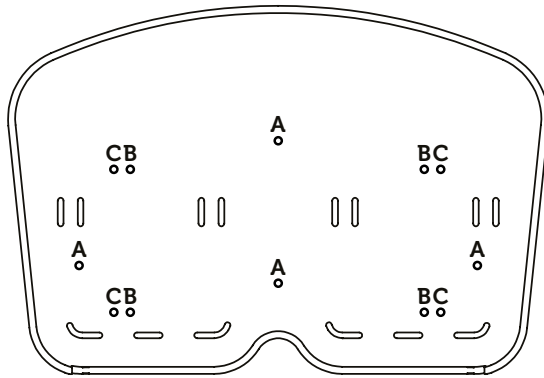

(A)  
Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella  
(B)  
Seabass Pro  
kahdella kannatinputkella  
(C)  
Anatomic Sits & Clozitt  
kahdella kannatinputkella


Koko 4

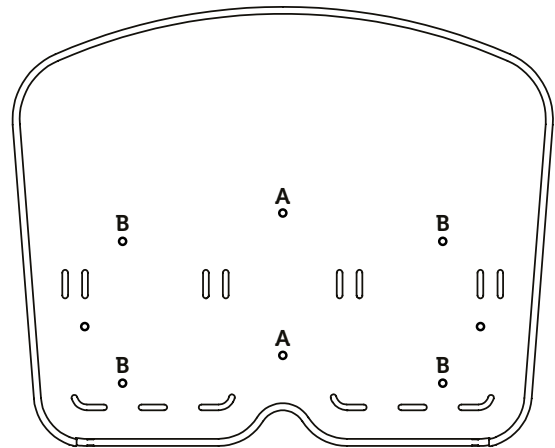

(A)  
Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella  
(B)  
Anatomic Sits  
kahdella kannatinputkella


# Porausohjeet erillisille jalkalautoille

Koko 1

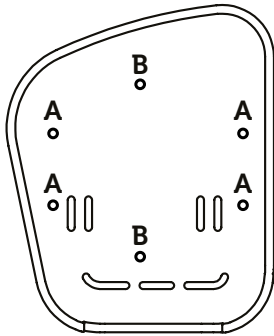

(A)


Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella

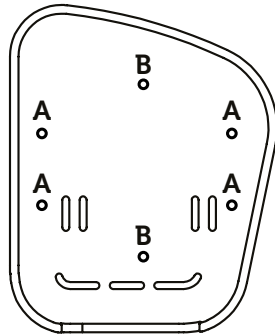

(B)


Anatomic Sits  
kahdella kannatinputkella

Koko 2

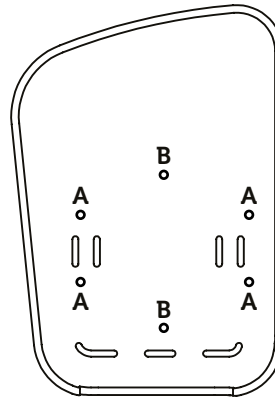

(A)


Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella

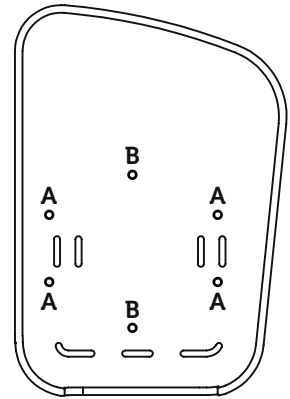

(B)


Seabass Pro, Clozitt,  
Anatomic Sits & Sharky Pro  
kahdella kannatinputkella

Koko 3

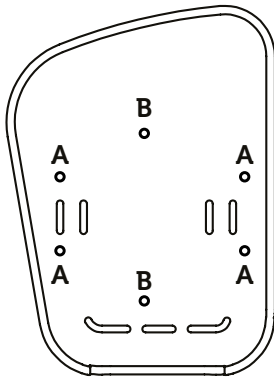

(A)


Delfi Pro & Anatomic Sits  
yhdellä kannatinputkella

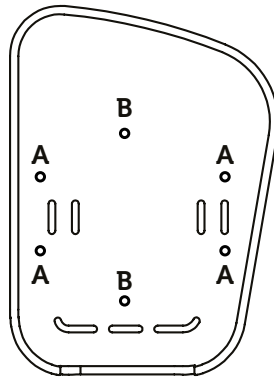

(B)

Seabass Pro, Clozitt &  
Anatomic Sits  
kahdella kannatinputkella

Koko 4

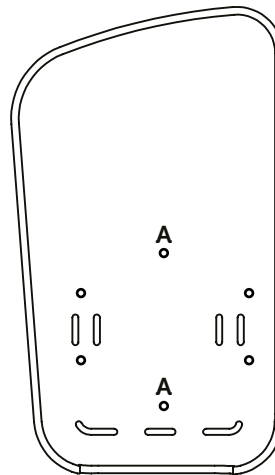

(A)

Anatomic Sits  
kahdella kannatinputkella

# Kunnossapito-ohjeet

## Alustan puhdistaminen

Alusta tulee puhdistaa säännöllisesti autoshampoolla tai vastaavalla. Voimakkaan likaantumisen yhteydessä voidaan käyttää rasvaliuotinta. Huomioi ympäristö ja käytä biohajoavia puhdistusaineita!

## Akku



Lataa akkua 24 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

Lataa akku tämän jälkeen joka yö.

Älä milloinkaan päästä akkua purkautumaan kokonaan, sillä se saattaa tällöin vaurioitua.

# Kunnostaminen

## Tarkastus

Tarkista, onko liikkuvissa osissa kuluneisuutta. Vaihda osat tarpeen mukaan. Tarkasta alustan yleinen kunto säännöllisesti ja varmista kaikkien ruuvien kireys. Mikäli olette epävarma, ottakaa yhteys meihin.

## Kaasujousi



**Tärkeää!** Kaasujousta on käytettävä säännöllisesti sen säilyttämiseksi toimivana. Kun tuotetta ei käytetä, tulee kaasujousta käyttää vähintään kerran 6 kuukauden välein. Tuotetta varastossa säilytettäessä tulee myös varmistaa, että jousen tanko on alaspäin suuntautuneessa asennossa. Muussa tapauksessa kaasujousen tiiviste saattaa rikkoutua ja jousi menettää toimintakykynsä.

# Varaosat

Zitzi Flipper Pro –alustassa saa käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

## Merkinnät

Runko on varustettu yksilöllisellä sarjanumerolla, joka tulee mainita kaikkien tuotetta koskevien yhteydenottojen yhteydessä. Sarjanumero löytyy istuinlevyn alta.

SARJANRO.



## Warranty

Takuu  
Rungolle

24

24 kuukauden takuu  
valmistusvirheiden osalta

Takuu  
Maalipinnalle

12

12 kuukauden takuu  
valmistusvirheiden osalta

Takuu  
Pyörille


12

12 kuukauden takuu  
valmistusvirheiden osalta

## Yhdistelmät & sopiva istuinjärjestelmä

Tuote sopii käytettäväksi istuinjärjestelmien Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro & Anatomic SITS kanssa. Muiden yhdistelmien osalta tulee ottaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen.

## Purkaminen ja hävittäminen

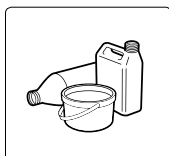

### Muovia

Pyörät, nupit, pyörien lukituslaite



### Metallia

Runko, kaasujousi, jouset, ruuvit ja kannatinputket



### Palavaa

Tyynyt

## Tekniset tiedot

Tuotteen tekniset tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta. Mikäli käyttäjän paino ylittää 40 kg, on käytettävä sähkötoimista alustaa. Maksimikuormitus on 75 kg. Mikäli teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostilla [info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com) tai soittakaa tukipuhelimeemme +4611 - 16 18 05.

| <b>Zitzi Flipper Pro</b>               | <i>Manuaalinen</i> | <i>Sähkökäyttöinen</i> |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Pyörät                                 | 125 mm             | 125 mm                 |
| Kallistus                              | 0-30° / -5-25°     | 0-30° / -5-25°         |
| Alin istumakorkeus                     | 23 cm              | 23 cm                  |
| Korkein istumakorkeus                  | 61 cm              | 61 cm                  |
| Kokonaispituus                         | 53, 60, 70 cm      | 53, 60, 70 cm          |
| Kokonaisleveys                         | 55 cm              | 55 cm                  |
| Kokonaispaino                          | 14,5 15,5 16 kg    | 19 20 20,5 kg          |
| Koot                                   | 3                  | 3                      |
| Käyttäjän maksimipaino (koko 1,2 ja 3) | 35, 50, 75 kg      | 35, 50, 75 kg          |

SE

**Anatomic SITT AB (valmistaja)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Puh. +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Asiakastuki +46 11 16 18 05

**Käyntiosoite**

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

**Anatomic SITT A/S**

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Puh. +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI

**Rehaco Oy**

Haarasuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Puhelin: +35 840 775 22 88

NL

**Anatomic SITT Nederland BV**

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Puh. +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

*World wide*

**[anatomicsitt.com](http://anatomicsitt.com)**

**[info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)**

**[facebook.com/anatomicsitt](https://facebook.com/anatomicsitt)**

**[youtube.com/anatomicsitt](https://youtube.com/anatomicsitt)**

