



**WC- ja
suihkutuolit**

Raz-AP/SP

Käyttäjän ja jälleenmyyjän opas



rehaco.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että Raz-suihkutuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti Raz-suihkutuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN

AP / SP

159 kg (350 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI JÄLLEENMYYNTITARKOITUKSESSA

LAITE ON SOPIVA TYYPIN A SUUREN KÄYTTÖKUORMITUKSEEN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus eteenpäin

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkavipu aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. ***Parhaan vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkutuilin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.*** Avaa valinnainen pyörien suunnan lukko, jos se kuuluu tuolin varusteisiin, ennen kuin kierrät takapyöriä sisään päin ja kytket pyörien kaksoislukot.



KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan Raz-suihkutuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin ilman hoitajaa, joka voi pidätellä tuolia laskeutumisen aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja suihkutuilin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.



Vakaus sivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin Raz-suihkutuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – on käytettävä tartuntapihtejä tai pyydettyä apua muilta.




KÄYTTÄJÄ EI SAA sijoittaa Raz-suihkutuolia sivukallistukselle, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Vakaus taaksepäin

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa SP-mallin tuolilla ylös kaltevaa pintaa ilman, että lisävarusteena saatavat takaosan kaatumisenestolaitteet ovat paikoillaan. Lisävarusteena saatavat kaatumisenestolaitteet on tilattava Raz-SP:n mukana ja asennettava oikein paikoilleen ennen epätasaisilla pinnoilla ajamista.

Kaatumisenestolaitteet - SP-malli

Raz SP-suihkutuoleihin on lisävarusteena saatavissa kaatumisenestolaitteet. Näitä suositellaan aina kun tuolia käytetään epätasaisilla pinnoilla, kuten rampeilla tai kaltevilla lattioilla, kun tuolia käyttää alaraaja-amputoitu käyttäjä, kun takapyöriä on siirretty eteenpäin tehtaan asettamasta kohdasta, tai kaikissa tilanteissa, joissa taaksepäin vakaus vaarantuu.

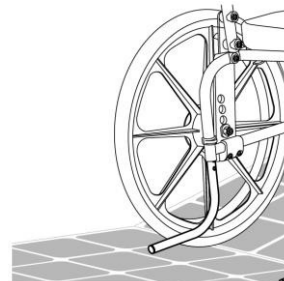

Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit ja muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on hoitajan testattava sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydettyä pätevän terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-AP:ta ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 suhde (5° kallistus).




ÄLÄ anna ketään käyttäjää liikuteltavan (vedettävän tai työnnettävän) Raz-AP-suihkutuolissa muutoin kuin hoitajan toimesta.

TÄRKEÄÄ!

RAZ-SP:N VAKAUTEEN TAAKSEPÄIN VAIKUTTAVAT TAKAPYÖRIEN ASENNUSPAIKKA, KÄYTTÄJÄN FYYSISET JA KLIINISET OMINAISUUDET JA SELKÄNOJAN KULMA. KAAUTUMISEN ESTOLAITTEIDEN TARVE ON MÄÄRITETTÄVÄ RAZ-SP-TUOLIA MÄÄRÄTTÄESSÄ, OTTAEN HUOMIOON KÄYTTÄJÄN FYYSISET KYVYT JA YMPÄRISTÖN. KAAUTUMISEN ESTOLAITTEET VOIDAAN TILATA JÄLKIASENNUKSENA MILLOIN TAHANSA, JOS HAVAITAAN NIIDEN OLEVAN TARPEELLISIA.

Upottaminen

Raz-suihkutuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Siitä voi aiheutua vaurioita suihkutuuolin osille.

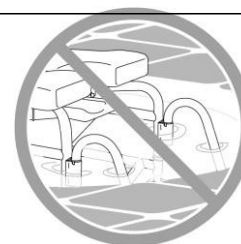

Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida

toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät tunne turvallisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisien aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.

Siirtyminen Raz SP -suihkutuoliin

AINA lukitse kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin/takapyörät taaksepäin) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.

Siirtyminen Raz SP -suihkutuoliin

AINA lukitse molemmat etupyörät ulompaan asentoon (eteenpäin osoittamaan) ja kytke kokonaan molemmat pyörälukot niin, että ne kytkeytyvät tiukasti etupyöriin.

Pyörien lukot on tarkoitettu estämään itsekääntyvien pyörien kiertäminen. Pyörien kaksoislukot on suunniteltu estämään pyörien pyöriminen ja pyörähaarukoiden kiertäminen. Kääntyvien pyörien ja pyörien lukot **EIVÄT ESTÄ eivätkä VOI ESTÄÄ** suihkutuolia liukumasta/siirtymästä, jos lattia on liukas. Lattian liukkautta voi aiheuttaa pöly, vesi, saippua tai mikä tahansa aine, joka estää etu- tai takapyöriä tarttumasta laitaan turvallisesti.

Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen etu- ja/tai takapyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua lattioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.


ÄLÄ seiso millään osalla Raz-suihkutuolin runkoa.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta suihkutuoliin on esteetön pääsy.

Raz-suihkutuoli **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.



PYÖRÄT OSOITTAVAT
ULOSPÄIN

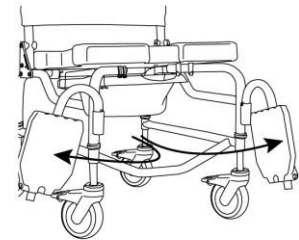

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-SUIHKUTUOLIIN ILMAN VALVONTAA.


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIA JA SEN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA!

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KINNITETTY. TAKAKOUKKUJEN ON OLTAVA TÄYSIN KYTKETTYJÄ JA ETUKANNATTIMIEN ON OLTAVA SALVATTUJA JA LUKITTUJA ISTUIMEN ETUTUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE.

VARMISTA, ETTÄ KUN TUOLI TOIMITETAAN ASIAKKAALLE, NIIN ISTUIMEN ASENNUSOHJEET LUOVUTETAAN ASIAKKAALLE JA/TAI HOITAJILLE.

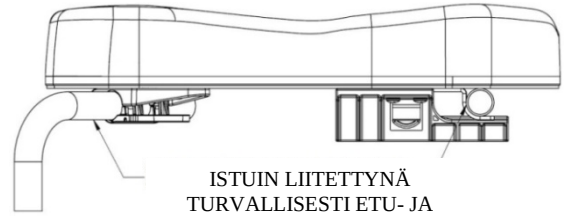


ISTUIN LIITETTYNÄ
TURVALLISESTI ETU- JA
TAKAPUTKIIN

KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0	YLEISIÄ TIETOJA	
1.1	Raz-AP/SP-suihkutuolien yleiskuvaus	7
1.2	Raz-AP/SP-suihkutuolien tekniset tiedot.....	7
2.0	VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
2.1	Selkänojan asennus	8
2.1.1	Selkänojan asennus – SP-malli.....	8
2.1.2	Selkänojan asennus – Malli AP	9
2.2	Raz-istuimen asennus	9
2.3	Pyörien asennus.....	10
2.4	Pyörien asennus vakiomallisella akselitapilla – SP-malli.....	10
2.5	Säädettävän jalkatuen asennus.....	11
2.6	Kiinnitysten asennus.....	11
3.0	SÄÄDÖT: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
3.1	Selkänojan säätö	11
3.1.1	Selkänojan kulman säätö	11
3.1.2	Säädettävän selkäpehmusteen säätö	11
3.2	Muotoillun istuimen syvyyssäätö.....	12
3.3	Istuimen korkeuden säätö lattiasta	13
3.3.1	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – AP-malli	13
3.3.2	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP-mallin etupyörät	13
3.3.3	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP-mallin takapyörät	13
3.4	Takapyörien eteen/taakse-säätö.....	14
3.5	Pyörien lukkojen säätö – SP-malli	14
3.6	Käsinojen säätö – Adjusta-Back-vaihtoehto	14
3.6.1	Käsinojan korkeuden säätö	14
3.6.2	Käsinojan kulman säätö	15
3.7	Säädettävän jalkatuen säätö	15
4.0	KÄYTTÖ JA TOIMINTA	
4.1	Adjusta-Back-selkänoja	16
4.2	Säädettävä selkäpehmuste	16
4.3	Muotoiltu istuin	17
4.4	Pyörät.....	18
4.5	Säädettävät jalkatuet	18
4.6	Pyörälukot – SP-malli	18
4.7	Alusastia.....	18
5.0	PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	
5.1	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen	19
5.1.1	Alusastia	19
5.1.2	Muotoiltu istuin	19
5.2	Puhdistus tarvittaessa	19
5.2.1	Säädettävä selkäpehmuste	19
5.2.2	Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat.....	19
5.3	Suosittelut puhdistustuotteet.....	19
6.0	RAJOITETTU TAKUU	20
7.0	YHTEYSTIEDOT	21

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Raz-AP/SP-suihkutuolien yleiskuvaus

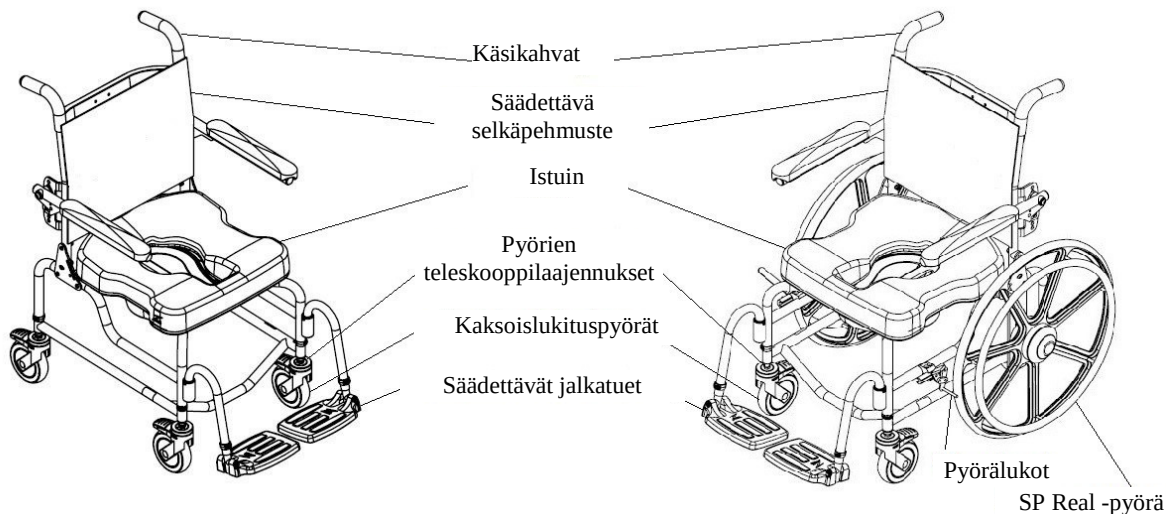

1.2 Raz-AP/SP-suihkutuolien tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-AP	Raz-SP (22" pyörät)	Raz-SP (24" pyörät)
PAINOKAPASITEETTI	159 kg (350 lbs)	159 kg (350 lbs)	159 kg (350 lbs)
RUNGON LEVEYS (istuin ja takarunko)	46 cm (18")	46 cm (18")	46 cm (18")
KOKONAISLEVEYS	57 cm (22,5")	67 cm (26,5")	67 cm (26,5")
KOKONAISPITUUS (sis. jalkatuet)	86 cm (33,75")	99 cm (39")	99 cm (39")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuin)	46 cm (18")	46 cm (18")	46 cm (18")
ISTUIMEN SYVYYS (takatolpan edestä istuimen etureunaan)	40 tai 48 cm (16" tai 19")	40 tai 48 cm (16" tai 19")	40 tai 48 cm (16" tai 19")
VAPAA KORKEUS alusastiakannattimilla: ilman alusastiakannattimia:	39-50 cm (15,5"-19,5") 41-51 cm (16,25"-20,25")	41-51 cm (16"-20") 39-49 cm (15,25"-19,25")	40-50 cm (15,75"-19,75") 38-48 cm (15"-19")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA (17" Adjusta-Back)	17-24 cm ½" lisäyksin (6,5"-9,5")	17-24 cm ½" lisäyksin (6,5"-9,5")	17-24 cm ½" lisäyksin (6,5"-9,5")
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	51-61cm 1" lisäyksin (20"-24")	51-61 cm 1" lisäyksin (20"-24")	51-61 cm 1" lisäyksin (20"-24")
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuet)	17 kg (38 lbs)	21 kg (47 lbs)	22 kg (49 lbs)
KEHYKSEN JA RUNKO-OSIEN MATERIAALI	Ruostumaton teräs (Elinikäinen takuu ruostumista vastaan)		
PIENIN KÄÄNTÖYMPYRÄ	93 cm (36,75")	152 cm (60")	152 cm (60")


2.0 VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN

2.1 Selkänojan asennus

2.1.1 Selkänojan asennus – SP-malli

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Sijoita kansivälilevy molempien selkänojan runkoputkien ulkopuolelle. Kohdista välikappale rungon alaosaan olevaan reikään.
3. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon jotta kansivälilevyt jäävät selkänojan asennuslevyjen ja selkänojan kehysputkien väliin.

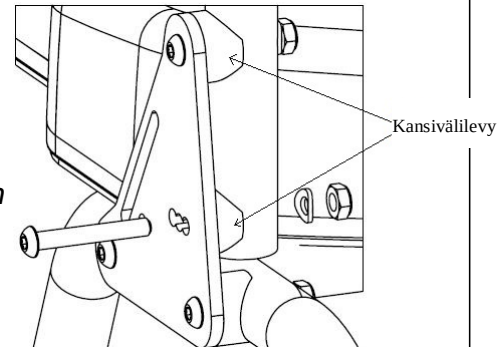

VIHJE: Yhden henkilön kootessa, aseta yksi kansivälilevy selkänojan putkelle juuri selkänojan rungon kääntöpisteen alapuolelle, nosta selkänojaa osittain ylöspäin kiinnittääksesi se paikoilleen, ja aseta sitten toinen kansivälilevy toiselle selkänojan putkelle, ja nosta selkänoja pystyasentoon.


4. Aseta 1 3/4" nuppipääruuvi läpi yhdestä selkänojalevyn kolmesta reiästä, ja vedä se kansivälilevyn ja runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse keskimäinen reikä 90° selkänojakulmalle, taaimmainen reikä 85° kulmalle, tai etummainen reikä 95° kulmalle.

VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja rungon läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.

5. Kiinnitä ruuvin toinen pää kaarevalla aluslevyllä ja nailonlukkommutterilla.
6. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkommutterin ohi.
7. Toista vaiheet 4–6 toiselle kehysputkelle.

TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

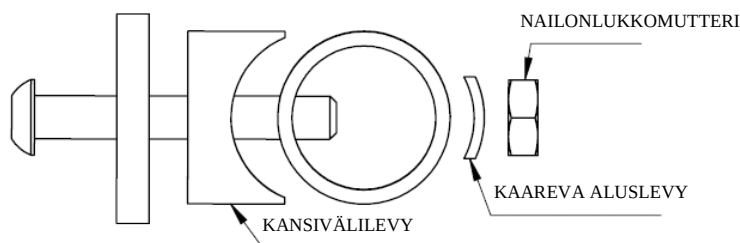


2.1.2 Selkänojan asennus – Malli AP

Tarvittavat työkalut: 5/32" kuusioavain, 7/16" kiintoavain


1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon kohdistaksesi reiät.
3. Aseta 1 1/2" nuppipääruuvi läpi yhdestä selkänojalevyn kolmesta reiästä, ja vedä se runkoputken läpi.

HUOM.: Valitse keskimmäinen reikä 90° selkänojakulmalle, taaimmainen reikä 85° kulmalle, tai etummainen reikä 95° kulmalle.
VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja rungon läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.

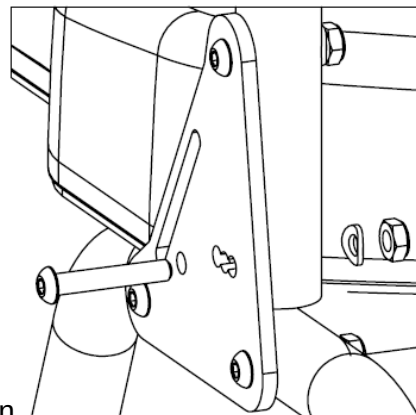


4. Kiinnitä ruuvin toinen pää kaarevalla aluslevyllä ja nailonlukkommutterilla.
5. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkommutterin ohi.
6. Toista vaiheet 3–5 toiselle kehysputkelle.

TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

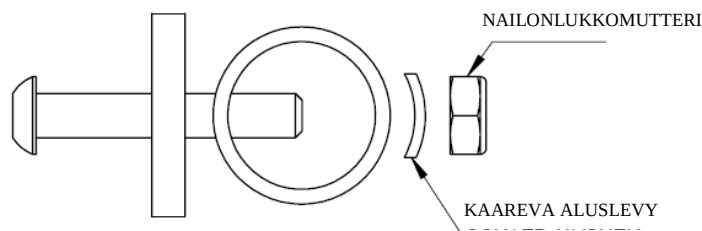

2.2 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista ne auki.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

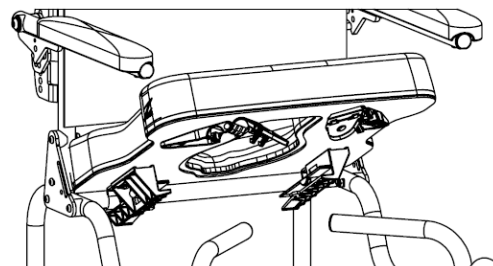

2.3 Pyörien asennus


1. Poista pyörät tarvikelaaatikosta.
2. Aseta pyörien laajennusputki alarungon vastaputkeen haluttuun asentoon.
3. Kohdista reikä runkoon ja pyörien laajennusputkeen. Voi olla tarpeen kiertää pyörien laajennusputkea, jotta reiät osuvat kohdakkain.

VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät ensin.

4. Aseta napsautusnasta runkoputken ja pyörien laajennusputken läpi. Varmista, että nastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti runkoputkien ulkopuolelle.
5. Toista vaiheet 2–4 kaikille rakenteen pyörille.

HUOM.: Jos AP-tuolin mukana tilattiin pyörien suunnan lukitus, yhdessä neljästä pyörästä on lukko asennettuna pyörän varteen.

Pyörät, joissa on suunnan lukitus, on asennettava eteenpäin suunnattuina johonkin takapyörien kohdista.

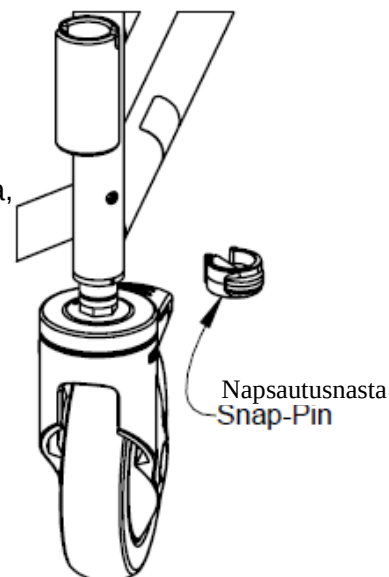

TÄRKEÄÄ!

TELESKOOPPISET PYÖRIEN LAAJENNUSPUTKET MAHDOLLISTAVAT 10 CM (4") KORKEUSSÄÄTÖALUEEN. MUTTA MITÄ KORKEAMMAKSI TUOLI SÄÄDETÄÄN, SITÄ AREMPI SE ON KAATUMISELLE. PYÖRIÄ EI KOSKAAN SAA SÄÄTÄÄ ERI KORKEUDELLE. EPÄTASAINEN TUOLI ON ERITTÄIN VAARALLINEN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE.


PYÖRÄT ON AINA ASENNETTAVA MAHDOLLISIMMAN MATALAAN ASENTOON, JOKA TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN TARPEET. KAIKKI TÄMÄN YLÄPUOLISET ASENNOT AIHEUTTAVAT MASSAKESKIPISTEEN SIIRTYMISEN, JOSTA VOI SEURATA LOUKKAANTUMINEN TAI TUOTEVAHINGOJA. SUOSITELLAAN, ETTÄ PÄTEVÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN AUTTAA JA A TARKISTAA TUOLIN TASAPAINON, JOS KORKEUSSÄÄTÖÄ MUUTETAAN.

2.4 Pyörien asennus vakiomallisella akselitapilla – SP-malli

Tarvittavat työkalut: 3/4" kiintoavain, 3/4" hylsyavain

1. Poista molemmat pyörät pakkausmateriaalista.
2. Poista akselitapit ja nailonlukkommutterit pakkausmateriaalista.
3. Poista pyörän keskiö kiertämällä sitä vastapäivään.
4. Aseta akselitappi pyörän navan läpi ja siitä akselin vastakappaleeseen.
5. Kierrä nailonlukkommutteri akselitappiin, ja kiristä sitä, kunnes pyörärakenne on tiukasti kiinni. *Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.*
6. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
7. Toista vaiheet 3–6 toiselle pyörälle.

HUOM: Pyörä on asennettava reikiin, jotka vastaavat haluttua istuimen ja pyörän korkeutta niin, että tuolin runko on suorassa.

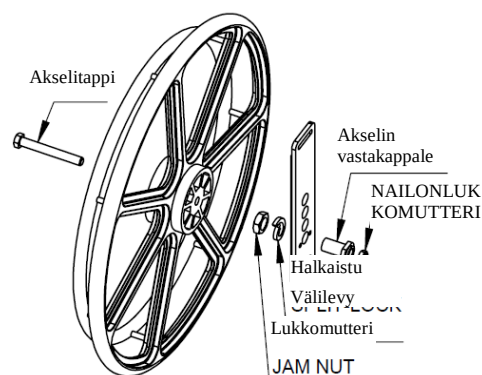


Tehdasasetus - Pyörien laajennusasetus SP-mallille	
22" Takapyörä	Alin reikä pyörien laajennusputkessa
24" Takapyörä	Toiseksi alin reikä pyörien laajennusputkessa

2.5 Säädetävän jalkatuen asennus

1. Poista pakatut jalkatuet pakkauksen sisällä olevasta varustelaatikosta.
2. Aseta jalkatuen ripustusputket vastakappaleisiin, jotka on hitsattu tuolin rungon etuosaan.

Jos tukiputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

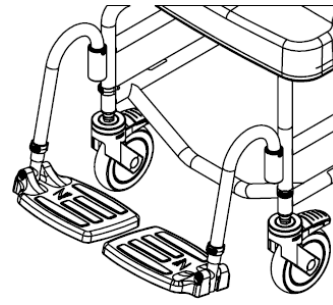

2.6 Kiinnitysten asennus

Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti.


Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, saattaa olla tarpeen vaihtaa uudelleen-käytön sijaan.

Tarkista nailonlukkommutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen.

Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus.

Jos sitä ei ole, vaihda nailonlukkommutteri uuteen.

Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

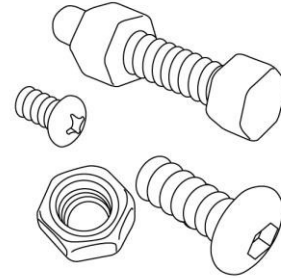

TÄRKEÄÄ!


SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA.

3.1 Selkänojan säätö

3.1.1 Selkänojan kulman säätö


Tarvittavat työkalut: 3/16" kuusioavain, 7/16" kiintoavain

1. Löysää ja poista lukkomutterit, välilevyt ja kansivälilevyt (SP-mallit) molemmista selkänojan pystyrunkoputkista.
2. Poista keskiruuvit ja välilevyt pystysuorista selkänojan rungon putkista.
3. Jättäen sisemmät kansivälilevyt paikoilleen (SP-mallit) kierrä selkänoja johonkin kolmesta selkänojan asennuslevyjen kohdasta.
4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn reikien läpi.
5. Kiinnitä ruuvit kaarevilla aluslevyillä ja lukkomuttereilla.
6. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella.

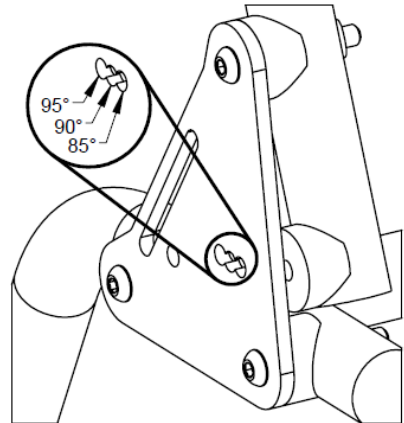

3.1.2 Säädetävän selkäpehmusteen säätö

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

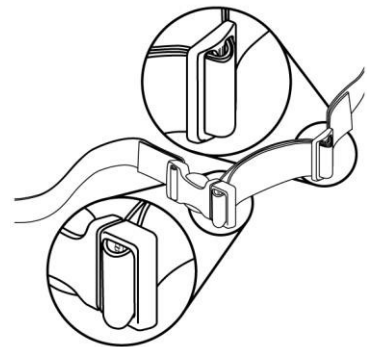


3.2 Muotoillun istuimen syvyyssäätö

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu/takasuuntainen säätövara.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla muoviset istuimen etuosan kannattimet.
2. Poista istuin nostamalla etureunaa ylös ja liu'uttamalla istuinta eteenpäin ja pois päin tuolista.
3. Löysää (*älä irrota*) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen.
4. Palauta istuin tuolin rungolle, asettaen istuimen etukannattimet etuosan tukiputkiin.
5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
6. Kiristä ruuveja juuri riittävästi pitämään puristimet paikoillaan, varmistaen, että istuin on asennettu runkoon suoraan.
7. Kun istuin on tuolissa, liu'uta takakannattimia taakse kunnes ne osuvat tiukasti takaristiputkiin, ja kiristä ruuvit pitämään kannattimet paikoillaan.
8. Kiristä kaikki kahdeksan ruuvia.

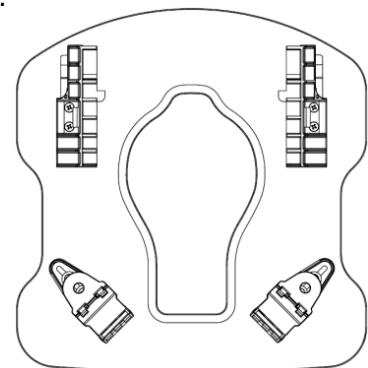

3.3 Istuimen korkeuden säätö lattiasta

3.3.1 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – AP-malli

Raz-AP-mallissa on neljä pyörien teleskooppilaajennusta, jotka mahdollistavat 7,5 cm (3") korkeussäädön.

1. Poista pyörän jatketta paikallaan pitävä napsautusnasta tuolin rungosta.
 2. Liu'uta pyörä rakenne haluttuun kohtaan.
 3. Kohdista pyörän jatkoputken reiät rungon reikiin, ja asenna napsautusnastat.
- VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät.*
4. Varmista, että nastat menevät kokonaan runkoputken läpi, ja että vihreät muoviklipsit napsauttavat tiukasti runkoputkien ympärille.
 5. Toista vaiheet 1–4 kaikille muille rakenteen pyörille.

TÄRKEÄÄ!

KAIKKI PYÖRIEN VARRET ON SÄÄDETTÄVÄ SAMALLE KORKEUDELLE. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA MUUTTAMALLA PYÖRIEN ASENTOA. EPÄTASAISET PYÖRIEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN.

3.3.2 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP-mallin etupyörät

SP-mallissa on kaksi etupyörien jatketta, jotka mahdollistavat 7,5 cm (3") korkeussäätöalueen, kun niitä käytetään 24" takapyörien kanssa, ja 10 cm (4") korkeussäätöalueen 22" takapyörillä.


1. Poista pyörän jatketta paikallaan pitävä napsautusnasta tuolin rungosta.
 2. Liu'uta pyörä rakenne haluttuun kohtaan.
 3. Kohdista pyörän jatkoputken reiät rungon reikiin, ja asenna napsautusnastat.
- VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät.*
4. Varmista, että nastat menevät kokonaan runkoputken läpi, ja että vihreät muoviklipsit napsauttavat tiukasti runkoputkien ympärille.
 5. Toista tämä toiselle pyörälle.

3.3.3 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP-mallin takapyörät

Tarvittavat työkalut: 3/4" hylsyavain, 3/4" kiintoavain

VIHJE: Katso kohdan 2.4 kuvaa.

1. Poista pyörän musta keskiö ensimmäisestä pyörästä kiertämällä sitä vastapäivään.
 2. Poista akselitappi ja pyörä rakenne akselin vastaanottavasta osasta alusastian kehyksessä.
 3. Poista akselin vastaanottava osa akselilevystä.
 4. Aseta akselin vastaanottava osa haluttuun reikään.
- HUOM.:** Katso oikealla olevasta kuvasta mahdolliset istuimen-etäisyydet-lattiasta.
5. Aseta halkaistu välilevy ja lukkomutteri akselin vastakappaleeseen.
 5. Aseta akseli ja pyörä rakenne akselin vastakappaleeseen ja kiristä nailonlukkommutteria, kunnes pyörä rakenne on tukevasti kiinni. Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.
 6. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
 7. Säädä pyörien lukot.
 8. Toista vaiheet 1–7 toiselle pyörälle. Vedä molempia pyöriä varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

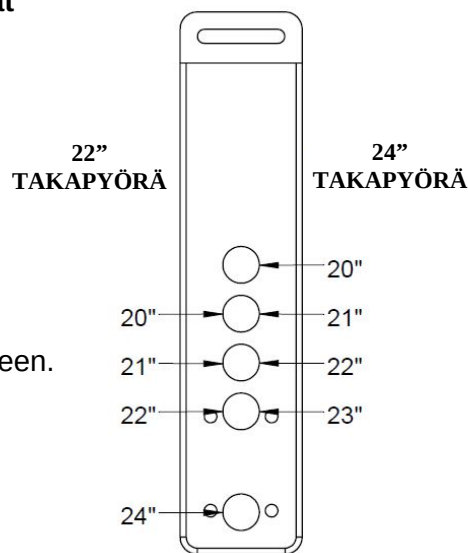


3.4 Takapyörien eteen/taakse-säätö

22" Ja 24" pyöriillä on 15 cm (6") etu/takasäätöalue.

Tarvittavat työkalut: 3/16" kuusioavain, 3/4" kiintoavain, 3/4" avain, (2) 7/16" avaimet

1. Löysää pyörien lukkoja.
2. Poista yhden pyörän keskiö kiertämällä sitä vastapäivään. Löysää ja poista akselitappi ja lukkomutteri, ja ota pyörärakenne pois.
- VIHJE: Tuolin kääntäminen toiselle sivulle helpottaa tätä toimenpidettä.
3. Pyörän ollessa irrotettuna löysää (älä irrota) alempi takapuolen nuppipääruuvi selkänojan asennuslevystä.
4. Löysää (älä irrota) alemman akselilevyn kiinnitysruuveja.
5. Säädä akselilevy huomioiden sen tarkan aseman asettamisen peilikuvaksi toisen pyörän akselilevyn.
6. Kiristä kiinnitysruuvit akselilevyn alaosaan ja nuppipääruuvi selkänojan asennuslevystä.
7. Aseta takaisin pyörä, akselitappi ja lukkomutteri.
8. Kiristä akselitappia ja lukkomutteria, kunnes ne ovat tiukalla.
9. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
10. Toista vaiheet 1–9 toiselle pyörälle. Noudata erityistä tarkkuutta kohdistaaksesi pyörät oikein.
11. Säädä pyörän lukot uudelleen.

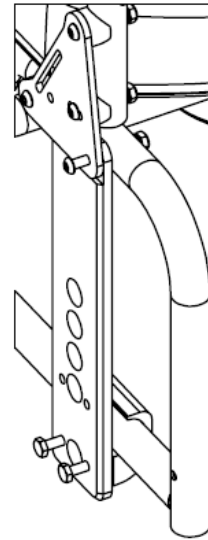

TÄRKEÄÄ!


ISTUIMEN KORKEUDEN KASVATTAMINEN, TAKAPYÖRIEN SIIRTÄMINEN ETEENPÄIN JA SELKÄNOJAN KULMAN SUURENTAMINEN HEIKENTÄVÄT HUOMATTAVASTI VAKAUTTA TAKASEPÄIN. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAKAUSTARKISTUS SUORITETAAN, KUN JOKIN NÄISTÄ SÄÄDÖISTÄ ON TEHTY. VAKAUSTARKISTUKSET ON TEHTÄVÄ HOITAJA TUOLIN TAKANA JA KAATUMISEN ESTOLAITTEET OIKEIN ASENNETTUINA JA SÄÄDETTYINÄ.

3.5 Pyörien lukkojen säätö – SP-malli

Tarvittava työkalu: 5 mm kuusioavain

1. Löysää (älä irrota) yhden pyörälukon kiinnitysruuveja.
2. Siirrä pyörän lukkoa rungon suuntaisesti, jotta se kiinnittyy pyörään ja pysäyttää kaiken pyörän liikkeen.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle pyörän lukolle.

Huom: Oikein säädetty pyörälukko estää pyörää kiertymästä olematta käyttäjälle liian vaikea kytkeä.

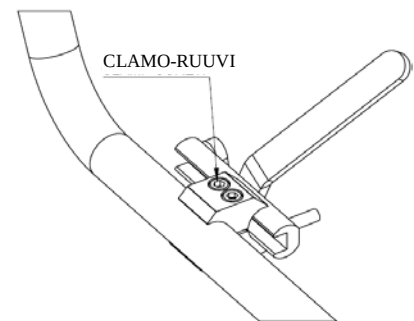


3.6 Käsinojen säätö – Adjusta-Back-vaihtoehto

3.6.1 Käsinojan korkeuden säätö

Käsinojat ovat säädettävissä 7,5 cm (3") alueella ½" lisäksi **vain** Adjusta-Back-vaihtoehdossa.

Tarvittavat työkalut: 7/32" kuusioavain, 9/16" kiintoavain

1. Löysää ja irrota alempi lukkomutteri.
2. Löysää ja irrota yläosan lukkomutteri.
3. Pitäen käsinoja ja käsinojen kääntölevyrakennetta yhdessä, siirrä yksikköä ylöspäin tai alaspäin käsinojan tukikiinnityksessä riippuen käyttäjän tarpeista.
4. Aseta yläruuvien lukkomutteri paikoilleen.
5. Aseta alaruuvien lukkomutteri paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit ja lukkomutterit ylhäältä ja alhaalta.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle käsinojalle.

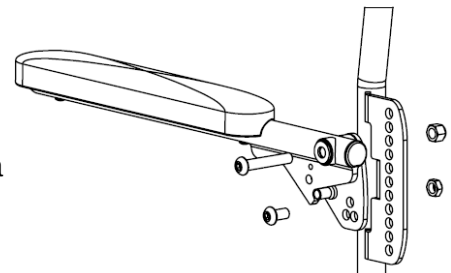


3.6.2 Käsinojan kulman säätö

Käsinojen kulmaa voidaan säätää 5° ylöspäin tai 5° alaspäin, jos selkänojan kulmaa säädetään 90° tehdasasetuksesta.


Tarvittavat työkalut: 7/32" kuusioavain, 9/16" kiintoavain

1. Löysää ja poista ruuvit, välilevyt ja lukkomutterit käsinojan kääntölevyn alaosasta.
2. Pitäen yläruuvia paikoillaan, kierrä käsinojarakennetta kunnes haluttu asento savutetaan, kohdistuen yksi kolmesta (kolmion muotoon järjestetystä) käsivarren taittolevyn reiästä kohdistettuna käsinojan tukikiinnityksen reikiin.
3. Aseta ruuvi haluttuun käsinojan taittolevyn kohtaan, ja kiinnitä lukkomutteri.
4. Kiristä ruuvi ja lukkomutteri.
5. Toista vaiheet 1–4 toiselle käsinojalle.

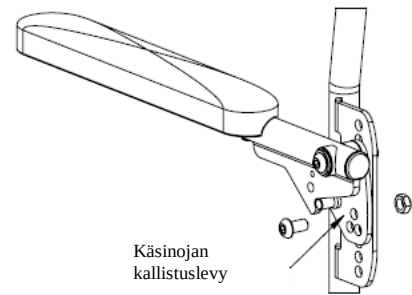

3.7 Säädetävän jalkatuen säätö


1. Poista muovinen napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sääda jalkalevyn laajennusputki pystysuoraan sopivaan korkeuteen jalkatuen ripustusputken sisällä.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi. Varmista, että napsautusnastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muoviklipsi napsahtaa tiukasti ripustusputkien ulkopuolelle.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle jalkalevylle.

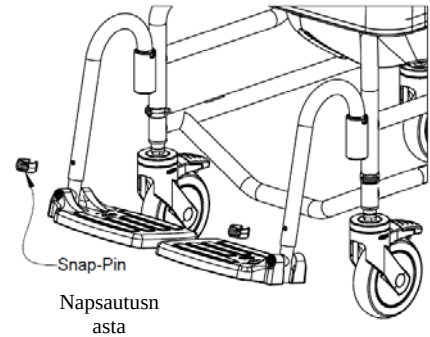

4.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

4.1 Adjusta-Back-selkänoja

Adjusta-Back -tuen kulmaa voidaan säätää (85°, 90°, tai 95°) ja siinä on käsituot, joiden korkeutta ja kulmaa voidaan säätää. Käsituot lukkiutuvat automaattisesti, kun ne taitetaan alas. Adjusta-Back on saatavana 17", 20" ja 24" selkäpituuksilla (43 cm, 51 cm ja 61 cm).

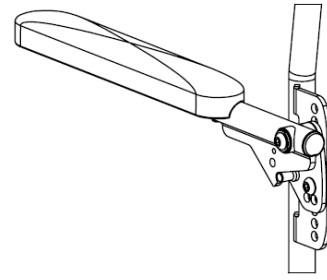


4.2 Säädetty selkäpehmuste

Adjusta-Back-selkätuissa on säädettävä selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Selkäpehmuste on irrotettava konepesua varten, ja se on saatavana 17" (43 cm), 20" (51 cm) ja 24" (61 cm) pituisina tuolille valitun selkänojan pituuden mukaisesti.

Asentaaksesi säädettävän selkäpehmusteen

Adjusta-Back-laitteeseen:


1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistuen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ylin hihna (1) on poikkituen yläpuolella.
3. Toinen (2) ja kolmas (3) hihna on sijoitettu ristitankojen ja selkänojan kiinnityslevyjen väliin.
4. Neljäs (4) ja viides (5) hihna asetetaan käsinojen asennuslevyjen aukkojen läpi.
5. 20" (51 cm) Pitkässä selkätuessa on kuudes hihna, joka sijaitsee käsitukien asennuslevyjen alapuolella.
6. Säädä kaikki hihnat käyttäjän tarpeen mukaisesti.

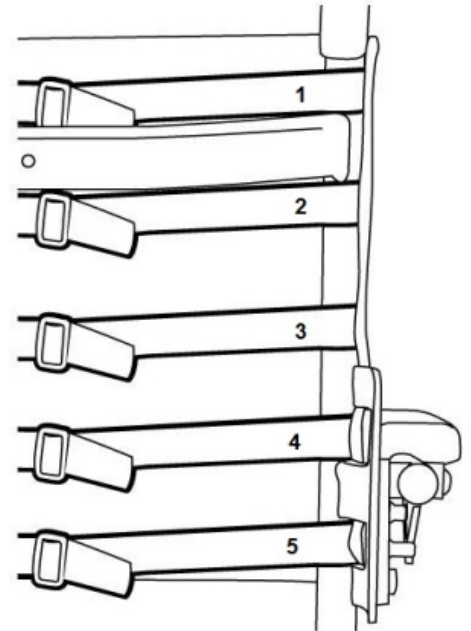

HUOM.: 24" (61 cm) Adjusta-Back -tuessa kaksi ylintä hihnaa on oltava selkätuen poikkituen yläpuolella. Muut viisi hihnaa ovat samalla korkeudella kuin 20" (51 cm) Adjusta-Back-tuessa.

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.


Säädettävän selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

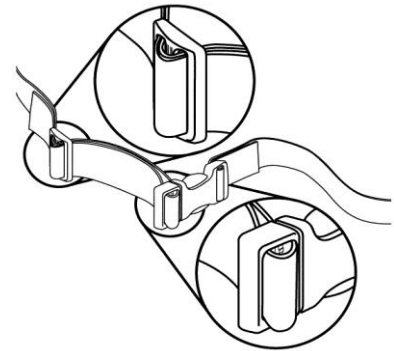

4.3 Muotoiltu istuin

Vakiomalliset, muotoillut Raz-AP/SP-suihkutuolin istuimet on suunniteltu auttamaan lantion pysymistä tasapainossa, ja ne on muotoiltu vähentämään painetta. Muotoillut istuimet on valmistettu pehmeästä, kiinteäpintaisesta vaahdosta, ja niitä on saatavana neljänä mallina: 16" syvä edestä avoin, 16" syvä edestä yhtenäinen, 19" syvä edestä avoin ja 19" syvä edestä yhtenäinen. Paineen vähennyksen päivityksenä on myös saatavana Visco-Foam-rajapintaistumia. Visco-Foam-istuimia on saatavana 16" ja 19" istuinsyvyyksillä, joista jokaisesta on viisi mallia: edestä yhtenäinen, edestä avoin, takaa avoin, vasemmalta avoin ja oikealta avoin.

Kaikissa istuimissa on erityinen Ischial Pelvic Alignment System (IPAS), joka mahdollistaa 5 cm (2") etu- ja takasäädön, lukkiutuu paikoilleen siirtoja varten, ja joka on helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisävälikappaleita on saatavana istuimen etu- ja takakulmalle. Kaikki Raz-tuolit sopivat useimpien vakiomallisten WC-istumien päälle, kun alusastia ei ole paikoillaan.

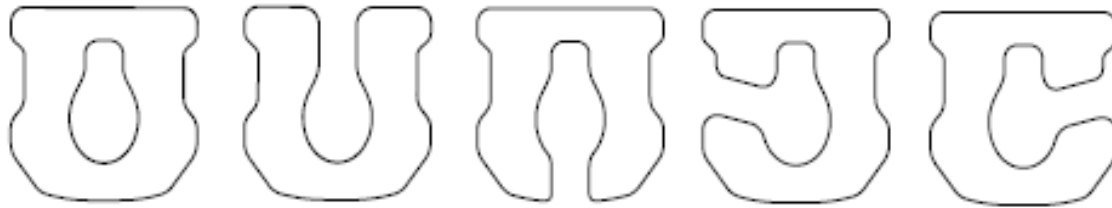

Yhtenäinen
etuosa

Avoin
etuosa


Avoin
takaosa

Avoin
vasemmalle

Avoin
oikealle

Asentaaksesi Raz-istuimen:

1. Varmista, että etukannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista ne auki.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen etukannattimen napsauta kiinnike sen toiseen puolikkaaseen etupuolen tukiputkien ympärillä.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

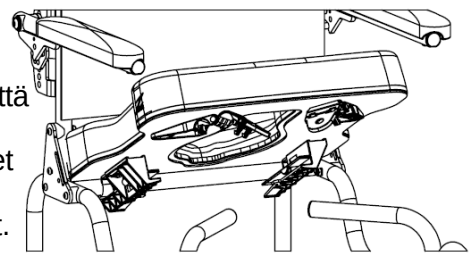

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN AENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

TÄRKEÄÄ!

RUNGON JA ISTUIMEN SÄÄDÖN SAA TEHDÄ VAIN RAZ-JÄLLEENMYYJÄN VALTUUTETTU ASENTAJA. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA KÄÄNTÄMÄLLÄ PYÖRIEN ASENTOA. RUNGON ON AINA OLTAVA SUORASSA. VIRHEELLINEN PYÖRIEN ASEMA VOI HEIKENTÄÄ TUOLIN VAKAUTTA JA AIHEUTTAA KAATUMISEN. TÄMÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA KÄYTTÄJÄLLE JA/TAI VAURIOITTA TUOLIA.

4.4 Säädetävät jalkatuet


Säädetävät jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa Raz-suihkutuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taistaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. Säädetäviä jalkatukia voidaan laajentaa pitempikäisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5 cm (2") pitemmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin Raz-suihkutuoleihin.

Asettaaksesi säädetävät jalkatuet:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

Säätääksesi säädetävien jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

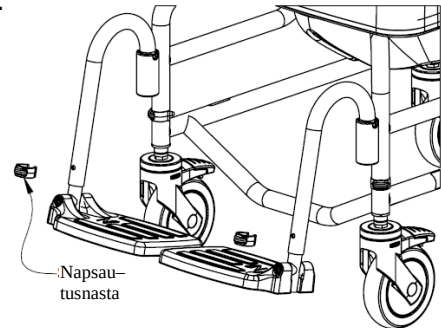


Kiertääksesi säädetäviä jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisään.

Poistaaksesi säädetävät jalkatuet nosta jalkatuet pois rungon vastaholkeista.


4.5 Pyörälukot – SP-malli

Raz-SP-suihkutuolin pyörälukot voidaan kytkeä työntämällä kahvoja eteenpäin. Tämä estää etupyöriä pyörimästä. **Parhaan vakauden saamiseksi on MOLEMMAT pyörälukot OLTAVA kytkettyinä.** Irrottaaksesi pyörälukot, vedä kahvoja taaksepäin.

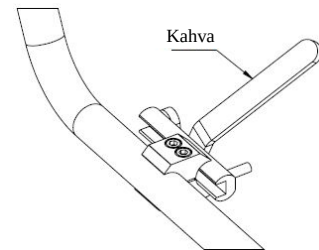

4.6 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin. **HUOM.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.**

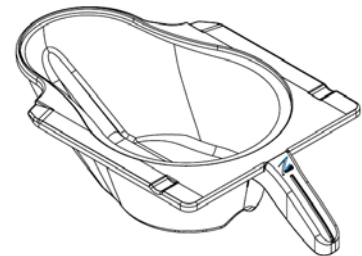

4.7 Pyörät

Jokainen Raz-suihkutuolin pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kiinnittääksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon vivun päätä, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon koholla olevaa päätä, kunnes se asettuu "pois"-asentoon.



5.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

5.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

5.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM.: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

5.1.2 Muotoiltu istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.
ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.
3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympäröykseen pääsee käsiksi paremmin.

5.2 Puhdistus tarvittaessa

5.2.1 Säädetty selkäpehmuste

1. Poista muovisalvat ja kolmilii'ut selkäpehmusteen hihnoista, kiinnittäen poiston aikana huomiota siihen, miten hihnat kulkevat kunkin osan läpi.
2. Poista selkäpehmuste selkänojan rungosta ja konepese se miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä, normaalilla tai hellävaraisella ohjelmalla. Asenna myös muut hihnojen tarvikkeet, kuten H-hihna sekä lantio- ja rintatukihihnat.
3. Asenna selkäpehmuste ja muut kohdistustarvikkeet tuoliin ja anna niiden kuivua.
ÄLÄ kuivaa selkäpehmustetta vaatteiden kuivauslaitteessa, tai se voi vaurioitua.
4. Kokoa kaikki muovisoljet ja kolmilii'ut hihnoin.
5. Sääda hihnat haluttuun kireyteen.

5.2.2 Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.
2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä.
ÄLÄ sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden säännöllistä tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toiminnassa havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko suihkutuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

5.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Desinfioiva pintapuhdistusaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.)
Keskitalon desinfiointiaine	SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla Raz-suihkutuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Raz-suihkutuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisia:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä Raz-suihkutuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä sisältää, rajoittumatta, muutokset valtuuttamattomia osia ja liitäntöjä käyttämällä, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoja pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan Raz-suihkutuoliin.

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAUSJAUHEITA TAI HANKAUSTYÖNYJÄ RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA RAZ-SUIHKUTUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINELAJÄÄMÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEISIIN JA RYHTYMÄTTÄ ASIANMUKAISIIN VAROTOIMENPITEISIIN IHMISTEN KEMIKAALEILLE ALTISTUMISEN SUHTEEN.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että Raz-suihkutuoli kootaan oikein, ja että kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATS LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN RAZ-SUIHKUTUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTA A TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEeseen JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTTÖÄ. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SUIHKUTUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN:

SÄHKÖPOSTILLA	info@razdesigninc.com
PUHELMELLA	+1 877 720 5678

rehaco.