


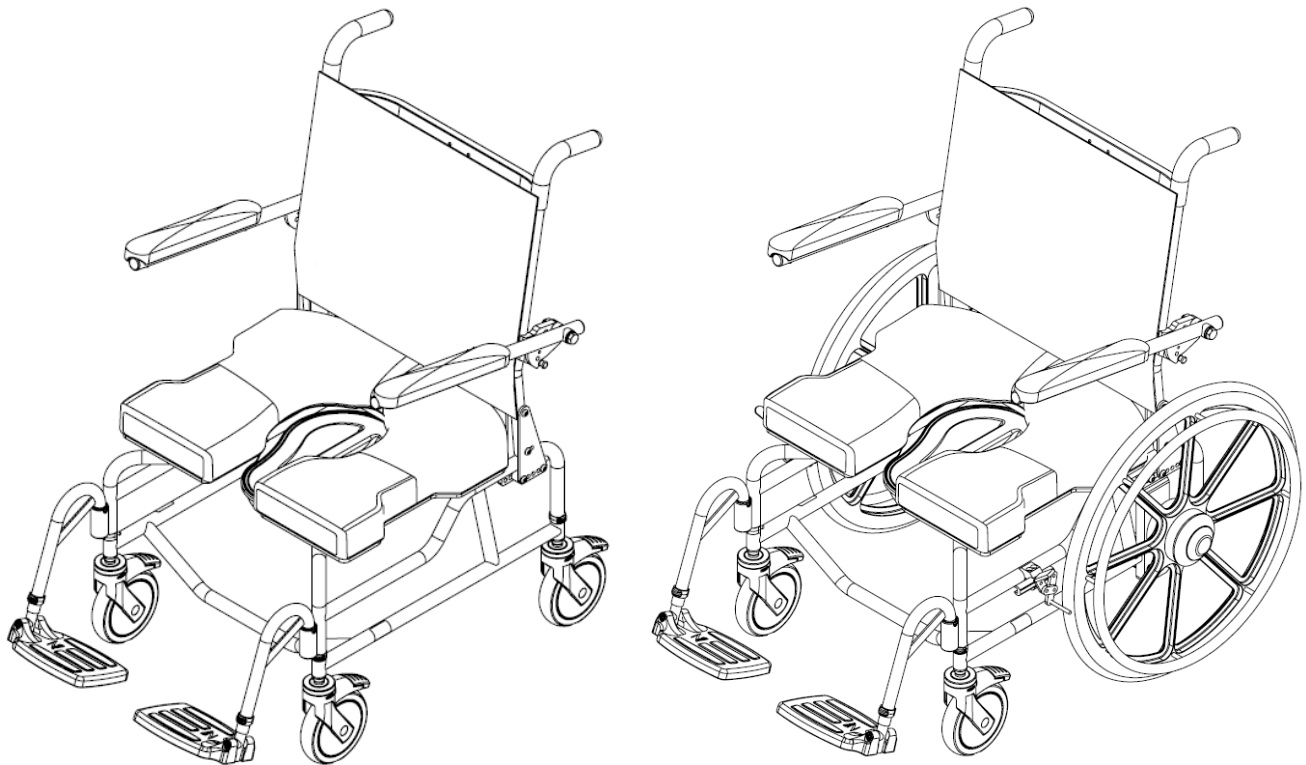

WC- ja suihkutuolit

Raz-AP600/SP600

Käyttäjän ja jälleenmyyjän opas



rehaco.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita!

On tärkeää, että Raz-suihkutuoli kootaan oikein ja kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Varmista, että käyttäjä(t), jälleenmyyjä(t) ja hoitaja(t) ovat lukeneet tämän ohjeen ja ymmärtäneet perusteellisesti Raz-suihkutuolin turvallisen käytön. Ajantasaiset käyttöohjeet ovat saatavana verkossa osoitteessa www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6, A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TUOLIN LUOKITUS SUURIMMAN KÄYTTÄJÄN PAINON MUKAAN

AP600 / SP600

272 kg (600 lbs)

TURVALLISUUSVAROITUKSIA HUOMIOITAVAKSI KÄYTTÖTARKOITUKSESSA

LAITE ON SOPIVA TYYPIN A SUUREN KÄYTTÖKUORMITUKSEEN (esim. LAITOKSIIN), EIKÄ SITÄ KOSKAAN SAA KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN, KUIN ALUN PERIN TARKOITETTUUN

Vakaus eteenpäin

Kaikkien mallien pyörät on varustettu kaksoislukoilla. Jalkavipu aktivoi sekä rullauslukon että kääntymislukon. **Parhaan vakauden saavuttamiseksi eteenpäin ja sivusuuntaan on tärkeää, että kaikki suihkutuilin pyörät ovat ulospäin ennen kuin lukot kiinnitetään.** Avaa valinnainen pyörien suunnan lukko, jos se kuuluu tuolin varusteisiin, ennen kuin kierrät takapyöriä sisään päin ja kytket pyörien kaksoislukot.



KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin istuessaan Raz-suihkutuolissa, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen eteenpäin.

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa ramppia alaspäin ilman hoitajaa, joka voi pidätellä tuolia laskeutumisen aikana.

PYÖRIEN LUKOT EIVÄT OLE JARRU! Älä koskaan käytä pyörien lukkoja suihkutuilin hidastamiseen, kun laskeudutaan kaltevia pintoja, koska tästä voi aiheutua tuolin kaatuminen liikkeen suuntaan.

Vakaus sivusuunnassa

KÄYTTÄJÄ EI SAA nojata eteenpäin Raz-suihkutuolin reunan yli, koska tämä voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.



KÄYTTÄJÄ EI SAA yrittää poimia esineitä lattialta nojaamalla ja kurottamalla – käytä tartuntapihtejä tai pyydä apua.

KÄYTTÄJÄ EI SAA sijoittaa Raz-suihkutuolia sivukallistukselle, koska se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen.

Vakaus taaksepäin

KÄYTTÄJÄ EI SAA ajaa SP600-mallin tuolilla ylös kaltevaa pintaa ilman, että lisävarusteena saatavat takaosan kaatumisenestolaitteet ovat paikoillaan. Lisävarusteena saatavat kaatumisenestolaitteet on tilattava Raz-SP600:n mukana ja asennettava oikein paikoilleen ennen epätasaisilla pinnoilla ajamista.

Kaatumisenestolaitteet – SP600-malli


Kaatumisenestolaitteet on saatavissa lisävarusteena Raz-SP600-suihkutuoleihin. Näitä suositellaan aina kun tuolia käytetään epätasaisilla pinnoilla, kuten rampeilla tai kaltevilla latioilla, kun tuolia käyttää alaraaja-amputoitu käyttäjä, kun takapyöriä on siirretty eteenpäin tehtaan asettamasta kohdasta, tai kaikissa tilanteissa, joissa taaksepäin vakaus vaarantuu.

Rampit ja muut kaltevat pinnat

Rampit ja muut pinnat, jotka eivät ole suoria (kuten kallistukset pyörätuolisuihkuissa) on hoitajan testattava sen varmistamiseksi, että ne eivät vaaranna tuolin vakautta. Tähän prosessiin on pyydyttävä pätevä terveydenhuollon ammattilaisen apua.

ÄLÄ vedä tai työnnä Raz-AP600:ta ylös tai alas kaltevaa pintaa tai ramppia, joka on jyrkempi kuin 1:12 suhde (5° kallistus).

ÄLÄ anna ketään käyttäjää liikuteltavan (vedettävän tai työnnettävän) Raz-AP600-suihkutuolissa muutoin kuin hoitajan toimesta.

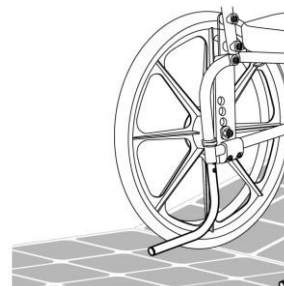

TÄRKEÄÄ!

RAZ-SP600:N VAKAUTEEN TAAKSEPÄIN VAIKUTTAVAT TAKAPYÖRIEN ASENNUSPAIKKA, KÄYTTÄJÄN FYYSISET JA KLIINISET OMINAISUUDET JA SELKÄNOJAN KULMA. KAAUTUMISENESTOLAITTEIDEN TARVE ON MÄÄRITETTÄVÄ RAZ-SP600-TUOLIA MÄÄRÄTTÄESSÄ, OTTAEN HUOMIOON KÄYTTÄJÄN FYYSISET KYVYT JA YMPÄRISTÖN. KAAUTUMISEN ESTOLAITTEET VOIDAAN TILATA JÄLKIASENNUKSENA MILLOIN TAHANSA, JOS HAVAITAAN NIIDEN OLEVAN TARPEELLISIA.

Upottaminen

Raz-suihkutuolia ei ole tarkoitettu käytettäväksi allastuolina. Älä upota suihkutuolia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen kokonaan tai osittain. Siitä voi aiheutua vaurioita suihkutuolin osille.

Siirtymiset

Vaarallisin vaihe minkä tahansa suihkutuolin käytössä on siirtyminen. Koska jokaisella tuolilla on erilaiset vakausominaisuudet, on tärkeää käydä läpi ja testata siirtymistekniikat huolellisesti, jotta varmistetaan menettelyn turvallisuus. Testisiirrot on suoritettava sellaisen hoitajan toimesta, joka voi estää tuolin kaatumisen tai liikkumisen siirtymisen aikana. Jos tunnet, että siirtymisiä ei voida toistuvasti tehdä turvallisesti, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, joka tuntee siirtymistekniikat ja vaihtoehdot. Henkilöiden, jotka eivät tunne turvallisia siirtymistaitoja, on haettava apua siirtymisien aikana, ja käytettävä mahdollisesti mekaanista nostolaitetta.



Siirtyminen Raz SP600 -suihkutuoliin

AINA lukitse kaikki neljä pyörää ulospäin (etupyörät eteenpäin/takapyörät taaksepäin) parhaan tuolin vakauden saavuttamiseksi.

Siirtyminen Raz SP600 -suihkutuoliin

AINA lukitse molemmat etupyörät ulompaan asentoon (eteenpäin osoittamaan) ja kytke kokonaan molemmat pyörälukot niin, että ne kytkeytyvät tiukasti etupyöriin.

Pyörien lukot on tarkoitettu estämään itsekääntyvien pyörien kiertyminen. Pyörien kaksoislukot on suunniteltu estämään pyörien pyöriminen ja pyörähaarukoiden kiertyminen. Kääntyvien pyörien ja pyörien lukot **EIVÄT ESTÄ eivätkä VOI ESTÄÄ** suihkutuolia liukumasta/siirtymästä, jos lattia on liukas. Lattian liukkautta voi aiheuttaa pöly, vesi, saippua tai mikä tahansa aine, joka estää etu- tai takapyöriä tarttumasta laitaan turvallisesti.

Siirtymistä ei saa koskaan yrittää, jos suihkutuoli on liukkaalla pinnalla. Suositellaan, että siirrot tehdään puhtailla, kuivilla ja luistamattomilla pinnoilla. Kovat lattiapinnat, kuten laatat, puu tai betoni eivät ehkä tarjoa riittävää pitoa estämään lukittujen etu- ja/tai takapyörien liukuminen. Kokonaan matolla peitetty pinta on ihanteellinen. Huomaa, että rätti- ja suihkumatot voivat liukua latioilla ja muodostaa näin vaarallisen pinnan.


ÄLÄ seiso millään osalla Raz-suihkutuolin runkoa.

ÄLÄ KOSKAAN käytä jalkalevyjä apuna siirtymisissä. Se voi aiheuttaa tuolin kaatumisen. Jalkatuet on käännettävä sivulle tai poistettava kokonaan siirtymisen aikana, jotta suihkutuoliin on esteetön pääsy.

Raz-suihkutuoli **Ei ole** tarkoitettu kuljetuslaitteeksi tai pitkäaikaiseksi istuinjärjestelmäksi.



**PYÖRÄT OSOITTAVAT
ULOSPÄIN**

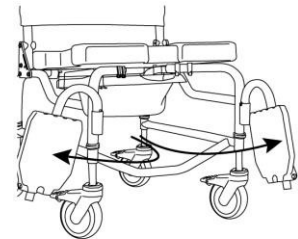

TÄRKEÄÄ!

KÄYTTÄJÄÄ EI SAA KOSKAAN JÄTTÄÄ RAZ-SUIHKUTUOLIIN ILMAN VALVONTAA.


TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ NOSTA RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIA JA SEN KÄYTTÄJÄÄ KÄSINOJISTA TAI JALKATUISTA!

TÄRKEÄÄ!

VARMISTA AINA, ETTÄ ISTUIN ON OIKEIN ASENNETTU JA KIINNITETTY. TAKAKOUKKUJEN ON OLTAVA TÄYSIN KYTKETTYJÄ JA ETUKANNATTIMIEN ON OLTAVA SALVATTUJA JA LUKITTUJA ISTUIMEN ETUTUTUKIPUTKIEN YMPÄRILLE.

VARMISTA, ETTÄ KUN TUOLI TOIMITETAAN ASIAKKAALLE, NIIN ISTUIMEN ASENNUSOHJEET LUOVUTETAAN ASIAKKAALLE JA/TAI HOITAJILLE.

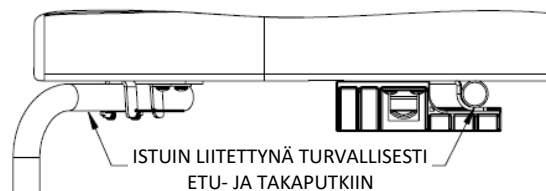


KÄYTTÄJÄN JA JÄLLEENMYYJÄN OHJE SISÄLLYSLUETTELO

1.0	YLEISIÄ TIETOJA	
1.1	Raz-AP600/SP600-suihkutuolien yleiskuvaus	7
1.2	Raz-AP600/SP600-suihkutuolien tekniset tiedot	7
2.0	VALMISTELU: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
2.1	Selkänojan asennus.....	8
2.2	Raz-istuimen asennus.....	8
2.3	Pyörien asennus	9
2.4	Pyörien asennus vakiomallisella akselitapilla – SP600-malli	9
2.5	Säädettävän jalkatuen asennus	10
2.6	Kiinnitysten asennus	10
3.0	SÄÄDÖT: TARKOITETTU VAIN JÄLLEENMYYJÄN KÄYTTÖÖN	
3.1	Selkänojan säätö.....	11
3.1.1	Selkänojan kulman säätö.....	11
3.1.2	Säädettävän selkäpehmusteen säätö	11
3.2	Muotoillun istuimen syvyyssäätö	11
3.3	Istuimen korkeuden säätö lattiasta	12
3.3.1	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – AP600-malli.....	12
3.3.2	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP600-mallin etupyörät	12
3.3.3	Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP600-mallin takapyörät	12
3.4	Takapyörien eteen/taakse-säätö – SP600-malli	13
3.5	Pyörien lukkojen säätö – SP600-malli	13
3.6	Säädettävän jalkatuen säätö	13
4.0	KÄYTTÖ JA TOIMINTA	
4.1	Säädettävä selkäpehmuste	14
4.2	Muotoiltu istuin	14
4.3	Pyörät	15
4.4	Säädettävät jalkatuet.....	16
4.5	Pyörien lukot – SP600-malli	16
4.6	Alusastia	16
5.0	PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO	
5.1	Puhdistus jokaisen käytön jälkeen.....	17
5.1.1	Alusastia.....	17
5.1.2	Muotoiltu istuin.....	17
5.2	Puhdistus tarvittaessa	17
5.2.1	Säädettävä selkäpehmuste	17
5.2.2	Runko, käsinojat, säädettävät jalkatuet ja muut osat	17
5.3	Suosittelut puhdistustuotteet	17
6.0	RAJOITETTU TAKUU	18
7.0	YHTEYSTIEDOT	19

1.0 YLEISIÄ TIETOJA

1.1 Raz-AP600/SP600-suihkutuolien yleiskuvaus

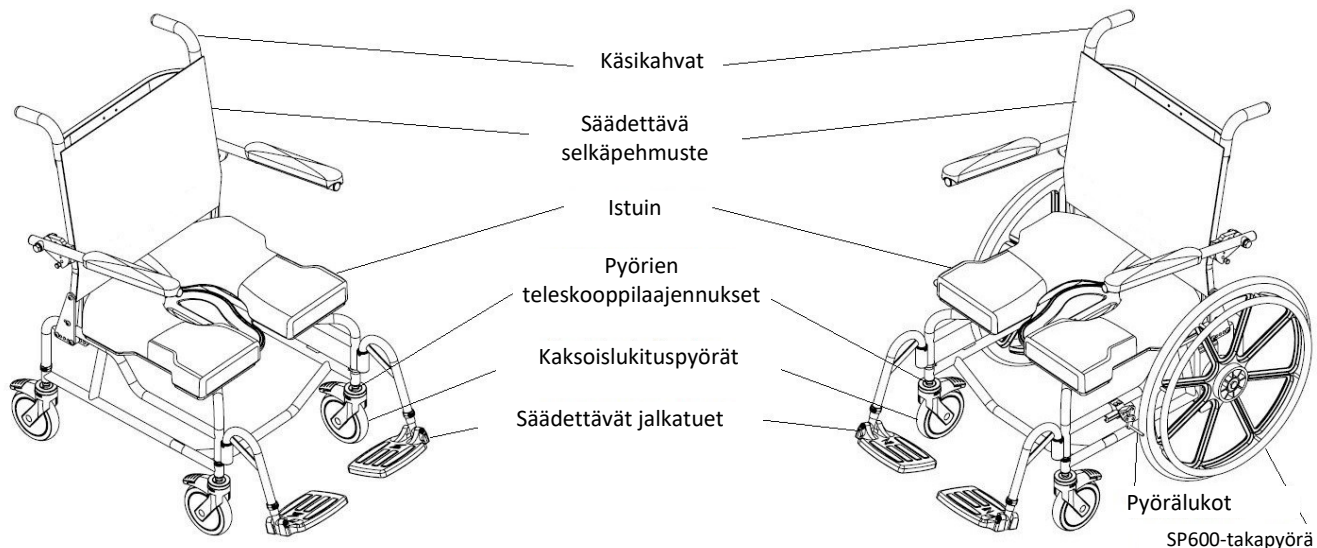

1.2 Raz-AP600/SP600-suihkutuolien tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT	Raz-AP600	Raz-SP600
PAINOKAPASITEETTI	275 kg (600 lbs)	275 kg (600 lbs)
RUNGON LEVEYS (istuin ja takarunko)	56cm (22")	56cm (22")
KOKONAISLEVEYS	67cm (26,5")	76cm (30")
KOKONAISPITUUS (sis. jalkatuet)	91cm (36")	101,5cm (40")
ISTUIMEN LEVEYS (alusastia-istuin)	58cm (23")	58cm (23")
ISTUIMEN SYVYYS (takatolpan edestä istuimen etureunaan)	46cm (18")	46cm (18")
VAPAA KORKEUS		
5" pyörät alusastiakannattimilla:	36-46cm (14,25"-18,25")	39 cm, 41 cm (15,25", 16,25")
5" pyörät ilman alusastiakannattimia:	38-49cm (15"-19")	40,5cm, 43cm (16", 17")
6" pyörät alusastiakannattimilla:	39-49cm (15,25"-19,25")	41 cm, 44 cm 51,5 cm (16,25", 17,25", 20,25")
6" pyörät ilman alusastiakannattimia:	41-51cm (16"-20")	43 cm, 46 cm , 53 cm (17", 18", 21")
KÄSINOJAN KORKEUS ISTUIMEN YLÄPUOLELLA	24cm (9,5")	24cm (9,5")
KORKEUS LATTIASTA ISTUIMELLE	48-58 cm 1" lisäyksin (19"-23")	5" pyörät: 51cm, 53cm (20", 21") 6" pyörät: 51 cm, 53 cm, 61 cm (20", 21", 24")
TUOTTEEN PAINO (sis. jalkatuet)		
5" Pyörillä:	25 kg (54,5 lbs)	30,9 kg (68 lbs)
6" Pyörillä:	26,7 kg (58,5 lbs)	31,3kg (69 lbs)
KEHYKSEN JA RUNKO-OSIEN MATERIAALI	Ruostumaton teräs (elinikäinen takuu ruostumista vastaan)	
PIENIN KÄÄNTÖYMPYRÄ	105 cm (41,5")	163 cm (64 cm)

2.1 Selkänojan asennus


Tarvittavat työkalut: 6 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

1. Poista suihkutuoli kuljetuspakkauksesta.
2. Nosta selkänoja pystysuoraan asentoon.
3. Aseta nuppipääruuvi läpi yhdestä niistä kolmesta reiästä, jotka ovat selkänojan ulommassa levyssä.


HUOM.: Valitse takimmainen reikä 95° kulmalle, tai etummainen reikä 100° selkänojakulmalle.

VIHJE: Phillips-ruuvitaltta voidaan asettaa yhden levyn ja rungon läpi selkänojan kiinnittämiseksi tilapäisesti pystysuoraan asentoon.

4. Kiinnitä ruuvin toinen pää nailonlukkomutterilla.
5. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella, kunnes ruuvien pää ulottuu 1–2 kierrettä nailonlukkomutterin ohi.
6. Toista vaiheet 3–5 toiselle kehysputkelle.

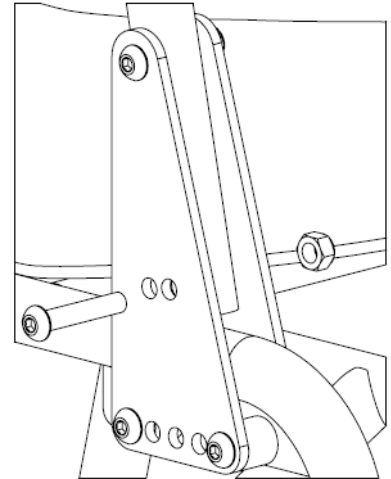


TAKASELKÄNOJAN RAKENNE YLHÄÄLTÄ NÄHTYNÄ

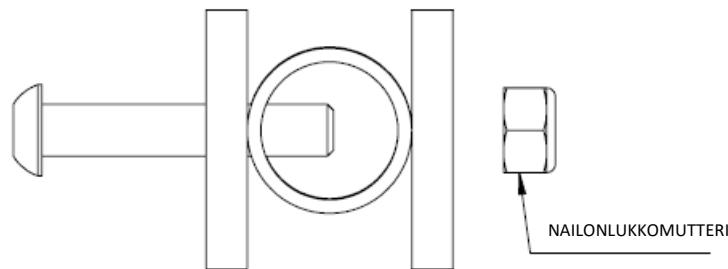

2.2 Raz-istuimen asennus

1. Varmista, että etupuolen jousikannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista niitä salvan avaamiseksi.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen kiinnikkeen, purista klipsiä ja sulje kiinnitin etutukiputkien ympärille.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

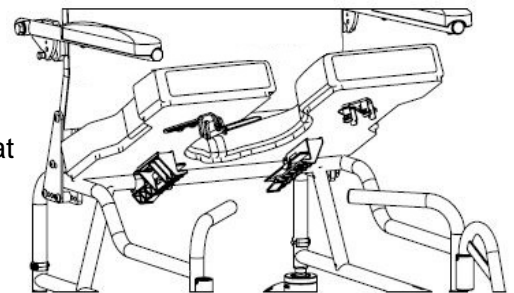


2.3 Pyörien asennus

1. Poista pyörät tarvikelatista.
2. Aseta pyörien laajennusputki alarungon vastaputkeen haluttuun asentoon.
3. Kohdista reikä runkoon ja pyörien laajennusputkeen. Voi olla tarpeen kiertää pyörien laajennusputkea, jotta reiät osuvat kohdakkain.

VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät ensin.

4. Aseta napsautusnasta runkoputken ja pyörien laajennusputken läpi. Varmista, että nastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti runkoputkien ulkopuolelle.
5. Toista vaiheet 2–4 kaikille rakenteen pyörille.

HUOM.: Jos AP600-tuolin mukana tilattiin pyörien suunnan lukitus, yhdessä neljästä pyörästä on lukko asennettuna pyörän varteen. Pyörät, joissa on suunnan lukitus, on asennettava eteenpäin suunnattuina johonkin takapyörien kohdista.

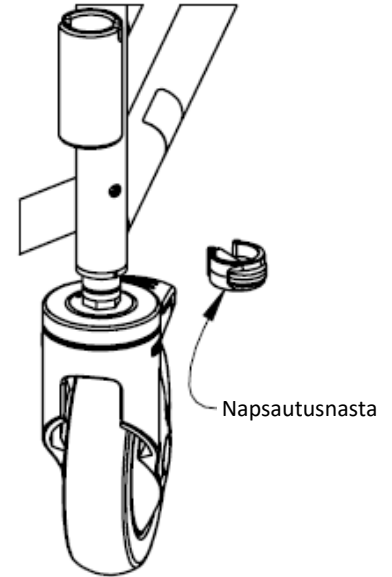

TÄRKEÄÄ!

TELESKOOPPISET PYÖRIEN LAAJENNUSPUTKET MAHDOLLISTAVAT 10 CM (4") KORKEUSSÄÄTÖALUEEN. MUTTA MITÄ KORKEAMMAKSI TUOLI SÄÄDETÄÄN, SITÄ AREMPI SE ON KAATUMISELLE. PYÖRIÄ EI KOSKAAN SAA SÄÄTÄÄ ERI KORKEUDELLE. EPÄTASAINEN TUOLI ON ERITTÄIN VAARALLINEN KAIKILLE KÄYTTÄJILLE.


PYÖRÄT ON AINA ASENNETTAVA MAHDOLLISIMMAN MATALAAN ASENTOON, JOKA TÄYTTÄÄ KÄYTTÄJÄN TARPEET. KAIKKI TÄMÄN YLÄPUOLISET ASENNOT AIHEUTTAVAT MASSAKESKIPISTEEN SIIRTYMISEN, JOSTA VOI SEURATA LOUKKAANTUMINEN TAI TUOTEVAHINKOJA. SUOSITELLAAN, ETTÄ PÄTEVÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAINEN AUTTAA JA A TARKISTAA TUOLIN TASAPAINON, JOS KORKEUSSÄÄTÖÄ MUUTETAAN.

2.4 Pyörien asennus vakiomallisella akselitapilla – SP600-malli

Tarvittavat työkalut: 15/16" kiintoavain, 15/16" hylsyavain

1. Poista molemmat pyörät pakkausmateriaalista.
2. Poista akselitapit ja nailonlukkometterit pakkausmateriaalista.
3. Poista pyörän keskiö kiertämällä sitä vastapäivään.
4. Aseta akselitappi pyörän navan läpi, akselitapin välikkeeseen ja siitä akselin vastakappaleeseen.
5. Kierrä nailonlukkometteri akselitappiin, ja kiristä sitä, kunnes pyörärakenne on tiukasti kiinni. *Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.*
6. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
7. Toista vaiheet 3–6 toiselle pyörälle.

HUOM.: Pyörä on asennettava reikiin, jotka vastaavat haluttua istuimen ja pyörän korkeutta niin, että tuolin runko on suorassa.

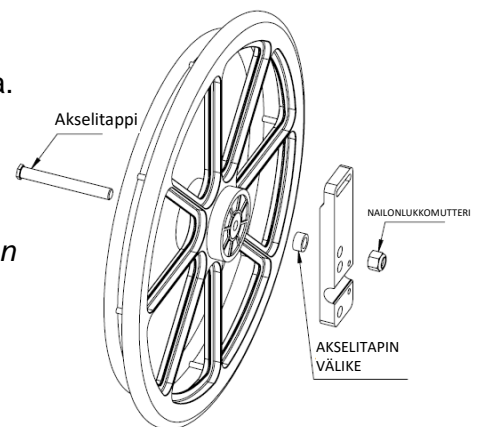


Tehdasasetus - Pyörien laajennusasetus SP600-mallille

24" Takapyörä

Toiseksi alin reikä pyörien laajennusputkessa


2.5 Säädetävän jalkatuen asennus

1. Poista pakatut jalkatuet pakkauksen sisällä olevasta varustelaatikosta.
2. Aseta jalkatuen ripustusputket vastakappaleisiin, jotka on hitsattu tuolin rungon etuosaan. *Jos tukiputket on suunnattu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.*

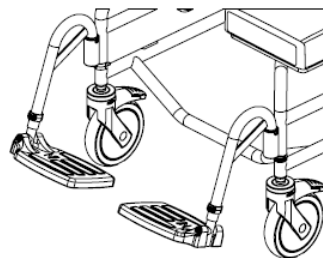

2.6 Kiinnitysten asennus

Kaikki kiinnitykset on asennettava tiukasti. Lukkomutterit, jotka poistetaan jostain syystä, saattaa olla tarpeen vaihtaa uudelleen käytön sijaan. Tarkista nailonlukkommutterien toiminta, kun kiinnität ruuvia takaisin paikoilleen. Kiristettäessä on oltava havaittavissa huomattava vastus. Jos sitä ei ole, vaihda nailonlukkommutteri uuteen. Suositellaan tarkistamaan kaikkien kiinnitysten tiukkuus vuosittain.

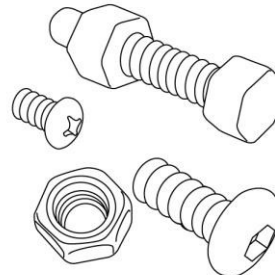

TÄRKEÄÄ!


SÄÄTÖJÄ EI SAA KOSKAAN TEHDÄ, KUN KÄYTTÄJÄ ISTUU TUOLISSA

3.1 Selkänojan säätö

3.1.1 Selkänojan kulman säätö


Tarvittavat työkalut: 6 mm kuusioavain, 13 mm kiintoavain

1. Löysää ja poista lukkomutterit molempien selkänojan pystyrunkoputkien sisältä.
2. Poista ruuvit pystysuorista selkänojan rungon putkista.
3. Kierrä selkänoja toiseen selkänojan asennuslevyn kahdesta asennosta.
4. Selkänojan ollessa paikoillaan aseta ruuvit takaisin valittujen selkänojan asennuslevyn reikien läpi.
5. Kiinnitä ruuvit lukkomuttereilla.
6. Kiristä rakenne kuusioavaimella ja kiintoavaimella.

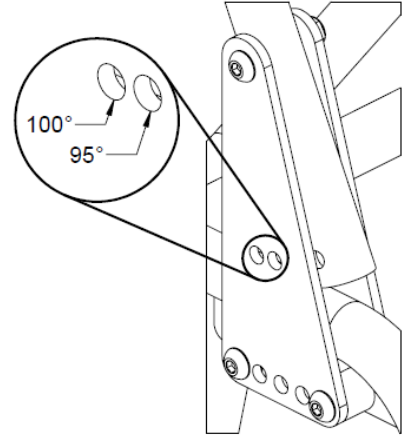

3.1.2 Säädettävän selkäpehmusteen säätö

Selkätuen verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

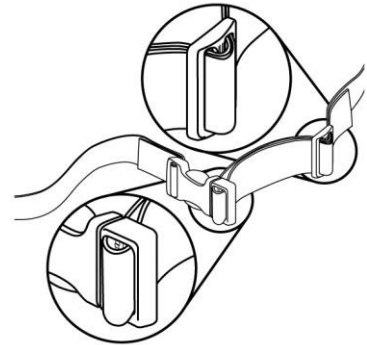


3.2 Muotoillun istuimen säätö

Istuimessa on noin 5 cm (2") etu/takasuuntainen säätövara.

Tarvittava työkalu: #2 Phillips-ruuvitaltta

1. Vapauta istuin avaamalla istuimen etuosan kannattimet.
2. Poista istuin nostamalla etureunaa ylös ja liu'uttamalla istuinta eteenpäin ja pois päin tuolista.
3. Löysää (*älä irrota*) kahdeksan ruuvia, jotka liittävät istuimen etu- ja takakannattimet istuimen alapuoleen.
4. Palauta istuin tuolin rungolle, asettaen istuimen etupuolen kannattimet etuosan tukiputkiin.
5. Liu'uta/kääntelee istuin haluttuun asentoon.
6. Kiristä ruuveja juuri riittävästi pitämään kannattimet paikoillaan, varmistaen, että istuin on asennettu runkoon suoraan.
7. Kun istuin on tuolissa, liu'uta takakannattimia taakse kunnes ne osuvat tiukasti takaristiputkiin, ja kiristä ruuvit pitämään kannattimet paikoillaan.
8. Poista istuin (*vaiheet 1 ja 2*) ja kiristä kaikki kahdeksan ruuvia.
9. Kiinnitä istuin tuolin runkoon seuraamalla kohdassa 2.2 annettuja asennusohjeita.

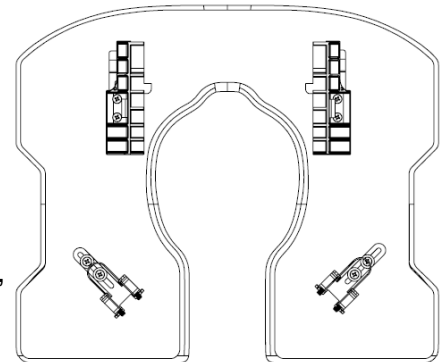

3.3 Istuimen korkeuden säätö lattiasta

3.3.1 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – AP600-malli

AP600-mallissa on neljä pyörien teleskoopilaajennusta, jotka mahdollistavat 10 cm (4") korkeussäädön.

1. Poista pyörän jatketta paikallaan pitävä napsautusnasta tuolin rungosta.
2. Liu'uta pyörärakenne haluttuun kohtaan.
3. Kohdista pyörän jatkoputken reiät rungon reikiin, ja asenna napsautusnastat.
VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät.
4. Varmista, että nastat menevät kokonaan runkoputken läpi, ja että vihreät muoviklipsit napsahtavat tiukasti runkoputkien ympärille.
5. Toista vaiheet 1–4 kaikille muille rakenteen pyörille.

TÄRKEÄÄ!

KAIKKI PYÖRIEN VARRET ON SÄÄDETTÄVÄ SAMALLE KORKEUDELLE. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA MUUTTAMALLA PYÖRIEN ASENTOA. EPÄTASAISET PYÖRIEN ASENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN.

3.3.2 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP600-mallin etupyörät

SP600-mallissa on kaksi etupyörien jatketta, jotka mahdollistavat 7,5 cm (4") korkeussäätöalueen, kun niitä käytetään 24" takapyörien ja 6" kääntyvien pyörien kanssa.

1. Poista pyörän jatketta paikallaan pitävä napsautusnasta tuolin rungosta.
2. Liu'uta pyörärakenne haluttuun kohtaan.
3. Kohdista pyörän jatkoputken reiät rungon reikiin, ja asenna napsautusnastat.
VIHJE: Tämä on helpompaa, jos lukitset pyörät.
4. Varmista, että nastat menevät kokonaan runkoputken läpi, ja että vihreät muoviklipsit napsahtavat tiukasti runkoputkien ympärille.
5. Toista tämä toiselle pyörälle.

3.3.3 Istuimen korkeuden säätö lattiasta – SP600-mallin takapyörät


Tarvittavat työkalut: 15/16" hylsyavain, 15/16" kiintoavain

VIHJE: Katso kohdan 2.4 kuvaa.

1. Poista pyörän musta keskiö ensimmäisestä pyörästä kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Poista akselitappi, akselitapin välike ja pyörärakenne akselilevystä.
3. Aseta akselitappi pyörärakenteen ja akselin välilevyn läpi ja sitten haluttuun reikään.

HUOM.: Katso oikealla olevasta kuvasta mahdolliset istuimen etäisyydet lattiasta.

4. Kiristä nailonlukkumutteria, kunnes pyörärakenne on tiukasti kiinni. Älä ylikiristä, koska pyörän on pyörittävä vapaasti.
5. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
6. Säädä pyörien lukot.
7. Toista vaiheet 1–6 toiselle pyörälle. Vedä molempia pyöriä varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti paikoillaan.

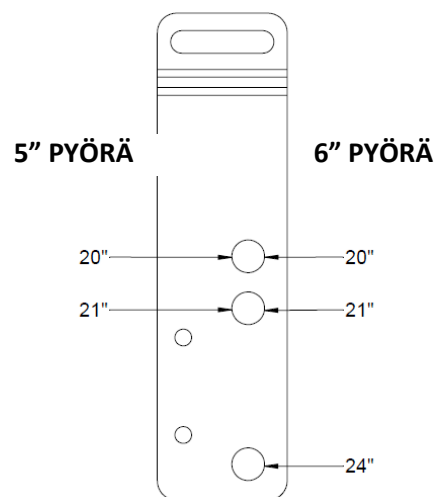


3.4 Takapyörien eteen/taakse-säätö – SP600-malli

Tarvittavat työkalut: 1/4" kuusioavain, 1/2" kiintoavaimet, 3/4" hylsyavain, 3/4" kiintoavain

1. Löysää pyörien lukkoja.
2. Poista yhden pyörän keskiö kiertämällä sitä vastapäivään. Löysää ja poista akselitappi ja lukkomutteri, ja ota pyörärakenne pois.

VIHJE: Tuolin kääntäminen toiselle sivulle helpottaa tätä toimenpidettä.

3. Pyörän ollessa irrotettuna löysää (älä irrota) alempi takapuolen nuppipääruuvi selkänöjan asennuslevystä.
4. Löysää (älä irrota) alemman akselilevyn kiinnitysruuveja.
5. Säädä akselilevy huomioiden sen tarkan aseman asettamisen peilikuvaksi toisen pyörän akselilevyyn.
6. Kiristä kiinnitysruuvit akselilevyn alaosasta ja nuppipääruuvi selkänöjan asennuslevystä.
7. Aseta takaisin pyörä, akselitappi ja lukkomutteri.
8. Kiristä akselitappia ja lukkomutteria, kunnes ne ovat tiukalla.
9. Aseta napa takaisin kiertämällä sitä myötäpäivään.
10. Toista vaiheet 1–9 toiselle pyörälle. Noudata erityistä tarkkuutta kohdistaksesi pyörät oikein.
11. Säädä pyörän lukot uudelleen.

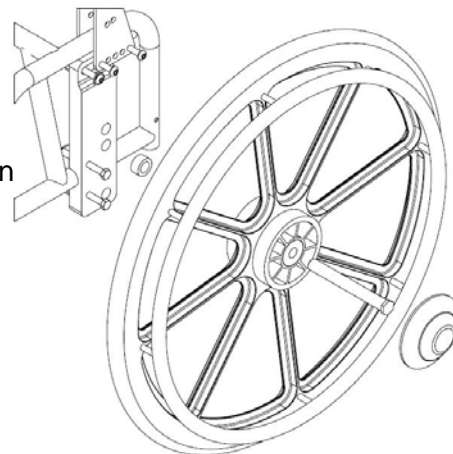

TÄRKEÄÄ!


ISTUIMEN KORKEUDEN KASVATTAMINEN, TAKAPYÖRIEN SIIRTÄMINEN ETEENPÄIN JA SELKÄNOJAN KULMAN SUURENTAMINEN HEIKENTÄVÄT HUOMATTAVASTI VAKAUSTA TAAKSEPÄIN. ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VAKAUSTARKISTUS SUORITETAAN, KUN JOKIN NÄISTÄ SÄÄDÖISTÄ ON TEHTY. VAKAUSTARKISTUKSET ON TEHTÄVÄ HOITAJA TUOLIN TAKANA JA KAATUMISEN ESTOLAITTEET OIKEIN ASENNETTUINA JA SÄÄDETTYINÄ.

3.5 Pyörien lukkojen säätö – SP600-malli

Tarvittava työkalu: 5 mm kuusioavain


1. Löysää (älä irrota) yhden pyörälukon kiinnitysruuveja.
2. Siirrä pyörän lukkoa rungon suuntaisesti, jotta se kiinnittyy pyörään ja pysäyttää kaiken pyörän liikkeen.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle pyörän lukolle.

Huom: Oikein säädetty pyörälukko estää pyörää kiertymästä olematta käyttäjälle liian vaikea kytkeä.

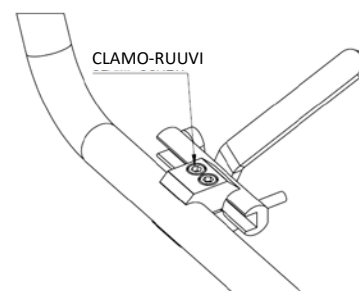

3.6 Säädettävän jalkatuen säätö

1. Poista muovinen napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Säädä jalkalevyn laajennusputki pystysuoraan sopivaan korkeuteen jalkatuen ripustusputken sisällä.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja jatkoputken läpi. Varmista, että napsautusnastat ovat kokonaan putken läpi, ja että vihreä muovikliipsi napsahtaa tiukasti ripustusputkien ulkopuolelle.
4. Toista vaiheet 1–3 toiselle jalkalevyille.

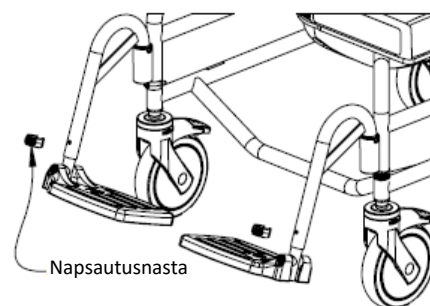


4.0 KÄYTTÖ JA TOIMINTA

4.1 Säädetty selkäpehmuste

Moniasentoisessa selkänojassa on säädettävä selkäpehmuste, joka tukee vartaloa parhaassa asennossa ja mukavimmalla mahdollisella tavalla. Pehmuste on irrotettava konepesua varten.


Asentaaksesi säädettävän selkäpehmusteen:

1. Aseta kangas selkätuen tankojen etupuolta vasten varmistaen, että kun se kiedotaan ympäri, hihnojen kiinnikkeet osoittavat kankaasta pois päin ja silmukat osoittavat alaspäin.
2. Ensimmäinen (1) ja toinen (2) hihna ovat ristitangon yläpuolella.
3. Kolmas (3), neljäs (4) ja viides (5) hihna on sijoitettu ristitangon ja käsinojien kiinnityslevyjen väliin.
4. Kuudes (6) hihna on käsinojien kiinnityslevyjen alapuolella.
5. Säädä kaikki hihnat käyttäjän tarpeen mukaisesti.

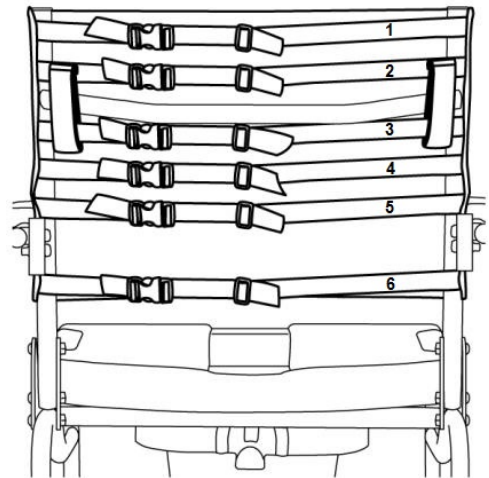


Selän verhoilun säätämiseksi jokaista hihnaa voidaan kiristää tai löysätä soljista, mikä mahdollistaa monet eri asennot. Esimerkiksi alhaalta lukien toinen ja kolmas hihna voidaan kiristää, jotta syntyy parempi tuki lantion alueelle.

Säädettävän selkäpehmusteen irrottamiseksi avaa hihnojen soljet.

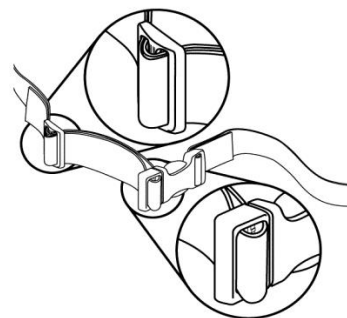


4.2 Muotoiltu istuin

Vakiomallinen, muotoiltu Raz-AP600/SP600-suihkutuolin istuin on suunniteltu auttamaan lantion pysymistä tasapainossa ja se on muotoiltu vähentämään painetta. Muotoillut istuimet on valmistettu pehmeästä, kiinteäpintaisesta vaahdosta, ja niitä on saatavana vakiomallisena 58 cm (23") leveänä, 46 cm (18") syvänä istuimena. Paineen vähennyksen päivityksenä on myös saatavana Visco-Foam-rajapintaistumia. Visco-Foam-istuimia on saatavana viitenä mallina: edestä yhtenäinen, edestä avoin, takaa avoin, vasemmalta avoin ja oikealta avoin. Kaikissa istuimissa on erityinen Ischial Pelvic Alignment System (IPAS), joka mahdollistaa 5 cm (2") etu- ja takasäädön, lukkiutuu paikoilleen siirtoja varten, ja joka on helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisävälkappaleita on saatavana istuimen etu- ja takakulmalle. Kaikki Raz-tuolit sopivat useimpien vakiomallisten WC-istumien päälle, kun alusastia ei ole paikoillaan.

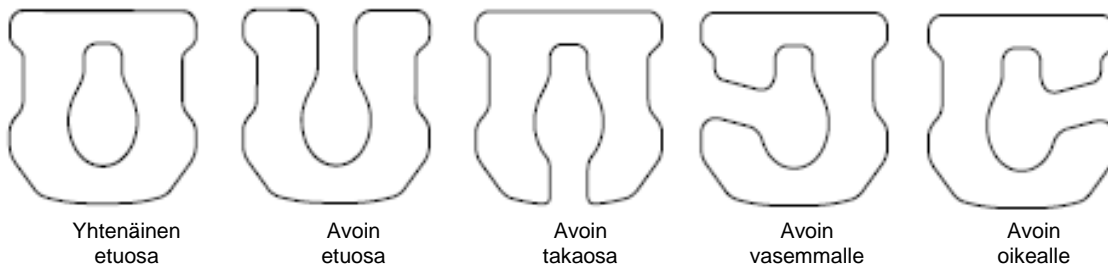

Asentaaksesi Raz-istuimen:

1. Varmista, että etupuolen jousikannattimet ovat auki-asennossa. Avataksesi etukannattimet, purista niitä salvan avaamiseksi.
2. Liu'uta istuimen takaosa yli takaosan ristiputkien samalla kun istuimen etuosa lasketaan kehykselle. Tarkista varmistaaksesi, että istuimen takaosan kannattimet tarttuvat ristiputkien alapuolelle.
3. Jatka istuimen etuosan laskua, kunnes istuimen etukannattimet asettuvat istuimen etupuolen tukiputkiin.
4. Varmista istuimen kiinnitys sulkemalla istuimen etukannattimet. Sulkeaksesi istuimen kiinnikkeen, purista klipsiä ja sulje kiinnitin etutukiputkien ympärille.
5. Tee vaiheet 1–4 käänteisessä järjestyksessä irrottaaksesi istuimen rungosta.

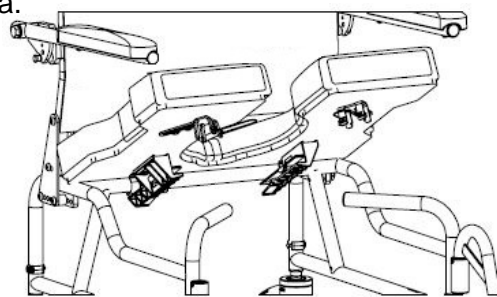

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA ISTUIMEN KORKEUTTA ILMAN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN APUA. KORKEAMMAT ISTUIMEN AENNOT HEIKENTÄVÄT TUOLIN VAKAUTTA, JA VOIVAT JOHTAA KAATUMISEEN JA LOUKKAANTUMISEEN.

4.3 Pyörät

Jokainen Raz-suihkutuolin pyörä on varustettu kaksoislukitusominaisuudella, joka samanaikaisesti estää pyörää kääntymästä ja pyörimästä. Kiinnittääksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon vivun päätä, kunnes se asettuu "päällä"-asentoon. Avataksesi kaksoislukon, paina jalalla kaksoislukon koholla olevaa päätä, kunnes se asettuu "pois"-asentoon.



TÄRKEÄÄ!

RUNGON JA ISTUIMEN SÄÄDÖN SAA TEHDÄ VAIN RAZ-JÄLLEENMYYJÄN VALTUUTETTU ASENTAJA. ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ MUUTTA RUNGON KULMAA KÄÄNTÄMÄLLÄ PYÖRIEN ASENTOA. RUNGON ON AINA OLTAVA SUORASSA. VIRHEELLINEN PYÖRIEN ASEMA VOI HEIKENTÄÄ TUOLIN VAKAUTTA JA AIHEUTTAA KAATUMISEN. TÄMÄ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA KÄYTTÄJÄLLE JATAI VAURIOITTA TUOLIA.

4.4 Säädettävät jalkatuet


Säädettävät jalkatuet ovat vakiovaruste kaikissa Raz-suihkutuoleissa. Kuljetusta varten jalkatuet voidaan taittaa ylös, kiertää sivulle tai poistaa kokonaan. Säädettäviä jalkatukia voidaan laajentaa pitempijalkaisille käyttäjille lisävarusteena saatavilla jalkatuen laajennusputkilla, 5 cm (2") pitimmillä putkilla, joita voidaan tilata kaikkiin Raz-suihkutuoleihin.

Asettaaksesi säädettävät jalkatuet:

1. Aseta jalkatukien ripustusputket jalkatukien vastakappaleisiin.
2. Jos ripustusputket on kohdistettu eteenpäin, putkien tapit osuvat vastakappaleiden uriin ja lukittuvat paikoilleen.

Säätääksesi säädettävien jalkatukien pituutta:

1. Poista napsautusnasta yhdestä jalkatuen ripustusputkesta.
2. Sijoita jalkalevy uudelleen käyttäjälle sopivaan pituuteen.
3. Aseta napsautusnasta jalkatuen ripustusputken ja sisäputken läpi.

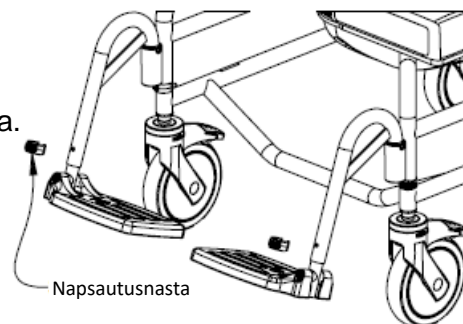


Kiertääksesi säädettäviä jalkatukia:

1. Nosta jalkatukien ripustusputkia irrottaaksesi tapit.
2. Kierrä jalkatukia ulospäin tai sisäänpäin.

Poistaaksesi säädettävät jalkatuet nosta jalkatuet pois rungon vastaholkeista.


4.5 Pyörien lukot – SP600-malli

Raz-SP600-suihkutuolin pyörälukot voidaan kytkeä työntämällä kahvoja eteenpäin. Tämä estää etupyöriä pyörimästä. *Parhaan vakauden saamiseksi on **MOLEMMAT** pyörälukot **OLTAVA** kytkettyinä.* Irrottaaksesi pyörälukot, vedä kahvoja taaksepäin.

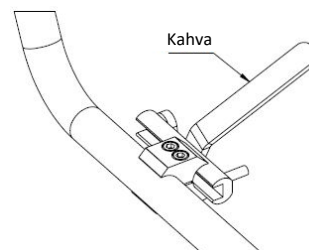

4.6 Alusastia

Raz-alusastia on suunniteltu taaksepäin roiskeita vähentävään, pitkänomaiseen muotoon, joka sopii suoraan istuimen alle. Astian keskellä on uniikki, loiskumista vähentävä harjanne. Kiiltävä pinta helpottaa puhdistusta ja huuhtelua, ja kaatonokka ja kahva helpottavat tyhjennystä. Alusastia poistetaan liu'uttamalla sitä taaksepäin. *HUOM.: Asettaessasi astiaa takaisin varmista, että astia ohjautuu vihreisiin muovikiinnikkeisiin, ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se osuu pysäyttimiin.*

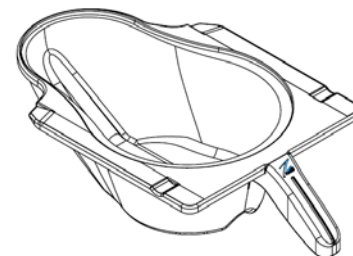

TÄRKEÄÄ!

VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA ON OTETTAVA YHTEYTTÄ VALTUUTETTUUN RAZ-JÄLLEENMYYJÄÄN KAIKKIEN KIINNITYSTEN, PYÖRIEN JA PYÖRÄLUKKOJEN, LAITTEISTON JA KAIKKIEN MUIDEN LIIKKUVIEN OSIEN TARKASTAMISTA VARTEN.

5.0 PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

5.1 Puhdistus jokaisen käytön jälkeen

5.1.1 Alusastia

1. Poista alusastia ja tyhjennä sen sisältö.
2. Pese astia monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusnesteellä. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa.
3. Huuhtelee hyvin ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

HUOM.: Kuuma saippuavesi ja sen jälkeen desinfiointiainesuihke voivat korvata monikäyttöisen desinfiointiaine-puhdistusliuoksen.

5.1.2 Muotoiltu istuin

1. Suihkuta monikäyttöisellä desinfiointiaineella ja hankaa pehmeällä harjalla tarpeen mukaan.
2. Huuhtelee vesisuihkulla ennen varastointia tai uudelleenkäyttöä.

ÄLÄ UPOTA istuinta veteen tai puhdistusnesteeseen.

3. Perusteellisempaa puhdistusta varten poista istuin suihkutuolista, jotta sen alapuoleen ja istuimen aukon ympärökseen pääsee käsiksi paremmin.

5.2 Puhdistus tarvittaessa

5.2.1 Säädetty selkäpehmuste

1. Poista muovisalvat ja kolmilii'ut selkäpehmusteen hihnoista, kiinnittäen poiston aikana huomiota siihen, miten hihnat kulkevat kunkin osan läpi.
 2. Poista selkäpehmuste selkänojan rungosta ja konepese se miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä, normaalilla tai hellävaraisella ohjelmalla. Asenna myös muut hihnojen tarvikkeet, kuten H-hihna sekä lantio- ja rintatukihihnat.
 3. Asenna selkäpehmuste ja muut kohdistustarvikkeet tuoliin ja anna niiden kuivua.
- ÄLÄ** kuivaa selkäpehmustetta vaatteiden kuivauslaitteessa, tai se voi vaurioitua.
4. Kokoa kaikki muovisoljet ja kolmilii'ut hihnoihin.
 5. Säädä hihnat haluttuun kireyteen.

5.2.2 Runko, käsinojat, säädettyt jalkatuet ja muut osat

1. Suihkuta runko monikäyttöisellä, desinfioivalla puhdistusaineella, hankaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee vedellä.
2. Tarvittaessa suihkuta runko ja osat laimennetulla (10 osaa vettä 1 osaan liuosta) kalkin/kattilakiven poistoaineella (kuten CLR), harjaa pehmeällä harjalla, ja huuhtelee perusteellisesti vedellä. **ÄLÄ** sekoita kalkin/kattilakiven poistoliuosta mihinkään muuhun nesteeseen, tai voi muodostua myrkyllisiä höyryjä.

Käyttäjälle suositellaan yhteydenottoa valtuutettuun Raz-jälleenmyyjään kaikkien kiinnitysten ja alirakenteiden säännöllistä tarkastamista varten, tai jos suihkutuolin toiminnassa havaitaan mahdollisia ongelmia.

Suihkutuoli ja sen osat on useita kertoja vuodessa pyyhittävä laimennetulla kalkin/kattilakiven poistoliuoksella, jotta vähennetään kuumavesihuuhtelun aiheuttamia kerrostumia.

Homeen muodostumisen riskin vähentämiseksi koko suihkutuoli on pyyhittävä kuivalla, pehmeällä liinalla viimeisen huuhtelun jälkeen ja ennen varastointia tai käyttöä.

5.3 Suositellut puhdistustuotteet

Tehtävä	Suosittelut tuotteet
Yleispuhdistus	Antibakteerinen puhdistusaine
Desinfioiva pintapuhdistusaine	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.)
Keskitason desinfiointiaine	SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Kalkki- ja kattilakivisuojaus	CLR

6.0 RAJOITETTU TAKUU

Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle Raz-suihkutuolin ostajalle/käyttäjälle, joka on ostanut sen valtuutetulta Raz-jälleenmyyjältä.

Tämä takuu antaa sinulle tiettyjä, lainmukaisia oikeuksia, mutta alueestasi ja maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita lainmukaisia oikeuksia.

Tätä takuuta laajennetaan noudattamaan valtion/alueen lakeja ja vaatimuksia.

Liittyen vain alkuperäiseen ostajaan/käyttäjään, Raz Design takaa kahden (2) vuoden ajan valmistuspäivästä lukien tuotteen jalustan ja selkärungon osien olevan vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä. Kaikilla muilla Raz-suihkutuolin osilla on yhden (1) vuoden takuu huomioiden normaalin kulumisen poissulkemisen. Jos tämän takuuajan kuluessa minkään näistä tuotteista havaitaan olevan viallinen, osa korjataan tai vaihdetaan Raz Designin harkinnan mukaisesti. Tämä takuu ei kata mitään työ- tai toimituskustannuksia, jotka liittyvät osien vaihtoon, asennukseen tai korjaukseen missään sellaisessa tuotteessa.

Takuuhuoltoa varten ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit Raz-suihkutuolisi. Jos et saa tyydyttävää takuupalvelua, ota yhteyttä suoraan Raz Designiin käyttäen tämän ohjeen joko alussa tai lopussa annettuja yhteystietoja. Anna yhteydenotossasi jälleenmyyjäsi nimi ja osoite, tuotteen tyyppi, ostopäivä, tuolin sarjanumero (harmaassa merkinnässä tuolin rungossa) sekä kuvaus tuoteongelman luonteesta. Älä palauta tuotteita valmistajalle ilman ennakkoon saatua lupaa.

Rajoituksia ja poissulkemisiä:

Tämä takuu ei ole voimassa sarjanumeroiduille tuotteille, joista sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi, eikä tuotteille, joita on käsitelty väärin tai jotka ovat joutuneet onnettomuuteen. Virheellinen käyttö, huolto tai varastointi voi mitätöidä Raz-suihkutuolin takuun.

Takuu ei kata tuotteita, joita on muutettu ilman Raz Designin erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä sisältää, rajoittumatta, muutokset valtuuttamattomia osia ja liitäntöjä käyttämällä, tuotteet, joiden vaurioituminen johtuu mihinkään osaan tehdyistä korjauksista, jotka on tehnyt henkilö tai henkilöt, jotka eivät ole valtuutetun Raz-jälleenmyyjän palveluksessa, tai jos tuote on vaurioitunut olosuhteissa, jotka eivät ole Raz Designin kontrolloitavissa. Vain Raz Designilla on valtuus määritellä, oikeuttavatko olosuhteet takuun voimassaoloon. Takuu ei koske ongelmia, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta tai tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Edellä mainittu takuu on yksinomainen ja sitä sovelletaan kaikkien muiden takuiden sijaan, joko ilmaistujen tai epäsuorien, mukaan lukien epäsuorat takuut, jotka kuvaavat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikkien takuuta koskevien rikkomusten korjaaminen rajoitetaan vain viallisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän asiakirjan ehtojen mukaisesti.

Minkä tahansa epäsuoran takuun soveltaminen ei saa laajentua tässä annetun nimenomaisen takuun kestoa pitemmäksi. Raz Design ei ole vastuussa mistään välillisistä tai satunnaisista vahingoista, jotka liittyvät osin tai kokonaan Raz-suihkutuoliin.

TÄRKEÄÄ!

ÄLÄ KÄYTÄ HANKAUSJAUHEITA TAI HANKAUSTYYNYJÄ RAZ-ALUSASTIASUIHKUTUOLIN PUHDISTUKSESSA.

ÄLÄ UPOTA RAZ-SUIHKUTUOLIA VETEEN.

HUUHTELE HUOLELLISESTI PUHDISTUKSEN JÄLKEEN, JOTTA VARMISTETAAN, ETTÄ KAIKKI SAIPPUA- TAI PUHDISTUSAINEMÄÄRÄT POISTUVAT.

ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSTUOTTEITA TUTUSTUMATTA TUOTTEEN KÄYTTÖOHJEISIIN JA RYHTYMÄTTÄ ASIANMUKAISIIN VAROTOIMENPITEISIIN IHMISTEN KEMIKAALEILLE ALTISTUMISEN SUHTEEN.

7.0 YHTEYSTIEDOT

On tärkeää, että Raz-suihkutuoli kootaan oikein, ja että kaikki säädöt tehdään huolellisesti. Uusimmat käyttöohjeet voidaan ladata osoitteesta www.razdesigninc.com. Saadaksesi selventäviä tietoja mistä tahansa tämän ohjeen osasta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Suomi
Rehaco Oy
Haaransuontie 6, A 7
90240 Oulu, Finland
040 705 5886
info@rehaco.fi

USA JA MUU MAAILMA
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

TÄRKEÄÄ!

TUOTTEET, JOITA EI ENÄÄ VOIDA KÄYTTÄÄ, ON HÄVITETTÄVÄ ERILLÄÄN KOTITALOUSJÄTTEESTÄ. SE ON TEHTÄVÄ PAIKALLISTEN JA KANSALLISTEN YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAAKA-AINEIDEN KIERRÄTYSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI. KATSO LISÄTIETOJA PAIKALLISTEN VIRANOMAISTEN VERKKOSIVUILTA LIITTYEN OIKEAAN HÄVITTÄMISEEN.

OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI, JOS MISSÄÄN VAIHEESSA TUNTUU, ETTÄ JOKIN RAZ-SUIHKUTUOLIN OSA TARVITSEE HUOLTOA. KAIKKI ONGELMAT, JOTKA VOIVAT VAIKUTTAA TUOLIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN, ON RATKAISTAVA VÄLITTÖMÄSTI. ON OTETTAVA YHTEYTTÄ SUIHKUTUOLIN TOIMITTANEESEEN JÄLLEENMYYJÄÄN, JOTTA KORJAUKSET VOIDAAN SUORITTA ENNEN TUOLIN KÄYTTÖÄ. JÄLLEENMYYJÄLLE ON ILMOITETTAVA SELKEÄSTI, ETTÄ SUIHKUTUOLI ON KORJAUKSEN TARPEESSA, EIKÄ SITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ ENNEN KUIN KORJAUKSET ON SUORITETTU JA KAIKKI ONGELMAT RATKAISTU.

JOS JÄLLEENMYYJÄSI EI JOSTAIN SYYSTÄ VASTAA TYYDYTTÄVÄLLÄ TAVALLA, OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ RAZ DESIGNIIN: SÄHKÖPOSTILLA info@razdesigninc.com
PUHELMELLA +1 877 720 5678

rehaco.