


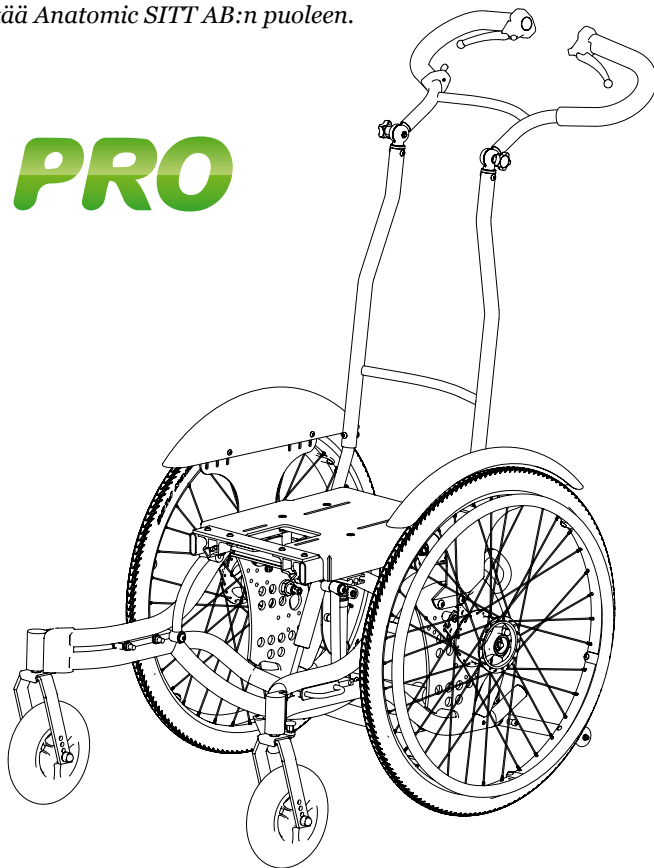

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan alustarunkona yhdessä Anatomic Sitt AB:n toimittamien istuinjärjestelmien kanssa.
Mikäli muunlaiset käytöt ovat tarpeen, kääntykää Anatomic SITT AB:n puoleen.

Zitzi SEABASS PRO



Valmistaja

Anatomic SITT AB
Box 6137, SE-60006 Norrköping
SWEDEN - Phone +46 (0)11-16 18 00




Check
here!

Yllä oleva ruutu tulee ruksata, mikäli tuotteeseen on tehty yksilöllisiä muutoksia. CE-merkintä ei tällöin ole enää voimassa ja tulee poistaa.

Sisällysluettelo

Edition 2 2010 06 02 BR 1201-1


2:1	Istuinlevyn asentaminen	9:1	Jalkatuki
2:2	Istuin syvyyden säätäminen	10:1	standardi jalkatuki
3:1	Istuimen kallistus	10:2	Kuulaniveladapteri
3:2	Työntökaaren kallistussäätö	10:3	Ylöstaittuva jalkatuki
4:1	Pyörän asema	11:1	Joustava jalkatuki
4:2	Tukipyörät	11:2	Pohjetuki
5:1	Tukipyörän kulmansäätö	12:1	Kurasuojat
5:2	Työntökaari	12:2	Autokiinnityssarja
6:1	Työntökaaren korkeussäätö	13:1	Käsijarru
6:2	Työntökaaren kokoontaittaminen	13:2	Kaatumaeste
7:1	Rumpujarrut	13:3	Kallistuspoljin
7:2	Pikalukituspyörät	14:1	Huolto
8:1	Käsinojat, istuin		

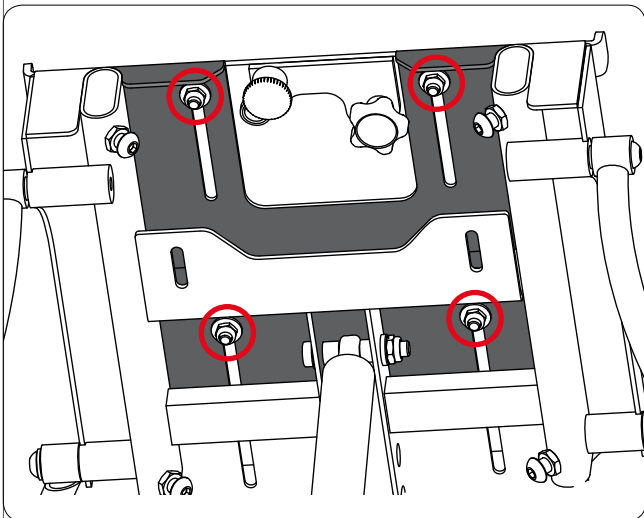

2:1 Istuinlevyn asentaminen

Valitse istuinlevy istuinjärjestelmän mukaan.
Syvyysääädä istuinlevy ja kiristä neljä ruuvia.

Huomio – Säädä istuin niin, että saat tuolin tasapainoon.

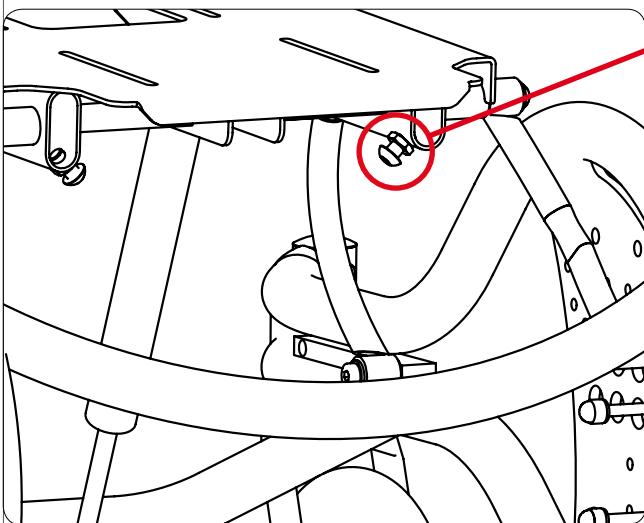


A

2:2 Istuinsyvyys

Saadaksesi Seabassin oikeaan tasapainoon, voidaan työntökahvaa syvyys säätää.

Kun Seabass on tasapainossa, se on paljon parempi ja helpompi ajaa.


A – Löysää ruuveja molemmilta puolilta, säädä työntökahva ja kiristä ruuvit.

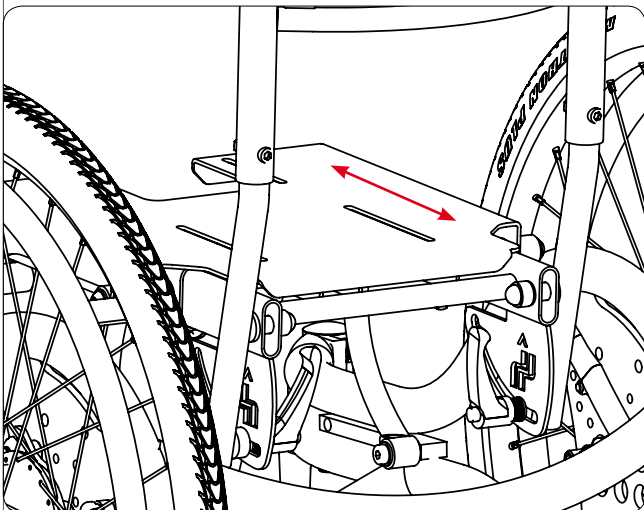

Huomio! Ruuveja ei tarvitse poistaa kokonaan. Riittää, että niitä hieman avataan.



Huomio! Jätä vähintään 5 cm työntökahvan liitoksesta putken sisään!



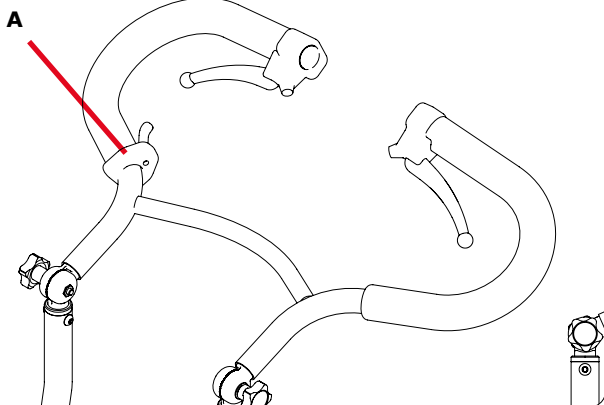


3:1 Istuimen kallistus

Paina kallistuskahvaa (A) ja säädä kallistus haluttuun asentoon. Vapauta kahva.



Ole varovainen, välttä puristumisriski

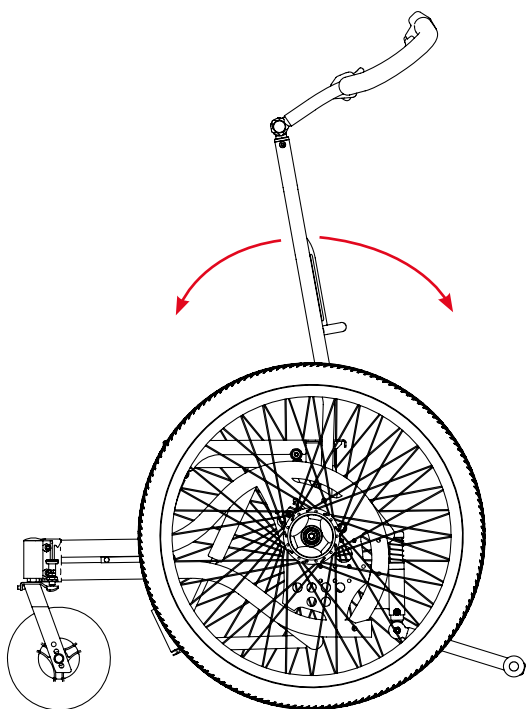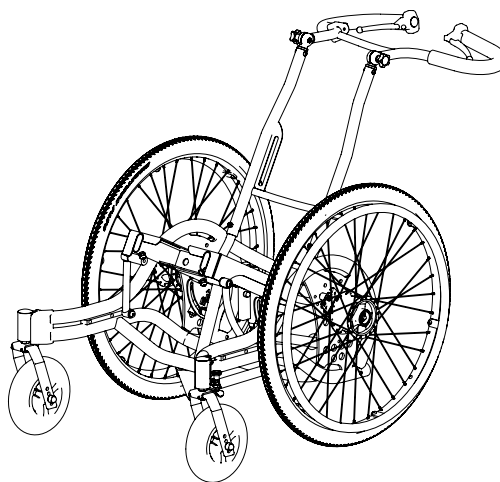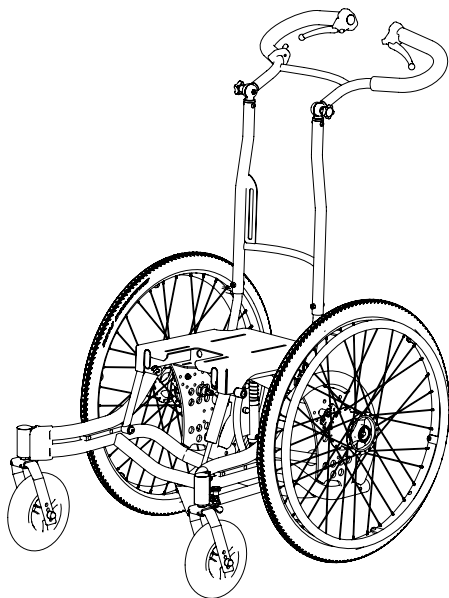



3:2 Työntökahvan säätäminen (Runko)

Työntökahva voidaan asentaa eri istuinjärjestelmiin. Löysää nupit (A), asenna ja kiristä nupit (A).



Työntökaaren rungon tulee olla kosketuksissa istuimen selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.

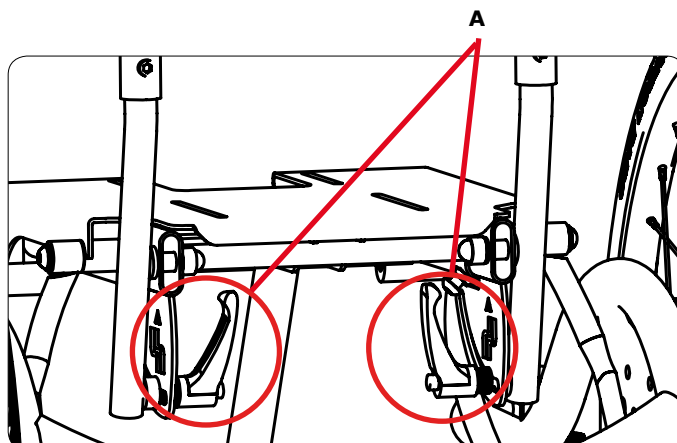

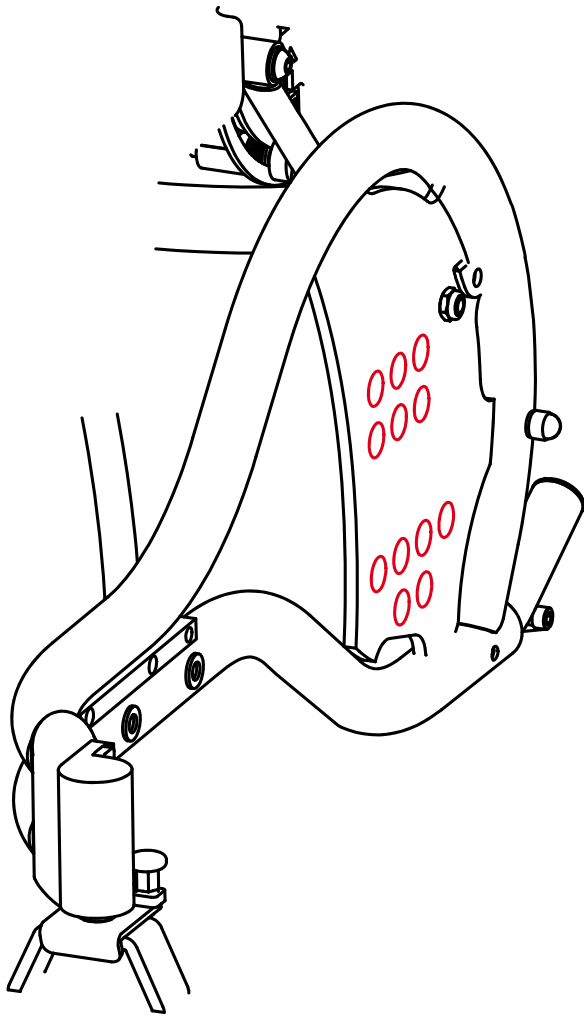

4:1 Pyörän asema


Riippuen istuinjärjestelmän asemasta alustan istuinlevyllä, pyörän asemaa on mahdollista säätää vaaka-akselilla painopisteen säilyttämiseksi ja vakauden parantamiseksi.

Valitse kiinnitys aukko joka antaa alustalle parhaan mahdollisen vakauden.

Pyörätuolin vakausominaisuuksia koskevia neuvoja ja apua on saatavissa jälleenmyyjältä.




Huomio! pyörän aseman muuttaminen saattaa lisätä kaatumisriskiä. Saattaa olla tarpeen myös säätää pyörien asennot.

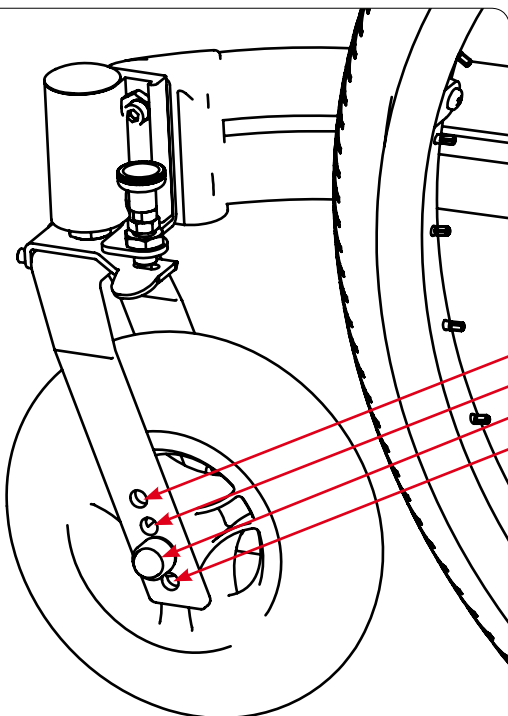

4:2 Tukipyörät

Tukipyöriä voidaan säätää neljälle eri korkeudelle kun säädät alustan vakautta.

Neljä eri tukipyörän paikkaa

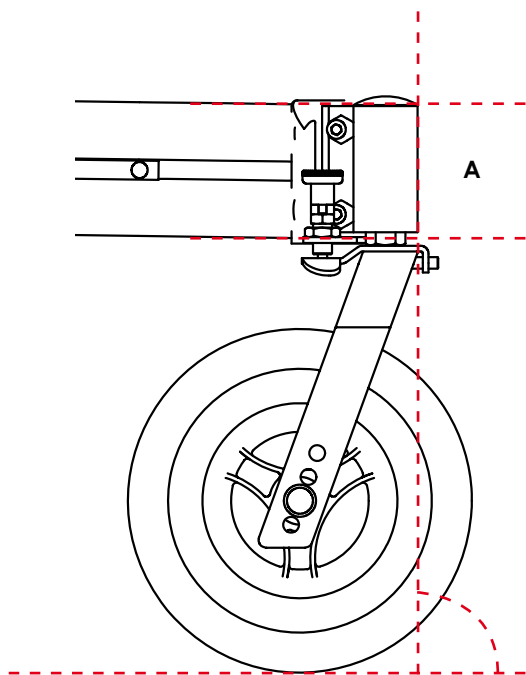

5:1 Tukipyörän kulmansäätö


Tukipyörien hienosäätö.

Muuttaaksesi tukipyörien haarukan kulmaa, löysää ruuveja ja säädä epäkeskomuttereita (A).

Huomautus - Varmista, että lukitset pultit kunnolla.



Huomio! Varmista, että ruuvit tulevat kunnolla kiristetyiksi säätämisen jälkeen

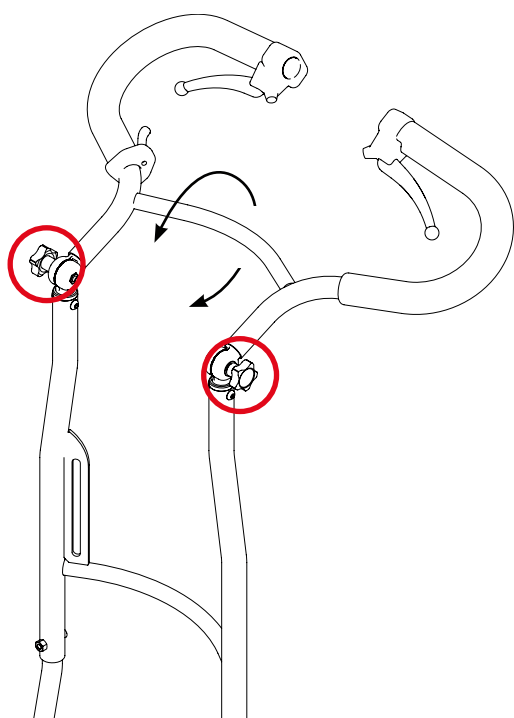

5:2 Työntökahva


Työntökahvojen kallistusta voidaan säätää avaamalla säätönupit. Säädä ja kiristä nupit kunnolla!



Huomio! Työntökaaren rungon tulee olla kosketuksissa istuimen selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.



Varmista, että ruuvit on kunnolla kiristetty

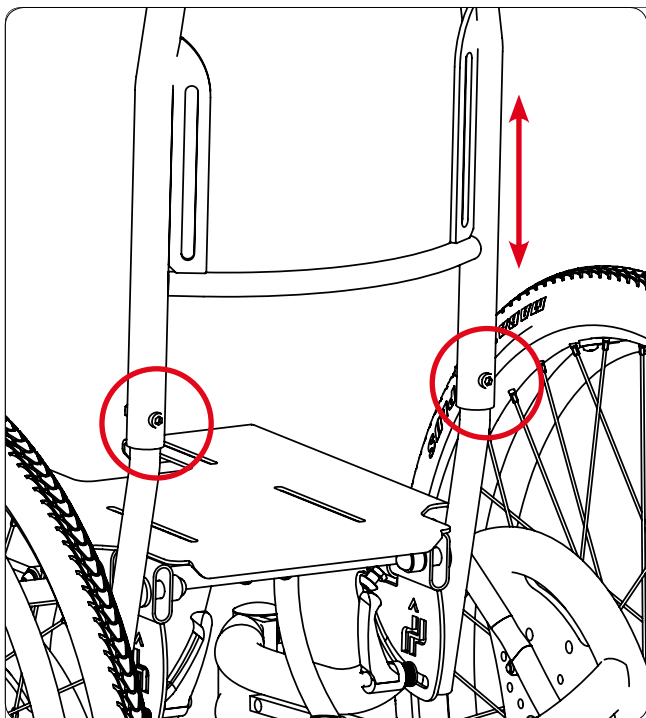

6:1 Työntökahvan korkeuden säätö

Työntökahva voidaan säätää kolmeen eri korkeuteen.

Kuvassa punaisella merkityllä alueella näkyy valittavissa olevat korkeudet. Säädä työntökahva haluttuun korkeuteen ja kiristä ruuvit kunnolla.

6:2 Kokoon taittuva työntökahva

Lisävaruste : kokoon taittuva työntökahva

Työntökahvan kokoontaittaminen :



Työntökahvan kokoontaittamiseksi, taita varsi (A) alaspäin.

Ylös nostaminen :

Vedä työntökahvaa ylöspäin kunnes kuulet napsahdavan äänen.

Napsahdus osoittaa, että työntökahva on lukkiutunut oikein.

Tärkeää– Varmista, että työntökahva on lukittu säätämisen jälkeen.

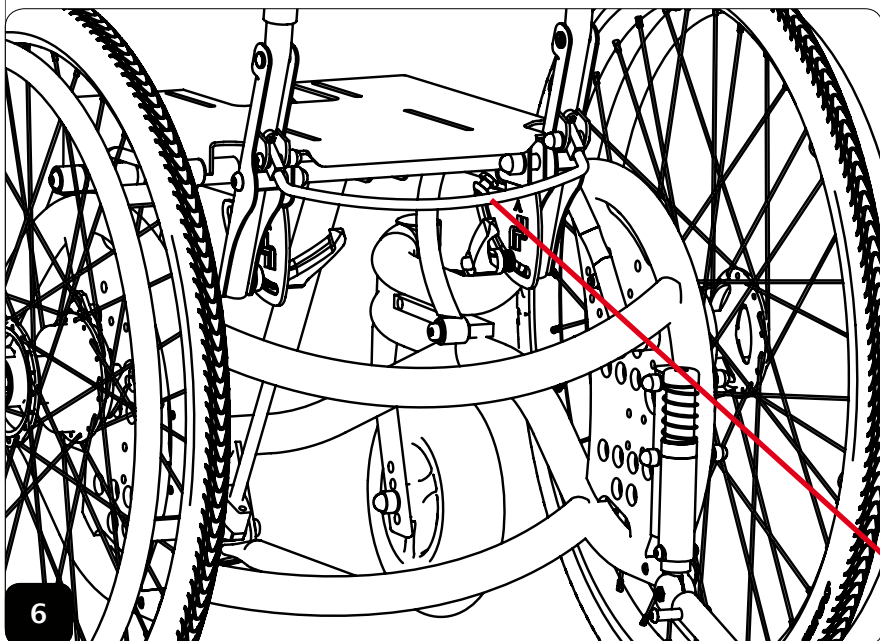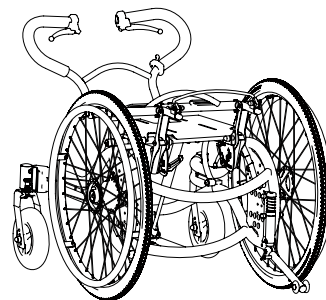

Varmista, että työntökahva palaa lukittuun asentoon.

7:1 Rumpujarru

Pyörät on varustettu rumpujarruilla, jotka avustaja voi kytkeä päälle.

Jarrujen kytkeminen päälle

Purista jarrukahvaa ja käännä punainen (A) lukitsin haluttuun asentoon.

Jarrujen vapauttaminen

Purista jarrukahvaa jolloin lukitsin avautuu automaattisesti. Päästä irti jarrukahvasta.

Jarrujen tarkistus

Aktivoi jarut työntäessäsi alustaa eteenpäin. Jos jorrut toimivat oikein, ei alusta liiku eteenpäin. Jarrukahvoja ei tulisi olla mahdollista vetää työntökaarta vasten. Noin 5-10mm raon tulisi jäädä kun jarrut ovat aktivoituna.

Mikäli jarrut eivät toimi

Tarkista molempien jarruvaijereiden kireys. Jos vaijeri on löysä, käytä ensin kiristysmutteria (B) sen kiristämiseen. Mikäli tämä säätö ei ole riittävä, kokeile seuraavaa pikasäätöohjetta jarruvaijereiden kiristämiseksi.

- Kiristä ruuvi (B) pohjaan saakka
- Avaa mutteria (D)
- Työnnä jarruvarsi (D)
- Kiristä mutteri (D)

7:2 Pikalukituspyörät

Pyörät ovat helposti irrotettavissa alustasta, mikä voi olla hyödyllistä kuljetusta varten

Pyörän irrottaminen

Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta ja pidä se alaspainettuna samalla pyörää ulospäin alustasta vetäen.


Pyörän vaihtaminen


Paina pyörän keskiössä olevaa painiketta ja pidä se alaspainettuna. Työnnä pyörän akseli rumpujarrun reikään. Kun pyörä paikallaan, vapauta painike.

Tarkista, että pyörä on kunnolla kiinni vetämällä sitä ulospäin painamatta keskipainiketta.

8:1 Käsinoja, istuin

- 1) Asenna profiilit 2 ruuvilla (A), aluslevyillä ja muttereilla (B).
- 2) Laita ruuvi alapuolelta ja aluslevy ja mutteri yläpuolelta. Kiristä.
- 3) Löysää ruuveja (C) molemmilta puolin.
- 4) Kiinnitä käsinojat profiiliin (jonka juuri asensit)
- 5) Kiristä kaikki ruuvit kunnolla !

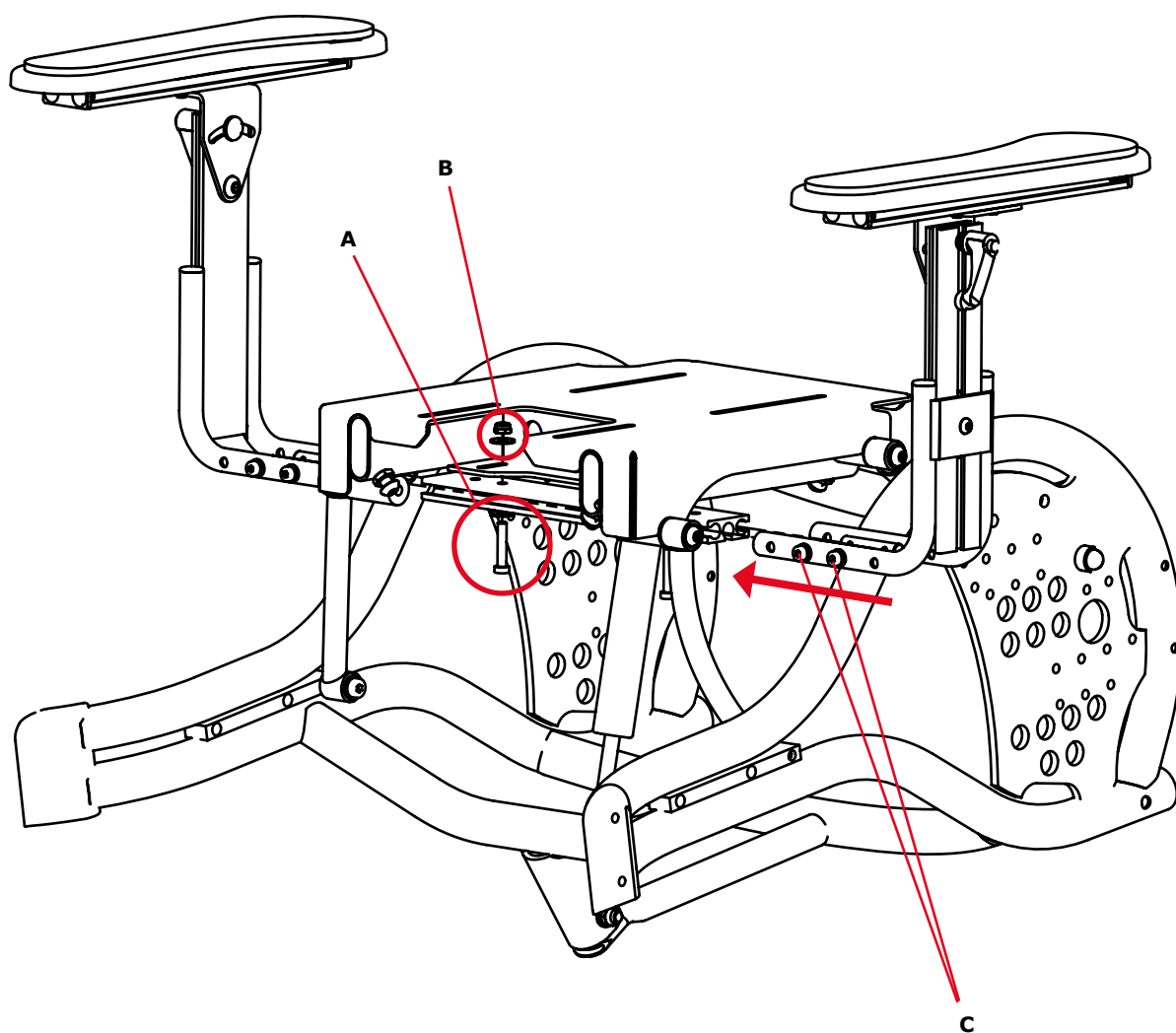

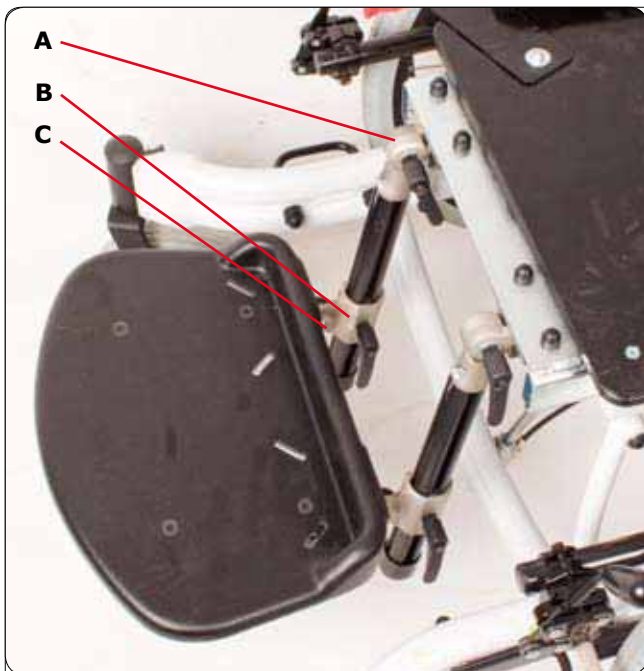

9:1 Jalkatuki

Jalkatuki asennetaan istuinlevyn etuosan alla oleviin reikiin.

A – Polvinivelen kulmansäätö

B – Jalkatuen korkeussäätö

C – Jalkatuen kulmansäätö



E

Jalkatuki on syvyys säädettävä!


Säätääksesi käyttäjän polvikulman oikein, tulisi jalkatuen syvyys säätää sen mukaan, miten istuin on asennettu alustaan.

Säädä löysäämällä ruuvia (**E**) ja vetämällä / työntämällä pidikettä oikeaan asentoon.

Kiristä ruuvi (**E**) kun kulma on halutunlainen.



HUOMIO! Vähintään 5 cm jalkatuen kiinnike putkista tulee pysyä istuin osan putkien sisällä koko ajan.

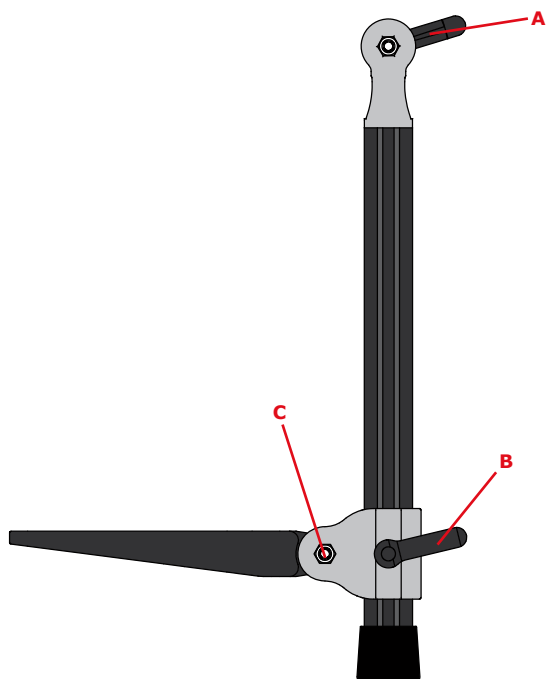

10:1 Standardi jalkatuki

- Irrota profiilin muovi kansi.
- Kiinnitä jalkalevyn kiinnike pidikkeeseen.
- Kiristä ruuvit.
- Laita muovi kansi takaisin paikalleen.

Kulman säätö polvinivelellä (A):


- 1) Löysää nuppi
- 2) Säädä
- 3) Kiristä

Jalkalevyn (B) korkeuden säätö:

- 1) Löysää nuppi
- 2) Säädä
- 3) Kiristä

Kulman säätö jalkaliitoksella (C):

- 1) Löysää ruuvi
- 2) Säädä
- 3) Kiristä

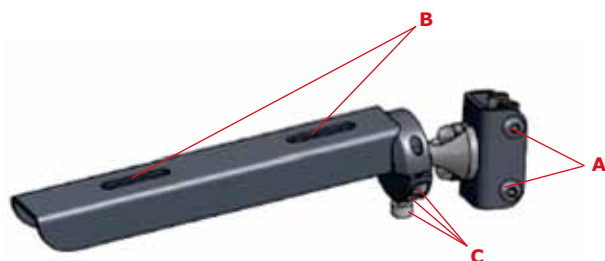

10:2 Kuulanivel adapteri

Korkeussäätö, jalkalevy (A):


- Löysää ruuvit (A)
- Säädä halutulle korkeudelle
- Kiristä ruuvit (A)

Syvyyssäätö, jalkalevy (B):

- Löysää ruuvit (B)
- Säädä haluttuun syvyyteen
- Kiristä ruuvit (B)

Kulmasäätö (C):

- Löysää ruuveja (C) niin, että pystyt säätämään niitä käsin
- Säädä haluttuun kulmaan
- Kiristä ruuvit (C)

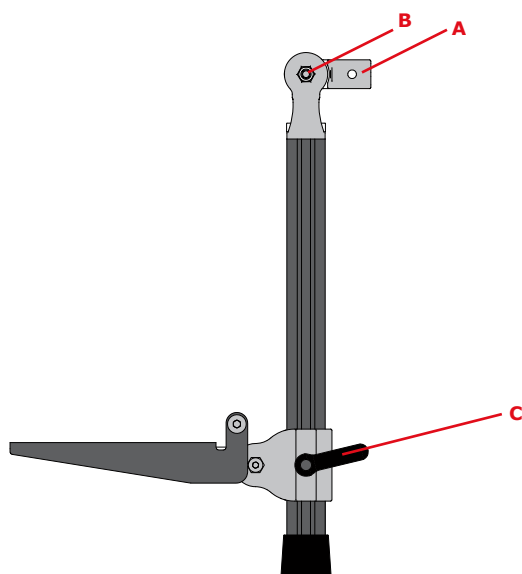

10:3 Ylöskääntävä jalkatuki

Jalkatuen asentaminen – A


Asenna jalkatuki työntämällä se jalkatuen kiinnikkeeseen.
Lukitse ruuvi tiukasti asennuksen jälkeen.

Kulman säätö, polvinivel – B

- Löysää nuppia (B)
- Säädä haluttuun kulmaan
- Kiristä nuppi (B)

Korkaussäätö, jalkalauta – C

- Löysää nuppia (C)
- Säädä haluttuun korkeuteen
- Kiristä nuppi (C)

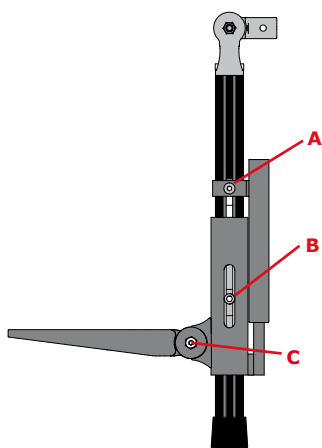

11:1 Jousitettu jalkalevyn kiinnitin

Joustava jalkatuki

Zitzi Seabass voidaan varustaa jousitetulla jalkatuen kiinnittimellä spastisuuden murtamiseksi sekä dynaamisuuden lisäämiseksi.

Jalkatuen asentaminen

Löysää päätyosaa ja työnnä jalkatuet profiliin.

Joustavuus (C)

Asennossa (B) oleva ruuvi on aina oltava alimmassa asennossa ollakseen täysin joustava.

Korkeussäätö


Löysää ruuvit (A) ja (B).

Kulman säätö

Löysää ruuvia asennossa (C) ja säädä jalkalevy haluttuun kulmaan.




Saavuttaaksesi optimaalisen jouston, tulisi jalkatuen putken osoittaa suoraan alaspäin.

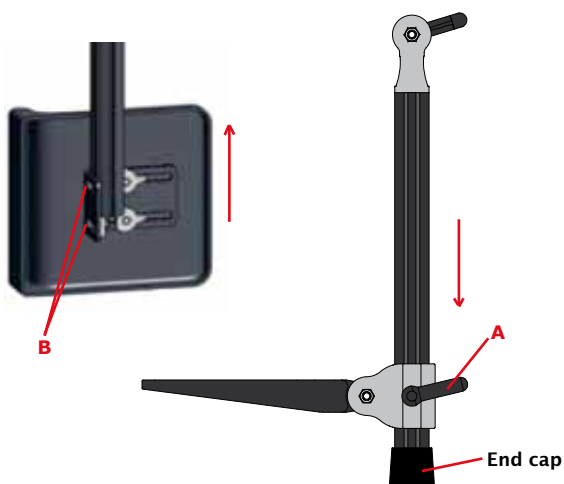

11:2 Pohjetuki

- Irrota jalkalevy löysäämällä ruuvi (A). Vedä jalkalevy suoraan alas.
- Kiinnitä pohjetuki jalkatuen kannattimeen.
- Säädä haluttu korkeus
- Kiristä ruuvi (B).
- Aseta jalkalevy takaisin.

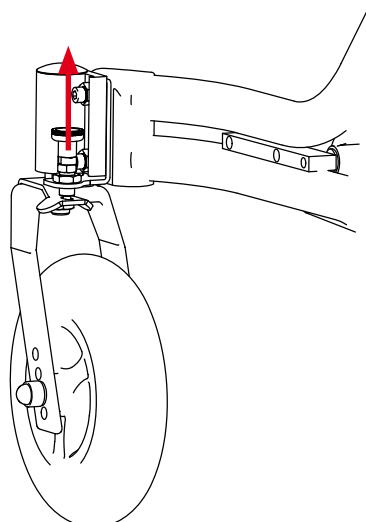


11:3 Suuntalukko

Vapauta suuntalukko vetämällä nuppia ylös. Vapauta lukitus kääntämällä nuppia 45 ° ja vapauttamalla se varovasti.

Käännä suuntalukko uudelleen vetämällä nuppia ylöspäin ja kierrä 45 ° ja vapauta se niin, että lukitus akseli asettuu tukipyörän haarukan yhteydessä olevaan reikään .

Varmista, että suuntalukko on kytketty!

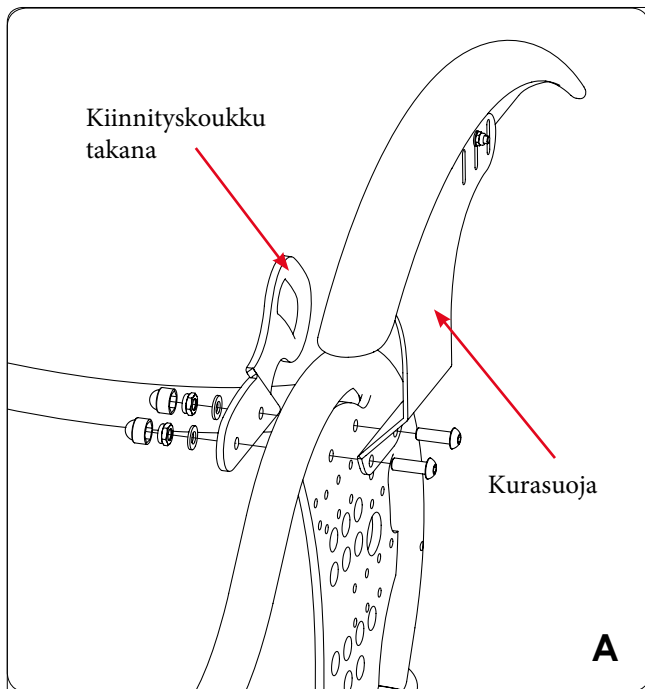


12:1 Kurasuojat

Irrota pyörää pikalukitustoiminnon avulla (katso kohta 7:2). Kurasuoja tulee asentaa runkopyörälevyn ulkopuolelle kahdella ruuvilla (A).

Säädä kurasuojat niin että pyörät pyörivät vapaasti.

Kurasuojien korkeus ja syvyys säätö voidaan tehdä käyttämällä muoviosaan kiinnitettyjä ruuveja.

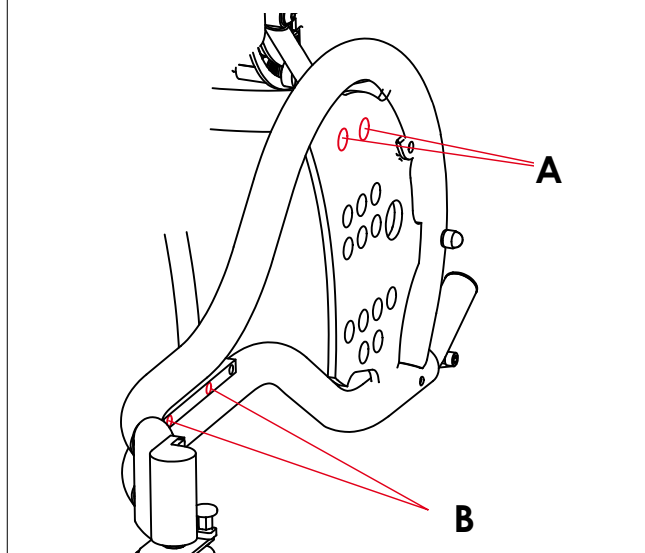

Huomio! Työntötangon rungon tulee olla kosketuksissa istuimen selkäosaan ajoneuvossa kuljettamisen aikana.


12:2 Kiinnityssarja kuljetukseen ajoneuvoissa

Takaosa

Jokainen kiinnike on asennettava kahdella ruuvilla rungon sisäpuolella (A).

Etuosa

Jokainen kiinnike on asennettava kahdella mutterilla kuljetuskiinnikeissä oleviin kierteisiin. Kiinnike on kiinnitettävä rungon ulkopuolelle niin, että lenkki tulee ulospäin ja mutterit sisäpuolelle (B).

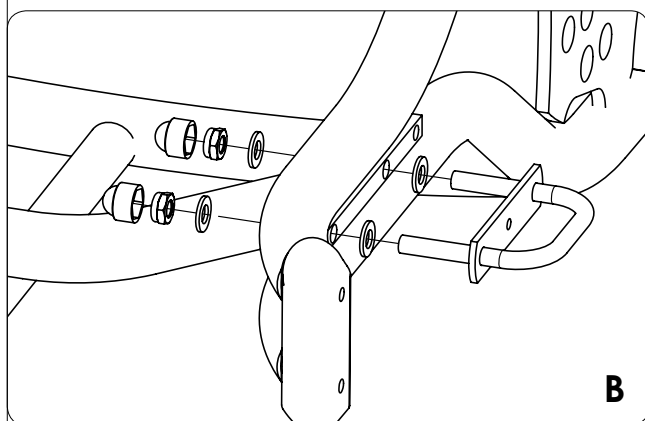

Törmäystestattu ja hyväksytty standardin 7176-19 mukaisesti 135 kg painolle.
Testattu standardin ISO 10542 mukaisesti.

13:1 Käsijarru

Käsijarru tulee asentaa samaan kiinnikkeeseen kuljetussarjan etukiinnike (A).

Kun autokiinnityssarjaa ei käytetä, asenna käsijarrun kiinnike mukana tulevilla ruuveilla.





A

13:2 Kaatumaeste

Kun kaatumaestettä ei käytetä, se on helppo kääntää pois paikaltaan kaatumaestettä varovasti jalalla painamalla ja sivuun kääntämällä.

Kaatumaestettä päälle kytkettäessä sitä on käännettävä, kunnes kuuluu loksahdus, joka osoittaa kaatumaesteen olevan oikeassa asennossa.

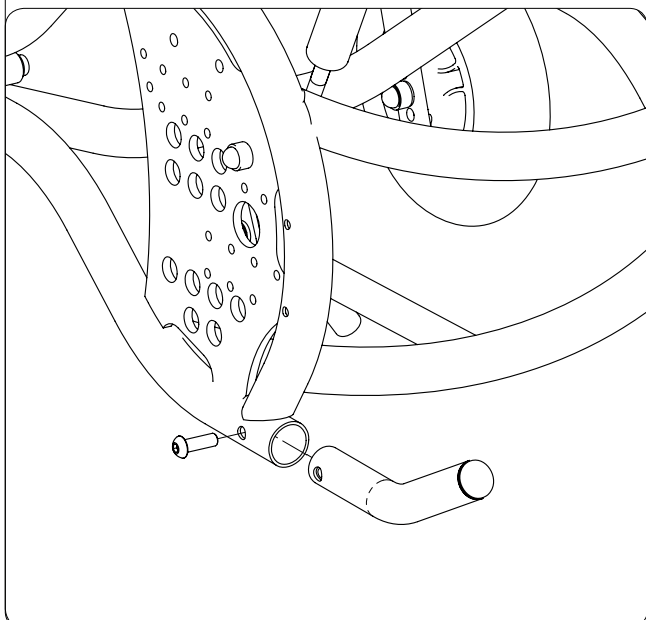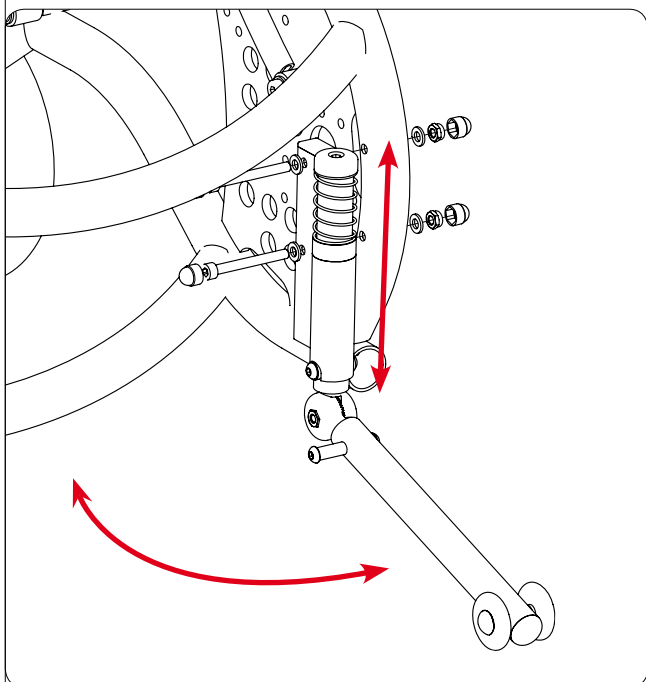

13:3 Kippauspoljin

Kippauspolkimen asentaminen

Irrota putken päätykansi, työnnä kippauspoljin runkoputkeen, kunnes reikä on linjassa rungossa olevien reikien kanssa

Kierrä ja kiristä kippauspolkimen mukana tulleet mutterit paikoilleen.



Zitzi Seabass Pro tulee aina varustaa kaatumaesteellä, joka tarjoaa monia säätömahdollisuuksia.

14:1 Huolto ohjeet

Alustan puhdistus

Muoviset ja metalliset osat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä auto shampooilla tai vastaavalla tuotteella. Mikäli runko on erittäin likainen, voidaan muovi- ja metalli osissa käyttää rasvanpoistoaainetta. Ajattele vihreästi, ympäristöasiat huomioiden! Käytä biohajoavia pesuaineita. Tarkasta kunto säännöllisesti ja suorita huolto tarvittaessa.

Pikalukituksen tarkistus

Irrota akselit, puhdista ja tarkasta lukituskuulien toiminto. Voitele ohuella voiteluöljyllä mikäli tarpeen. Akselit eivät vaadi voitelua, koska ne eivät pyöri keskiössä, mutta ne voi olla tarpeen puhdistaa liasta. Tarkista, että pyörät on kiinnitetty kunnolla uudelleen kiinnityksen jälkeen. Huolla jos tarpeellista. Tarkista säännöllisesti.

Huoltovälit

Huollon tarve vaihtelee käytön ja kulumisen mukaan ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Huolto tulee kuitenkin tehdä vähintään kerran vuodessa. Katso erilliset huolto- ja kunnostusohjeet.

Työkalut

Säätöihin / huoltoon tarvitaan kuusiokoloavainpaketti, jokoavaimia ja ruuvimeisseli.

Yhteenveto ja tarkastus

Alla olevat tarkistukset tulee suorittaa jokaisella käyttökerralla :

- Tarkista säännöllisesti alustan kunto ja ruuvien kireys.
- Tarkista säännöllisesti kuluminen ja vauriot. Vaihda osat tarvittaessa.
- Tarkista säännöllisesti jarrujen ja tiltin toiminnot sekä muut liikkuvat osat vaurioitumisen varalta ja varmista, että ne toimivat kunnolla.
- Katso www.anatomicsitt.com tarkistuslista.

Merkintä

Alusta on merkitty sarjanumerolla. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Laitekohtainen sarjanumero sijaitsee rungon etuosan putkessa olevassa etiketissä.

Combinations

Tuote soveltuu käytettäväksi Zitzi Delfi, Zitzi Delfi PRO, Zitzi Sharky ja Anatomic SITS-istuinjärjestelmien kanssa. Muiden yhdistelmien osalta ottakaa yhteyttä Anatomic SITT AB:hen

Kierrätys

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee lajitella materiaalityypin mukaan.

15:1**Takuu**

Rungossa on 3 vuoden takuu valmistusvirheille.

Tekniset tiedot

Seabass PRO	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Leveys (cm)	35	40	45
Leveys, etu pyörät (cm)	46	53	60
Pituus (cm)	60	62	62
Istuin korkeus (cm)	45	45	45
Leveys renkaiden sisäpuolelta (cm)	48	53	58
Leveys kelauspyörillä (cm)	51	66	71
Kallistus (astetta)	0-30	0-30	0-30
Max.käyttäjän paino (kg)	135	135	135



Sticker placement!

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Visiting address Stohagsgatan 26, 602 29 NORRKÖPING, SWEDEN
Postal address Box 6137, SE600 06 NORRKÖPING, Phone +46 (0)11-16 18 00, fax 011-16 20 05
www.anatomicsitt.com

