



Zitzi
ACTIVE 

Käyttöohje


Zitzi Active

Sisällysluettelo

Turvallisuusvarotoimenpiteet	3	Tukipöytä.....	15
Työkalu	4	Ohjaustanko.....	15
Selkänojan kiinnittäminen/irrotus	4	Yhtenäinen jalkatuki.....	16
Selkänojan kallistussäätö	5	Kaksiosainen jalkatuki	17
Selkänojan korkeuden säätäminen.....	6	Pohjetuki	18
Selkänojan syvyysäätö	6	Jalkahihna	19
Istuimen sijoitus	7	Nilkkatuki	19
Päätuki.....	8	Alustarunko Flipper Pro G2	20
Lantiovyö.....	9	Alustarunko Seastar	22
Rintakehävaljaat	10	Kunnossapito.....	23
Rintakehävyö	11	Yhteenvedo ja tarkastukset.....	24
Selkänojaan kiinnitettävä käsinoja.....	12	Adaptaatio ja kustomointi.....	25
Tukikahva	13	Myyntiehdot	26
Polvituki	14	Tekniset tiedot	27

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic SITT AB

Postiosoite	Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin	+46 11-161800
Fax	+46 11-162005
E-mail	info@anatomicsitt.com
Webb	anatomicsitt.com
Opastusvideot	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt

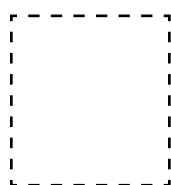

Rastita tämä ruutu, jos tuote on KUSTOMOITU.

CE-merkintä ei ole enää voimassa ja tulee poistaa.

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886 | info@rehaco.fi

Turvavarotoimenpiteet

Johdanto

Zitzi Active -tuolin käyttäminen koko laajuudessaan edellyttää tämän käyttöohjeen lukemista. Tämä koskee kaikkia käyttäjän läheisiä henkilöitä.

Tuote on tarkoitettu henkilöille, joilla on ongelmia istumisen kanssa ja soveltuu käytettäväksi useiden eri diagnoosien yhteydessä. Zitzi Active -tuolin sovitusta ja säätäminen kuuluu ainoastaan lääketieteellisesti pätevän henkilön tehtäväksi.

Mikäli tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteys Anatomic SITT AB -yhtiöön.



Soveltuvuus käyttöön

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aktiivisena istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic Sitt AB:n valmistaman alustan kanssa.

Zitzi Active täydentää tavanomaista istuinjärjestelmää ja aktiivisen istumisen aikaa tulee rajoittaa potilaan edellytysten mukaisesti.



Käyttöä edeltävä tarkastus

Tarkista kaikki liikkuvat osat, vyöt ja kiinnitysosat mahdollisen kuluneisuuden, toiminnan yms. osalta. Tarkista myös, että muoviosat ovat ehjiä ja vaurioitumattomia. Varmista, että istuinjärjestelmä on oikein kiinnitetty alustaan. Zitzi Active -tuolin käyttö edellyttää aina jonkin valmistamamme lantiovyön käyttämistä, tarvittaessa myös rintakehävyön tai -valjaiden käyttämistä (vastaavan tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudatettava).

Potilasta ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa Active-tuoliin. Potilaan kokemat mahdolliset ongelmat tulee huomioida.



Turvahihna

Istuinjärjestelmän mukana toimitetaan turvahihna, jota tulee aina käyttää yhdessä universaaliadapterijärjestelmän kanssa. Hihna tulee kiristää tuolin selkänojaprofiilista ja alustan ohjaustangon/kahvan ympäri. Varmista, että hihna on tukevasti paikallaan ja kireällä.



Käytön jälkeinen tarkastus

Käytön jälkeen on aina tarkastettava, että potilaalla ilmenee punoitusta tai painautumia.

Yhteydenotot

Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Tuotteen yksilöivä sarjanumero sijaitsee istuinosan verhoilun alla olevassa kilvessä.

Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Työkalu

Säätöjen tekemiseen tarkoitettu kuusio-
koloavain (4 mm) on kiinni selkänojan
yläosassa.



Työkalu tulee säilyttää profiilin
päällä selkänojabrofiilia suojaamassa.

Mukana on myös
Torx-avain T-25



= Säätöpultit



= Torx-avain




Selkänojan kiinnittäminen/irrotus

Selkänoja on kiinnitetty 4 pultilla.

Työnnä selkänojabrofiili alas kannatin-
osaan ja kiristä neljä mukana toimitettua
ruuvia (kuvassa punaisella ympyröidy).

Selkänojabrofiilin pidäkkeen ansiosta
selkänoja tulee automaattisesti oikealle
paikalleen.

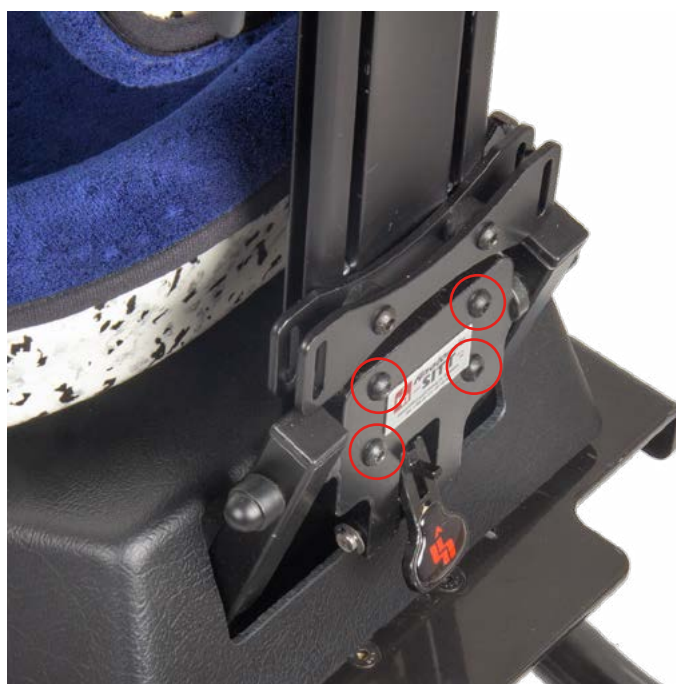

Selkänojan kallistussäätö




Vipu kytketään päälle sitä suoraan ulos ja sitten ylös vetämällä. Selkänojan kulman säätämiseksi vipua painetaan alas, jolloin selkänoja vapautuu ja se voidaan säätää sopivaan asentoon. Kun haluttu kulma on saavutettu, vipu jälleen vapautetaan.



On hyvin tärkeää pitää vipu säätöjen tekemisen jälkeen turva-asennossa alas käännettynä.



Selkänojan korkeussäätö

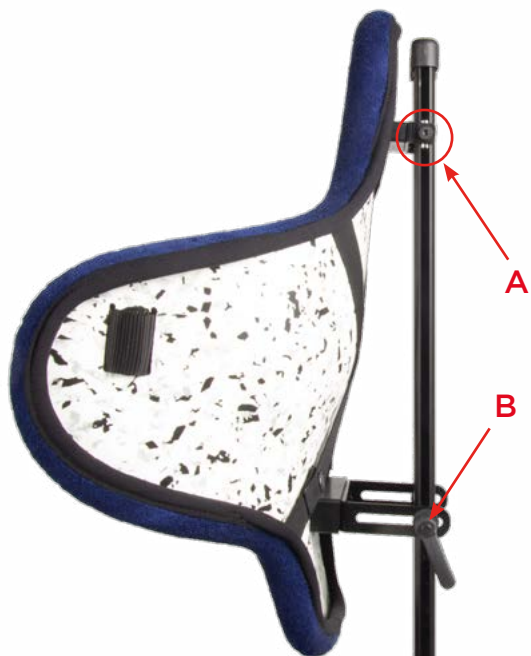

- Avaa kuvan mukaisia ruuveja A ja vipuja B selkänojanprofiilin molemmilla puolin.
- Sääda korkeus.
- Sijoita selkänoja siten, että selkänojan yhdysrakenteinen lannetuki tulee käyttöön.
- Kiristä ruuvit ja vivut.

○ = Säätepultti



Selkänojan syvyyssäätö



- Avaa vipu B (kuvassa) selkänojanprofiilin molemmilta puolin.
- Sääda selkänojan syvyys C halutulle tasolle.
- Lukitse vipu.




Istuimen sijoitus

Istuinosan siirtäminen

Istuinosalla on kaksi mahdollista sijaintivaihtoehtoa: normaali kiinnitys (asema 1) tai taempi kiinnitys (asema 2). Näiden erona on istuinosan siirtyminen taaksepäin 2,5 cm asemassa 2. Vaihdaminen näiden kahden aseman välillä tapahtuu avaamalla neljä ruuvia ja siirtämällä istuineen uuteen asemaan.

Kiristä ruuvit tiukalle.

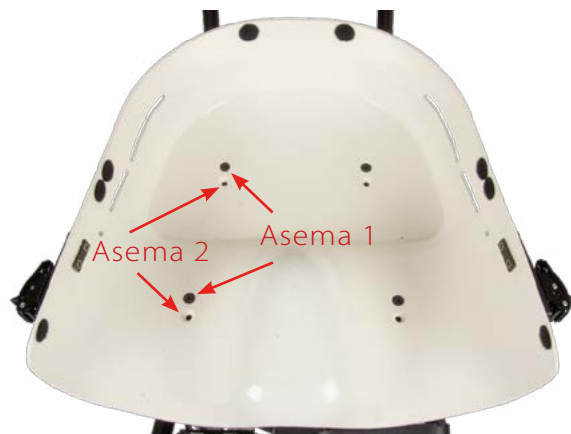

Reunuspehmusteen sovittaminen

Reunuspehmuste voidaan poistaa kokonaan tai osittain lisätilan saamiseksi istuimeen. Se on varustettu tarrakiinnityksellä ja on siten helppo irrottaa ja kiinnittää toiseen kohtaan. Reunuspehmuste voidaan myös helposti leikata halutun pituiseksi.

Istuintyynyn sovittaminen

Istuintyyny voidaan myös poistaa, hioa tai korvata muulla materiaalilla.



Päätuki

A – Päätuken kannattimen asentaminen

Irrota aluksi selkänojaprofiilin yläosaan integroitu kuusiokoloavain.

Työnnä päätuken kannatin (A) sitten haluttuun asentoon selkänojaprofiilin kiskossa. Kiristä pultit!

B – Asenna päätuki kannattimeensa (A) ja säädä haluttuun asentoon. Kiristä lopuksi vipu (B).

C – Päätuken säätäminen

Avaa säätöpultteja (C) hieman, jolloin voit helposti säätää päätukea käsin. Säädön tulua suoritetuksi pultit (C) kiristetään.

Mikäli päätuki on tarpeen säätää korkeammalle, avataan vipua (B) ja päätuki säädetään haluttuun kohtaan, mikä jälkeen vipu (B) kiristetään.



B Korkeussäädön vipu

A Päätuken kannatin,
4 pulttia tappeineen

 = Säätöpultit



Lantiovyö

Lantiovyön kannattimen säätäminen

Lantiovyön kiinnityskohdan muuttamiseksi avataan ruuvia (A) ja solki (B) siirretään haluttuun kohtaan (vaihtoehtoiset reiät suojuksen alla). Kiristä ruuvilla (A).

Lantiovyön asentaminen

Pujota lantiovyö istuimessa olevan raon (C) ja edelleen soljen (B) läpi. Purista vyön hihna tiukasti soljen (B) sisään.



○ = Torx-avain

Kiertymisenestovyön kiinnityksen säätäminen

Vyön kiinnityskohdan muuttamiseksi avataan ruuveja (A) ja soljet (B + D) siirretään haluttuun kohtaan (ks. vaihtoehtoiset reiät), ja kiristetään ruuveilla (A).

Kiertymisenestovyön asennus

Pujota molemmat hihnat istuimessa olevan raon (C) läpi ja edelleen soljen (B) ja (D) läpi. Kiristä vyönhihnat tiukasti solkiin.



Rintakehävaljaat



A Yläkannattimet

B Alakannatin,
perustoimituksessa 1 kpl

Asentaminen, yläkannattimet – A

Ensin poistetaan kuusiokoloavain, joka on paikallaan selkänojaprofiilin yläpäässä. Sitten yläkannattimet (A) työnnetään haluttuun asemaan selkänojaprofiilin kiskossa.

Yläkannattimien säädöt

Avaa pultteja ja tee tarvittavat säädöt. Yläkannattimien tulee olla sellaisella korkeudella, että vetosuunta on hieman olkapäiden yläpuolella. Kiristä pultit.

Valjaiden asentaminen


Vedä ylähihnat kiskon läpi solkeen. Pujota sitten valjaiden alahihnat alakannattimiin (B). Käytä voisä olevia kolmiliukusolkia (E).

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen

Avaa yläkannattimen pulttia ja säädä halutulle korkeudelle.

Kiristä yläpultti.

Säädä haluttuun kulmaan ja kiristä pultti.

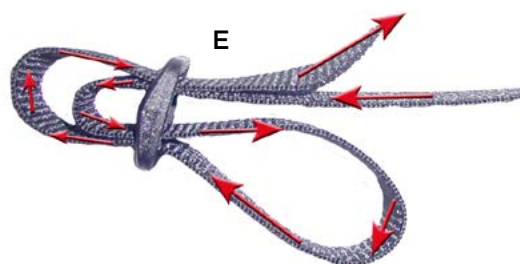

Varmista, että niskalle on tarpeeksi tilaa, tyynyt ovat oikeassa kohdassa eivätkä paina käyttäjää!

○ = Säätöpultit



Rintakehävyö

Rintakehävyön asentaminen

Rintakehävyön hihnat kiinnitetään vartalotuen läpi vetämällä oikealla olevan kuvan mukaisesti.



Selkänojaan kiinnitettävä käsinoja

Käsinojen kiinnittäminen selkänojaan

Ennen käsinojen kiinnittämistä selkänojaan on kuusioavain ja muut mahdolliset jo asennetut osat ensin poistettava. Näitä osia voivat olla päätuki, yläkannattimet ja ohjaustanko.

Avaa lukitusruuveja (A) ja siirrä käsinoja (B) sivuun päästäksesi käsiksi ruuveihin (C) kannattimessa olevien reikien läpi. Avaa ruuveja (C) sen verran, että pääset siirtämään kiskotappeja (D) selkänoja-profiilin urissa. Säädä kannatin halutulle korkeudelle ennen ruuvien (C) kiristämistä. Säädä käsinojat (B) halutulle leveydelle ja kiristä lukitusruuvit (A). Asenna irrotetut osat uudelleen paikoilleen ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Korkeuden säätäminen

Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (C). (Käsinojen leveyttä voidaan joutua säätämään, mikäli ne peittävät korkeussäädön reiät). Sitten säädetään haluttu korkeus ja ruuvit kiristetään.



Leveyden säätäminen

Käsinojan leveyden säätämiseksi avataan lukitusruuveja (A) ja säädetään haluttu leveys, minkä jälkeen ruuvit kiristetään.





Kallistuskulman säätäminen

Käsinojan kulman säätämiseksi avataan vipua (E) ja käsinoja säädetään haluttuun kulmaan, ja vipu (E) kiristetään.



Sivuttaiskallistuksen säätäminen

Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuveja (F) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, ja kiristetään ruuvit (F).

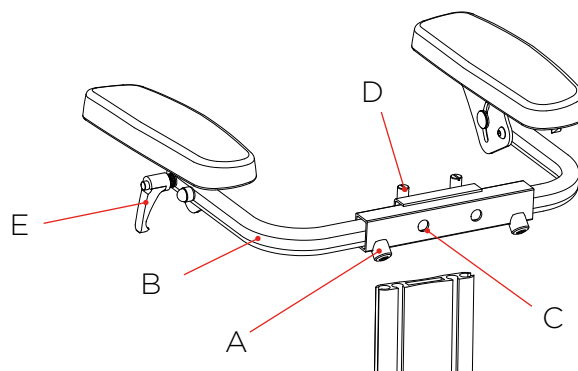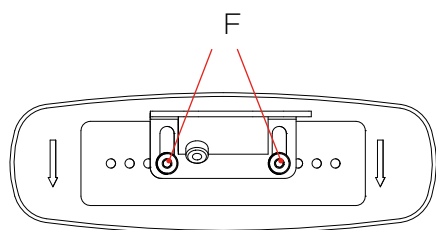

Tukitanko

Tukitangon asentaminen


Asenna tukitanko (A) keskikannattimeen (B) (neliöputki). Lukitse tanko ruuvilla (C).

Tukitangon kulman säätäminen

Avaa vipua (D) ja säädä haluttuun kulmaan. Kun haluttu kulma on saavutettu, kiristä vipu.



Tärkeää – Osien on säätämisen jälkeen oltava oikein lukittuneet. Kiristä vipu tiukalle!

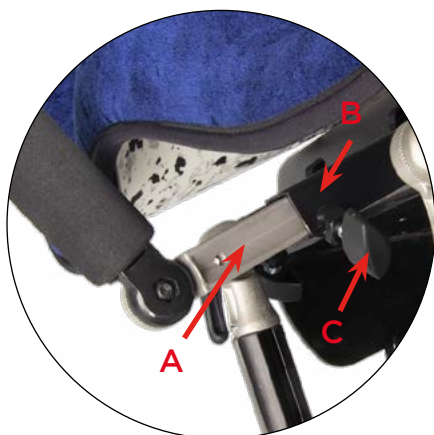

Polvituki

Polvituen asentaminen

Polvituki kiinnitetään muovisten hammastettujen hihnojen avulla istuimen kummallekin puolelle. Polvituen kannattimet voidaan sijoittaa ylös tai alas (ks. alla olevat kuvat).

- Kiinnittäminen (alas) alempaan osaan tapahtuu ruuveilla valmiisiin reikiin kuvassa 1 esitetyllä tavalla.
- Kiinnittäminen (ylös) istuimeen tapahtuu asennussarjan avulla (lyhyet ruuvit ja levy) istuinosassa oleviin valmiisiin reikiin kuvissa 2-3 esitetyllä tavalla.



1. Asennus alas - polvituki



2. Asennus ylös - polvituki



3.



Polvituen säätäminen

Polvituki voidaan kiristää paikoilleen käteväällä soljella, jossa on kiristysosa ja avauspainike.



Kiristysosa




Avauspainike

Tukipöytä


Pöydän asentaminen

Aseta pöytä käsinojalevyjen päälle ja käännä pöydän lukitusvivut (A) kiinni käsinojalevyn alle (B). Lukitusvipua on käännettävä niin pitkälle, että se on käsinojalevyn reunan kohdalla.

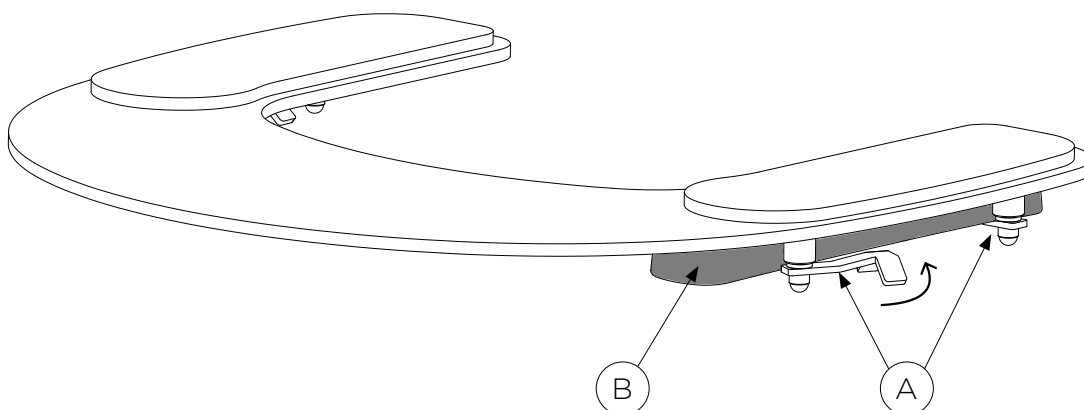

Ohjaustanko

- 1) Ota kuusiokoloavain pois selkänojaprofiilin yläpäästä.
- 2) Asenna tapit (A) selkänojaprofiilin uriin.
- 3) Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvit.

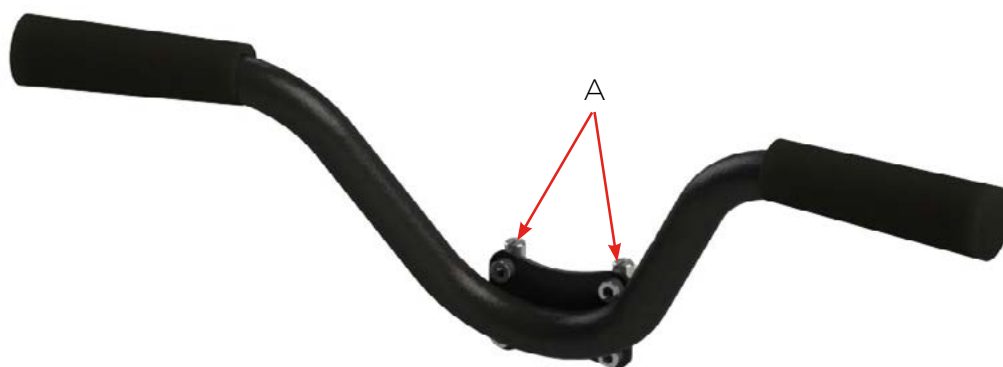

Yhtenäinen jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Asenna jalkatuki neliöputkeen (A). Kiinnitä jalkatuki lukitusruuvilla (B).

Polvinivelen säätäminen

Avaa vipua (C) ja säädä haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä vipu.

! **Tärkeää** – Hammastuksen on osuttava kohdalleen. Lukitse pultti tiukkaan!

Jalkalaudan korkeussäätö

Avaa vipukahvaa (D) molemmilla puolin ja säädä haluttu asento. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä vivut.

Jalkalaudan kallistussäätö

Avaa ruuveja (E) (molemmilla puolin), ja säädä haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit, kun haluttu kulma on saavutettu.

! **Tärkeää!** – Hammastuksen on osuttava kohdalleen säätämisen jälkeen.



 = Säätöpulttit



Kaksiosainen jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Asenna jalkatuki neliöputkeen (A). Kiinnitä jalkatuki lukitusruuvilla (B).

Polvinivelen säätäminen

Avaa vipua (C) ja säädä haluttuun asentoon. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä vipu.



Tärkeää - Hammastuksen on osuttava kohdalleen. Lukitse pultti tiukkaan!

Jalkalaudan korkeussäätö

Avaa vipukahvaa (D) ja säädä haluttu asento. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä vivut.

Jalkalaudan kallistussäätö

Avaa jalkalaudan ruuveja (E), ja säädä haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit, kun haluttu kulma on saavutettu.



○ = Säätöpultit



Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen

Poista suojus putken alapäästä ja ruuvaa pidäkeruuvi auki, ja poista jalkalauta rakennelmasta. Työnnä pohjetuen kannattimen kiinnityspultit sivulta alla olevan kuvan mukaisesti. Kiristä ruuvit (A). Kiinnitä pohjetuen kannatinlevy alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla ruuvikiinnityksillä (B).

Asenna jalkalauta, pidäkeruuvi ja putkensuojus takaisin paikoilleen.

Pohjetuen korkeuden ja syvyyden säätäminen

Avaa ruuveja (A) ja säädä pohjelevy halutulle korkeudelle ja syvyydelle. Kiristä ruuvit (A).

Pohjetuen sivuttais- ja kallistussäätö

Avaa ruuveja (B) hieman, ja säädä pohjelevyä sivuttais-suunnassa ja kallistuksen osalta. Kiristä ruuvit (B).



○ = Säätöpultit



Jalkahihna

Jalkalauta on varustettu jalkahihnan asentamista varten.

Jalkahihnojen asentaminen kaikkiin jalkalautoihin tehdään vetämällä hihna alas ja ylös kahden jalkalaudassa olevan esiporotun aukon läpi. Jalkahihna voidaan kiinnittää etupuolisiin tai taempiin aukkoihin.



Nilkkatuki

Jalkalauta on varustettu nilkkatuen asentamista varten.

Nilkkatuki kiinnitetään sekä yhtenäiseen että erilliseen jalkalautaan alapuolelta.



Varmista, että pehmuste ei ole taittunut.


Sisäkäyttöön tarkoitettu alustarunko Flipper Pro G2



Kiinteä asennus

Kiinteä asennus tarkoittaa, että istuinjärjestelmä on kiinnitetty suoraan alustarunkoon. Tällä menetelmällä tehtävä asennus on suoritettava mukana toimitetun asennussarjan avulla.


Istuinjärjestelmän pohjassa on reiät kiinteää asennusta varten.

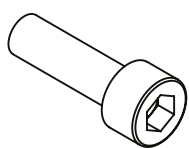

M6-ruuvi (A)
4 kpl



M6-prikka (B)
4 kpl

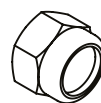

M6-mutteri (C)
4 kpl



HUOM! Muita kuin mukana toimitettuja ruuveja ei tule käyttää. Nämä ovat turvaosia. Mikäli tarvitaan muuta mitoitus, kääntykää Anatomic SITT AB:n puoleen.


Adapterijärjestelmän asentaminen

Käytä adapterijärjestelmää Universal Small (153042).

Aloita asentamalla pohjalevy (A) alustarungolle ruuvaamalla se kiinni mukana toimitetuilla ruuveilla, prikoilla ja muttereilla (B).

Asenna adapterilevy (C) sitten ruuveilla (E) istuinjärjestelmän alapuolella oleviin reikiin. Prikat (C) on asennettava istuinjärjestelmän ja adapterilevyn väliin.

Kun adapterilevy ja pohjalevy on asennettu istuinjärjestelmälle ja alustarungolle, nämä voidaan liittää yhteen. Istuinjärjestelmä on kunnolla kiinni, kun kuuluu loksahdusääni.

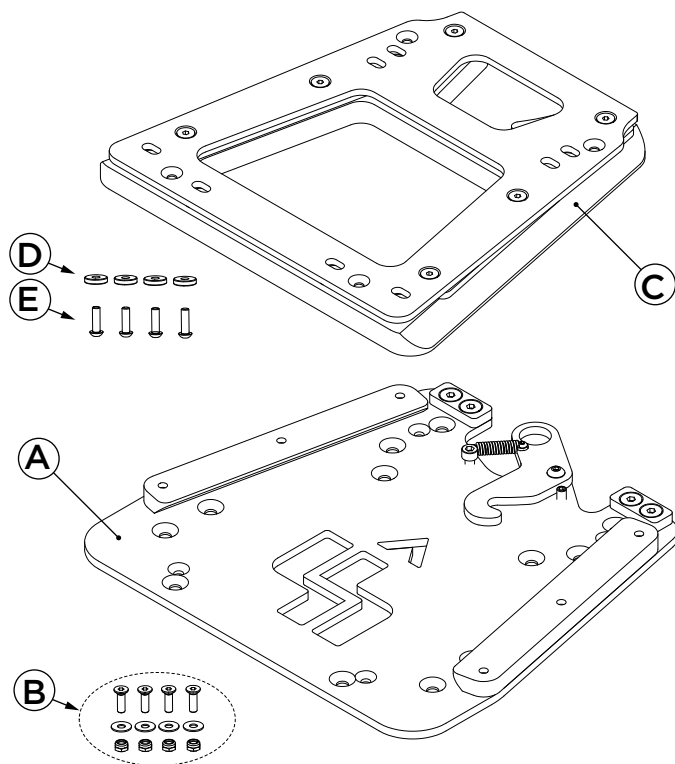

Huom!



Varmista ennen käyttöä, että istuinjärjestelmä on tukevasti kiinni.



Universaalista adapterijärjestelmää käytettäessä on istuinjärjestelmän selkänojan turvahihnaa käytettävä ja se tulee kiinnittää alustarungon ohjaustangon tai vastaavan ympäri.

Huomioikaa erilliset alustarungon käsittelyä koskevat käyttöohjeet.

Seastar-alustarunko

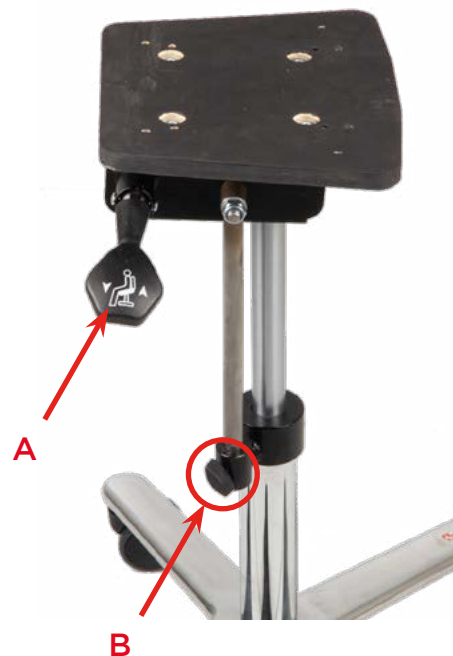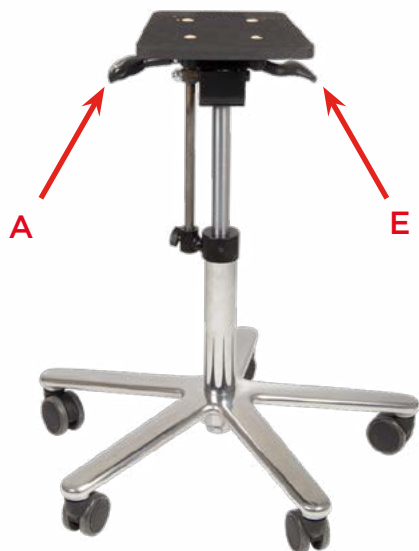

Istuinjärjestelmän asentaminen alustarungolle

Kiinteä asennus tai asennus adapterijärjestelmän kanssa tehdään samalla tavoin kuin Flipper Pro G2 -alustalla (ks. sivut 20-21).

Korkeuden säätäminen

Aloita avaamalla kiertolukitusta (B), joka estää istuinta kääntymästä ympäri. Korkeuden säätäminen tehdään tämän jälkeen vivulla (A), jota pidetään alas painettuna säätämisen aikana. Säätämisen jälkeen lukitaan kiertolukitus (B).

Kallistus

Kallistaminen tehdään vivun (E) avulla.

Jalkatuen asentaminen

Irrota alusta varovasti istuintangosta iskunvaimennusta vaurioittamatta.

Siirrä jalkatukea ylöspäin istuintangoilla ja kiristä nuppi (C). Paina istuintanko alustaan.

Jalkatuen säätäminen

Korkeuden säätämiseksi nuppi (C) avataan ja jalkatukea siirretään ylös- tai alaspäin halutulle korkeudelle, minkä jälkeen nuppi (C) kiristetään.

Jalkatuen **kallistuksen** säätämiseksi nuppia (D) kierretään kiinni tai auki jalkalaudan kulman säätämiseksi halutuksi.



Kunnossapito

Huoltovälit

Laitteen toimivuuden varmistaminen edellyttää säännöllisten huolto- ja tarkastustoimenpiteiden suorittamista. Huollon tarve riippuu sekä käytön runsaudesta että kulumisesta. Tarkista kaikki liikkuvat osat ja kiinnitysosat kuluneisuuden osalta. Huoltaminen kuuluu aina ammattilaisten ja pätevien henkilöiden tehtäväksi. Epävarmoissa tilanteissa voitte aina kääntyä Anatomic SITT AB:n puoleen.

Puhdistus- ja pesuohjeet

Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla rievulla tai pestä antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Ole ympäristöystävällinen, käytä biohajoavia pesuaineita. Tyynyt, kankaat ja vöiden pehmusteet pestään hienopesuna 60° asteessa ilman rumpukuivausta, mutta voidaan kuivata kuivauskaapissa. Vastaavassa pesuohjelapussa annettuja ohjeita on noudatettava. Samat pesuohjeet koskevat asentotukivaljaita ja lantiovöitä Anatomic SITT AB:lta.

Tarkista laitteen kunto säännöllisesti ja suorita huoltotoimenpiteet tarpeen mukaan.

Kaasujousta on käytettävä säännöllisesti

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi aktivoida vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että mäntä osoittaa alaspäin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua, joilloin jousi ei enää toimi.

Työkalut

Säätöjen tekemiseen tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on osa tuolin selkänoja-profiilia sen yläpäähän liitettynä. Mukana on myös Torx-avain T-25.

Takuu

1 vuoden takuu valmistusvirheiden osalta. Lisätietoja myöntämästämme takuusta löytyy tämän käyttöohjeen sivulta 26.

Yhdistelmät

Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita, jotka voidaan yhdistää kaikkiin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin lisävarusteisiin. Zitzi Active soveltuu käytettäväksi yhdessä erilaisten Anatomic SITT AB:n toimittamien alustarunkojen kanssa. Muiden yhdistelmien osalta tulee ottaa yhteys Anatomic SITT AB:hen.

Varaosat

Zitzi Active -tuolin CE-merkinnän voimassaolon edellytyksenä on, että istuinjärjestelmään käytetään ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

Kunnostaminen uudelleenkäyttöä varten

Istuinjärjestelmän kunnostaminen edellyttää Anatomic SITT AB:n toimittamien alkuperäisosien käyttämistä.



Huom! Varmistakaa aina kunnostuksen yhteydessä, että apuväline ei ole kustomoitu ennen uudelle käyttäjälle lähettämistä.

Merkinnät

Zitzi Active ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Tuotteen yksilöivä sarjanumero sijaitsee istuinosan verhoilun alla olevassa kilvessä.

Tämä sarjanumero tulee mainita kaikissa tuotetta koskevissa yhteydenotoissa.

Kierrätys

Käytetty osa tai tuote tulee irrottaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityyppien mukaisesti metalliin, muoviin ja poltettaviin materiaaleihin (tekstiilit).

Kaasujousi lajitellaan ongelmajätteeksi.

Yhteenvedo ja tarkastukset

Tarkastusohjeet

Alla mainitut tarkastukset on suoritettava säännöllisesti. Nämä asiat on tarkastettava jokaisella kerralla ennen kuin käyttäjä siirtyy istuinjärjestelmään.

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit on kiristetty tiukalle.
- Tarkista säännöllisesti, onko hihnoissa ja pehmusteissa kuluneisuutta.
- Varmista, että alusta on moitteettomassa tasapainossa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on säädetty oikein sen varmistamiseksi, että potilaan istuma-asento on oikea.
- Käyttäjää ei tule sijoittaa istuinjärjestelmään ennen kuin istuin on kuuluvasti lokahtaen kiinnittynyt adapterijärjestelmällä varustettuun alustarunkoon. Varmista istuimen tukeva kiinnittyminen alustarunkoon.

Adaptaatio ja kustomointi

Ohjeistus ja suositukset

Aina kun Zitzi Active -tuoliin tehdään joitakin muutoksia, on suoritettava arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio (mukautus) vai kustomointi.

Adaptaatio on mikä tahansa muutos, joka tehdään CE-merkinnän puitteissa. Kaikki muut muutokset ovat kustomointia. Adaptaatiot kuuluvat ainoastaan tehtävään päteväksi katsotun henkilöm toimesta, ja ne tulee aina suorittaa ammattitaitoisesti.

CE-merkintä osoittaa tuotteen täyttävän kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tulee huomioda, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskianalyysi. Tuotteen käyttö ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Tietyille käyttäjälle adaptoituun tuotteeseen tulee liittää ilmoitus adaptaatiosta siten, että tuotetta ei erehdytä luulemaan perusmalliseksi.

Adaptaatiot Zitzi Active -tuoliin

Tulee huomioda, että apuvälineen adaptaatiota sekä kustomointia tulee seurata riskianalyysi. Tuotteen käyttö ei milloinkaan saa muuttua vaaralliseksi adaptaation jälkeen.

Jalkatuen profiilien katkaisu

Jalkatuen profiilia voidaan lyhentää paremmin käyttäjälle soveltuvaksi.

Selkänojaprofiilin katkaisu

Selkänojan profiilia voidaan lyhentää paremmin käyttäjälle soveltuvaksi. Profiili ei kuitenkaan saa olla niin lyhyt, ettei se mahdollista kaikkien selkäjaan liitettävien kannattimien kiinnittämistä.

Myyntiehdot

Takuu

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu mitätöityy, jos tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai sitä on käsitelty väärällä tavalla tai huolimattomasti. Virheellinen tuote on palautettava takuuvaatimuksen käsittelyä varten. Mukaan on liitettävä alkuperäisen toimituksen kuormakirja.

Takuuvaatimukset

Kuvaile virhe ja sen mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi takuun alaista korjausta tai mahdollista vaihtoa. Liitä mukaan aina kopio tilauksesta ja pyydä tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, tieto yhteyshenkilöstä ja puhelinnumero.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä lisävaurioilta kuljetuksen aikana. Merkitse muistiin kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten kuljetuksen aikana syntyneiden ongelmien varalta.

Tuotepalautus

Virheellisten tilausten tai toimitusten yhteydessä tuotteet tulee palauttaa 20 päivän sisällä toimituspäivästä. Liitä kopio lähetyskirjasta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy.

Varmista, että pakkaat tuotteen huolella suojataksesi sitä lisävaurioilta kuljetuksen aikana. Merkitse muistiin kuljetuksen seurantakoodi mahdollisten kuljetuksen aikana syntyneiden ongelmien varalta.

Yli 20 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista

hyvitetään 80% laskutusarvosta

Yli 60 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista

hyvitetään 60% laskutusarvosta

Yli 150 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista

hyvitetään 40% laskutusarvosta

Yli 360 päivää toimituspäivän jälkeen palautetuista tuotteista

ei myönnetä hyvitystä




Kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa.

TEKNISET TIEDOT – ZITZI ACTIVE


	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
Käyttäjän pituus (cm) noin	100	120	140	160
Käyttäjän paino (kg)	30	45	60	75
Istuimen syvyys (cm) D	25	30	35	40
Lantion leveys (cm)* E	19 / 21	23 / 25	27 / 29	31 / 33
Sivuttaismitta (cm) A	17.5	21	24.5	
Selkänokan korkeus (cm) B	32	37	42	47
Selkäprofiilin korkeus (cm) C	39	45	53	59
Selkänokan kulma	-18° – +14°	-18° – +20°	-18° – +20°	-18° – +20°
Lantiokulma	-3° – +29°	-3° – +35°	-3° – +35°	-3° – +35°
Sivuttaiskorkeus (cm) (F)	28 – 33	32 – 40	38 – 44	43 – 50

Verhoiluun alle sijoitettava irrotettava kiila lonkkien ja lantion alueen säätämistä varten.

Abduktio: kaikki koot 28°
Istuinkallistus: kaikki koot -15°

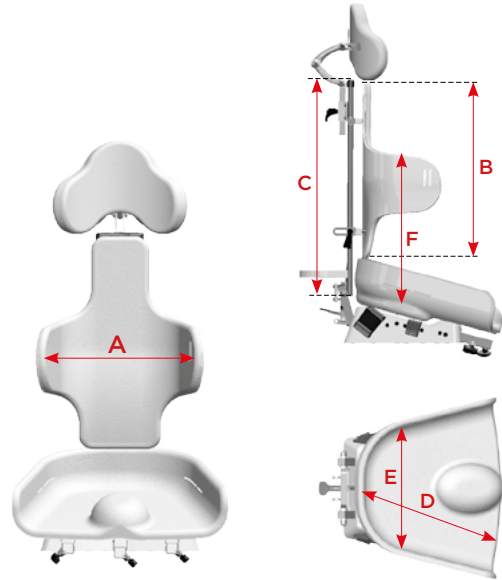


SELKÄNOJAAN KIINNITETTÄVÄ KÄSINOJA

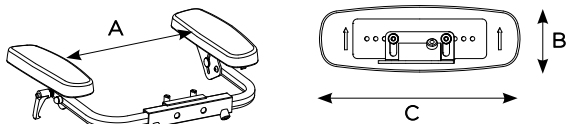


Mitat	A	B	C
Koko 1	240 - 340 mm	75 mm	230 mm
Koko 2	280 - 440 mm	75 mm	230 mm
Koko 3	280 - 440 mm	75 mm	330 mm


PÄÄTUKI

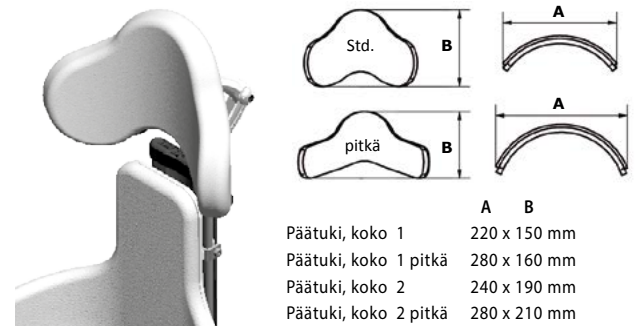


JALKATUKI

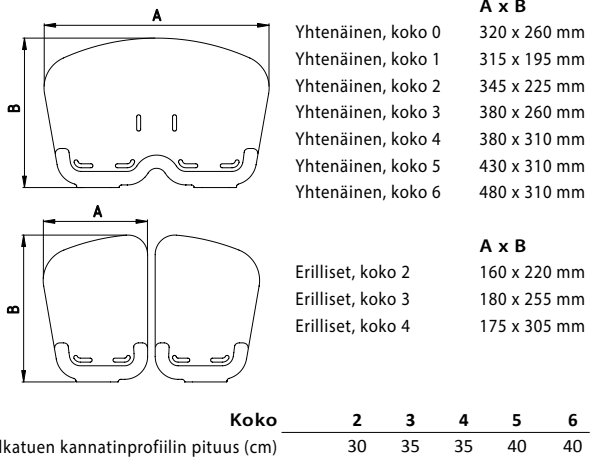


TUKIKAHVA

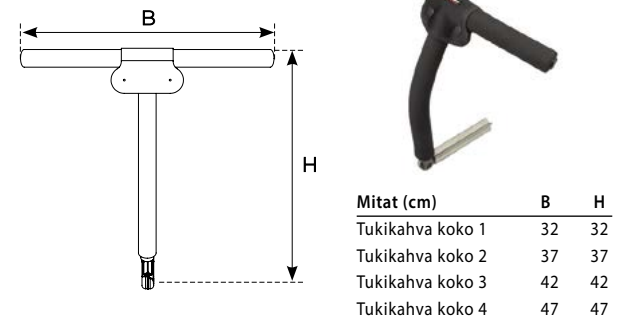

TUKIPÖYTÄ

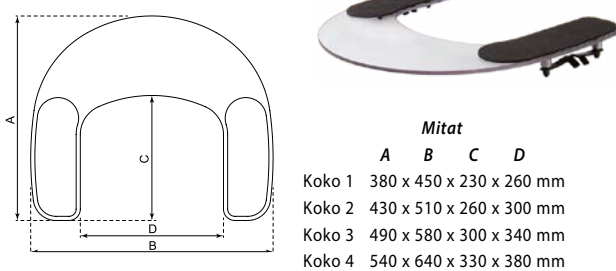

POLVITUKI

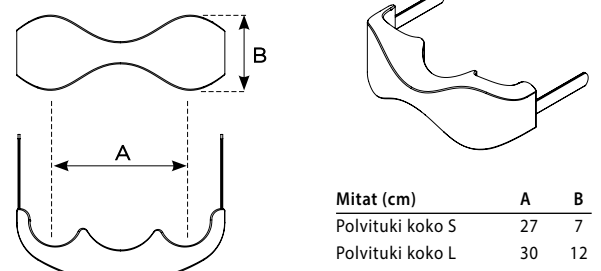

SE**Anatomic SITT AB (Valmistaja)**

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK**Anatomic SITT A/S**

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

FI**Rehaco Oy**

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu, Finland

Puhelin: +35 840 775 22 88

NL**Anatomic SITT Nederland BV**

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands Tel

+31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

*World wide***anatomicsitt.com****info@anatomicsitt.com****facebook.com/anatomicsitt****youtube.com/anatomicsitt**