


FI

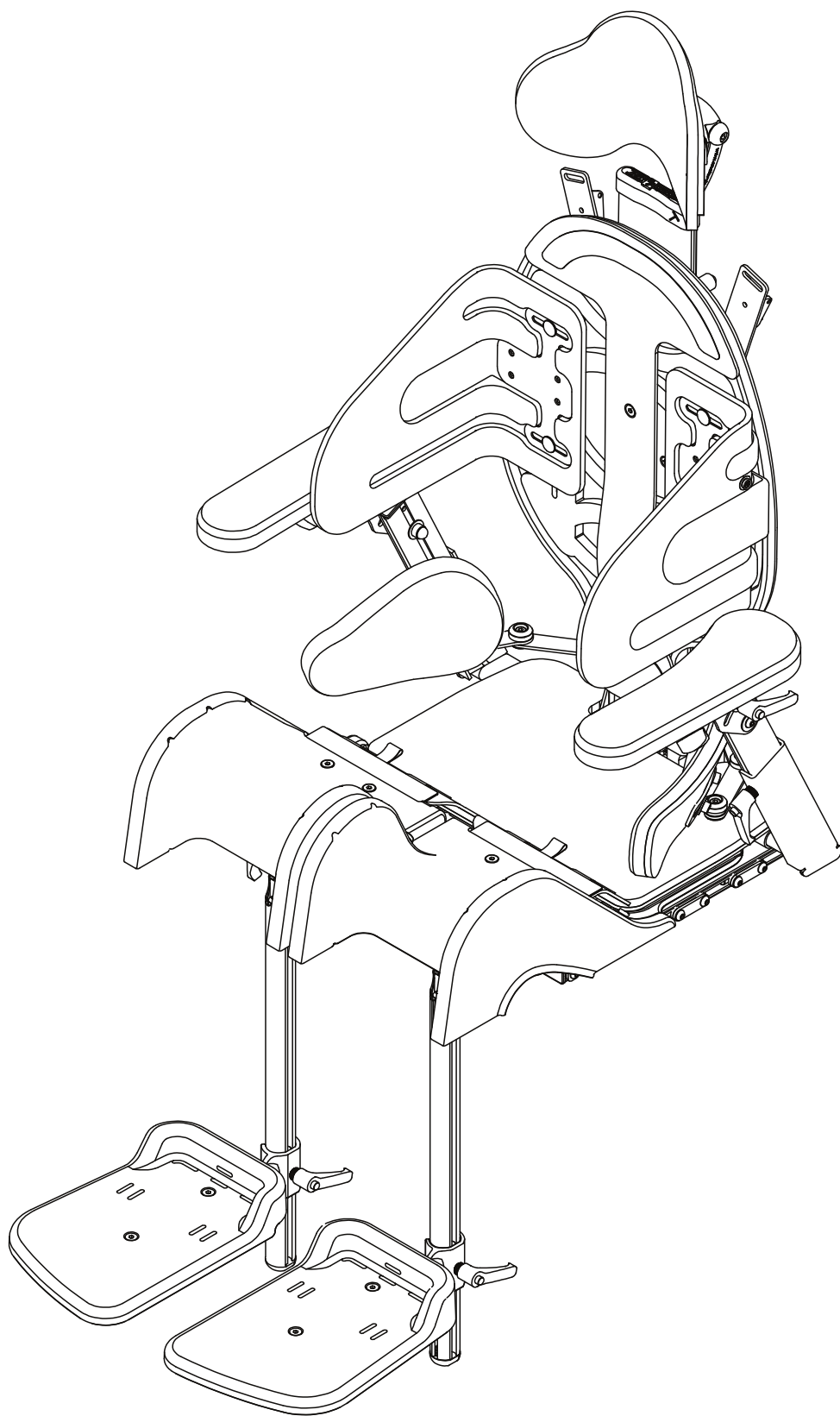

Käyttöohje - ZITZI Sharky Pro

© Anatomic SITT AB


Sisällysluettelo

Turvallisuusvarotoimet	5	Käsinojat istuimesta	23
Johdanto	5	Käsinojien asentaminen.....	23
Päätuki	7	Leveyden säätäminen.....	23
Päätuen kannattimen asentaminen	7	Korkeuden säätäminen	23
Päätuen asentaminen	7	Kallistuksen säätäminen ylös/alas	23
Päätuen kannattimen korkeussäätö	7	Sivuttaiskallituksen säätäminen.....	23
Päätuen säätäminen	7	Pehmuste	23
Otsahihnan kannattimen asentaminen.....	7	Selkänoja, kiinteät käsinojat	25
Selkänoja	9	Kiinteiden käsinojien asentaminen.....	25
Selkänojan asentaminen.....	9	Leveyden säätäminen.....	25
Selkänojan korkeuden säätäminen.....	9	Korkeuden säätäminen	25
Selkänojan kallistuksen säätäminen.....	9	Kallistuksen säätäminen ylös/alas	25
Sivutuen säätäminen.....	9	Sivuttaiskallituksen säätäminen.....	25
Lannetuen säätäminen	9	Pehmuste	25
Sivuttaistuki	11	Selkänoja, taittavat käsinojat	27
Sivuttaistuen asentaminen.....	11	Taittuvien käsinojien asentaminen.....	27
Taitettava sivuttaistuki.....	11	Leveyden säätäminen.....	27
Vahvistettu sivuttaistuki	11	Korkeuden säätäminen	27
Istuinosa	13	Kallistuksen säätäminen ylös/alas.....	27
Istuinosan säätäminen	13	Sivuttaiskallituksen säätäminen.....	27
Istuinleveyden säätäminen.....	13	Taittamistoiminto	27
Jalanpituusero	15	Valjaiden sijoitus	29
Istuintaskun säätäminen	15	Alemman asennuskiinnikkeen asentaminen	29
Abduktio, adduktio ja windswept-lonkka ...	15	Alemman asennuskiinnikkeen säätäminen.	29
Lämmitystyyny	16	Ylemmän asennuskiinnikkeen asentaminen.	29
Lämmitystyyny	16	Ylemmän asennuskiinnikkeen säätäminen.	29
Lämmitystyynyjen asentaminen.....	16	Valinnaisten alakiinnikkeiden asentaminen.	29
Lämmitystyyny	16	Ohjaustanko	31
Akku	16	Ohjaustangon asentaminen.....	31
Akun lataaminen	17	Korkeuden säätäminen	31
Lantiotuki	19	Ylempi käsivarsituki	33
Mounting the pelvis support	19	Ylemmän käsivarsituen asentaminen.....	33
Lantiotuen säätäminen	19	Korkeuden säätäminen.....	33
Lantiovyö	21	Leveyden säätäminen.....	33
Lantiovyön kiinnikkeen säätäminen.....	21	Pehmusteen päällinen	33
Lantiovyön kiinnittäminen	21		


Pöytä, kiinteä	35
Pöydän asentaminen	35
Asennusreikien vaihto	35
Sivuun kääntyvä pöytä	37
Pöydän asentaminen	37
Kääntötoiminnon käyttäminen.....	37
Pöytä vahvistetuin asennuskiinnikkein	39
Vahvistetun pöydän asentaminen.....	39
Leveyden säätäminen.....	39
Pohjetuki	41
Pohjetuen asentaminen.....	41
Korkeuden säätäminen.....	41
Leveyden säätäminen.....	41
Jalkatuki	43
Jalkatuen asentaminen.....	43
Jalkatuen valinnainen asennus.....	43
Turvapysäytin	43
Kulman säätäminen polvinivelen kohdalla..	43
Kulman säätäminen nilkan kohdalla.....	43
Jalkatuen kannattimet	45
Kiinteä jalkatuen kannatin	45
Joustava jalkatuen kannatin.....	45
Ylös käännettävä jalkatuen kannatin.....	45
Pallonivelkannatin	45
Tasainen istuin	47
Tasaisen istuimen asentaminen.....	47
Istuinjärjestelmän asennus	49
Kiinteä asennus.....	49
Asentaminen adapterijärjestelmän avulla...	51
Kuljettaminen ajoneuvossa	52
Ohjeet autossa kuljettamiseksi	52
Törmäystestattu ja hyväksytty.....	52

Asiakaspalvelu	53
Kunnossapito-ohjeet	54
Huoltovälit	54
Puhdistus- ja pesuohjeet	54
Kaasumäntä on aktivoitava säännöllisesti...	54
Työkalut	54
Takuu	55
Yhdistelmät	55
Varaosat	55
Kunnostaminen	55
Merkinnät	55
Kierrätys	55
Yhteenveto ja tarkastukset	56
Sovittaminen ja kustomointi	57
Ohjeita ja suosituksia	57
Sharky Prolle sallitut sovitukset	57
Myyntiehdot	58
Takuu	58
Takuuvaatimukset	58
Tuotteiden palauttaminen.....	58
Tekniset tiedot	59
Käyttäjän tiedot	59
Tuotteen tiedot	59

Yhteiset yksityiskohdat

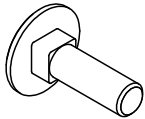


Kiinnityspultit

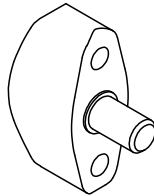


Sorminuppi
Ulkokierteitys




Sorminuppi
Sisäkierteitys

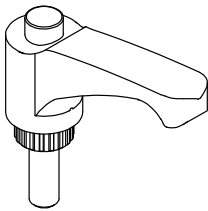

Vipukahva

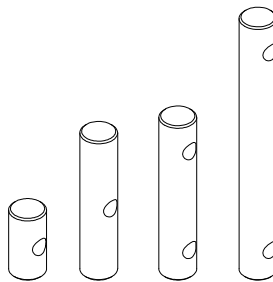

Tappi
Eri koot

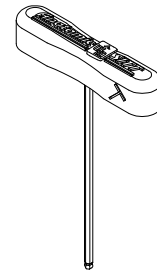

Kuusiokolavain
*Sijoitettu selkänöjaprofiilin
yhteyteen*

Kuusiokoloavain

Säätöjen tekemiseksi tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on sijoitettu selkänöjaprofiilin yläosaan.

Turvallisuusvarotoimet

Johdanto

Zitzi Sharky Pron kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä käsikirja huolellisesti läpi. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka toimivat käyttäjän läheisyydessä. Tuote on suunniteltu käyttäjille, joilla on istumisongelmia ja soveltuu käytettäväksi monien erilaisten diagnoosien yhteydessä. Zitzi Sharky Pron säätäminen tulee aina suorittaa lääketieteellisesti pätevän henkilön toimesta.

Lisätietoja tarvittaessa antaa valmistaja Anatomic SITT AB

Sovellusala

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi istuinjärjestelmänä yhdessä Anatomic SITT AB:n valmistaman alustan kanssa. Muunlaista käyttöä haluttaessa kääntykää Anatomic SITT AB:n puoleen.

Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sarjanumero sijaitsee aktivointikotelon alla olevassa etiketissä. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa kirjeenvaihdossa.

Törmäystestattu

Zitzi Sharky Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 -standardin mukaisesti. Lisätietoja sivulla 52.

Tätä tuotetta valmistaa Anatomic SITT AB

Postiosoite Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping

Katuosoite Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping


Maahantuoja

Rehaco Oy Haaransuontie 6 A 7 90240 Oulu

Puhelin +358 40 705 5886

Email info@rehaco.fi

The logo for Rehaco, featuring the word "rehaco." in a lowercase, sans-serif font. The "rehaco" part is green, and the period is grey.

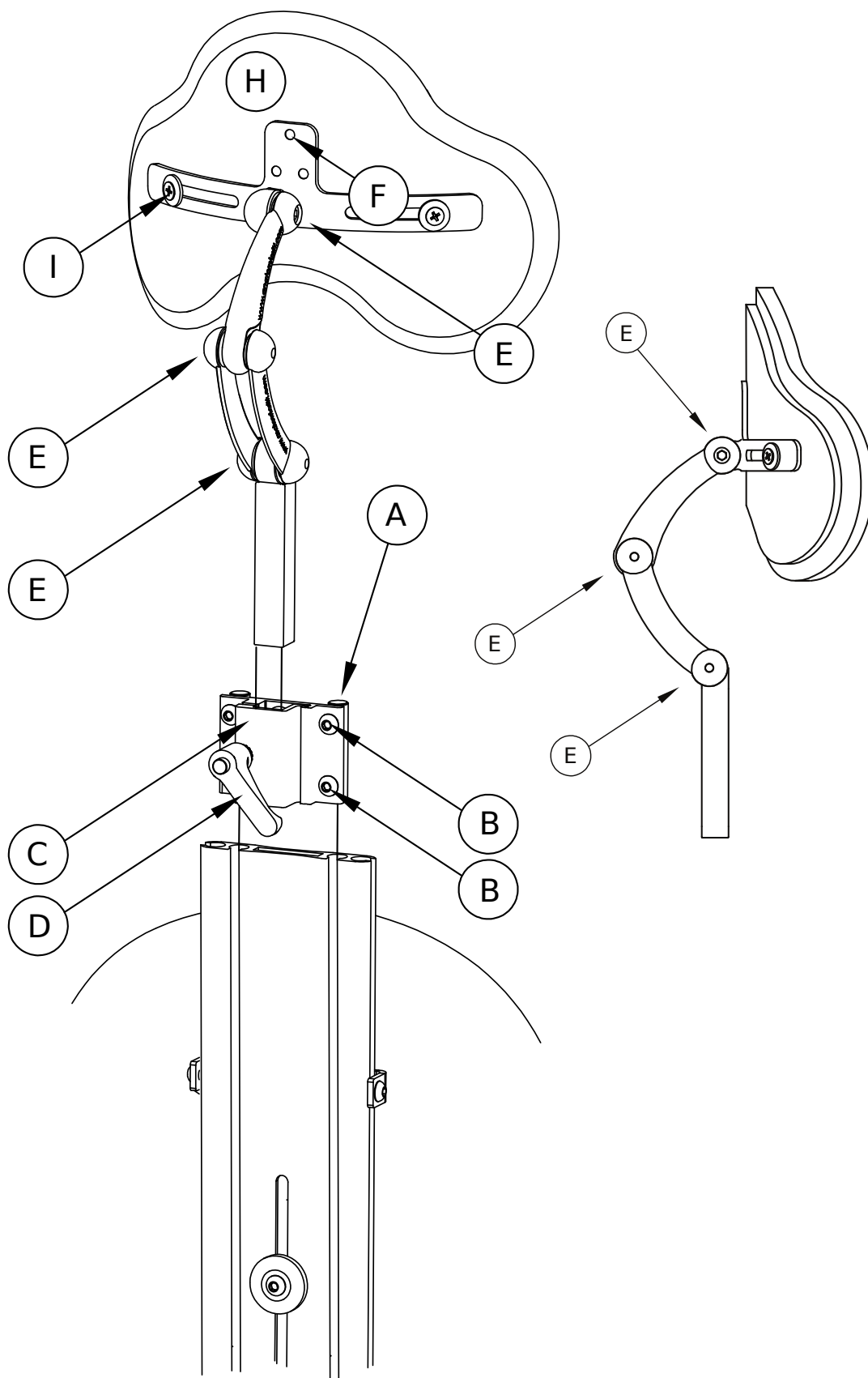

Pääntuki

Pääntuen kannattimen asentaminen

Ennen kuin pääntuen kannattimen asentaminen voidaan tehdä, on kuusiokoloavain ja muut jo kiinnitetyt tarvittavat osat irrotettava.

Työnnä pääntuen kannattimen (A) tapit selkänojaprofiiliin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä neljä ruuvia (B).

Pääntuen asentaminen

Työnnä pääntuen nelikulmainen putki pääntuen kannattimeen (C) ja kiristä vipukahva (D), kun haluttu asema on saavutettu.

Pääntuen kannattimen korkeussäätö

Avaa ruuveja (B) ja siirrä pääntuen kannatin halutulle korkeudelle. Kiristä sitten ruuvit (B).

Pääntuen säätäminen


Kolminivelistä pääntukea säädetään avaamalla ruuvia (E) siinä nivelessä, jota halutaan säätää. Kun haluttu asento on saavutettu, kiristä ruuvi (E) uudelleen.

Pääntuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (D) ja pääntuki siirretään halutulle korkeudelle. Kiristä sitten vipukahva (D).

Otsahihnan kannattimen asentaminen

Ennen otsahihnan kannattimen asentamista on pääntuen levy (H) irrotettava. Pääntuen levyn irrottamiseksi avataan kahta ruuvia (I).

Adsenna otsahihnan kannatin reikiin (F) mukana toimitettuja asennusosia käyttäen. Katso otsahihnan kannattimen asentamista koskevat erilliset ohjeet.

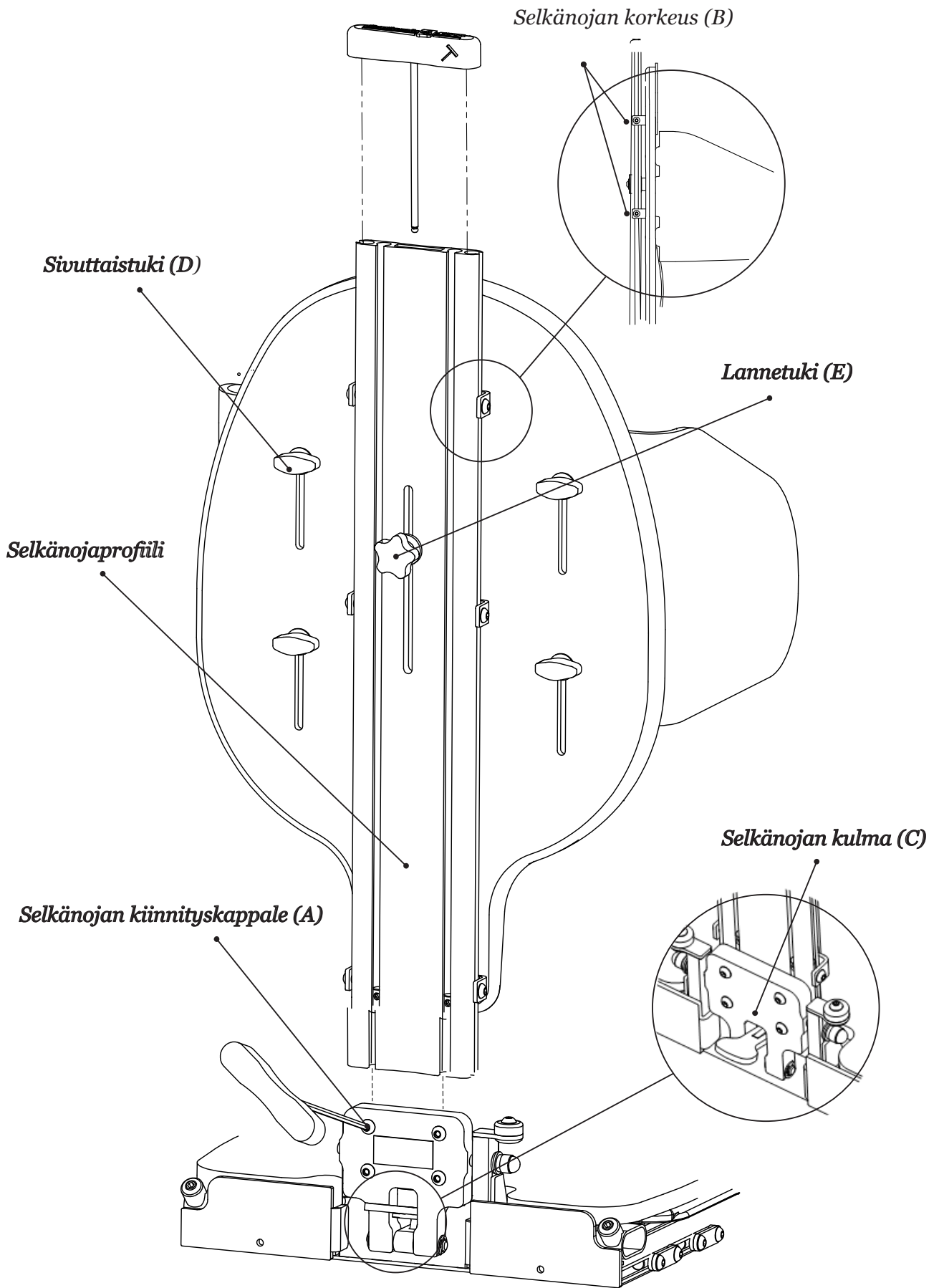

Selkänoja

Selkänojan asentaminen

Selkänojan kiinnityskappaleeseen sisältyy neljä ruuvia (A) ja kaksi tappia. Kohdista ja liu'uta selkänoja-profiili selkänojan liitoskotelossa oleviin tappeihin.

Kiristä sitten neljä ruuvia (A) kuusiokoloavaimella. Selkänoja asettuu automaattisesti oikeaan asentoon selkänoja-profiilissa olevien ennata asennettujen pidättimien avulla.

Selkänojan korkeuden säätäminen

Selkänojan korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (B) kuusiokoloavaimella selkänoja-profiilin molemmilla puolin ja suoritetaan säätö halutulle korkeudelle. Kun säädöt on saatu sopiviksi, kiristä ruuvit (B) uudelleen.

Selkänojan kallistuksen säätäminen

Käännä lukitusvipu (C) aktiiviseen asentoon sitä ylöspäin nostamalla ja sitten työntämällä se kannan päälle.

Selkänojan kallistuskulman säätämiseksi vipua painetaan alas. Selkänoja voidaan nyt siirtää haluttuun asentoon. Kun haluttu kulma on saavutettu, lukitusvipu vapautetaan säädetyn kulman säilyttämiseksi.



Huom.!

Selkänojaa on aina muistettava tukea kaasumäntää aktivoitaessa.

Sivutuen säätäminen

Sivutuen leveyden ja korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppia (D) ja suoritetaan säätö halutulle korkeudelle ja leveydelle. Kiristä sorminuppi (D), kun haluttu asema on saavutettu.

Lannetuen säätäminen

Avaa nuppia (E) ja paina lannetuen yläosaa, joka sijaitsee selkänojan vuorauksen takana, kunnes aluttu alaselkäkorkeus on saavutettu. Pitele lannetukea paikallaan ja kiristä vitten nuppi (E).



Huom.!

Selkänojan korkeutta voidaan joutua säätämään lannetuen saamiseksi oikeaan asemaan.

Vinkki!

Irrota selkänojan vuoraus lannetuen saamiseksi paremmin näkyviin säädön aikana.

Vahvistusputki
Selkänojaa vahvistettaessa

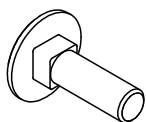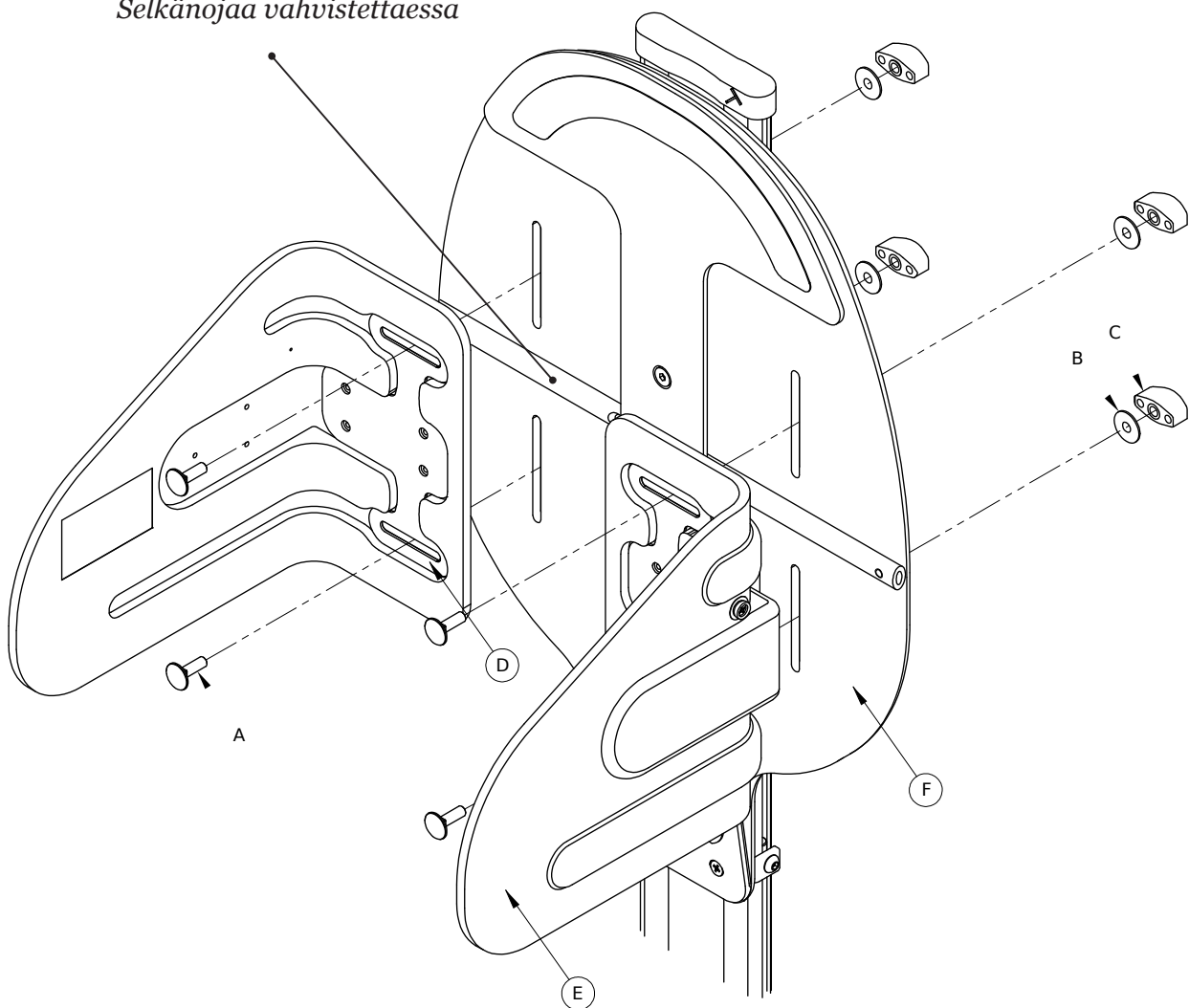

Kiinnityspultti (A)
4 pcs



Aluslevy (B)
4 pcs



Sorminuppi (C)
4 pcs



Pulttilevy (D)
2 pcs

Sivuttaistuki

Sivuttaistuen asentaminen

Asenna sivuttaistuki käyttäen kiinnityspulttia (A), aluslevyä (B), sorminuppia (C) ja pulttilevyä (D). Pulttilevy (D) estää kannatipulttia (A) kiertämästä raossa.

Työnnä kiinnityspultti (A) pulttilevyn (D), sivuttaistuen (E) ja selkänojan levyssä (F) olevan raon läpi. Pane sen jälkeen paikoilleen aluslevy (B) ja sorminuppi (C) selkänojan levyn (F) vastapuolelta.


Vinkki!

Katso tämän käsikirjan sivut 8-9 sivuttaistuen säätöä koskevien ohjeiden saamiseksi.

Valinnainen sivuttaistuki


Vaihtoehtona kiinteälle sivuttaistuella voitte käyttää taitettavaa sivuttaistukea tai vahvistettua sivuttaistukea. Nämä asennetaan samalla tavalla kuin edellä kuvattiin.

Vahvistuspaketti koostuu vahvistetuista sivuttaistuista ja vahvistusputkesta. Katso erilliset ohjeet vahvistuspaketin asentamiseksi.

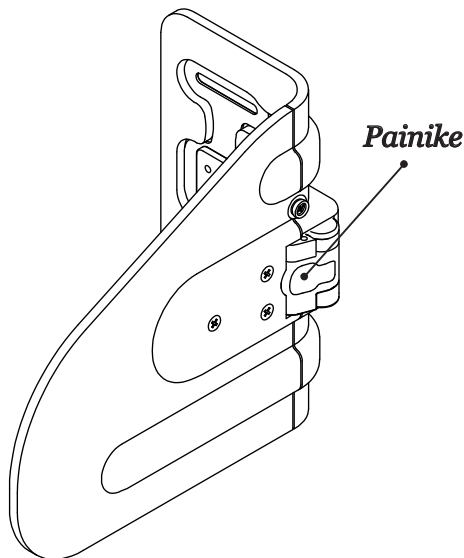



Taitettava sivuttaistuki

Avaa taitettava sivuttaistuki punaista painiketta painamalla

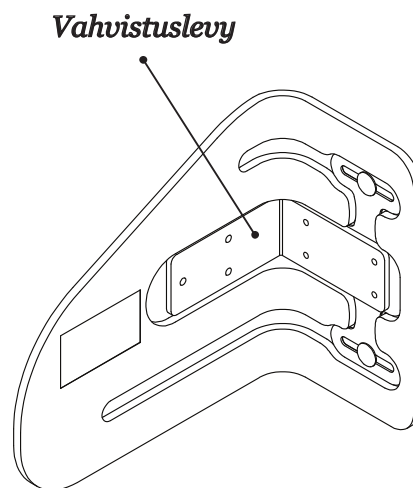

Vahvistettu sivuttaistuki

Vahvistuspaketti sisältää vahvistetun sivuttaistuen ja vahvistusputken

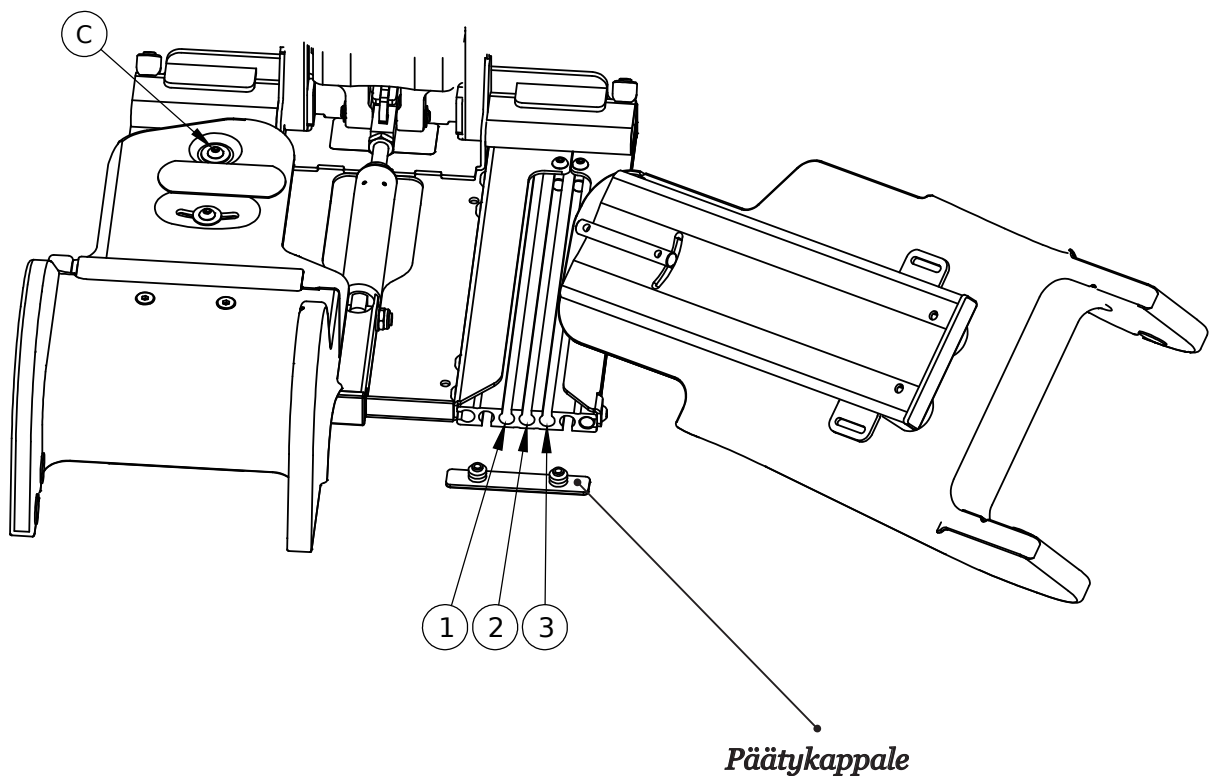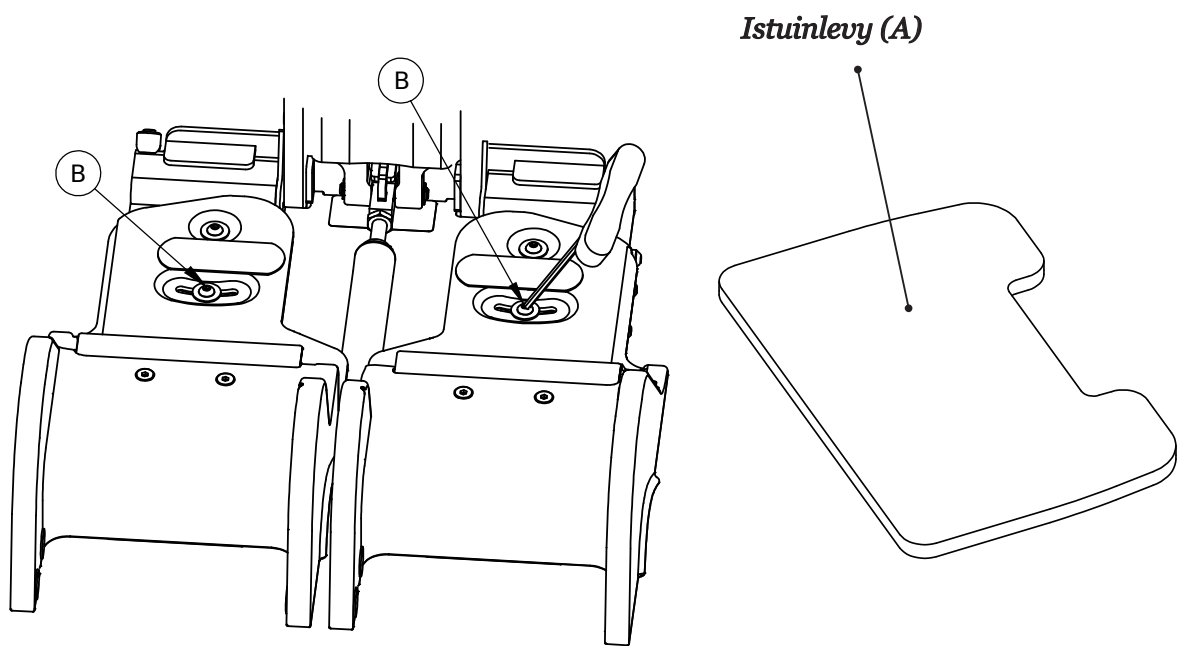

Istuinosa

Istuinosan säätäminen

Istuinsyvyys, jalanpituusero ja mahdollinen jalkaosien abduktio/adduktio ovat helposti säädettävissä. Aloita poistamalla istuinverhoilu ja istuinlevy (A) päästäksesi kunnolla käsiksi säätöruuveihin (B).

Huom.!

Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan jalkaosien säätämiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.

Istuinleveyden säätäminen


Istuinleveyden kasvattamiseksi tai pienentämiseksi on pohjaprofiilissa olevan jalkaosan asemaa muutettava. Aloita poistamalla pohjaprofiilin etuosassa sijaitseva päätykappale ja avaa sitten jalkaosassa olevaa ruuvia (B) kuusiokoloavaimella. Kun olet avannut ruuvia (B) hieman, vedä koko jalkaosa pois pohjaprofiilista ja siirrä se haluttuun uraan.

Suurimman istuinleveyden saavuttamiseksi tappi työnnetään uraan 3, ja pienimmän istuinleveyden aikaansaamiseksi tappi työnnetään uraan 1. Jalkaosa on tehdasasetuksena sijoitettu uraan 1.

Kiristä ruuvi (B), kun haluttu asema on saavutettu. Jalkaosassa olevaa takaruuvia (C) saatetaan joskus joutua hieman avaamaan.

Vinkki!

Istuinyksikön mittaspesifikaatiot ovat tämän käsikirjan sivulla 59.

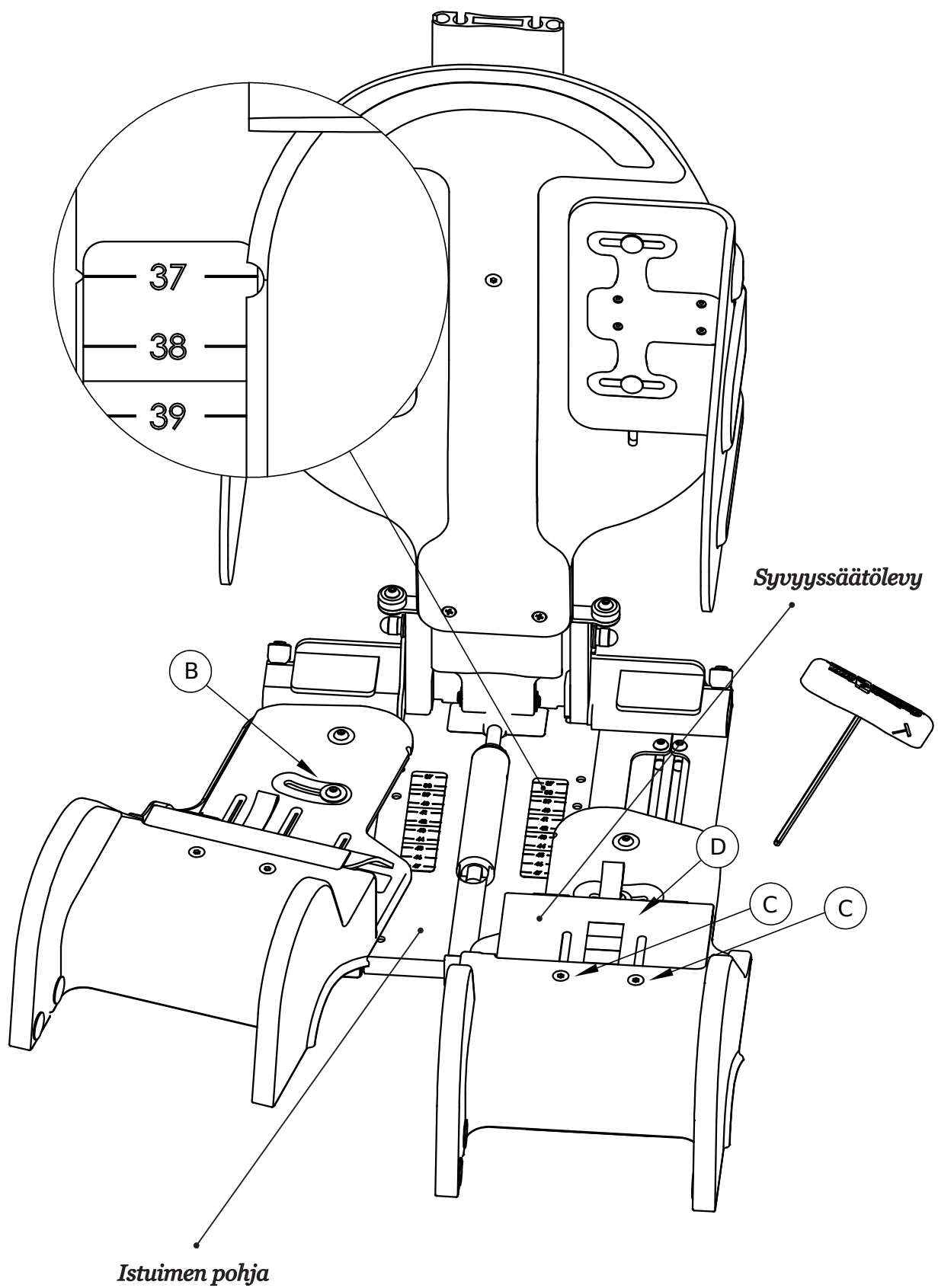

Istuinosa

Jalanpituusero

Jalanpituuden muuttamiseksi jalkaosassa olevaa ruuvia (B) avataan kuusiokoloavaimella ja jalkaosa säädetään haluttuun pituuteen. Sen jälkeen ruuvi (B) kiristetään uudelleen.

Istuintaskun säätäminen

Istuinsyvyyden säätämisen yhteydessä on säädettävä myös istuintaskua. Avaa jalkaosan etumaisia ruuveja (C) kuusiokoloavaimella ja vedä syvyyssäätölevy haluttuun asemaan. Kiristä sitten ruuvit (C).

Vinkki!

Istuimen pohjassa ja syvyyssäätölevyissä olevaa väriasteikkoa voidaan käyttää apuna hyvän lähtökohdan saamiseksi istuinsyvyyden säätämiseksi.

Mikäli istuinsyvyys säädetään esimerkiksi 43 cm:iin (harmaa alue), tulee myös syvyyssäätölevy vetää harmaalle alueelle. Tällä varmistetaan mahdollisimman oikeanlainen istuintaskun koko ja seurauksena oleva istuinasento.

Säädöt tulee aina hienosäätää kunkin asiakkaan vaatimusten mukaisiksi.

Abduktio, adduktio ja windswept-lonkka

Jalkaosan säätämiseksi johonkin näistä asennoista avataan ruuvia (B) kuusiokoloavaimella ja siirretään jalkaosa haluttuun asemaan. Kiristä ruuvi (B).

Huom.!

Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan säätämisen tekemiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.

Lämmitystyyny

Lämmitystyyny

Lämmitystyyny pitävät ruumiinlämpötilan automaattisesti yllä ja estävät jäähtymisen kylmällä säällä. Kun ruumiinlämpötila on saavutettu, lämmitysyksikkö sammuu automaattisesti energian säästämiseksi. Mikäli lämpötila laskee, yksikkö aktivoituu ja lämpiyä uudelleen ruumiinlämpötilaan.

Liittimet on valittu huolella niiden väärin liittämisen riskin minimoimiseksi. Liittimiä, akkua tai latauslaitetta ei missään olosuhteissa saa päästää altistumaan vedelle tai kosteudelle.

Lämmitystyynyjen asentaminen

Lämmitystyyny asennetaan istuimen ja selkänojan verhoilun alle tarranauhalla kiinnittämällä.

Lämmitystyyny

Lämmitystyynyissä on sisäänrakennettu lämpötilansäätö alueella +27° C:sta +32° C:seen.

Eristys sietää alhaisia ja korkeita lämpötiloja, eikä ole altis auringonvalolle, kosketudelle tai kemikaaleille. Tyynyjen materiaali on paloa hidastavaa (FMVSS 302). Lämmitystyyny on valmistettu huokoisesta materiaalista kondensoitumisen estämiseksi.

Akkua

Akkua on uudelleenladattava (Ni-MH) ja voidaan ladata ainoastaan mukana toimitetulla laatuslaitteella. Kun akku on lopullisesti tyhjentynyt, se tulisi toimittaa kierrätykseen paikalliselle kierrätysasemalle.



Huom.!

Kun akku on lopullisesti tyhjentynyt ja käyttökelvoton, se tulisi toimittaa kierrätykseen paikallisella kierrätysasemalla.



Akun lataaminen

Noudata alla esitettyjä vaiheita akun lataamiseksi oikein. Lämmitysyksikköä koskevia lisätietoja ja ohjeita on saatavissa erillisestä käsikirjasta.

- 1) Liitä latauslaite seinäpistokkeeseen, 230 V, 50 Hz.
- 2) Liitä latauslaite ohjainkoteloon.
- 3) Kun lataamaton akku on kytketty, latauslaitteessa oleva LED-ilmaisain vilkkuu hitaasti keltaisella valolla. Tämä ilmaisee hitaan latautumisen. Jonkin ajan kuluttua laturi vaihtaa nopeaan lataukseen, ja LED-ilmaisain alkaa vilkkua nopeasti vihreällä valolla.
- 4) Jätä akku liitetyksi latauslaitteeseen, kunnes LED-ilmaisain palaa jatkuvalla vihreällä valolla. Tämä ilmoittaa akun latautuneen täydellisesti ja latauslaitteen siirtyneen ylläpitolataustoimintoon.
- 5) Kytke virtajohto irti seinäpistokkeesta.
- 6) Kytke latauslaite irti ohjainkotelosta.

Huom.!

Mikäli latauslaitteen LED vilkkuu nopeasti keltaisella valolla, osoittaa se akun olevan tyhjentynyt/ei toimintakunnossa.

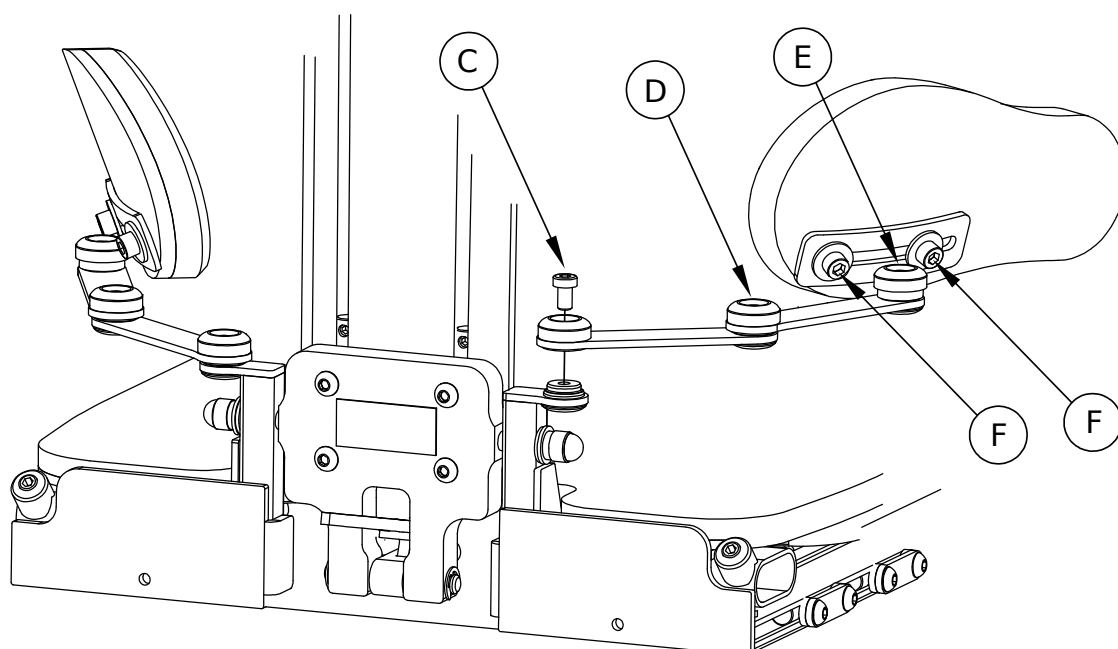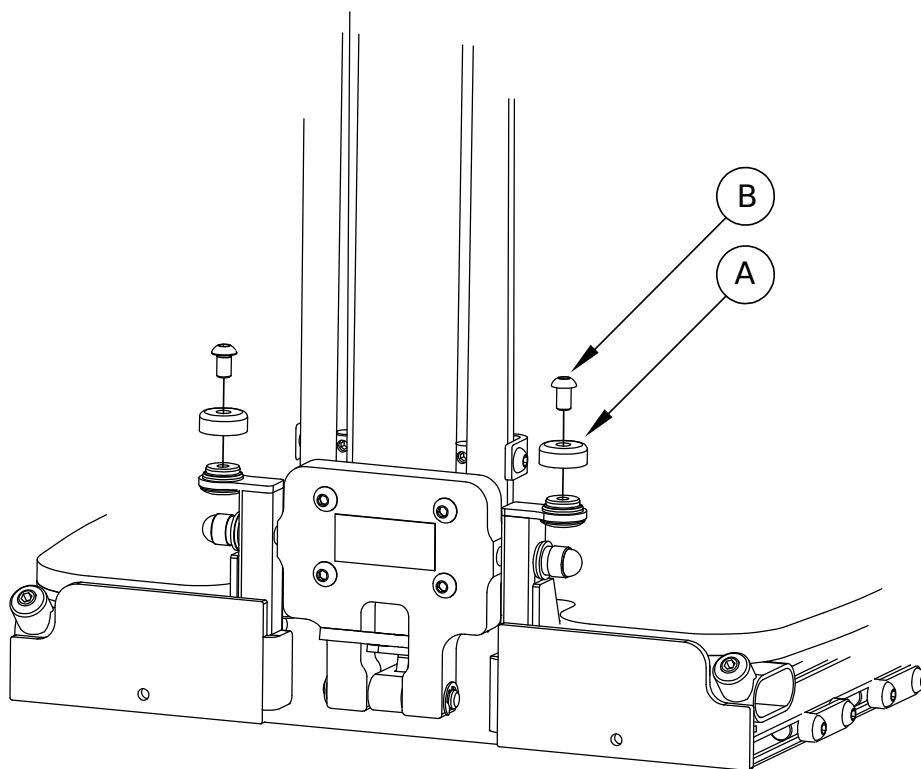

Lantiotuki

Lantiotuen kiinnitys


Ennen lantiotuen kiinnittämistä on suojus (A) poistettava. Irrota ruuvi (B) ja poista sitten suojus. Ruuvi (B) korvataan toisentyyppisellä ruuvilla (C).

Asenna lantiotuki suojuksen (A) paikalle ja kiristä ruuvilla (C).


Lantiotuen säätäminen

Lantiotuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (C), (D) tai (E) halutuista säädöistä riippuen. Lantiotuen levyn korkeutta säädetään avaamalla ruuveja (F) ja siirtämällä levy haluttuun asemaan.


Kiristä ruuvit (F) uudelleen.

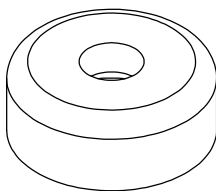


Suojus (A)
Poistetaan

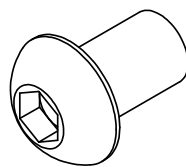

M6-ruuvi (B)
Korvataan ruuvilla (C)

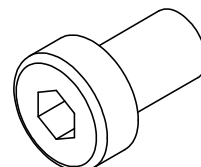

Ruuvi (C)
Uusi ruuvi

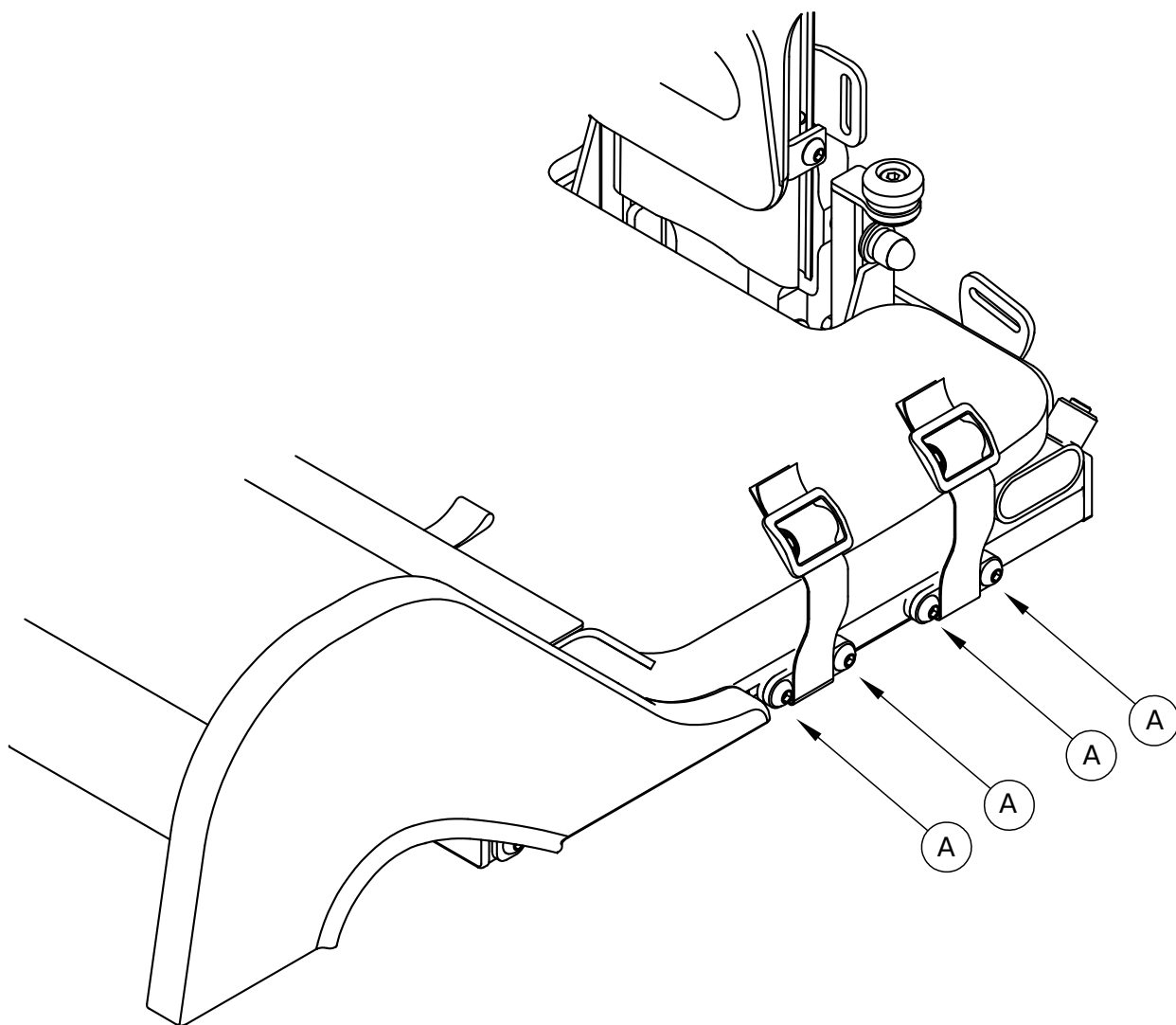

Lantiovyö


Lantiovyön kiinnikkeen säätäminen


Lantiovyön kiinnikkeen aseman siirtämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja suoritetaan säätö haluttuun kohtaan. Kiristä sitten ruuvit (A).

Lantiovyön kiinnittäminen

Käytä tri-glide -solkea lantiovyötä lantiovyötä kiinnikkeeseen kiinnitettäessä. Asentaminen tri-glide -menetelmän mukaisesti esitetään kuvassa.

Tri-glide -menetelmä

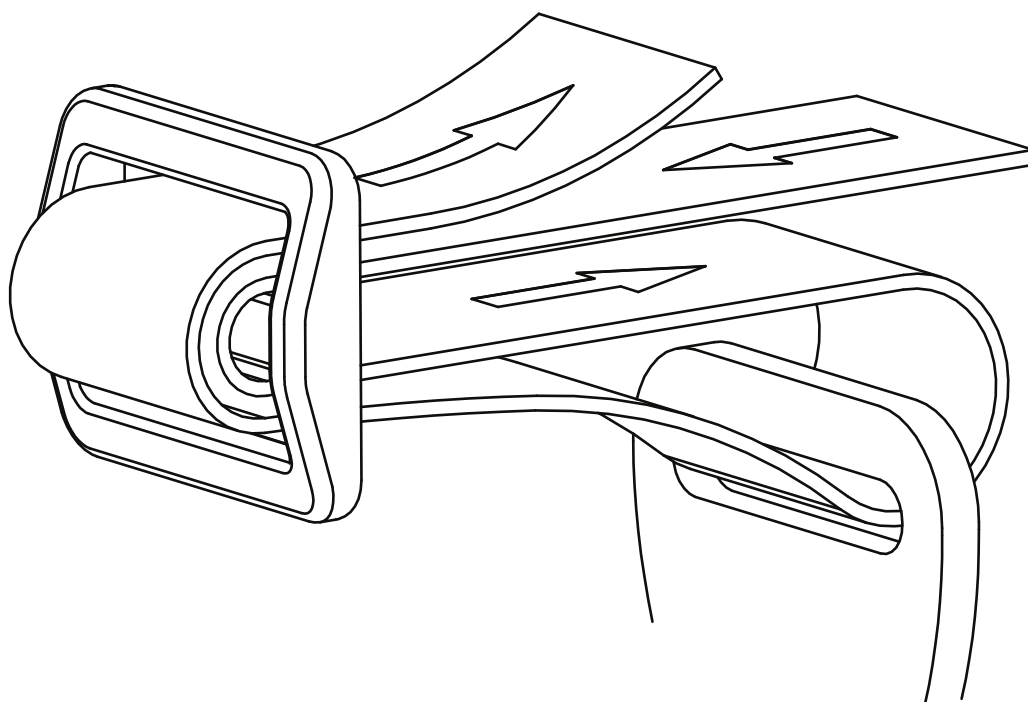

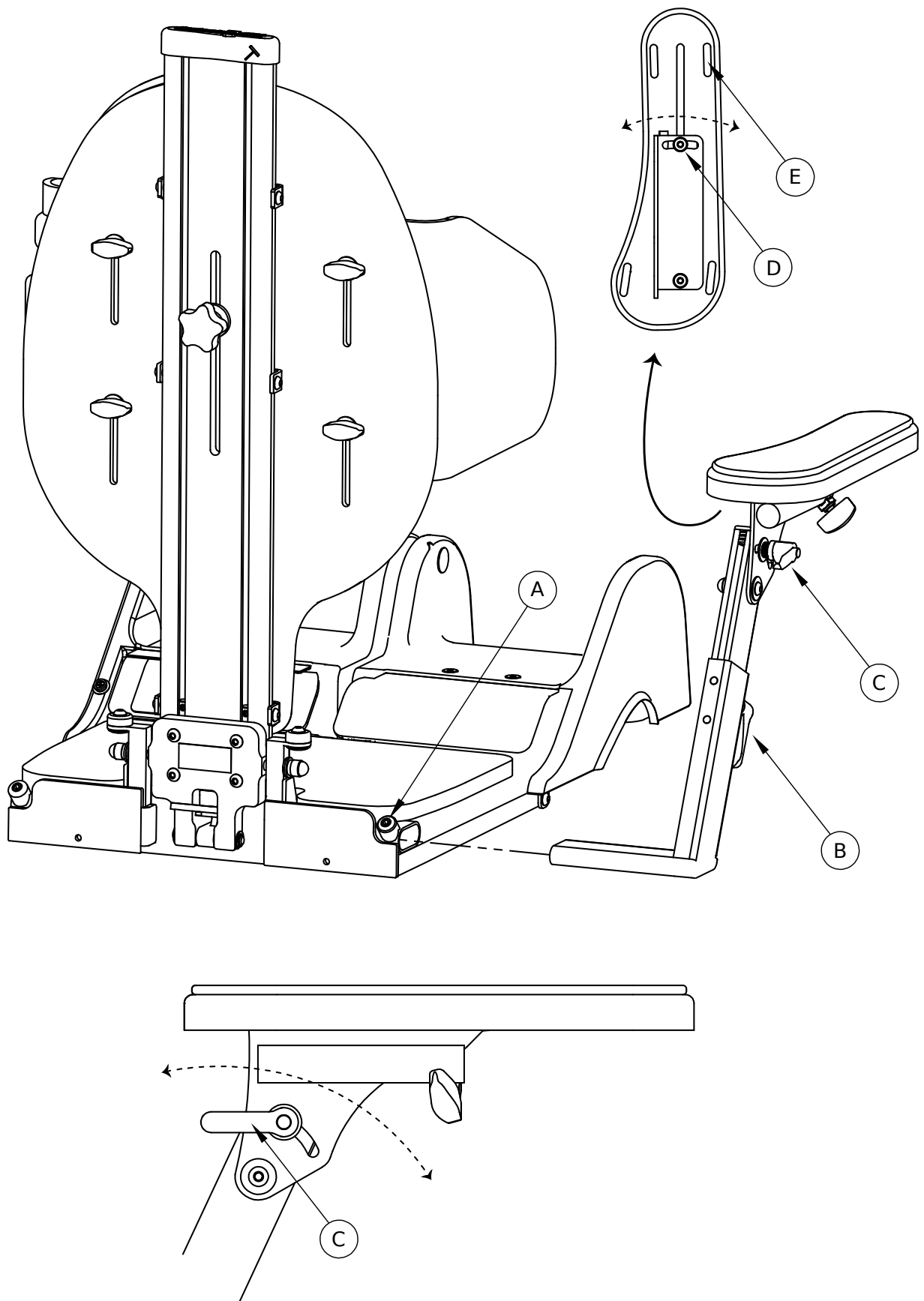

Käsinojat istuimesta

Käsinojen asentaminen

Työnnä käsinojat istuimen pohjassa oleviin, niitä varten tarkoitettuihin putkiin. Kun käsinoja on leveyssuunnassa oikeassa asemassa, kiristä ruuvi (A).

Leveyden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen

Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas


Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C).

Sivuttaiskallistuksen säätäminen

Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).

Pehmuste

Kiinnitä pehmuste käsinojan levyn päälle tarrahihnat neljän aukon (E) läpi viemällä ja liitä ne toisiinsa levyn alapuolella.

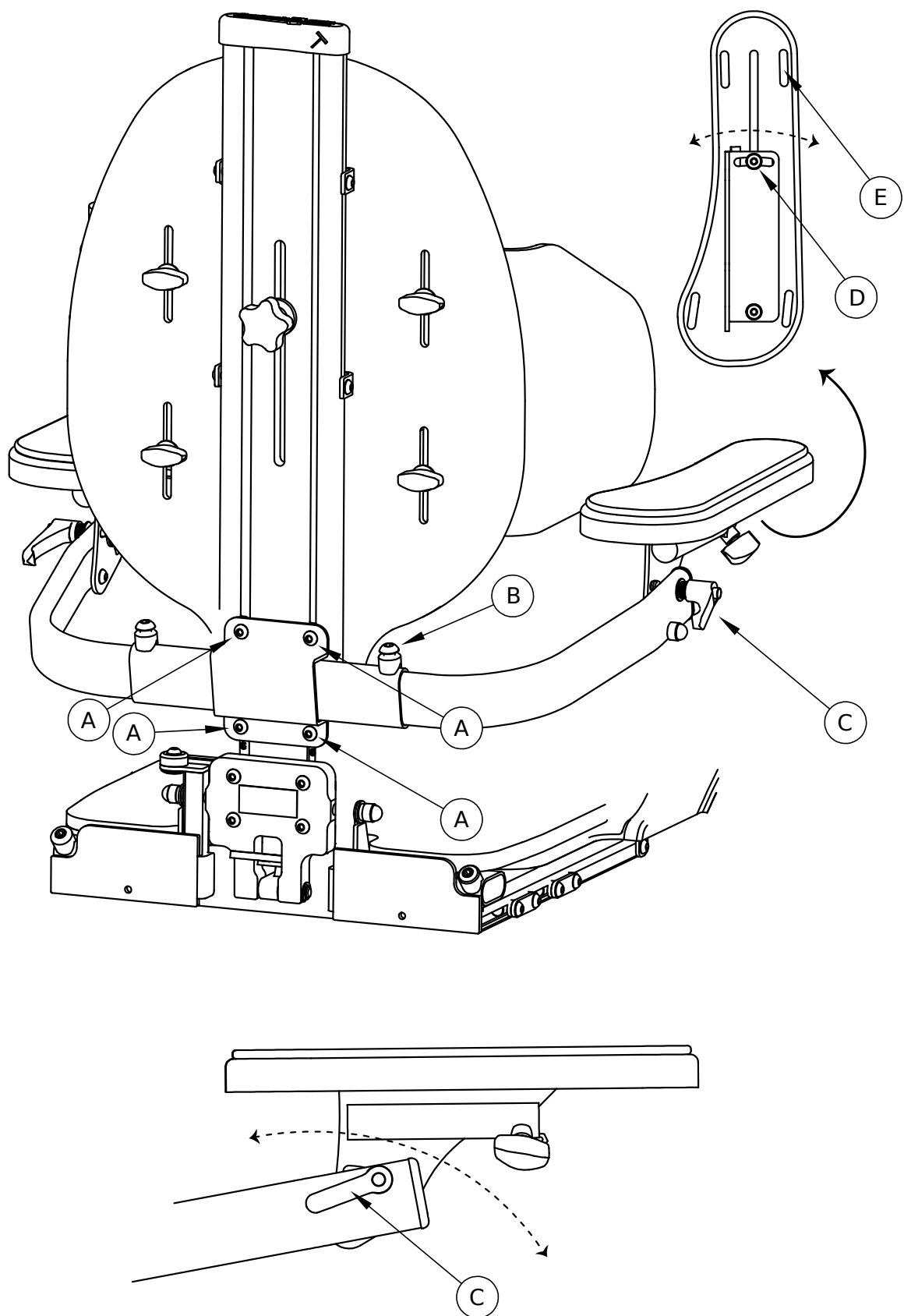

Selkänoja, kiinteät käsinojat

Kiinteiden käsinojien asentaminen

Ennen kuin selkänojasta tulevien käsinojien asentaminen voidaan tehdä, on kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.

Työnnä käsinojan kannattimen tapit selkänoja-profiiliin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka poistettiin ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Leveyden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen

Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas


Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C).

Sivuttaiskallistuksen säätäminen

Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).

Pehmuste

Kiinnitä pehmuste käsinojan levyn päälle tarrahihnat neljän aukon (E) läpi viemällä ja liitä ne toisiinsa levyn alapuolella.

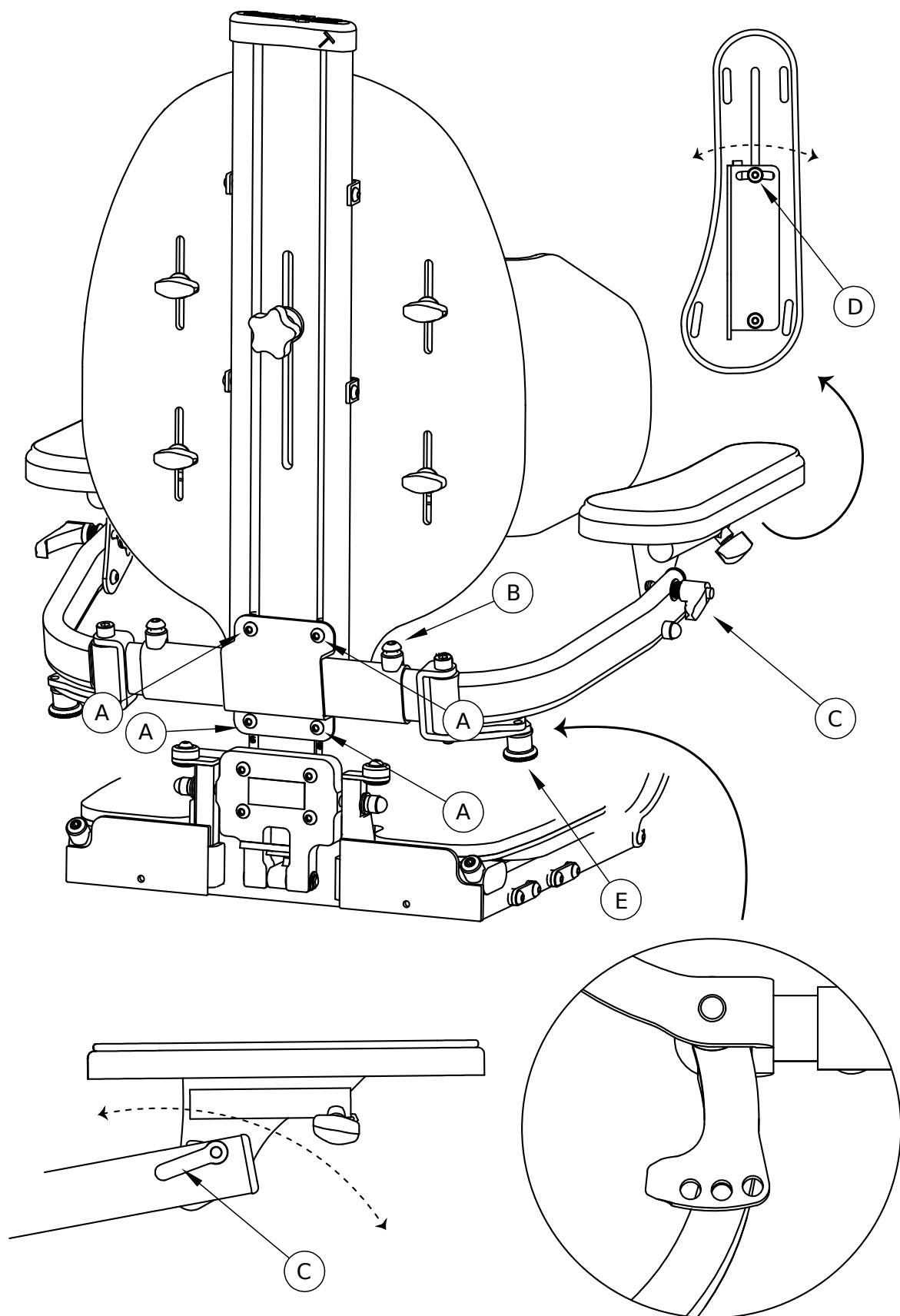

Kolme reikäsemaa
Käsinojan kallistuskulman säätämiseksi

Selkänoja, taittavat käsinojat

Taittuvien käsinojien asentaminen

Ennen kuin selkänojasta tulevien käsinojien asentaminen voidaan tehdä, on kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.

Työnnä käsinojan kannattimen tappi selkänoja-profiiliin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka poistettiin ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Leveyden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään sitten haluttuun asentoon, kiristä ruuvi (A).

Korkeuden säätäminen

Käsinojan korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (B) ja käsinoja siirretään halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (B).

Kallistuksen säätäminen ylös/alas


Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipukahvaa (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä vipukahva (C). Katso sivut 24-25.

Sivuttaiskallistuksen säätäminen

Käsinojan sivuttaiskallistuksen säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, kiristä ruuvi (D).

Taittamistoiminto

Käsinojan taittamiseksi sivuun vedetään lukitusnuppia (E) alaspäin ja taitetaan käsinoja sivuun. Varmista, että käsinoja menee paikalleen loksauttaen sitä takaisin käännettäessä. Taittumiskulman säätämisen mahdollistavat kolme reikäasemaa lukitusvivulle.

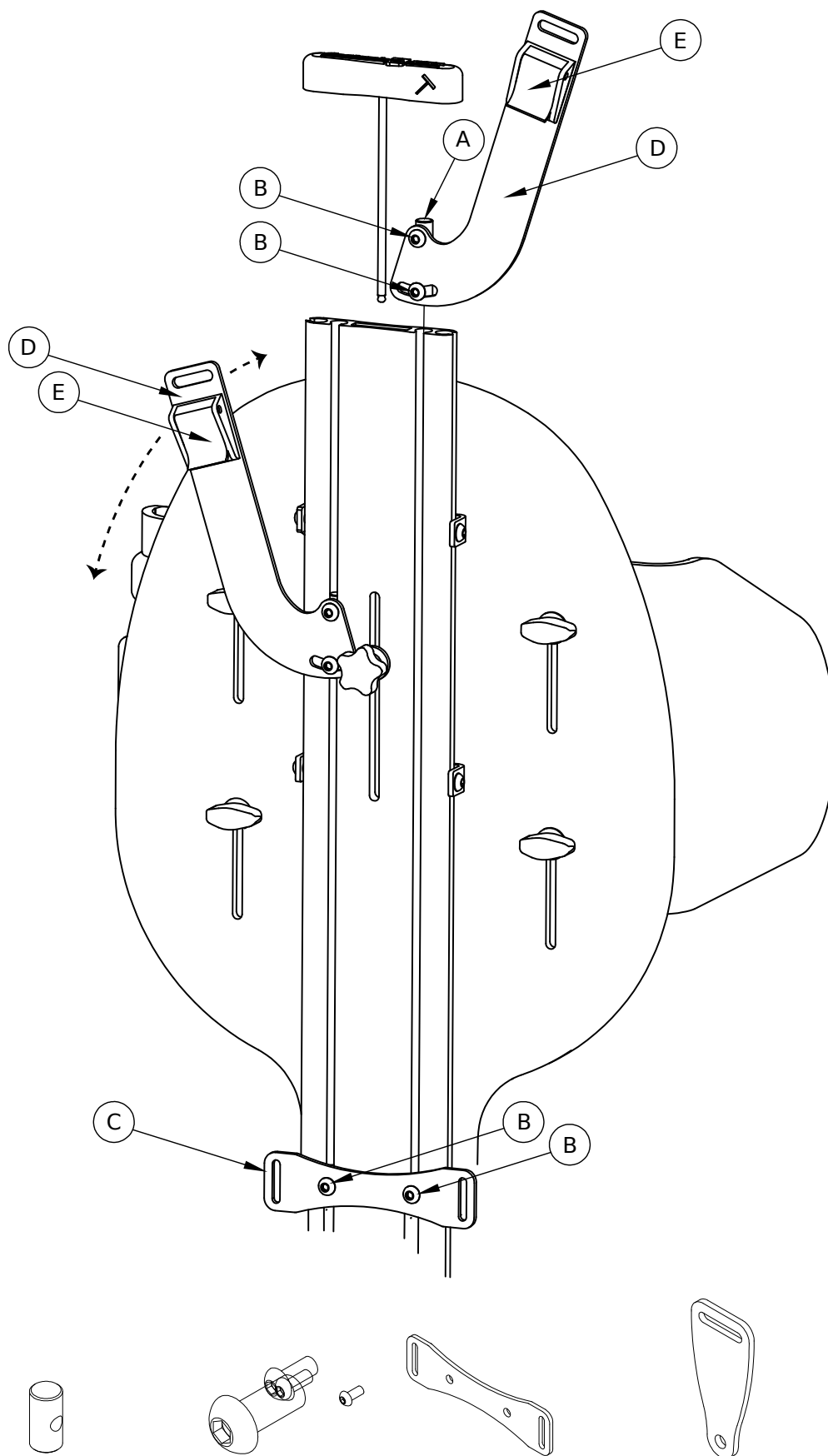

Tappi (A)
4 pcs

M6-ruuvi (B)
6 pcs

Alakiinnike (C)

Yläkiinnike (F)

Valjaiden sijoitus

Alemman asennuskiinnikkeen asentaminen

Ennen kuin alemman asennuskiinnikkeen asentaminen voidaan tehdä, on kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näihin osiin voivat sisältyä pääntuki, ylemmät asennuskiinnikkeet ja ohjaustanko.

Työnnä alemman asennuskiinnikkeen tapit selkänojaprofiilin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (B). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka poistettiin ennen käsinojan kannattimen asentamista.

Alemman asennuskiinnikkeen säätäminen

Korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja kannatin siirretään halutulle korkeudelle, kiristä ruuvit (B).

Ylemmän asennuskiinnikkeen asentaminen


Poista kuusiokoloavain ja työnnä ylemmän asennuskiinnikkeen (D) tapit (A) selkänojaprofiilin uraan. Kun kannatin on saatu oikealle korkeudelle, kiristä ruuvit (B). Pane kuusiokoloavain takaisin profiiliin.


Ylemmän asennuskiinnikkeen säätäminen

Korkeuden ja kulman säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja sitten siirretään kannatin haluttuun asemaan, kiristä ruuvit (B).

Valinnaisten alakiinnikkeiden asentaminen

Valjaiden kiinnittämiseksi alemmas voidaan käyttää valinnaista asennuskiinnikettä (F). Tämä kiinnitetään mukana seuraavalla ruuvilla istuimen pohjassa valmiina oleviin reikiin.

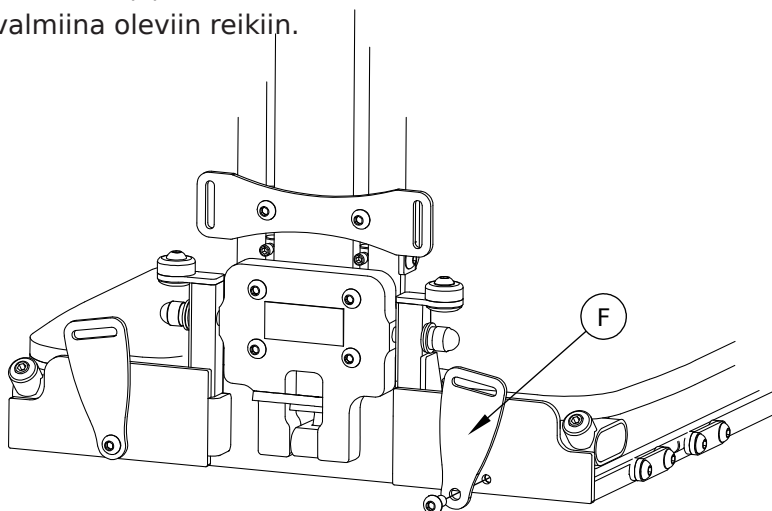

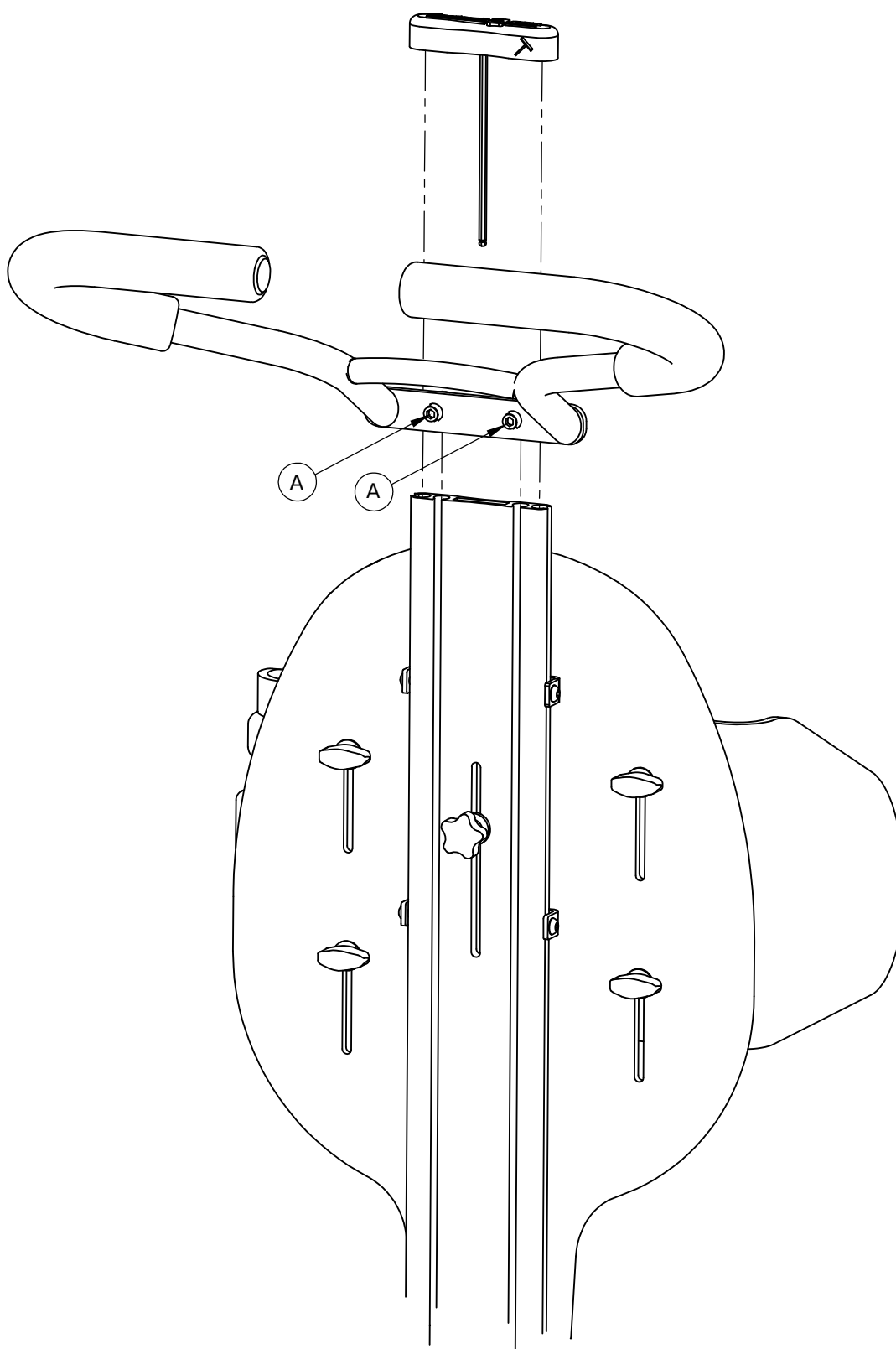

Ohjaustanko

Ohjaustangon asentaminen

Ennen kuin ohjaustanko voidaan asentaa, on kuusiokoloavain ja muut mahdollisesti jo kiinnitetyt osat irrotettava. Näitä osia voivat olla esimerkiksi pääntuki ja ylemmät asennuskiinnikkeet.


Työnnä ohjaustangon tapit selkänoja Profiiliin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (A). Asenna takaisin paikalleen osat, jotka mahdollisesti poistettiin ennen ohjaustangon asentamista.

Korkeuden säätäminen

Ohjaustangon korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja ohjaustanko siirretään halutulle korkeudelle. Kun haluttu korkeus on saavutettu, kiristetään ruuvit (A).

Huom.!

Huomaa, ettei ruuveja tarvitse milloinkaan avata kokonaan ohjaustangon korkeuden säätämiseksi, riittää, kun niitä avataan hieman.

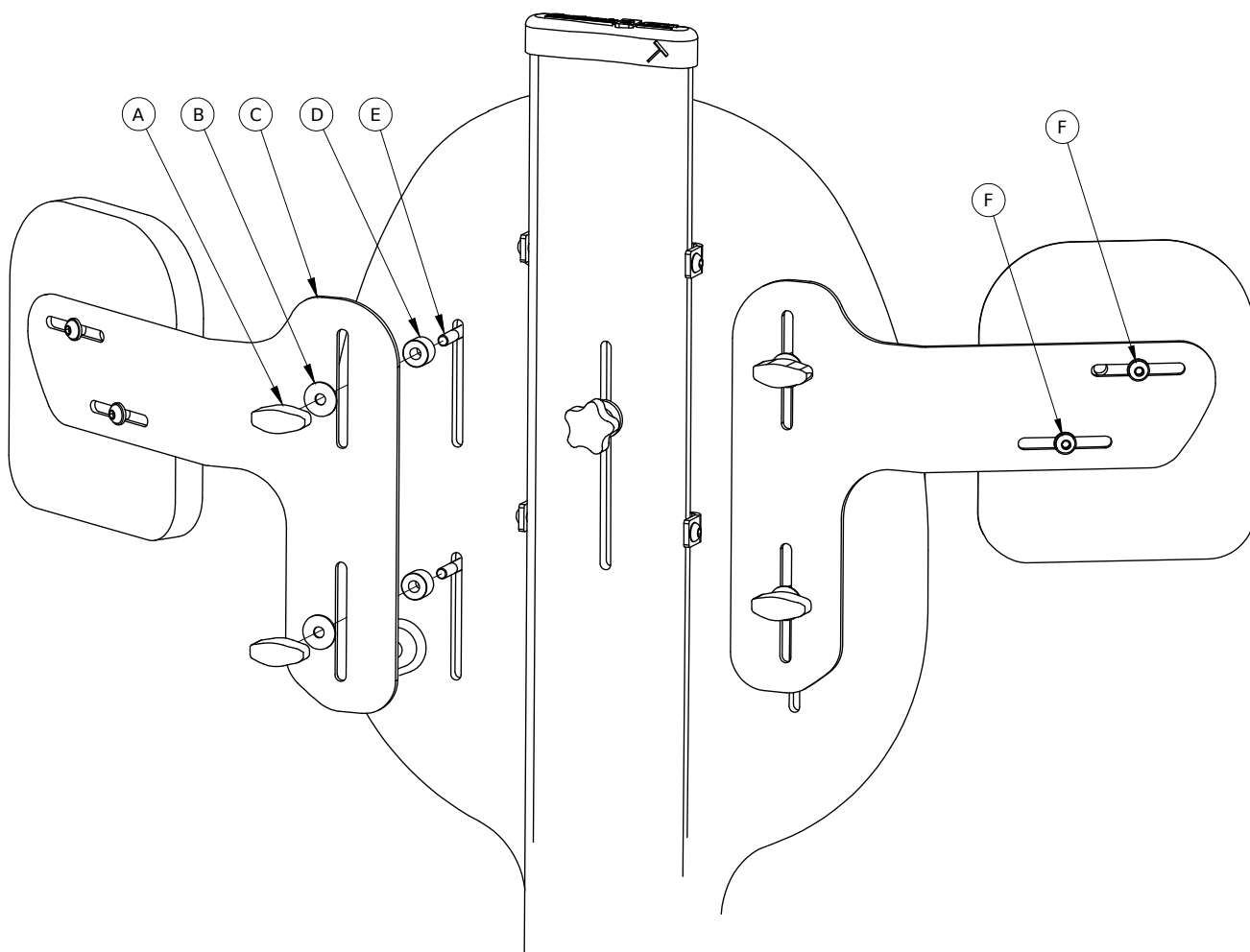


Sorminuppi (A)
4 pcs



Aluslevy (B)
4 pcs



Välike (D)
4 pcs

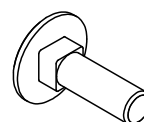

Kiinnityspultti (E)
4 pcs

Ylempi käsivarsituki

Ylemmän käsivarsituen asentaminen

Asenna ylempi käsivarsituki sorminuppien (A), aluslevyjen (B), välikkeiden (D) ja kiinnityspulttien (E) avulla. Huomaa, että sivuttaistuessa olevat kiinnityspultit on korvattava mukana toimitetuilla pidemmillä kiinnityspulteilla.

Sivuttaistuen asentamista koskevia yksityiskohtaisia lisätietoja on tämän käsikirjan sivulla 6.

Huom.!

Sivuttaistuessa olevat kiinnityspultit on korvattava mukana toimitetuilla pidemmillä kiinnityspulteilla ylempiä käsivarsitukia asennettaessa.

Korkeuden säätäminen

Ylemmän käsivarsituen korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppeja (A) ja tehdään säätö sopivaan korkeuteen. Kun haluttu korkeus on saavutettu, kiristetään sorminupit (A).

Leveyden säätäminen


Ylemmän käsivarsituen säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuveja (F) ja sitten tehdään säätö haluttuun leveyteen. Kun haluttu asema on saavutettu, ruuvit kiristetään.

Huom.!

Ylempää käsivarsitukea säädettäessä voidaan myös sivuttaistukea säätää samanaikaisesti.

Pehmusteen päällinen

Kun pehmusteen päällinen on tarpeen pestä, se voidaan helposti poistaa ylemmän käsivarsituen levystä päällisen takana olevaa joustavaa nauhaa venyttämällä.

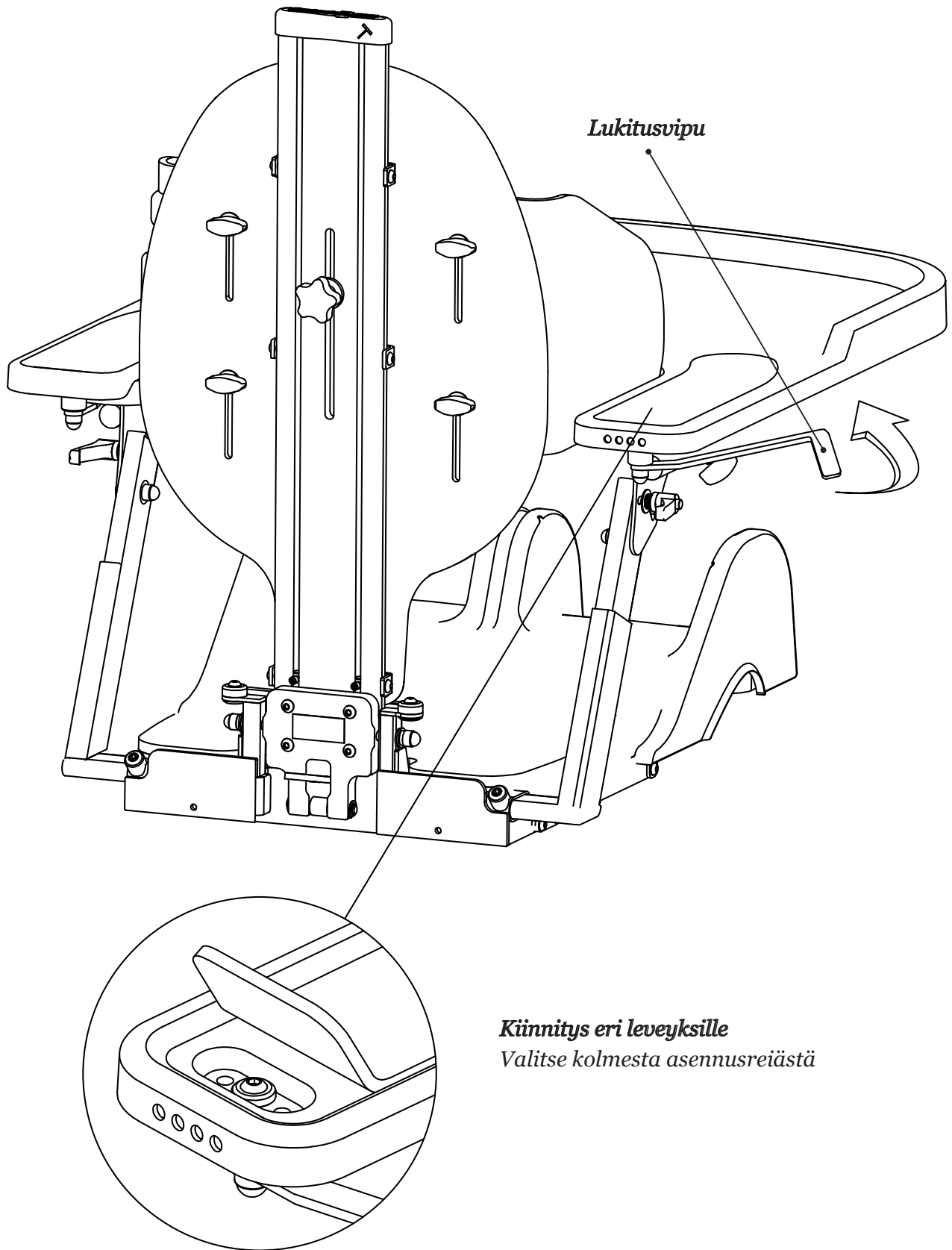

Pöytä, kiinteä

Pöydän asentaminen

Aseta pöytä käsivarsitukilevyjen päälle ja käännä sitten pöydän lukitusvipua siten, että se on käsivarsituen levyn alla. Lukitusvipua on käännettävä, kunnes se on korotetun käsivarsituen levyn reunan sisäpuolella.

Asennusreikien vaihto



Valittavana on 3 asennusleveyttä. Leveyttä muutetaan käyttämällä yhtä pehmusteen alla olevista valinnanvaraisista asennusrei'istä. Lukitusvipu on tehtaalla asennettu keskireikään.

Asennusreiän vaihtamiseksi on pehmusteen takapäätä aluksi nostettava. Takareunassa olevat reikämerkinnät ilmoittavat pöydän koon.




Huom!


Älä nosta pöytää etureunasta.

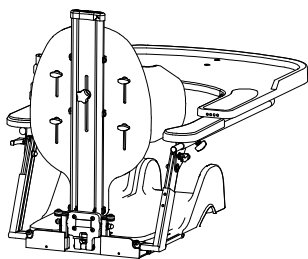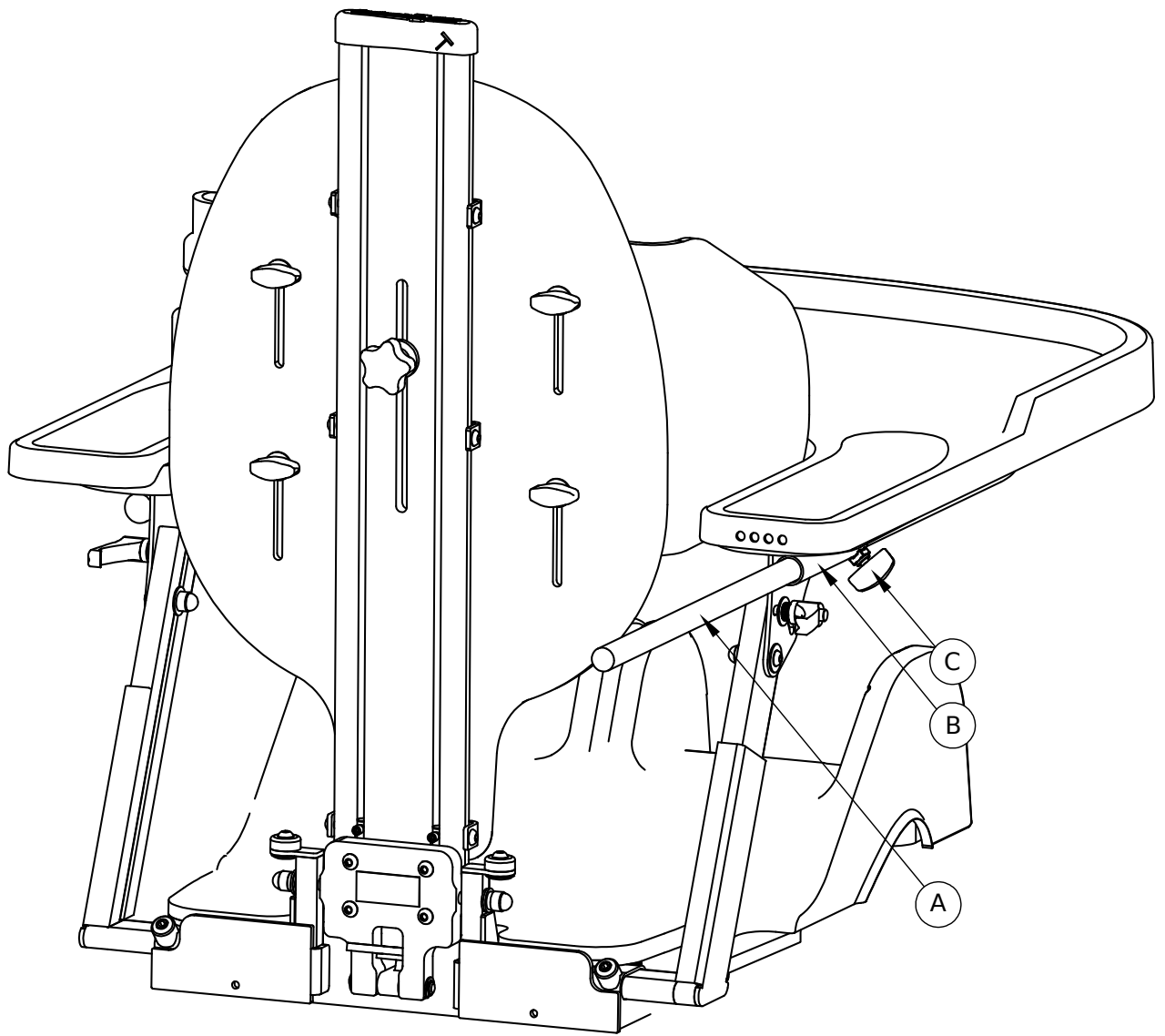

Asema 1

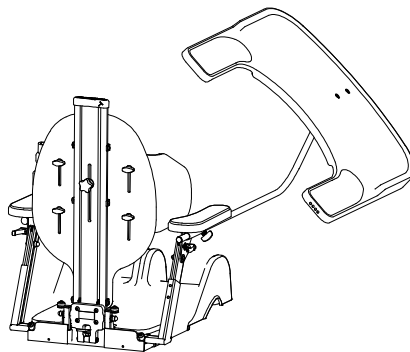

Asema 2

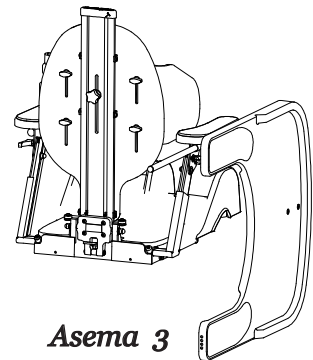

Asema 3

Sivuun kääntyvä pöytä

Pöydän asentaminen

Kääntyvän pöydän asentamiseksi pöydän asennusputki (A) pannaan käsinojan levyn alla olevaan putkeen (B). Työnnä pöytä haluttuun kohtaan ja anna sen levätä käsinojien levyillä. Lukitse pöytä kiristämällä sorminuppi (C).

Kääntötoiminnon käyttäminen

Pöydän kääntämiseksi sivuun avataan ensin sorminuppia (C) hieman. Nosta pöytää ja työnnä sitä eteenpäin. Nosta pöytää hieman ja käännä se sivuun. Kun pöytä on alimmassa asennossaan, työnnä se uudelleen takaisin ja kiristä sorminuppi (C).

- 1) Vedä pöytää eteenpäin
- 2) Nosta pöytää edelleen ja käännä se sivuun
- 3) Kun pöytä on alimmassa asennossaan, työnnä se uudelleen takaisin

Huom.!


Muista kiristää sorminuppi (C) pöydän kääntötoimintoa käytettyäsi. Mikäli käytetään lukitusvipuja, ne on käännettävä käsinojan levyn alle sivulla 34-35 kuvatulla tavalla.

Muista!

Varmista, että vedät pöytää tarpeeksi eteenpäin kääntötoiminnon käyttämisen yhteydessä käyttäjän vahingoittumisen estämiseksi.

Vahvistettu pöytä

Kuva alapäin

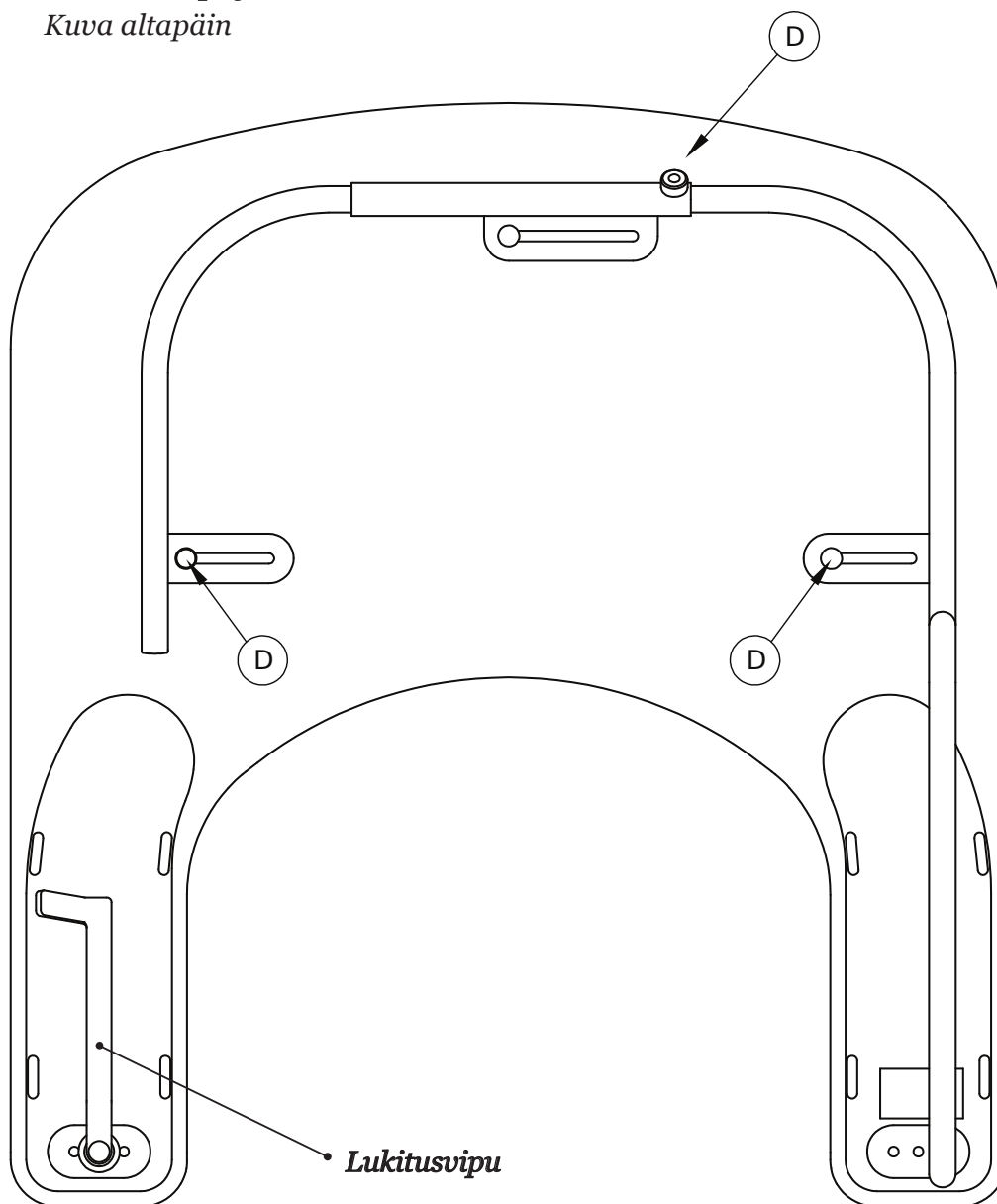

Pöytä vahvistetuin asennuskiinnikkein

Vahvistetun pöydän asentaminen

Vahvistetun pöydän asentamiseksi pöydän asennusputki (A) pannaan käsinojan levyn alla olevaan putkeen (B). Työnnä pöytä haluttuun kohtaan ja anna sen levätä käsinojien levyillä.


Lukitse pöytä kiristämällä sorminuppi (C). Lukitusvipua on käännettävä, kunnes se on korotetun käsivarsituen levyn reunan sisäpuolella.


Leveyden säätäminen

Käsinojien leveyden säätämisen sijasta pöydän leveyttä voidaan säätää siten, että asennuskiinnikkeet sopivat käsinojien kiinnikkeissä oleviin asennusputkin. Leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (D) ja suoritetaan säätö haluttuun kohtaan. Kiristä sitten ruuvit (D).

Huom.!

Ellei pöydän leveyssäätö ole riittävä, on mahdollista säätää käsinojaa leveyssuunnassa. Lisätietoja tämän käsikirjan sivuilla 22-23.

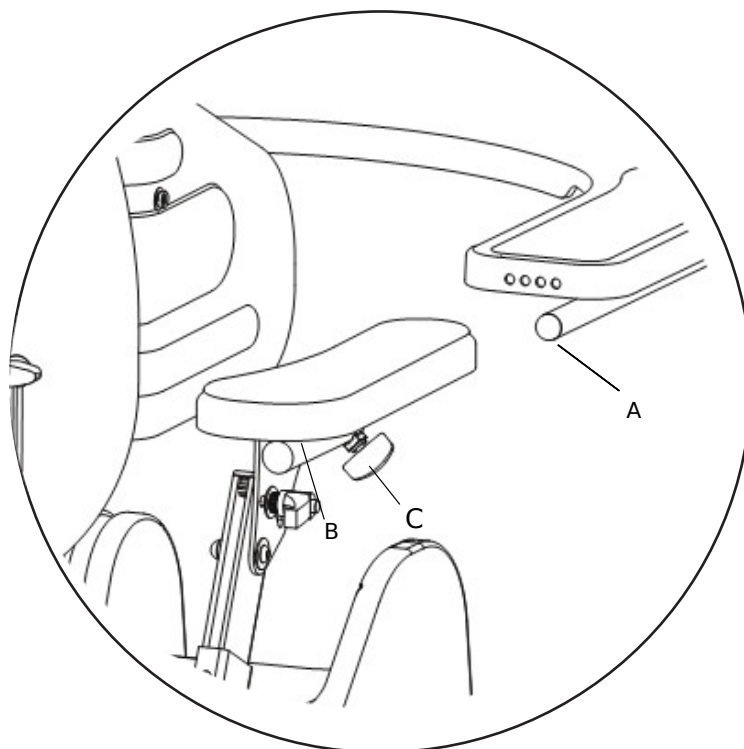

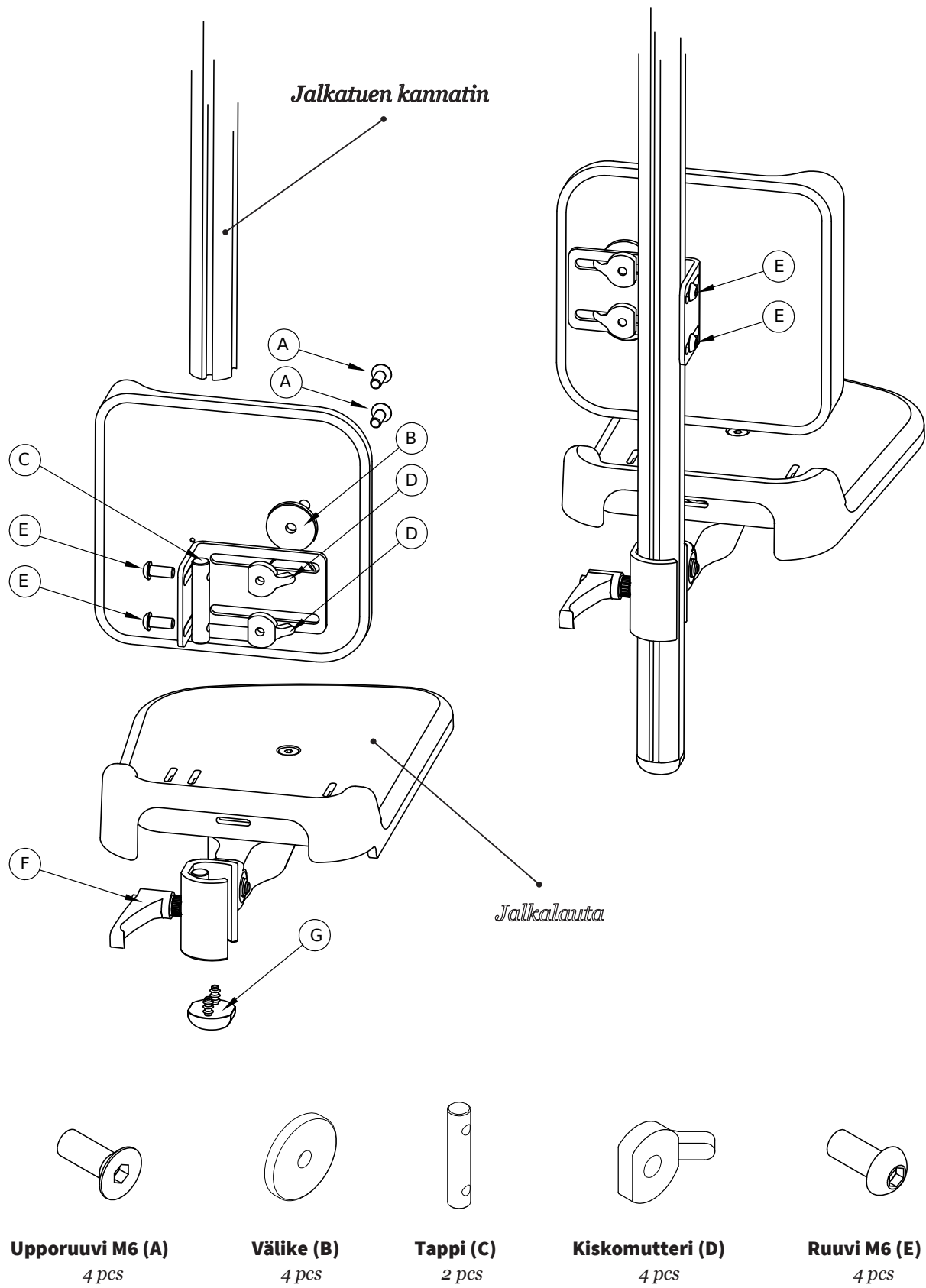

Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen

Ennen pohjetuen asentamista on mahdolliset jalkatuet ensin poistettava jalkatuen kannattimesta. Aloita poistamalla päätykappale (G) ja avaa sitten vipukahvaa (F), joka pitää jalkatuen paikallaan jalkatuen kannattimessa. Vedä sitten jalkatuki alas.

Asenna pohjetuki painamalla tapit (C) jalkatuen kannattimeen, säädä halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit (E). Asenna jalkatuki ja sen päätykappale takaisin.

Vinkki!

Jalkatuen uudelleen asentamisen osalta katso tämän käsikirjan sivut 42-43.

Korkeuden säätäminen


Pohjetuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (E) hieman ja suoritetaan säätö sopivaan korkeuteen, sitten kiristetään ruuvit (E).

Leveyden säätäminen

Pohjetuen leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (E) hieman ja suoritetaan säätö sopivaan leveyteen, sitten kiristetään ruuvit (E).

Huom.!

Muista kiinnittää jalkatuki ja päätykappaleet pohjetukea jälkikäteen asennettaessa.

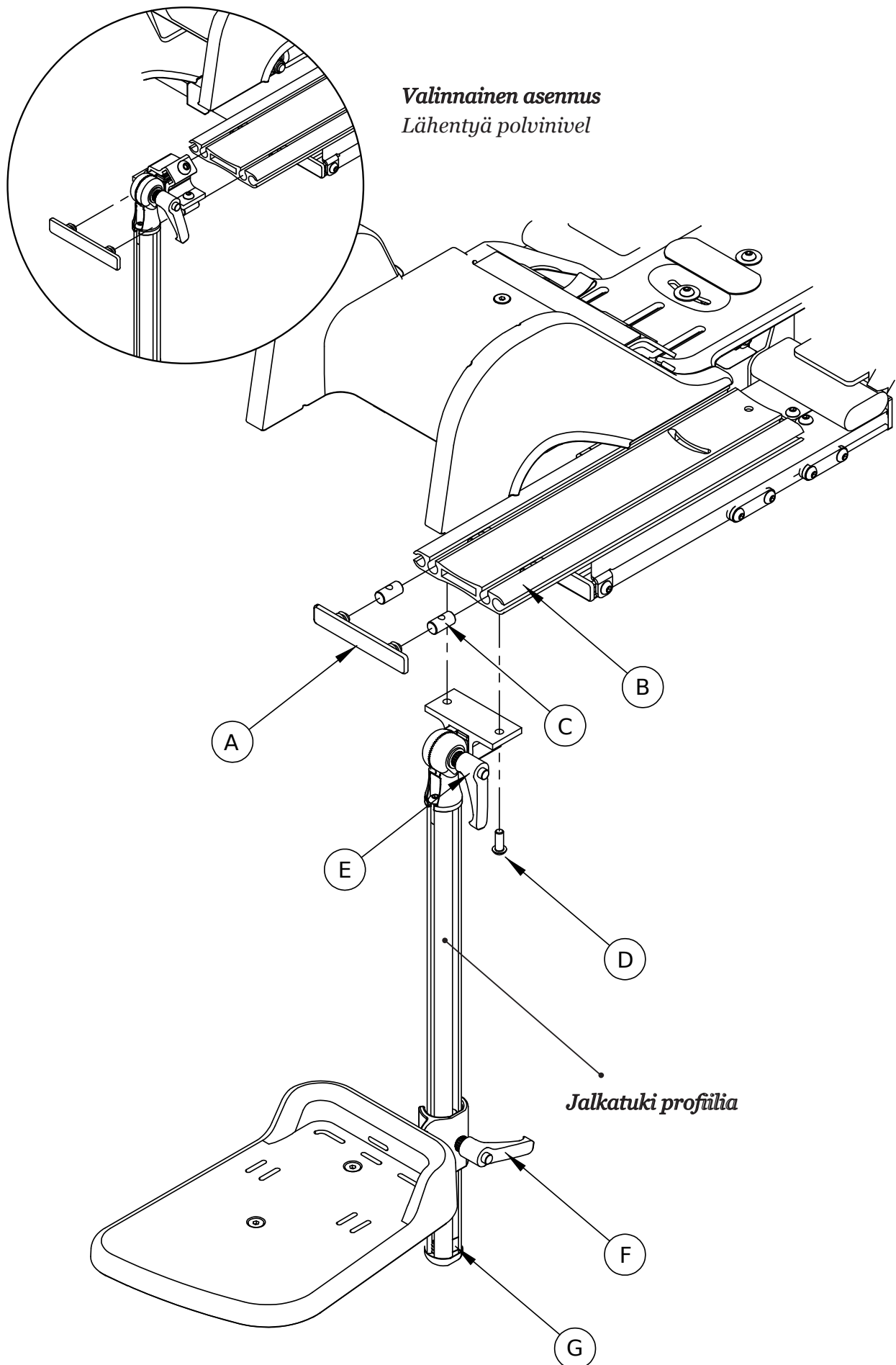

Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Jalkatuen versiosta riippumatta asentaminen tehdään samalla tavalla. Aloita poistamalla päätykappale (A) alustaprofiilin (B) päästä ja työnnä sitten tapit (C) sisään siten, että ne ovat samalla kohdalla alustaprofiilissa (B) olevien reikien kanssa. Kiinnitä jalkatuki sitten ruuveilla (D) tappeihin (C) alustaprofiilissa (B) olevien reikien läpi.

Jalkatuen valinnainen asennus

Asennuksen saamiseksi lähemmäs polviniveltä voidaan käyttää vaihtoehtoista asennusmenetelmää, jossa jalkatuen kannatin asennetaan alustaprofiilin (B) vastakkaiselle puolelle.

Huom.!

Huomaa, että ei ole tarpeen purkaa jalkaosaa profiilista jalkatuen asentamiseksi.

Turvapysäytin

Tapin muodossa oleva turvapysäytin (G) on asennettu jalkatuen kannattimen alaosaan päätykappaleen sisään. Turvapysäytintä (G) voidaan käyttää myös ennalta asetetun korkeusasemaan palauttamiseksi.

Vinkki!


Liitä toinen turvapysäytin jalkatuen yläpuolelle jalkatuen kannattimen uraan, jolloin jalkatuki on helppo palauttaa vaihtehtoiseen korkeusasemaan (esimerkiksi kenkien kanssa tai ilman).

Kulman säätäminen polvinivelen kohdalla

Kun jalkatuki on asennettu alustaprofiilin päälle, on mahdollista säätää jalkatuen kulmaa polvinivelen kohdalla. Avaa vipukahvaa (E) ja säädä haluttuun kulmaan, kiristä sitten vipu (E).

Kulman säätäminen nilkan kohdalla

Kun jalkatuki on asennettu alustaprofiilin päälle, on mahdollista säätää jalkatuen kulmaa nilkan kohdalla. Avaa vipukahvaa (F) ja säädä haluttuun kulmaan, kiristä sitten vipu (F).

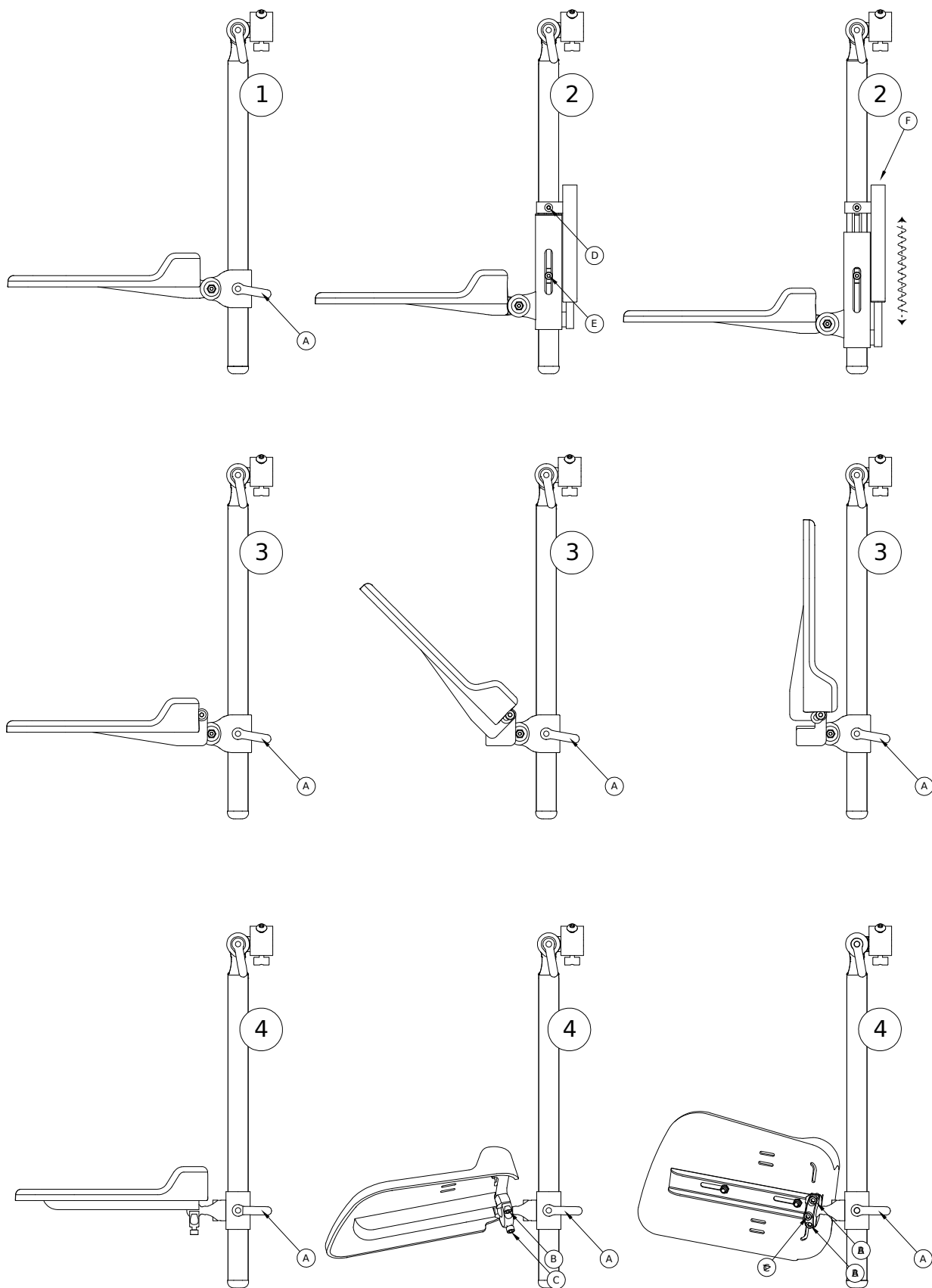

Jalkatuen kannattimet

Kiinteä jalkatuen kannatin (1)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahva (A) ja tehdään säätö halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen kiristetään vipukahva (A).

Joustava jalkatuen kannatin (2)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja tarvittaessa ruuvia (E) ja säädetään jalkatuki halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen ruuvi kiristetään (D). Valitse jousituksen pituus säätämällä ruuvi (E) haluttuun kohtaan ja kiristä se. Sääda jousen amplitudi ruuvilla (E) kiristämällä se oikeaan kohtaan.

Vinkki!

Jousen vastusta voidaan säätää ruuvilla (F).


Ylös käännettävä jalkatuen kannatin (3)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (A) ja tehdään säätö halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen kiristetään vipukahva (A). Kääntötoiminto toteutetaan nostamalla jalkalautaa edestä.

Pallonivelkannatin (4)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan vipukahvaa (A) ja sitten suoritetaan säätö halutulle korkeudelle, kiristä vipukahva (A).

Palloniveltoiminnon käyttämiseksi avataan ensin ruuveja (B) ja (C) ja suoritetaan säätö halutulle korkeudelle. Sitten kiristetään ruvit (B) ja asema lukitaan ruuvilla (C).

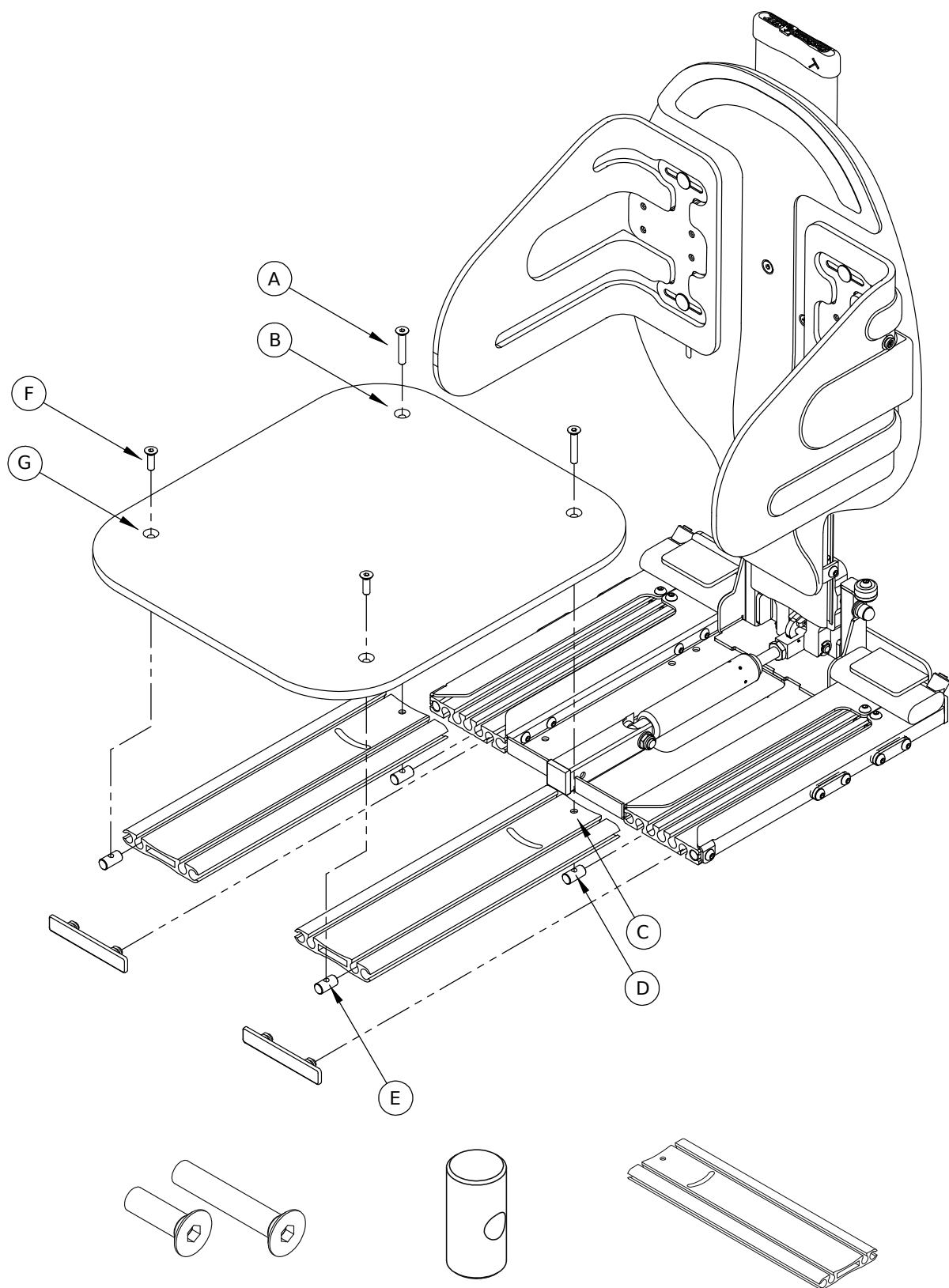

Upporuuvi M6
2+2 pcs

Tapit
4 pcs

Profiilit
2 pcs

Tasainen istuin

Tasaisen istuimen asentaminen

Tasaista istuinta asennettaessa standardi-istuimen osat korvataan tasaisella istuinlevyllä. Tasaisen istuimen asentaminen on tehtävä mukana toimitetuilla asennusosilla jäljempänä olevan kuvauksen mukaisesti.

Tasaista istuinta asennettaessa tulee pidemmät ruuvit (A) laittaa tasaisessa istuinlevyssä olevien takimmaisten reikien (B) ja profiilissa olevien reikien (C) läpi. Ruuvit kiristyvät vastakkaisella puolella tappeihin (D). Älä kiristä kokonaan.


Työnnä tapit (E) profiilin ulompiin uriin ja kiinnitä ruuvit (F) niihin tasaisessa istuinlevyssä olevien reikien (G) läpi.

Työnnä tasaisen istuinlevyrakennelman tapit istuinalustaan uraan 1 (katso sivu 12) haluttuun asemaan, kiristä ruuvit (A).



Huom.!

Älä milloinkaan käytä muita kuin mukana toimitettuja ruuveja. Nämä ovat turvaominaisuuksia. Mikäli tarvitaan muunlaisia mittoja, ota yhteys Anatomic SITT AB:hen.

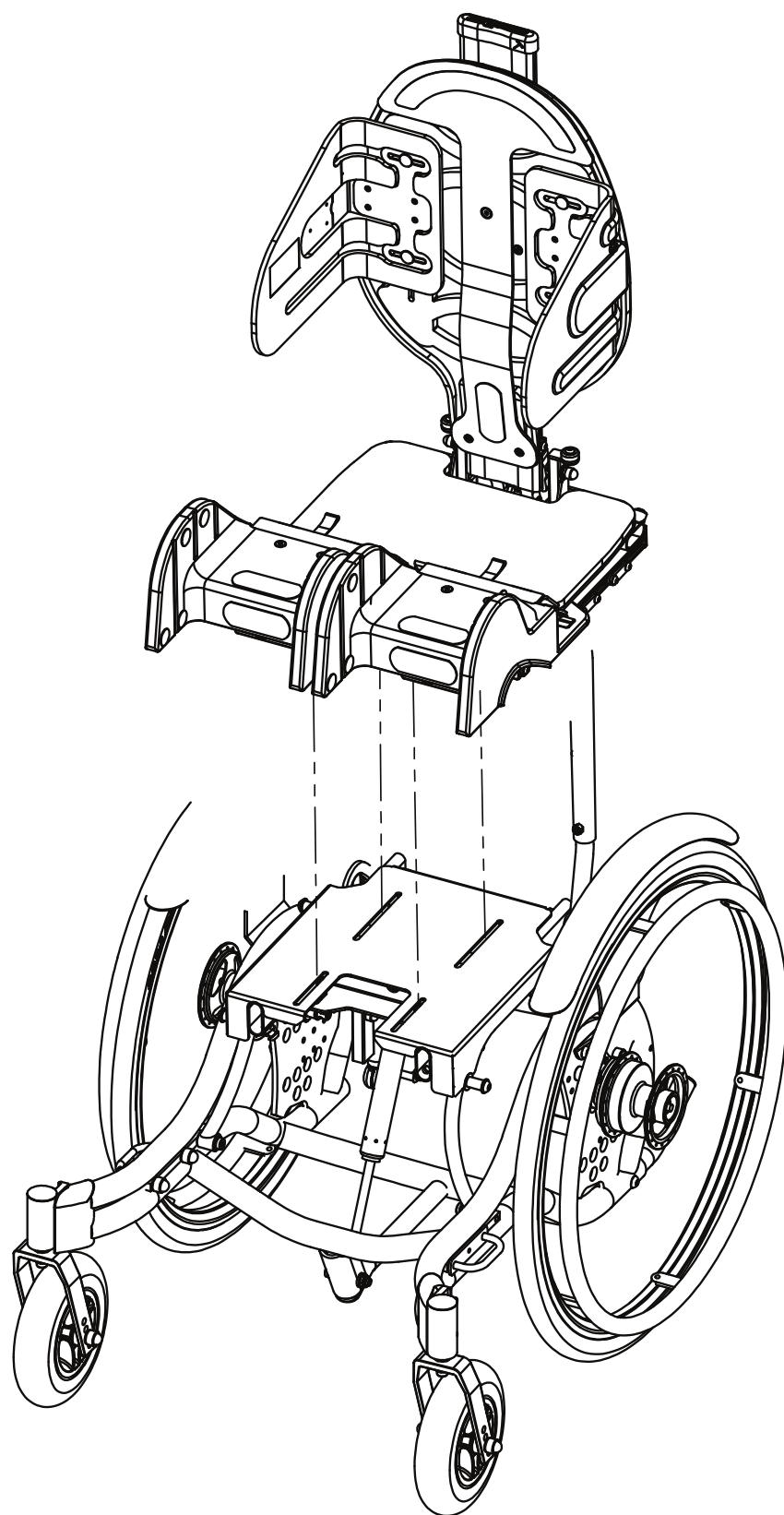

Istuinjärjestelmän asennus

Asentaminen alustalle

Istuinjärjestelmä voidaan asentaa alustalle eri tavoin. Eri vaihtoehdot selitetään seuraavassa. Valitkaa itsellenne parhaiten sopiva menetelmä.

Kiinteä asennus

Kiinteällä asennuksella tarkoitetaan sitä, että istuinjärjestelmä liitetään suoraan alustalle. Tällä menetelmällä tehtävä asennus on suoritettava mukana toimitetulla asennussarjalla.

Istuinjärjestelmän pohjassa on kaksi erilaista reikäkuviota alustalle kiinnittämistä varten. Valitse reikäkuvio, joka soveltuu parhaiten asentamiseen hyvän tasapainon säilyttäen.




Huom.!

Älä milloinkaan käytä muita kuin mukana toimitettuja ruuveja. Nämä ovat turvaominaisuuksia. Mikäli tarvitaan muunlaisia mittoja, ota yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.

Huom.!

Mikäli käytetään tasaista istuinta, on tämä ensin poistettava ennen alustalle asentamista.

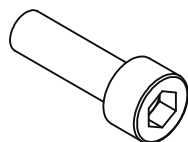


M6 Ruuvi (A)
4 pcs



M6 Aluslevy (B)
4 pcs



M6 Lukitusmutteri (C)
4 pcs

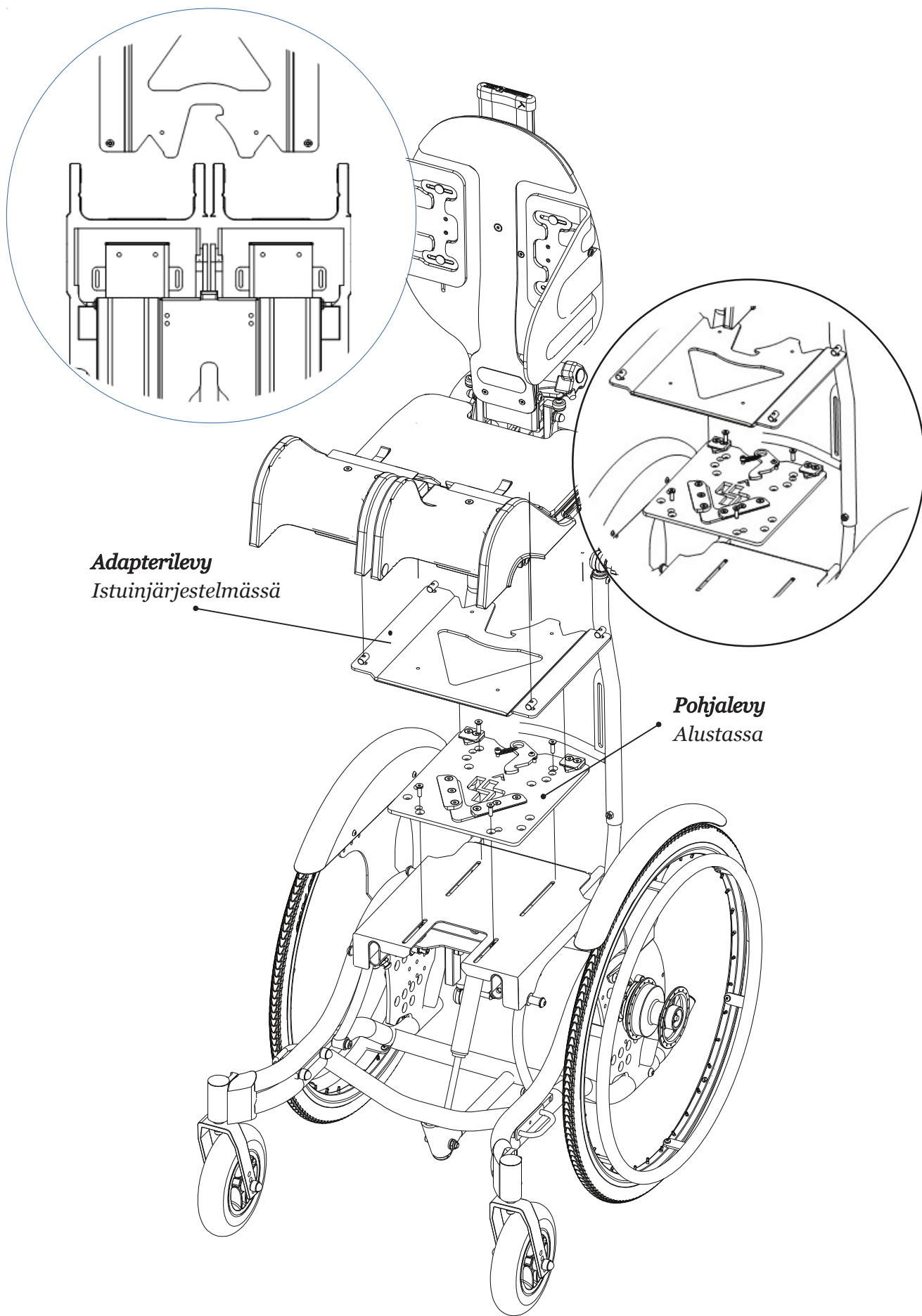

Istuinjärjestelmän asentaminen alustalle

Asentaminen alustalle

Alla istuinjärjestelmän alustalle asentamisen eri menetelmät.
Valitkaa itsellenne parhaiten sopiva menetelmä.

Asentaminen adapterijärjestelmän avulla

Adapterijärjestelmä mahdollistaa istuinjärjestelmän helpon siirtämisen erilaisten alustojen välillä. Adapterijärjestelmä koostuu istuinjärjestelmässä olevasta adapterilevystä ja kussakin alustassa olevasta pohjalevystä.

Aloita asentamalla pohjalevy kiinnittämällä se mukana toimitetuilla ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla.


Asenna sitten adapterilevy työntämällä tapit (A) istuinjärjestelmän pohjassa oleviin uloimpiin uriin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristä ruuvit (B).

Kun molemmat levyt on asennettu, ne voidaan yhdistää. Istuinjärjestelmä on kunnolla kiinnittynyt, kun kuuluu loksahdus.




Huom.!

Varmista ennen käyttöä, että istuinjärjestelmä on kiinnittynyt tukevasti alustaan.

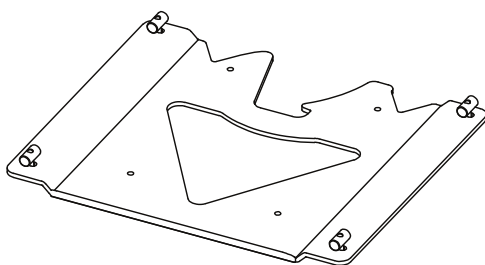

Adapterilevy

Kiinnittyy istuinjärjestelmään

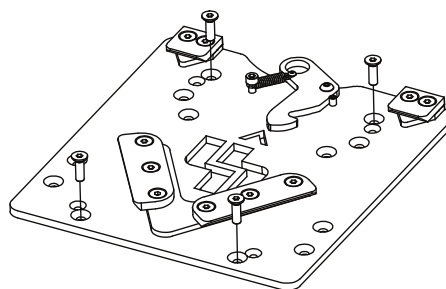

Pohjalevy

Kiinnittyy alustaan

Ajoneuvossa kuljettaminen

Ohjeet autossa kuljettamiseksi

Kuljetettaessa Sharky Pro -tuolia alustalle kiinnitettynä autossa tulee noudattaa alustan valmistajan määäämiä ohjeita.


Kun Sharky Pro on asennettu Seabass Pro:lle, tulee alusta kiinnittää alla kuvassa esitettyihin tätä varten tarkoitettuihin kuljetuskiinnikkeisiin.



Huom.!

On tärkeää, että kiinnityshihna kiristetään vain lievästi.

Hihnojen liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa alustan vääntymisen.

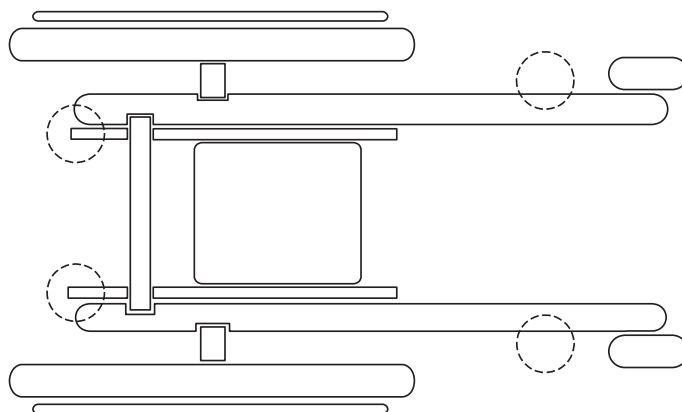

Törmäystestattu ja hyväksytty

Sharky Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 -standardin mukaisesti. Tämän standardin mukaisesti istuinjärjestelmä voidaan asentaa kaikille alustoille, jotka on hyväksytty standardin ISO 7176-19 mukaisesti, jolloin hyväksyntä yhdistelmälle säilyy.

Huom.!

Törmäystestin hyväksyntä on voimassa korkeintaan 75 kg:n painoille.



Asiakaspalvelu

Scandinavia

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomicsitt.com

SE

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

DK

Rehaco Oy

Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
Email info@rehaco.fi
Tel. +358 40 775 2288

FI

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66
Email post@bardum.no

NO

Europe

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomicsitt.com

NL

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

MLT

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

GBR

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

NZL

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

GR

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

EST

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

IRL

PRT

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

FR

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmíðin

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjörður
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

UAE

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

AUS

Special needs for Special children

48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

ISR

The Gym & Care

1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

MYS

Kunnossapito-ohjeet

Huoltovälit

Laitteen kunnollisen toiminnan takaamiseksi on suoritettava säännöllinen huolto ja tarkastus. Huollon tarve riippuu käyttömäärästä ja kulumisesta. Tarkista kaikki liikkuvat osat ja kiinnitykset kulumisen osalta. Huoltamisen tulee aina tapahtua ammattitaitoisen ja valtuutetun henkilöstön toimesta. Mikäli olette epävarma, ottakaa vapaasti yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.

Puhdistus- ja pesuohjeet

Muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Käytä biohajoavia pesuaineita.

Tyynyt, kankaat ja vöiden pehmusteet voidaan pestä 60 asteen hienopesussa. Tuotteita ei saa rumpukuivata. Seuraa tuotteen pesulapun ohjeita. Samat pesuohjeet pätevät Anatomic Sitt AB:n valmistamiin vartalo ja lantiovöihin.

Tarkista kunto säännöllisesti ja suorita tarvittaessa kunnostustoimenpiteet.

Kaasumäntä on aktivoitava säännöllisesti

Kaasumäntää tulee käyttää säännöllisesti sen toiminnan ylläpitämiseksi. Mikäli tuotetta ei käytetä, tulee kaasumäntä aktivoida vähintään puolen vuoden välein. Ne tulisi lisäksi varastoida siten, että männän tanko osoittaa alaspäin. Kaasumännän tiiviste voi muuten rikkoutua jolloin kaasumäntä ei toimi.

Työkalut

Säätöjen tekemiseksi tarvittava työkalu (4 mm:n kuusiokoloavain) on kiinni selkänojaprofiilin yläosassa.

Takuu

1 vuosi valmistusvirheiden osalta. Järjestämämme takuuta koskevien lisätietojen saamiseksi katso tämän käsikirjan sivu 58.

Yhdistelmät

Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita, jotka voidaan yhdistää kaikkien tässä käsikirjassa kuvattujen lisävarusteiden kanssa. Zitzi Sharky Pro soveltuu käytettäväksi yhdessä alustojen Zitzi Flipper Pro, Zitzi Seabass Pro, Mika ja Flizzy kanssa. Muiden yhdistelmien osalta ottaakaa yhteys valmistajaan Anatomic SITT AB:hen.

Varaosat

Zitzi Sharky Pron CE-merkinnän voimassa säilyttämiseksi, istuinjärjestelmään saadaan käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

Kunnostaminen

Istuinjärjestelmän kunnostamisen saa suorittaa ainoastaan alkuperäisillä Anatomic SITT AB:n varaosilla.



Huom.!

Tarkistakaa aina kuunostuksen yhteydessä ennen uusille käyttäjille lähettämistä, ettei laite ole erikoisvalmisteinen (kustomoitu).

Merkinnät

Zitzi Sharky Pro ja sen lisävarusteet ovat CE-merkinnällä varustettuja tuotteita. Yksilöllinen sarjanumero sijaitsee aktivointikotelon alla olevassa etiketissä. Tämä sarjanumero tulee mainita kaikessa tuotetta koskevassa kirjeenvaihdossa.

Kierrätys

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityypin, metallin, muovin ja palavien aineiden (teskttiilit) mukaan. Kaasumäntä luokitellaan ongelmajättemateriaaliksi.

Yhteenveto ja tarkastukset

Tarkastusohjeet

Suorita kussakin kohdassa mainitut tarkistustoimenpiteet säännöllisesti. Seuraavat kohdat tulee tarkastaa aina potilaan käyttäessä istuinjärjestelmää.

- Suorita jokaisessa kohdassa kuvatut tarkistustoimenpiteet säännöllisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit on kunnolla kiristetty.
- Tarkista hihnojen ja pehmusteiden kuluminen säännöllisesti.
- Älä aseta lasta istuimeen, ennen kuin kuulet loksahdusäänen istuinta alustalle kiinnittäessäsi
- Älä kallista istuinta liiaksi eteenpäin lapsen ollessa asetettuna tuoliin.

Sovittaminen ja kustomointi

Ohjeita ja suosituksia

Sharky Pro -istuinta muutettaessa jollakin tavoin, on suoritettava arviointi sen määrittämiseksi, onko kysessä sovitus vai kustomointi.

Sovitusta on jokainen CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut muutokset ovat kustomointeja. Sovituksia saa tehdä vain henkilö, joka katsotaan päteväksi tehtävään ja ne tulee tehdä ammatillisesti. CE-merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

Huomioi, että lääketieteellisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei saa milloinkaan muuttua vaaralliseksi käyttää sovituksen jälkeen.

Tuotteeseen tulee liittää ilmoitus siitä, että se on sovitettu tietylle käyttäjälle siten, ettei sitä voida erehdyksessä katsoa perusmalliseksi tuotteeksi.

Sharky Prolle sallitut sovitukset

Huomioi, että lääketieteellisen apuvälineen sovitukselle sekä kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei saa milloinkaan muuttua vaaralliseksi käyttää sovituksen jälkeen.

Lyhennetyt jalkatukiprofiilit

Jalkatuen profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.

Lyhennetyt käsinojaprofiilit (käsinoja istuimesta)

Käsinojan profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi. Profiilin saa katkaista vain alapäästä (istuinta kohden) ja M5-reiät turvapysäyttimille on porattava ja kierteitettävä. Nämä reiät on porattava siten, että turvapysäyttimet voidaan asentaa profiilin uriin vähintään 10 mm:n etäisyydelle profiilin päästä.

Lyhennetty selkänojanprofiili

Selkänojan profiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi. Profiili ei milloinkaan saa olla kaikkien selkänojan kiinnikkeiden asentamisen sallivaa lyhyempi. Lantiotuen säätämiseen tarkoitettun aukon reunan ja profiilin pään välillä on myös oltava vähintään 10 mm.

Myyntiehdot

Takuu

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä. Takuu ei kata tuoteeseen on kohdistuneita ulkoisia tekijöitä tai jos tuotetta on käsitelty huolimattomasti. Edellytyksenä takuuvaatimuksen käsittelemiselle on, että viallinen tuote palautetaan maahantuojalle. Alkuperäisen toimituksen pakkauslipuke on aina liitettävä mukaan.

Takuuvaatimukset

Kuvatkaa virhe ja sen mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaatimuksessa esitetään takuun alaiset korjaukset tai mahdollinen vaihto. Liittäkää aina mukaan kopio laskusta ja mainitkaa, että tuote tulee palauttaa teille korjausten jälkeen. Ilmoittakaa lähetysosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero.

Varmistakaa, että tuote tulee pakatuksi hyvin sen suojaamiseksi iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysosoite dokumentaatiossanne. Tämä siksi, että voitte seurata lähetystä, mikäli kuljetuksen aikana esiintyy häiriöitä.

Tuotteiden palauttaminen

Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuotteet tulee palauttaa 20 päivän sisällä toimituksesta. Muukaan tulee liittää kopio sekä pakkauslipukkeesta että laskusta. Ilmoittakaa syy tuotteiden palautukseen.

Varmistakaa, että tuote tulee pakatuksi hyvin sen suojaamiseksi iskuilta kuljetuksen aikana. Mainitkaa lähetysosoite dokumentaatiossanne. Näin voitte seurata lähetystä, mikäli kuljetuksen aikana esiintyy häiriöitä.

Tuotteista, jotka on palautettu yli 20 päivää toimituksesta

hyvitetään 80 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 60 päivää toimituksesta

hyvitetään 60 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 150 päivää toimituksesta


hyvitetään 40 % laskutusarvosta

Tuotteista, jotka on palautettu yli 360 päivää toimituksesta

ei hyvitetä mitään

⚠ Erikoisvalmisteisia (kustomoituja) tuotteita ei voida palauttaa

Tekniset tiedot

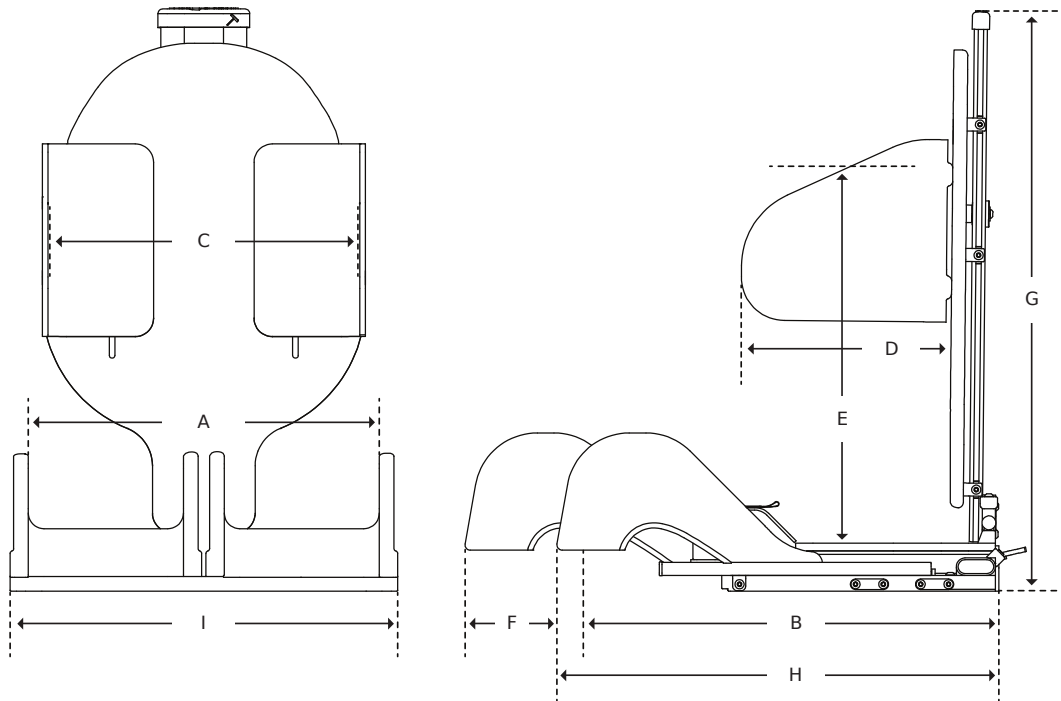

Käyttäjän tiedot	Koko 1	Koko 2
Käyttäjän pituus	150-180 cm	170-195 cm
Istuimen leveys (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Istuimen syvyys (B)	37-47 cm	45-55 cm
Sivuttaisleveys (C)	27-35 cm	30-38 cm
Sivuttaissyvyys (D)	21 cm	25 cm
Korkeus kainalon kohdalla (E)	35-50 cm	40-55 cm
Jalkojen pituusero (F)	10 cm	10 cm
Abduktio/adduktio	18° / 9°	18° / 9°
Tuotteen tiedot	Koko 1	Koko 2
Käyttäjän paino	130 kg*	130 kg*
Korkeus (G)	67 cm	77 cm
Pituus (H)	52-62 cm	62-72 cm
Leveys (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Paino	14 kg	15 kg
Selkänöjan kallistuskulma	-10° / +25°	-10° / +25°

* Crash testi hyväksyntä on voimassa paino jopa 75 kg.

SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Katuosoite

Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NO

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norway

Tel +47 64 91 80 60

Fax +47 64 91 80 66

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

