

EasyStandlii Bantam XS & S

Säilytä käyttöohje telineen mukana.




Käyttöohje

SYMBOL LEGEND



CAUTION/ATTENTION

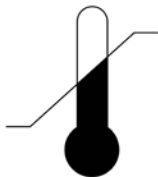

ENVIRONVENTAL
CONDITIONS



TYPE BF APPLIED PART



DATE OF MANUFACTURE



PINCHPOINT



INSTRUCTIONS FOR USE

SN

SERIAL NUMBER



MANUFACTURER



Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

R_xonly

Afin de préserver l’environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje correspondiente.

Siate responsabili verso l’ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d’uso, presso la vostra sede di riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de sua vida útil.

800.342.8968 www.easystand.com

Sisällysluettelo

Esittely1

Turvatoimenpiteet 2

Kokoaminen 3

Kelattavan kokoaminen12

Säädöt ja Käyttö14

Sähkötoiminen nosto - käyttö23


Osien erittely 28

Seisominen 29

Ylläpito 30

Ongelmatilanteet 31

Rajoitettu takuu32

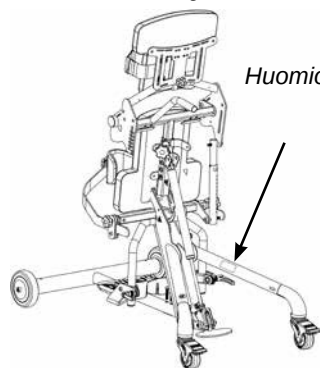

Huomio : sarjanumero on sijoitettu takarunkoon

Osto päivä _____ Sarja # _____

Johdanto

Onneksi olkoon, olet uuden EasyStand -seisomatelineen omistaja!
Me täällä Altimate Medicalissa olemme suunnitelleet EasyStand -telineen mukavuutta silmälläpitäen.

EasyStand -telineen kuvaus

EasyStand -mallisto on suunniteltu niille, jotka pystyvät liikkumaan itse, hoitajan tai nostolaitteen avulla. Se on hyödyllinen työkalu kuntoutukseen, kotiin, kouluun ja töihin. EasyStand -seisomateline tukee henkilöä sekä istuma- että seisoma-asennossa. Lukuisia erilaisia lisävarusteita on myös saatavilla, kuten käsiohjaus tai Power Up Lift -nostolaite henkilökohtaisia tarpeita varten.

Käyttötarkoitus

EasyStand Bantam -mallisto on tarkoitettu avustamaan niitä henkilöitä, joilla on vaikeuksia nousta seisomaan istuma-asennosta. Käyttäjän painon tulee olla maksimissaan 23kg (koko XS) ja 45kg (koko S).

Tämä käyttöohje on tärkeä osa seisomatelineen toimintaa ja kaikkien laitetta käyttävien tulisi lukea se huolella.
Näin voimme taata, että EasyStand -teline kootaan oikein ja sitä käytetään mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.

Altimate Medical suosittelee valvojan paikallaoloa EasyStand -telineen ollessa käytössä.

Jos ilmenee ongelmia, jotka eivät ratkea tätä käyttöohjetta lukemalla, ottakaa yhteys paikalliseen toimittajaan tai soittakaa suoraan Altimate Medicalille numeroon 800-342-8968 tai 507-697-6393. On tärkeää, että EasyStand Bantam -teline turvatarkastetaan viikoittain turvallisen käytön takaamiseksi. Telineen käyttäjä voi itse säätää EasyStand -telinettä ohjeiden mukaisesti. Kun säädöt on suoritettu, tarkasta EasyStand -teline taataksesi, että kaikki säädettävät osat ovat turvallisesti paikoillaan, kuten käyttöohjeessa on esitetty. Kuluneiden osien vaihdot tai suuremmat säädöt tulisi aina suorittaa paikallisen toimittajan tai huoltajan toimesta. Käytä ainoastaan Altimate Medical Inc.:in hyväksymiä osia turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi.

Älä käytä EasyStand Bantam -telinettä ilman lääkärin suositusta.
EasyStand Bantam -telineen käyttö ilman lääkärin suositusta saattaa johtaa terveydellisiin ongelmiin.
Suosittelemme ensin kunnollisen seisonaohjelman laatimista lääkärin tai fysioterapeutin kanssa.

Liity Seisovaan Joukkoomme!

Tavoitteemme on yksinkertainen – pyrimme saamaan liikuntarajoitteisia ihmisiä seisomaan heidän terveytensä edistämiseksi. Tapaa, jaa ja opi muilta liikuntarajoitteisilta ihmisiltä, erityishuomiota kaipaavien lasten vanhemmilta, lääketieteen ammattilaisilta ja seisomisen asiantuntijoilta sosiaalisessa verkostossamme. Kun pidät seisonaohjelmiasi “ajatustesi kärjessä”, sinulla on paras mahdollisuus ylläpitää seisontarutiinia, joka maksimoi kaikki seisomisen edut!

Lue, jaa ja kommentoi EasyStand -blogia osoitteessa blog.easystand.com

EasyStandin voi löytää näistä sosiaalisista verkostoista:



Turva ohjeet

- Ole hyvä ja lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen telineen käyttöä.

Soita Altimate Medicalille numeroon 800-342-8968 tai 507-697-6393 jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää lisää.

- Jos käyttäjä ei täytä alla mainittuja vaatimuksia eikä häntä ole asetettu telineeseen asianmukaisesti kuntouttajan tai fysioterapeutin toimesta, Altimate Medical Inc. ei suosittele EasyStand Bantam -telineen käyttöä.

Bantam (Erittäin Pieni) – on suunniteltu kaikille 71-102cm pitkille ja enintään 23kg painaville henkilöille.

Bantam (Pieni) – on suunniteltu kaikille 91-137cm pitkille ja enintään 45kg painaville henkilöille.

Tarkemmat yksityiskohdat löytyy osoitteesta www.easystand.com

- EasyStand Bantam -telinettä ei tule käyttää konsultoimatta ensin fysioterapeuttia. Konsultoimatta jättäminen saattaa johtaa terveydellisiin ongelmiin. Suosittelemme hyvän seisonaohjelman laatimista ja fysioterapeutin valvontaa.

- EasyStand Bantam -seisontatelinettä tulisi aina käyttää asiantuntevan aikuisen läsnäollessa. Älä koskaan jätä lasta yksin Bantam -telineeseen.
- Älä säädä Bantam -telinettä telineen ollessa pystyasennossa.

Poikkeus: Jos omistuksessaanne on maattava versio, katso sivut 17-19.

Kaikki asennon korjaukset tulee suorittaa asiantunteva hoitaja tai terveydenhuollon ammattilainen.

- On tärkeää tarkastaa EasyStand Bantam -teline vähintään viikoittain, jotta teline säilyy turvallisessa käyttökunnossa. Kiinnitä erityistä huomiota löystyneisiin osiin. Jos EasyStand -teline on varustettu Pow'r Up -nostolaitteella, tarkasta kaikki sähköjohdot kulumien varalta ja varmista, että ne ovat kiinnitetty huolellisesti. Kuluneiden osien vaihdon tai muiden tärkeiden säätöjen tulee suorittaa valtuutettu myyjä tai huoltopalvelu. Ainoastaan Altimate Medicalin hyväksymiä varaosia tulee käyttää turvallisuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.
 - Jos EasyStand -telinettä käytetään kotiympäristössä, tarkasta teline ennen jokaista käyttökertaa lemmikkien, lasten tai tuholaisten aiheuttamien vaurioiden tai kulumien varalta.
 - Älä säädä jalkaosia käyttäjän ollessa seisoma-asennossa. Keskustele fysioterapeutin kanssa oikeanlaisesta jalkojen asennosta ja kulmasta.
 - Älä koskaan nosta jalkoja tai säädä selkätukea etuasentoon käsitukea säätämällä. Jalkatukea voi ainoastaan nostaa makuuasennossa, joka samalla laskee selkänöjää.
 - Varmista, että tarvittavat tuet ovat tiukasti paikoillaan ennen lapsen saattamista seisovaan asentoon.
 - Jos teline on ollut alle 10°C lämpötilassa, sen tulee olla huoneenlämpöinen ennen käyttöä.
 - **Käyttöolosuhteet:** Lämpötila: 5°C - 40°C, Ilmankosteus: 20% - 90% lämpötilan ollessa 30°C, Ilmanpaine: 700 – 1060hPa.
 - **Varastointi/kuljetusolosuhteet:** Lämpötila: -10°C - 50°C, Ilmankosteus: 20% - 90% lämpötilan ollessa 30°C, Ilmanpaine: 700 - 1060hPa.
 - EasyStand -telinettä voi käyttää enintään 3,050 metrin korkeudessa.
 - EasyStand -telineen käyttöikä normaaliolosuhteissa on 5 vuotta. Huomio: Tämä voi vaihdella käyttömäärästä riippuen.
 - Seisontateline on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa tasaisilla pinnoilla. Pidä pyörät lukittuina käytön aikana.
 - Telineen kuljetusta käyttäjän ollessa seisovassa asennossa ei suositella.
 - Äärimmäiset sivuttaiset tai edestakaiset liikkeet voivat saada telineen kaatumaan.
 - Telinettä suositellaan säilytettäväksi huoneenlämmössä normaalissa ilmankosteudessa.
 - Altimate Medicalin tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi Altimate Medicalin lisäosien kanssa.
- Muiden valmistajien lisäosat eivät ole Altimate Medicalin testaamia, jos niin ei ole erikseen mainittu, eikä niitä täten suositella käytettäväksi Altimate Medicalin tuotteiden kanssa.
- Tuotteeseen ei suositella muutoksia ilman kirjallista suostumusta (joihin sisältyy mm. Muiden valmistajien osilla aikaansaadut muutokset) ja se kumoaa tuotteen takuun.
 - EasyStand Bantam -sähkönostin täyttää IEC 60601-1 ja 60601-2 säädösten vaatimukset.*
 - Liikkuvan mallin rengaslukko on tarkoitettu ainoastaan telineen pitämiseksi paikoillaan siirrettäessä tai paikallaan ollessaan, eikä sitä saa käyttää kelattavan jarruna liikkuvan yksikön pysäyttämiseen.



Varoitus: Laite on tarkoitettu monille erilaisille käyttäjille; siksi telineessä on lukuisia säätöreikiä.

Vältä sormien tai muiden ruumiinosien laittamista kyseisiin reikiin.



Varoitus: Käytössä ollessaan laitteessa on lukuisia liikkuvia osia.

Tutustu telineeseen huolella ja vältä laittamasta käsiä tai sormia liikkuville alueille.



Varoitus: Neuvo sivustakatsojia pysymään kauempana telineen ollessa käytössä..



Varoitus: Älä käytä EasyStand Bantam -telinettä ylä- tai alamäessä, teline on tarkoitettu käytettäväksi tasaisilla pinnoilla. Teline saattaa kaatua.

* Vain Bantam Pow'r Up -nostolaite

Kokoaminen

1. Poista kaikki osat laatikosta.
Irrota kaksi pulttia ja uppomutteria.



2. Käännä takarunkoa niin, että pääset helpommin käsiksi tolppaan.
Liitä etu- ja takarunko toisiinsa.



3. Kiinnitä kaksi uppomutteria rungon alaosaan ja tasaa putki.
Voit joutua käyttämään kumivasaraa tasataksesi rungon ja putken.



4. Kiinnitä kaksi pulttia rungon yläosaan ja kiinnitä ne uppomutteriin samalla varmistaen, että ne ovat linjassa. Kiristä huolellisesti.



5. Laita teline takaisin alkuperäiseen asentoon. Jos mukana on säädettävä ja irrotettava pumppukahva (lisävaruste), poista nuppi, pultti ja prikka kahvan keskiosasta. Aseta prikka kuvan mukaisesti.



6. Aseta pultti prikkaan kuvan mukaisesti.



7. Aseta mutteri pulttiin ja kiristä huolellisesti.



8. Poista sokka pumpusta ja aseta pumpun kahva varteen kuvan mukaisesti ja työnnä sokka reikien läpi.



9. Aseta kahvan yläosa kahvaan kiinni, aseta kaksi pulttia ja kiinnitä huolellisesti.



10. Käytä vaihtoehtoista pumppua tai kaasujousta nostaaksesi istuinta $\frac{3}{4}$ ylös kuvan mukaisesti. Aseta säätövarsi ylös linjaan selkäputken kanssa.



11. Saadaksesi varren paikoilleen, paina jousinapista ja anna varren liukua paikalleen. Katso, että säätövarren väri täsmää istuimen syvyyden väriä. Kiristä mutteri huolellisesti.
(lisätietoja säätövarren säätämisestä sivulla 15).



12. Löysää jalkatukien kiinnikkeitä ja pyöritä ne paikalleen
(lisätietoja jalkatukien säätämisestä sivulla 14).



13. Aseta polvituet telineen putkiin kiinnikkeet alaspäin.



14. Saadaksesi tuen paikoilleen, paina jousinappi alas ja anna tuen liukua paikalleen. Jatka kunnes jousinappi lukittuu.


Swing-Away -polvitukia varten asenna tuki paikalleen ja kiristä mutterit huolellisesti.



15. Aseta polvituet paikalleen ja kiristä mutterit huolellisesti.




16. Poista mutteri ja metallinen priikka polvituesta ja jätä kumiprikka paikalleen polvitukeen. Aseta polvituki ja kumiprikka polvituen varteen. Aseta metalliprikka ja mutteri pulttiin kuvan mukaisesti. Toista toimenpide vastakkaisella puolella (lisätietoja polvitukien säätämisestä sivulla 14).

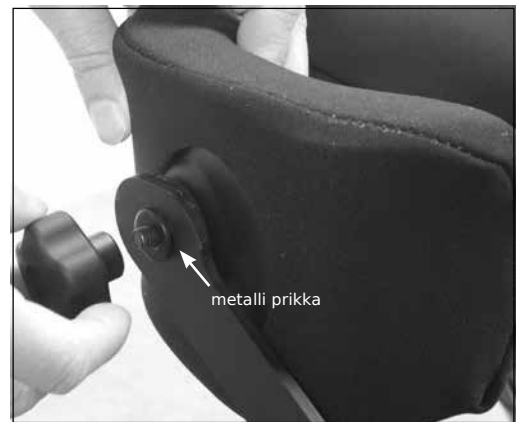

17. Jos olet tilannut tility/selinmakuu version, poista ohjain pakkauksesta. Poista kaksi pulttia ohjaimen pohjasta ja jätä mutterit paikoilleen.



18. Aseta ohjain varteen telineen sivussa. Varsi liukuu loveen ohjaimen pohjassa.

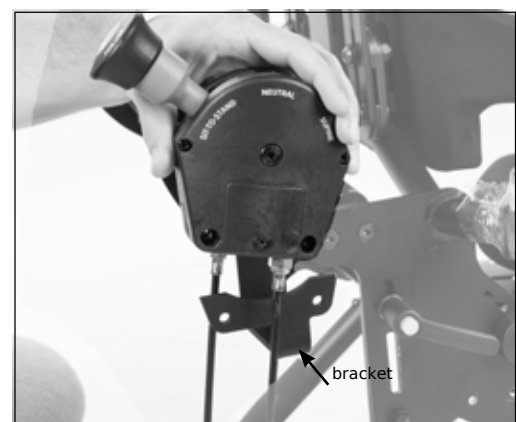

19. Varmista, että mutterit ovat ohjaimen pohjassa, linjaa reiät ja aseta molemmat pultit paikoilleen. Kiristä huolellisesti.



20. Jos olet tilannut vaihtoehtoisen Shadow Tray -pöytälevyn, löystytä kahvat pöytälevyn sivuilla, käännä putket ylös niin, että ne ovat linjassa pöytälevyn kanssa kuvan mukaisesti ja kiristä kahvat. Asenna kaksi pöytälevyn vartta kiinni tukeen pöytälevyn pohjassa. Toinen varsista on pidempi kuin toinen helpomman asennuksen vuoksi (lisätietoa Shadow Tray -pöytälevyn asennuksesta sivuilla 20-21). Varsien pultteja käytetään pysäytysseinä. Aseta pikakiinnitystappi pöytälevyn reikiin kiinnittääksesi pöytälevyn paikalleen.



21 . Sivulle taittuvan Shadow pöytälevyn nupit tulevat samassa pussissa käyttöohjeen kanssa. Aseta nupit telineeseen kuten kuvassa näytetty Ja työnnä pöytälevy kiinnikkeisiin. Kiristä huolellisesti.


! Varoitus: Kun pöytälevy on paikallaan, varmista, että sivuilla olevat kahvat ovat kunnolla kiristetty. Sivulle taittuvasta pöytälevystä tulee poistaa muovit, löystyttää mutterit, asentaa pöytälevy ja kiristää mutterit huolellisesti.



22. Poista tappi keskitolpasta ja asenna selkäosa telineeseen kuvan mukaisesti, jos se ei ole jo kiinni.




23. Aseta selkäosa haluttuun korkeuteen. Aseta pultti ja kiristä huolellisesti.

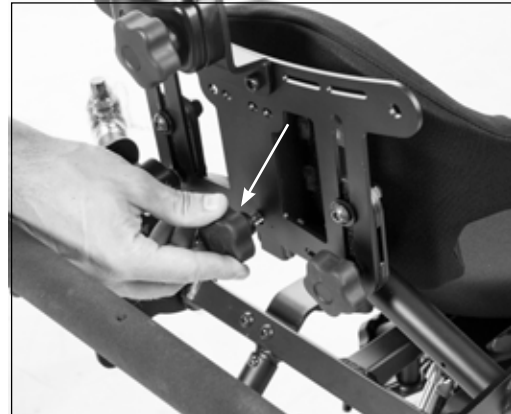

24. Jos olet tilannut vaihtoehtoisen päätuen, lisää päätuki telineeseen ja kiristä huolellisesti.



25 .Jos lisävarusteena saatava kaksoistoiminto on tilattu, aseta pultti työntökahvaan kuvan mukaisesti ja linjaa vapautinkahvan kanssa.
Kierrä pultti vapautinkahvaan ja kiristä huolellisesti.

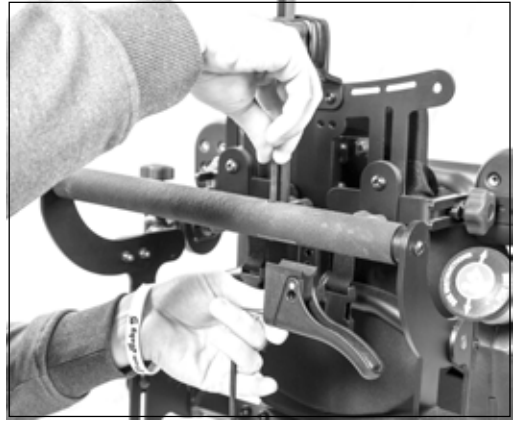

26. Jos lisävarusteena saatava kyynärpää suojat on tilattu, poista rintasuojia pöytälevystä. Irrota pultit ja vaihda ne kyynärpääsuojiin mukana tuleviin pultteihin. Aseta kyynärsuoja pöytälevylle. Linjaa rintasuojan kiinnitys reikiin, aseta pultit pöytälevyyn ja kyynärsuojaan. Kiristä huolellisesti.



Kelattavan vaihtoehdon kokoaminen

Huomio: Jos tämä vaihtoehto on lisätty vasta jälkeenpäin, telineen etuosa on purettava ennen jatkamista.

27. Kelattavassa versiossa on kaksi rengasta, T-mallin runko, sekä pultit ja mutterit. Tarvitset 5mm avaimen ja kumivasaran kokoamista varten.



28. Aseta Bantam -teline selälleen ja kiinnitä T-runko runkoon.

Huomaa, että etuosa kaartuu ylöspäin.



29. Aseta reiät linjaan ja laita piilomutterit rungon pohjaan. Saadaksesi ne linjaan, sinun on ehkä napautettava niitä kumivasaralla. Kiristä pultit huolellisesti.



30. Aseta renkaat rungon etupuolen vasemmalle ja oikealle puolelle.




31. Aseta reiät linjaan ja laita pultit ja mutterit reikiin ja kiristä huolellisesti varmistaen, että piilomutterit ovat linjassa rungon kanssa.
Nosta Bantam -teline pystyasentoon ja kiristä rungon pultit uudestaan



Kelattavan säätö & käyttö

Lukitaksesi tai vapauttaaksesi renkaat, käännä rengasta neljänneskierröksen verran.

Käytä kelausvanteen säätöä asentaaksesi työntörenkaat eteen itseliikkumista varten. Kiristä kunnolla paikalleen.

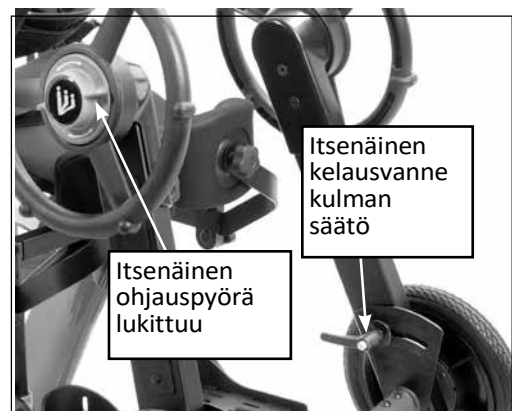

Säätäminen & Käyttö

Kaasusylinteri

Aseta jalka polkimelle ja nosta käyttämällä kahvaa istuimen takana nostaaksesi telineen seisovaan asentoon. Näin voi joutua tekemään myös, kun käyttäjää lasketaan takaisin istuma-asentoon.

Jalkalaudat



Varoitus: Älä koskaan säädä jalkalevyjä lapsen ollessa seisovassa asennossa.



Varoitus: Vältä sormien joutumista säätökoloihin.

KUVA A - Korkeus-Vakiojalkalevyissä on ainoastaan korkeudensäätö. Löystytä kiinnike, joka yhdistää jalkatuen istuimeen säätääksesi jalkalevyn korkeutta.

Monisäädettävissä jalkalevyissä on useampia säätömahdollisuuksia:

KUVA B - Jalkalevy-Löystytä kiinnikkeitä kallistaaksesi jalkalevyä.

KUVA C - Adduktio-Löystytä kiinnikkeitä liu'uttaaksesi jalkalevyt toisiinsa kiinni..

KUVA D - Etuosa-Löystytä mutterit jalkalevyjen alta ja liu'uta jalkalevyt paikalleen.

KUVA E – Aorauskulma - Löystytä mutterit jalkalevyjen alta ja liu'uta levyt paikoilleen.

KUVA F – Levitys - Löystytä kiinnikkeet levittääksesi jalkalevyt erilleen, kiristä kiinnikkeet. Löystytä mutterit jalkalevyjen alta vetääksesi levyt erilleen.

Kiristä mutterit aina huolellisesti.

Polvituet

KUVA G - Tavallisissa polvituissa on ainoastaan syvyyden säätö jar otaatio. Säätääksesi polvitukia löystytä mutterit ja liikuta tuki paikalleen.


Kiristä kunnolla, kunnes oikea paikka löytyy.

KUVA H - Swing-Away -polvisuojat heilahtavat pois edestä päästämällä irti punaisesta nappulasta. Niissä on myös leveyden ja korkeuden säädöt.




Varoitus : Tee säätöjä polvisuojille ainoastaan, kun lapsi on istuma-asennossa.


KUVA . A
Korkeus

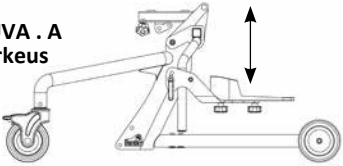


KUVA . B
Jalkalevy

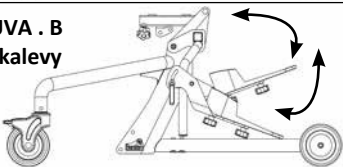


KUVA . C
Adduktio

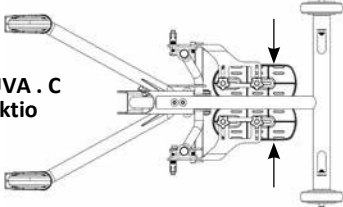


KUVA . D
Etuosa

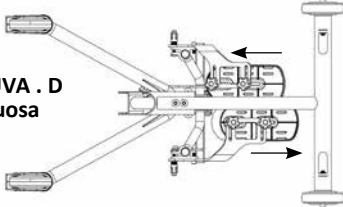


KUVA . E
Aorauskulma

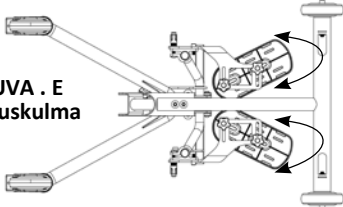


KUVA . F
Levitys

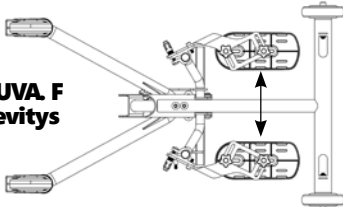

KUVA . G
Standardi polvi tuet

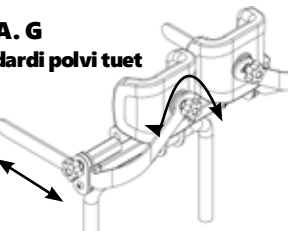

KUVA . H
Swing-Away polvi tuet

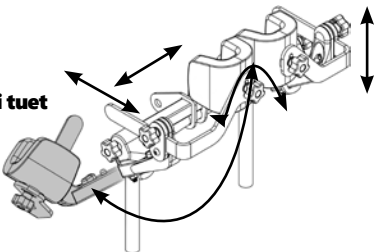

Istuimen Syvyys/selkänojan kulma/ selkäosan Korkeus

 **Varoitus:** Älä säädä istuimen syvyyttä, kun lapsi käyttää telinettä.

 **Varoitus:** Varmista, että istuimen putken ja säätövarren värit täsmäävät.
Poista ensin Shadow Tray -pöytälevy ja nosta istuin pystyyn pienessä kulmassa.


32. Löysää mutterit istuimen putkessa ja säätövarressa.
Älä ruuvaa muttereita kokonaan irti istuinta säätäessäsi.
Bantam **Extra Small** -mallin selänkulman säädöt sijaitsevat lukitusmutterin yllä. Selkäkulman säädön värit alkavat vihreästä (suurin) siniseen (pienin).
Bantam **Small** -mallin kulman säädöt ovat lukitusmutterin alapuolella.
Kulman säädön värit alkavat sinisestä (pienin) vihreään (suurin).

33. Lyhyempään asetukseen muuttaminen: Säädä säätövarsi (selkäkulma) ensin päästämällä irti jousinapista ja liikuta sitä kahden reiän verran kerrallaan. Liikuta sitten istuimen tukea (istuimen syvyys) yksi reikä kerrallaan.
Jatka näin toimimista, kunnes löydät halutun asetuksen ja säätöjen värit täsmäävät.

Pidempään asetukseen muuttaminen: Säädä istuimen putkea (istuimen syvyys) ensin päästämällä lukitus irti ja liikuttamalla putkea yhden reiän verran kerrallaan. Sen jälkeen siirrä säätövarsta (selkäkulma) enintään kaksi reikää kerrallaan.
Jatka näin, kunnes olet löytänyt sopivan säädön ja säätöjen värit täsmäävät.

Huomio: Säätämistä helpottaaksesi voit joutua nostamaan telinettä hieman istuinsäätöjä tehdessä.

Kiristä istuin ja säätövarret paikoilleen, kun olet löytänyt halutun kulman.

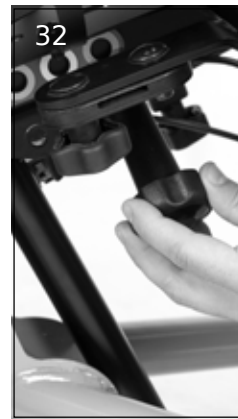

Lantiotuki/vartaloguet vaihtoehdot


34. Vaihtoehdotiset lantiotuet voidaan irrottaa kuljetuksen ajaksi. Lantiotuen leveyttä voi säätää löystyttämällä mutterit istuimen alta. Löystytä mutteri sivusta säätääksesi lantiotuen leveyttä. Kiristä aina huolellisesti.

Lantiotuessa on lukuisia kiinnitysreikiä takapuolella, jotka sallivat useita eri asentoja pysty- ja vaakatasossa. Tuet voidaan myös kiinnittää suoriin 90:n, 180:n ja 270:n asteen kulmiin.


35. Vaihtoehdotinen vartaloguet voidaan poistaa kuljetusta varten. Vartaloguten leveyttä voi säätää löystyttämällä muttereita telineen takaosassa. Kiristä aina huolellisesti.

Vartalogutissa on lukuisia kiinnitysreikiä, jotka sallivat lukuisia eri asentoja pysty- ja vaakatasossa. Tuet voidaan kiinnittää suoriin 90:n, 180:n ja 270:n asteen kulmiin.

Tarkasta sopivuus ja mahdolliset esteet asettamalla teline pystyasentoon ja takaisin istuma-asentoon (ilman käyttäjää istuimella), sillä tuet eivät välttämättä toimi kunnolla kaikissa asennoissa.

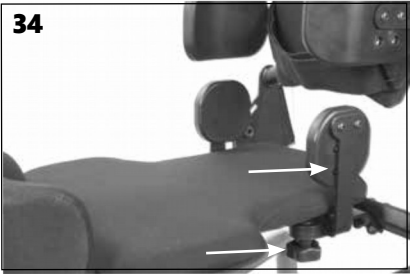

Lantiotuet

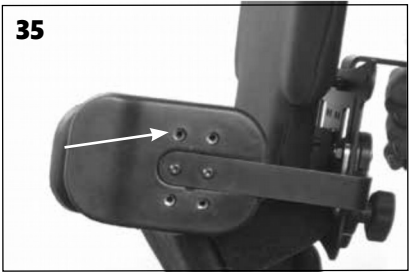

Vartaloguet



Lisäosien kiinnitys

36. Lisäosien kiinnitystelinet on telineen takaosassa ja sitä voi hyödyntää usein eri tavoin. Keskellä olevia reikiä voidaan käyttää erilaisia päätukia varten. Reiät löytyvät myös rintaliivejä, rintavöitä ja vartalogut varten. Kiinnitysvarsi on standardi jokaisessa mallissa.

Liivin kiinnitys

37. Aseta liivin kiinnikkeet paikoilleen kuvan mukaisesti.

38. Kun kiinnike on paikallaan, vedä takaisin kunnes kiinnike on paikallaan tiukasti.

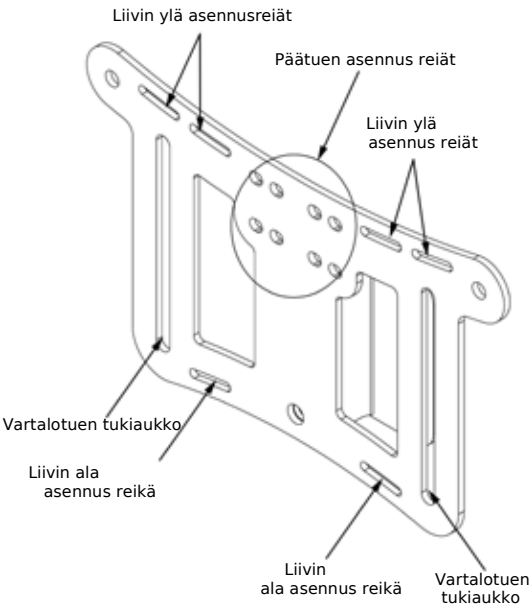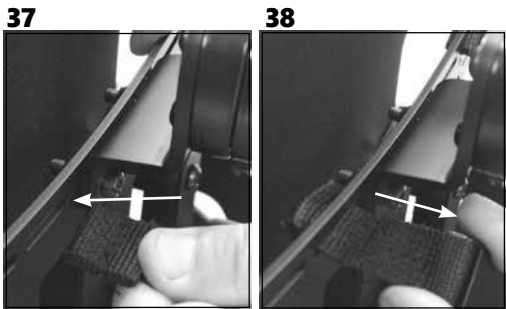

Ohjaimen käyttö

Ohjain on suunniteltu helpoksi ja mukavaksi käyttää käyttäjää ajatellen. Ohjaimessa on kaikki tarvittava makuuasentoa varten.

39. Ohjaimessa on kolme asentoa, Sit-to-Stand -tila, neutraalitila ja makuutila/kallistus.

40. Ohjaimessa on jousella toimiva turvakatkaisin (punainen), joka estää tahattoman tilan vaihdon. Katkaisijaa on nostettava ylös, ennen kuin käyttötilaa voidaan vaihtaa.

Istumasta seisontaan -tila (sit to stand)

41. Teline on lukittu istumasta seisontaan – tilaan, kun jalkatuen kiinnike on lukittu runkoon. Huomaa, että vaikka ohjain on asetettu istumasta seisontaan -tilaan, jalkatuen kiinnikkeen pitää olla kohtisuorassa lattiaan ja lukittuna paikoilleen. Jos kiinnike ei ole valmiiksi tässä asennossa, tämä voidaan tehdä seuraavasti :

Työntämällä selkää eteenpäin loppuun asti (noin 90 pystyssä) Työntämällä jalkalaudan kinnikkeet kokonaan alas ja taakse kohti lattiaa sen alueen loppuun.

Teline on lukittu istumasta seisontaan -tilaan, kun kuuluu kilahdus.

Jos vain siirrät selkä- tai jalkatukia eteen- tai taaksepäin, teline ei ole vielä lukittu istumasta seisontaan -tilaan.

Istumasta seisontaan -tila mahdollistaa käyttäjän vaihdella istuma- ja seisoma-asennon välillä. Istuin nousee ja laskee, polvi- ja lonkkakulmat muuttuvat selkäosan ja jalkatukienputkien kulmaa muuttamatta. Tämä pitää potilaan ylävartalon pystysuorassa koko liikkeen ajan.

Tärkeää: Kaikki istuimen syvyysasetukset ja säädöt tulee tehdä ohjaimen ollessa Istumasta seisontaan -tilassa.



Ohjaimen käyttö

Neutraali tila

42. Ohjain tulisi asettaa neutraali tilaan vain kun vaihdetaan istumasta seisontaan (sit to stand) -asennosta Makuutilan (supine) käyttöön.

Ohjainta ei saa jättää neutraaliin tilaan, jos käyttäjä on Bantam-seisomatelineessa.
Neutraalissa tilassa teline ei anna käyttäjälle mitään tukea.

42



43. Neutraali tila mahdollistaa polvi- ja selkäkulman säädön vapaasti.

43



Ohjaimen käyttö

Makuutila/kallitus (Supine)

 **Varoitus:** Kunnolla kiinnitettyä ja säädettyä päätukea tulee AINA käyttää makuutilassa.

44. Teline on lukittu kallistustoimintoon, kun ohjain on Supine - asentoon.

Lonkan ja polven nivelkohdat on lukittu määritettyyn kulmaan ja niitä voi muuttaa vasta kun makuu-tila on kytketty pois päältä. Käyttäjä voidaan kohottaa pystysuoraan asentoon tai kallistaa makuu asentoon, kun laite on makuutilassa.

45. Jos laite on makuu/kallistus (supine) tilassa, voit nostaa telinettä pystyyn vain sen verran, että jalkatuen putket ovat kohtisuorassa lattiaan nähden. **ÄLÄ YRITÄ NOSTAA TÄMÄN PISTEEN YLI.** Pakotettaessa laitetta yli sen pysähdyspisteen, voi tämä vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vammoja.

Kun ääriasento on saavutettu makuutila/tiltti (supine) -toiminnossa ja jalkatuen putket ovat kohtisuorassa lattiaan nähden, mutta käyttäjä haluaa pystympään asentoon: Siirrä ohjain istumasta seisomaannousu -asentoon (sit to stand). Tällä toiminnolla voidaan jatkaa pystympään asentoon vahingoittamatta laitetta.

 **Varoitus:** Lukitsemismekanismi makuutilassa on erittäin voimakas.

Hydraulisen pumpun tuntumasta tai Pow'r Up -lisäosan sähkömoottorin äänestä käyttäjä voi helposti huomata, milloin makuutilan mekaaniset rajoitukset on saavutettu. Mikäli näiden mekaanisten lukitusten päälle ladataan liikaa painoa, lukot tai telineen runko saattavat vaurioitua.

Takuu ei kata laitteen väärinkäytöstä aiheutuneita vahinkoja.



Shadow Tray-pöydän käyttö

- ⚠ **Varoitus:** Näitä säätöjä on syytä tehdä ainoastaan telineen ollessa istuma-asennossa.
- ⚠ **Varoitus:** Tue aina pöytälevyä kun löystytät sen kiinnittimiä.
- ⚠ **Varoitus:** Kun pöytälevy on paikallaan, varmista kiinnikkeiden pysyvyys pöytälevyn sivuissa.

Mustan pöytälevyn ja kirkkaan pöytälevyn syvyys

46. Säätääksesi vaihtoehtoisen pöytälevyn syvyyttä, aseta pöytälevyn putket paikoilleen ja linjaa reiät haluttuun syvyyteen ja asenna kiinnitysnupit



47. Säätääksesi pöytälevyn korkeutta, löysää molemmat kiristimet sivuilla ja nosta pöytälevy haluttuun korkeuteen, kiristä huolellisesti.




48 . Säätääksesi pöytälevyn kulmaa, löystytä kiristimet pöytälevyn sivuilla ja käännä pöytälevy haluttuun kulmaan, kiristä huolellisesti.



Swing-Away Shadow pöytälevyn säätö

Mustan muovatun/Säädettävän pöytälevyn korkeus

49. Säättääksesi pöytälevyn korkeutta, löystytä mutterit telineen sivussa ja nosta haluttuun korkeuteen. Kiinnitä huolellisesti.

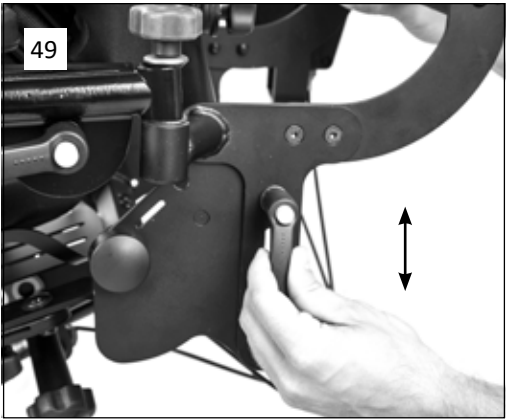

Säädettävän pöytälevyn syvyys

50. Löystytä mutteri pöytälevyn alla ja vedä tai työnnä haluttuun kohtaan. Kiristä huolellisesti.

Säädettävän pöytälevyn kulma

51. Säättääksesi tarjottimen kulmaa, löystytä kiinnikkeitä pöytälevyn sivuissa ja aseta haluamaasi kohtaan. Kiristä huolellisesti.




Varoitus: Näitä säätöjä saa tehdä ainoastaan telineen ollessa istuma-asennossa.



Varoitus: Tue aina pöytälevyä löystyttäessäsi muttereita tai kiinnityksiä pöytälevyä säädettäessä.



Varoitus: Kun pöytälevy on paikallaan, varmista, että sivujen kiinnikkeet ovat kiristetty kunnolla.

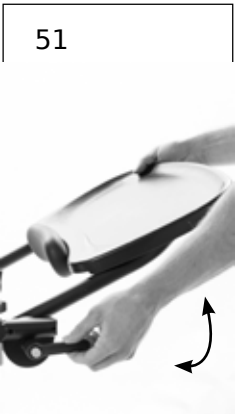


Sivulle taittuvan pöytälevyn lisäosa

52. Löystytä mutteri vain toiselta puolelta, kunnes voit siirtää sivulle taittuvan pöytälevyn sivuun. Pöytälevy kääntyy sekä oikealle, että vasemmalle.

53. Siirrä pöytälevy sivuun kuljetuksen ajaksi.

Huomio: Irrottaaksesi pöytälevyn, löystytä mutterit pöytälevyn molemmin puolin.

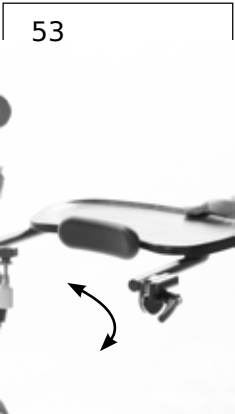

Päätuen säätäminen




54. Säätääksesi pääntuen korkeutta löystytä mutteri selkäosan takaa, siirrä haluttuun kohtaan ja kiristä huolellisesti.

55A. Säätääksesi pääntuen syvyyttä löystytä mutteria pääntuen takaa ja liu'uta haluttuun kohtaan. Kiristä huolellisesti.

55B. Säätääksesi pääntuen kulmaa, löystytä kiinnitintä ja siirrä haluttuun kohtaan. Kiristä huolellisesti.

Jalkatuen säätäminen

56. Säädä jalkatukea löystyttämällä punaista jalkatuen kiinnitintä, nosta tukea ylös tai alas haluttuun kulmaan ja kiristä huolellisesti. Jalkatuen voi myös kääntää suuremman liikkumavaran saamiseksi.

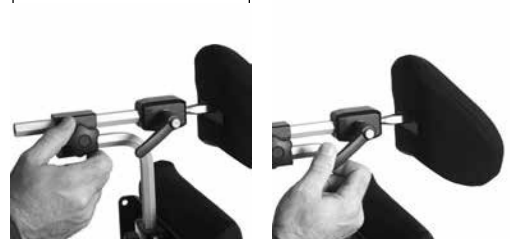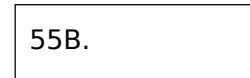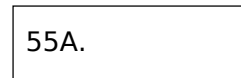

Sähkötoimisen nostimen käyttö

Akun lataaminen

EasyStand Bantam -telineen sähkötoiminen nostin käyttää kahta suljettua 12 voltin, 2,9 ampeerin lyijyakkua. Telineen voi nostaa noin 100 kertaa täyteen ladatulla akulla. Teline antaa äänimerkin, kun akkuvirta on alhainen. Lataa akku äänimerkin kuultuasi. Akun täyteen lataaminen kestää noin 8 tuntia. EasyStand Bantam -telineen voi nostaa pystyasentoon akun ollessa latauksessa. Laturi havaitsee täyden akun ja pitää yllä jatkuvaa virtaa ja huolehtii siitä, ettei akku pääse yllilatautumaan. Kun akun lataustaso ylittää tehtaan asettaman rajan, laturin vikavirtasuojia estää volttimäärän ylittämästä tätä rajaa. Tehdasasetus estää akun runsasta elektrolyyttikulutusta, joka voi olla seurausta yli latauksesta. Laturi löytyy työkalupussista telineen takaa.

VAROITUS: Käytä ainoastaan Altimate Medicalin Linak -laturia, mallinumero 10CH01S-00, ladataksesi Pow'r Up -nostimen.

1. Kytke laturin johto seinään. Laturin vihreä valo syttyy ja ilmaisee avoimen virtapiirin.
2. **KUVA A-** Kytke laturin johto käsiohjaimen kylkeen. Laturin valo muuttuu keltaiseksi merkiksi siitä, että akkua ladataan.
3. **KUVA B-** Teline toimitetaan kytkemättömänä akkuihin. Kytke laitteelle virran antava valkoinen johto ja musta johto, joka antaa virran ohjaimelle. Mustassa johdossa on pykälä, joka helpottaa johdon paikalleen asettamista. Lataa akku täyteen ennen käyttöä. *Huomio:* Valkoisessa johdossa on kumiprikka, joka saattaa tehdä johdosta tiukan, joka puolestaan saattaa tehdä johdon paikalleen asettamisen vaikeaksi. Varmista aina, että johto on kunnolla kiinni akussa.
4. Kun akut ovat täynnä, laturin valo muuttuu vihreäksi.
5. Lataa akut täyteen kolmen kuukauden välein tai useammin silloin, kun laite ei ole käytössä.


VAROITUS: Bantam Pow'r Up -nostinta ei ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Käyttömäärä enintään 5%, maksimissaan 1 minuutti / 19 minuuttia.

Nostimen Nosto – Paina UP (nuoli ylöspäin) ohjaimessa nostaaksesi istuimen.

Nostimen Laskeminen – Paina DOWN (nuoli alaspäin) ohjaimessa laskeaksesi istuimen.

VAROITUS: Varmista, että kaapelit ovat kytketty ohjeiden mukaisesti ennen käyttöä. Älä anna kaapelien laahautua lattialla tai tarttua esineisiin.

KUVA A

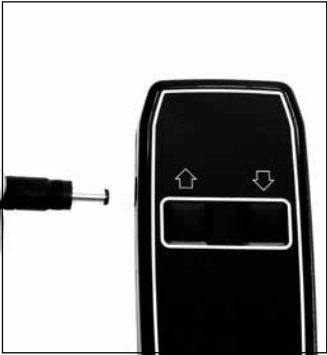

KUVA B



Mekaanisen hätävapautuksen aktivointi



VAROITUS: Hätäkatkaisimen käyttäminen palauttaaksesi teline istuma-asentoon saattaa aiheuttaa vaurioita istuimelle. Käytä mekaanista hätäkatkaisinta ainoastaan hätätilanteissa.

Kaikissa Altimate Medicalin sähkönostintuotteissa on mekaaninen vapautin, joita tulee ainoastaan käyttää hätätapauksissa.

KUVA C-Vapautin sallii käyttäjän palauttamisen istuma-asentoon silloin, kun akkuvirta loppuu käyttäjän ollessa seisovassa asennossa. Laite vetäytyy alas ainoastaan, jos vapautin kytketään ja istuimen päällä on painoa. Vapautin löytyy istuimen vasemmalta puolelta ja sen tunnistaa punaisesta merkistä, jossa sana “EMERGENCY”.

1. Aktivoidaksesi hätävapauttimen, irrota pikapinni istuimen alta.
2. Purista kahvaa ja jos tarpeellista, paina kahvaa alaspäin.

KUVA . C



Akun vaihto

Akut sijaitsevat suljetussa tilassa Pow’r Up -nostimen hallintalaatikossa (musta laatikko, johon johdot kytketään). Kun akut ovat tulleet käyttöikänsä päähän ja kaipaavat vaihtoa, älä avaa hallintalaatikkoa; ota yhteys Altimate Medicalin Asiakaspalveluun tai paikalliseen edustajaasi ja kysy korvaavaa hallintalaatikkoa. Suosittelemme, että akut vaihdettaisiin neljän vuoden välein.

Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen ja kysy ohjeita vanhojen akkujen hävittämisestä.

IP Luokitus

IP -luokitus on laatuarvo, joka ilmaisee pölyn, veden ja sähkölaitteisiin kohdistuvien iskujen kestävyys tason. Pow’r Up -nostimen komponenteilla on IP21 -luokitus.

IP21 määräytyy seuraavalla tavalla:

Ensimmäisen numeron määritelmä: 2 – Suojaa kiinteiltä, tuntemattomilta esineiltä, jotka ovat läpimitaltaan 12,5mm ja suurempia.

Toisen numeron määritelmä: 1 – Suojaa pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta..

Elektromagneettinen yhteensopivuus

Pow’r Up -nostimen osat on suunniteltu ja testattu täyttämään EMC -vaatimukset.

On hyvin epätodennäköistä, että EasyStand -telineesi kohtaa ongelmia riittämättömästä elektromagneettisesta yhteensopivuudesta johtuen. Siitä huolimatta, jos huomaat Pow’r Up -nostimen käyttäytyvän epätavallisesti (katkonaisesti) ja telinettä käytetään mahdollisesti häiriötä tekevien laitteiden, kuten matkapuhelinten, mikroaaltouunien tai radiomastojen läheisyydessä, tämä saattaa johtua elektromagneettisesta häiriöstä. Jos tällaista ilmenee, käytä mekaanista vapautinta laskeaksesi teline istuma-asentoon ja siirrä teline pois häiritsevän laitteen läheisyydestä.

Ilmoita mahdollisista elektromagneettisista häiriöistä AML:n Asiakaspalveluun.

Valmistajan Ohjeet – Elektromagneettiset Päästöt		
EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla esitellyssä elektromagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän on syytä varmistua siitä, että käyttöympäristö vastaa tätä.		
Päästö testi	Compliance	Elektromagneettisen Ympäristön Noudatt. - Ohjeistus
Radioenergia päästöt CISPR 11	Ryhmä 1	Radioenergiapäästöt CISPR 11 Ryhmä 1 EasyStand Bantam -teline käyttää radioenergiaa ainoastaan sisäisiin toimintoihin.
RF emissions CISPR 11	Luokka B	Näinollen radioenergiapäästöt ovat hyvin alhaiset, eivätkä täten aiheuta häiriötä ympärillä oleviin sähkölaitteisiin. EasyStand Bantam -telinettä voi käyttää kaikissa ympäristöissä, mukaanlukien kotona ja siellä, missä kulkee tavallisestikin kotitalouksissa käytettävä sähkövirta.
Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2	Luokka A	
Jännitteen vaihtelu/ Välkkymispäästöt IEC 61000-3-3	noudattaa	

Valmistajan Ohjeet – Elektromagneettinen Immunitaetti			
EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla näytetyssä ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistua siitä, että laitetta käytetään oikeanlaisessa ympäristössä.			
Immunitaetti testi	IEC 60601 Testi taso	Noudatus taso	Electromagneettinen Ympäristö - Ohjeistus
Elektrostaattinen Purkautuminen (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV kontakti ± 8 kV ilma	± 6 kV kontakti ± 8 kV ilma	Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai keraamista laattaa. Jos lattia on tehty synteettisestä materiaalista, ilmankosteuden tulee olla vähintään 30%. Virtalähteiden syötön tulee olla tyypillisen liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa.
Virtapiikit IEC 61000-4-4	± 2 kV virta lähteille ± 1 kV sisään/ ulostulo linjoille	± 2 kV virta lähteille ± 1 kV sisään/ ulostulo linjoille	Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa. Virtapiikit, häiriöt ja volttimäärän vaihtelut virtalinjoissa
Aalto IEC 61000-4-5	± 1 kV linjasta linjaan ± 2 kV linjasta maahan	± 1 kV linjasta linjaan ± 2 kV linjasta maahan	Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa.
Virtapiikit, häiriöt ja volttimäärän vaihtelut virtalinjoissa IEC 61000-4-11	<5 % U _T (>95 % dip in U _T) for 0,5 cycle 40 % U _T (60 % dip in U _T) for 5 cycles 70 % U _T (30 % dip in U _T) for 25 cycles <5 % U _T (>95 % dip in U _T) for 5 s	<5 % U _T (>95 % dip in U _T) for 0,5 cycle 40 % U _T (60 % dip in U _T) for 5 cycles 70 % U _T (30 % dip in U _T) for 25 cycles <5 % U _T (>95 % dip in U _T) for 5 s	Virtalähteiden syötön laatu tulee olla tyypillisen liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa. Mikäli käyttäjä vaatii EasyStand Bantam -telineen käyttöä sähkökatkosten aikana, EasyStand Bantam -telineen on syytä saada virtansa häiriöttömästä virtalähteestä tai akusta.
Virran taajuus (50/60 Hz) Magneetti kenttä IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Virran magneettikentän tulee olla tyypillisen liiketilan tai sairaalaympäristön tasoa.
HUOMIO: U _T tarkoittaa vaihtovirran volttimäärää testiolosuhteissa..			

Valmistajan Ohjeistus – Elektromagneettinen Immuneiteetti

EasyStand Bantam -teline on tarkoitettu käytettäväksi alla kuvatussa elektromagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistua siitä, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.			
Immuneiteetti testi	IEC 60601 Testi taso	Noudatus Taso	Elektromagneettinen Ympäristö - Ohjeistus
Johdettua radioener. IEC 61000-4-6 Säteilevä radioener. IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz 3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 Vrms 3 V/m	Kannettavia radioenergiaviestimiä ei tule käyttää laskettua suositusetaisyyttä lähempänä EasyStand Bantam -telinettä. Suositeltu käyttöetaisyys $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz <i>P</i> tarkoittaa lähettimen maksimivirtaa watteina (W) lähettimen valmistajan tietojen mukaan ja <i>d</i> on suositusetaisyys metreinä (m). Radioenergian vahvuus, kuten elektromagneettikyselyssä <i>a</i> on selvitetty, tulee olla alhaisempi kuin noudatustaso jokaisella taajuudella <i>b</i> Häiriöitä saattaa ilmetä, mikäli lähellä olevassa laitteessa on seuraava merkintä: 
<i>HUOMIO 1: 80 MHz - 800 MHz, korkeampi taajuusalue pätee.</i> <i>HUOMIO 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikkiin tilanteisiin.</i> <i>Elektromagneettiseen kenttään vaikuttavat tekijät, kuten heijastukset rakennuksista, esineistä ja ihmisistä.</i>			
^a FiKentävahvuudet lähettimistä, esim. Radioasemista, matkapuhelimista ja lankapuhelimista. Radiot, harrastelijaradiot, AM- ja FM -radiolähetykset ja TV-lähetykset eivät ole teoreettisesti tarkasti ennustettavissa. Jotta elektromagneettisen kentän voisi määritellä, mittausta kannattaa harkita. Jos elektromagneettikentän vahvuus on suositeltua suurempi, EasyStand Bantam -telineen käyttöä tulee tarkkailla normaalin toimivuuden takaamiseksi. Mikäli epätavallista käyttäytymistä ilmenee, lisätoimet saattavat olla tarpeen, kuten esim. EasyStand Bantam -telineen siirtäminen ja käyttö toisaalla. ^b Taajuusalueella 150 kHz - 80 MHz, kentän vahvuus tulee olla alle 3 V/m.			

Suosittelut käyttöetäisyydet radioenergiaa käyttävien kommunikointilaitteiden ja EasyStand Bantam -telineen välillä

EasyStand Bantam -telinettä tulee käyttää ympäristössä, jossa säteilevän radioenergian määrä ja siitä aiheutuvat häiriöt ovat hallinnassa. Telineen omistaja voi estää elektromagneettisen häiriön synnyn säilyttämällä vähimmäisetäisyyden kannettaviin kommunikointivälineisiin (lähettimiin), kuten alla näkyy kommunikointivälineiden maksimisäteilystä riippuen.			
Lähettimen maksimi säteily W	Vähimmäisetäisyys lähettimen taajuuden perusteella m		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2 .5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23


Lähettimille, joiden maksimilähetystaajuutta ei ole ylle listattu, suositeltu vähimmäisetäisyys d metreissä (m) voidaan arvioida käyttämällä kaavaa, jolla lasketaan lähettimen taajuus, jossa P on lähettimen korkein virtalähtö watteina (W) lähettimen valmistajan tietojen perusteella.

HUOMIO 1: 80 MHz - 800 MHz, korkeampi taajuusalue pätee..

HUOMIO 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikkiin tilanteisiin.

Elektromagneettinen kenttä kokee muutoksia heijastuessaan rakennuksista, esineistä ja ihmisistä.

Lisä- & Varaosat

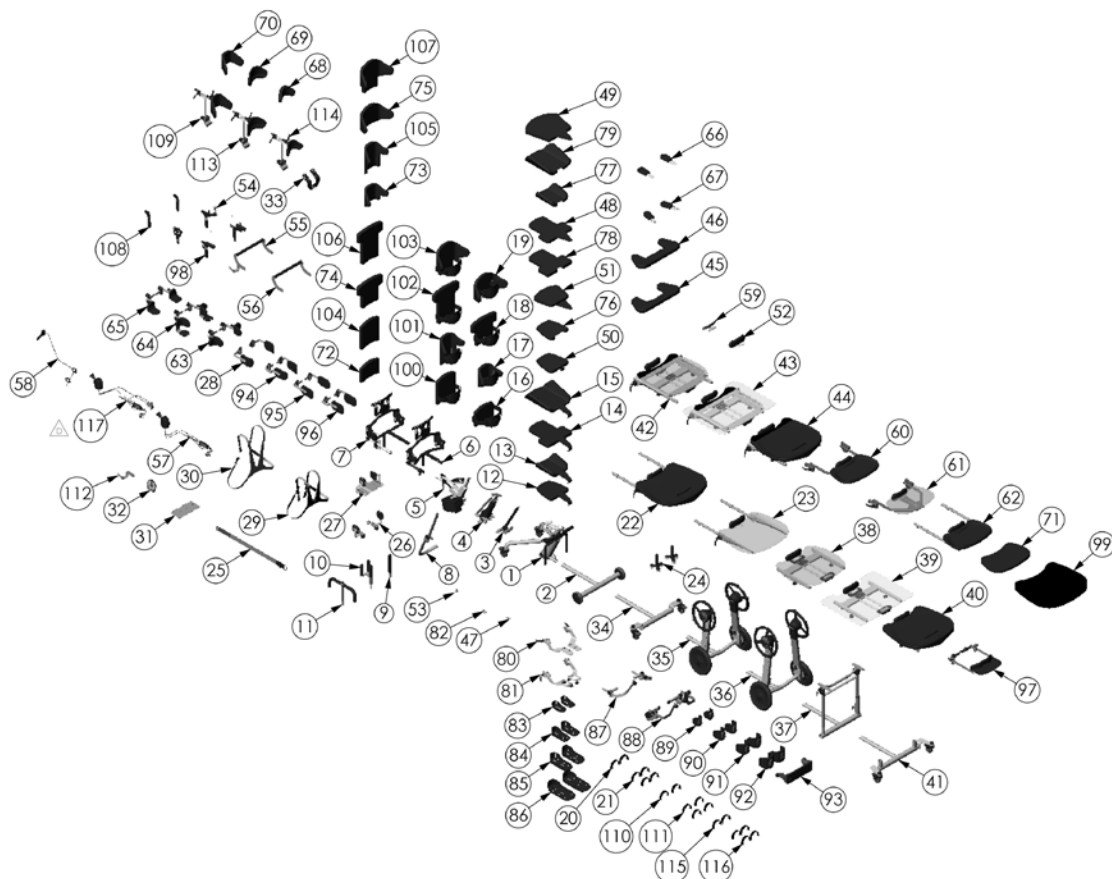

ITEM NO.	PART NO.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	NAME
1	150000	ASMBLY FRAME PEDIATRIC	40	150148	TRAY ASMBLY BLK XTEND MOTION	79	150085	SLIP COVERS SEAT COMFY SMALL
2	150016	ASMBLY NO-TABLE FRONT	41	150170	H-FRAME BANTAM SWIVEL WHEEL	80	150250	FOOT PLATE STANDARD
3	150018	ASMBLY GAS SPRING PEDIATRIC	42	150188	TRAY ASMBLY CLEAR XTEND MOTION TILT	81	150252	FOOTPLATE MULTI-ADJUST
4	150020	ASMBLY HYDRAULIC LIFT PEDIATRIC	43	150190	TRAY ASMBLY O-SIZE XTEND MOTION TILT	82	150253	NON SUPINE ASSEMBLY
5	150022	ASMBLY ELECTRIC LIFT BANTAM	44	150186	TRAY ASMBLY BLK XTEND MOTION TILT	83	150254	FOOT HOLDERS 6" L X 3" W
6	150100	BACK REST ASMBLY XS	45	150156	ASSEMBLY ELBOW PAD 9.25" CUTOUT	84	150256	FOOT HOLDERS 7.75" L X 3.25" W
7	150102	ASMBLY BACK REST SMALL	46	150160	ASSEMBLY ELBOW PAD SM	85	150258	FOOT HOLDERS 9.75" L X 4" W
8	NG50328	HANDLE PUMP REMOVABLE/ADJ	47	NG50499	ASSEMBLY BEARING SEAT DEPTH	86	150260	FOOT HOLDERS 11.75" L X 5" W
9	NG50260	HANDLE STANDARD TOP	48	130040	UPHOLSTRY SEAT STANDARD SM	87	150262	KNEE ASMBLY STANDARD SMALL
10	NG50044	QUAD GRIP OPTION	49	130061	UPHOLSTRY SEAT COMFY SMALL	88	150264	SWING-AWAY KNEES BANTAM
11	NG50070	ACTUATOR HANDLE EXTENSION EVOLV LG	50	130058	SEAT COVER STANDARD XS	89	150266	KNEE PADS 2.5"
12	150042	ASMBLY SEAT STANDARD XS	51	130059	UPHOLSTRY SEAT COMFY XS	90	150268	KNEE PAD 3.25"
13	150044	ASMBLY SEAT COMFY XS	52	130046	PAD FRONT BANTAM	91	150270	KNEE PADS 4.25"
14	150046	ASMBLY SEAT STANDARD SM	53	A5614	ASMBLY GAS SPRING LOCK OUT	92	150272	KNEE PADS 5"
15	150048	ASMBLY UPHOLSTRY COMFY SEAT SM	54	150228	ASMBLY SHADOW SUPPORT TRAY PED	93	150276	ASMBLY KNEE PAD SOFT MPS
16	150050	ASMBLY BACK REST STANDARD XS	55	150212	HANDLE ASSEMBLY SUPINE	94	150248	ASMBLY LATERAL GUIDES PED
17	150052	ASMBLY UPHOLSTRY FORM TO FIT BACK XS	56	150230	HANDLE ASSEMBLY NON SUPINE	95	150274	ASMBLY LATERAL GUIDES PED
18	150054	ASMBLY BACK REST STANDARD SM	57	150234	SUPINE OPTION SMALL BANTAM	96	150275	ASMBLY LATERAL GUIDES PED
19	150056	ASMBLY UPHOLSTRY COMFY BACK SM	58	150236	HAND ACTUATOR ASSEMBLY	97	150246	MOBILE TABLE BANTAM
20	150080	ASMBLY FOOT STRAP PED	59	150038	ASMBLY CHEST PAD MOUNT STANDARD	98	150014	ASMBLY SHADOW SUPPORT TRAY PED
21	150082	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED	60	A5600	ASMBLY TRAY SWING AWAY MPS	99	150093	PADDED SLIP COVER LARGE TRAY
22	150074	ASMBLY TABLE STANDARD PEDIATRIC	61	A5602	ASMBLY TRAY SWING AWAY CLEAR MPS	100	150238	ASMBLY BACK REST STANDARD XS
23	150076	ASMBLY TABLE CLEAR PEDIATRIC	62	150104	TABLE STANDARD 11" L X 19" W	101	150240	ASMBLY UPHOLSTRY FORM TO FIT BACK HIGH XS
24	NG50042	SUPPORT GRIP OPTION	63	150216	LATERALS W/ELBOW STOP 8"-12"	102	150242	ASMBLY BACK REST STANDARD HIGH SM
25	150046	POSITIONING BELT ADJUSTABLE 34.5" - 44.5"	64	150218	LATERALS W/ELBOW STOP/ARM REST 8"-12"	103	150244	ASMBLY UPHOLSTRY COMFY BACK SM
26	150007	ASMBLY HIP GUIDES PEDIATRIC	65	150220	ELBOW STOP W/ARM REST	104	150089	SLIP COVER BACK HIGH XS
27	150009	ASMBLY HIP GUIDES XS	66	A5604	ASMBLY FOREARM WINGS MPS	105	150090	SLIP COVER BACK COMFY HIGH XS
28	150008	ASMBLY LATERAL GUIDES PED	67	A5606	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS	106	150091	SLIP COVER BACK HIGH SM
29	150088	CHEST VEST 9.5" L X 9" W	68	A5635	SLIP COVER HEAD REST XS	107	150092	SLIP COVER BACK COMFY HIGH SM
30	150086	CHEST VEST 11" L X 5.5" W	69	A5636	SLIP COVER HEAD REST SM	108	150282	ASMBLY SHADOW SUPPORT TRAY PED
31	80809	FOOT POUCH	70	A5637	COVER HEAD REST CONTOUR SM	109	150284	ASMBLY HEAD REST XS
32	80246	SEAT ANGLE LOCATOR	71	A5638	PADDED SLIP COVER TRAY MPS	110	150436	ASMBLY FOOT STRAP 15"L
33	150128	ASMBLY HIGH MOUNT CHEST VEST BRKT	72	130078	SLIP COVER BACK 11"-13"H	111	150438	ASMBLY FOOT STRAP SECURE 15"L
34	150116	ASMBLY SWIVEL CASTER BANTAM	73	130079	SLIP COVER BACK COMFY 15"-17"H	112	110437	BRACKET CONTROLLER
35	150150	MOBILE OPTION BANTAM	74	130080	SLIP COVER BACK STANDARD 14"-16"H	113	150044	ASMBLY HEAD REST SM
36	150177	MOBILE OPTION BANTAM TAIL	75	130081	SLIP COVER BACK COMFY SM	114	150062	ASMBLY HEAD REST XS
37	150192	FRAME FRONT BANTAM SWING AWAY	76	130082	SLIP COVER SEAT STANDARD XS	115	150288	ASMBLY FOOT STRAP PED
38	150144	TRAY ASMBLY CLEAR XTEND MOTION	77	130083	SLIP COVER SEAT COMFY XS	116	150290	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED
39	150146	TRAY ASMBLY O-SIZE XTEND MOTION	78	130084	SLIP COVER SEAT STANDARD SM	117	150294	SUPINE OPTION W/FAILSAFE BANTAM

Seisominen

Esteet

Seisominen/painon kannattelu ei välttämättä ole mahdollista seuraavista syistä:

Jos käyttäjällä on vakavia kontraktuuria tai rajoitteita liikeradoissa

Jos käyttäjällä on osteoporoosi tai hauraat luut

Jos käyttäjällä on posturaalinen ortostaattinen hypotensio

Jos käyttäjällä on sijoiltaan olevia niveliä



Varoitus: Seisomisohjelmaa harkitsevien asiakkaiden tulee konsultoida fysioterapeuttia ja lääkäriä määrittääkseen mitä mahdollisia esteitä on olemassa. Kliinikkojen on käytettävä parasta mahdollista arvostelukykyyään määrittääkseen käyttäjän tarpeet. Seisomisohjelmasta päättää yksilökohtaisesti käyttäjän hoitoryhmä (fysioterapeutti, kuntouttaja, kuntoutusteknologian ammattilainen/laitteen välittäjä ja kuluttaja). Ota huomioon kaikki esteet määritelläksesi onko seisomis/painonkannatteluohjelma heille sopiva.

Seisominen



Varoitus: Konsultoi aina fysioterapeuttia ennen seisomisohjelman aloittamista.



Varoitus: Älä koskaan säädä EasyStand -telinettä, kun käyttäjä on pystyasennossa.



Varoitus: Kun teline lasketaan seisovasta asennosta istuvaan, pidä kädet ja jalat poissa istuimen alla olevasta mekanismista.

Ylläpito

Puhdistaminen/Desinfiointi

- Puhdista EasyStand Bantam -teline miedolla, hankaamattomalla desinfiointiaineella tai saippualla ja vedellä.
- Tarkista EasyStand -teline viikoittain varmistaaksesi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat ovat kunnolla kiinni. Näin tekemättä jättäminen saattaa johtaa putoaviin osiin, joka aiheuttaa lapsille tukehtumisvaaran.
- Älä käytä valkaisuainetta tai muita vastaavia puhdistusaineita EasyStand -telineeseen.
- Desinfiointipyyhkeet ovat turvallisia käytettäväksi metallisilla ja sileillä pinnoilla.
- Käytä kosteaa sientä miedon saippuan tai miedon desinfiointiaineen kanssa.
- Puhdista neopreenit miedon saippuan ja veden kanssa.
- Neopreenipeitteet voidaan irrottaa ja pestä vedellä. Ilmakuivaa peitteet. Irrota ja aseta peitteet takaisin varovasti.
- Älä kuivapese verhoilukankaita.
- Mikäli EasyStand -telinettä käyttää yksi käyttäjä, puhdista teline kuukausittain tai tarpeen mukaan.
- Mikäli EasyStand -telinettä käyttävät useammat käyttäjät, teline tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen.

Uretaanipäällysteiset Kankaat (Dartex tai vastaava)

- Puhdistussuosituksia tulee noudattaa aina ennen aikaisten vaurioiden välttämiseksi.
- Puhdista pintalika kertakäyttöliinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Desinfioi käyttämällä 0.1% natriumhypokloriittia (1000ppm klooria), vahvempia puhdistusaineita ei suositella.
- Huuhtelee puhdistusaineen jäämät vedellä ja kuivalla kankaalla ennen uudelleenkäyttöä tai varastointia.
- Älä silitä.

Hydrauliosien Huolto

- Hydrauliosat ajetaan sisään tavallisesti 50-100 käytön aikana. Esiintyä voi vikinää tai vähemmän sulavaa työntöliikettä. Vastakkaisten osien tiukka yhteensopivuus tuottaa ainutlaatuisen tuntuman ja äänen.
 - Jos hydrauliosat vuotavat öljyä, ota yhteys paikalliseen EasyStand -tuotteiden välittäjään ja pyydä korvaavaa osaa. Tähän tarvitsen EasyStand -telineen sarjanumeron.
 - Älä kohdista liiallista voimaa hydrauliosiin, tai käytä niitä EasyStand -telineen liikutteluun. Tämä saattaa vaurioittaa hydraulipumppua ja se mitätöi myös takuun.
 - Käyttäjän suorittamaa huoltoa ei vaadita. Älä koskaan käytä voiteluainetta, ruokaöljyä, rasvaa tai muuta vastaavaa tuotetta mihinkään tuotteen osaan. Jotkin yhdisteet voivat reagoida tuotteessa käytettyjen tiivisteiden kanssa. Tämä saattaa vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.
 - Älä ylitä suosituspainorajaa.
 - Jos EasyStand -teline on toimitettu alle 50 fahrenheitin (10 celsiusastetta) lämpötilassa, anna hydraulijärjestelmän lämmetä huoneenlämpöön ennen käyttöä. Muussa tapauksessa laite saattaa vaurioitua ja tulla käyttökelvottomaksi.
 - Kun laite on täysin pystyasennossa, hydraulijouset saattavat palautua hieman takaisin. Tämä on normaalia.
 - Aina ei ole tarpeellista kääntää hydraulijousen vartta koko matkaa taaksepäin istuinta laskiessa.
- Mikäli istuimen laskeminen on vaikeaa, yritä kääntää kahvaa eri asentoihin.
- Mikäli teline on pystyasennossa eikä kukaan käytä sitä, istuimelle on annettava painetta samalla, kun hydraulijousen kahvaa käännetään taaksepäin.

Hydraulisen laitteen ilmaus

EasyStand -telineen hydrauliseen järjestelmään saattaa joutua ilmaa. Tämä johtuu yleensä telineen kuljetuksesta ja on täysin normaalia. Seuraa huolellisesti alla olevia ohjeita, sillä manuaaliset hydraulikkajärjestelmät eivät toimi oikein, ellei ilmaa saada järjestelmästä ulos. Laitteen on oltava huoneenlämmössä tätä toimenpidettä varten.

1. Pumppaa kahvaa, kunnes laite on ääriasennossa.
2. Jatka pumppaamista hitaasti noin 10 kertaa lisää. Näin ilma poistuu järjestelmästä.

Ongelmatilanteet

Säärimitta on liian lyhyt seisojalle.

Käännä ja vaihda jalantukia vasemmalta oikealle.

Yksi pöydän putkista on pidempi kuin toinen. Onko tämä normaalia?

Kyllä, tällä tavalla pidempi tuki on helpompi linjata ennen lyhyempää putkea.

Saimme juuri Bantam -telineemme ja pöytälevyssä on pikapinni, joka pitää tarjottimen paikallaan, mutta molemmin puolin on kaksi pulttia. Käytänkö pultteja kiristääkseni pöytälevyn paikalleen?

Pultit ja mutterit ovat pöytälevyn syvyyden säätöä varten. Niitä voi siirtää mihin tahansa reikään, kunnes pöytälevy on sopivalla syvyydellä. Säättääksesi syvyyttä poista pultit, aseta pöytälevy oikealle syvyydelle ja laita pultit takaisin lähimpiin reikiin. Tämä pysäyttää putket oikealle syvyydelle ja se helpottaa pöytälevyn asentamista. Pöytälevyn kiinnittämistä varten on kaksi pikapinniä kiinni molemmilla puolilla vaijereissa.

Varmista molemmin puolin, että molemmat ovat tallessa.

Kuljetuksessa ne voivat liikkua, joten ensisilmäyksellä ainoastaan toinen puoli on näkyvillä.

Miten tilaan varaosia?

Ota yhteys paikalliseen välittäjääsi ja pidä laitteesi sarjanumero lähettyvilläsi.

Jos et tiedä paikallista välittäjääsi,

soita Altimate Medicalin Asiakaspalveluun (800) 342-8968 ja pidä laitteesi sarjanumero lähettyvilläsi.

Rajoitettu takuu

Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa/kuluttajaa (tai välittäjää, joka ei osta tai myy eteenpäin). Altimate Medical, Inc. antaa takuun EasyStand Bantam -telineen valmistusvioille ja -materiaaleille seuraavasti.

- Teräsrunko – 5 vuoden takuu
- Hydraulijärjestelmä – 2 vuoden takuu
- Verhoiluosat, muovituet, kumiosat, maalatut pinnat, laakerit ja muut osat, joita ei erikseen ole mainittu – 90 päivän takuu

Sähkökäyttöisen nostimen komponenttien takuut:

- Nostolaite & käsikatkaisija – 2 vuoden takuu
- Ohjain & akut – 90 päivää
- Akkulaturi – 90 päivää

Takuuaika alkaa ostopäivästä.

Jos laite on vuokrattu tai muulla tavalla myymätön, takuu aika alkaa Altimate Medicalin alkuperäisestä laskutuspäivästä. Altimate Medicalin takuuajana vialliseksi toteamat tuotteet korjataan tai korvataan Altimate Medicalin määräämässä huoltopisteessä.

ALTIMATE MEDICALIN VASTUU TAKUUN VOIMASSAOLON AIKANA ON RAJATTU EDELLÄ MAINITTUUN MENETTELYYN.

Takuu ei kata osien vaihdosta ja asennuksesta koituvia työkuluja.

Toimituskulut jäävät asiakkaan maksettaviksi. Palautusmaksut maksaa Altimate Medical.

Takuuhuoltoa varten ota yhteys luvalliseen laitteen myyneeseen välittäjään.

Mikäli et saa tyydyttävää takuhuoltoa, kirjoita suoraan Altimate Medicalille alla mainittuun osoitteeseen.

Älä palauta tuotteita tehtaallemme ilman erillistä sopimusta.

RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET:

Takuu ei kata tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai peitetty.

Huoltamattomat, väärinkäytetyt, väärin huolletut, väärin varastoidut tai muuten Altimate Medicalista riippumattomista syistä vaurioituneet tuotteet eivät ole tämän takuun piirissä ja takuun arvioinnista vastaa yksin Altimate Medical. Tuotteet, joita on muokattu ilman Altimate Medicalin kirjallista suostumusta (mukaanlukien muokkaus hyväksymättömillä osilla tai lisäosilla) eivät kuulu tämän takuun piiriin.

Takuu ei kata ongelmia, jotka johtuvat hoito- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Takuu päättyy, mikäli muiden kuin Altimate Medicalin valmistamia osia tai laitteeseen yhteensopimattomia osia lisätään Altimate Medicalin valmistamaan tuotteeseen.

TAKUU ON POISSULKEVA JA IRROTETTU MUISTA TAKUUSOPIMUKSISTA. ALTIMATE MEDICAL EI OTA VASTUUTA MINKÄÄNLAISISTA SEURANNAIS- TAI VAHINKOVAURIOISTA.

Altimate Medical tähtää tuotteidensa jatkuvaan kehittämiseen ja pidättää oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia, ohjeita ja hintoja ilman erillistä varoitusta.

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA
Phone: 507•697•6393 Fax: 507•697•6900 800•342•8968
easystand.com info@easystand.com

Ympäristö asiat

Tuotteen vanhettua:

- Kierrätä maasi kierrätys­säädösten mukaisesti.
- Kierrätä kaikki metalliosat.
- Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää maasi kierrätys­säädösten mukaisesti.
- Kysy paikalliselta kierrätyskeskukselta neuvoja asianmukaiseen osien hävitykseen tai kierrätykseen.
- Palauta hydraulijärjestelmä tai sylinteri (Pow'r Up -nostin ainoastaan) Altimate Medical, Inc.:lle.



262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: 800.342.8968 or 507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com



EasyStand  CE
standing made easy

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. Altimate Medical maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with Altimate Medical for latest information. FORM MBANEX-SMALL 070617 REV B Copyright © 2017 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

rehaco.

Haaransuontie 6 A 7
90240 Oulu
info@rehaco.fi
www.rehaco.fi