


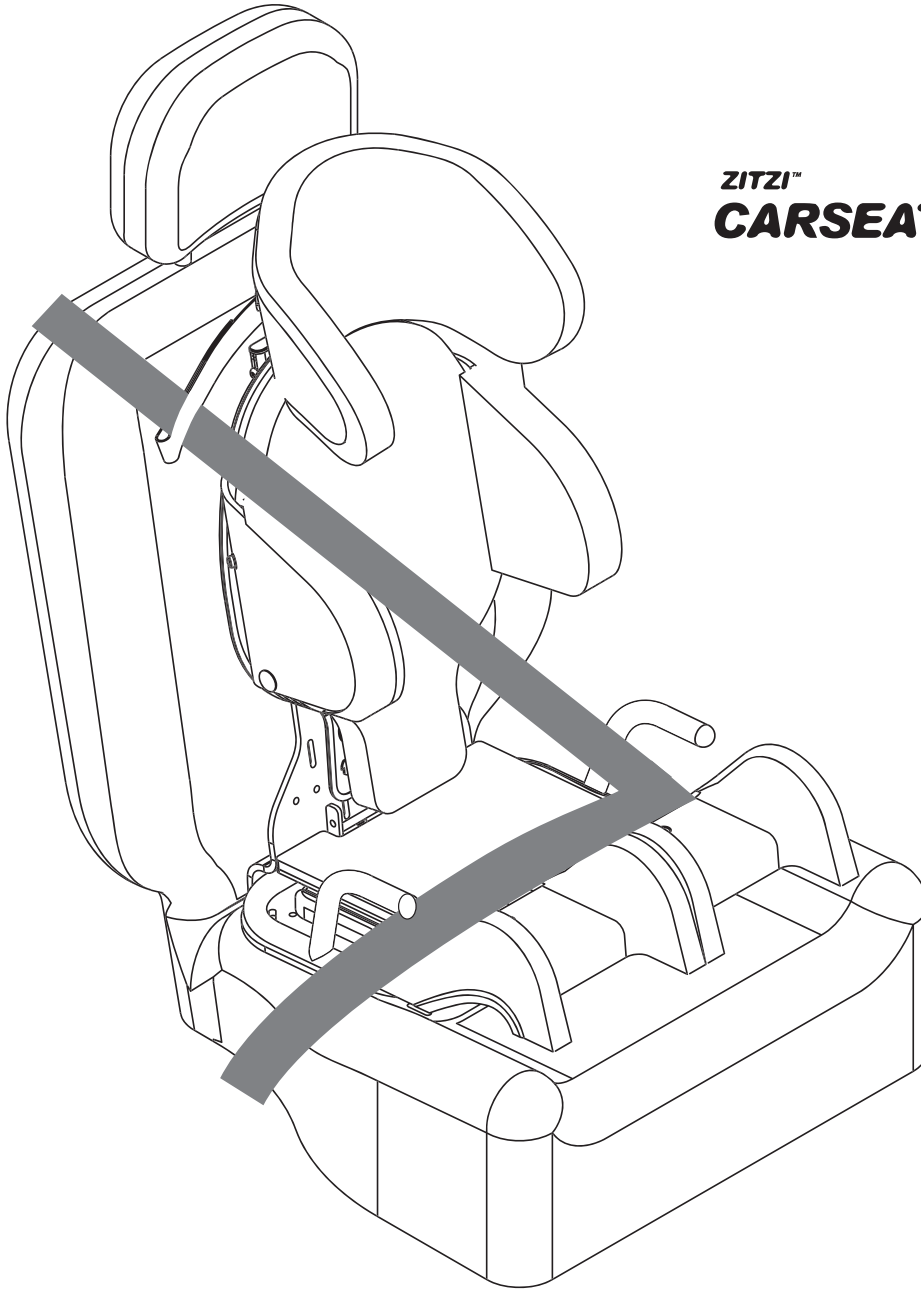

**ZITZI™
CARSEAT PRO**



Käyttöohje

Zitzi Carseat pro

Sisällysluettelo

Avainkohdat	3	Lannerangan tuki	11
Työkalut.....	4	Jalkatuki.....	12
Istuinosan säätäminen	4	Lantiovyö	13
Alaraajojen pituusero	5	Ylävyön ohjureiden asentaminen	14
Reisiosan verhoilut.....	5	Pöytä.....	15
Istuinkuopan säätäminen	5	Asentaminen autoon.....	16
Loitonnus (abduktio) ja lähennys (adduktio)	6	Kääntölevy.....	17
Selkäosan säätäminen	7	Kunnossapito & Takuu	18
Selkänojan korkeuden säätäminen	7	Hoito ja kunnossapito	18
Leveyden säätäminen	7	Purkaminen & hävittäminen.....	18
Vartalotuen säätäminen.....	8	Yhdistelmät	18
Päätuki.....	9	Varaosat.....	18
Päätuen korkeuden säätäminen.....	9	Merkinnät	18
Päätuen levyn säätäminen sivusuunnassa	9	Takuu	19
Lantiotuki.....	10	Yhteenveto ja jälkitarkastus	19
		Materiaalit	19

Onnittelumme Zitzi Carseat Pro -turvaistuimen valinnasta. Se on turvaistuin, jonka kanssa lapsi voi kasvaa ja joka tulee palvelemaan Teitä pitkään.

Turvallisuus, mukavuus ja säätömahdollisuudet ovat olleet tärkeitä

Zitzi Carseat Pro - turvaistuimen kehitystyössä.

Turvaistuimen toiminnan edellytyksenä on, että sitä käytetään

tarkoituksenmukaisella tavalla ja käyttöohjeet luetaan

kokonaisuudessaan ennen Zitzi carseat Pro - turvaistuimen

käyttöönottoa.

Käyttöohjeet tulee myös säilyttää myöhempää käyttöä varten.



Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Anatomic SITT AB:n valmistamana lasten turvaistuimena

Avainkohdat



Zitzi Carseat Pro on hyväksytty voimassa olevien eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti (ECE R44.04) ja soveltuu lapsille, joiden painoluokka on 15-25 kg ja 15–36 kg. **Zitzi Carseat Pro** on törmäystestattu ja hyväksytty kun se on asennettu ajosuuntaan nähden eteenpäin auton istuimeen auton 3-piste turvavyöllä kiinnitettynä. Jos istuin on asennettu räätälöityyn ajoneuvoon, ota yhteyttä ajoneuvon räätälöimään yritykseen saadaksesi neuvoja asennuksesta.

Zitzi Carseat Pro on autossa käytettävä turvaistuin joka on kehitetty henkilöille joilla on toiminnallisia eroavaisuuksia ja sitä voidaan käyttää myös istuimena lyhyillä matkoilla Pengy-alustalla

- Zitzi Carseat Pro -istuinta voidaan käyttää autossa sekä takaistuimella että etuistuimella.
- Zitzi Carseat Pro -istuinta on käytettävä yhdessä auton normaalin kolmipisteturvavyön kanssa.
- Zitzi Carseat Pro -istuinta ei tule käyttää ilman päällistä. Päällistä ei saa vaihtaa mihinkään muuhun kuin istuimen valmistajan toimittamaan, koska päällinen on olennainen osa autoistuimen turvallisuutta.
- Zitzi Carseat Pro -istuin on aina oltava kiinnitettynä auton turvavyöllä, vaikka istuin ei olisikaan juuri silloin käytössä. Kiinnittämätön istuin voi aiheuttaa vaurioita voimakkaasti jarrutettaessa.
- Varmista aina, että turvavyö on kiinnitetty tukevasti ja että istuin on asennettu ohjeiden mukaisesti.
- Istuimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, koska ne voivat vaikuttaa istuimen turvallisuuteen.
- Myöskään auton turvavyöhön ei saa tehdä muutoksia.
- Zitzi Carseat Pro -istuinta EI MILLOINKAAN saa asentaa autonistuimelle sivuttain ajosuuntaan nähden.
- Kiinnitä lapsi istuimeen AINA hänen istuessaan tuolissa, myös lyhyiden matkojen ajaksi.
- Varmista, ettei Zitzi Carseat Pro -istuin voi puristua siirrettävän autonistuimen, selkänojan, autonoven tai takaoven väliin.
- Auton hattuhyllylle EI MILLOINKAAN saa jättää irtonaisia esineitä. Irtonainen esine voi aiheuttaa vakavia vaurioita voimakkaasti jarrutettaessa.
- Autolla ajatun kolarin jälkeen Zitzi Carseat Pro -turvaistuin tulee vaihtaa uuteen. Vaikka se näyttäisi vahingoittumattomalta, se ei välttämättä suojaa lasta parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä vakuutusyhtiösi.
- Älä milloinkaan jätä lasta autoon ilman valvontaa.
- Zitzi Carseat Pro -turvaistuin voi kuumentua auton ollessa pysäköitynä auringonpaiseeseen.
- Kaikkien väiden sekä turvaistuimessa että autossa tulee olla ehjiä, tukevasti kiinnitettyjä ja kiertymättömiä.
- Jos kääntölevy on asennettu, tulee varmistaa, että tuoli on lukittu salvilla ajosuunnansuuntaiseksi ennen liikkeellelähtöä.
- Zitzi Carseat Pro -istuinta EI MILLOINKAAN saa asentaa ajosuuntaan nähden taaksepäin.
- Säilytä käyttöohjeet tallessa vastaista käyttöä varten.




VAROITUS!

Zitzi Carseat Pro -istuinta EI MILLOINKAAN saa asentaa ajosuuntaan nähden taaksepäin.

Työkalut


Tietty tuoliin tehtävät säädöt edellyttävät työkaluja. Useimmat säädöt voidaan tehdä 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Omaa T-avainta voidaan hyvin käyttää.

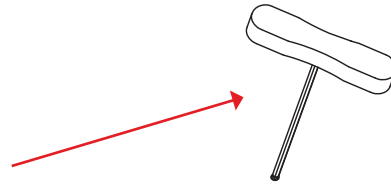

Tämä symboli osoittaa, että säädöt on tehtävä kuusiokoloavaimella

Takahihna


Carseatin mukana tulee takahihna, joka on kiinnitetty pohjalevyyn ja kiertää selkäosan ympäri. Hihna on suunniteltu varmistamaan, että selkä ei suoristu enempää kuin sen pitäisi kun käyttäjä asetetaan istuimeen tai käsiteltäessä istuinta auton ulkopuolella. Tarvittaessa hihnan pituutta voidaan säätää tri-glide soljilla yksittäisen käyttäjälle sopivaksi.

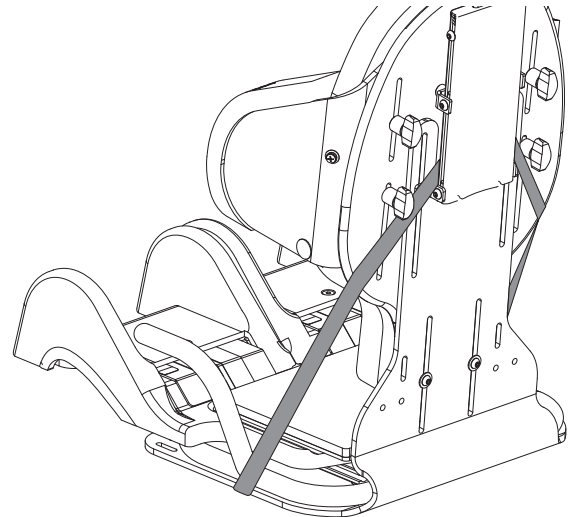

Takahihna on aina asennettava tuoliin, jotta vältetään istuimen turhaa rasitusta

Istuinosan säätäminen


Istuinsyvyyden, erilaisten alaraajanpituuksien ja mahdollisen jalkojen loitonnuksen/lähentämisen mukaan tehtävät säädöt on helppo tehdä. Aloita irrottamalla päällinen siten, että pääset käsiksi istuimen takana oleviin säätöruuveihin. Huomaa, että ruuveja ei tarvitse avata kokonaan, osittainen avaaminen riittää.

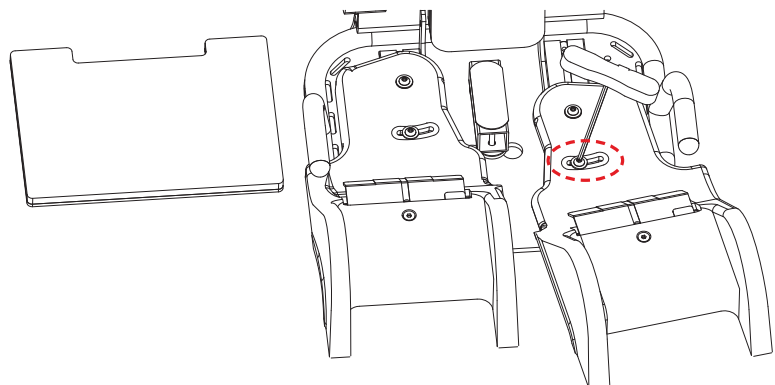

Alaraajojen pituusero

Avaa istuinosassa olevaa etummaista ruuvia.

Vedä istuinosa haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvi.

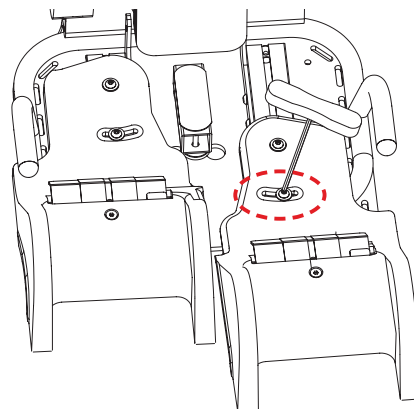


Reisiosan verhoilut

Nosta ensin istuinosan päällistä päästäksesi käsiksi nappiin joka pitää reisiosan verhoilua paikallaan. Vedä sitten reisiosan verhoilu irti painonapista.

Kumpikin reisiosa koostuu kahdesta reisiosan verhoilusta. Oikeanpuoleisessa osassa on kaksi reisiosan verhoilua, jotka on merkitty ”Oikea” ja vasemmanpuoleisessa osassa on kaksi reisiosan verhoilua, jotka on merkitty ”Vasen” (katsottuna takaapäin siten, että Carseat Pro on edessä).

Reisiosan verhoilun kaarevan puolen tulee aina olla ulospäin ja suoran puolen olla sisäänpäin.

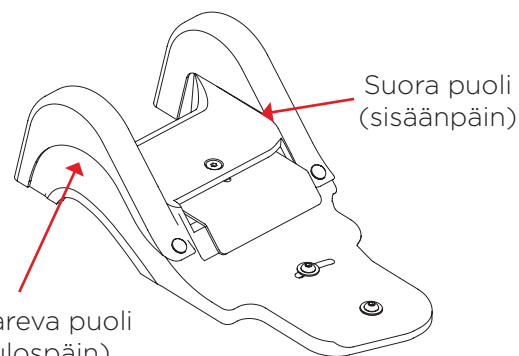



Istuinkuopan säätäminen

Istuimen syvyyssäädön yhteydessä on säädettävä myös istuinkuopan pituus





Esimerkki Jos istuinsyvyudeksi on säädetty 24 cm (harmaa vyöhyke, koossa 2), on myös istuinkuopan säätö siirrettävä harmaalle osuudelle **istuinkuopan** koon säilyttämiseksi **vastaavana** ja oikean istuma-asennon aikaansaamiseksi.

Avaa istuinosan ruuvia kuusiokoloavaimella. Sääda istuinkuopan pituus halutuksi säätölevy haluttuun kohtaan vetämällä.

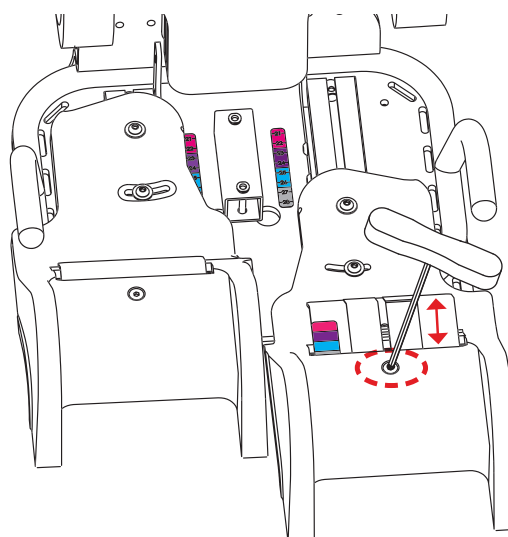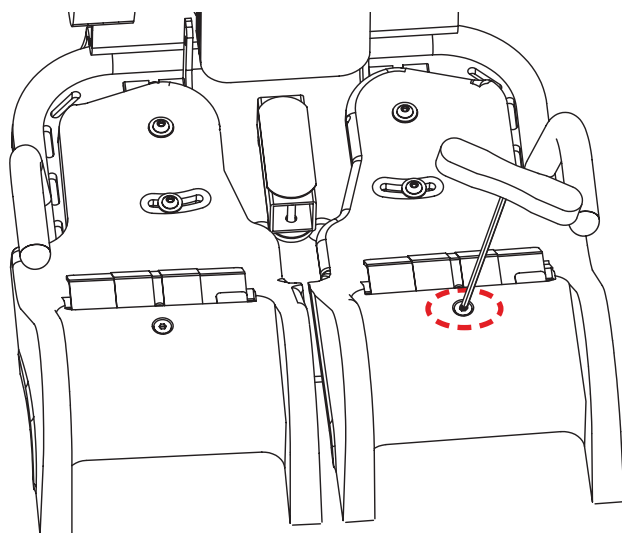


Loitonnus (abduktio) ja lähennys (adduktio)


Avaa jalkaosan päällä olevaa ruuvia kuusiokoloavaimella. Siirrä jalkaosa haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvi.

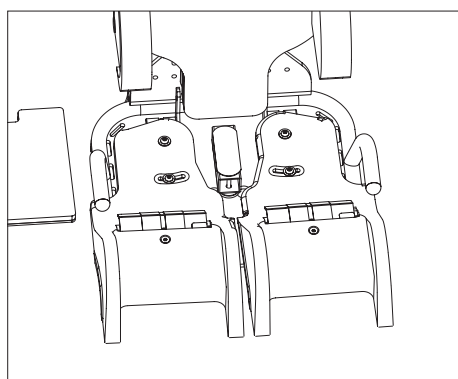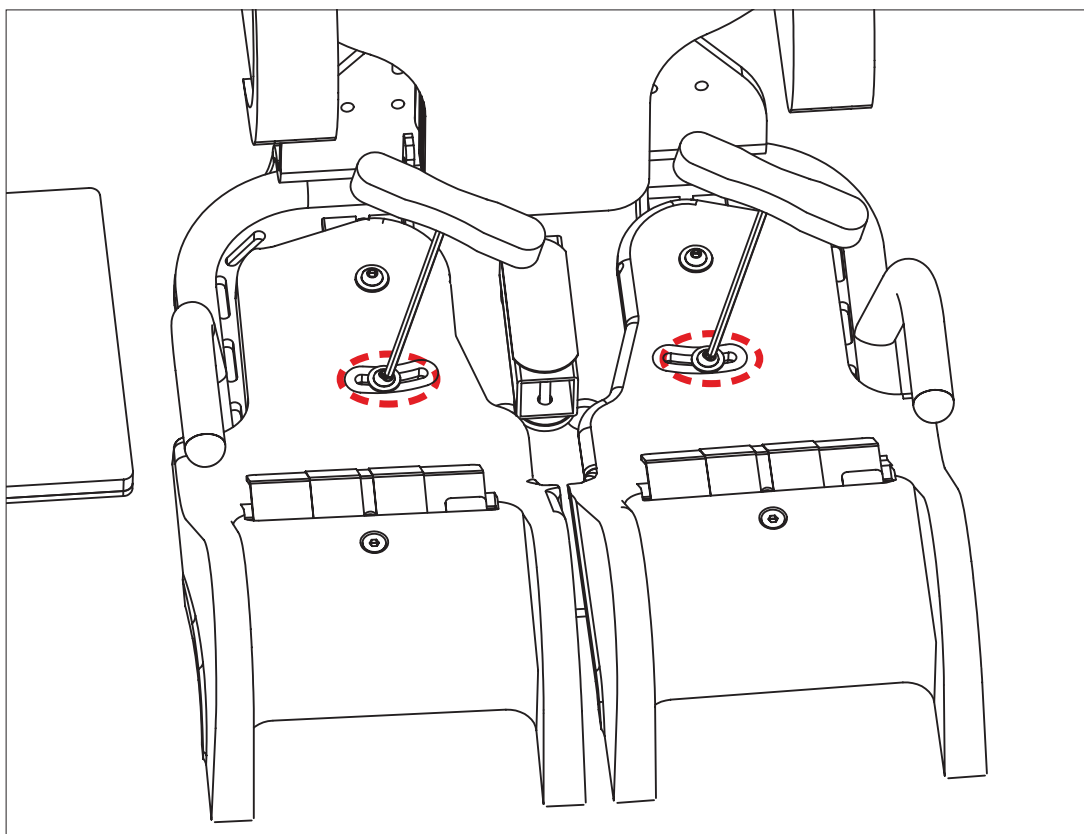

Neutraali

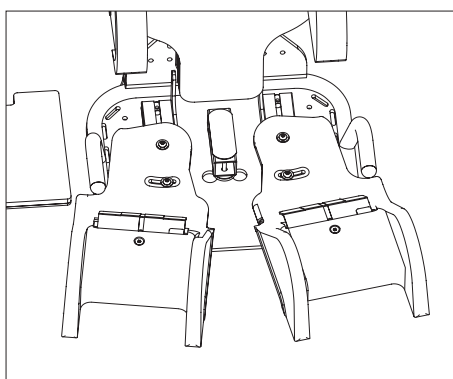

Abduktio

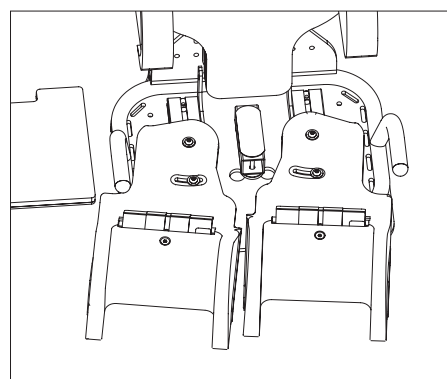


Adduktio/vinoasento

Selkäosan säätäminen

Selkänojan korkeuden säätäminen

Avaa punaisella merkittyjä ruuveja (4 kpl) kuusiokoloavaimella ja säädä selkänoja halutulle korkeudelle.


Kiristä ruuvit säätämisen jälkeen uudelleen.

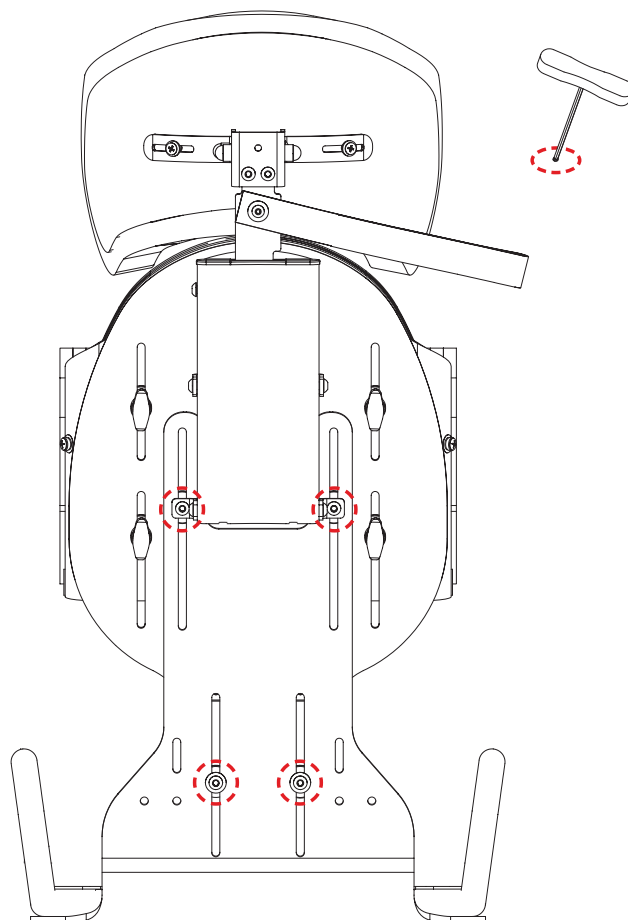

Leveyden säätäminen

ja sen verhoilu ensin irrotettava Carseat Pro - tuolista.

Selkänojalevyä pienennetään leikkaamalla siitä korkeintaan 2 cm. Leikkaaminen voi tapahtua joko selkänojan mukaisesti tai koko levyn ympäri.

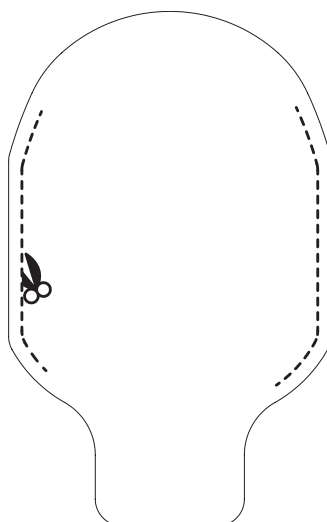


Tärkeää! Älä leikkaa selkänojalevystä enempää kuin 2 cm.

Vartalotuen säätäminen

Avaa punaisella merkittyjä kiristimiä (4) ja säädä tuen leveys, kulma ja korkeus halutunlaiseksi.

Kiristä nupit säätämisen jälkeen.

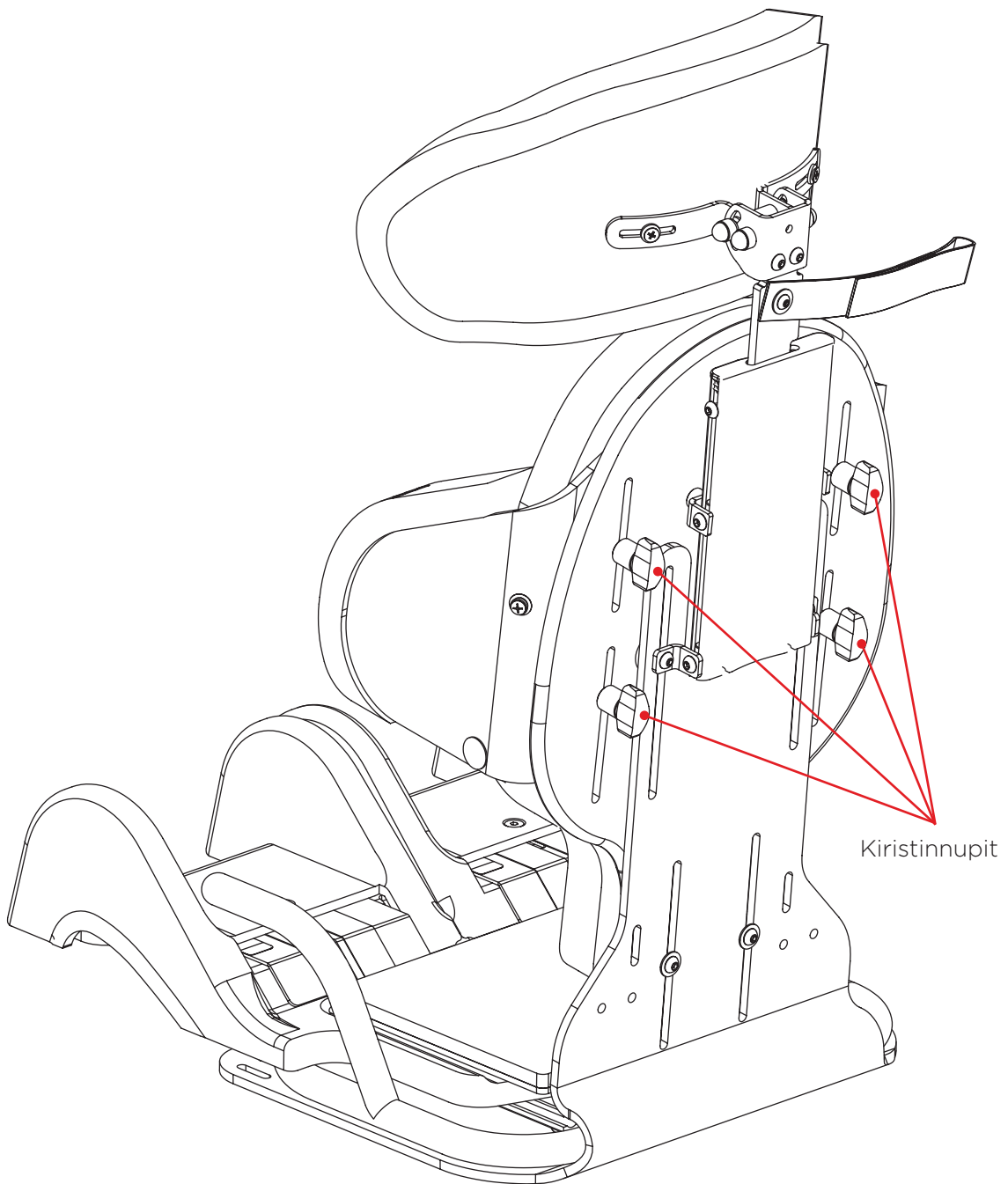


Päätuki

Päätuen korkeuden säätäminen

- Avaa säätöruuvia (A).
- Säädä haluttuun korkeuteen.
- Päätukea ei voida turvallisuussyistä poistaa.
- Kiristä säätöruuvi

Päätuen levyn säätäminen sivusuunnassa

- Avaa säätöruuveja (B).
- Säädä haluttuun kohtaan.
- Kiristä ruuvit.

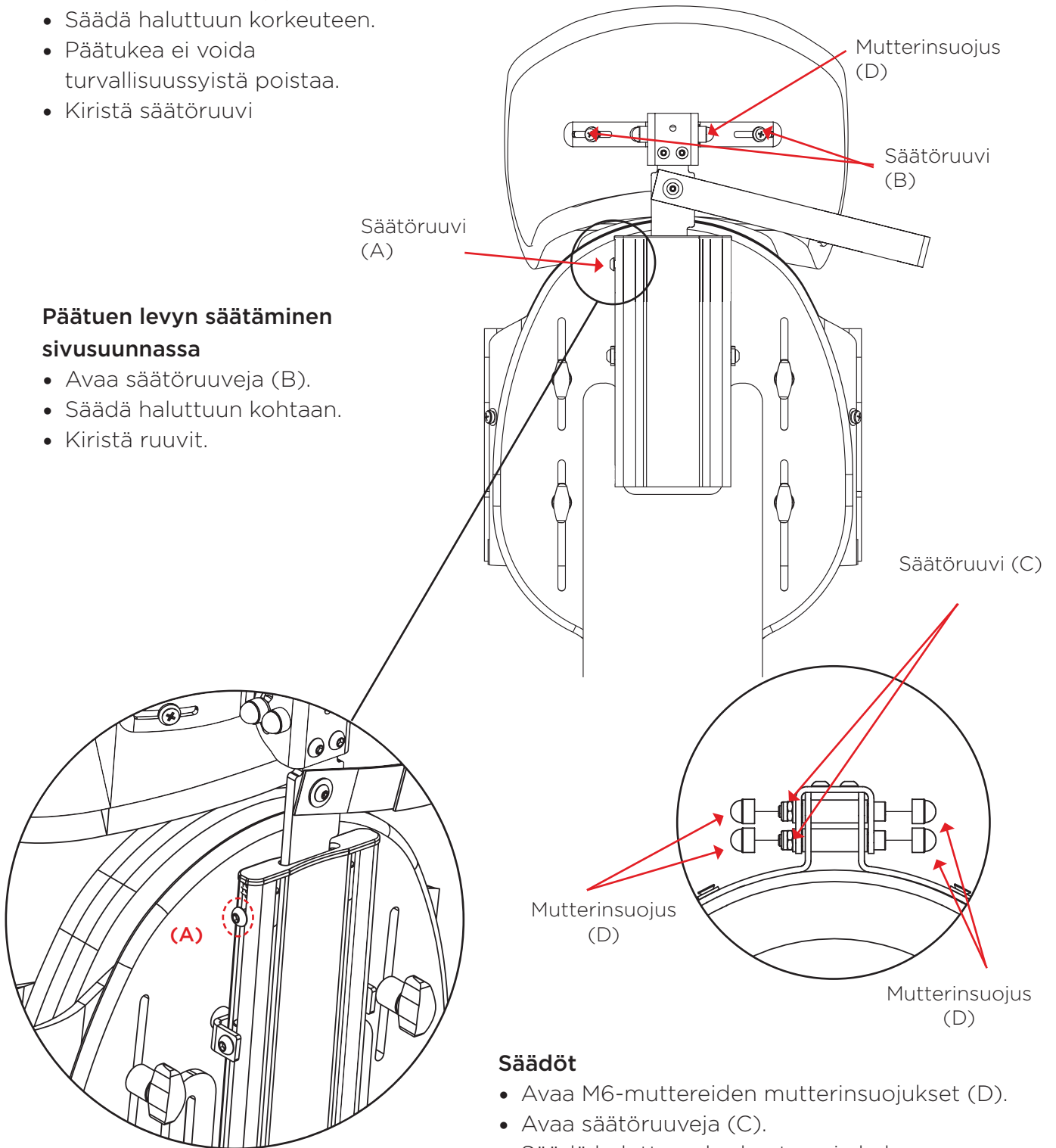

Säädöt


- Avaa M6-muttereiden mutterinsuojukset (D).
- Avaa säätöruuveja (C).
- Säädä haluttuun korkeuteen ja kulmaan.
- Kiristä mutterit (C).
- Asenna mutterinsuojukset (D) takaisin paikoilleen.

Lantiotuki

Lantiotuki asennetaan mukana toimitetuilla ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä tuolissa oleviin vastaaviin kannattimiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kiristä ruuvit asentamisen jälkeen.



HUOM! Lantiotuet on asennettava turvakaaren sisäpuolelle.


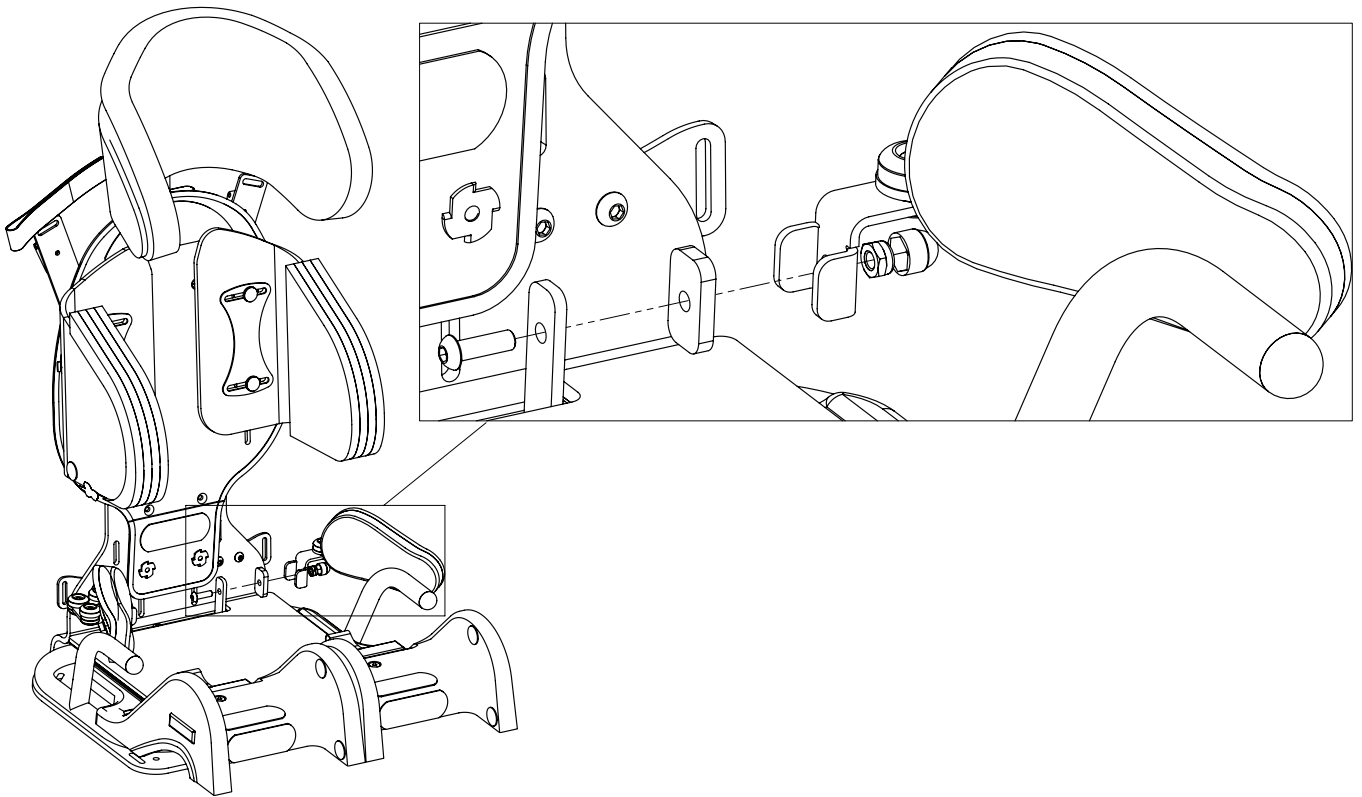


Lannerangan tuki


Lisävarusteet, ilmatäytteinen lannerangan tuki pumpulla

Ennen lannerangan tuen asentamista on selkänoja säädettävä.

- Irrota selkänojan päällinen
- Kiinnitä lannerangan tuki selkänojaverhoilun alle (sijoituskohta suunnilleen punaisella merkityllä alueella alla olevassa kuvassa) tarraliuskan avulla.
- Pane selkänojan päällinen takaisin paikalleen.

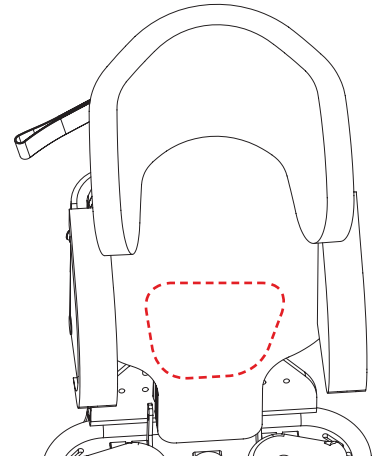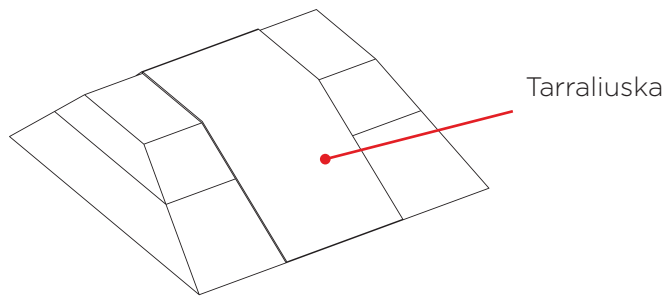

Pumpulla täytettävä lannerangan tuki on saatavissa vaihtoehtona

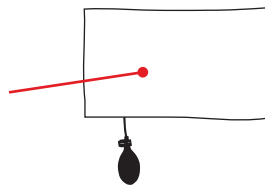


Jalkatuki

Mukana toimitettu tarraliuska liimataan Carseat Pro -turvaistuimen alle (kuva 1). Tarraliuskan sisäreunan tulee olla samalla tasalla reikien kanssa ja heti niiden takana, kuten kuvassa esitetään.

Aseta jalkatuki ensin istuimelle (kuva 2). Aseta Carseat Pro sitten jalkatuen päälle ja mahdollisimman lähelle selkänojaa.

Varmista, että tarraliuskat tarttuvat toisiinsa.

Kuva 1

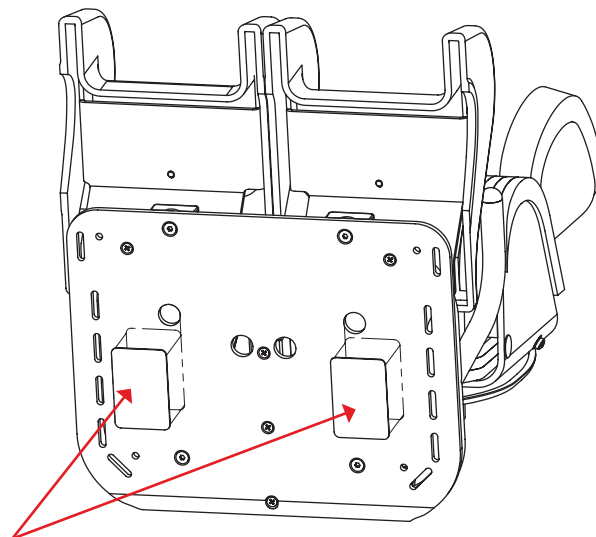


Tarraliuska

Jalkatuen säätö

Carseat Pro-jalkatuki on ylöstaittuva. Säättääksesi jalkalevyn korkeutta löysää nuppia ja säädä haluttuun korkeuteen.



Kuva 2

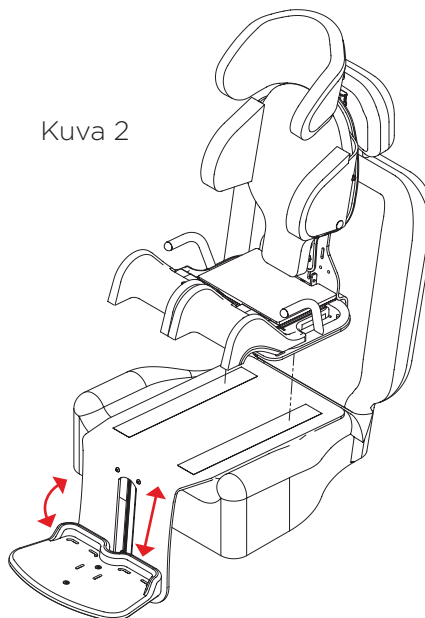

Lantiovyö

Lantiovyötä vaihdettaessa


Pujota hihnat istuinlevyssä olevien punaisella merkittyjen rakojen läpi kolmisolkiperiaatteen mukaisesti (tri-glide, E)

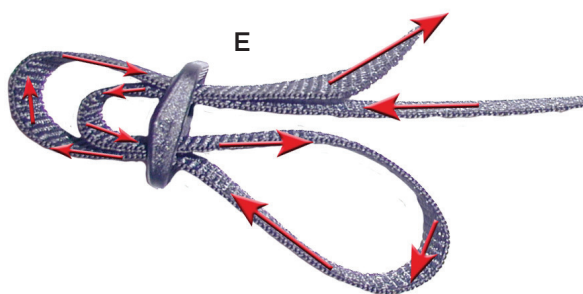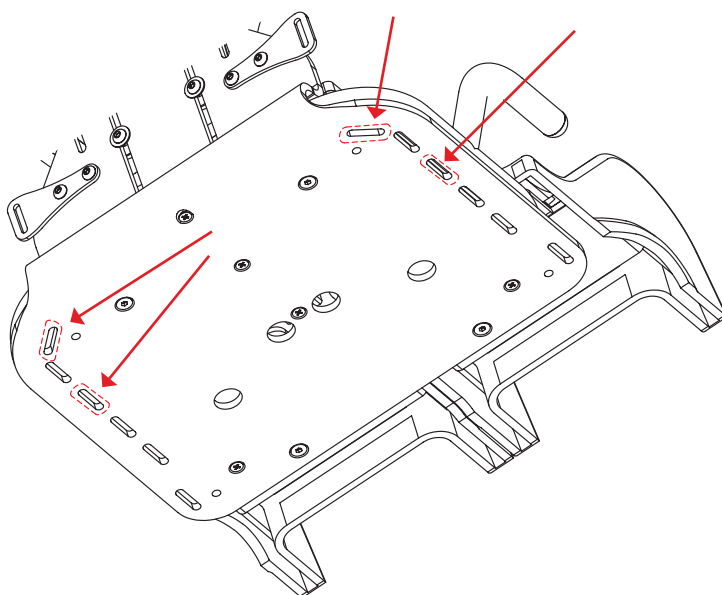

HUOM! Älä unohda käyttää auton turvavyötä!

Ylävyön ohjureiden asentaminen

Ylemmät ohjurit (A)

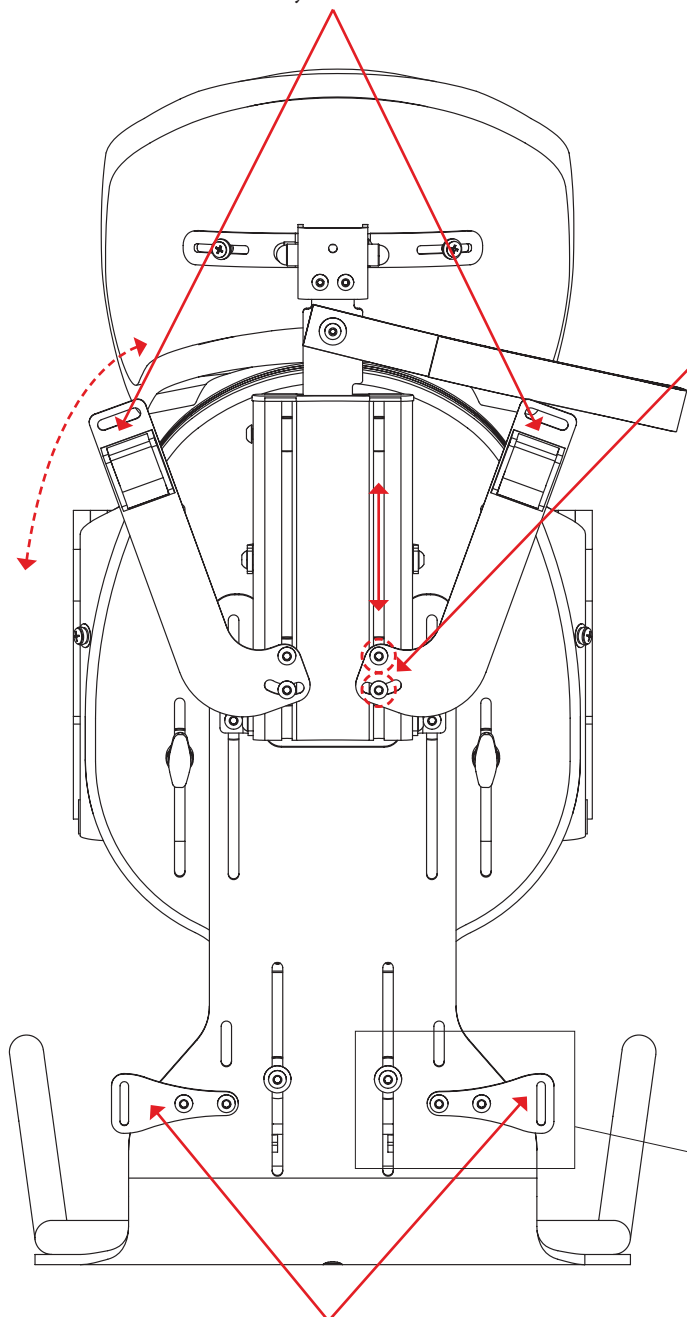

Alemmat ylävyön kiinnittimet(B)

Ylempien ohjureiden (A) asentaminen


Työnnä ylemmät ohjurit profiilissa olevien hahlojen alapäästä haluttuun kohtaan. Kiristä ruuvit.

Ylempien ohjureiden (A) säätö

Avaa ruuveja ja säädä haluttuun korkeuteen & kulmaan. Säädä ohjurin korkeus sellaiseksi, että vetosuunta on hieman olkapäiden tason yläpuolella. Kiristä ruuvit.


Liivin asentaminen

Pujota liivin ylähihnat hahlon läpi ja solkeen. Pujota liivin alaosan kiinnikkeet alakannattimiin. Käytä mukana toimitettuja triglide-solkia (E).

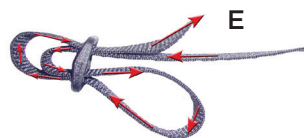

Alemmat ylävyön kiinnittimet (B)

Asenna alemmat kiinnittimet ruuveilla, muttereilla ja välilevyillä kuvassa (2) esitetyllä tavalla. Kiristä ruuvit.

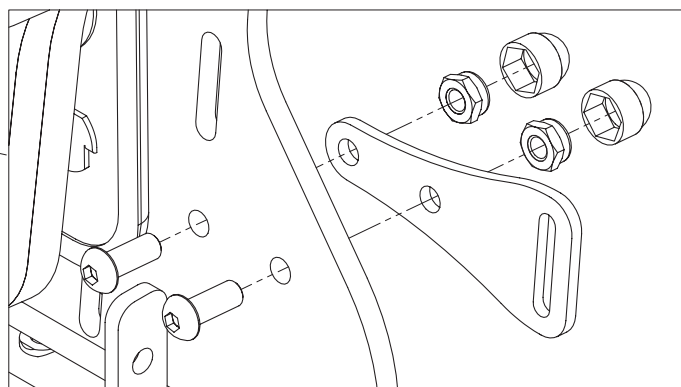

Kuva (2)




Varmista, että kaulalle jää tarpeeksi tilaa. Tarkista myös voiden kireys ja pehmusteiden sijainti oikealla paikallaan.

Pöytä

Pöytä sijoitetaan **käyttäjän** polvien päälle ja kiinnitetään tarrahihnoilla (1) & (2), jotka kiinnitetään Carseat Pro - istuimeen alla olevan kuvan mukaisesti. Käyttäjä voi haluttaessa hyödyntää pöytää käsivarsitukena.



HUOM! Varmista, että pöytä ei ole liian tiukasti käyttäjän vatsan päällä ja että se istuu tukevasti paikallaan.

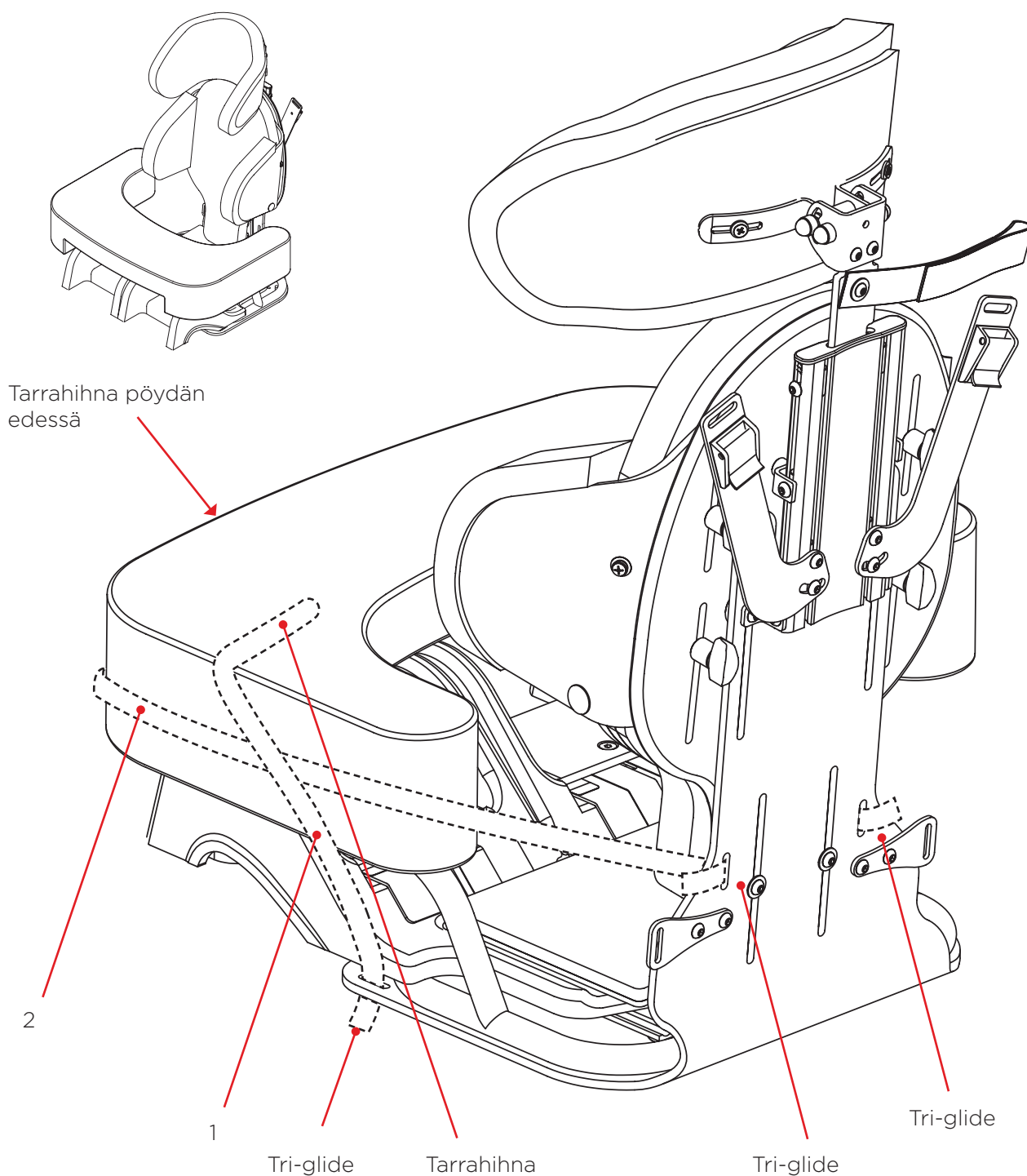

Asentaminen autoon


- Zitzi-istuinta on aina käytettävä yhdessä auton 3-pisteturvavyön kanssa.
- Vyön oikea kulkutapa on kuvassa esitetyn kaltainen.
- Aseta Zitzi Carseat Pro autonistuimelle.
- Varmista, että Carseat Pro -istuin on keskellä.
- Aseta lapsi Carseat Pro -istuimeen.
- Vedä (auton) 3-pisteturvavyö lapsen ympäri. Lantiovyö tulee lapsen lantion yli punaisten turvakaarien (A) alta.
- Laita vyönohjain vyön ympärille olkapään kohdalla.
- Kiristä vyö aina tämän jälkeen mahdollisimman tiukalle.
- Päästä lapsi turvavyöstä avaamalla turvavyön soljen lukko.
- Zitzi Carseat Pro Istuin voidaan jättää autoon, Mutta sen on oltava kiinnitettynä auton turvavyöllä.

Käytä aina vyönohjainta

On hyvin tärkeää, että vyö kulkee vyönohjaimen kautta.

Runkoputken alle

Turvavyö vedetään turvakaaren alta solkeen kuvassa esitetyllä tavalla.

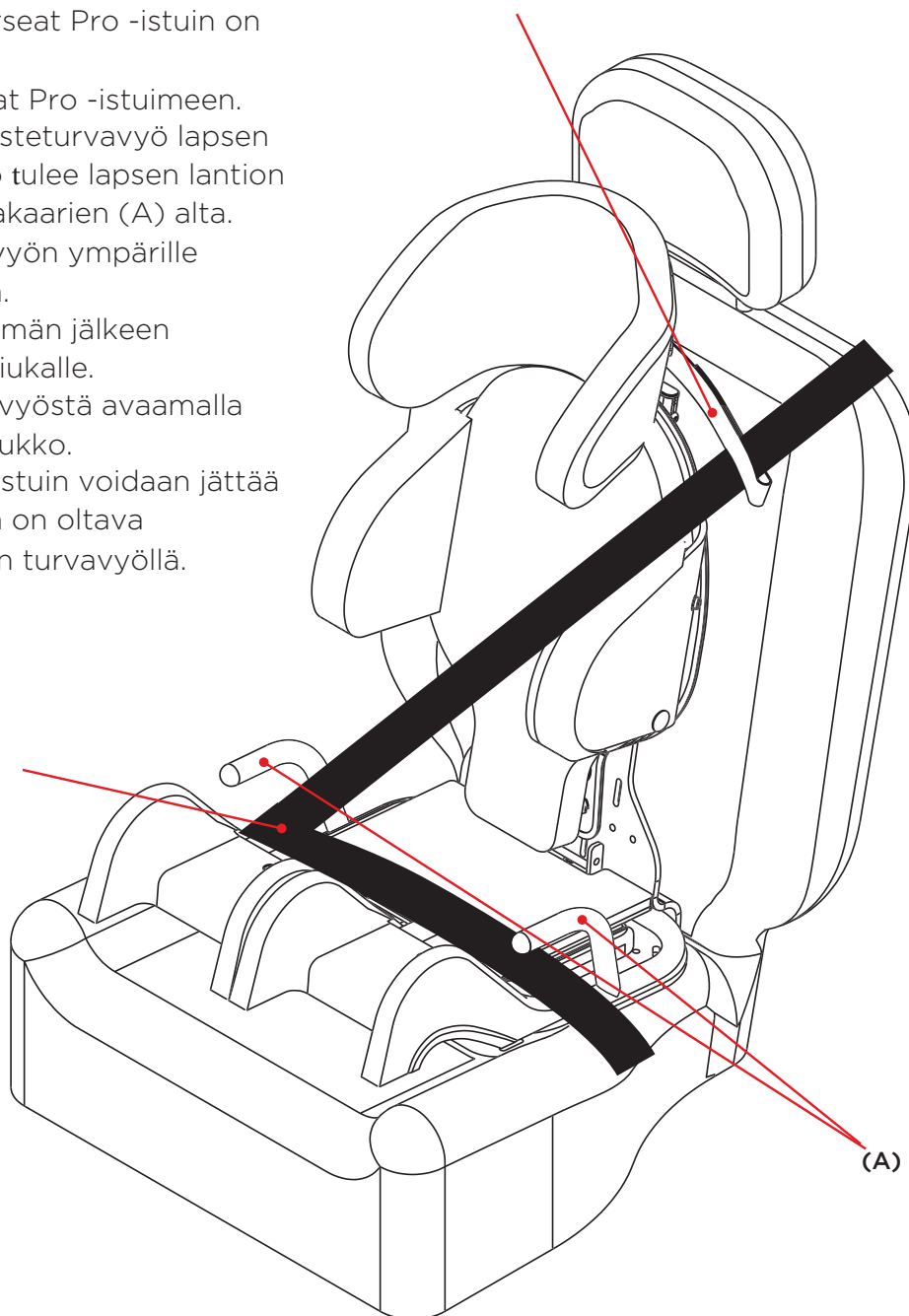


HUOM! Mitä tiukemmin vyöt sopivat lapsen ympärille, sitä paremmin lapsi on suojattu onnettomuuden tapahtuessa. Mahdollisuuksien mukaan tulee varmistaa, että mahdollinen takki tms ei jää vyön ja käyttäjän lonkan väliin.

Kääntölevy


Kääntölevy asennetaan Carseat Pro -turvaistuimen alle mukana toimitetuilla ruuveilla (1), välilevyillä (2) ja muttereilla (3) kuvassa esitetyllä tavalla. Mutterit suojataan asentamisen jälkeen suojuksilla (4). Kääntölevy asetetaan istuimelle varmistaen, että Carseat Pro -istuimen selkänoja on mahdollisimman lähellä autonistuimen selkänojaa. Kääntölevyn takaosa voidaan sijoittaa niin, että se menee istuimen ja selkänojan väliin.

Carseat Pro -istuimen kääntämiseksi parempaan asentoon istuimeen nousemista ja siitä poistumista varten vedetään nupista (merkitty kuvissa punaisella) sen avaamiseksi lukituksesta ja tuolia käännetään.


Salpa voidaan lukita kahteen asemaan - asentoon, jossa Carseat Pro on ajosuuntaan ja asentoon, jossa istuin suuntautuu sivulle (istuimeen nousu- ja siitä poistumisen asento)

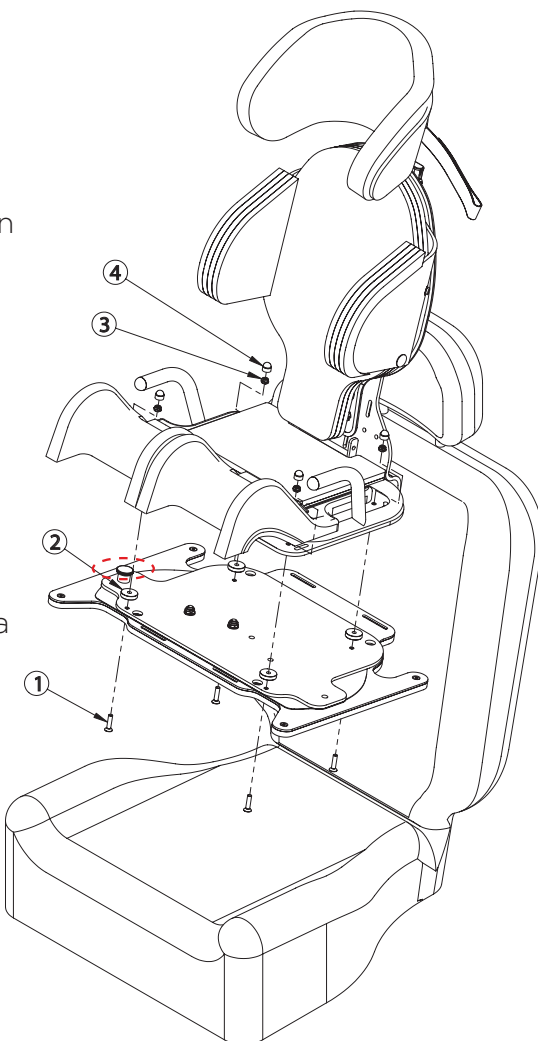


Zitzi Carseat Pro
kääntölevyn päälle
asennettuna autonistui-
messa.

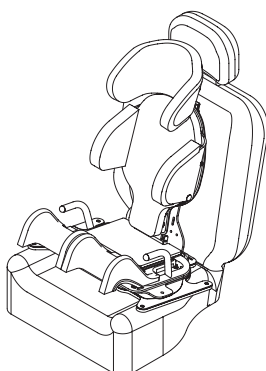


HUOM! Varmista aina, että salpa on kunnolla lukittu ennen tuoliin nousemista ja siitä poistumista, sekä ennen ajoneuvon liikkeellelähtöä.

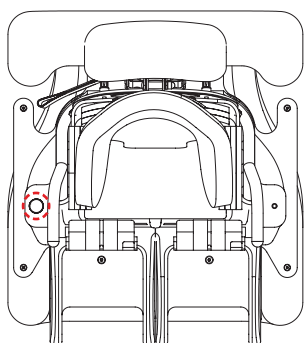

Neutraali

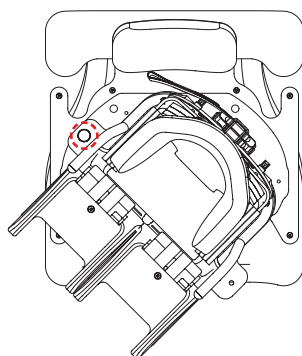

Puolittain sivuun käännettynä

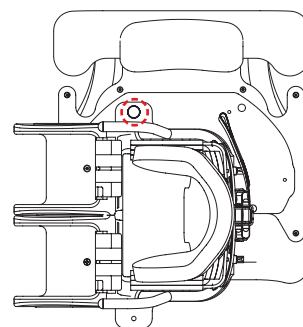

Kokonaan sivuun käännettynä

Kunnossapito & Takuu

Hoito ja kunnossapito

Tyynyt ja vyönpehmusteet pestään 60°:n hienopesuohjelmalla.

Älä kuivaa kuivausrummussa tai kuivauskaapissa. Muovi- ja metalliosat pyyhitään puhtaaksi kostealla rievulla. Voimakkaasti likaantuneisiin muovi- ja metalliosiin voidaan käyttää rasvanpoistoainetta.

Muista irrottaa kangasverhoilu ennen tällaista puhdistusta. Biologisesti hajoavan rasvapoistoaineen käyttöä suositellaan.

Tarkasta kaikki osat kulumisen havaitsemiseksi. Vaihda tarvittaessa. Mikäli kunnossapidon osalta on kysyttävää, ottakaa yhteyttä valmistajaan tai maahantuojaan.

Purkaminen & hävittäminen

Käytetty osa tai tuote puretaan ja romutetaan. Osat tulee erotella materiaalityypin mukaan. Viimeisellä sivulla on luettelo Zitzi Carseat Pro -turvaistuimen erilaisista materiaalityypeistä.

Yhdistelmät

Zitzi Carseat Pro on ECE-hyväksytty tuote, joka voidaan yhdistää kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen lisävarusteiden kanssa.

Zitzi Carseat Pro -turvaistuinta EI saa yhdistää muihin tuotteisiin.


Varaosat

Zitzi Carseat Pro -istuimessa saa käyttää ainoastaan Anatomic SITT AB:n toimittamia varaosia.

Merkinnät

Zitzi Carseat Pro lisävarusteineen on ECE-hyväksytty tuote. sarjanumero sijaitsee selkänojalevyn alaosassa Tämä sarjanumero tulee aina ilmoittaa tuotetta koskevassa tietojen vaihdossa.

- Tämä on universaalinen auton turvaistuin. Se on hyväksytty ECE-säädöksen nro. 44.04 mukaisesti yleiskäyttöön ajoneuvoissa ja sopii niistä useimpiin, mutta ei kaikkiin autonistuihin.
- Turvaistuin voidaan asentaa oikein, jos ajoneuvon valmistaja ilmoittaa ohjekirjassaan ajoneuvon olevan soveltuva tietyn painoryhmän universaalista tyyppiä olevan turvaistuimen asentamiseen.
- Tämä istuin on luokiteltu universaaliseksi vaativammissa olosuhteissa kuin mitkä ovat koskeneet aiempia turvaistuinten säädöksiä, joilla ei ole tätä hyväksyntää.
- Mikäli olette epävarmoja joistain istuinta koskevista seikoista ottakaa yhteyks valmistajaan tai jälleenmyyjään.

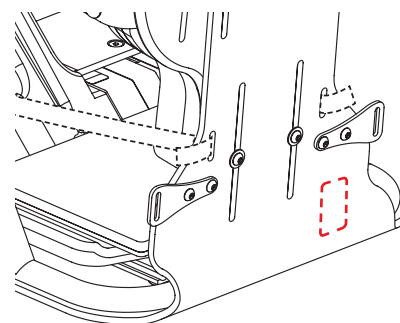

Takuu

1 vuosi ostopäivästä valmistusvirheiden osalta. Takuu koskee vain tuotteita, joihin omistaja ei ole tehnyt muutoksia. Takuu ei koske tuotteita, jotka ovat olleet mukana törmäyksessä tai vastaavassa tapahtumassa.

Yhteenveto ja jälkitarkastus

- Mainitut jälkitarkastukset on suoritettava jatkuvasti.
- Kaikkien ruuvien kireys on tarkastettava säännöllisesti.
- Hihnojen ja tyynyjen kuluneisuus on tarkastettava säännöllisesti.
- Edellä mainitut seikat tulee tarkastaa Zitzi Carseat Pro -turvaistuimen jokaisen käytön yhteydessä.

Materiaalit

- **Metalli**
Turvakaari, profiilit, jalkatuen kannatin, päätuen tanko, lantiotukien kannattimet, jalkaosan vahvennus, istuinkallistuksen säätö ja selkänojalevy.
- **Muovi**
Istuin- ja selkäosa, pöytä, jalkatuen levy, jalkaosat, vartalotuet, päätuen tyyny ja istuinlevy.
- **Palava**
Tukipehmusteet ja lantiovyö.

SE

Anatomic SITT AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Puh +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-602 29 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Tanska

Puh +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Alankomaat

Puh +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco OY

Haaransuontie 6 A7, 90240 Oulu

Puh: +35 840 775 22 88

info@rehaco.fi

www.rehaco.fi