

EasyStandi Zing

MPS, Supine, MPS Tilt Table (TT), Supine Tilt Table (TT), Vertical & Prone koko 1

Säilytä käyttöohje aina telineen mukana.




Käyttöohje

SYMBOLIEN SELITYKSET



VAROITUS/HUOMIO

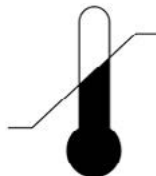

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET



TYYPIN BF SOVELTUVA OSA



VALMISTUSPÄIVÄMÄÄRÄ



PURISTUKSIINJOUTUMISVAARA



LUE KÄYTTÖOHJEET

SN

SARJANUMERO



VALMISTAJA

R_xonly



Kierrätä tämä tuote sen käyttöön päätyttyä ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Turvaohjeet	2
Kokoaminen	3
Säädöt & käyttö	11
Osien erittely	19
Kunnossapito	27
Rajoitettu takuu	28

Ostopäivä_____Sarjanumero_____

Johdanto

Onnittelut EasyStand Zing –seisomatelineen hankinnasta. Olemme Altimate Medicalissa suunnitelleet EasyStand Zing –telineen täyttämään tarpeen.

EasyStand –tuotteiden kuvaus

EasyStand –tuotesarja on tarkoitettu henkilöille, jotka kykenevät avustettuina siirtymään hoitajan tai nostolaitteen avulla. Se on hyödyllinen työkalu kuntoutukseen sekä koti-, koulu- ja työkäyttöön. EasyStand –seisomatelineet tukevat käyttäjää eri asennoista seisoma-asentoon. Telineeseen voidaan yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi liittää erilaisia asentotukivälineitä.

Käyttöaiheet

EasyStand Zing –tuotteilla on tasomainen pinta, joka voidaan säätää vatsa-asennosta tai selinmakuuasennosta pystyssä seisovaan asentoon. Koon 1 Zing soveltuu useimmille henkilöille, joiden paino on korkeintaan 32 kg.

Tämä käyttöohje on seisomatelinejärjestelmän olennainen osa ja jokaisen laitetta käyttävän tulee lukea se kokonaisuudessaan. Näin varmistetaan, että EasyStand Zing asennetaan oikein ja käytetään mahdollisimman hyödyllisellä tavalla.

EasyStand Zing –seisomatelineen käyttäminen edellyttää pätevän aikuisen avustajan osallistumista. Mikäli ilmenee ongelmia, joita ette pysty ratkaisemaan tätä käyttöohjetta lukemalla, ottakaa yhteys paikalliseen toimittajaan tai soittakaa suoraan Altimate Medicalille, puh. 800-342-8968 tai 507-697-6393.

EasyStand Zing on tarkastettava vähintään viikoittain sen turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi. Telineen käyttöohjeessa luetellut säädöt ovat käyttäjän tehtävissä käyttöohjeita noudattamalla. Säättämisen jälkeen EasyStand on tarkastettava sen varmistamiseksi, että kaikki kiinteästi asennetut ja säädettävät komponentit ovat tukevasti paikoillaan käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt ja mahdolliset muut merkittävät korjaustoimenpiteet kuuluvat valtuutetun toimittajan tai huoltokeskuksen tehtäviksi. Turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi tulee käyttää ainoastaan Altimate Medical Inc.:n hyväksymiä varaosia.

EasyStand Zing –seisomatelinettä ei tule käyttää lääkäriä konsultoimatta. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakavia terveysongelmia. Suosittelemme kunnollisen seisontaohjelman suunnittelemista ja seurantaa yhteistyössä pätevän lääkärin tai työ/fysioterapeutin kanssa.



Liity seisovaan joukkoomme!

Tavoitteemme on yksinkertainen – rohkaista liikuntarajoitteisia ihmisiä seisomaan heidän terveytensä edistämiseksi. Tapaa muita liikuntarajoitteisia ihmisiä, erityislasten vanhempia, lääketieteen ammattilaisia ja seisomisen asiantuntijoita, jaa tietoja heidän kanssaan ja opi heiltä jossakin sosiaalisista verkostoistamme.

Lue, jaa ja kommentoi EasyStand –blogissa osoitteessa blog.easystand.com

EasyStand löytyy seuraavissa sosiaalisissa verkostoissa:



Turvaohjeet

- Kaikki turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet ja käyttöohjeet tulee lukea ja ymmärtää ennen käyttöä. Soittakaa Altimate Medicalille, mikäli teillä on kysyttävää tai haluatte isätietoja, puh. 800-342-8968 tai 507-697-6393.
- Mikäli käyttäjä ei täytä jäljempänä mainittuja edellytyksiä tai häntä ei ole asianmukaisesti sovitettu telineeseen pätevän terapeutin tai lääkärin toimesta, Altimate Medical Inc. Ei suorittelee EasyStand Zing –seisomatelineen käyttämistä.
- **Zing koko 1** – on suunniteltu sopivaksi useimmille käyttäjille, joiden pituus on korkeintaan 112 cm ja paino korkeintaan 32 kg.

Tarkempia spesifikaatioita löytyy verkkosivuiltamme www.easystand.com.

- EasyStand Zing –seisomatelineettä ei tule käyttää lääkäriä konsultoimatta. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakavia terveysongelmia. Suosittelemme kunnollisen seisontaohjelman suunnittelemista ja seurantaa yhteistyössä pätevän lääkärin tai työ/fysioterapeutin kanssa.
- EasyStand Zing –seisomatelineen käyttäminen edellyttää aina pätevän aikuisen avustajan osallistumista. Konsultoi terapeuttianne tai lääkärienne jalan sopivan asennon ja kulman löytämiseksi. Lasta ei milloinkaan tule jättää ilman valvontaa Zingiin.
- Älä säädä Zing-telineen jalkalautaa lapsen seisoessa telineessä.
- EasyStand Zing on tarkastettava vähintään viikoittain sen turvallisen toimintakunnon varmistamiseksi. Osien löystymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuluneiden osien vaihtaminen, isommat säädöt ja mahdolliset muut merkittävät korjaustoimenpiteet kuuluvat valtuutetun toimittajan tai huoltokeskuksen tehtäviksi. Turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi tulee käyttää ainoastaan Altimate Medical Inc.:n hyväksymiä varaosia.
- Mikäli EasyStand –telinettä käytetään kotiympäristössä, on laite tarkastettava ennen jokaista käyttöä sen varmistamiseksi, ettei telineessä ole vaurioita tai yllättävää kulumista, joka voisi olla kotieläinten, tuholaisien tai lasten tahattomasti aiheuttamaa.
- Tarvittavien tuki- ja kohdistuselementtien oikeat säädöt on tarkastettava ennen käyttäjän nostamista seisoma-asentoon.
- Säilytys/kuljetusolosuhteet: lämpötila -10 - +50 °C, suhteellinen kosteus: 20-90 % 30 °C:ssa, ilmanpaine: 700-1060 hPa.
- Mikäli laite on altistunut 23,5 °C:n alapuolella oleville lämpötiloille, sen on annettava lämmitä ennen käyttöä.
- EasyStand –telineen odotettavissa oleva käyttöikä normaaleissa käyttöolosuhteissa on 5 vuotta. Huom: tämä saattaa vaihdella käytön runsauden mukaisesti.
- Seisomateline on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön tasaisilla alustoilla. Pyörät tulee käytön aikana pitää lukittuina.
- Telineen siirtämistä ei suositella käyttäjän ollessa seisoma-asennossa.
- Äärimmäiset liikkeet sivuttais- tai pitkittäissuunnassa voivat aiheuttaa telineen kaatumisen.
- Telineen säilyttämistä normaalissa huoneenlämpötilassa ja kosteuspitoisuuksissa suositellaan.
- Altimate Medical –tuotteet on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Altimate Medical –lisävarusteiden kanssa. Ellei toisin mainita, muiden valmistajien lisävarusteet eivät ole Altimate Medicalin testaamia eikä niitä suositella käytettäväksi Altimate Medical –tuotteiden kanssa.
- Ilman kirjallista suostumusta tehdyt muutokset tuotteisiin (sisältäen niihin kuitenkin rajoittumatta muutokset, jotka on tehty käyttämällä muiden valmistajien toimittamia osia tai varusteita) eivät ole suositeltavia ja mitätöivät takuun.

 **Varoitus:** tämä laite on suunniteltu sovitettavaksi monenlaisille käyttäjille; siksi laitteessa on erilaisia säätöahjoja ja -reikiä. Sormien tai muiden ruumiinosien joutumista näille alueille on vältettävä.

 **Varoitus:** käytön aikana tässä laitteessa on erilaisia liikkuvia osia. Perehdy laitteen toimintaan ja vältä käsien tai sormien joutumista näiden alueiden läheisyyteen.

 **Varoitus:** neuvo sivullisia pysyttelemään poissa laitteen luota sen ollessa käytössä


Kokoaminen

1. Poista kaikki laatikosta ja aseta pystytanko lattialle kuvassa esitetyllä tavalla.

Poista kaikki muovikääreet.



2. Mikäli teline on tilattu kaasujousen lukituksella varustettuina, se toimitetaan lukitussa asennossa. Lukitus avataan vetämällä lukkoa ulos ja kääntämällä sitä.

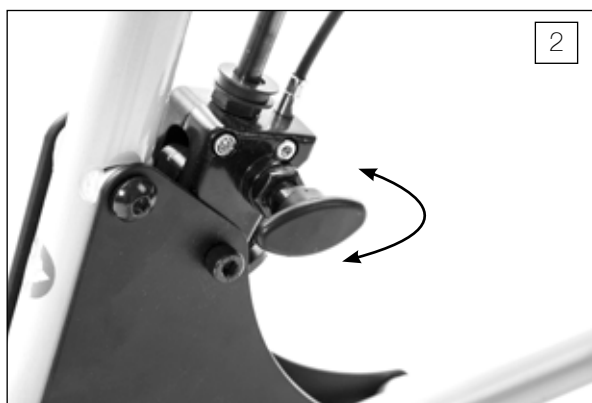

3. Selinmakuu-, pystyasento- ja vasta-asentotoiminnoilla (Supine, Vertical ja Prone) varustettujen laitteiden tapauksessa laite asetetaan pystyyn vaiheessa 5 esitetyllä tavalla. MPS- ja TT-malleissa painetaan jalkapoljinta ja pylväs päästetään nousemaan ylös pystyasentoon.



4. Poista kiinnitysosia sisältävä pussi alustarungosta. Se sisältää kokoamiseen tarvittavat 4 pulttia.



5. Käännä alustarunko ympäri ja kohdista lyhyt pää jalkapolkimeen.




6. Ruuvaa kaikki 4 pulttia paikoilleen. Älä kiristä tässä vaiheessa.




7. Kun kaikki 4 pulttia on ruuvattu paikoilleen, ne kiristetään tiukkaan. Aseta laite pyörilleen ja lukitse pyörät.



8. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöiset polvi- tai pohjetyyny, avaa kiristimien nuppeja ja siirrä kohdalleen.

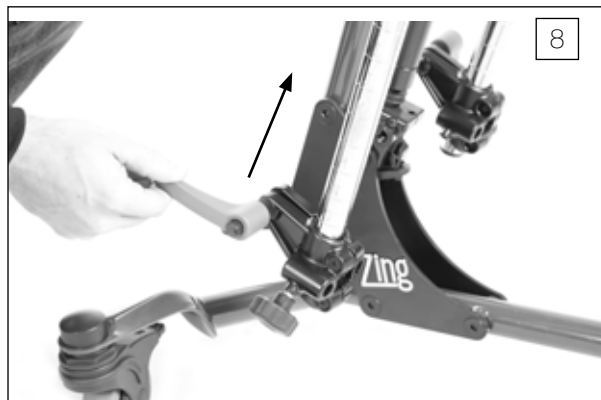

9. Vatsa-asento- ja selinmakuutoiminnolla (Prone ja Supine) varustetuissa laitteissa painetaan jalkapoljinta varsien liikkumien mahdollistamiseksi yli 90°.

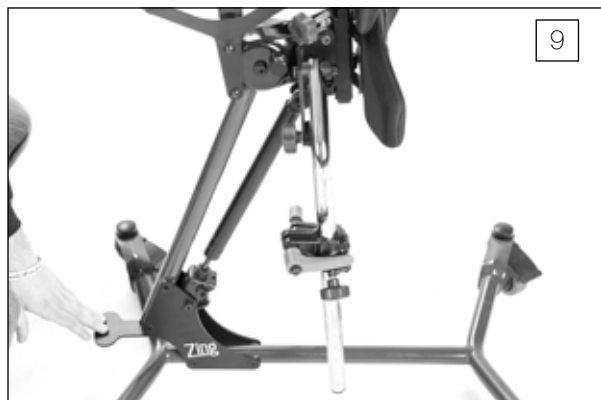

10. Kiristä pystyvarren sivulla oleva uloke tiukalle.



11. Mikäli laitteen mukana on tilattu polvihihnalla varustettu pohjetuki, aseta rakennelma varsien päälle kuvassa esitetyllä tavalla.



12. Kun polvihihnalla varustettu pohjetuki on paikallaan, kiristä nupit tiukalle.



13. Mikäli laitteen mukana on tilattu itsenäisesti säädettävät pohjetuet, kiristimissä olevia räikkäkahvoja avataan ja sijoitetaan kuvassa esitetyllä tavalla. Työnnä pohjetuet kiristimen sisäpuolelle. Kiristä tiukalle.



14. Työnnä monisäätöiset polvituet kiristimen ulkopuolelle. Kiristä tiukalle.



15. Mikäli laitteen mukana on tilattu tasomainen jalkalauta, se asennetaan varsiin kuvassa esitetyllä tavalla. Kiristä tiukalle.



16. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöiset jalkalaudat, kumpikin jalkalauta asennetaan varsin päälle kahvat ulospäin. Kiristä nupit tiukalle.



17. Mikäli laitteen mukana on tilattu lonkkatuett, ne työnnetään lantiopehmusteen takana olevaan kannattimeen. Kiristä tiukalle.




18. Mikäli laitteen mukana on tilattu sivutuet, ne työnnetään ylävartalon tukityynyn takana olevaan kannattimeen. Kiristä tiukalle.

MPS/Supine



(TT)Tilt Table

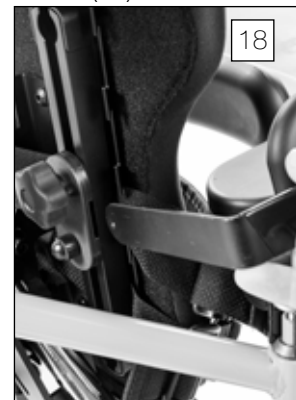

MPS, Supine tai Tilt Table

19A. Mikäli laitteen mukana on tilattu musta muotoiltu pöytäkaukalo, kaukalon molemmat varret työnnetään kannattimeensa kuvassa esitetyllä tavalla.

19B. Käännä harmaa mäntä takaisin lukitusasentoon ja kiristä nuppi tiukalle.



MPS, Supine tai Tilt Table

20A. Mikäli laitteen mukana on tilattu monisäätöinen pöytäkaukalo, kiinnitysosien pussissa on kaksi ruuvattavaa nuppia. Kierrä ruuvinuppeja hieman laitteessa olevaan vastaavaan kannattimeen.

20B. Avaa kaukalon alla olevaa säätönuppia, vedä kaukalo ulospäin ja aseta kannatin runkoon. Kiristä tiukalle.

Huom: varmista, että aluslevy on paikallaan.



Vertical tai Prone

21A. Poista 4 pulttia kaukalon pohjasta. Laita pultit talteen.

21B. Aseta kaukalo kannattimen päälle kuvassa esitetyllä tavalla.




Vertical tai Prone

22. Ruuvaa sisään molempia ruuveja, jotka ovat lähempänä tukia, sitten molempia etupuolen ruuveja. Kun kaikki ruuvit ovat paikoillaan, kiristä tiukalle.



Vertical tai Prone

23A. Mikäli laitteen mukana on tilattu valinnainen työntökahva, kannattimessa olevat pultit poistetaan kuvassa esitetyllä tavalla.

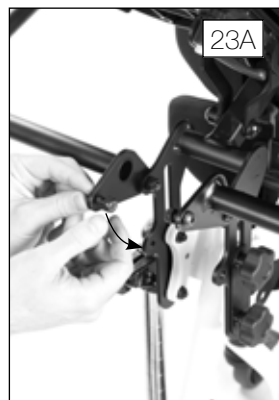


23B. Käännä työntökahvan toista päätä siten, että se kohdistuu pystyvarressa olevan reiän kohdalle. Työnnä pultti sisään ja ruuvaa mutteri pulttiin. Kiristä tiukalle. Toista vaiheet toiselle kahvalle.



24A. Mikäli laitteen mukana on tilattu Zing Tilt Table (TT), aseta tasomaisen päätuen kannatin ylävartalon tukityynyyn varmistaen, että välikkeet ovat paikoillaan kannattimen ja tyynyn välissä.



24B. Kiristä pultit tiukalle.

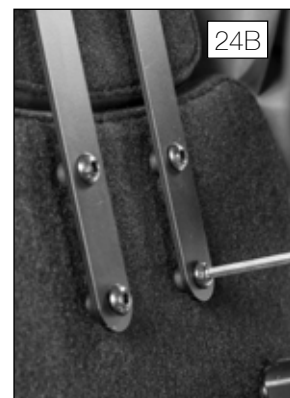


Säädöt & Käyttö

Pöydät

Musta muovattu/monisäätöinen pöytä: korkeussäätö

25. Pöytäkaukalon korkeuden säätämiseksi telineen takana olevia nuppeja avataan ja pöytä säädetään haluttuun kohtaan. Kiristä tiukalle.

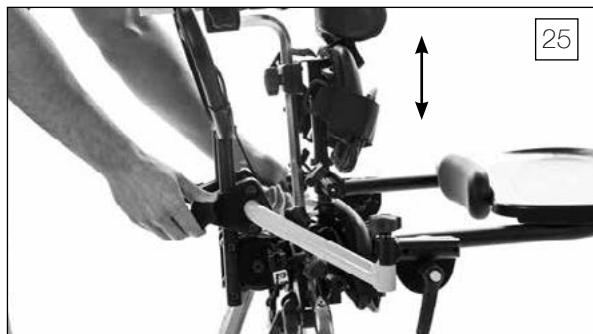


Musta muovattu pöytä: syvyyssäätö

26. Pöydän säätämiseksi nuppia avataan kunnes tuntuu vastusta, ja sen jälkeen nupin keskiössä oleva harmaa vipu käännetään kokonaan auki.




ÄLÄ kierrä nuppia liian pitkälle vastapäivään. Nupin vääntäminen väkisin yli pysäytyskohdan vaurioittaa mekanisme.

Pöytä voidaan nyt irrottaa kokonaan tai säätää haluttuun kohtaan tangossa olevien lukitusreikien avulla.

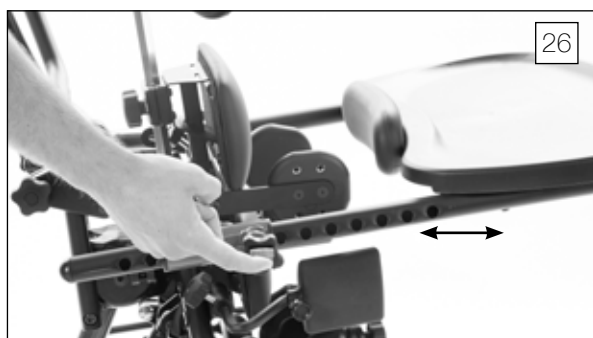


Monisäätöinen pöytä: syvyyssäätö

27. Avaa pöydän alla olevaa nuppia ja vedä tai työnnä pöytä haluttuun kohtaan. Kiristä tiukalle.

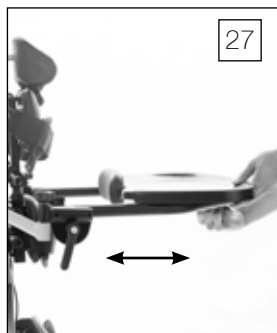

Monisäätöinen pöytä: kallistussäätö



28. Pöydän kallistuksen säätämiseksi avataan pöydän molemmilla sivuilla olevia räikkäkahvoja ja pöytä säädetään haluttuun asentoon. Kiristä tiukalle.

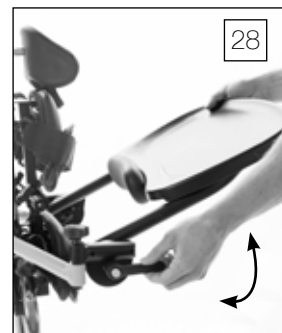

Sivuun käännettävä monisäätöinen pöytä

29. Avaa nuppia vain toiselta sivulta, kunnes voit kääntää pöydän sivuun.

30. Käännä pöytä sivuun siirtymisen mahdollistamiseksi.

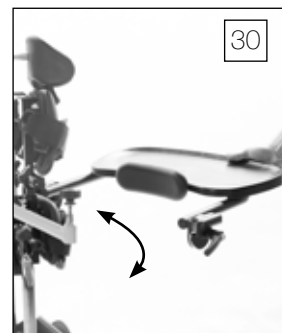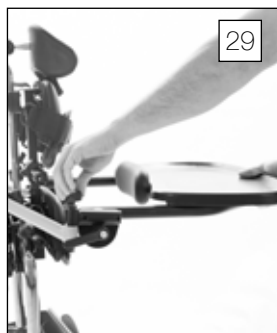


Lonkkatuet

31. Lonkkatukien leveyttä voidaan säätää lantiotuen takana olevia nuppeja avaamalla. Lantiotuissa on sekä käsinupit että asetusruuvit etu/takasäätöä varten. Kiristä tiukalle.




Sivutuet (MPS, SUPINE, VERTICAL ja PRONE)

32. Sivutukien leveyttä voidaan säätää telineen takana olevia nuppeja avaamalla. Kiristä aina tiukalle. Syvyyttä voidaan säätää avaamalla molempia pultteja, kun haluttu asema on saavutettu. Kiristä tiukalle.

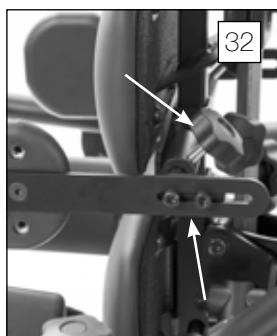

33. Sivutuissa on tyynyn takana useita kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat lisäsäätämisen pysty- ja vaakatasossa. Tyyny voidaan myös kiinnittää korkealle, matalalle tai neutraaliin asemaan tuen aikaansaamiseksi mahdollisimman laajalle alueelle.

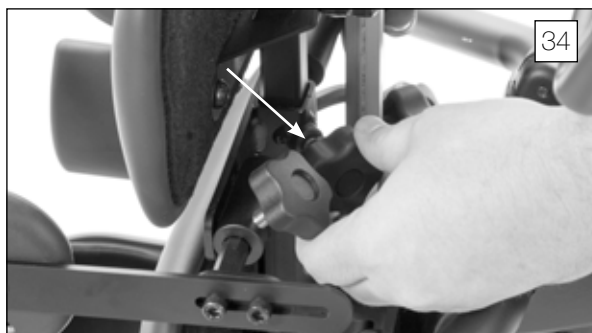

34. Sivutuen korkeuden säätämiseksi nuppia avataan, tuki säädetään haluttuun kohtaan ja kiristetään tiukalle.

Sivutuet (TILT TABLE)

35. Sivutuen korkeuden säätämiseksi nuppia avataan, tuki säädetään haluttuun kohtaan ja kiristetään tiukalle.




Pohjetuki polvihihnalla

36. Polvihihnalla varustetun pohjetuen säätämiseksi kummallakin puolella olevia nuppeja avataan. Suorita etu/taka- ja pystysuuntainen säätö ja kiristä tiukalle.




Monisäätöiset polvituet

37. Monisäätöisen polvituen korkeuden säätämiseksi avataan räikkäkahvaa, säädetään ja kiristetään tiukalle.

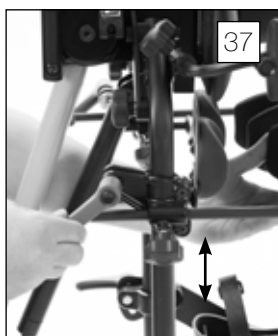

38. Monisäätöisen polvituen syvyyden säätämiseksi avataan vipua, suoritetaan säätö ja kiristetään tiukalle.

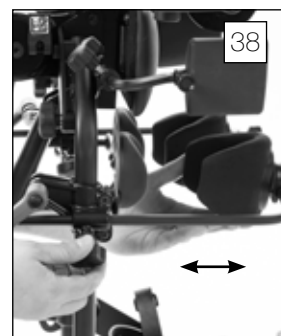

39. Monisäätöisen polvituen asennon säätämiseksi avataan nuppia ja tuki kierretään haluttuun asentoon. Kiristä tiukalle.




Itsenäisesti säädettävät pohjetuet

40. Itsenäisesti säädettävän pohjetuen syvyyden säätämiseksi avataan vipua, suoritetaan säätö ja kiristetään tiukalle.



41. Irrota pultit ja säädä pohjetuen korkeus halutunlaiseksi. Kiristä tiukalle.

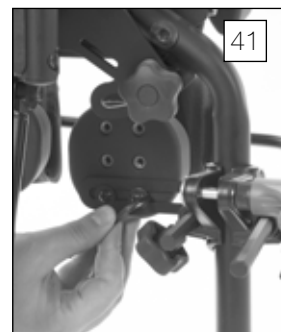


Päätuki

42. Päätuen kannattimen korkeuden säätämiseksi avataan selkänojassa olevaa nuppia, suoritetaan säätö ja kiristetään tiukalle.

43. Päätuen kannattimen syvyyden säätämiseksi avataan päätuen takana olevaa nuppia, suoritetaan säätö ja kiristetään tiukalle.

Päätuen kannattimen kallistuksen säätämiseksi avataan räikkäkahvaa, suoritetaan säätö ja kiristetään tiukalle.

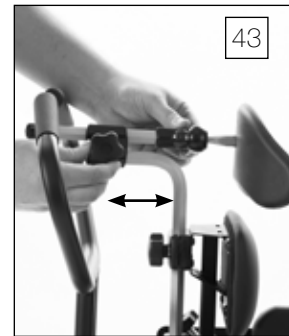

Ylävartalotuki



44. Ylävartalon tuen korkeuden säätämiseksi avataan vipua, painetaan jousipainiketta ja suoritetaan säätö. Kiristä tiukalle.

Tasomaiset jalkalaudat

45. Korkeus – Tasomaiset jalkalaudat ovat ainoastaan korkeussäädettäviä. Avaa vipua, suorita säätö ja kiristä tiukalle.

46A. Hihnat – Asenna hihnat sopiviin hahloihin.

46B. Jalanpitimet – Aseta jalanpitimet haluttuun asentoon. Työnnä pultti paikalleen ja kiristä nuppi tiukalle.

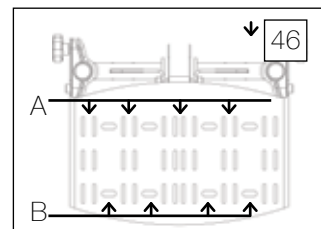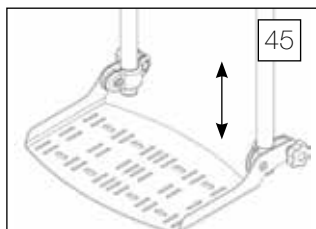

Monisäätöiset jalkalaudat

45. Korkeus – Avaa räikkäkahvoja, jotka liittävät kannattimen telineen pystyputkiin ja säädä jalkalaudan korkeus.







48. Jalkapohjan/jalkapöydän liikesäätö – Avaa räikkäkahvoja jalkalautojen kallistamiseksi. Kiristä tiukalle.

49. Loitonnus – Avaa nuppeja jalkalautojen siirtämiseksi yhteen. Kiristä nupit tiukalle.

50. Etu/takasäätö – Avaa jalkalautojen alla olevia nuppeja, säädä jalkalautojen paikka ja kiristä nupit tiukalle.

51. Kulmasäätö – Avaa jalkalautojen alla olevia nuppeja, säädä jalkalautojen paikka ja kiristä nupit tiukalle.

52. Loitonnus – Avaa räikkäkahvoja jalkalautojen siirtämiseksi erilleen ja kiristä tiukalle. Avaa jalkalautojen alla olevia nuppeja, siirrä jalkalautoja erilleen ja kiristä nupit tiukalle.

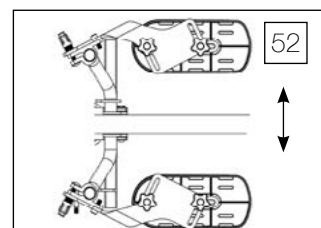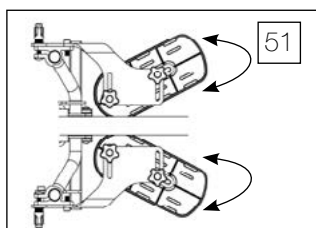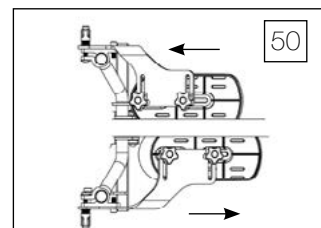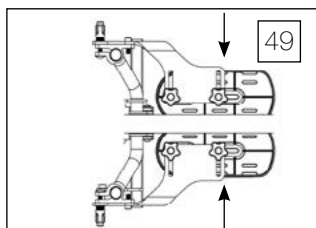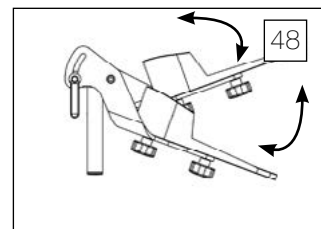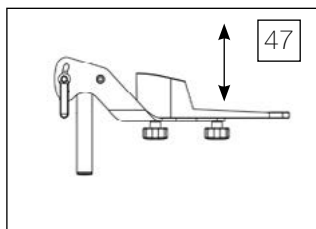

Varoitus: jalkalautoja ei tule koskaan säätää lapsen ollessa seisoma-asennossa.




Varoitus: vältä sormien joutumista säätöhahloon.

Jalkojen loitonnus

53. Avaa lantiotuen takana olevaa nuppia.





54. Loitonna kumpaakin tukitankoa haluttuun asentoon, korkeintaan 30 astetta per jalka. Kiristä tiukalle.

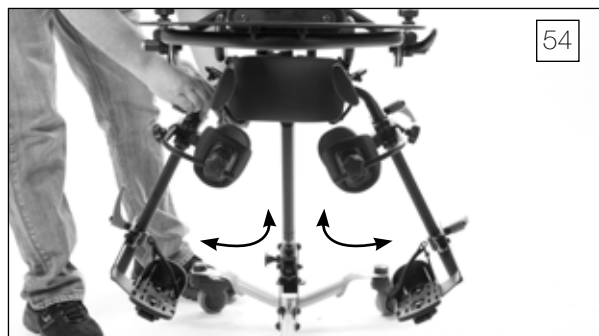

Selinmakuu (vain MPS)

55. Käännä lantiotuen takana sijaitseva vipu "selinmakuulta seisomaan" -asentoon.


56. Sääda haluttuun selinmakuuasentoon jalkapoljinta painamalla ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa telineessä.

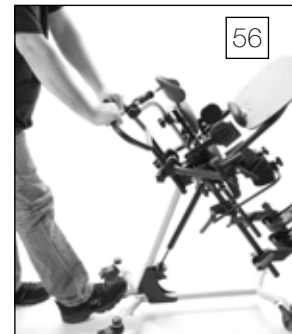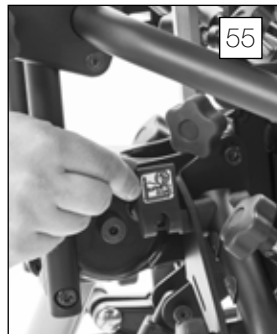

Vatsa-asento (vain MPS)

57. Käännä lantiotuen takana sijaitseva vipu "vatsa-asentoon".


58. Sääda haluttuun vatsa-asentoon jalkapoljinta painamalla ja kallistamalla. Tämä voidaan tehdä käyttäjän ollessa telineessä.

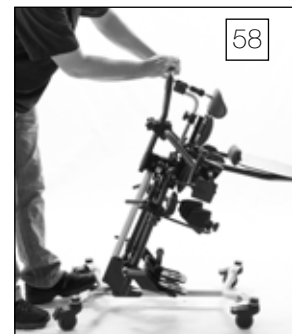

Kaksoissäätö

59. Purista kahvaa telineen säätämiseksi haluttuun asentoon.


60. Sääda teline haluttuun asentoon jalkapoljinta käyttäen.

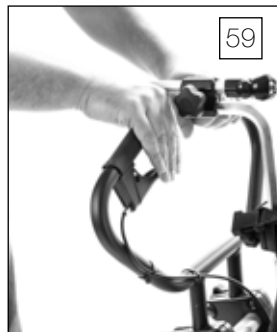

Kaasujousen lukitus

61. Vedä lukitsimen nuppia ja avaa kiertämällä. Telineettä voidaan nyt säätää jalkapolkimen tai käsikahvan avulla.

62. Kierrä, kunnes nuppi on pystysuorassa ja lukittuu paikalleen. Kaasujousi on nyt lukittu taha-tonta liikettä vastaan.

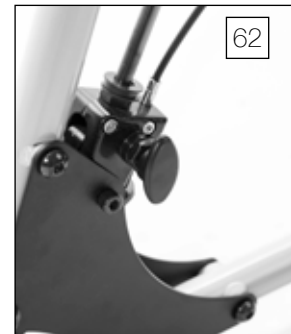

Suuntalukittava pyörä

63. Lukitse oikea takapyörä telineen ohjautumiseksi suoraan. Kääntyvän pyörän lukitseminen lukitsee pyörän pyörimissuunnan, muttei estä pyörää pyörimästä.




Kasvoaukko

64. Avaa tuessa olevaa nuppia. Työnnä kasvokehikko hahloon ja kiristä nuppi tiukalle.




Osien erittely – Supine

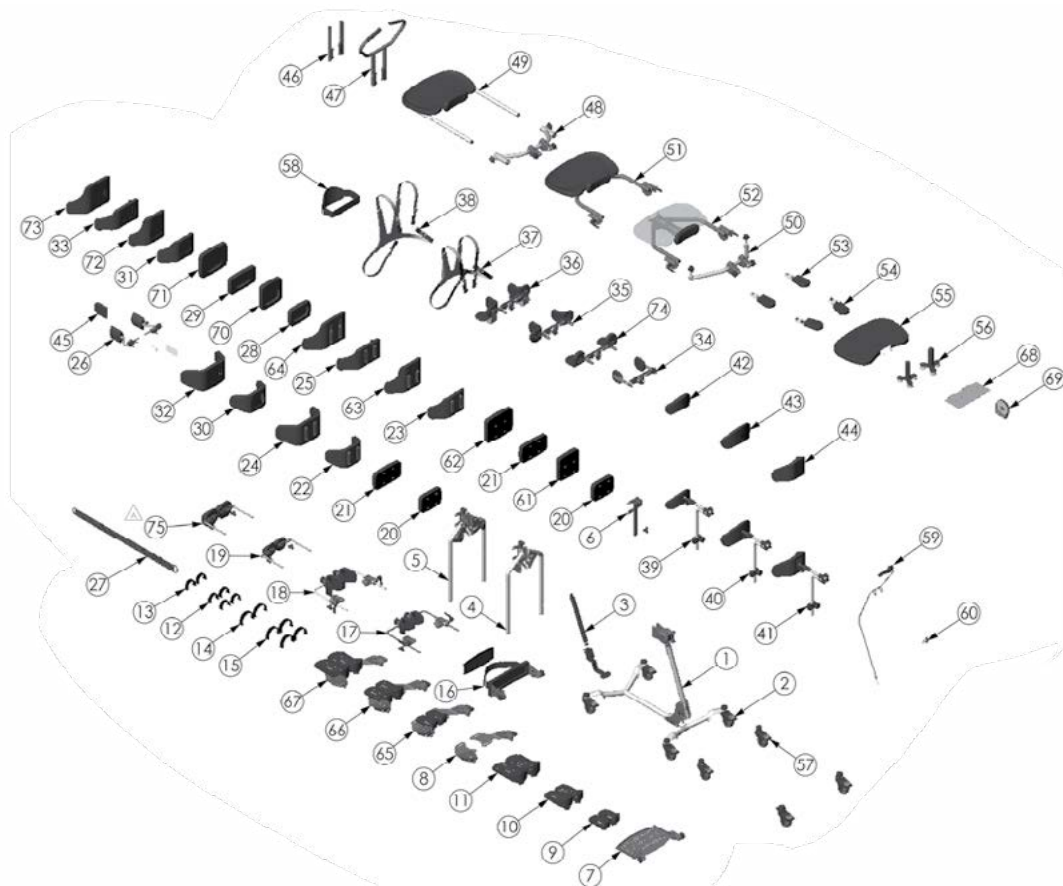

ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME
1	A5522	A	1	ASMBLY BASE ZING SUPINE	38	T50088	000	1	ASMBLY CHEST VEST SM
2	A5526	000	1	ASMBLY CASTERS BASIC MPS	39	Y5626	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT XS
3	A5528	000	1	ASMBLY GAS SPRING LIFT MPS	40	Y5628	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT SMALL
4	A5530	B	1	ASMBLY LEGS MPS STANDARD	41	A5586	000	1	ASMBLY HEAD REST CONTOUR SM
5	A5532	B	1	ASMBLY LEGS MPS ABDUCTION	42	A3035	000	1	SLIP COVER HEAD REST XS
6	A5534	000	1	ASMBLY MAST MPS	43	A3036	000	1	SLIP COVER HEAD REST SM
7	A5536	000	1	ASMBLY PLATFORM FOOT PLATE MPS	44	A3037	000	1	COVER HEAD REST CONTOUR SM
8	A5538	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS MULTI-ADJ	45	A3039	000	1	SLIP COVER 3.5" LATERAL PAD
9	A5540	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS EI	46	A5592	000	1	ASMBLY TRAY ASSEMBLY MOUNT MPS
10	A5542	000	1	ASMBLY FOOT PLATES XS	47	A5594	000	1	ASMBLY PUSH HANDLE MPS
11	A5544	000	1	ASMBLY FOOT PLATES SM	48	A5595	000	1	ASMBLY TABLE MOUNT BASIC MPS
12	A5546	000	1	ASMBLY SECURE FOOT STRAPS XS	49	A5596	000	1	ASMBLY TRAY MOLDED MPS
13	A5548	000	1	ASMBLY FOOT STRAPS XS	50	A5599	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT TILT MPS
14	T50080	A	1	ASMBLY FOOT STRAP PED	51	A5600	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY MPS
15	T50082	A	1	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED	52	A5602	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY CLEAR MPS
16	A5550	000	1	ASMBLY KNEE PAD SOFT MPS	53	A5604	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS MPS
17	A5556	000	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE XS	54	A5606	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS
18	A5558	000	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE SM	55	A3038	000	1	PADDED SLIP COVER TRAY MPS
19	A5560	000	1	ASMBLY CALF PAD INDEPENDENT MPS	56	NG50042	000	1	SUPPORT GRIP OPTION
20	A5562	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 7"	57	A5608	000	1	ASMBLY CASTERS DIRECTIONAL MPS
21	A5564	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 9"	58	A5610	000	1	ASMBLY CHEST STRAP MPS
22	A5566	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" XS	59	A5612	000	1	ASMBLY DUAL LIFT CONTROL MPS XS
23	A5568	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" XS	60	A5614	000	1	ASMBLY GAS SPRING LOCK OUT
24	A5570	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" SM	61	A5616	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" X 7"
25	A5572	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" SM	62	A5618	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" X 9"
26	A5574	000	1	ASMBLY HIP GUIDES MPS XS	63	A5620	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" XS
27	A3011	000	1	POSITIONING BELT ADJUSTABLE XS	64	A5622	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" SM
28	A3028	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 7"	65	A5624	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS EI
29	A3029	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 9"	66	A5626	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS XS
30	A3030	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" XS	67	A5628	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS SM
31	A3031	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" XS	68	80809	A	1	TOOL POUCH
32	A3032	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" SM	69	80246	000	1	SEAT ANGLE LOCATOR
33	A3033	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" SM	70	A3045	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 7"
34	A5576	A	1	ASMBLY LATERAL GUIDES MPS SM	71	A3046	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 9"
35	A5578	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	72	A3047	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" XS
36	A5580	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	73	A3048	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" SM
37	T50086	000	1	ASMBLY CHEST VEST XS	74	A5630	000	1	ASMBLY ELBOW / ARM PAD MPS XS
					75	A5678	000	1	ASMBLY CALF PAD 4.5" X 4.5"


Osien erittely – MPS

(moniasentoinen seisomateline)

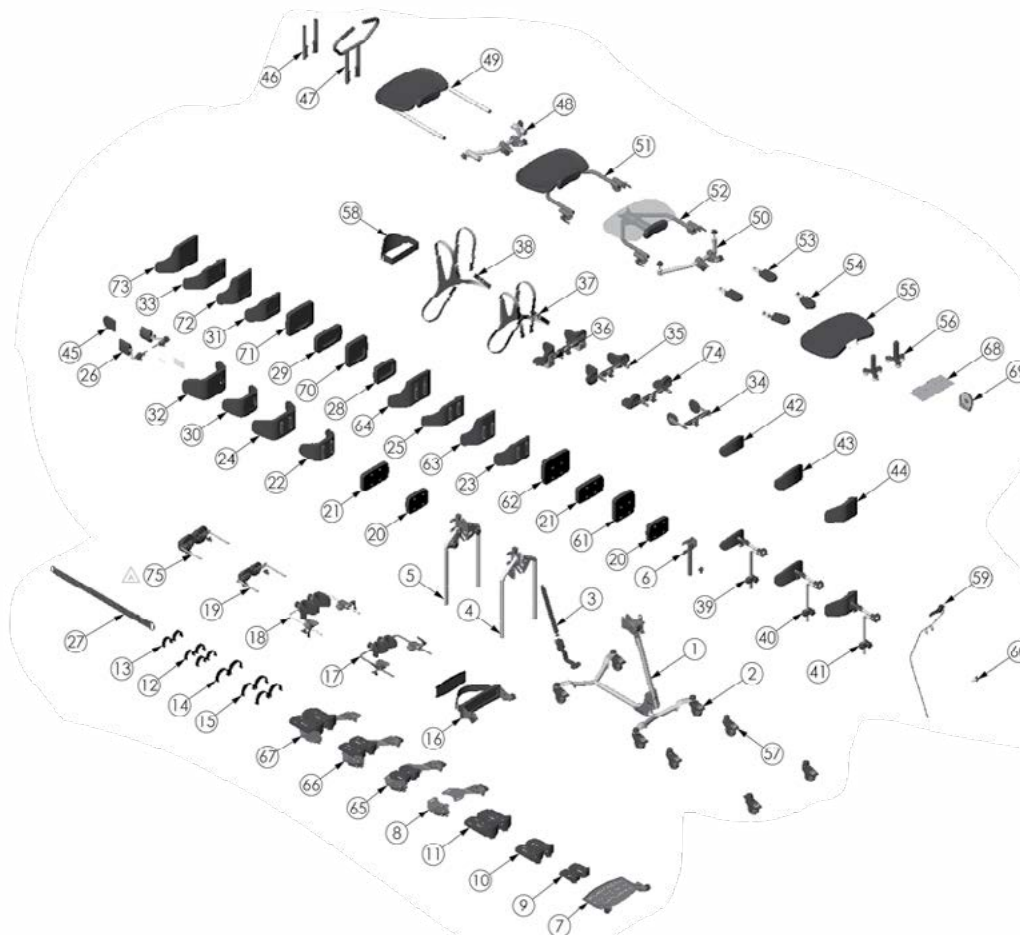

ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME
1	A5520	A	1	ASMBLY BASE ZING FORWARD PRONE	38	T50088	000	1	ASMBLY CHEST VEST SM
2	A5526	000	1	ASMBLY CASTERS BASIC MPS	39	Y5626	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT XS
3	A5528	000	1	ASMBLY GAS SPRING LIFT MPS	40	Y5628	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT SMALL
4	A5530	B	1	ASMBLY LEGS MPS STANDARD	41	A5586	000	1	ASMBLY HEAD REST CONTOUR SM
5	A5532	B	1	ASMBLY LEGS MPS ABDUCTION	42	A3035	000	1	SLIP COVER HEAD REST XS
6	A5534	000	1	ASMBLY MAST MPS	43	A3036	000	1	SLIP COVER HEAD REST SM
7	A5536	000	1	ASMBLY PLATFORM FOOT PLATE MPS	44	A3037	000	1	COVER HEAD REST CONTOUR SM
8	A5538	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS MULTI-ADJ	45	A3039	000	1	SLIP COVER 3.5" LATERAL PAD
9	A5540	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS EI	46	A5592	000	1	ASMBLY TRAY ASSEMBLY MOUNT MPS
10	A5542	000	1	ASMBLY FOOT PLATES XS	47	A5594	000	1	ASMBLY PUSH HANDLE MPS
11	A5544	000	1	ASMBLY FOOT PLATES SM	48	A5595	000	1	ASMBLY TABLE MOUNT BASIC MPS
12	A5546	000	1	ASMBLY SECURE FOOT STRAPS XS	49	A5596	000	1	ASMBLY TRAY MOUNTED MPS
13	A5548	000	1	ASMBLY FOOT STRAPS XS	50	A5599	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT TILT MPS
14	T50090	A	1	ASMBLY FOOT STRAP PED	51	A5600	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY MPS
15	T50082	A	1	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED	52	A5602	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY CLEAR MPS
16	A5550	000	1	ASMBLY KNEE PAD SOFT MPS	53	A5604	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS MPS
17	A5556	000	1	ASMBLY KNEE PAD ADJUSTABLE XS	54	A5606	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS
18	A5558	000	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE SM	55	A3038	000	1	PADDED SLIP COVER TRAY MPS
19	A5560	000	1	ASMBLY CALF PAD INDEPENDENT MPS	56	NG50042	000	1	SUPPORT GRIP OPTION
20	A5562	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 7"	57	A5608	000	1	ASMBLY CASTERS DIRECTIONAL MPS
21	A5564	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 9"	58	A5610	000	1	ASMBLY CHEST STRAP MPS
22	A5566	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" XS	59	A5612	000	1	ASMBLY DUAL LIFT CONTROL MPS XS
23	A5568	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" XS	60	A5614	000	1	ASMBLY GAS SPRING LOCK OUT
24	A5570	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" SM	61	A5616	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" X 7"
25	A5572	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" SM	62	A5618	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" X 9"
26	A5574	000	1	ASMBLY HIP GUIDES MPS XS	63	A5620	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" XS
27	A3011	000	1	POSITIONING BELT ADJUSTABLE XS	64	A5622	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" SM
28	A3028	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 7"	65	A5624	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS EI
29	A3029	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 9"	66	A5626	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS XS
30	A3030	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" XS	67	A5628	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS SM
31	A3031	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" XS	68	80809	A	1	TOOL POUCH
32	A3032	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" SM	69	80744	000	1	SEAT ANGLE LOCATOR
33	A3033	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" SM	70	A3045	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 7"
34	A5576	A	1	ASMBLY LATERAL GUIDES MPS SM	71	A3046	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 9"
35	A5578	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	72	A3047	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" XS
36	A5580	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	73	A3048	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" SM
37	T50086	000	1	ASMBLY CHEST VEST XS	74	A5630	000	1	ASMBLY ELBOW / ARM PAD MPS XS
					75	A5678	000	1	ASMBLY CALF PAD 4.5" X 4.5"


Osien erittely – Tilt Table Supine

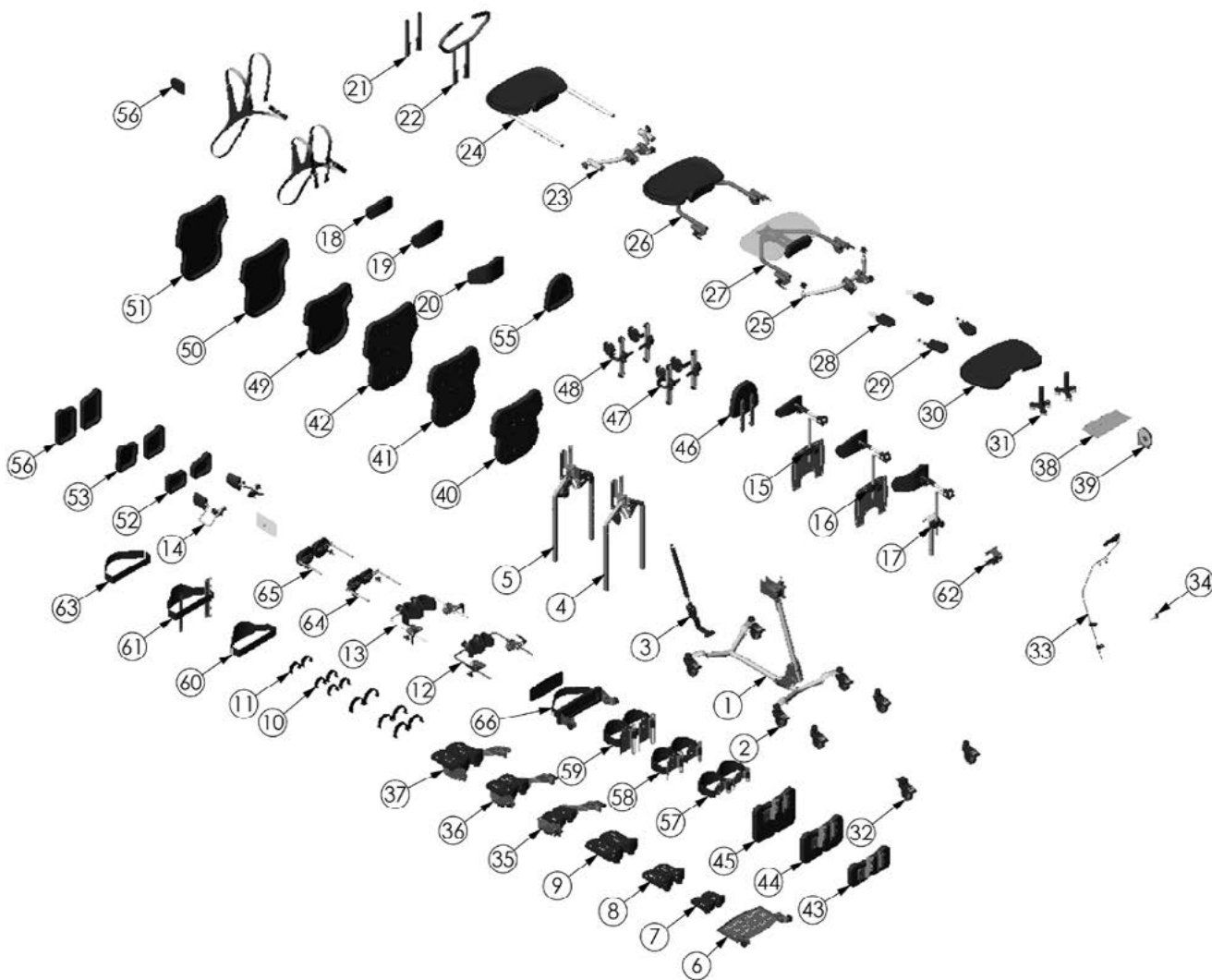

ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME
1	A5520	B	1	ASMBLY BASE ZING FORWARD PRONE
2	A5526	000	1	ASMBLY CASTERS BASIC MPS
3	A5528	A	1	ASMBLY GAS SPRING LIFT MPS
4	A5632	000	1	ASMBLY LEGS TT STANDARD
5	A5634	000	1	ASMBLY LEGS TT ABDUCTION
6	A5536	000	1	ASMBLY PLATFORM FOOT PLATE MPS
7	A5540	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS EI
8	A5542	000	1	ASMBLY FOOT PLATES XS
9	A5544	000	1	ASMBLY FOOT PLATES SM
10	A5546	000	1	ASMBLY SECURE FOOT STRAPS XS
11	A5548	000	1	ASMBLY FOOT STRAPS XS
12	A5556	A	1	ASMBLY KNEE MULTI ADJUSTABLE XS
13	A5558	A	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE SM
14	A5636	000	1	ASMBLY HIP GUIDES TT XS
15	Y5626	B	1	ASMBLY HEAD SUPPORT XS
16	Y5628	B	1	ASMBLY HEAD SUPPORT SMALL
17	A5586	A	1	ASMBLY HEAD REST CONTOUR SM
18	A3035	000	1	SLIP COVER HEAD REST XS
19	A3036	000	1	SLIP COVER HEAD REST SM
20	A3037	000	1	COVER HEAD REST CONTOUR SM
21	A5592	000	1	ASMBLY TRAY ASSEMBLY MOUNT MPS
22	A5594	000	1	ASMBLY PUSH HANDLE MPS
23	A5595	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT BASIC MPS
24	A5596	000	1	ASMBLY TRAY MOLDED MPS
25	A5599	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT TILT MPS
26	A5600	B	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY MPS
27	A5602	B	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY CLEAR MPS
28	A5604	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS MPS
29	A5606	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS
30	A3038	000	1	PADDED SLIP COVER TRAY MPS
31	NG50042	000	1	SUPPORT GRIP OPTION
32	A5608	000	1	ASMBLY CASTERS DIRECTIONAL MPS
33	A5612	A	1	ASMBLY DUAL LIFT CONTROL MPS XS
34	A5614	000	1	ASMBLY GAS SPRING LOCK OUT
35	A5624	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS EI
36	A5626	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS XS
37	A5628	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS SM
38	80809	A	1	TOOL POUCH
39	80246	000	1	SEAT ANGLE LOCATOR
40	A5638	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 14" X 14"
41	A5640	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 16" X 14"
42	A5642	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 18" X 14"
43	A5644	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 4"
44	A5646	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 6"
45	A5648	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 8"
46	A5650	A	1	ASMBLY HEAD PAD ZING PLANAR
47	A5652	000	1	ASMBLY LATERAL GUIDES TT 4" - 8"
48	A5654	000	1	ASMBLY LATERAL GUIDES TT 7" - 11"
49	A3063	000	1	SLIP COVER 14" X 14"
50	A3064	000	1	SLIP COVER 16" X 14"
51	A3065	000	1	SLIP COVER 18" X 14"
52	A5660	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 4" TT
53	A5662	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 6"
54	A5664	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 8"
55	A3066	000	1	SLIP COVER PLANAR HEAD SUPPORT XS
56	A3039	000	1	SLIP COVER 3.5" LATERAL PAD
57	A5666	A	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 4" PADS
58	A5668	A	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 6" PADS
59	A5670	A	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 8" PADS
60	A5672	000	1	ASMBLY STRAP W/PAD 25" - 38"
61	A5674	000	1	ASMBLY CHEST STRAP W/PAD TT
62	A5676	A	1	ASMBLY HEAD REST MOUNT ZING TT
63	A3062	000	1	POSITIONING BELT ADJUSTABLE TT
64	A5560	000	1	ASMBLY CALF PAD INDEPENDENT MPS
65	A5678	000	1	ASMBLY CALF PAD 4.5" X 4.5"
66	A5550	000	1	ASMBLY KNEE PAD SOFT MPS
67	T50080	A	1	ASMBLY FOOT STRAP PED
68	T50082	A	1	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED
69	T50086	000	1	ASMBLY CHEST VEST XS
70	T50088	000	1	ASMBLY CHEST VEST SM


Osien erittely – Tilt Table MPS

(moniasentoinen seisomateline)

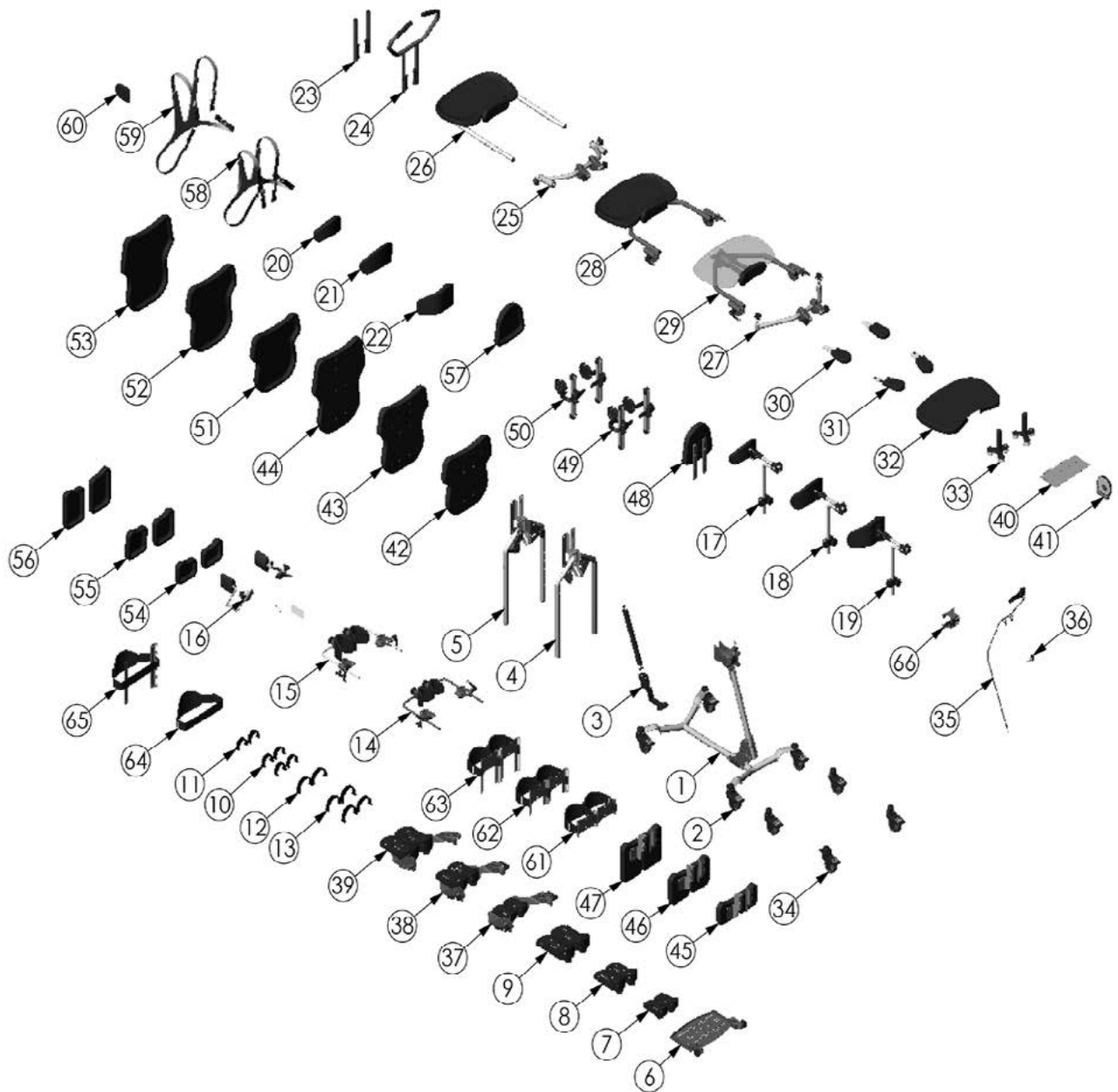


ITEM NO.	PART NO.	REV	QTY.	NAME
1	A5520	A	1	ASMBLY BASE ZING FORWARD PRONE
2	A5526	000	1	ASMBLY CASTERS BASIC MPS
3	A5528	000	1	ASMBLY GAS SPRING LIFT MPS
4	A5632	000	1	ASMBLY LEGS TT STANDARD
5	A5634	000	1	ASMBLY LEGS TT ABDUCTION
6	A5536	000	1	ASMBLY PLATFORM FOOT PLATE MPS
7	A5540	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS EI
8	A5542	000	1	ASMBLY FOOT PLATES XS
9	A5544	000	1	ASMBLY FOOT PLATES SM
10	A5546	000	1	ASMBLY SECURE FOOT STRAPS XS
11	A5548	000	1	ASMBLY FOOT STRAPS XS
12	T50080	A	1	ASMBLY FOOT STRAP PED
13	T50082	A	1	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED
14	A5556	000	1	ASMBLY KNEE MULTI ADJUSTABLE XS
15	A5558	000	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE SM
16	A5636	000	1	ASMBLY HIP GUIDES TT XS
17	Y5626	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT XS
18	Y5628	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT SMALL
19	A5586	000	1	ASMBLY HEAD REST CONTOUR SM
20	A3035	000	1	SLIP COVER HEAD REST XS
21	A3036	000	1	SLIP COVER HEAD REST SM
22	A3037	000	1	COVER HEAD REST CONTOUR SM
23	A5592	000	1	ASMBLY TRAY ASSEMBLY MOUNT MPS
24	A5594	000	1	ASMBLY PUSH HANDLE MPS
25	A5595	000	1	ASMBLY TABLE MOUNT BASIC MPS
26	A5596	000	1	ASMBLY TRAY MOLDED MPS
27	A5599	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT TILT MPS
28	A5600	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY MPS
29	A5602	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWAY CLEAR MPS
30	A5604	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS MPS
31	A5606	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS
32	A3038	000	1	PADDED SLIP COVER TRAY MPS
33	NG50042	000	1	SUPPORT GRIP OPTION
34	A5608	000	1	ASMBLY CASTERS DIRECTIONAL MPS
35	A5612	000	1	ASMBLY DUAL LIFT CONTROL MPS XS
36	A5614	000	1	ASMBLY GAS SPRING LOCK OUT
37	A5624	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS EI
38	A5626	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS XS
39	A5628	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS SM
40	80809	A	1	TOOL POUCH
41	80246	000	1	SEAT ANGLE LOCATOR
42	A5638	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 14" X 14"
43	A5640	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 16" X 14"
44	A5642	000	1	ASMBLY PAD ZING PLANAR 18" X 14"
45	A5644	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 4"
46	A5646	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 6"
47	A5648	000	1	ASMBLY LEG PAD ZING TT 8"
48	A5650	000	1	ASMBLY HEAD PAD ZING PLANAR
49	A5652	000	1	ASMBLY LATERAL GUIDES TT 4" - 8"
50	A5654	000	1	ASMBLY LATERAL GUIDES TT 7" - 11"
51	A3063	000	1	SLIP COVER 14" X 14"
52	A3064	000	1	SLIP COVER 16" X 14"
53	A3065	000	1	SLIP COVER 18" X 14"
54	A5660	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 4" TT
55	A5662	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 6"
56	A5664	000	1	ASMBLY SLIP COVERS LEG PAD 8"
57	A3066	000	1	SLIP COVER PLANAR HEAD SUPPORT XS
58	T50086	000	1	ASMBLY CHEST VEST XS
59	T50088	000	1	ASMBLY CHEST VEST SM
60	A3039	000	1	SLIP COVER 3.5" LATERAL PAD
61	A5666	000	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 4" PADS
62	A5668	000	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 6" PADS
63	A5670	000	1	ASMBLY KNEE STRAP TT 8" PADS
64	A5672	000	1	ASMBLY STRAP W/PAD 25" - 38"
65	A5674	000	1	ASMBLY CHEST STRAP W/PAD TT
66	A5676	000	1	ASMBLY HEAD REST MOUNT ZING TT

Osien erittely – Vertical

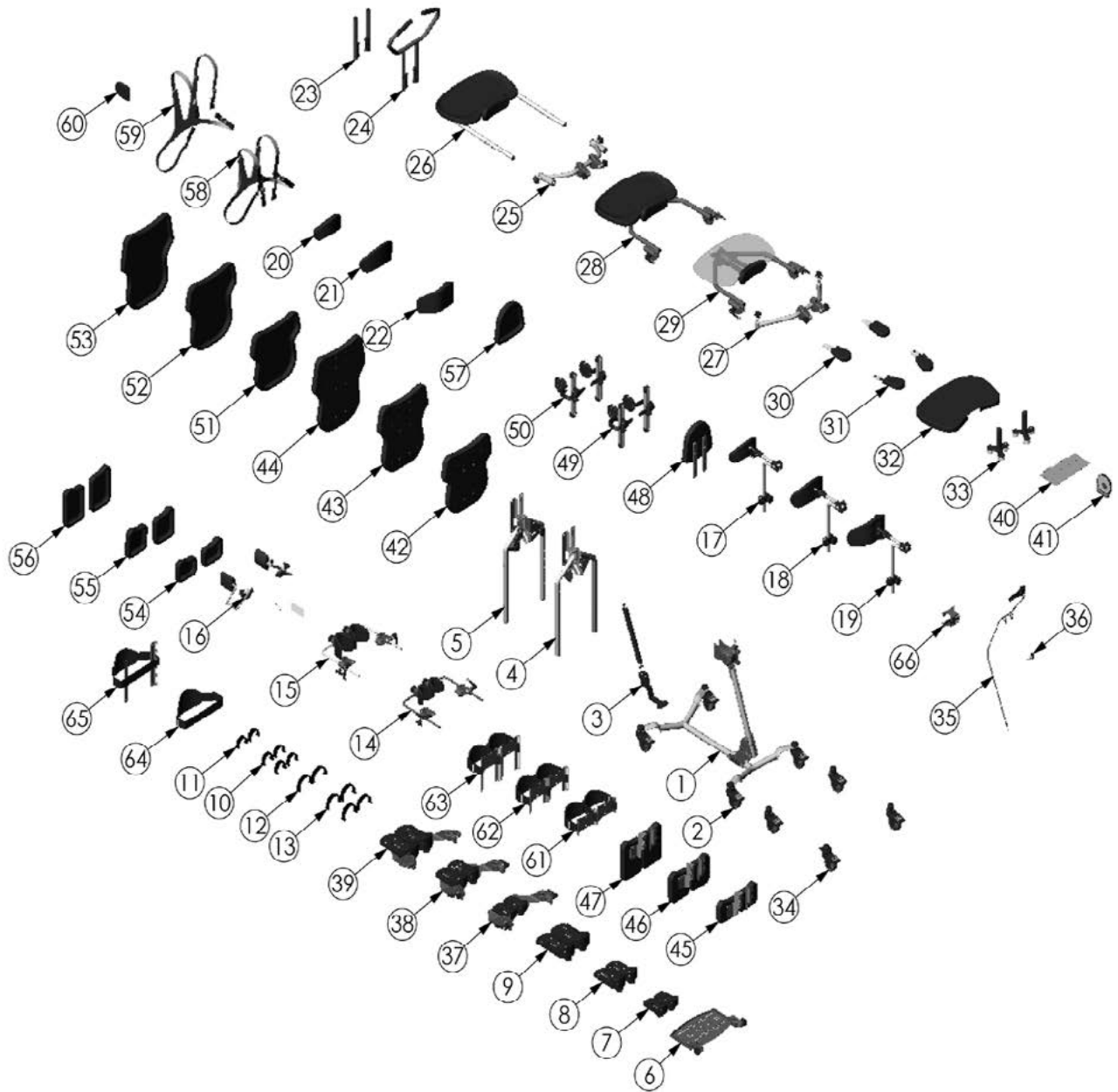

Osien erittely – Prone

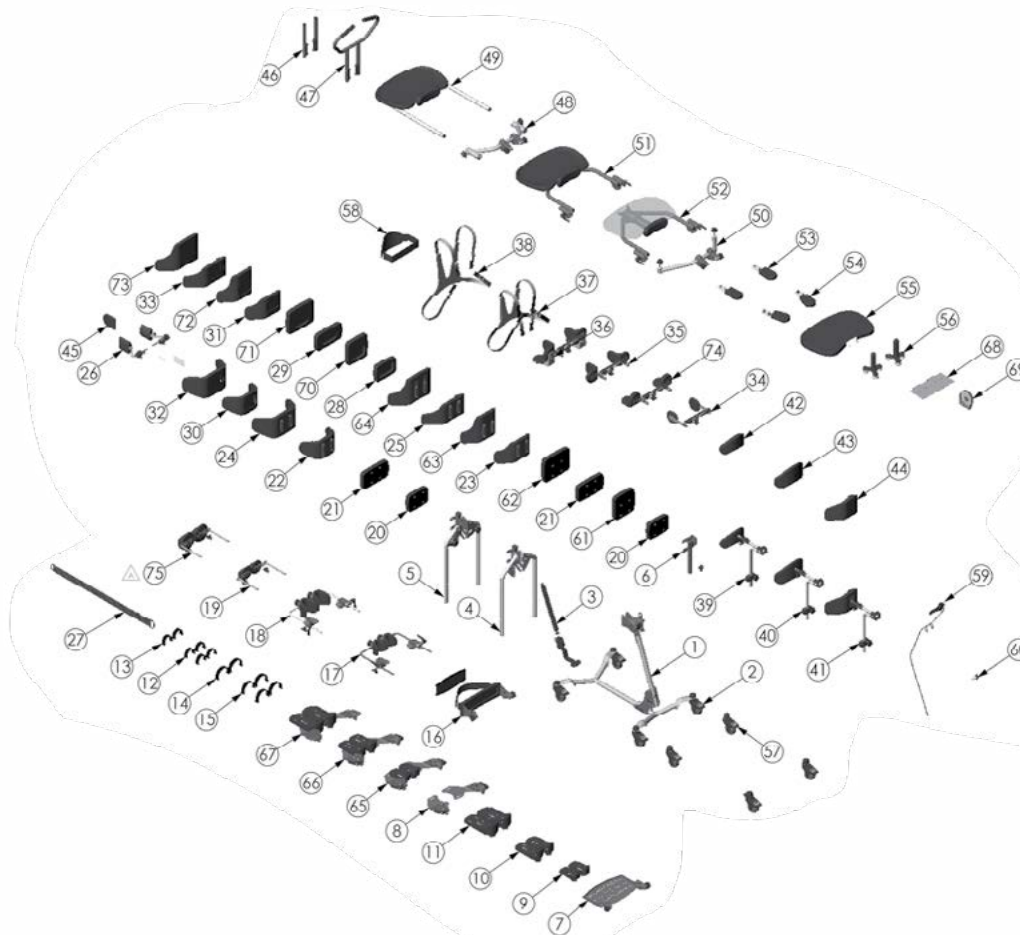

ITEM NO.	PART NO.	B/V	QTY.	NAME	ITEM NO.	PART NO.	B/V	QTY.	NAME
1	A5520	A	1	ASMBLY BASE ZING FORWARD PRONE	38	150088	000	1	ASMBLY CHEST VEST SM
2	A5526	000	1	ASMBLY CASTERS BASIC MPS	39	Y5626	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT XS
3	A5528	000	1	ASMBLY GAS SPRING LIFT MPS	40	Y5628	A	1	ASMBLY HEAD SUPPORT SMALL
4	A5530	B	1	ASMBLY LEGS MPS STANDARD	41	A5586	000	1	ASMBLY HEAD REST CONTOUR SM
5	A5532	B	1	ASMBLY LEGS MPS ABDUCTION	42	A3035	000	1	SLIP COVER HEAD REST XS
6	A5534	000	1	ASMBLY MAIST MPS	43	A3036	000	1	SLIP COVER HEAD REST SM
7	A5636	000	1	ASMBLY PLATFORM FOOT PLATE MPS	44	A3037	000	1	COVER HEAD REST CONTOUR SM
8	A5538	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS MULTI-ADJ	45	A3039	000	1	SLIP COVER 3.5" LATERAL PAD
9	A5540	000	1	ASMBLY FOOT PLATE MPS EI	46	A5592	000	1	ASMBLY TRAY ASSEMBLY MOUNT MPS
10	A5542	000	1	ASMBLY FOOT PLATES XS	47	A5594	000	1	ASMBLY PUSH HANDLE MPS
11	A5544	000	1	ASMBLY FOOT PLATES SM	48	A5595	000	1	ASMBLY TABLE MOUNT BASIC MPS
12	A5546	000	1	ASMBLY SECURE FOOT STRPS XS	49	A5596	000	1	ASMBLY TRAY 1" MOLDED BUMP
13	A5548	000	1	ASMBLY FOOT STRAPS XS	50	A5599	A	1	ASMBLY TABLE MOUNT TILT MPS
14	150080	A	1	ASMBLY FOOT STRAP PED	51	A5600	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWARD MPS
15	150082	A	1	ASMBLY FOOT STRAP SECURE PED	52	A5602	A	1	ASMBLY TRAY SWING AWARD CLEAR MPS
16	A5550	000	1	ASMBLY KNEE PAD SOFT MPS	53	A5604	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS MPS
17	A5556	000	1	ASMBLY KNEE MULTI ADJUSTABLE XS	54	A5606	000	1	ASMBLY FOREARM WINGS CLEAR MPS
18	A5558	000	1	ASMBLY KNEE MULTI-ADJUSTABLE SM	55	A3038	000	1	PADDED SLIP COVER TRAY MPS
19	A5560	000	1	ASMBLY CALF PAD INDEPENDENT MPS	56	NG50042	000	1	SUPPORT GRIP OPTION
20	A5562	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 7"	57	A5608	000	1	ASMBLY CASTERS DIRECTIONAL MPS
21	A5564	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 5" X 9"	58	A5610	000	1	ASMBLY CHEST TRAP MPS
22	A5566	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" XS	59	A5612	000	1	ASMBLY DUAL LIFT CONTROL MPS XS
23	A5568	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" XS	60	A5614	000	1	ASMBLY C-CLIP SWING LOCK OUT
24	A5570	000	1	ASMBLY CONTOUR PELVIC 5" SM	61	A5616	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" 9"
25	A5572	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 5" SM	62	A5618	000	1	ASMBLY PAD PLANAR 7" X 9"
26	A5574	000	1	ASMBLY HIP GUIDES MPS XS	63	A5620	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" XS
27	A3011	000	1	POSITIONING BELT ADJUSTABLE XS	64	A5622	000	1	ASMBLY CONTOUR BACK 7" SM
28	A3028	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 7"	65	A5624	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS EI
29	A3029	000	1	SLIP COVER PLANAR 5" X 9"	66	A5626	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS XS
30	A3030	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" XS	67	A5628	000	1	MULTI-ADJUSTABLE FOOT PLATE MPS SM
31	A3031	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" XS	68	B0809	A	1	TOOL POUCH
32	A3032	000	1	SLIP COVER CONTOUR PELVIC 5" SM	69	B0246	000	1	SEAT ANGLE LOCATOR
33	A3033	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 5" SM	70	A3045	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 7"
34	A5576	A	1	ASMBLY LATERAL GUIDES MPS SM	71	A3046	000	1	SLIP COVER PLANAR 7" X 9"
35	A5578	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	72	B3047	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" XS
36	A5580	A	1	ASMBLY LATERAL W/ ELBOW PAD MPS XS	73	A3048	000	1	SLIP COVER CONTOUR BACK 7" SM
37	150086	000	1	ASMBLY CHEST VEST XS	74	A5630	000	1	ASMBLY ELBOW ARM PAD MPS XS
					75	A5678	000	1	ASMBLY CALF PAD 4.5" X 4.5"

Kunnossapito

Puhdistaminen/desinfiointi

- Puhdista EasyStand miedolla, hankaamattomalla desinfointiaineella tai saippualla ja vedellä.
- Tarkasta EasyStand vähintään viikoittain sen varmistamiseksi, että kaikki mutterit, pultit ja säädettävät osat on kiristetty tiukalle. Tarkastuksen laiminlyönti saattaa johtaa osien irtoamiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran.
- Älä käytä valkaisuaineita tai muitakaan valkaisuainepohjaisia puhdistusaineita EasyStand-telineelle.
- Desinfointipyyhkeet ovat turvallisia käyttää metalli- ja muilla huokosettomilla pinnoilla.
- Käytä kosteaa sientä ja mietoa saippuaa tai mietoa, hankaamatonta desinfointiainetta.
- Puhdista neopreeniosat miedolla saippualla ja vedellä.
- Hygieniapäälliset voidaan irrottaa ja pestä käsin vedellä. Kuivaa päälliset ilmassa. Päällisten irrottamisessa ja uudelleen asentamisessa tulee noudattaa varovaisuutta.
- Älä tee kuivapuhdistusta verhoilulle.
- Mikäli EasyStand-telineellä on vain yksi käyttäjä, tulee teline puhdistaa kuukausittain tai tarpeen mukaan.
- Mikäli EasyStand-telineellä on monta käyttäjää, se tulee puhdistaa aina käytön jälkeen.

Uretaanipinnoitetut kankaat ja pestävät hygieniapäälliset (Dartex tai geneerinen vastine)

- Suositeltuja puhdistus- ja desinfointiohjeita on noudatettava aina sen ollessa mahdollista PU-kalvolle aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi, jotka saattaisivat johtaa päällisen ennenaikaiseen pilaantumiseen.
- Pinnallinen lika poistetaan kertakäyttöpyyhkeellä ja neutraalin puhdistusaineen lämpimällä liuoksella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Desinfioi 0,1-prosenttisella natriumhypokloriittiliuoksella (1000 ppm klooria); vahvempia valkaisuliukuksia ei suositella.
- Huuhtelee mahdolliset puhdistusaineliuosjäämät vedellä ja kuivaa kangas ennen uudelleen käyttämistä tai säilytystä.
- Älä käytä silitysrautaa.

Rajoitettu takuu

Tämä takuu koskee ainoastaan alkuperäistä ostajaa/asiakasta (tai välittäjää, joka ei osta tai myy edelleen). Altimate Medical, Inc. myöntää EasyStand -telineelle takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta jäljempänä luetellulla tavalla.

- Teräsrungot – 5 vuoden takuu
- Verhoillut osat, muovituotet, kumiosat, maalatut pinnat, laakeroinnit ja muut edellä erikseen mainitsemattomat osat – 90 päivän takuu
- Kaasujousi – 2 vuoden takuu

Takuuaika alkaa asiakkaalle myyjältä/toimittajalta tapahtuneen oston päivämäärästä. Mikäli tuote on vuokrattu tai muulla tavalla toimitettu kuluttajalle ilman myyntiä, takuu aika alkaa Altimate Medicalin laskutuspäivästä. Jokainen tuote, joka on Altimate Medicalia tyydyttävällä tavalla osoitettu vialliseksi takuuajan puitteissa, korjataan tai korvataan Altimate Medicalin harkinnan mukaisesti.

ALTIMATE MEDICALIN AINOA VELVOLLISUUS JA TEIDÄN YKSINOMAINEN OIKEUTENNE RAJOITTUU TMÄN TAKUUN PUITTEISSA TÄLLÄISEEN KORJAUKSEEN JA/TAI KORVAUKSEEN. Tämä takuu ei sisällä korvaavien osien asentamisesta aiheutuvia työ kustannuksia. Rahtikulut tehtaalle kuuluvat asiakkaan maksettavaksi myyjälle. Palautusrahdin kulut maksaa Altimate Medical. Takuuhuollon saamiseksi tulee ottaa yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta Altimate Medical –tuote on ostettu. Mikäli ette saa tyydyttävää takuupalvelua, kirjoittakaa suoraan Altimate Medicalille jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen. Tuotteita ei tule palauttaa tehtaалlemme ilman edeltävää valtuutusta.

RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET. Edellä mainittu takuu ei koske sarjanumerolla varustettuja tuotteita, jos sarjanumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka ovat olleet alttiina laiminlyönnille, väärinkäytölle, epäasianmukaiselle käytölle, huollolle, säilytykselle tai vaurioille, jotka eivät ole Altimate Medicalin hallittavissa, ja tämän arviointi kuuluu yksinomaan Altimate Medicalin tehtäväksi. Tämä takuu ei kata tuotteita, joihin on tehty muutoksia ilman Altimate Medicalin nimenomaista kirjallista suostumusta (mukaan lukien, niihin kuitenkin rajoittumatta, vieraita osia tai lisävarusteita käyttäen tehdyt muutokset). Takuu ei koske ongelmia, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Takuu mitätöityy, jos Altimate Medical –tuotteeseen lisätään osia, jotka eivät ole Altimate Medicalin valmistamia tai osia, jotka eivät ole alkuperäisten laitespesifikaatioiden mukaisia.

EDELLÄ KUVATTU TAKUU ON POISSULKEVA JA SYRJÄYTTÄÄ KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAKUUT. ALTIMATE MEDICAL EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI LIITÄNNÄISISTÄ VAHINGOISTA.

Altimate Medical harjoittaa jatkuvaa tuotteiden kehitystyötä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia ominaisuuksiin, teknisiin tietoihin ja hintoihin ilman aiempaa ilmoitusta. Tarkistakaa viimeisimmät tiedot Altimate Medicalilta.

Altimate Medical, Inc., 262 W, 1st St., Morton, MN 56270 USA
Puh. 507.697.6393 Maksuton linja: 800.342.8968 Fax: 507.697.6900
easystand.com info@easystand.com

Ympäristönäkökohdat

Tuotteen käyttöön päätyttyä:

- Kierrätä tuote kansallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Kierrätä kaikki metalliosat.
- Muoviosat tulee hävittää tai kierrättää kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.
- Tiedustele paikalliset koodit paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta ja kierrätyskeskuksesta
- Palauta kaasujousen sylinteri Altimate Medical Inc.:lle, mikäli paikallista kierrätysmahdollisuutta ei ole.



AltimateMedical

EasyStand

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
Toll Free: 800.342.8968 or 507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Jälleenmyyjä:

rehaco.

Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

EasyStand  [®] **CE**
standing made easy



Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. AMI maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest info.
FORM ZINGMPSTTMAN 120216 REV B Copyright © 2016 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.