



BioFit

Istuintyynty


NXT BioFit -pyörätuolityynyn monikerroksinen rakenne antaa tuetun istuma-asennon ja hyvän ihonsuojan käyttäjille, joilla on keskisuuri tai suuri painehaavaumariski. Paine jakautuu tasaisesti tyynyn istumapinnalle.



YLEISTÄ

NXT-istuintyynyjen muotoilu estää käyttäjän liukumisen ja antaa lantion asennolle tuennan. Koh-
talainen abduktori/adduktori-muotoilu varmistaa istuma-asennon keskilinjaisuuden. Takana
oleva kaarevuus antaa ristiselälle tilaa ja sopii modulaaristen selkätukiä kanssa käytettäväksi.
Istuintyynyn viistetty etureuna sopii hyvin potkutellen pyörätuolilla liikkuville ja käyttäjille, jotka
haluavat istua tiukalla eturunkokulmalla tai joilla on kireät hamstringlihakset.


- A** Säteittäin leikattu takaosa tukee ristiselkää
- B** Lantio-osan muotoilu estää liukumista antaen samalla lantiolle tuennan
- C** Kohtalainen abduktio-/adduktiomuotoilu ohjaa reisiluun keskilinjaista asentoa varten.
- D** Viistetty etureuna on eduksi pyörätuolilla potkutellen liikkuville tai käyttäjille, jotka haluavat istua tiukalla eturungon kulmalla tai joilla on kireät reisilihakset
- E** Teksturoitu luistamaton pohja, jossa on silmukka Velcro® kangas ja kantohihna
- F** Smartx3D-antimikrobinen 4-suuntainen polyesteri stretch-päällinen takaa käyttäjälle mukavan, toiminnallisen ja hengittävän istumisen.
- G** Vedenpitävä vetoketju

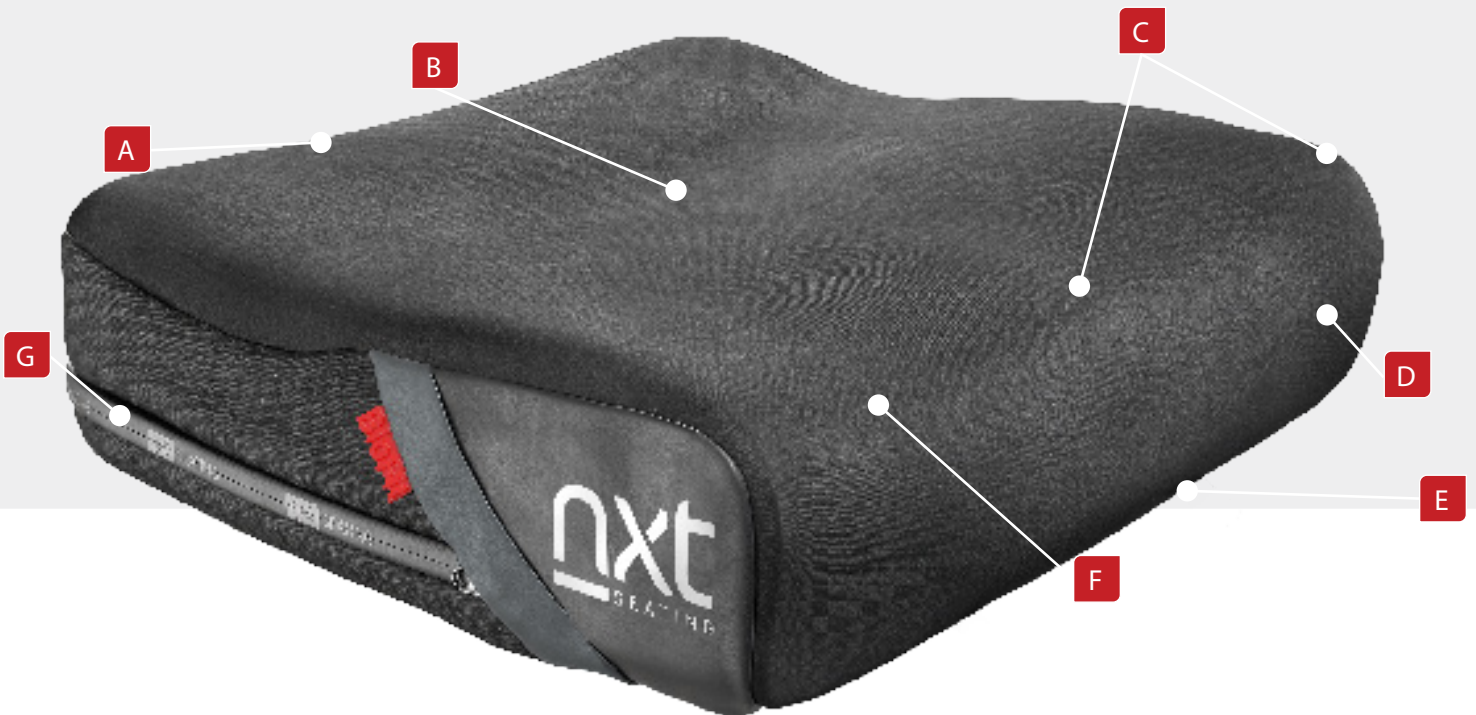

Sit Selective
Immersion Technology

NXT SIT (Selective Immersion Technology) -reikiä anatomiset sijainnit tukevat istuin- ja ristiselän aluetta liukumisen ja kitkan estämiseksi ja samalla lantion asennon säilyttämiseksi. Reiät on muotoiltu eri syvyyksiin ja ne ovat muodoltaan kartiomaisia. Tämä mahdollistaa upotuksen ja alhaisemman paineen luisiin ulokkeisiin ja tukee samalla ympäröiviä alueita, jotka voivat kestää suurempaa kuormitusta.

OMINAISUUDET

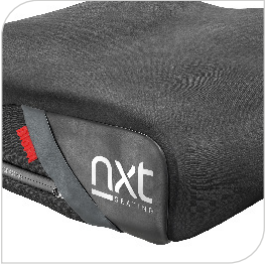

SMARTX3D ANTIMIKROBINEN 4-SUUNTAIN-
EN STRETCH PÄÄLLINEN TAKAA MUKA-
VUUDEN JA MATALAN LÄMPÖTILAN




KOSTEUSSULKUINEN VE-
TOKETJULLINEN SISÄPÄÄL-
LINEN



VAAHTOMUOVITYNYN
SMARTGELILLÄ

smartGEL™
INFUSED VISCO TECHNOLOGY

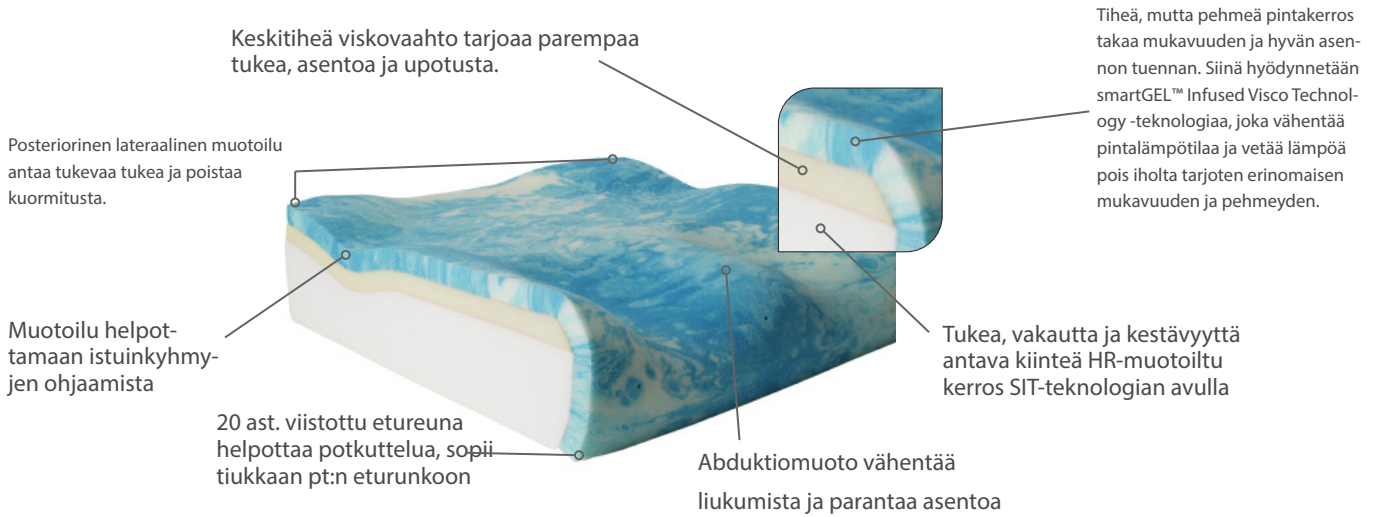


smartx3D

SMARTX3D ON MULLISTANUT NXT PYÖRÄTUOLITYNYN
JA SELKÄOSAT

Innovatiivinen smartx3D-kangas tarjoaa ennennäkemätöntä mukavuutta ja kestävyttä. Tämä edistysellinen kangas käyttää kolmikerroksista teknologiaa, joka sisältää ainutlaatuisen ilmatäytteen kanavoidun keskikerroksen, joka imee lämmön ja kosteuden pois materiaalista. Pehmeä, hengittävä ja kosteutta poistava smartx3D tarjoaa täydellisen mukavuutta.

- Erittäin pehmeä ja mukava
- Antimikrobinen
- Parantaa upotusta/ulottuvuutta
- Vähentää kitkaa
- 20 kertaa ilmanläpäisevämpi kuin tavalliset kankaat

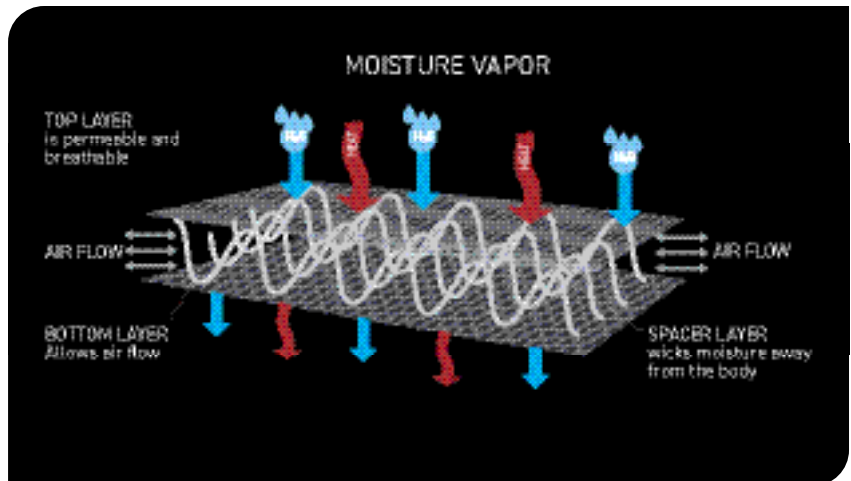

LISÄVARUSTEET



Lateraaliset kiilat

Paksuus 1,3 cm tai voidaan kak-sinkertaistaa 2,5 cm kokoiseksi. Ne on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä ja leikata sopivaksi. Voidaan käyttää lantion asennon tukemiseen tai reisien adduktion.



Kiinteä istuinosa

Saatavana on ohutprofiilisia kiinteitä istuinlevyjä, jotka tarjoavat kiinteän istumapinnan ja muotoilullaan poistavat riippumattomuuden, silloin, kun istuimessa on kangaspinta.






Inkontinenssi-istuintyyntyn päällinen

NXT-inkontinenssi-tyynynpäällinen vedenpitävällä vetoketjulla on valmistettu sairaalaluokan kestävästä materiaalista, joka on helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Se on antimikrobisesti kestävä, hengittävä ja nestetiivis ja lateksiton.

Tekniset tiedot

BIOFIT tekniset mitat

Tyynyn paino	3.9 lb (1.77 kg)
Syvyys	10 in. to 22 in. (25.4 cm to 55.8 cm)
Leveys	10 in. to 26 in. (25.4 cm to 66 cm)
Paksuus	
	4.5 in. (11.4 cm)
	4 in. (10.2 cm)
	2.75 in. (7 cm)
Painoraja	300 lb. (136.1 kg) 22in. to 24 in. wide 400 lbs (181.44 kg)

* Tyynyn paino 16" x 16" tyynyssä

BIOFIT koot- tuumina (senttimetreinä)

		LEVEYS														
		10 (25.4)	12 (30.5)	13 (33)	14 (35.6)	15 (38.1)	16 (40.6)	17 (43.2)	18 (45.7)	19 (48.3)	20 (50.8)	21 (53.3)	22 (55.8)	23 (58.4)	24 (61)	26 (66)
SYVYYS	10 (25.4)															
	12 (30.5)															
	14 (35.6)															
	15 (38.1)															
	16 (40.6)															
	17 (43.2)															
	18 (45.7)															
	19 (48.3)															
	20 (50.8)															
	22 (55.8)															

HALLINTO JA VARASTO:

Kaavarinkatu 8 H 5
33840 TAMPERE
info@rehaco.fi

Rehaco oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240 OULU
040 705 5886