

VIRIKE SÄHKÖSÄÄTÖPÖYTÄ

KÄYTTÖOPAS





SISÄLTÖ

TEKNISET TIEDOT	3
MALLIT	4
KOKOAMISOHJE.....	5
Rungon kokoaminen.....	5
Kallistuvan kannen kiinnitys.....	6
Kiinteän kannen kiinnitys	7
Ohjausyksikön ja akkukaapelin kiinnitys	8
Lisävarusteiden kiinnitys	9
PÖYDÄN KANNEN KALLISTUKSEN SÄÄDÖN JA OHJAUSYKSIKÖN NOLLAUKSEN OHJE	10
Pöydän kannen kallistuksen säätö	10
Ohjausyksikön nollausohje	10
KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE	11



Tuote	Virike sähkösäätöpöytä Mallit A, B, C, D, E, F, G Kannet: 90x60 cm & 120x60 cm
Tuotekoodit	13183-XXXX
Korkeussäätö	58,5–110 cm (kannen kanssa)
Rungon materiaali	Teräs Muovikomponentit
Pöytälevy	Laminaatti
Virtalähde	230VAC / 5A / 50Hz
Virrankulutus lepotilassa	0,1 W
Ohjausjännite	24VDC
Käyttöaste/-aika	10 %, max. 2 min / 18 min
Nopeus	n. 38 mm / sek.
Nostoaika	n. 10 sek.
Käyttölämpötila	+10 – +40°C
Ilmankosteus	20–80 %
Runko-osien pintakäsittely	Harmaa RAL9006 jauhemaalaus
Kannen tasainen max.kuormitus lepotilassa	70 kg
Kannen tasainen max.kuormitus noston aikana	50 kg
Kiinteästi asennetun kannen max.kuormitus	30 kg
Kallistetun kannen max.kuormitus	6 kg
Vartalogukien max.kuormitus (lisävaruste)	8 kg
Takuu	2 vuotta Takuussa noudatetaan kaupan alan yleisiä takuuehtoja.
Nostopilareiden valmistaja	LINAK Oy
Sähköpöydän valmistaja	R Mokki Oy Teollisuustie 13 60100 Seinäjoki

Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Basic 90	Ilman kannen kallistusta	90x60cm	13183-90A
Virike Basic 120	Ilman kannen kallistusta	120x60cm	13183-120A



Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Basic Plus 90	Koko kannen kallistus	90x60cm	13183-90B
Virike Basic Plus 120	Koko kannen kallistus	120x60cm	13183-120B



Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Double 60/30 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	90x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/30
Virike Double 90/30 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 90cm	13183-90/30
Virike Double 60/30 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	90x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm	13183-30/60
Virike Double 90/30 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 90cm	13183-30/90



Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Middle	Jaettu pöydän kansi, keskellä kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 30cm Säädettävä levy: 60cm Kiinteä levy: 30cm	13183-30/60/30



Malli	Kuvaus	Koko	Tuotekoodi
Virike Double 60/60 Right	Jaettu pöydän kansi, oikealla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 60cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/60o
Virike Double 60/60 Left	Jaettu pöydän kansi, vasemmalla puolella kallistus	120x60cm Kiinteä levy: 60cm Säädettävä levy: 60cm	13183-60/60v



RUNGON KOKOAMINEN

1. Käännä lattiavaste ylösalaisin, lukitse jarrusalvat ja kiinnitä pyörät pyörittämällä ne kiinni lattiavasteeseen.



2. Kiristä pyörät lopuksi lenkkiavaimella.



3. Kiinnitä nostopilari lattiavasteeseen kiristämällä lattiavasteen keskellä olevat neljä M6x12mm ruuvia kuusiokoloavaimella.



4. Käännä jalat oikein päin siten, että johdot tulevat sisäänpäin ja pitkät lattiavasteen sivut osoittavat samaan suuntaan.



5. Aseta kansivaste jalan päälle siten, että nostopilarin johto tulee sisäänpäin ja sekä kansi- että lattiavasteen pitkät sivut ovat vastakkain.



6. Kiinnitä kansivaste jalkaan neljällä M6x12mm uppokantaruuvilla.



7. Kiinnitä toinen jalka samalla tavalla. Pöydän runko on nyt koossa!



KALLISTUVAN KANNEN KIINNITYS

1. Ruuvaa kannenkallistusmekanismi kahdella M4 ruuvilla pöydän runkoon. Huomioi oikea paikka; mekanismi tulee saranoihin nähden keskelle.



2. Ruuvaa saranat kiinni etuprofiiliin M4 uppokantaruuveilla.



3. Keskellä olevasta ruuvista tehdään tarvittaessa kannen syvyysäättö.



4. Laske kansi alas ja ruuvaa kannenkallistusmekanismin toinen pää pöytään uppokantapuuveilla.



5. Kannenkallistusmekanismi on nyt kiinnitetty. Varmista, että kansi lukkiutuu eri asentoihin ja kallistusmekanismi toimii moitteetta.




6. Pöytä on valmis käyttöön!



KIINTEÄN KANNEN KIINNITYS

1. Kun olet kiinnittänyt kallistuvan kannen, aseta mustat holkit tarkasti ruuvien reikiin kohtiin kuvan osoittamalla tavalla.

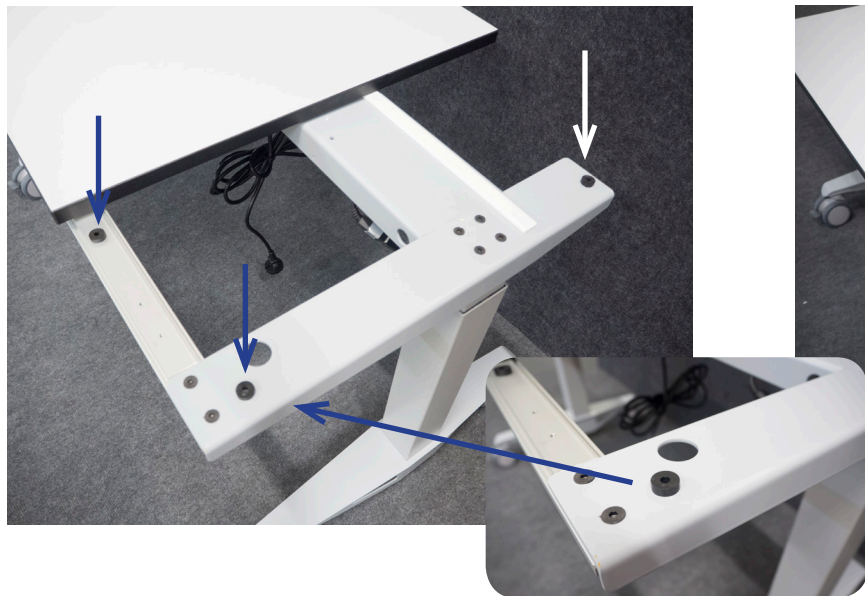

2. Aseta pöydän kansi varovasti holkkien päälle niin, että pöydän reunat ovat kohdakkain ja pöydän kansien väliin jää 5 mm rako. Suosittelemme kokoamaan pöydän niin, että ohjausyksikön reikä tulee pöydän oikeaan reunaan.



3. Ruuvaa pöydän kansi paikoilleen neljällä ruuvilla. Kannen ulkoreunan ruuvipaikat (2 ja 3) ovat aina samat riippumatta pöydän mallista. Sisemmät ruuvipaikat (1 ja 4) ovat kansien raosta seuraavat.



4. Kiinnitä toinen kiinteä pöytälevy samalla tavalla, mikäli pöydässä on kaksi kiinteää levyä kallistuvan osan molemmin puolin (Malli Middle).



OHJAUSYKSIKÖN JA AKKUKAAPELIN KIINNITYS

1. Pujota ohjausyksikön kaapeli rei'ästä sisään.



2. Irrota ohjausyksikön takana oleva teipinsuoja.




3. Liimaa yksikkö kiinni niin, että Linakin logossa oleva nuoli osoittaa ylöspäin.



4. Pujota kaapeli kansivasteen rei'ästä ja kiinnitä virtayksikköön. Kiinnitä johto nippusiteillä ja leikkaa nippusiteistä ylimääräiset pois. **HUOM!** Jos pöydän kansi on kallistuva, jätä johto hieman löysälle, jotta kansi pääsee kallistumaan.

5. Keri loppu johto kasaan ja kiinnitä nippusiteellä. **HUOM!** Varmista, että johtonipun ja nostopilarin väliin jää riittävästi tilaa, ettei johto jää väliin pöytää nostettaessa.

6. Kiinnitä moottorikaapeli, joka on ollut irti kuljetuksen ajan.

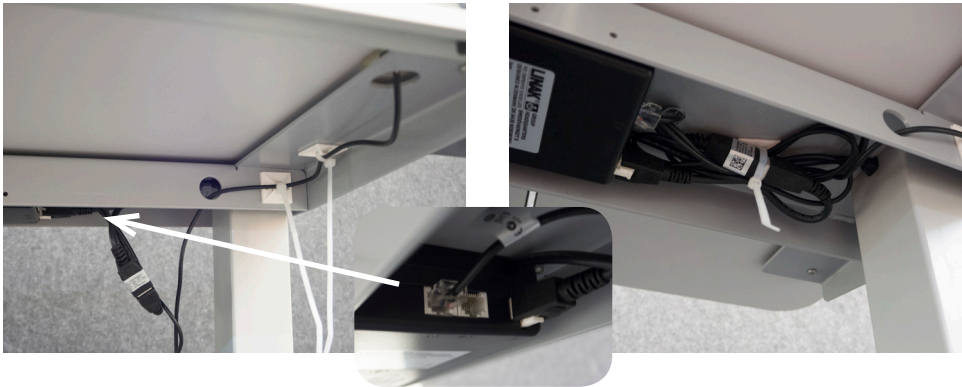

7. Kiinnitä moottorikaapeli nippusiteellä.



LISÄVARUSTEIDEN KIINNITYS

Vartaloguki

Vartaloguki kiinnitetään asettamalla se pöydän etuosassa olevaan uraan.



Bluetooth

Bluetooth-tikku asetetaan toiseen virtayksikössä olevaan porttiin. (Toisessa on ohjausyksikön johto.)



PÖYDÄN KANNEN KALLISTUKSEN SÄÄDÖN JA OHJAUSYKSIKÖN NOLLAUKSEN OHJE




R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

PÖYDÄN KANNEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ


1. Kallista pöydän kantta nostamalla se haluttuun kulmaan.



2. Pöydän kansi lukittuu paikoilleen, kun päästät irti.

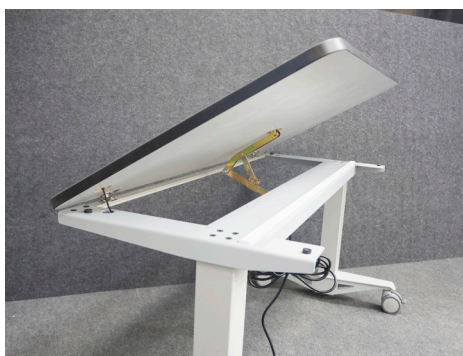

3. Kun haluat laskea kannen takaisin alas, nosta pöydän kansi ensin ylös asti, ja laske sen jälkeen varovasti alas.

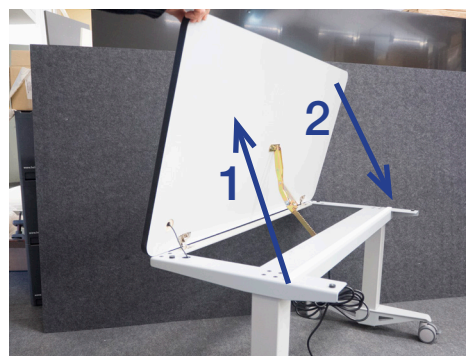

OHJAUSYKSIKÖN NOLLAUSOHJE

Ennen käyttöön ottoa tai mahdollisen vikatilanteen vuoksi tulee keskusyksikkö nollata seuraavasti

1. Varmista, että pöytä pääsee nousemaan ja laskemaan vapaasti.
2. Aja nostopilarit alimpaan asentoon ohjauspaneelin nuoli alas -näppäimellä.
3. Vapauta nuoli alas -näppäin ja paina sitä uudestaan pohjassa n. 5 sekunin ajan.
4. Nostopilarit käyvät alimmassa nollaustasossaan ja palaavat normaaliin alatasoonsa.
5. Nyt pöytä on valmis käyttöön.

Keskusyksikkö saattaa käytön aikana mennä vikatilaan eri syistä, joita voivat olla esimerkiksi sähkökatkos tai jännitepiikki sähköverkossa, nostopilareiden ylikuormitustila, irrotettu tai löysä moottorijohto. Jos keskusyksikkö on vikatilassa, liikkuu pöytä vain alaspäin ja hitaammalla nopeudella. Nollaustoimenpiteellä saadaan nämä normaalit vikatilat poistettua.



- Tuotetta tulee käyttää ainoastaan yhdessä siihen kuuluvan virtalähteen kanssa.
- Pöydän kokoajan, huoltajan sekä käyttäjän on luettava nämä ohjeet tarkasti. Ohjeet on säilytettävä pöydän yhteydessä.
- Varmista aina ennen pöydän korkeuden säätämistä, että pöytä pääsee nousemaan ja laskemaan vapaasti.
- Virike on toiminnallinen sähköpöytä, eikä sitä saa käyttää henkilönnostimena.
- Noudata teknisissä tiedoissa mainittuja maksimikuormituksia. Älä ylikuormita pöytää.
- **Pöytää käytettäessä tai säädettäessä pyörien jarrujen tulee olla lukittuna.**
- Kun säädät pöytää, pysy turvallisella etäisyydellä pöydästä välttääksesi puristumisen liikkuvan pöytälevyn ja lähellä olevien kiinteiden esteiden väliin. Varmista myös ettei kukaan tai mikään vahingoitu tai vaurioitu pöytää nostettaessa ja laskettaessa. Vedä mahdollinen tuoli pois pöydän läheltä ennen pöydän nostamista/laskemista. Pöytälevy ei saa nostettaessa ja laskettaessa törmätä kiinteään esteeseen, jotta se ei kaadu.
- Kun säädät pöytälevyn kallistusta, varmista, ettei kenenkään sormet jää pöydän raon väliin.
- Pöytää ei saa muunnella tai muokata millään tavalla.
- Pöytää huollettaessa tai korjattaessa virtajohto on aina irrotettava pistorasiasta. Virtalähteen muunteleminen on kielletty.
- Tarkista noin viikon käytön jälkeen, että ruuvit ovat tarpeeksi tiukalla. Jos pöydän nostaminen ja laskeminen ei onnistu, tarkista johtojen liitokset ja että virtajohto on paikoillaan.
- Pöydän sähköjärjestelmiä ei saa korjata kuin sähköalan ammattilainen. Viallisesta laitteesta voi aiheutua sähköisku, jos huolto suoritetaan varomattomasti. Ennen kuin pöydän sähköjärjestelmää aletaan korjata, virtajohto on irrotettava pistorasiasta. Laita johto takaisin pistorasiaan vasta korjaamisen päätteeksi.
- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen.

JÄLLEENMYynti:

rehaco.

HALLINTO JA VARASTO
Kaavarinkatu 8 H 5
33840, Tampere
040 705 5886
info@rehaco.fi

Rehaco Oy
2447737-2
Haaransuontie 6 A 7
90240, Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi