



Zitzi
Flipper G2

Käyttöohje

Käyttöohje, asennus- ja säätöohjeet, huolto,
kunnossapito ja kunnostaminen



Tämä käyttöohje koskee sisäalustaa Zitzi Flipper G2 lisävarusteineen. Lisävarusteiden osalta viittaamme tuotteen tilauskaavakkeeseen.

Sisällysluettelo

Valmistaja	3	Asennus- ja säätämisohteet	15
Kustomointi.....	3	Ohjaustangot.....	16
Johdanto	4	Pysäköintijarru.....	17
Yleistä	4	Suuntalukko	17
Yhteydenotto - merkinnät	4	Kaatumaeste	18
CE-merkintä - luokitus	4	Alustan pidennys	18
Vaativuustentukaisuusvakuutus	4	Istuinosa.....	19
Käyttötarkoitus	4	Säädettävä istuinkorkeus - Kaasujousi	20
Symbolien luettelo	5	Säädettävä istuinkorkeus - Toimilaite	20
Tuotteessa olevat merkinnät	6	Kallistustoiminto	21
Turvavaroitustenpiteet	7	Akun lataaminen.....	22
Koulutus ja pätevyysvaatimukset.....	7	Elektroniikkakotelo	22
Varoituksia ja varoitustenpiteitä	7	Jalkatuki	23
Käyttöä edeltävä tarkastus	9	Korkealaitainen jalkatuki.....	24
EMC – sähkömagneettinen		Pohjetuki	25
yhteensopivuus.....	10	Ohjaustankoon kiinnittyvä käsinoja	26
Rajoitukset	11	Yhteenveto ja tarkastukset	27
Muut vaaratekijät.....	12	Kuljettaminen ajoneuvoissa	27
Hyväksytyt yhdistelmät.....	12	Huolto ja kunnossapito.....	28
Poikkeustilanteet/onnettomuudet	12	Käyttöä edeltävä tarkastus.....	28
Tekniset tiedot/Toiminta	13	Huolto ja kunnossapito	29
Adaptaatio ja kustomointi	14	Kunnostaminen	30
		Kierrättäminen	33
		Takuu ja vaatimukset	34
		Käyttöohjeen tarkistukset.....	35

Valmistaja

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postiosoite	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin	+46 11-161800
Sähköposti	info@anatomicsitt.com
Internet	anatomicsitt.com
Opastusvideoita	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-rekisteröintinumero/SRN: SE-MF-000002240

Kustomointi



Rastita tämä ruutu, mikäli tuotteeseen on tehty henkilökohtaisia muutoksia.

CE-merkintä ei tällöin ole voimassa ja tulee poistaa.



rehaco.

Johdanto

Yleistä

Apuvälineen kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeitä lukea tämä käyttöohje huolellisesti. Tämä koskee kaikkia hoitajia ja perheenjäseniä, jotka osallistuvat käyttäjän hoivatyöhön. Käyttäjä on henkilö, joka istuu tuolissa ja hoitaja on välinettä käyttävä henkilö.

Säilyttäkää käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Uusia versioita on ladattavissa verkkosivuiltamme www.anatomicsitt.com. Tietoja uusimmasta versiosta löytyy etusivulta päivämäärän kanssa.

Yhteydenotto - merkinnät

Tuotekilvessä ja tuotteen pakkauksessa on tuotteen viitenumero (REF) ja sarjanumero (SN - päätuotteille) tai eränumero (LOT - lisävarusteille). Nämä numerot tarvitaan yhteydenotoissa Anatomic Sitt -yhtiöön. Sarjanumero löytyy istuinlevyn alapuolelta.

CE-merkintä - luokitus

Laite lisävarusteineen on asetuksen (EU) 2017/745, Liite VIII luokituksen mukainen CE-merkinnällä varustettu Luokan I lääkinällinen väline.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite täyttää lääkinnällisiä välineitä koskevan asetuksen (EU) 2017/745 säädösten vaatimukset. Tarkista tämänhetkinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotevaihtoehdoille ja lisävarusteille osoitteessa www.anatomicsitt.com/documents.

Käyttötarkoitus

Zitzi Flipper G2 on hoitajan avulla käytettäväksi tarkoitettu sisäkäyttöön tarkoitettu pyörillä varustettu kuljetusalusta. Tuotteessa on nosto- ja laskutoiminto ja se on tarkoitettu käytettäväksi Anatomic Sitt i Norrköping AB:n toimittaman istuinjärjestelmän tai yksittäisen istuimen kanssa. Zitzi Flipper G2 on uudelleenkäytettävä tuote.

Symbolien luettelo

	Tätä symbolia käytetään käyttöohjeessa lukijan huomioon kiinnittämiseksi esim. tärkeisiin turvaohjeisiin yms.		Ilmoittaa valmistuserän numeron, jolloin erä voidaan tunnistaa.
	Tämä symboli varoittaa puristuksiin joutumisen vaarasta.		Ilmoittaa tuotteen olevan lääkinällinen väline.
	Tämä symboli viittaa ohjeisiin ja vinkkeihin, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.		Ilmoittaa valmistajan viitenumeron/tuotenumeron, jonka avulla lääkinällinen väline voidaan tunnistaa.
	Ilmoittaa, että käyttöohje on luettava ennen käyttöä. Symboli on kiinni tuotteessa.		Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka avulla tietty tekninen tuote on tunnistettavissa
 www.anatomicsitt.com	Ilmoittaa, että käyttöohjeet tulee aina lukea ennen käyttöä. Verkkosoite ilmoittaa sivuston, josta asiakirja löytyy sähköisessä muodossa.		Yksilöllinen tuotetunniste, jonka avulla lääkinällinen väline on tunnistettavissa yksiselitteisesti.
	Ilmoittaa, että käyttöohje tulee lukea tärkeiden turvallisuustietojen saamiseksi esim. varoituksista, joita ei löydy tuotekilvestä.		Ilmoittaa tuotteen olevan varustettu CE-merkinnällä sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistajan (EU) MDR 2017/745 -säädöksessä määritellyllä tavalla. Voidaan myös käyttää yhdessä valmistuspäivän kanssa.		Ilmoittaa lämpötilarajat, joilla lääkinällistä apuvälinettä voidaan turvallisesti käyttää.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistuspäivämäärän.		Osoittaa paikan, johon laturi tulee liittää käsiohjaimessa.
	Ilmaisee tyyppin BF liityntäosan (terveydenhuollon sähkölaitteille).		Ilmoittaa, että elektroniikkatuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteiden mukana.
	Ilmaisee tuotteen olevan kaksoiseristetty, so. eristysluokkaa II		

Tuotteessa olevat merkinnät

Päätuotteen tuotekilpi



Annotations for the main product label:

- Tuotteen tyyppi (Product type)
- Tuoteryhmä (Product group)
- Tuotteen nimi (Product name)
- UDI-tunniste (UDI identifier)
- Maksimikuormitus, sis. käyttäjän (Maximum load, incl. user)
- Sähköjärjestelmän toimintasuhde (Electrical system operating condition)

Lisävarusteiden tuotekilpi



Annotations for the accessory label:

- Tuotteen tyyppi (Product type)
- Tuoteryhmä (Product group)
- Tuotteen nimi (Product name)
- UDI-tunniste (UDI identifier)

Turvallisuusvarotoimet

Koulutus ja pätevyysvaatimukset

- Asentaminen, huolto ja kunnostus kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Mukauttamista/erityissovituksia (adaptaatio) koskevat päätökset kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi ja sovitusten suorittaminen pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen asetukset, säädöt ja testaaminen kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi (erikoishenkilöstö apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen määränneen tahon tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, tulee aina suorittaa riskinarviointi ennen käyttöä.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä

-  Käyttöohje tulee aina lukea ennen käyttöä.
-  Säädöt kuuluvat yksinomaan pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Säätojen tekeminen on sallittua vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Tuotteen toiminta on tarkastettava ennen sen luovuttamista käyttäjälle.
-  Apuvälineen määrännyt henkilö on vastuussa käyttäjän ja/tai muiden välittömässä yhteydessä olevien henkilöiden opastamisesta välineen turvalliseen käyttöön. Tuotteen toiminta on aina varmistettava ennen käyttöä.
-  Määrääjän tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, on varmistettava valitun istuimen tasapaino siten, että putoamisriskiä ei synny. Ks. Alustan pidennys. Kaatumaeste voidaan tarvittaessa tilata.
-  Säätoja saa tehdä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Kaikkien asennus-, säätö- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen on kaikki kiristysruuvit ja -mutterit tarkistettava ja kiristettävä.

-  Tarkista ennen käyttöä, että istuinjärjestelmä on tukevasti kiinni alustassa.
-  Jarrut on aina lukittava apuvälineeseen siirryttäessä ja siitä poistuttaessa.
-  Renkaisiin vaikuttavia jarruja ei ole tarkoitettu ajojarruiksi, vaan ainoastaan lukitusjarruiksi (pysäköintijarru).
-  Jalkalautaa ei saa käyttää apuna välineeseen noustaessa ja siitä poistuttaessa.
-  Istuimen korkeutta tai istuinkallistusta muutettaessa on varottava puristuksiin joutumista. Kädet eivät saa olla istuimen alla säätöjä tehtäessä. Vältä istuimen kallistamista taaksepäin maksimiasentoon sen ollessa alimmassa säädössään istuimen/adapterin vaurioitumisriskin vähentämiseksi.
-  Alustaa kaltevilla alustoilla käytettäessä on huomioitava kohonnut kaatumisvaara. Alusta tulee pysäköidä ainoastaan vaakasuorille ja tasaisille alustoille.
-  Nostaminen tulee aina tehdä ainoastaan rungosta – ei koskaan istuimesta.
-  Huoltotoimenpiteitä ei tule koskaan tehdä käytön aikana.
-  Jos käyttäjä kurkottaa liian pitkälle apuvälineestä, saattaa painopiste siirtyä ja aiheuttaa kohonneen kaatumisvaaran.
-  Laitetta ei saa milloinkaan ylikuormittaa, suurimman sallitun kuormituksen osalta ks. kappale Rajoitukset.
-  Pyörät saattavat joissakin tapauksissa osua jalkakautaan. Ohjaavan pyörän toiminta voi tällöin häiriintyä, ja säätöjä voidaan joutua muuttamaan.
-  Käyttäjää ei koskaan saa jättää ilman valvontaa apuvälinettä käytettäessä.
-  Tuolia ennen käyttöä asennettaessa on tarkistettava tasapaino ja maavara korkeuden ja kallistuksen äärisäädöissä.

Käyttöä edeltävä tarkastus

Tarkastus tulee suorittaa ennen jokaista käyttöä seuraavasti:

- Tarkasta, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Erityisesti on tarkastettava ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkasta, että istuin on tukevasti kiinni rungossa.
- Tarkasta tuotteen tukevuus.
- Tarkasta mahdollisten kaatumaesteiden toimivuus.
- Tarkasta jarrujen toimivuus.
- Tarkasta pyörien kunto ja niiden kiinnitys.
- Tarkasta tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänoja- ja istuinkallistus, korkeussäätö jne. niiden toiminnan ja lukittumisen osalta.

Mikäli havaitaan vikaa, ei tuotetta tule käyttää, vaan on käännettävä apuvälineiden jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

EMC – Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Yleistietoja

Flipper G2 EI -alustan sähköjärjestelmällä on CE-merkintä ja se on yhteensopiva EMC-direktiivin 2014/30/EU kanssa ja testattu direktiivin IEC 60601-1-2: 2014 vaatimusten mukaisesti.

Kolmansien osapuolten valmistamat osat

Muiden kuin toimittajan valmistamien ja toimittamien komponenttien ja kaapeleiden käyttö voi lisätä sähkömagneettista säteilyä tai heikentää sähköjärjestelmän sähkömagneettista häiriönsietoa ja aiheuttaa häiriöitä/suorituskyvyn heikkenemistä.

Häiriöt muiden laitteiden kanssa, yleinen/RF

Vältä elektroniikan käyttöä muiden sähkölaitteiden lähellä, koska tämä voi heikentää toimintakykyä. Jos järjestelmää on tarpeen käyttää lähellä muita sähköjärjestelmiä, tulee niitä tarkkailla sen havaitsemiseksi, toimivatko ne normaalisti.

Kannettavia radiotaajuusviestintälaitteita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa käyttää lähempänä kuin 30 cm mistään sähköjärjestelmän osasta. Tämä johtuu toimintakyvyn heikkenemisen vaarasta.

Jos käyttäjä huomaa poikkeavaa toimintaa sähköjärjestelmässä, varsinkin jos tällainen käyttäytyminen on satunnaista ja liittyy järjestelmän kytketymiseen matkapuhelimiin, mikroaaltouuneihin ja radioasemiin, kyseessä voi olla merkki sähkömagneettisesta häiriöstä.

Jos tällaista käyttäytymistä ilmenee, yritä siirtää Flipper G2 EI kauemmaksi häiritsevistä laitteista.

Sähkötoimisen noston/laskun tai kallistuksen aikana Flipper G2 Electric toimii sisäisen akkunsa voimalla.



Tyypin BF sovellettu osa
Flipper G2 EI on lukiteltu tyypin BF sovelletuksi osaksi.



Luokka II
Flipper G2 EI on luokiteltu Luokan II tuotteeksi lataamisen aikana, koska laturi on Luokkaa II.

Rajoitukset

Maksimikuormitus

Maksimikuormituspaino on: 50 kg (koko 2), 75 kg (koko 3) ja 130 kg (koko 4). Kuormituspainolla tarkoitetaan suurinta painoa, jolle alustarunko voidaan altistaa, kuten käyttäjien ja istuinjärjestelmien painoa.

Käyttöikä

Tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä normaalikäytössä on 5 vuotta, kun sitä käytetään tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti ja näitä käyttöohjeita noudattaen. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, miten usein ja miten intensiivisesti tuotetta käytetään, mutta on korkeintaan 10 vuotta.


Käyttöolosuhteet

Flipper G2, sähkötoiminen:

+5 - +40 °C

Kosteus 20-90 %

Ilmanpaine 700hPa - 1060hPa

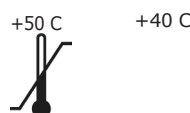


Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Flipper G2, sähkötoiminen:

-25 - +70 °C

Kosteus 20-90 %

Ilmanpaine 700hPa - 1060hPa

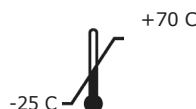

Akut tulee aina ladata ennen säilytystä. Tämän jälkeen akku on ladattava 6 kuukauden välein sen toiminnan ylläpitämiseksi. Akkua pitkäaikaisesti säilytettäessä ei tule ylittää lämpötilarajoja -25 °C - + 70 °C, koska muuten akun toimintaikä ja -kyky saattaa heikentyä. Säilytyslämpötilaksi suositellaan +10 °C - + 25 °C.

Kaasujousi

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi aktivoida vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että männän tanko osoittaa alaspäin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua ja jousen toiminta lakata.

Toimilaitteet

Toimintasuhde: 10 % (2 minuutin jatkuva käyttö, jota seuraa 18 minuuttia käyttämättömänä)

Muut vaaratekijät

On huolehdittava siitä, että tuote ja sen lisävarusteet on oikein säädetty siten, ettei käyttäjä tunne oloaan epämukavaksi tai vahingoitu käytön aikana. Mikäli näin ei ole, on tuote säädettävä uudelleen tai asennettava sopivat lisävarusteet.

Rajoitettu ihokosketusaika lämmön osalta (koskee sähkötoimista mallia G2 EI). Alla mainitut osat voivat kuumentua yli 41 °C:n yläpuolelle, eivätkä näin ollen saa olla kosketuksissa käyttäjän ihon kanssa alla olevassa taulukossa mainittua aikaa pidempään (t tarkoittaa aikaa).

Osa	Korkein mitattu lämpötila	Maksimiaika
Käsiohjain	42 °C	10 min ≤ t
Kallistuksen toimilaitteet	45 °C	1 min ≤ t < 10 min
Noston toimilaitteet	51 °C	t < 1 min
Laturi	44 °C	1 min ≤ t < 10 min

Hyväksytyt yhdistelmät

Tuotteen CE-merkinnän säilyminen edellyttää, että apuvälinettä käytetään vain sellaisten lisävarusteiden kanssa ja varaosin, jotka ovat Anatomic Sitt AB:n toimittamia. Tuotteen tilauskaavakkeesta löytyvät tiedot mahdollisista lisävarusteista sekä varaosia koskevat hajotuskuvat.


Poikkeustilanteet/onnettomuudet

Mikäli tuote ei ole toimintakuntoinen, kääntykää apuvälinemyyjän tai valmistajan puoleen.


Mikäli tapahtuu vakava onnettomuus, siitä tulee tehdä ilmoitus Anatomic Sitt AB:lle ja käyttömaan viranomaisille.

Tekniset tiedot/Toiminta

Zitzi Flipper G2

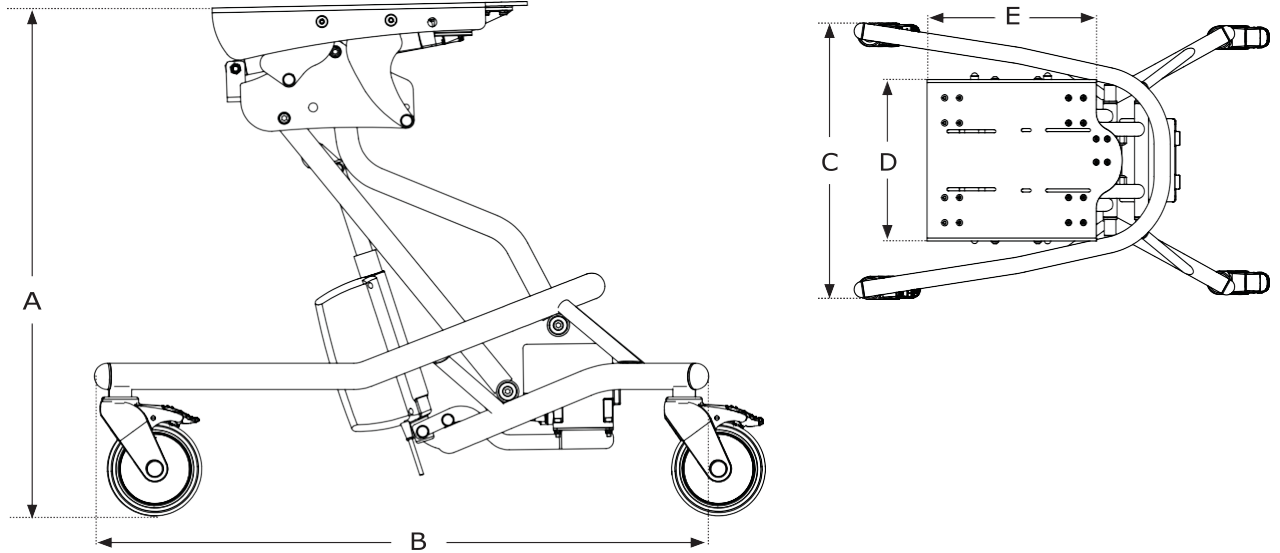

	Korkeus A	Pituus B	Leveys C	Istuinlevy D x E	Kuormituspaino	Paino Manuaalinen	Paino Sähkötoiminen	Kallistus
Koko 2	28-64 cm	65 cm	59 cm	26 x 32 cm	Max 50 kg	18 kg	21 kg	0° - 30° alt. -5° - 25°
Koko 3	28-64 cm	77 cm	59 cm	26 x 32 cm	Max 75 kg	19 kg	22 kg	0° - 30° alt. -5° - 25°
Koko 4 XL	45-71 cm	87 cm	61 cm	34 x 35 cm	Max. 130 kg	--	26 kg	0° - 30° alt. -5° - 25°

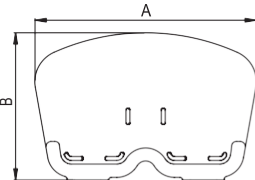

JALKATUKI

A x B

Yhten. koko 2 345 x 225 mm
Yhten. koko 3 380 x 260 mm
Yhten. koko 4 380 x 310 mm
Yhten. koko 5 430 x 310 mm
Yhten. koko 6 480 x 310 mm


A x B

Erill. koko 2 160 x 220 mm
Erill. koko 3 180 x 255 mm
Erill. koko 4 175 x 305 mm

Koko 2-6

Jalkatuen profiilin pituus 35 cm
Hammasnivelen pituus: 80 mm


TYÖNTÖKAHVAAN KIINNITETTY KÄSINOJA

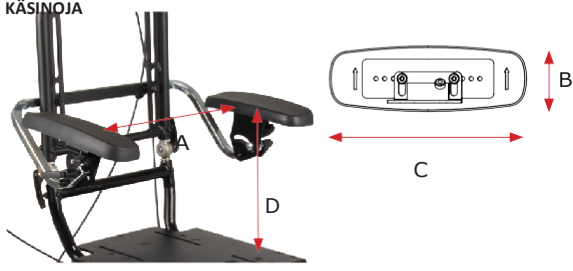

Mitat

	A	B	C	D
Koko 1	280 - 440 mm	75 mm	230 mm	180 - 380 mm
Koko 2	280 - 440 mm	75 mm	330 mm	180 - 380 mm
Koko 3	380 - 500 mm	75 mm	330 mm	220 - 400 mm

KORKEALAITAINEN JALKATUKI

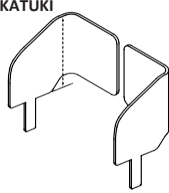


A (korkeus jalkalaudasta)


koko 2 180 mm
koko 3 210 mm
koko 4 240 mm
koko 5 240 mm
koko 6 240 mm

Korkealaitainen jalkatuki koko 2 sopii jalkatukeen koko 2 jne.

TYÖNTÖKAHVA

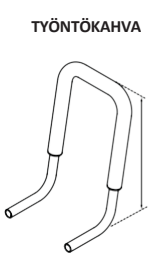

OHJAUSTANKO

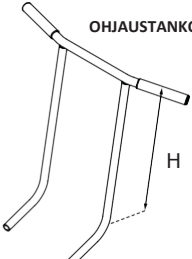

	Korkeus (H)
Työntökahva 1	13 cm
Työntökahva 2	35 cm
Ohjaustanko	50 cm

Korkeus on istuinlevyn päältä kahvaan/tankoon

Adaptaatio ja kustomointi

Suositukset

Aina kun tuotteeseen tehdään muutoksia, on tehtävä arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio (sovitus) vai kustomointi.

Adaptaatio on CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut muutostyöt ovat kustomointeja. Adaptaation voi tehdä ainoastaan tehtävään päteväksi katsottu henkilö ja se tulee tehdä ammatimaisesti.

CE-merkinnän puitteissa sallitut adaptaatiot

Jalkatukiprofiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.

Istuinlevyyden voidaan tehdä asennusta varten reikiä. Seuraavia kriteereitä on kuitenkin noudatettava:

- Korkeintaan 4 reikää
- Reiät eivät saa olla suurempia kuin 6,5 mm
- Reiät eivät saa olla 15 mm lähempänä aiempia reikiä ja hahloja
- Reiät eivät saa olla 15 mm lähempänä levyn reunoja

Riskianalyysi


Tulee huomioida, että lääkinnällisen apuvälineen adaptaatiolle ja kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua käyttäjälle vaaralliseksi kustomoinnin jälkeen.

Merkintä

Tuote on merkittävä tietyille käyttäjälle mukautetuksi siten, ettei sitä voida sekoittaa tuotteen perusmalliin.

Asennus- ja säätämisohteet

Asentaminen kuuluu aina pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavassa). Käyttäjää ja muita käyttäjän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä tulee opastaa tuotteen toimintoihin siten, että apuvälinettä voidaan käyttää turvallisesti.

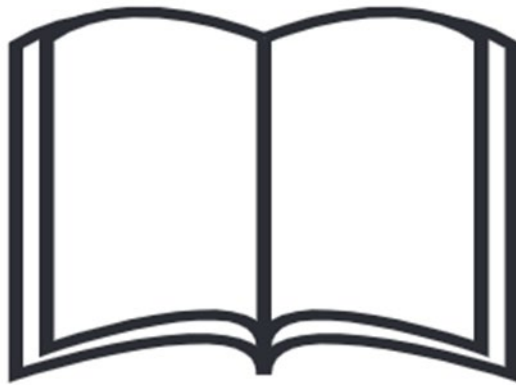

Ohjaustangot

Työntökahvan asentaminen

Kahva työnnetään runkoputkiin, ja ruuvit (A) kiristetään.



Ohjaustangon asentaminen

Ohjaustanko työnnetään runkoputkiin, ja ruuvit (A) kiristetään (ks. yllä oleva kuva).




Ohjaus-
tanko

Pysäköintijarru

Pysäköintijarrun kytkeminen päälle ja pois

Pyörien lukitsemiseksi painetaan poljinta. Lukitus avataan painamalla polkimen etureunaa.

Lukituksen kytkeminen päälle lukitsee sekä pyörimisen että pyörien suuntauksen.

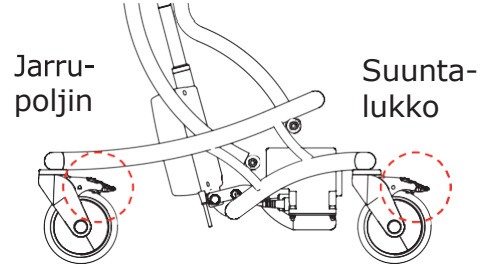

Lukittu jarru



Ei lukittu

Pikaopas

- **Lukitseminen**
Pyörät lukitaan polkimen takareunaa painamalla.
- **Lukituksesta avaaminen**
Lukitus avataan polkimen etureunaa painamalla.

Suuntalukko

Asentaminen

Suuntalukko (standardikoko 4) on valittavissa kokoa 2-3 oleville alustoille.

Lukko sijaitsee oikeassa takapyörässä (HUOM: tässä pyörässä ei ole jarrua).

Kytkeminen päälle ja pois

Suuntalukko kytketään päälle polkimen takareunaa painamalla. Suuntalukko kytkeytyy, kun pyörä on suorassa eteenpäin.

Suuntalukko avataan polkimen etureunaa painamalla.



Suuntalukko
päälle
kytkettynä



Suuntalukko
pois päältä
kytkettynä

Kaatumaeste

Kaatumaesteen asentaminen


Kaatumaesteen (A) asentamiseksi avataan ensin ruuvia, joka kiinnittää pyörän. Sitten kaatumaeste nostetaan pyörän-laakerin päälle päin runkoputkea. Kaatumaeste lukitaan eteenpäin suunnattuna kolmella ruuvilla (B), ja pyörä ruuvataan takaisin paikalleen.



Alustan pidennys

Asentaminen

Alustan pidennysosan asentaminen tehdään avaamalla aluksi ruuvia (A) ja irrottamalla pyörä rungosta. Sitten poistetaan suojatulppa (B) runkoputkesta. Alustan pidennysosa (C) työnnetään paikalleen ja kiristetään mukana toimitetulla ruuvilla (D) ja aluslevyllä. Lopuksi pyörä ruuvataan paikalleen ruuvilla (A).

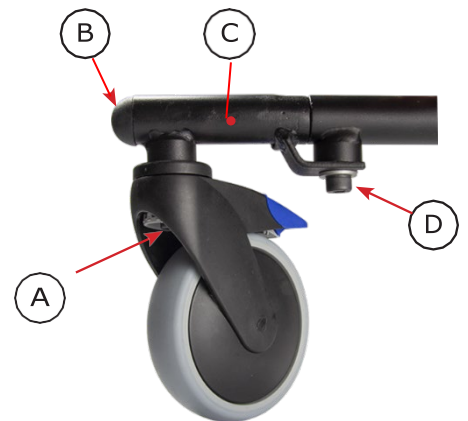


Active-istuinta Flipper G2 -alustalla käytettäessä on kaatumariskin johdosta käytettävä alustan pidennystä. Sama koskee muita istuinjärjestelmiä, jotka asennetaan pitkälle eteen. Tarvittaessa turvallisuutta voidaan lisätä kaatumaesteiden avulla.

Istuinosa

Istuinjärjestelmän asentaminen

Istuinjärjestelmän asennuslevy voidaan helposti kiinnittää alustaan neljällä (4) ruuvilla, aluslevyllä ja mutterilla alustarungon istuinlevyn hahloihin, jotka on merkitty kirjaimella (A).

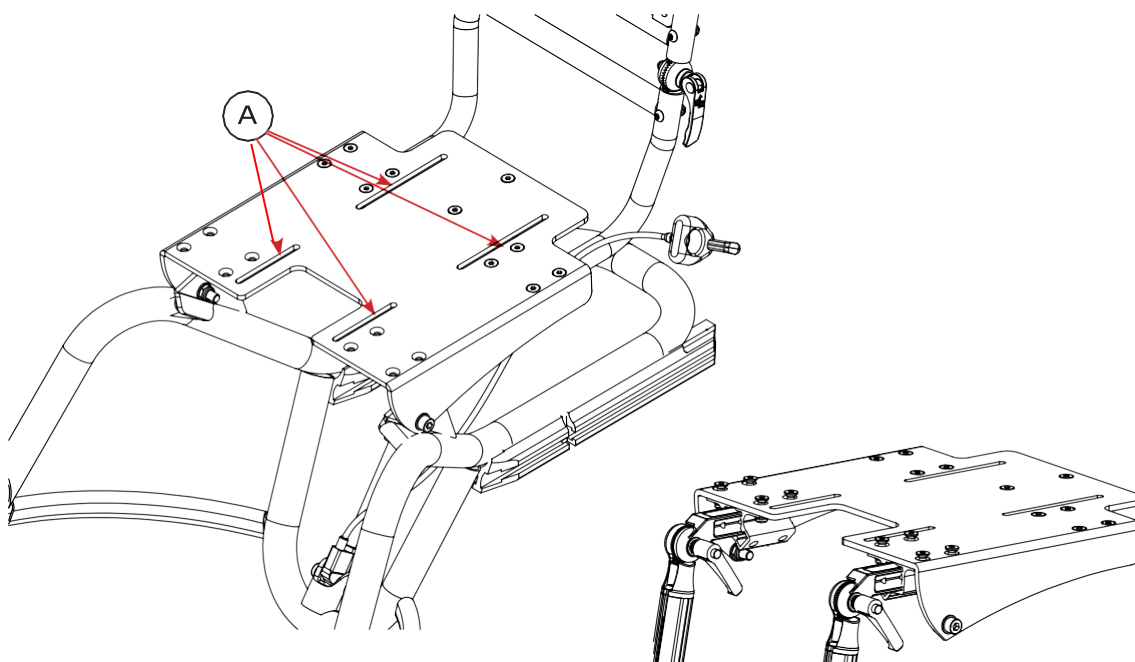

Lisätietoja asennuslevyistä löytyy valitun istuinjärjestelmän vastaavista käyttöohjeista.



Vältä istuimen asentamista liian taakse. Tässä on riski istuimen osumisesta alustarunkoon istuinta äärikallistuksessa laskettaessa, jolloin se saattaa irrota ja pudota alustalta. Istuinta asennettaessa on aina tarkistettava, että se ei kosketa muita osia korkeuden ja kallistuksen ääriasennoissa.

Säädettävä istuinkorkeus - Kaasujousi

Istuinkorkeus on helposti säädettävissä polkimen avulla. Säättämisen aikana on aina muistettava tukea istuinjärjestelmää toisella kädellä.


- Kaasujousta käytetään jalkapoljinta painamalla.
- Istuinjärjestelmä säädetään halutulle korkeudelle.
- Jalkapoljin vapautetaan, kun haluttu korkeus on saavutettu. Tällöin korkeus lukittuu.



Huomioi mahdollinen puristuksiin joutumisen vaara.

Säädettävä istuinkorkeus - Toimilaite

Istuinkorkeutta säädetään sähkötoimisen käsiohjaimen avulla. Säättämisen aikana on aina muistettava tukea istuinjärjestelmää toisella kädellä.

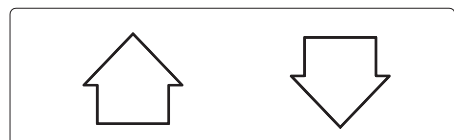

- Ylös-nuoli (A) nostaa istuinlevyä
- Alas-nuoli (B) laskee istuinlevyä



Huomioi mahdollinen puristuksiin joutumisen vaara.



Kallistustoiminto

Kallistustoiminto

Flipper G2 -alustassa on kaksi kallistustoimintoa, jotka säätävät istuinlevyn sivulla olevien reikien avulla. Normaalitoiminnossa käytetään alemmaa reikää. Haluttaessa negatiivisempi kallistus käytetään ylempää reikää.



Kaasujousella toimivia kallistus

Istuinlevyä säädetään avaamalla nuppia (A) ja painamalla toimilaitteen vipua alaspäin (sijaitsee istuinlevyn takana). Sitten istuinlevyä painetaan alas- ja eteenpäin. Kallistuskulma lukitaan vapauttamalla vipu (B), ja kiristämällä nuppi (A).



Istuinkulman palauttamiseksi alkuperäiseen asentoonsa avataan nuppia (A), käsivipua painetaan alas, ja istuinlevyä vedetään ylös ja taaksepäin työntötangosta.

Tarkastus

Varmista aina kallistuksen lukittuminen, kun haluttu kulma on saavutettu.

Lukitus

Nupin (A) on oltava aina kiristetty säätämisen jälkeen.

Toimilaitteilla toimiva kallistus

Säädä kallistus pitämällä painiketta (C) painettuna (eteenpäin) ja painiketta (D) (taaksepäin). Vapauta painike tämän jälkeen.

Kallistussäätö →

Korkeussäätö →

Käsiohjain



Huomioi mahdollinen puristuksiin joutumisen vaara.



Pidä käsiohjain paikassa, jossa ei ole vaaraa nosto/laskutoiminnon tahattomasta käynnistämisestä.


Akun lataaminen

Liitä laturin pistoke ohjainlaitteen sivulla olevaan pistokkeeseen. Liitä laturin virtajohto sitten seinäpistokkeeseen (220 V).

Laturissa on valo, joka palaa joko vihreänä tai keltaisena.

Vihreä = ylläpitolataus **Keltainen** = normaali lataus

Latauksen/virransyötön katkaisemiseksi laturin virtajohto irrotetaan seinäpistokkeesta.

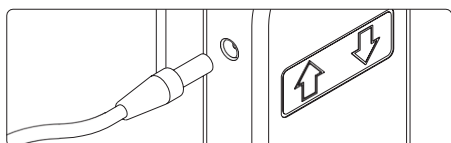

Latauskytkin sijaitsee käsiohjaimen sivulla.



Ensimmäinen lataus tulee olla 24 tunnin pituinen. Sen jälkeen lataamista suositellaan tehtäväksi joka yö. Akkua ei tule koskaan päästää kokonaan purkautumaan.

Ainoastaan alkuperäisiä latureita saa käyttää.



Laturin tulee olla vaivatta ja esteettömästi käsillä koko latauksen ajan.

Elektroniikkakotelo

Elektroniikkakotelon liitäntöissä nostolaitteen johto liitetään numerolla 1 merkittyyn liitäntään. Kallistustoiminnon toimilaitteen johto liitetään numerolla 2 merkittyyn liitäntään.





KÄSIOHJAIN



TOIMILAITE (KALLISTUS)



TOIMILAITE (NOSTO)

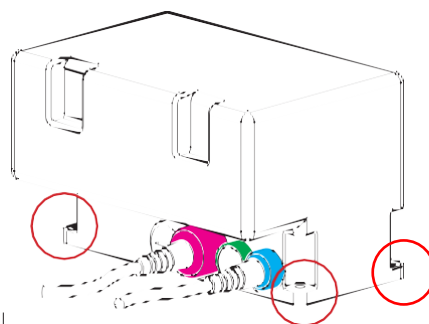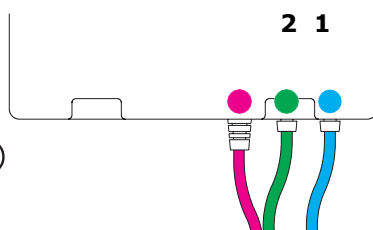

Elektroniikkakotelon vaihtamiseksi kaikki johdot irrotetaan ensin. Sitten avataan 4 ruuvia yllä kuvatulla tavalla. Uusi asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Asenna kannattimet jalkatukiin mukana toimitetuilla ruuveilla (C). Kannattimet asennetaan kuvan mukaisesti neljällä ruuvilla istuinlevyn etureunaan. Huomaa, että lukitusruuvien (B) on osoitettava sisään/alaspäin. Kiinnitä jalkatuen neliöputki (A) jalkatuen kannattimiin istuinlevyn etuosan alle. Lukitse jalkatuki lukitusruuveilla (B) molemmin puolin.

Turvapysäytin

Kiskotapin (D) muodostama turvapysäytin on asennettu jalkatukiprofiiliin alapäähän. Turvapysäytintä voidaan myös käyttää aiemmin säädetyn korkeuden löytämiseksi.





Jalkatuen profiiliin jalkatuen yläpuolelle voidaan asentaa toinen turvapysäytin vaihtoehtoisen korkeussäädön löytämisen helpottamiseksi (esim. kenkien kanssa/ilman kenkiä).

Polvikulman säätäminen

Kun jalkatuki on asennettu istuinlevvyyn, voidaan jalkatukea säätää polvinivelen kohdalta. Avaa vipuja (E) hieman ja säädä jalkatuki haluttuun kulmaan. Kiristä vivut.

Jalkatuen korkeuden säätäminen

Kun jalkatuki on asennettu istuinlevvyyn, jalkatukea voidaan säätää nilkan kohdalta. Avaa vipuja (E) hieman ja säädä jalkatuki halutulle korkeudelle. Kiristä vivut.

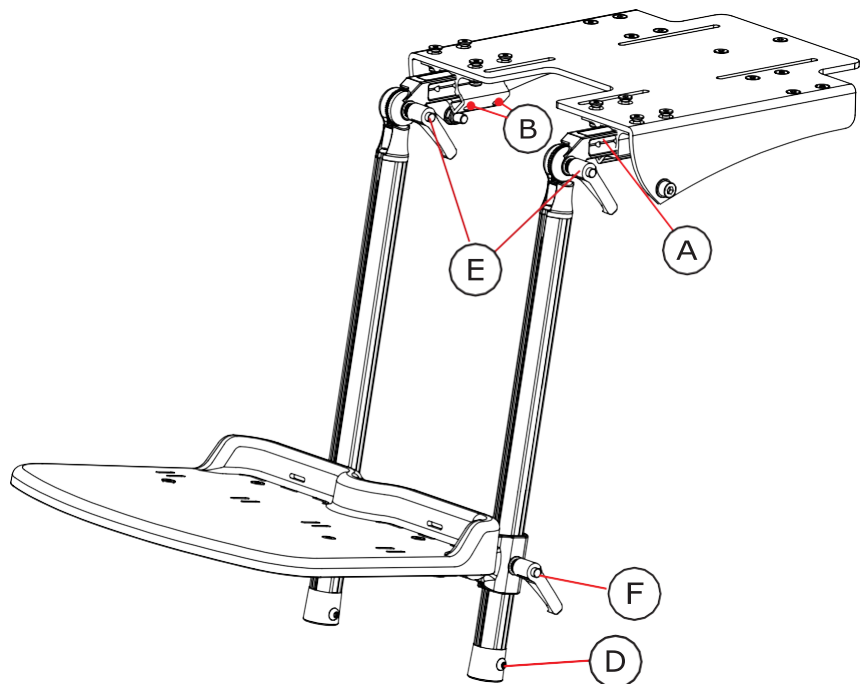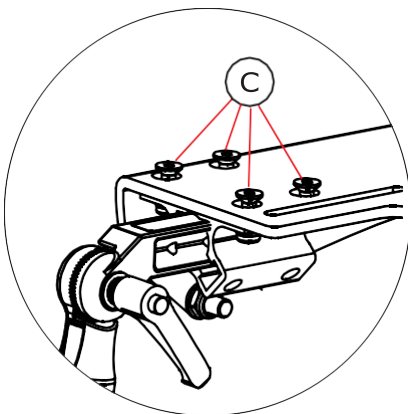


Korkealaitainen jalkatuki

Korkealaitaisen jalkatuen asentaminen

Jalkatuen asentamiseksi jalkatuen (B) vastamutteri (A) painetaan ensin jalkatuen kannattimeen (C). Sitten jalkatuki (D) säädetään halutulle korkeudelle ja kiristetään vipu (E).

Jalkatuen korkeus ja leveys säädetään ruuvien (F) ja (G) avulla.

Korkealaitaisen jalkatuen muovinen kannatin (H) tulee sijoittaa jalkatuen levyssä olevan hahlon (I) läpi. Lopuksi asennetaan mukana toimitettu tyyny ja tarkistetaan kaikkien ruuvien kireys.

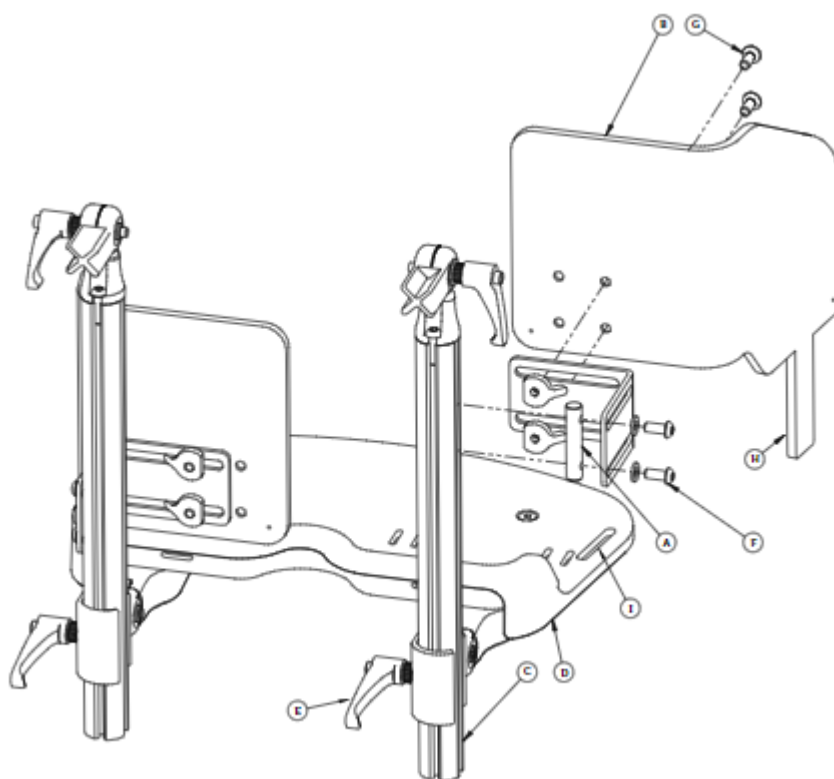

Halutun korkeuden säätämisen jälkeen muovinen kannatin (H) voidaan tarvittaessa leikata tai kuumentaa ja taittaa jalkatuen levyn alle.

Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen

Ennen pohjetuen asentamista on mahdolliset jalkatuet ensin irrotettava jalkatuen kannattimesta. Ensin poistetaan päätykappale (G) ja sitten avataan vipua (F), joka pitää jalkatuen paikallaan sen kannattimessa. Sitten jalkatuen levyä kannattimiseen vedetään alaspäin.


Pohjetuki asennetaan työntämällä vastamutterit (C) jalkatuen kannattimeen, säädetään halutulle korkeudelle ja kiristetään ruuveilla (E). Lopuksi jalkatuki ja päätykappale asennetaan takaisin paikoilleen.

Korkeuden säätäminen

Pohjetuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (E) hieman ja tuki säädetään halutulle korkeudelle. Lopuksi ruuvit kiristetään.

Leveyden säätäminen

Pohjetuen leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja tuki säädetään halutulle leveydelle. Lopuksi ruuvit kiristetään.

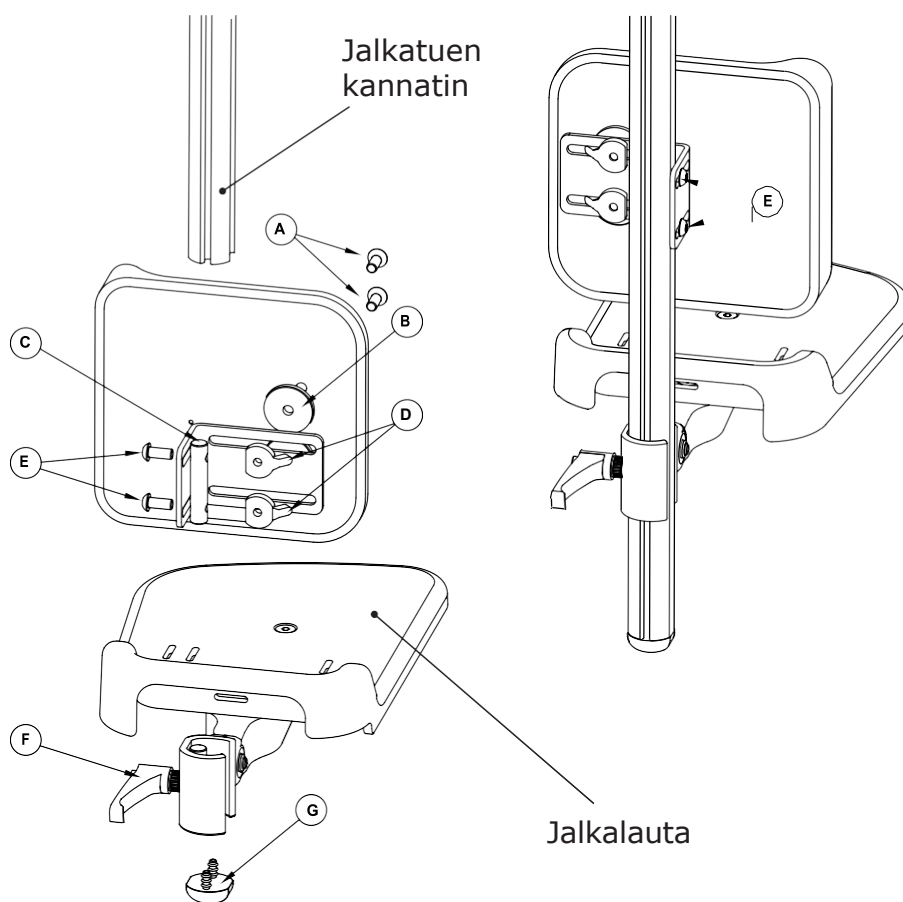

Ohjaustankoon kiinnittyvä käsinoja

Asentaminen ohjaustankoon

Avaa ruuveja (A) molemmilla puolin. Asenna käsinojan kannatin selkänojan taakse sopivalle korkeudelle panemalla ruuvit (A) takaisin paikoilleen ja kiristämällä.

Korkeuden säätäminen

Avaa ruuveja (A) ja säädä halutulle korkeudelle. Kiristä ruuvit.

Leveyden säätäminen

Avaa ruuveja (B) hieman ja säädä leveys halutuksi. Kiristä ruuvit.

Kallistussäätö ylös/alas

Käsinojan kallistuksen säätämiseksi avataan vipua (C) hieman ja säädetään kulma halutuksi.

Käsinojalevyn syvyysäätö

Avaa ruuveja (D) käsinojalevyn alta ja siirrä käsinoja haluttuun kohtaan levyn alla olevien reikien avulla.



Yhteenveto ja tarkastukset

Asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on tarkastettava, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja toimivat moitteettomasti.

Tarkasta tuotteen ja sen lisävarusteiden säädöt varmistaen, että käyttäjän istuma-asento on oikea.

Kaikkien asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on kaikki nupit, kiinnitysruuvit ja -mutterit tarkastettava ja kiristettävä.

Varmista, että apuväline on tasapainossa siten, että kaatumisvaaraa ei ole.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää. Käänny apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Kuljettaminen ajoneuvoissa

Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi käyttäjien kuljettamiseen ajoneuvoissa. Tätä tuotetta ei myöskään ole törmäystestattu.

Huolto ja kunnossapito

Tarkastus ennen käyttöä

Apuvälineen moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta.

Tarkastukset on suoritettava aina ennen käyttöä seuraavien seikkojen osalta:

- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Tarkasta etenkin ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustarungossa.
- Tarkista tuotteen vakaus.
- Tarkista mahdollisten kaatumasteiden toimivuus.
- Tarkista jarrujen toimivuus.
- Tarkista pyörien kunto ja niiden kiinnitys.
- Tarkista tuotteen liikkuvat osat ja toiminnot, kuten selkänöjan kallistus jne., liikkeen ja lukittumisen osalta.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää, vaan tulee kääntyä apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Hoito

Hoidon tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Tarve riippuu tuotteesta mutta vähintään kerran viikossa tehtävää hoitoa suositellaan.

Puhdista laite kostealla liinalla ja miedolla antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Elektroniikalla on IP-luokitus: IPXO. Tämä tarkoittaa, että se saadaan puhdistaa vain lievästi kostutetulla liinalla. Elektroniikka on irrotettava ennen pesemistä.

Huolto ja kunnossapito

Tuote on huollettava säännöllisesti turvallisen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Huollon tarve vaihtelee ja voidaan arvioida tapauskohtaisesti tuotteen käytöstä ja kulumisesta riippuen, mutta vähintään puolivuositain tehtävää huoltoa suositellaan.

Huoltotoimenpiteet kuuluvat aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäviksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvaohjeet”. Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosa.

Jokaisen huollon yhteydessä on varmistettava, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että tuotteen käyttäminen on turvallista. Mikäli ilmenee puutteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen eivätkä ole korjattavissa, on tuote otettava pois käytöstä. Tuotteen puhdistamisen osalta ks. kappaleet Hoito ja Kunnostaminen.

Tarkista seuraavat seikat ja korjaa tarvittaessa:

- Tarkista kaikki tuotteen toiminnot.
- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, vääntymiä, kuluneisuutta ja vaurioita.
- Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty tiukalle.
- Tarkista, että kaikki nupit ovat ehjiä ja toimivia.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustarungossa.
- Tarkista kaatumaesteiden toimivuus.
- Tarkista jarrujen toimivuus.
- Testaa kaikkien liikkuvien osien kuten nivelten, vaijereiden, pyörien, nappien jne. toiminta ja voitele ne. Käytä sopivaa öljyä tai voiteluainetta (esim. CRC 5-56, Teflon-spray jne.).
- Tarkista tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojakallistus, istuma-asento, korkeussäätö jne. säätömahdollisuuksien, liikkuvuuden ja lukittumisen osalta.
- Tarkista, että kaasujouset lukittuvat valittuun asemaan.
- Tarkista, että vaijerit on oikein sijoitettu ja säädetty.
- Tarkista pyörien toiminta: tarkista, että kaikki pyörät ovat kiinni ja tukevasti alustaa vasten. Tarkista, että tuote rullautuu normaalisti.
- Tarkista kaikkien nivelten, hammasliitosten ja kannattimien kuluneisuus. Varmista, että ne lukittuvat tukevasti.
- Tarkista merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit; niiden on oltava ehjät ja luettavissa.

Sähkötoiminnot

- Tarkista, että toimilaitteet ja akut on kunnolla kiinnitetty ja hyvässä kunnossa.
- Tarkista, että kaapelit, liitännät ja tiivistysrenkaat ovat ehjät eikä niissä ole näkyviä vaurioita.
- Tarkista, että käsiohjain ja laturi ovat hyvässä kunnossa ja toimivat.

Jälkitarkastus

Huollon jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti.

Kunnostaminen

Kunnostaminen tehdään normaalisti, mikäli apuväline on ollut henkilökohtaisessa käytössä ja se on tarkoitus luovuttaa uudelle käyttäjälle tai varastoida pidempään. Työ kuuluu aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäväksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale "Turvaohjeet".

Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n alkuperäisosia.

Tietoja tuotteesta ja sen toiminnoista löytyy käyttöohjeesta osoitteessa www.anatomicsitt.com. Tuotteen käyttökäyttöä koskevien tietojen osalta katso tämä käyttöohjeen kappale "Rajoitukset".

Kunnostuksen yhteydessä on aina tarkistettava ennen lähettämistä uudelle käyttäjälle, että apuväline ei ole erityisesti mukautettu (adaptaatio).

Aina kunnostuksen yhteydessä tulee varmistaa, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että se on turvallinen käyttää. Mikäli siinä on vikoja, joita ei voida kunnostuksella korjata, on tuote poistettava käytöstä ja kierrätettävä.

Puhdistaminen

Tuote puhdistetaan sienellä/liinalla ja antibakteerisilla miedoilla puhdistusaineilla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Tuote voidaan pestä pesukaapissa: 65 °C korkeintaan 10 minuutin ajan. Alustaa pesukaapissa pestäessä se on tuettava ja asetettava pystyyn pyörät lukittuina.

Sähkökomponentit on irrotettava alustasta ennen pesemistä pesukaapissa.

Kuivaus

Alusta voidaan kuivata kuivauskaapissa korkeintaan 70 °C:ssa ja 10 minuutin ajan.

Kunnostukseen liittyvät tarkastukset

Puhdistamisen ja kuivauksen jälkeen tuote on tarkastettava vaurioiden/kuluneisuuden osalta. Tuotteen soveltuvuutta kunnostamiselle arvioitaessa on pidettävä mielessä, että tuotteen käyttöikä on rajallinen (ks. kappale ”Rajoitukset” tässä käyttöohjeessa).

Rikkinäiset, kuluneet ja murtuneet osat on vaihdettava uusiin. Käytä ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosa. Varaosia voidaan tilata erillisen varaosaluettelon/hajotuskuvan perusteella. Tuotteen CE-merkinnän säilyttäminen edellyttää, että käytetään ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosa.

Testaa kaikkien liikkuvien osien kuten nivelten, vaijereiden, pyörien, nappien jne. toiminta ja voitele ne. Käytä sopivaa öljyä tai voiteluainetta (esim. CRC 5-56, Teflon-spray jne.).

Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Varmista, että kaikki käyttöohjeet ja alkuperäiset kilvet/etiketit sisältyvät uuteen määräykseen.

Kilvet/tarrat

Mikäli tarvitsette uusia kilpiä tai tarroja, ottakaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen. Niiden sijainti apuvälineessä neuvotaan osoitteessa www.anatomicsitt.com, josta löytyy myös käyttöohje.

Korjausmaali

Korroosioaurioiden estämiseksi ja naarmujen korjaamista varten voidaan tilata valkoista maalia Anatomic Sitt AB:lta. Tuotenumero: 387299, korjausmaali, alusta G2, mattamusta.

Tarkastusten luettelo

Yleistarkastus:

- ☐ Tarkasta tuote kokonaisuudessaan lisävarusteineen rikkoutuneiden, murtuneiden tai kuluneiden osien havaitsemiseksi, jotka on vaihdettava uusiin.
- ☐ Tarkasta kaikki tuotteen toiminnot.
- ☐ Tarkasta, ettei apuvälineessä ole vääntymiä ja että se on tukeva siten, että kaikkia neljä pyörä koskettavat alustaa.

Alusta:

- ☐ Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty tiukalle.
- ☐ Tarkista, että tuolin säädöt toimivat moitteettomasti.
- ☐ Tarkista, että kallistus toimii ja että kaasujousi lukittuu valittuun asemaan.
- ☐ Tarkista, että vaijerit on sijoitettu ja säädetty oikein.
- ☐ Tarkista, että noton kaasujousi toimii moitteettomasti.
- ☐ Tarkista työntökahvan/ohjaustangon säädöt ja nivelet.

Pyörät/jarrut:

- ☐ Tarkista, että pyörien ruuvit on kiristetty tiukalle.
- ☐ Tarkista, että pyörät pyörivät toimivat moitteettomasti eivätkä laakerit jumiudu.
- ☐ Tarkista jarrujen toiminta kaikissa pyörissä.
- ☐ Tarkista, että alusta kulkee vaivattomasti ja suoraan pyörillään.

Jalkatuki:

- ☐ Tarkista korkeus- ja kallistussäädön toiminta.
- ☐ Tarkista kaikkien hammasnivekten mahdollinen kuluneisuus ja varmista, että ne lukittuvat kunnolla.

Kiinnitysjärjestelmä:

- ☐ Tarkista lukittuminen.

Muut lisävarusteet:

- ☐ Tarkista kaikkien osien mahdollinen kuluneisuus, vaihda tarvittaessa uusiin.
- ☐ Tarkista lukot ja säädöt.

Sähköiset toiminnot:

- ☐ Tarkista, että toimilaite ja akku ovat oikein asennetut ja hyvässä kunnossa.
- ☐ Tarkista, että kaapelit, liitännät ja tiivistysrenkaat ovat ehjät eikä niissä ole näkyviä vaurioita.
- ☐ Tarkista, että käsiohjain ja laturi ovat hyvässä kunnossa ja toimivat.

Jälkitarkastus

Kunnostuksen jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti. Tarkista myös, että merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit ovat ehjät ja luettavissa.

Kierrättäminen

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityypin mukaan ja toimittaa kierrätysasemalle. Akut ja kaasujousi tulee luokitella vaaralliseksi materiaaliksi.

Takuu ja vaatimukset

Takuu ja siihen liittyvät vaatimukset

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä tai sopimuksen mukaisesti. Takuuta ei myönnetä, jos tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai vääränlaista tai huolimatonta käsittelyä. Virheellinen tuote on palautettava takuukäsittelyä varten. Liitä mukaan alkuperäisen toimituksen lähetysluettelo.

Takuuvaatimuksen arviointia helpottaa, että se on palautettaessa kuiva ja puhdistettu.

Kuvaile virhe ja mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi korjauksia tai korvaus takuun alaisena. Liitä aina mukaan kopio laskusta ja pyydä tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Takuuvaatimuskaavake on ladattavissa verkkosivuiltammne.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Palautukset

Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuote tulee palauttaa 20 päivän sisällä toimituspäivästä. Liitä aina mukaan kopio lähetysluettelosta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy. Palautuskaavake on saatavissa verkkosivuiltamme.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Tulee huomioda, että kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa!

Käyttöohjeen tarkistukset

Käyttöohjeiden tähän versioon on tehty seuraavat muutokset.

Tekniset tiedot / Toiminta

Uusi ohjaustankoon kiinnittyvä käsinoja

Asennus- ja säätämisohjeet

Uusi sivu 26 "Ohjaustankoon kiinnittyvä käsinoja"

Rajoitukset

Toimilaite lisätty

Tarkistettujen versioiden luettelo

ver. 2.0 - 2020-09-28

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-10-15

ver. 2.3 - 2022-12-30



Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

Anatomic Sitt AB (valmistaja)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Ruotsi
Puhelin +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Käyntiosoite
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Ruotsi

World wide

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

