



Zitzi
Sharky Pro

Käyttöohje

Käyttöohje, asennus- ja säätöohjeet, huolto,
kunnossapito ja kunnostaminen



Tämä käyttöohje koskee istuinjärjestelmää Zitzi Sharky Pro lisävarusteineen. Lisävarusteiden osalta viittaamme tuotteen tilauskaavakkeeseen.

Sisällysluettelo

Valmistaja	3	Päätuki	30
Kustomointi.....	3	Asentotukivyöt	32
Johdanto	4	Lantiovyö	34
Yleistä	4	Nilkkamansetti	35
Yhteydenotto - merkinnät	4	Istuimeen kiinnitettävät käsinojat.....	36
CE-merkintä - luokitus	4	Selkänojaan kiinnitettävät kiinteät käsinojat	38
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	4	Selkänojaan kiinnitettävät taitettavat käsinojat	40
Käyttötarkoitus	4	Olkavarren tuki	42
Symbolien luettelo	5	Työntötanko.....	43
Tuotteessa olevat merkinnät.....	6	Pöytä, kiinteä.....	44
Turvavaroitukset	7	Pöytä, taitettava.....	45
Koulutus ja pätevyysvaatimukset.....	7	Pöytä vahvistetuin kannattimin	46
Varoituksia ja varoitoimenpiteitä	8	Tukipöytä	47
Käyttöä edeltävä tarkastus	9	Jalkatuki.....	48
Rajoitukset	9	Yhtenäinen jalkatuki.....	49
Muut vaaratekijät.....	10	Jalkatuen kannattimet	50
Hyväksytyt yhdistelmät.....	10	Korkealaitainen jalkatuki.....	52
Poikkeustilanteet/onnettomuudet	10	Pohjetuki.....	54
Tekniset tiedot/Toiminta	11	Työntökahva	56
Adaptaatio ja kustomointi	13	Alaselän tuki	57
Asennus- ja säätämisohteet.....	14	Lämpötyyny	58
Istuinjärjestelmän asentaminen.....	15	Yhteenveto ja tarkastukset.....	59
Universaali adapterijärjestelmä	16	Kuljettaminen ajoneuvoissa	60
Kiinteä asennus	17	Huolto ja kunnossapito	61
Tasomainen istuin	18	Käyttöä edeltävä tarkastus.....	61
Istuinosa	20	Huolto ja kunnossapito	62
Selkänoja.....	24	Kunnostaminen	63
Sivutuki	26	Kierrättäminen.....	66
Lantiotuki.....	28	Takuu ja vaatimukset	66
Lonkkatuki	29	Käyttöohjeen tarkistukset.....	67

Valmistaja

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postiosoite	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin	+46 11-161800
Sähköposti	info@anatomicsitt.com
Internet	anatomicsitt.com
Opastusvideoita	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-rekisteröintinumero/SRN: SE-MF-000002240

Kustomointi



Rastita tämä ruutu, mikäli tuotteeseen on tehty henkilökohtaisia muutoksia.

CE-merkintä ei tällöin ole voimassa ja tulee poistaa.



rehaco.

Johdanto

Yleistä

Apuvälineen kaikkien etujen hyödyntämiseksi on tärkeätä lukea tämä käyttöohje huolellisesti. Tämä koskee kaikkia hoitajia ja perheenjäseniä, jotka osallistuvat käyttäjän hoivatyöhön. Käyttäjä on henkilö, joka istuu tuolissa ja hoitaja on välinettä käyttävä henkilö.

Säilyttäkää käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Uusia versioita on ladattavissa verkkosivuiltamme www.anatomicsitt.com. Tietoja uusimmasta versiosta löytyy etusivulta päivämäärän kanssa.

Yhteydenotto - merkinnät

Tuotekilvessä ja tuotteen pakkauksessa on tuotteen viitenumero (REF) ja sarjanumero (SN - päätuotteille) tai eränumero (LOT - lisävarusteille). Nämä numerot tarvitaan yhteydenotoissa Anatomic Sitt -yhtiöön. Sarjanumero löytyy istuinlevyn alapuolelta.

CE-merkintä - luokitus

Laite lisävarusteineen on asetuksen (EU) 2017/745, Liite VIII luokituksen mukainen CE-merkinnällä varustettu Luokan I lääkkinnällinen väline.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Laite täyttää lääkkinnällisiä välineitä koskevan asetuksen (EU) 2017/745 säädösten vaatimukset. Tarkista tämänhetkinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotevaihtoehdoille ja lisävarusteille osoitteessa www.anatomicsitt.com/documents.

Käyttötarkoitus

Zitzi Sharky on modulaarinen dynaaminen istuinjärjestelmä nuorille ja aikuisille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia. Istuinjärjestelmässä on useita säätömahdollisuuksia ja se on varustettavissa erilaisin lisävarustein määrätynlaisen istuma-asennon aikaansaamiseksi. Istuinjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi Anatomic Sitt i Norrköping AB -yhtiön valmistaman kuljetusalustan kanssa.


Zitzi Sharky on uudelleenkäytettävä tuote.

Symbolien luettelo

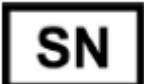
	Tätä symbolia käytetään käyttöohjeessa lukijan huomioon kiinnittämiseksi esim. tärkeisiin turvaohjeisiin yms.		Ilmoittaa valmistuserän numeron, jolloin erä voidaan tunnistaa.
	Tämä symboli varoittaa puristuksiin joutumisen vaarasta.		Ilmoittaa tuotteen olevan lääkinällinen väline.
	Tämä symboli viittaa ohjeisiin ja vinkkeihin, jotka helpottavat tuotteen käyttämistä.		Ilmoittaa valmistajan viitenumeron/tuotenumeron, jonka avulla lääkinällinen väline voidaan tunnistaa.
 www.anatomicsitt.com	Ilmoittaa, että käyttöohjeet tulee aina lukea ennen käyttöä. Verkko-osoite ilmoittaa sivuston, josta asiakirja löytyy sähköisessä muodossa.		Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka avulla tietty tekninen tuote on tunnistettavissa
	Ilmoittaa, että käyttöohje tulee lukea tärkeiden turvallisuustietojen saamiseksi esim. varoituksista, joita ei löydy tuotekilvestä.		Yksilöllinen tuotetunniste, jonka avulla lääkinällinen väline on tunnistettavissa yksiselitteisesti.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistajan (EU) MDR 2017/745 -sääöksessä määritellyllä tavalla. Voidaan myös käyttää yhdessä valmistuspäivän kanssa.		Ilmoittaa tuotteen olevan varustettu CE-merkinnällä sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistuspäivämäärän.		

Tuotteessa olevat merkinnät

Päätuotteen tuotekilpi

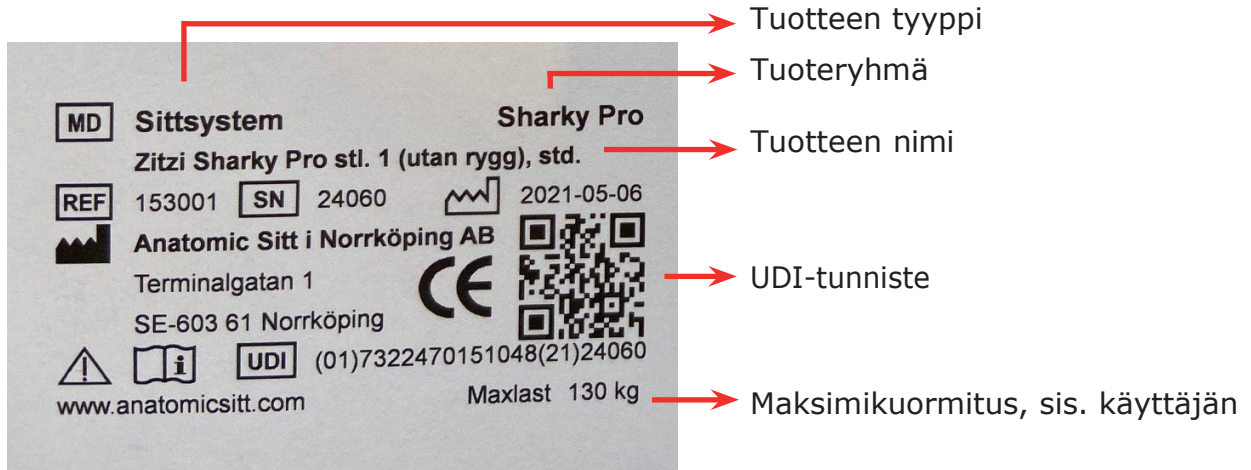

Lisävarusteiden tuotekilpi

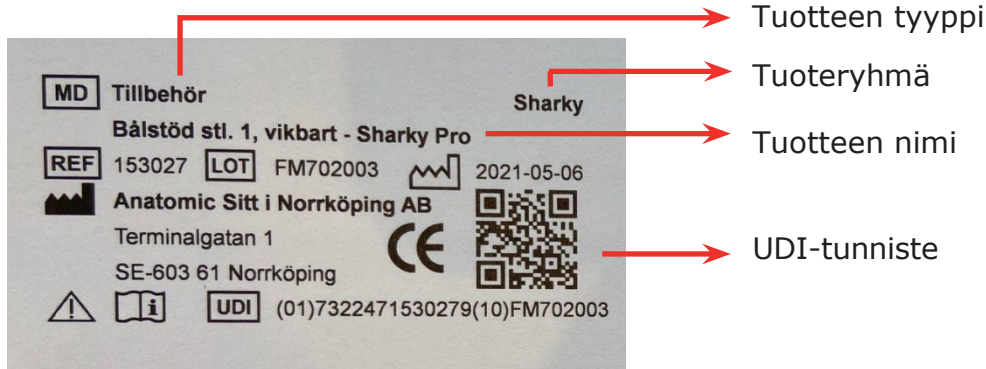

Turvavarotoimet

Koulutus ja pätevyysvaatimukset

- Asentaminen, huolto ja kunnostus kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Mukauttamista/erityissovituksia (adaptaatio) koskevat päätökset kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi ja sovitusten suorittaminen pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen asetukset, säädöt ja testaaminen kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi (erikoishenkilöstö apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen määränneen tahon tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, tulee aina suorittaa riskinarviointi ennen käyttöä.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä

-  Käyttöohje tulee aina lukea ennen käyttöä.
-  Säädot kuuluvat yksinomaan pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Säätojen tekeminen on sallittua vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Tuotteen toiminta on tarkastettava ennen sen luovuttamista käyttäjälle.
-  Apuvälineen määrännyt henkilö on vastuussa käyttäjän ja/tai muiden välittömässä yhteydessä olevien henkilöiden opastamisesta välineen turvalliseen käyttöön. Tuotteen toiminta on aina varmistettava ennen käyttöä.
-  Määrääjän tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, on varmistettava valitun istuimen tasapaino siten, että putoamisriskiä ei synny.
-  Säätoja saa tehdä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Kaikkien asennus-, säätö- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen on kaikki kiristysruuvit ja -mutterit tarkistettava ja kiristettävä.
-  Istuinjärjestelmän tukeva kiinnitys alustaan on aina varmistettava ennen Potilaan asettamista istuinjärjestelmään! Istuin toimitetaan turvahihnan kanssa, joka on tarkoitus kiristää istuimen selkänoja-profiolista ja työntökahvan ympäri. Tätä hihnaa tulee aina käyttää yleisadapterijärjestelmän kanssa sekä ajoneuvokuljetuksissa. Tulee varmistaa, että hihna on tukeva ja tiukalla.
-  Jalkalautaa ei saa käyttää apuna välineeseen noustaessa ja siitä poistuttaessa.
-  Laitetta ei saa milloinkaan ylikuormittaa, suurimman sallitun kuormituksen osalta ks. kappale Rajoitukset.
-  Tulee huomioida, että jos käyttäjä kurkottaa liian pitkälle apuvälineestä, saattaa painopiste siirtyä ja aiheuttaa kohonneen kaatumisvaaran.
-  Nostaminen tulee aina tehdä ainoastaan rungosta – ei koskaan istuimesta.
-  Istuinjärjestelmää ei tule milloinkaan nostaa käyttäjän istuessa siinä.
-  Huoltotoimenpiteitä ei tule koskaan tehdä käytön aikana.
-  Käyttäjää ei koskaan saa jättää ilman valvontaa apuvälinettä käytettäessä.
-  Käytön jälkeen on aina tarkistettava esiintyykö potilaalla punoitusta tai painejälkiä.

Käyttöä edeltävä tarkastus

Tarkastus tulee suorittaa ennen jokaista käyttöä seuraavasti:

- Tarkasta, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Erityisesti on tarkastettava ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkasta, että istuin on tukevasti kiinni alustarungossa.
- Tarkasta tuotteen tukevuus.
- Tarkasta tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänoja- ja istuinkallistus, korkeussäätö jne. niiden toiminnan ja lukittumisen osalta.
- Tarkasta esiintyykö vöissä ja liiveissä kuluneisuutta ja varmista niiden toimivuus ja kiinnitys.

Mikäli havaitaan vikaa, ei tuotetta tule käyttää, vaan on käännettävä apuvälineiden jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Rajoitukset

Maksimikuormitus

Maksimikuormituspaino on: 130 kg, koskee kaikkia kokoja.

Kuormituspainolla tarkoitetaan suurinta painoa, jolle istuinjärjestelmä voidaan altistaa, kuten käyttäjien painoa ja mahdollisia muita kuormitteita.

Maksimikuormituspaino ajoneuvoissa tapahtuvalle kuljetukselle on 75 kg.

Käyttöikä

Tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä normaalikäytössä on 5 vuotta, kun sitä käytetään tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti ja näitä käyttöohjeita noudattaen. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, miten usein ja miten intensiivisesti tuotetta käytetään, mutta on korkeintaan 10 vuotta.

Kaasujousi

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi aktivoida vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että männän tanko osoittaa alaspäin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua ja jousen toiminta lakata.

Muut vaaratekijät

On huolehdittava siitä, että tuote ja sen lisävarusteet on oikein säädetty siten, ettei käyttäjä tunne oloaan epämukavaksi tai vahingoitu käytön aikana. Mikäli näin ei ole, on tuote säädettävä uudelleen tai asennettava sopivat lisävarusteet.

Hyväksytyt yhdistelmät

Tuotteen CE-merkinnän säilyminen edellyttää, että apuvälinettä käytetään vain sellaisten lisävarusteiden kanssa ja varaosin, jotka ovat Anatomic Sitt AB:n toimittamia. Tuotteen tilauskaavakkeesta löytyvät tiedot mahdollisista lisävarusteista sekä varaosia koskevat hajotuskuvat.


Poikkeustilanteet/onnettomuudet

Mikäli tuote ei ole toimintakuntoinen, kääntykää apuvälinemyyjän tai valmistajan puoleen.

Mikäli tapahtuu vakava onnettomuus, siitä tulee tehdä ilmoitus Anatomic Sitt AB:lle ja käyttömaan viranomaisille.

Tekniset tiedot/Toiminta

Sharky Pro

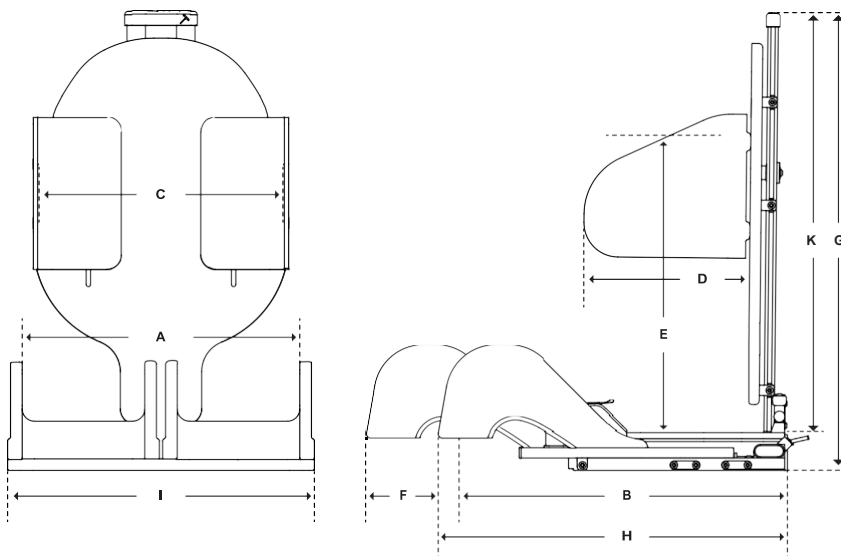

Tekniset tiedot


Koko 1

Koko 2

Käyttäjän pituus	150- 180 cm	170- 195 cm
Käyttäjän paino	130 kg*	130 kg*
Istuimen leveys (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Istuimen syvyys (B)	36- 47 cm	45- 55 cm
Lateraalinen leveys (C)	27- 35 cm	30- 38 cm
Lateraalinen syvyys (D)	21 cm	25 cm
Kainalokorkeus (E)	35- 50 cm	40- 55 cm
Jalkapituusväli (F)	10 cm	10 cm
Loitonnuks/lähennys	18° / 9°	18° / 9°
Korkeus (G)	72 cm	77 cm
Pituus (H)	52- 62 cm	62- 72 cm
Leveys (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Paino	14 kg	15 kg
Selkänojakuilma	-10° / +30°	-10° / +30°
Selkänojalevy: lev. x korkeus	35 x 54 cm	36 x 60 cm
Selkänojaprofiilin pituus (K)	67 cm	72 cm

* Törmäystestin hyväksyntä korkeintaan 75 kg:n painolle.

LANNETUKI koko 3

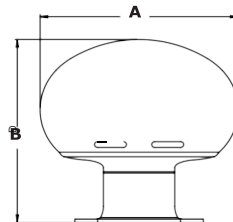



A x B = 18 x 21 cm

LEVEYSSÄÄTÖ

	Lannetuki	
	Std.	Suora
Sharky 1 (SW=36)	22-32	32-39
Sharky 1 (SW=39)	25-35	35-42
Sharky 1 (SW=42)	28-38	38-45
Sharky 2 (SW=43)	26-32	36-39
Sharky 2 (SW=46)	29-35	39-42
Sharky 2 (SW=49)	32-38	42-45

(SW=istuinleveys, kaikkia mitat cm)

JALKATUKI

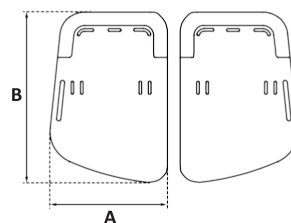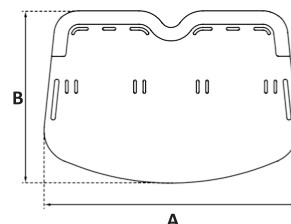

A x B

Yhten. koko 3 380 x 260 mm

Yhten. koko 4 380 x 310 mm

Erill. koko 3 175 x 255 mm


Erill. koko 4 175 x 305 mm

Footrest size 3 4

Jalkatuen kannatinprof. pituus (cm) 35 40

Hammasnivelen pituus (mm) 30 30

PÖYTÄ

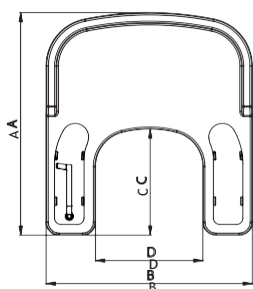


Pöytä	A	B	C	D
Koko 1	480	450	240	250 mm
Koko 2	540	515	260	290 mm
Koko 3	570	570	280	340 mm
Koko 4	660	600	320	385 mm
Koko 5	660	650	320	435 mm

Tukipöytä


Tukipöytä	A	B	C	D
Koko 1	380	450	230	260 mm
Koko2	430	510	260	300 mm
Koko 3	490	580	300	340 mm
Koko 4	540	640	330	380 mm
Koko 5	620	740	380	440 mm

TUKIPÖYTÄ

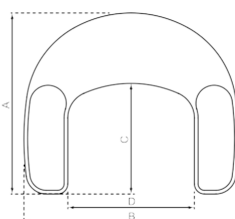

KORKEALAITAINEN JALKATUKI

Koko 3 sopii jalkatukeen kokoa 3 jne.

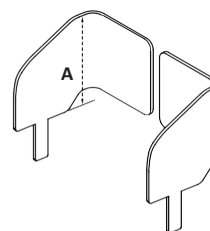


A (korkeus jalkalaudasta)

Koko 3 210 mm

Koko 4 240 mm

SÄÄDETTÄVÄ SELKÄNOJA

Kaikki mitat sis. verhoilun

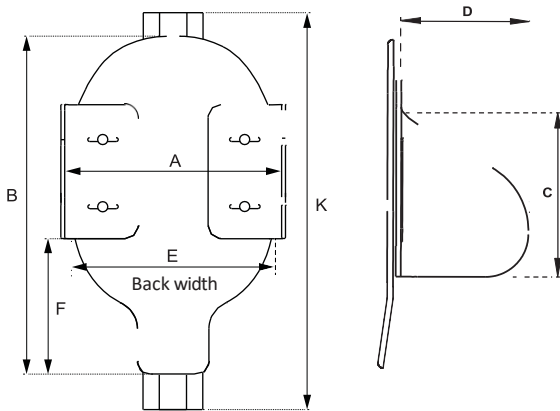

Selkänöjan mitat

B x E

Koko 1 54 x 35 cm

Koko 2 60 x 36 cm

Sivutuen mitat (cm)

C x D

Koko 3 (Delfi) 25 x 18 cm

Koko 1 (Sharky) 22 x 25 cm

Koko 2 (Sharky) 30 x 29 cm

SIVUTUKI

Leveyssäätö (A) cm sis. verhoilun

Korkeussäätö (F) cm sis. verhoilun


Sivutuki	Selkänöja 1	Selkänöja 2	Selkänöja 1	Selkänöja 2
Koko 3 (Delfi)	21 - 30	21 - 30	13 - 20	16 - 23
Koko 1 (Sharky)	27 - 35	27 - 35	14 - 21	17 - 24
Koko 2 (Sharky)	30 - 38	30 - 38	12 - 18	15 - 22

Harmaat ruudut = standardikonfiguraatio

Koko 1 Koko 2


Selkänöjaprofiilin pituus (K): 67

ISTUIMEEN ASENNETTAVA KÄSINOJA

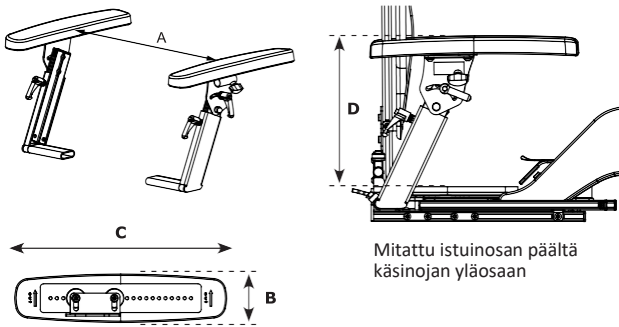

Mitta A B C D
350-460 75 330 190-280 mm

SELKÄNOJAAN ASENNETTAVA KÄSINOJA

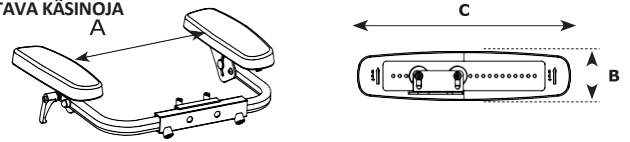

	A	B	C
Standardi			
Koko 1-2	350 - 470 mm	75 mm	330 mm
Taittuva			
Koko 1-2	380 - 500 mm	75 mm	330 mm


POIKKITANKO

	A
Koko 3	425 mm
Koko 4	480 mm
Koko 5	520 mm


Mitat putkien keskeltä



PÄÄTUKI

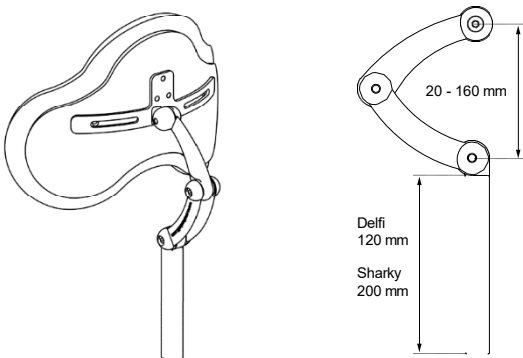


Päätuki	A x B
Koko 1	220 x 150 mm
Koko 1 pitkä	280 x 160 mm
Koko 2	240 x 190 mm
Koko 2 pitkä	280 x 210 mm

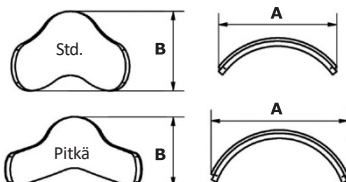

LONKKATUKI

	A x B
Koko 1-2	200 x 120 mm

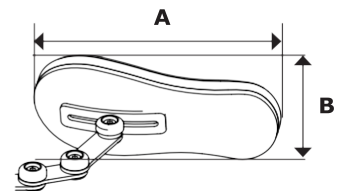

Adaptaatio ja kustomointi

Suositukses

Aina kun tuotteeseen tehdään muutoksia, on tehtävä arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio (sovitus) vai kustomointi.

Adaptaatio on CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut muutostyöt ovat kustomointeja. Adaptaation voi tehdä ainoastaan tehtävään päteväksi katsottu henkilö ja se tulee tehdä ammattimaisesti.

CE-merkinnän puitteissa sallitut adaptaatiot

Jalkatukiprofiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.

Selkänojaprofiilia voidaan lyhentää. Profiili ei saa olla niin lyhyt, ettei kaikkia selkänojalevyn kiinnitysosia voitaisi asentaa paikoilleen.

Riskianalyysi


Tulee huomioida, että lääkinällisen apuvälineen adaptaatiolle ja kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua käyttäjälle vaaralliseksi kustomoinnin jälkeen.

Merkintä

Tuote on merkittävä tietyllä käyttäjälle mukautetuksi siten, ettei sitä voida sekoittaa tuotteen perusmalliin.

Asennus- ja säätämisohjaat

Asentaminen kuuluu aina pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavassa). Käyttäjää ja muita käyttäjän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä tulee opastaa tuotteen toimintoihin siten, että apuvälinettä voidaan käyttää turvallisesti.

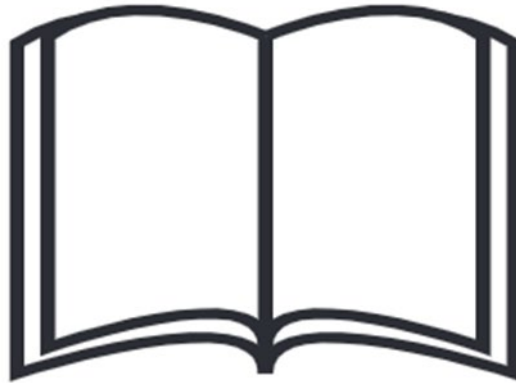

Työkalu

Säätöjen tekemiseen tarvittava kuusiokoloavain (4 mm) on sijoitettu selkänojaprofiilin yläosan sisään.





 = Säätöpultti 

Istuinjärjestelmän asentaminen

Asentaminen alustalle

Istuinjärjestelmän asentamiseksi alustalle on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, jotka selitetään seuraavassa. Valitse parhaiten soveltuva menetelmä.

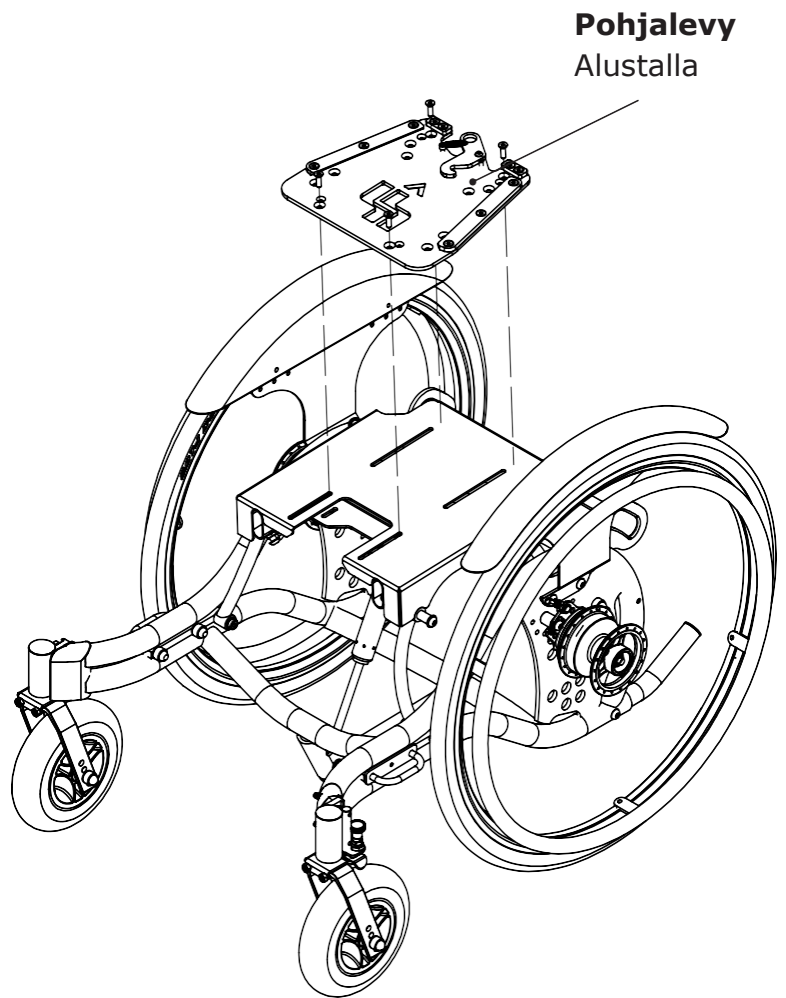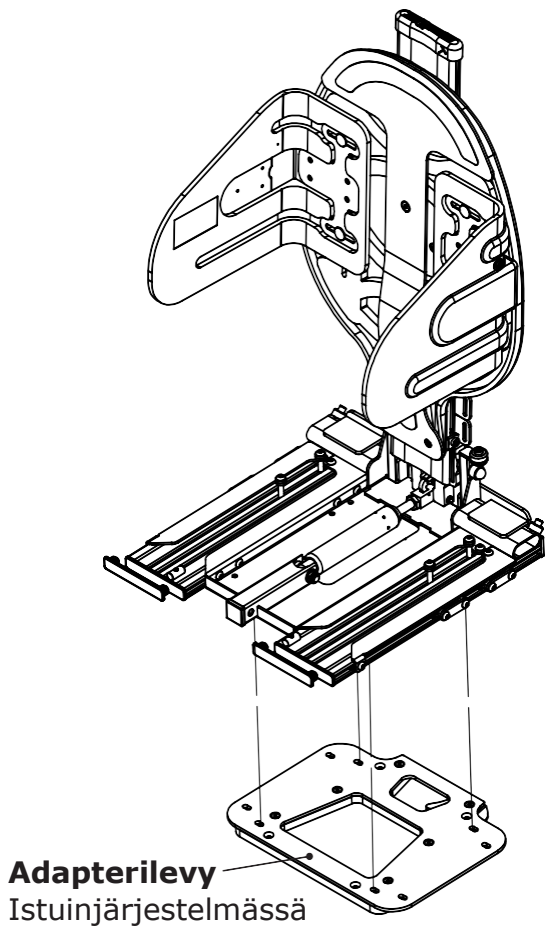


Universaali adapterijärjestelmä

Asentaminen adapterijärjestelmän kanssa

Kiinnitä ensin pohjalevy (A) alustaan mukana tulevilla pulteilla, aluslevyillä (prikoilla), ja muttereilla (B).

Kiinnitä sitten adapterilevy (C) työntämällä vastamutterit (D) istuinjärjestelmän pohjan ulimpiin uriin. Aseta haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvit (E).

Kun molemmat levyt on asennettu, ne voidaan yhdistää. Istuinjärjestelmän tukeva kiinnittyminen varmistuu, kun kuulet loksahduksen.

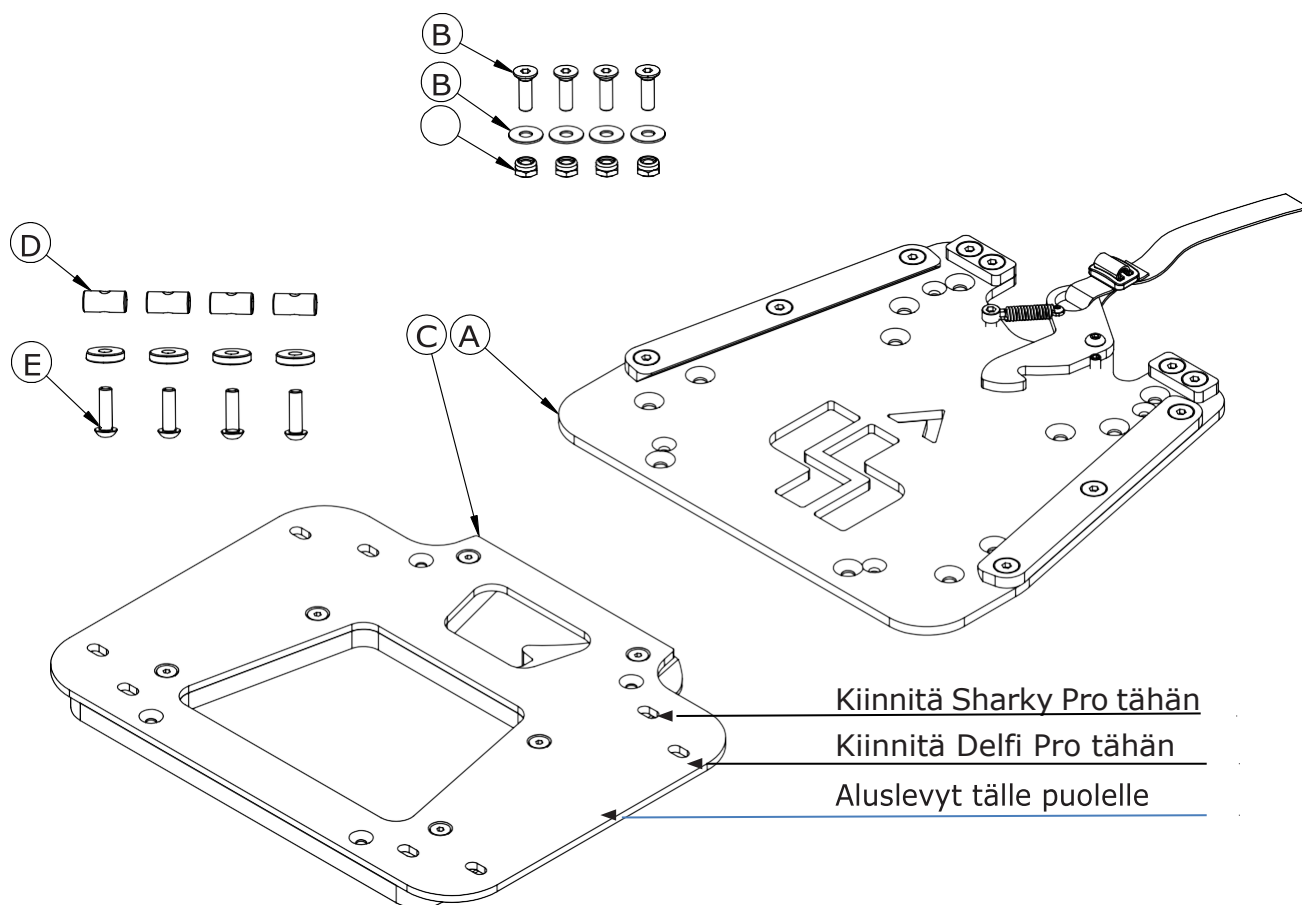

Varmista ennen käyttöä, että istuinjärjestelmä on tukevasti kiinni alustassa.




Universaalia adapterimekanismia käytettäessä istuinjärjestelmän selkänojan turvahihna tulee kiristää alustan työntökahvan (tai vastaavan) ympärille.

Kiinteä asennus

Kiinteä asennus tarkoittaa istuinjärjestelmän kiinnittämistä suoraan alustalle. Tällä tavalla tehtävä asennus on tehtävä mukana toimitetulla asennussarjalla.

Istuinjärjestelmän pohjassa on kaksi erilaista reikäkuviota alustaan kiinnittämistä varten. Valitse ne reiät, jotka parhaiten soveltuvat hyvän tasapainon aikaansaavan kiinnityksen tekemiseksi.

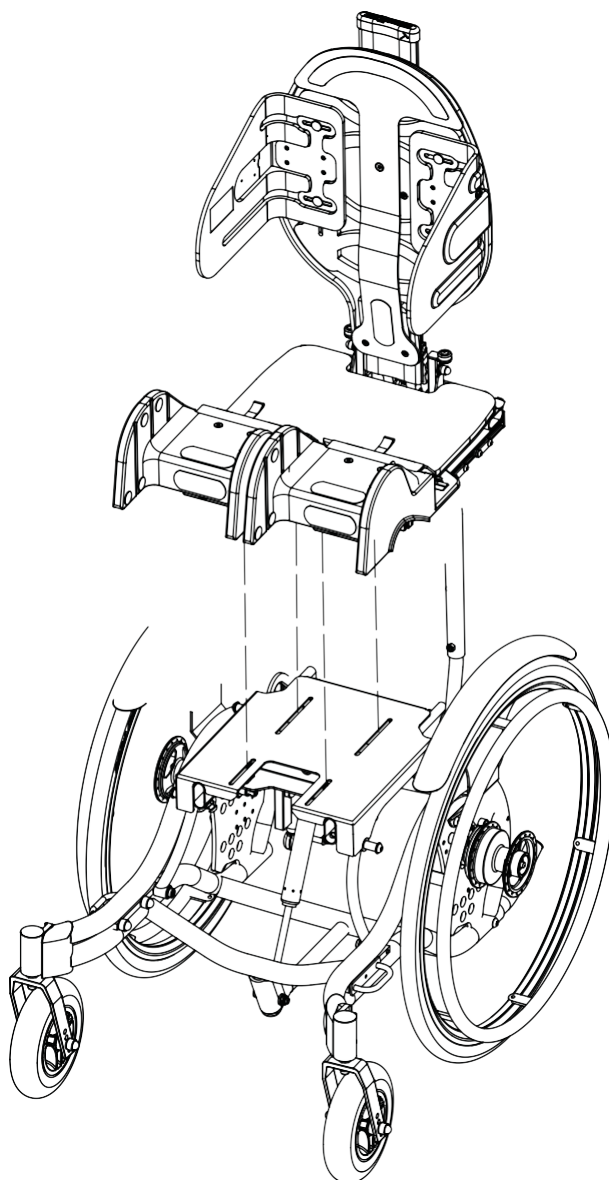

Käytä turvallisuussyistä ainoastaan mukana toimitettuja ruuveja. Mikäli halutaan muita mittoja, tulee ottaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen.



Tasomaista istuinta käytettäessä se on ensin irrotettava ennen alustalle asentamista.

Tasomainen istuin

Tasomaisen istuimen asentaminen

Tasoistuin asennettaessa normaalit istuinosaat korvataan tasomaisella istuinlevyllä. Tasoistuimen asentaminen tulee tehdä mukana toimitetuilla asennusosilla alla olevan kuvauksen mukaisesti.


Poista päätysuojus (I) profiilien päistä. Käytä vastamutterita (A) profiilien uloimmissa urissa ja asenna ruuvi (B) tasomaisen istuimen reikiin (C). Älä kiristä ruuveja (B) kokonaan.

Käytä profiilin taemmissa rei-issä (G) pidempiä ruuveja (D) aluslevyn (E) kanssa. Ruuvien vastakkaisella puolelle käytetään vastamuttereita (H). Älä kiristä ruuveja (D) kokonaan.

Työnnä tasomainen istuin istuinalustaan uraan 2 ja kiristä ruuvit (B) ja (D). Pane päätysuojukset (I) takaisin profiileihin.




Käytä turvallisuussyistä ainoastaan mukana toimitettuja ruuveja. Mikäli halutaan muita mittoja, tulee ottaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen.

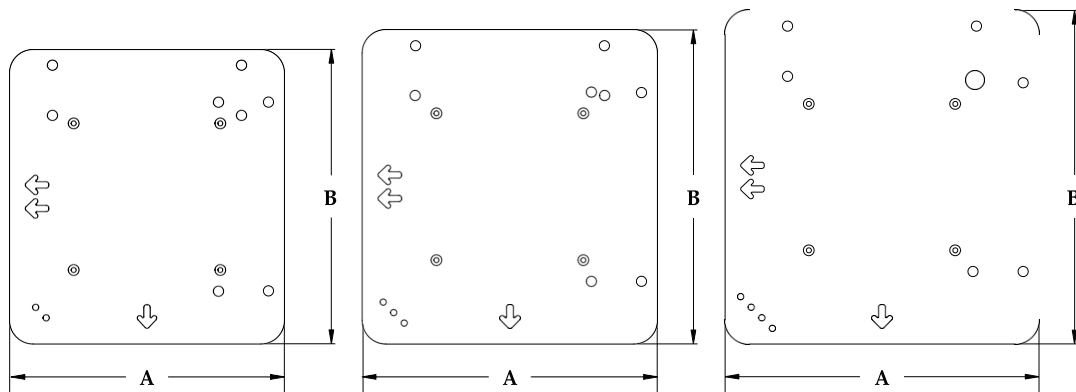


Tasoistuin
Tuotenro.
153190
(AxB)
350 x 375 mm


Tasoistuin
Tuotenro.
153191
(AxB)
375 x 400 mm

Tasoistuin
Tuotenro.
153192
(AxB)
400 x 425 mm

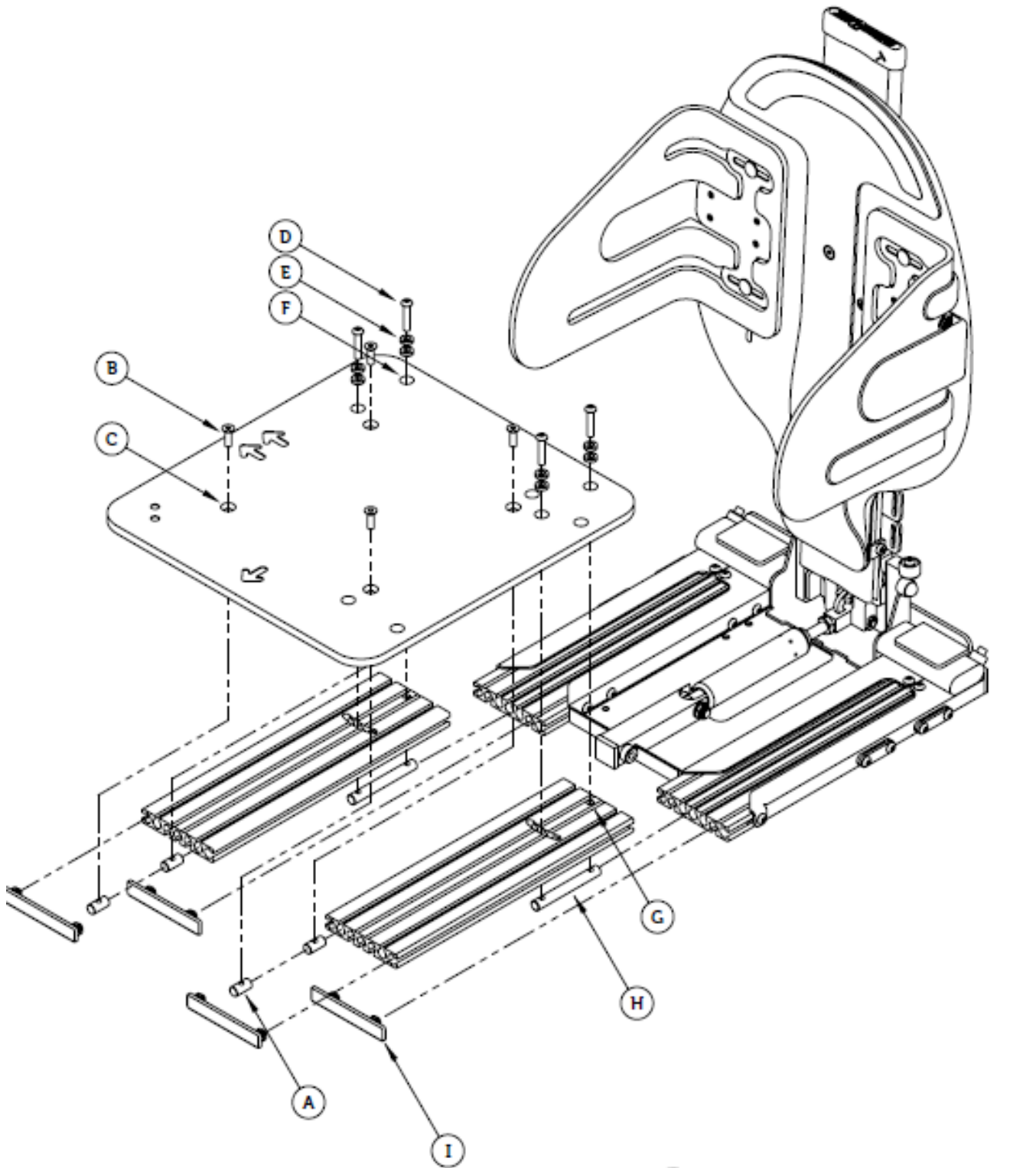



M6x3 priikka
8 kpl

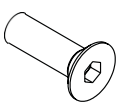
M6x16 ruuvi
uppokanta
4 kpl

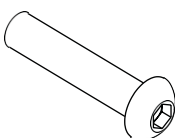
M6x35 ruuvi
4 pcs


Vastamutterit
4 kpl / 2 kpl

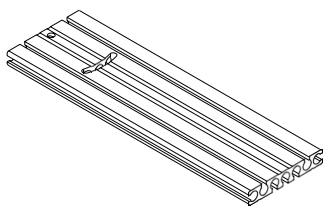
Profiilit
2 kpl

Istuinosa

Istuinosan säätäminen

Istuinsyvyys, alaraajojen pituusero ja mahdollinen alaraajojen loitonnuks/lähennys ovat helposti säädettävissä. Aloita poistamalla istuinverhoilu ja istuinlevy (A) päästäksesi kunnolla käsiksi säätöruuveihin (B).





Jalkaosien säätäminen ei edellytä ruuvien avaamista kokonaan, niiden avaaminen hieman riittää.

Istuinleveyden säätäminen

Istuimen leveyden lisääminen tai kaventaminen edellyttää jalkaosan paikan muuttamista pohjaprofiilissa. Aloita poistamalla päätysuojus pohjaprofiilin etupuolelta ja avaa sitten jalkaosassa olevaa ruuvia (B) kuusiokoloavaimella. Kun ruuvia (B) on hieman avattu, vedä jalkaosaa kokonaan ulos pohjaprofiilista ja siirrä se haluttuun uraan.

Suurin istuinleveys saadaan aikaan asettamalla vastamutteri uraan 3, kapein asettamalla vastamutteri uraan 1. Tehdasasetuksena jalkaosaa on asennettu uraan 1.

Säädön tultua suoritetuksi kiristetään ruuvi (B). Jalkaosan takaruuvia (C) saatetaan joskus joutua avaamaan hieman.

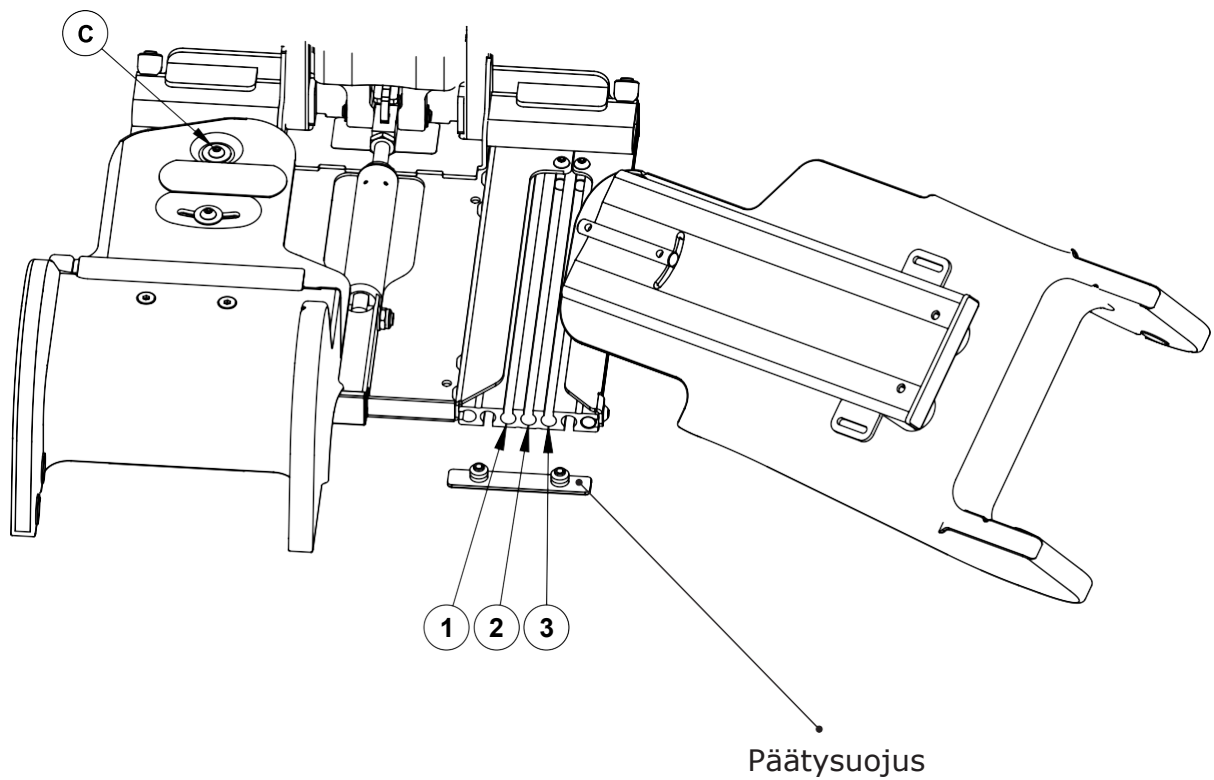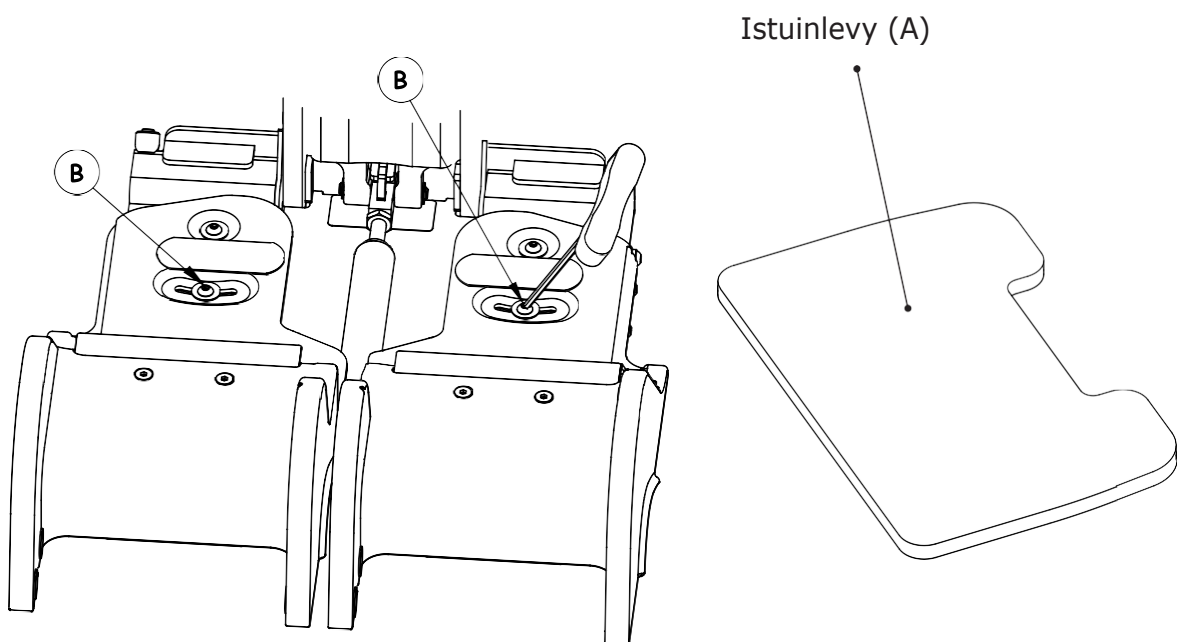

Säätäminen alaraajojen pituuseron mukaisesti

Löysää ruuvia (B) jalkaosassa kuusiokoloavaimella ja säädä jalkaosa halutulle pituudelle. Kiristä ruuvi (B) sen jälkeen uudelleen.

Istuinkaukalon säätäminen

Istuimen syvyyden säätämisen jälkeen on myös istuinkaukaloa säädettävä. Avaa jalkaosan takaruuveja (C) kuusiokoloavaimella ja vedä syvyydensäätölevy haluttuun kohtaan. Kiristä sitten ruuvit (C).




Hyvänä lähtökohtana istuimen syvyyssäädölle toimii istuinalustan ja syvyydensäätölevyn väriasteikko. Jos istuin säädetään esim. 43 cm:n syvyydelle (harmaa tausta), tulee myös syvyydensäätölevy vetää harmaalle alueelle. Tällä varmistetaan mahdollisimman oikea istuinkaukalon koko ja sen myötä istuma-asento. Asetukset tulee aina hienosäätää käyttäjän vaatimukseen sopiviksi.

Loitonnuks, lähennys ja virheasennot

Jalkaosan säätämiseksi virheasentojen korjaamiseksi avataan ruuvia (B) kuusiokoloavaimella, ja jalkaosa siirretään haluttuun asentoon. Kiristä ruuvi (B).



Säätämistä varten ruuveja ei koskaan tarvitse irrottaa kokonaan, niiden avaaminen hieman riittää.

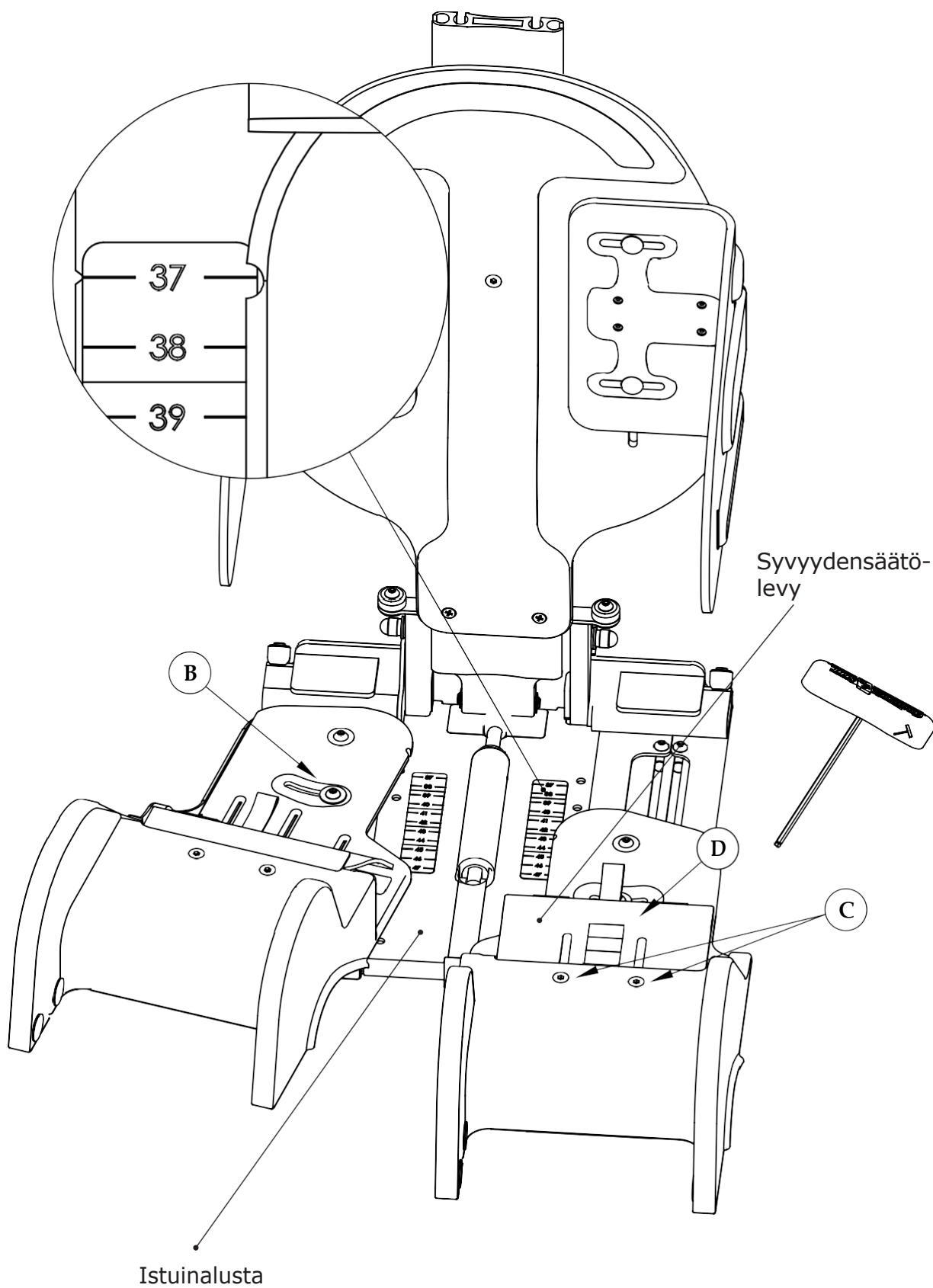

Selkänoja

Selkänojan asentaminen

Selkänojan kiinnitysosat koostuvat 4 ruuvista (A) ja kahdesta vastamutterista. Kohdista ja liu'uta selkänoja profiili selkänojan aktivointikotelossa oleville vastamuttereille. Kiristä sitten neljä ruuvia (A) kuusiokoloavaimella. Selkänoja asettuu automaattisesti oikealle korkeudelle selkänojassa olevien valmiiksi asennettujen pysäyttimien ansiosta.

Selkänojan korkeuden säätäminen

Selkänojan korkeuden säätämiseksi avataan kuusiokoloavaimella ruuveja (B) selkänoja profiilin kummallakin puolella, ja säädetään korkeus. Säädön tultua suoritetuksi ruuvit (B) kiristetään uudelleen. Avaa nuppia (E).

Selkänojan kulman säätäminen

Käännä aktivointivipu (C) aktiiviasentoon sitä nostamalla ja sitten painamalla se kannan päälle. Selkänojan kulman säätämiseksi kieleke painetaan alas. Kaasujousi aktivoi nyt selkänojan siten, että se voidaan siirtää haluttuun asentoon. Tämän jälkeen kulma lukitaan aktivointivipu vapauttamalla.



Kaasujousta aktivoitaessa tulee aina muistaa tukea selkänojaa.

Sivutuen säätäminen

Sivutuen leveyden ja korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppia (D) ja suoritetaan säätö halutulle leveydelle ja korkeudelle. Tämän jälkeen sorminuppi (D) kiristetään.

Lannetuen säätäminen


Avaa nuppia (E) ja paina selkänojaverhoilun alla olevaa lannetuen yläosaa, kunnes se on halutulla syvyydellä alaselkään nähden. Pitele lannetukea paikallaan ja kiristä nuppi (E).



Lannetuen saamiseksi haluttuun kohtaan saattaa olla tarpeen säätää selkänojan korkeutta.



Poista selkänojan verhoilu saadaksesi lannetuen näkyviin paremmin.

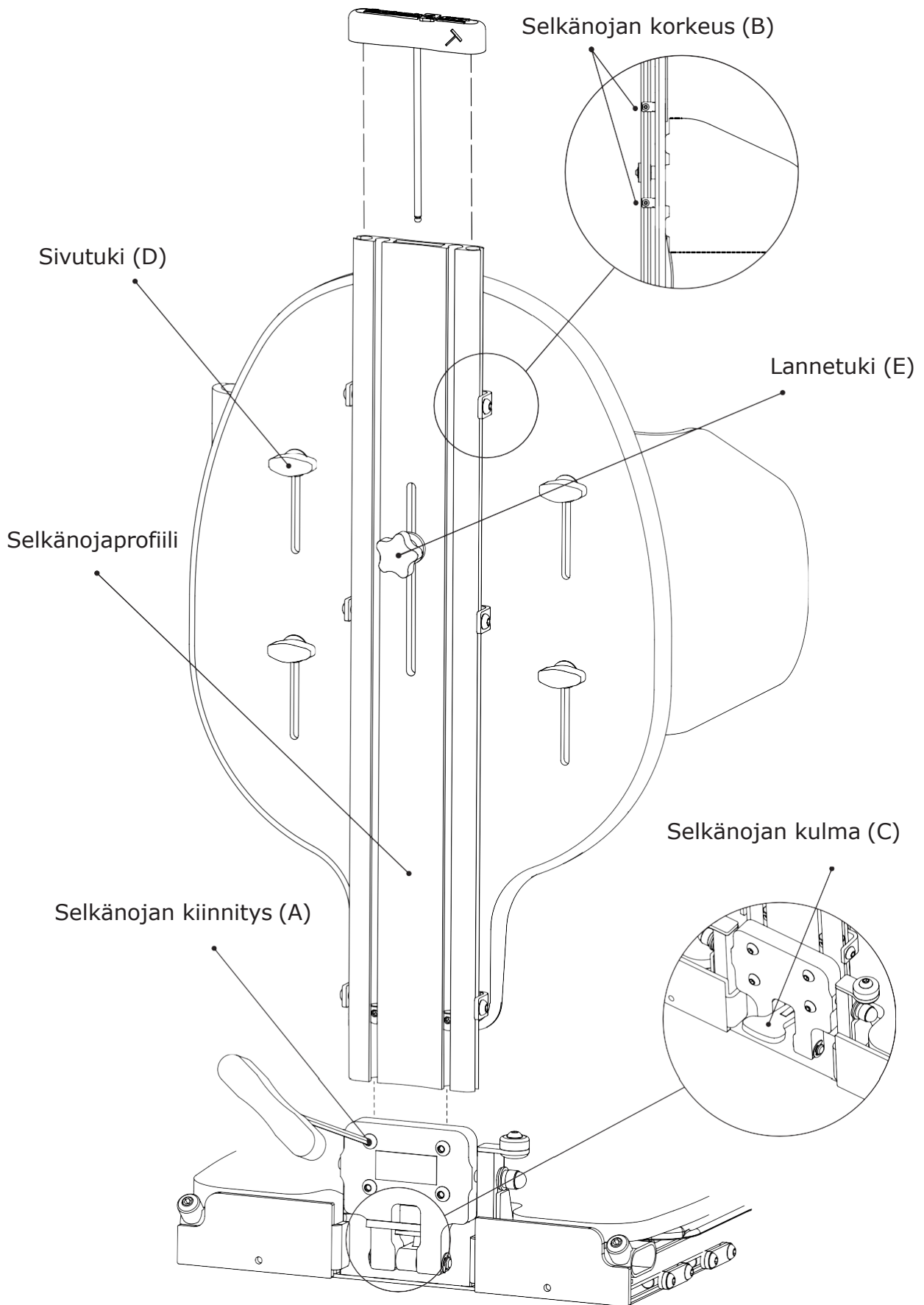

Sivutuki

Sivutuen asentaminen


Sivutuki asennetaan kiinnityspultilla (A), aluslevyllä (B) ja sorminupila (C). Kiinnityspultti (A) pannaan sivutuen (D) ja selkänojalevyssä (E) olevan hahlon läpi. Sitten pultti kiinnitetään aluslevyllä (B) ja sorminupilla (C) selkänojalevyn (E) takaa.

Valinnainen sivutuki

Kiinteän sivutuen vaihtoehtona voidaan käyttää taitettavaa sivutukea tai vahvistettua sivutukea. Myös ne asennetaan yllä kuvatulla tavalla.

Taitettava sivutuki



Taitettava sivutuki avataan punaista painiketta painamalla.

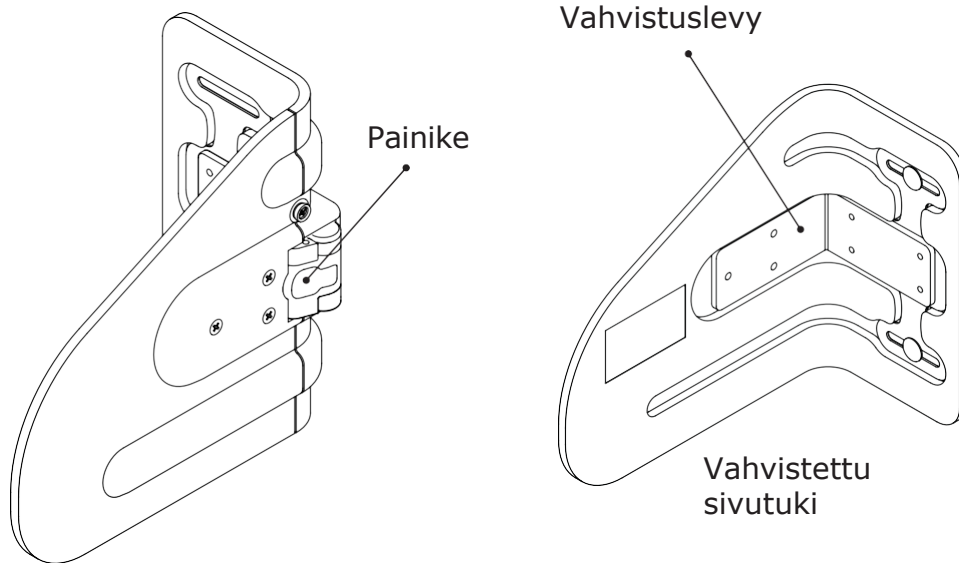

Sivutuen sulkeminen

Taitettava sivutuki avataan punaista painiketta painamalla. Syvyyden säätämiseksi avataan neljää sivulla olevaa ruuvia.



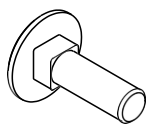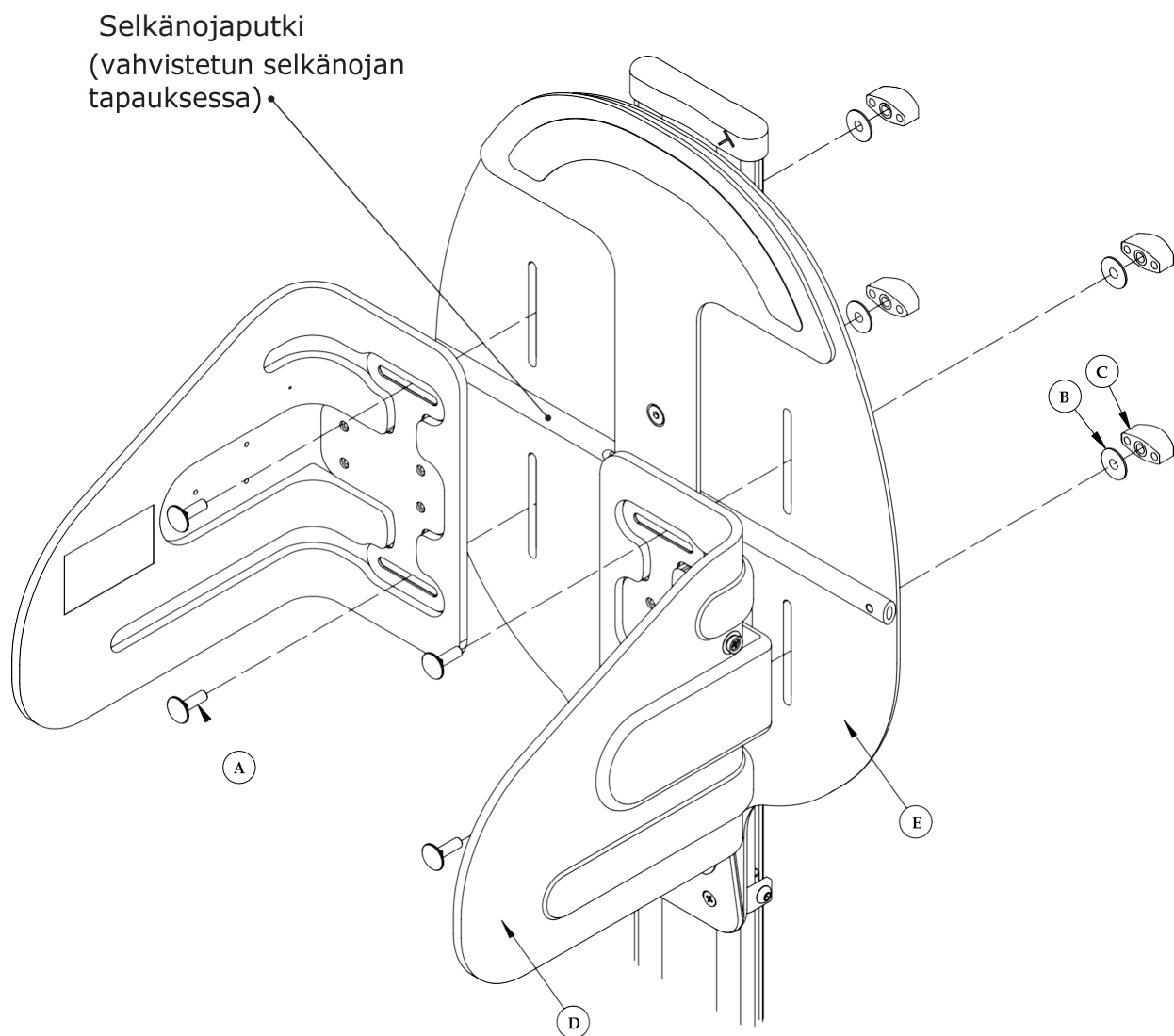

Kiinnityspultti
(A)
4 kpl



Aluslevy
(B)
4 kpl



Sorminuppi (C)
4 kpl

Lantiotuki

Lantiotuen asentaminen


Ennen lantiotuen kiinnittämistä on suojus (A) poistettava. Irrota ruuvi (B) ja sitten suojus.

Asenna lantiotuki suojuksen (A) tilalle ja kiinnitä ruuvilla (B).

Lantiotuen säätäminen

Lantiotuen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (B), (C) tai (D) riippuen säädöistä, joita halutaan tehdä. Lantiotuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (E) ja siirretään levy haluttuun kohtaan.

Kiristä ruuvit (E) uudelleen.

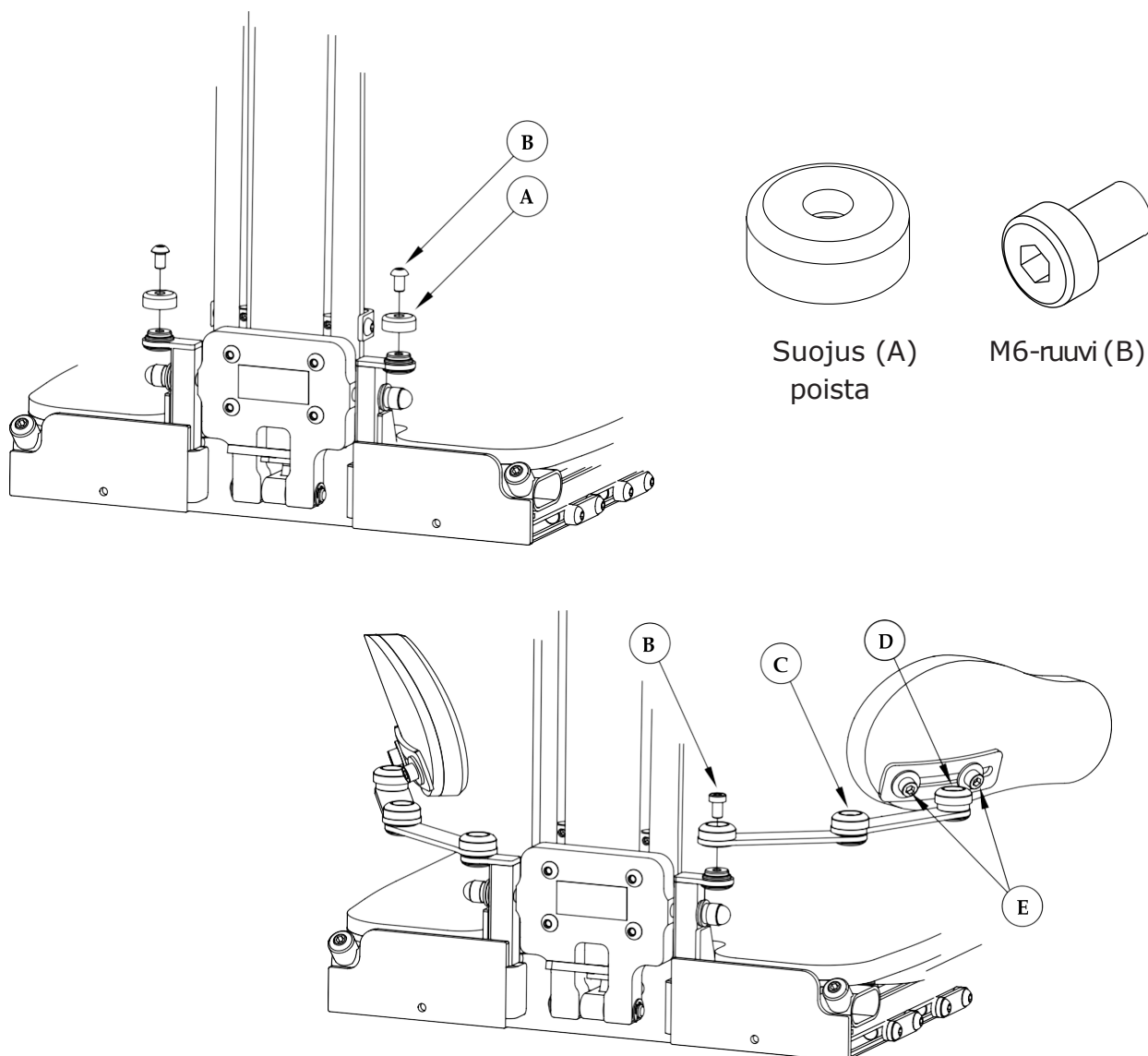


Lonkkatuki

Lonkkatukien asentaminen

Avaa kahta ruuvia, jotka kiinnittävät jalkaosan pohjaan. Asenna sitten lonkkatuki (kahdella irrotetulla ruuvilla) jalkaosan ja pohjan väliin kuvassa esitetyllä tavalla (kahden Sharkylle tarkoitetun mustan profiilin väliin) siten, että lonkkatuki lepää pohjaa vasten.

Valitse, mitä hahloja lonkkatuessa tullaan käyttämään riippuen siitä, miten pitkällä etu/takasuunnassa lonkkatuen halutaan olevan. Sitten lonkkatuki säädetään sivusuunnassa ennen ruuvien kiristämistä tiukalle.

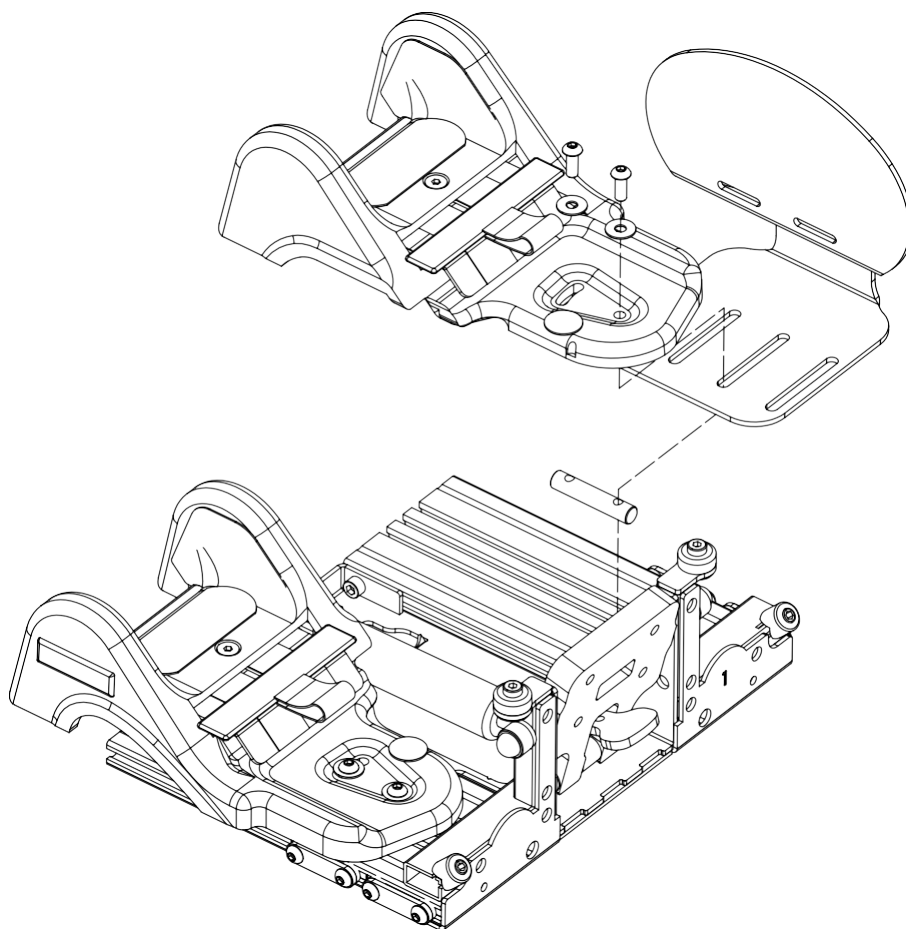

Päätuki

Päätuen kannattimen asentaminen

Ennen kuin päätuen kannatin voidaan asentaa, on ensin poistettava kuusiokoloavain ja muut jo asennetut osat.

Liu'uta päätuen kannattimen vastamutterit (A) selkänojaprofiilin kiskoihin. Kun haluttu asema on saavutettu, kiristetään neljä ruuvia (B).

Päätuen asentaminen

Liu'uta päätuen neliöputki päätuen kannattimeen (C) ja kiristä vipukahva (D), kun haluttu asema on saavutettu.

Päätuen kannattimen korkeussäätö

Avaa ruuveja (B) ja siirrä päätuen kannatin haluttuun asemaan. Kiristä sitten ruuvit (B).

Päätuen säätäminen


Kolminivelisen päätuen säätämiseksi avataan ruuvia (E) siinä nivelessä, jota halutaan säätää. Kun haluttu asento on saavutettu, ruuvi (E) kiristetään uudelleen.

Päätuen korkeuden säätämiseksi vipukahvaa (D) avataan ja päätuki siirretään halutulle korkeudelle. Sitten vipukahva (D) kiristetään.

Päätuen otsapannan kannattimen asentaminen

Ennen päätuen otsapannan kannattimen asentamista on päätuen tukilevy (H) poistettava. Tukilevyn poistamiseksi avataan kahta ruuvia (I).

Päätuen otsapannan kannatin sovitetaan reikiin (F) mukana toimitetuilla asennusosilla. Kannattimen asentamiseen on olemassa erilliset ohjeet.

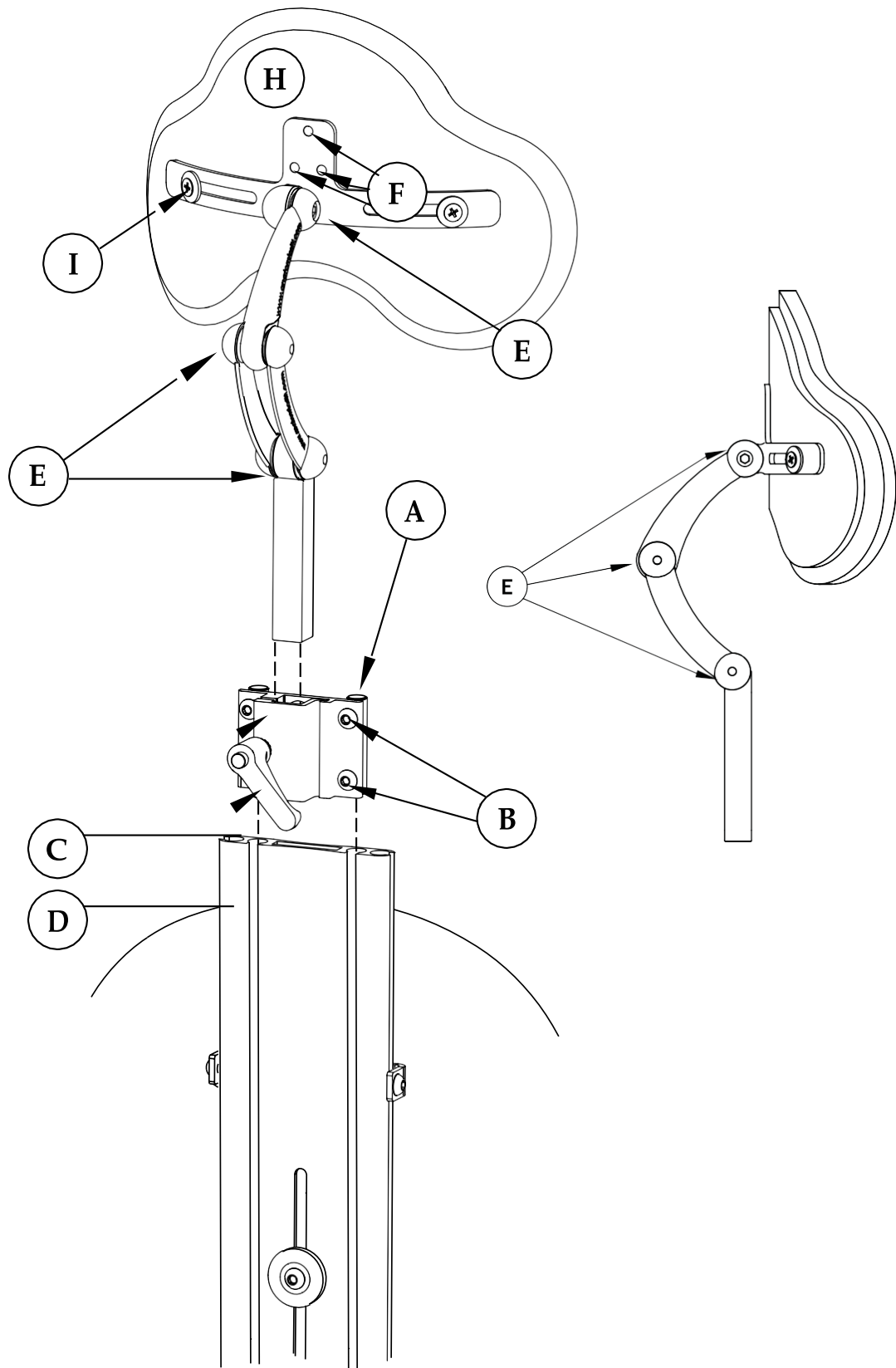

Asentotukivyöt

Yläkannattimen asentaminen

Poista kuusiokoloavain ja liu'uta yläkannattimen (D) vastamutterit (A) selkänojaprofiiliin kiskoon. Kun kannatin on halutulla korkeudella, kiristä ruuvit (B). Pane kuusiokoloavain takaisin profiiliin.

Yläkannattimen säätäminen

Korkeuden ja kulman säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja kannatin siirretään haluttuun asentoon. Sitten ruuvit (B) kiristetään.

Alakannattimen asentaminen

Ennen alakannattimen (C) asentamista on kuusiokoloavain ja mahdolliset muut jo asennetut osat ensin poistettava. Näihin osiin voivat kuulua päätuki, yläkannattimet ja työntökahva.


Liu'uta alakannattimen vastamutterit selkänojaprofiiliin kiskoihin. Kun kannatin on halutulla korkeudella, kiristä ruuvit (B). Asenna aiemmin irrotetut osat takaisin paikoilleen.


Alakannattimen säätäminen

Korkeuden ja kulman säätämiseksi avataan ruuveja (B) hieman ja kannatin siirretään haluttuun asentoon. Sitten ruuvit (B) kiristetään.

Valinnaisten alakannattimien asentaminen

Vöiden asentamiseksi alemmas voidaan käyttää valinnaista asennuskannatinta (F). Se asennetaan mukana toimitetulla ruuvilla istuinalustan valmiisiin reikiin.

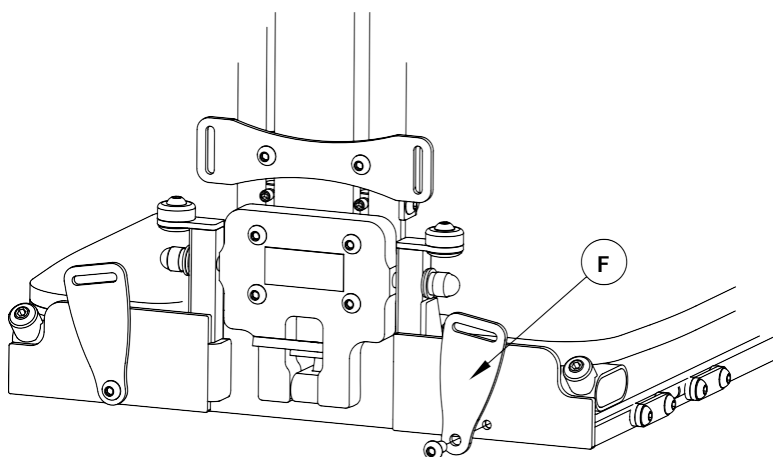

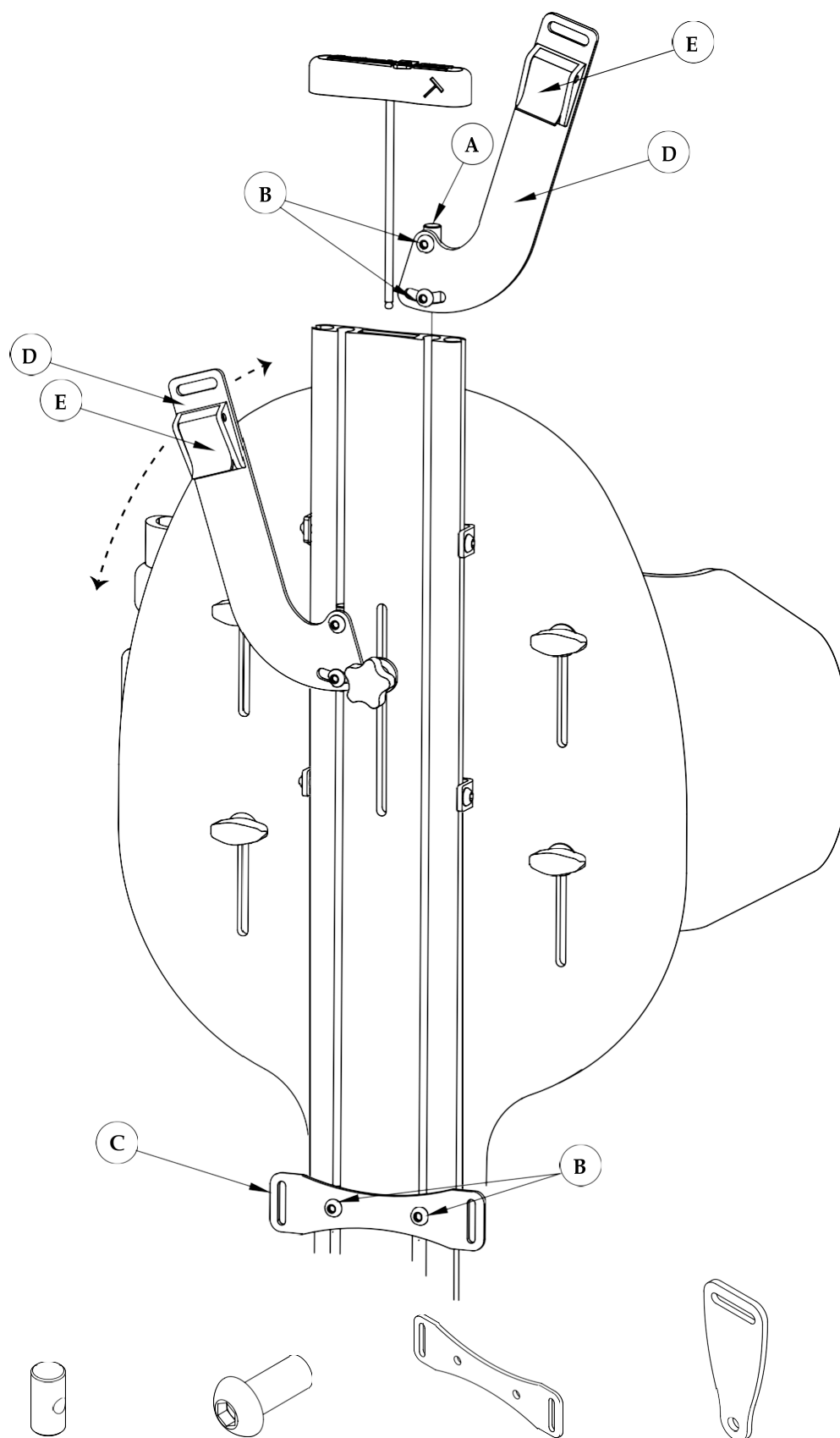

Vastamutteri
(A)
4 kpl

M6 ruuvi (B)
6 kpl

Alakannatin (C)
Sis. perustoim.

Alakannatin (F)
Lisävar. 2 kpl



Lantiovyö

Lantiovyön säätäminen

Lantiovyön kannattimen kiinnityskohdan säätämiseksi avataan kiinnitysruuveja (A) hieman ja säädetään haluttu kohta. Sitten ruuvit (A) kiristetään.

Lantiovyön asentaminen

Lantiovyön kiinnittämiseen käytetään kolmoisliukusolkea (Tri-glide).
Tri-glide -menetelmän mukainen kiinnitys esitetään kuvassa.

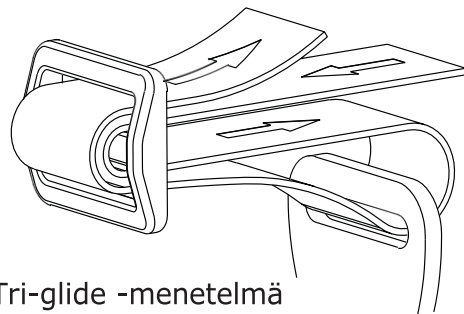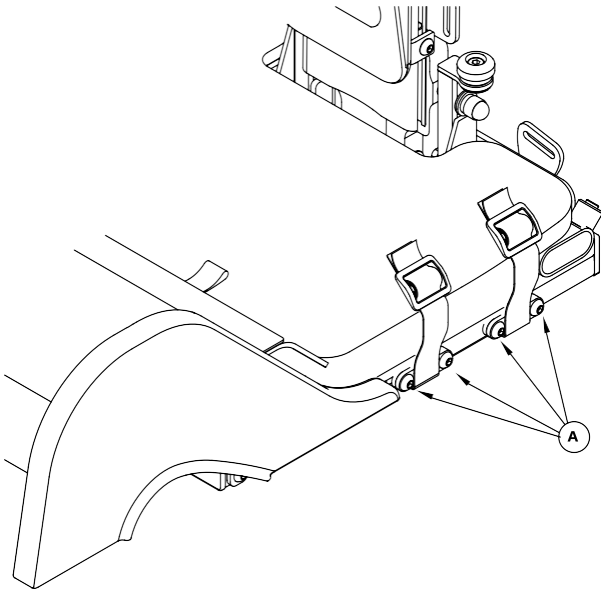

Tri-glide -menetelmä





Varmista, ettei vyö jää
kiinnikkeiden väliin puristuksiin.

Nilkkamansetti

Jalkalaudassa on asennusvalmius nilkkamansetille.

Säädettävän jalkatuen yhteydessä nilkkamansetti asennetaan jalkatuen alle.

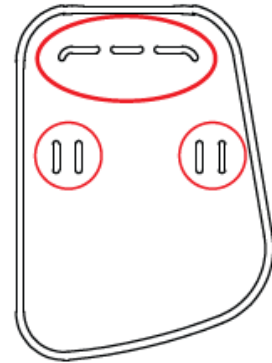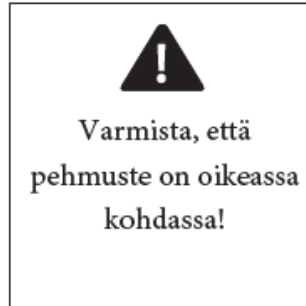

Istuimeen kiinnitettävät käsinojat

Käsinojien asentaminen

Työnnä käsinojat niille varattuihin istuinpohjassa oleviin putkiin. Kun käsinoja on halutussa asemassa, kiristetään ruuvi (A).

Leveyden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten ruuvi (A) kiristetään.

Korkeuden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (B) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten vipu (B) kiristetään.

Pystykulman säätäminen

Käsinojan kulman säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten vipu (C) kiristetään.


Sivuttaiskulman säätäminen

Käsinojan sivuttaiskulman säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten ruuvi (D) kiristetään.

Koverien käsinojien asentaminen

Käsinojat asennetaan kuvan mukaisesti korkeat sivut ulospäin, poispäin kehosta.



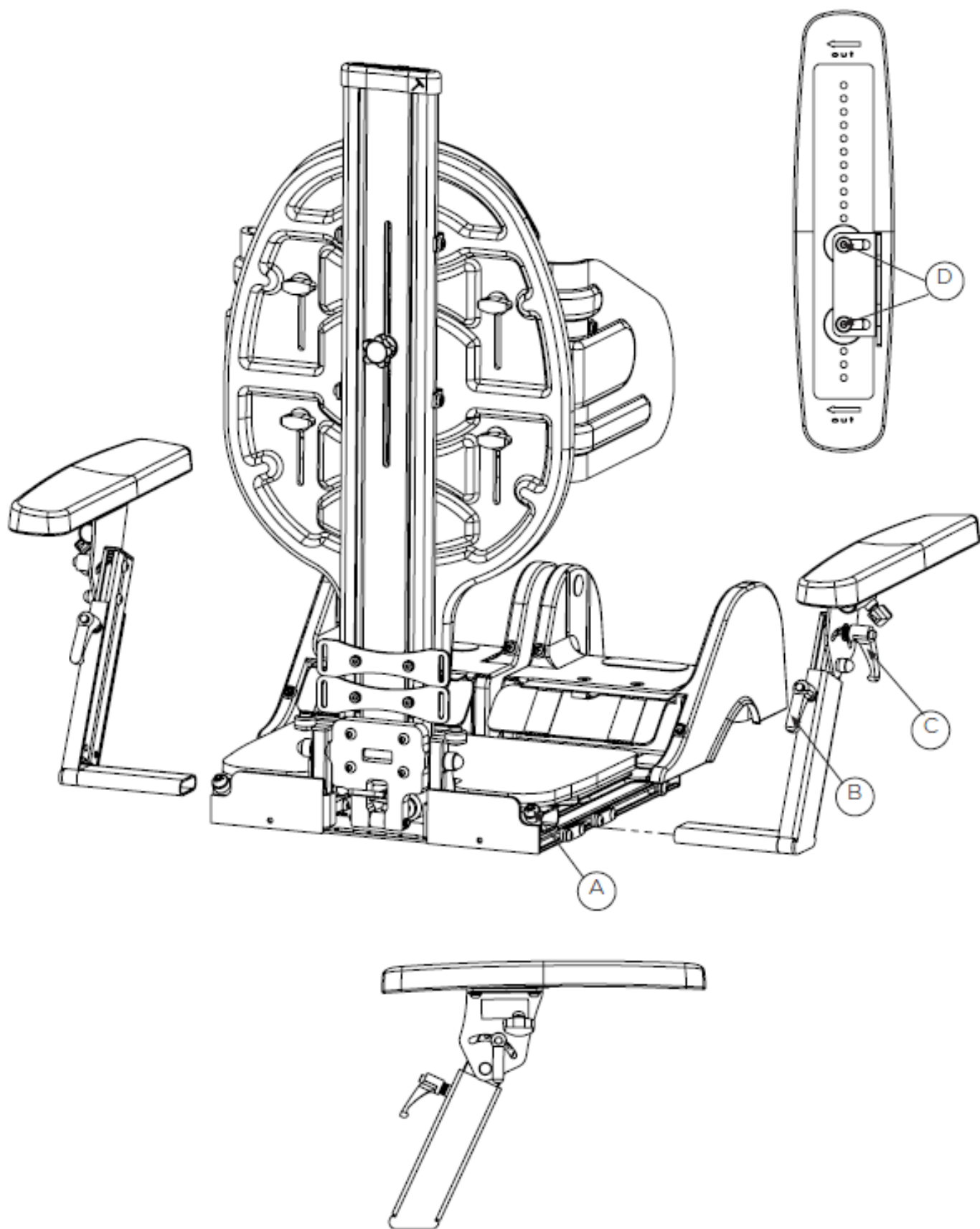

Selkänojaan kiinnitettävät kiinteät käsinojat

Kiinteiden käsinojien asentaminen

Ennen selkänojaan kiinnitettävien käsinojien asentamista on kuusiokoloavain ja mahdolliset muut jo asennetut osat ensin poistettava. Näihin osiin voivat kuulua päätuki, yläkannattimet ja työntökahva.

Liu'uta käsinojan kannattimen vastamutterit selkänojaan profiiliin kiskoihin. Kun kannatin on halutulla korkeudella, kiristä ruuvit (A). Asenna aiemmin irrotetut osat takaisin paikoilleen.

Korkeuden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (B) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten vipu (B) kiristetään.

Leveyden säätäminen


Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten ruuvi (A) kiristetään.

Pystykulman säätäminen

Käsinojan kulman säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten vipu (C) kiristetään.

Sivuttaiskulman säätäminen

Käsinojan sivuttaiskulman säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten ruuvi (D) kiristetään.

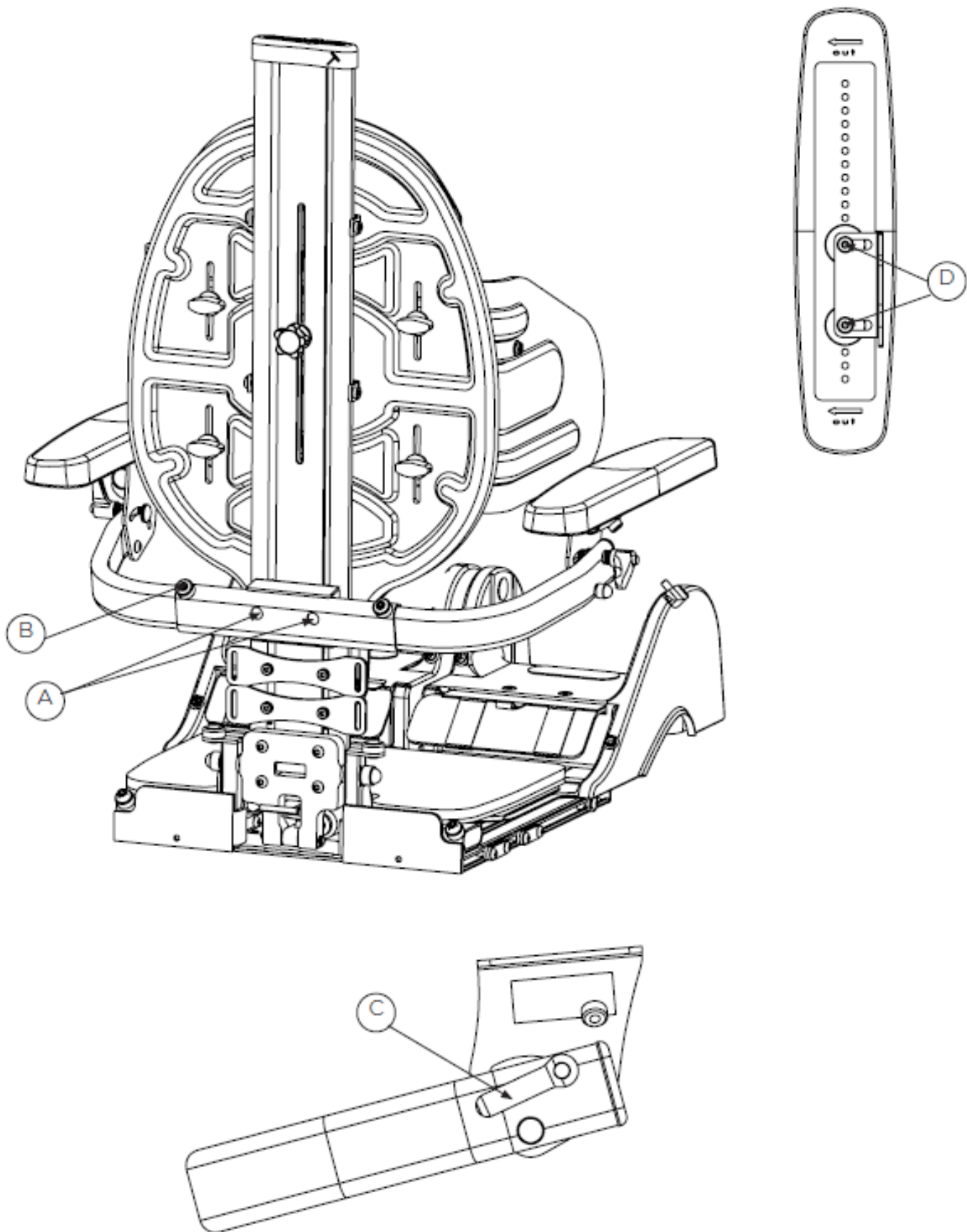

Selkänojaan kiinnitettävät taitettavat käsinojat

Taitettavien käsinojien asentaminen

Ennen selkänojaan kiinnitettävien käsinojien asentamista on kuusiokoloavain ja mahdolliset muut jo asennetut osat ensin poistettava. Näihin osiin voivat kuulua päätuki, yläkannattimet ja työntökahva.

Liu'uta käsinojan kannattimen vastamutterit selkänojaprofiilin kiskoihin. Kun kannatin on halutulla korkeudella, kiristä ruuvit (A). Asenna aiemmin irrotetut osat takaisin paikoilleen.

Korkeuden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (B) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten vipu (B) kiristetään.

Leveyden säätäminen

Käsinojan säätämiseksi leveyssuunnassa avataan ruuvia (A) ja käsinoja siirretään haluttuun kohtaan, sitten ruuvi (A) kiristetään.

Pystykulman säätäminen


Käsinojan kulman säätämiseksi korkeussuunnassa avataan vipua (C) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten vipu (C) kiristetään.

Sivuttaiskulman säätäminen

Käsinojan sivuttaiskulman säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja käsinoja siirretään haluttuun kulmaan, sitten ruuvi (D) kiristetään.

Taittäminen

Käsinojan taittamiseksi sivuun lukitusosaa (E) vedetään alas ja käsinoja taitetaan sivuun. Varmista, että käsinoja takaisin taitettaessa kuuluu loksahdusääni. Kulman säätäminen on mahdollista lukitusosan kolmiasentoisen säädön avulla.

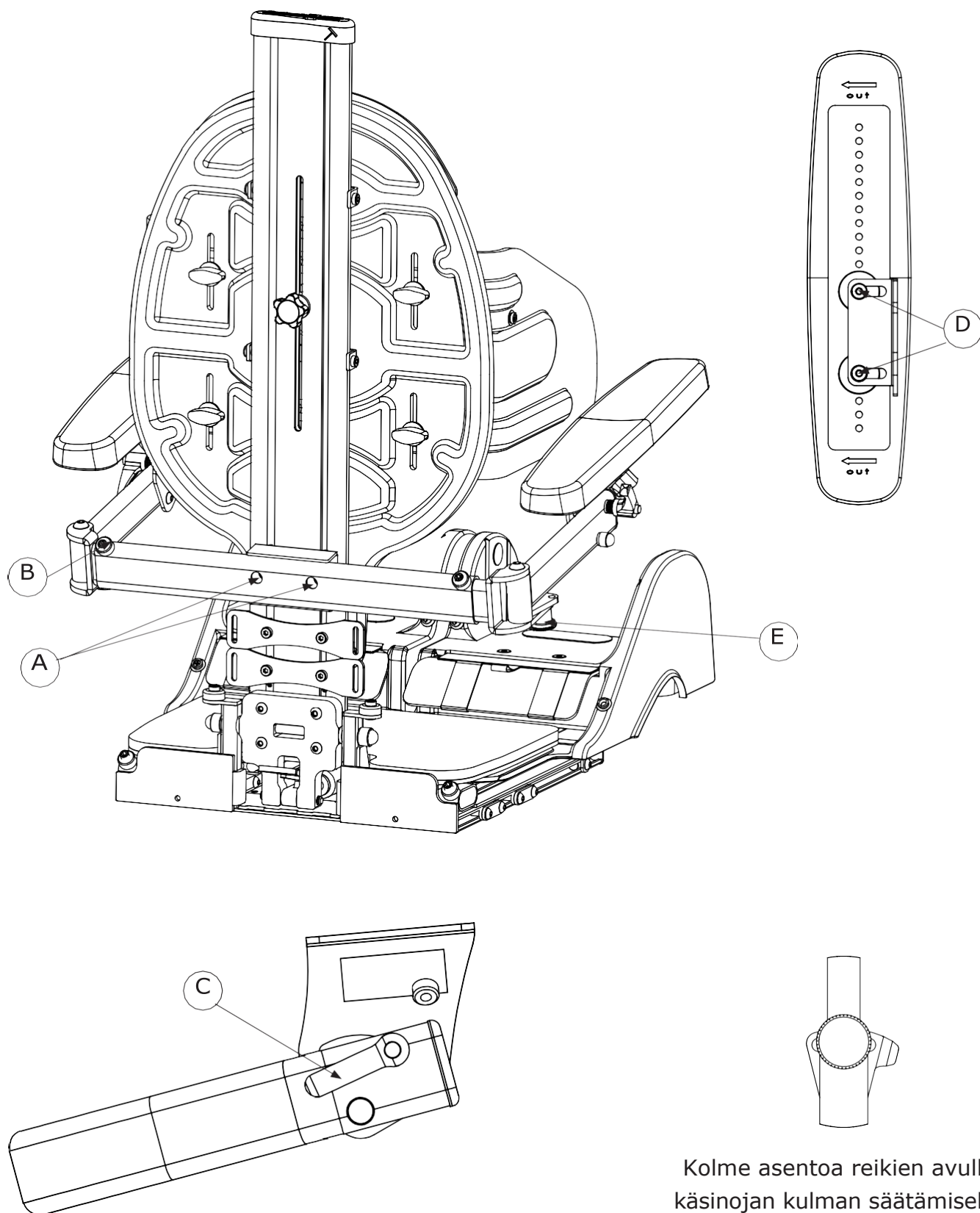

Olkavarren tuki

Olkavarren tuen asentaminen

Kiinnitä olkavarren tuki sorminuppien (A), aluslevyjen (B), välikkeiden (D) ja pulttien (E) avulla. Huomioi, että kiinnityspultit on vaihdettava pidempiin mukana toimitettuihin pultteihin. Työnnä kiinnityspultti (E) sivutuen ja selkävyn hahlon läpi. Kiinnitä sitten välikkeiden (D), olkavarren tuen kannattimen (C), aluslevyjen (B) ja sorminuppien (A) avulla selkänojan vastakkaiselle puolelle.

Korkeuden säätäminen


Korkeuden säätämiseksi avataan sorminuppeja (A) ja suoritetaan säätö halutulle korkeudelle. Säädön tultua suoritetuksi sorminupit (A) kiristetään.

Leveyden säätäminen

Olkavarren tuen leveyden säätämiseksi avataan ruuveja (F) ja säädä halutulle leveydelle. Säädön tultua suoritetuksi ruuvit kiristetään.

Tyynyn suojus

Kun tyynyn suojus vaatii puhdistamista, se on helposti irrotettavissa olkavarren tukilevystä suojuksen takana olevaa elastista materiaalia venyttämällä. Suojuksen asentamiseksi takaisin paikalleen se vedetään tukilevyn päälle varmistaen, että se tulee keskelle.

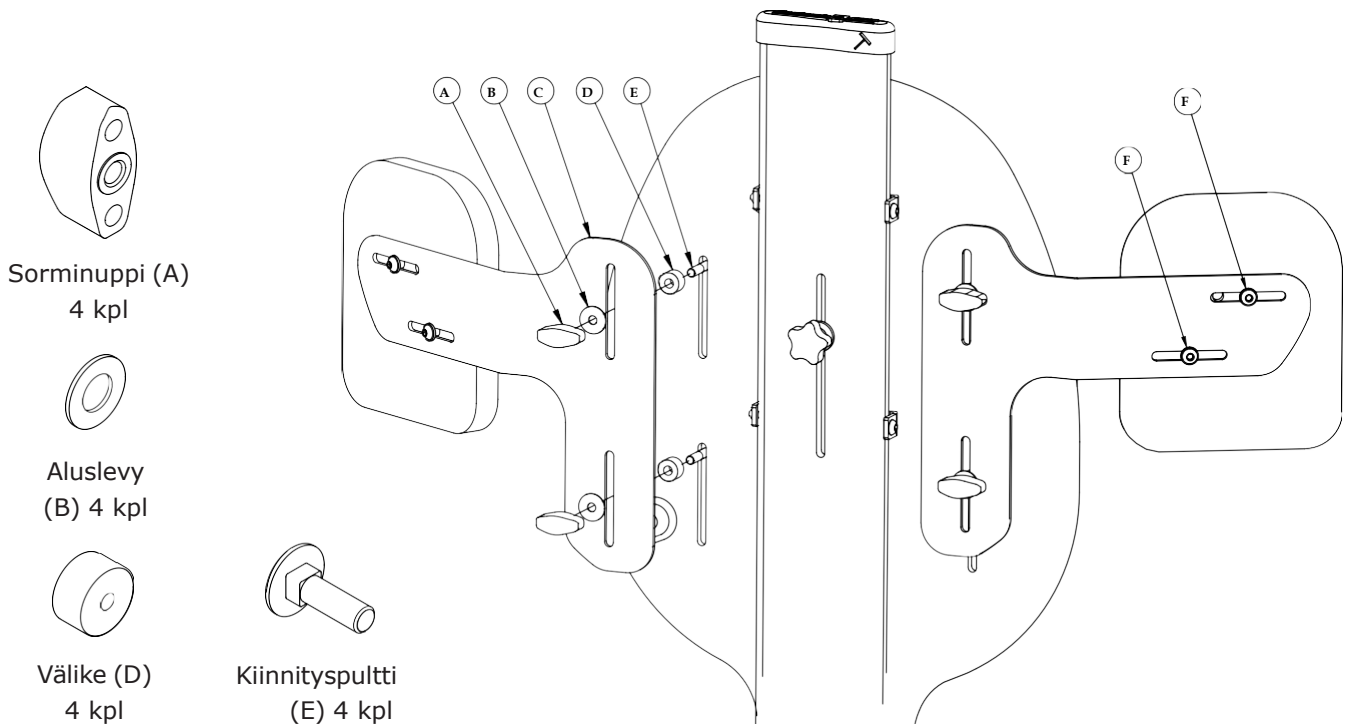


Olkavarren tukia asennettaessa on sivutuen kiinnityspultit korvattava mukana toimitetuilla pidemmillä pulteilla. Olkavarren tukea säädettäessä voidaan samanaikaisesti säätää myös sivutukea.

Työntötanko

Poikittaisen työntötangon asentaminen

Työntötanko työnnetään käsinojalevyjen alla oleviin putkiin ja kiinnitetään molemmin puolin nupilla (A). Tanko voidaan vetää ulos vasemmalta puolelta ja kääntää sivuun oikean puolen pysyessä yhä kiinni putkessa.

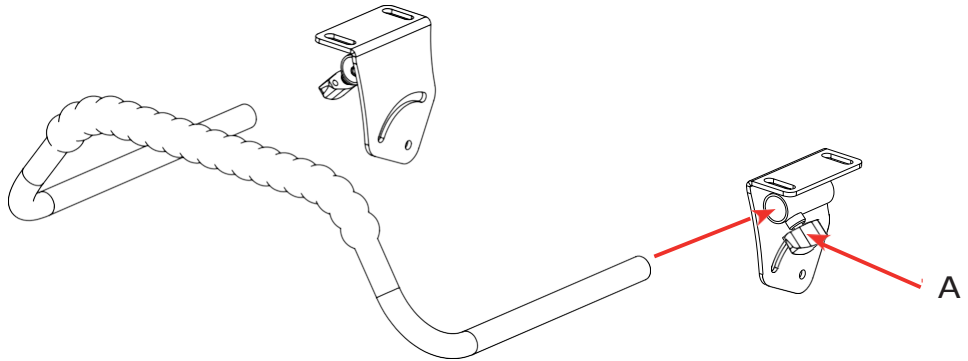

Pöytä, kiinteä

Pöydän asentaminen


Aseta pöytä käsinojalevyjen päälle ja käännä pöydän lukitusvivut käsinojanlevyjen alle. Lukitusvipua on käännettävä kunnes se on käsinojalevyn kohoreunan sisäpuolella.

Kiinnitysreikien muuttaminen

Käytettävissä on 3 kiinnitysleveyttä. Leveys säädetään vaihtamalla lukitusvivun kiinnitysreikää, joka sijaitsee käsipehmusteen alla pöydän takaosassa. Perusasetuksena lukitusvipu on kiinnitetty keskimmäiseen kiinnitysreikään. Pöydän käsipehmusteen takaosaa on nostettava ennen kiinnitysleveuden säätämistä. Takareunan reikämerkinnät osoittavat pöydän koon.




Älä nosta pöydän etureunasta.

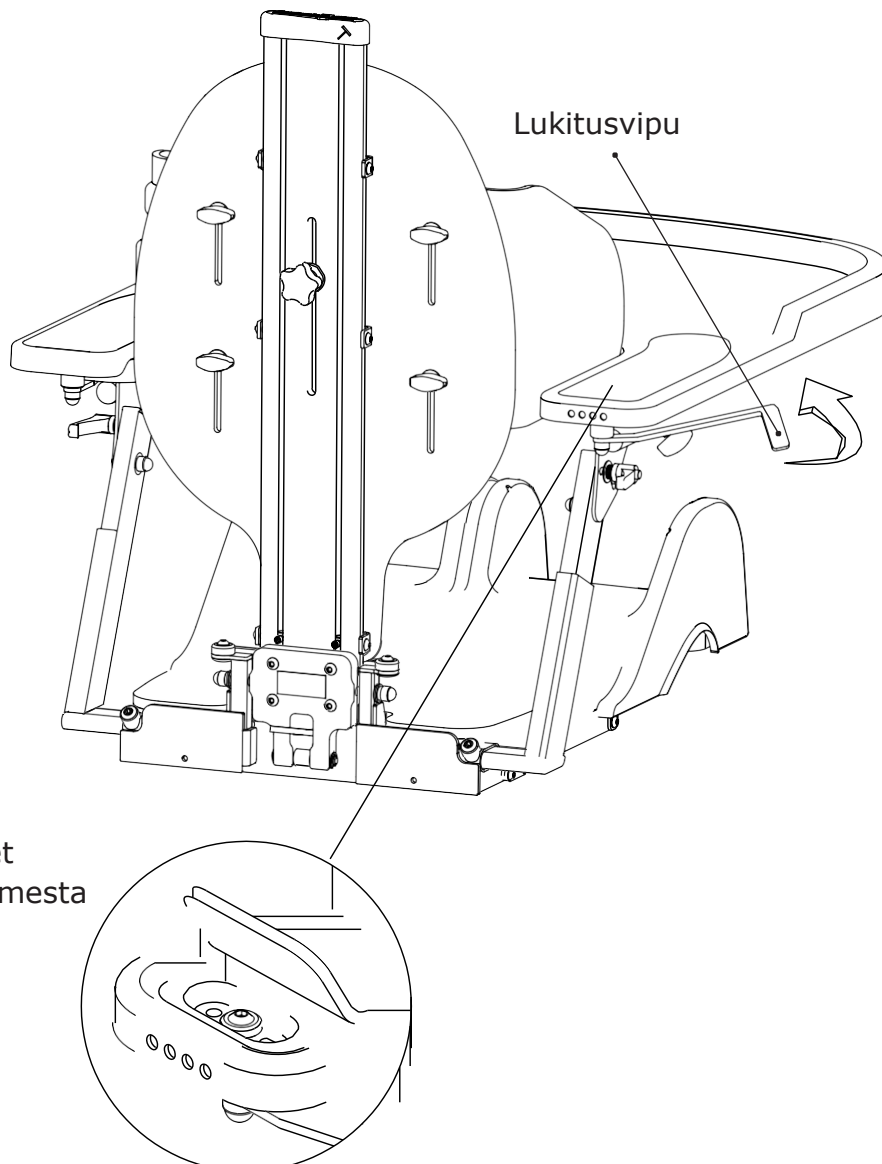

Pöytä, taitettava

Taitettavan pöydän asentaminen




Työnnä pöydän kiinnitystanko (A) putken (B) läpi. Putki (B) sijaitsee käsinojalevyn alla. Työnnä pöytä haluttuun kohtaan käsinojalevyjen päälle. Lukitse pöytä kiristämällä sorminuppi (C).

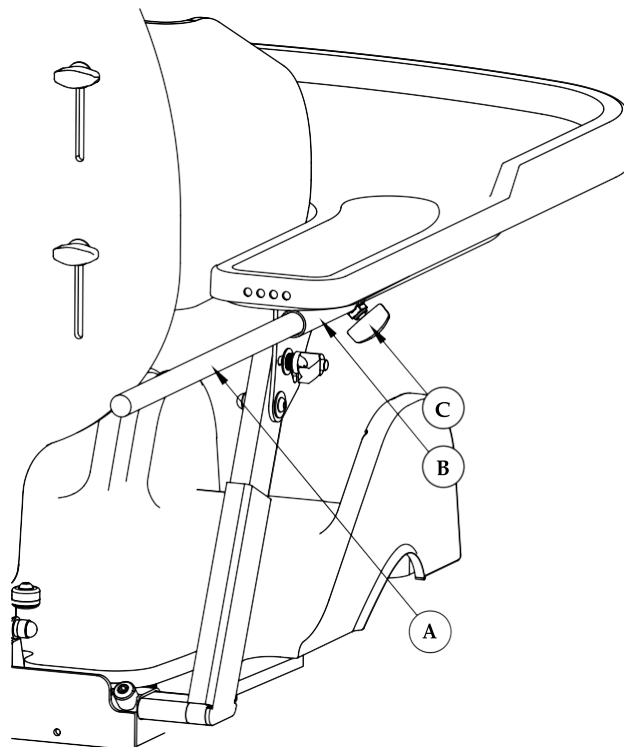

Pöydän taittaminen

Taittaaksesi pöydän sivuun löysää ensin hieman sorminuppia (C). Nosta pöytää hieman javedä eteenpäin. Nosta pöytää yhä enemmän ja taita se sivuun. Kun pöytä on alimmassa asennossaan, työnnä kiinnitystankoa takaisin päin ja kiristä sorminuppi (C).

- 1) Vedä pöytää eteenpäin
- 2) Nosta pöytää lisää ja taita se sivuun
- 3) Työnnä pöytä takaisin sen ollessa alimmassa asennossaan

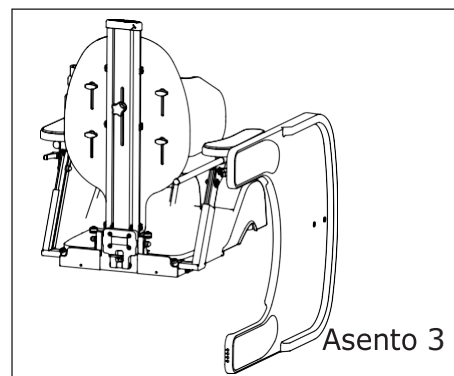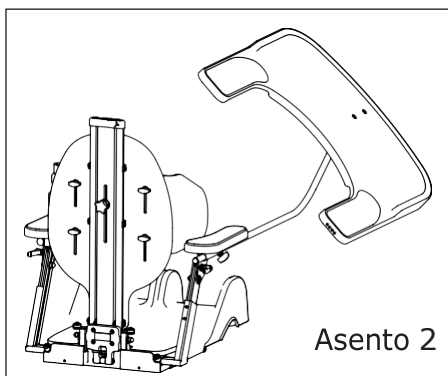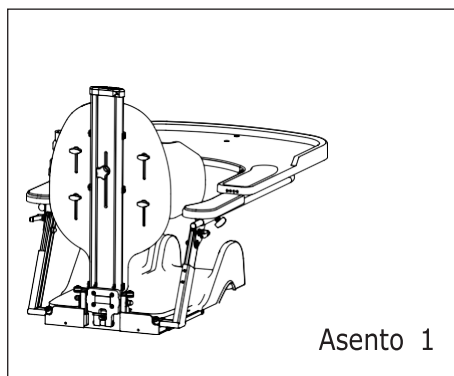

Muista kiristää sorminuppi (C) pöydän taittamisen jälkeen. Mikäli käytetään lukitusvipuja, ne on käännettävä sisään käsinojalevyn alle.



Pöytää taittaessa tulee varmistaa, että pöytää on vedetty tarpeeksi eteenpäin, jotta se ei vahingoita tuolin käyttäjää.

Pöytä vahvistetuin kannattimin

Vahvistetun pöydän asentaminen

Vahvistettu pöytä asennetaan työntämällä pöydän kiinnitysputki (A) käsinojalevyn alla olevan putken (B) läpi.

Sitten pöytä työnnetään haluttuun kohtaan ja annetaan levätä käsinojalevyjen päällä. Pöytä lukitaan paikalleen kiristämällä sorminuppi (C). Lukitusvipua on käännettävä kunnes se on käsinojalevyn kohoreunan sisäpuolella.

Leveyden säätäminen



Käsinojen leveyden säätämisen sijaan voit säätää pöydän leveyttä siten, että asennuskannattimet sopivat käsinojan kannattimissa oleviin asennusputkiin. Leveys säädetään löysäämällä hieman ruuveja (D) ja tekemällä säätö haluttuun asemaan. Kiristä ruuvit (D).



Jos pöydän leveyssäätö ei riitä, on mahdollista säätää käsinojan leveyttä.

Vahvistettu pöytä


Alapuolelta nähtynä

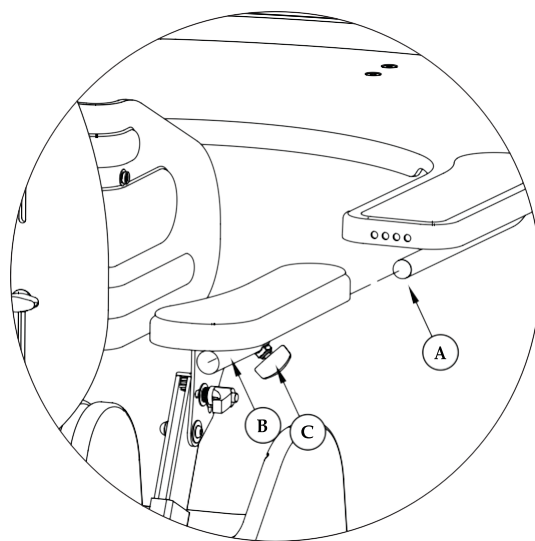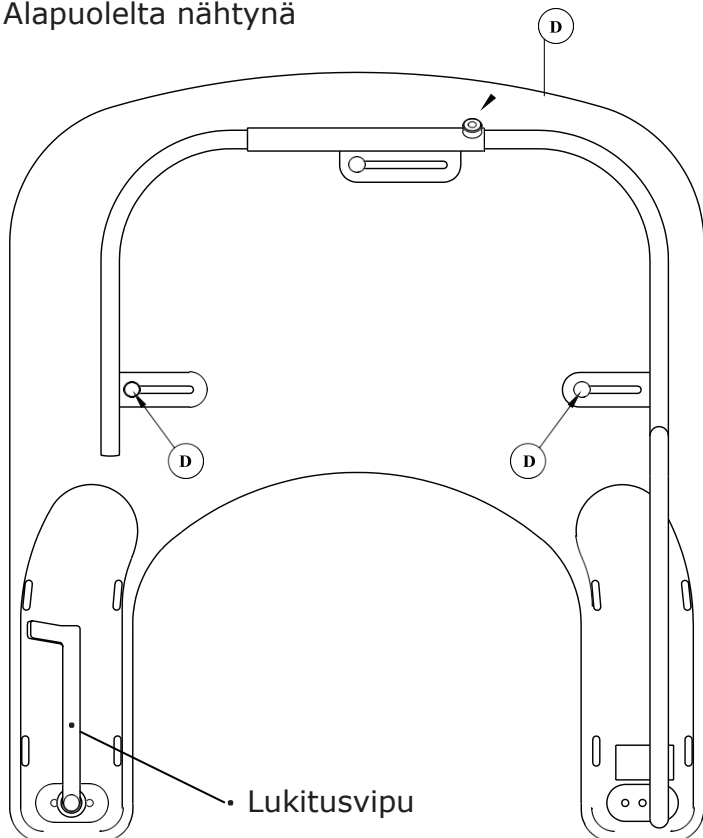

Tukipöytä

Pöydän asentaminen

Aseta pöytä käsinojalevyjen päälle ja käännä lukitusvipuja (A) kohti käsinojalevyjä (B), kunnes ne ovat käsinojalevyn kohoreunan sisäpuolella.

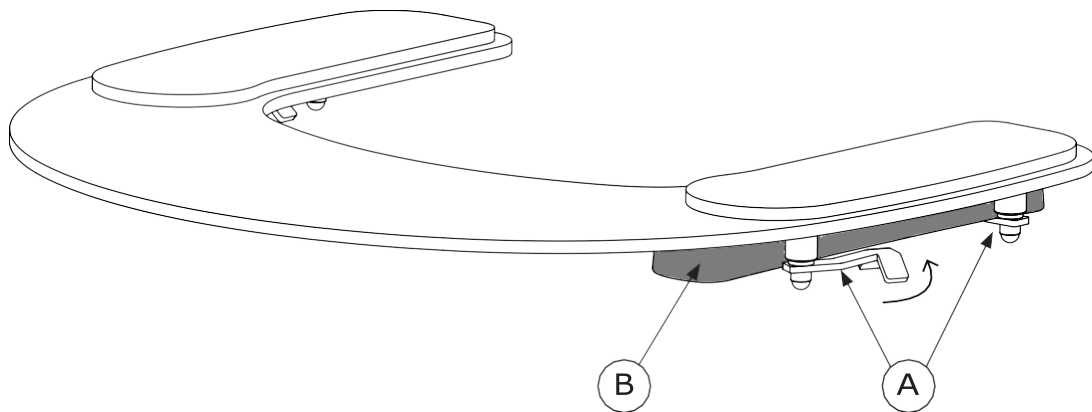

Jalkatuki

Jalkatuen asentaminen

Asentaminen tehdään samalla tavalla jalkatuen versiosta riippumatta. Poista aluksi päätysuojus (A) pohjaprofiilin (B) päästä ja lisää sitten vastamutterit (C) siten, että ne kohdistuvat pohjaprofiilin (B) reikiin. Kiinnitä sitten jalkatuki ruuveilla (D) vastamuttereihin (C) pohjaprofiilissa (B) olevien reikien läpi.



Jalkatuen asentaminen ei edellytä jalkaosan purkamista profiilista.

Turvapysäytin

Vastamutterin muodossa oleva turvapysäytin (G) on asennettu jalkatuen kannattimeen päätysuojuksen sisäpuolelle. Turvapysäytintä (G) voidaan myös käyttää ennalta määrättyyn korkeusasemaan palaamiseksi.



Jalkatuen profiiliin jalkatuen yläpuolelle voidaan asentaa toinen turvapysäytin vaihtoehtoisen korkeussäädön löytämisen helpottamiseksi (esim. kenkien kanssa/ilman kenkiä).

Kulman säätäminen polvinivelen kohdalta

Kun jalkatuki on asennettu pohjaprofiiliin, voidaan jalkatuen kulmaa säätää polvinivelen kohdalta. Avaa vipua (E) hieman, säädä jalkatuki haluttuun kulmaan ja kiristä vipu.

Kulman säätäminen nilkan kohdalta

Kun jalkatuki on asennettu pohjaprofiiliin, voidaan jalkatuen kulmaa säätää nilkan kohdalta. Avaa vipua (F) hieman, säädä jalkatuki haluttuun kulmaan ja kiristä vipu (F).

Jalkatuen korkeuden säätäminen


Korkeuden säätämiseksi avataan vipua (H) hieman ja jalkatuki säädetään halutulle korkeudelle.

Jalkatuen vaihtoehtoinen asennus


Lähemmäksi polviniveltä pääsemiseksi on tarjolla vaihtoehtoinen asennusmenetelmä, jossa jalkatuen kannatin asennetaan pohjaprofiilin (B) vastakkaiselle puolelle.



Jalkojen pituuseron tai loitonnuksen tapauksessa on käytettävä erillisiä jalkatuksia. Ks. myös kappale Isuinosa

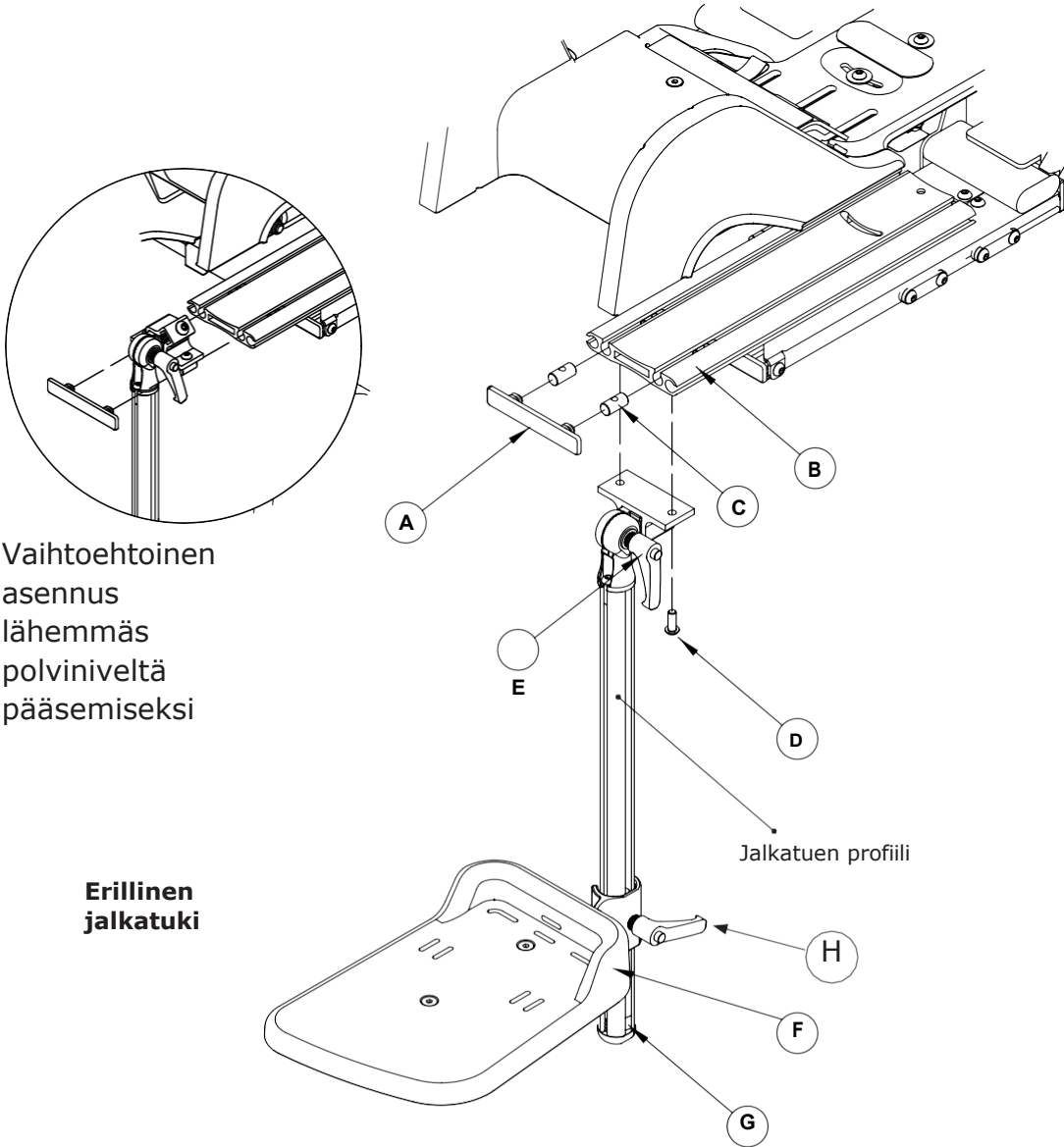

Yhtenäinen jalkatuki

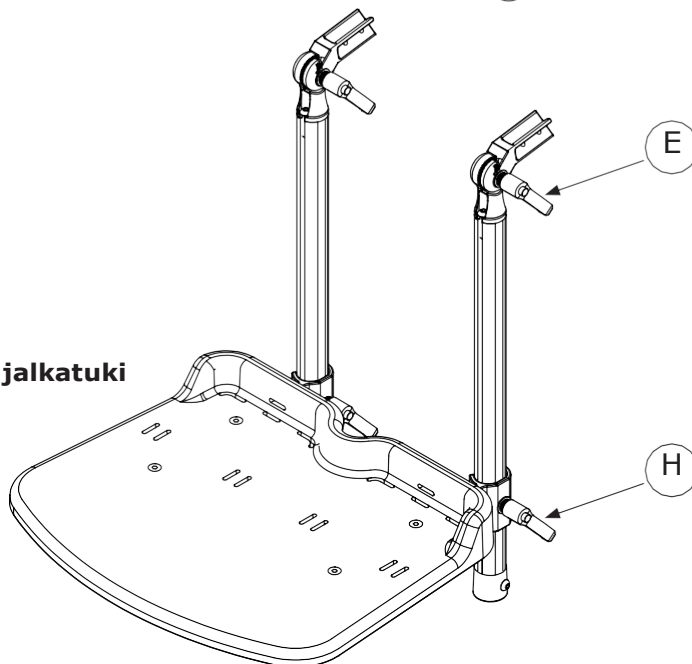

Jalkatuen kannattimet

Kiinteä jalkatuen kannatin (1)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipu (A) avataan ja säädetään haluttu korkeus, ja vipu kiristetään tiukalle (A).

Jalkatuen nivelen kulman säätämiseksi avataan ruuvia (E), ja kulma säädetään. Sitten ruuvi kiristetään.

Joustava jalkatuen kannatin (2)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi avataan ruuvia (D) ja tarvittaessa ruuvia (E), tehdään säätö halutulle korkeudelle ja kiristetään ruuvi (D). Valitse tasapainotusjousen pituus ruuvin (E) avulla ja lopuksi kiristä se.

Jousen amplitudia voidaan säätää ruuvilla (E) kiristämällä se sopivaan asemaan.



Jousen jäykkyyttä voidaan säätää jousen kotelossa (F) olevalla ruuvilla.


Ylös kääntyvä jalkatuen kannatin (3)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) avataan ja tuki säädetään haluttuun korkeuteen, sitten vipu (A) kiristetään. Jalkatuki taitetaan ylös jalkalaudan etuosasta nostamalla.

Pallonivelkannatin (4)

Jalkatuen korkeuden säätämiseksi vipua (A) avataan ja tuki säädetään haluttuun korkeuteen, sitten vipu (A) kiristetään.

Nivellystoimintoa käytetään avaamalla ruuveja (B) ja (C) ja säätämällä tuki haluttuun asentoon. Ruuvit (B) kiristetään ja asento lukitaan ruuvilla (C).

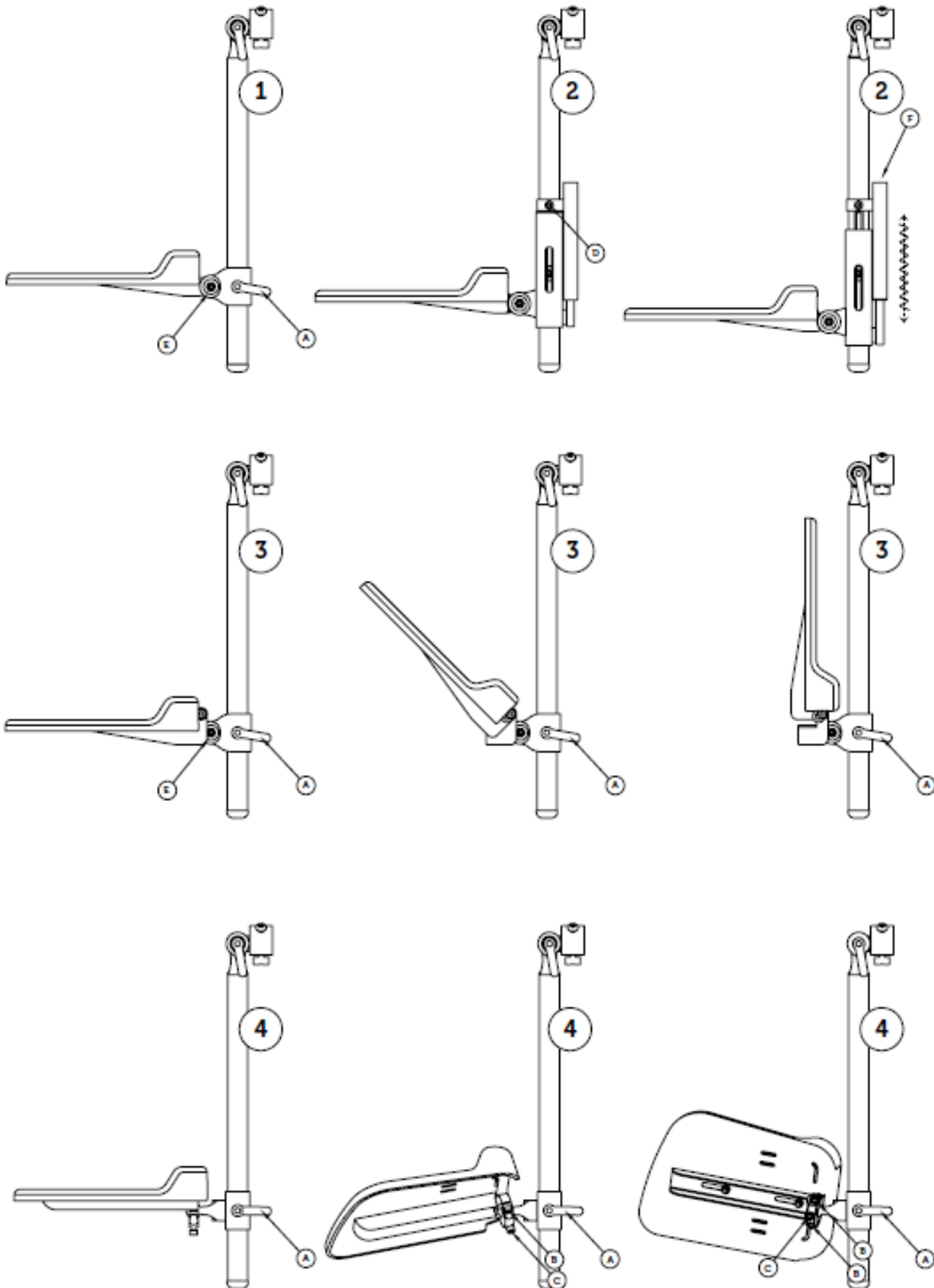

Korkealaitainen jalkatuki


Korkealaitaisen jalkatuen asentaminen jälkitilauksena

Aiempi jalkalauta korvataan uudella. Koska korkealaitainen jalkatuki on suunniteltu sekä yksi- että kaksiosaiseen kannattimeen sopivaksi, jalkatuki edellyttää vaihtoehtoisia porausreikiä aiemmasta jalkatuen tyypistä riippuen.

Jalkatuen asentamiseksi jalkatuen (B) vastamutteri (A) painetaan ensin jalkatuen kannattimeen (C). Sitten jalkatuki (D) säädetään halutulle korkeudelle ja kiristetään vipu (E).

Jalkatuen korkeus ja leveys säädetään ruuvien (F) ja (G) avulla.

Korkealaitaisen jalkatuen muovinen kannatin (H) tulee sijoittaa jalkatuen levyssä olevan hahlon (I) läpi. Lopuksi asennetaan mukana toimitettu tyyny ja tarkistetaan kaikkien ruuvien kireys.



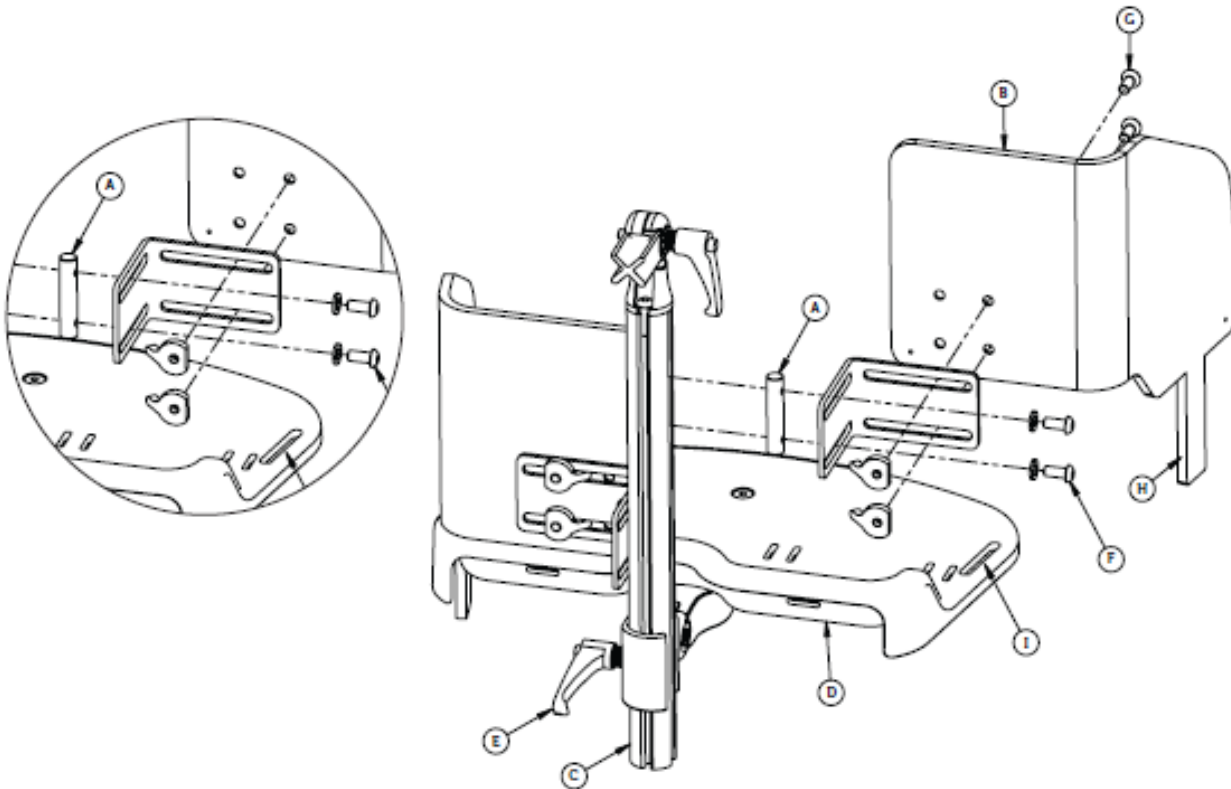


Halutun korkeuden säätämisen jälkeen muovinen kannatin (H) voidaan tarvittaessa leikata tai kuumentaa ja taittaa jalkatuen levyn alle. Porausreikien merkinnät ovat myös löydettävissä jalkalaudan alta.

Yhdestä kannattimesta kahteen ja päinvastoin

Oletusarvona korkealaitaisilla jalkatuilla kokoa 2,3 ja 4 on kaksi kannatinta ja koolla 1 on yksi kannatin.

Vaihtaminen kannatinvaihtoehtojen välillä tehdään kääntämällä kulmalevyä (A) 180 astetta ja vaihtamalla mutteritapin (B) puolta.

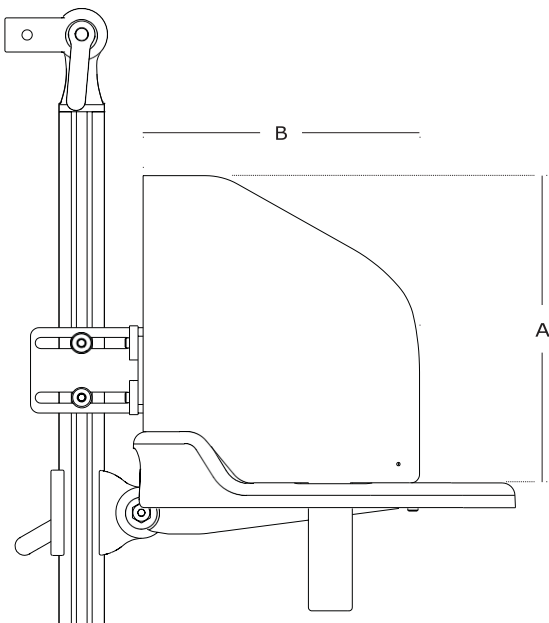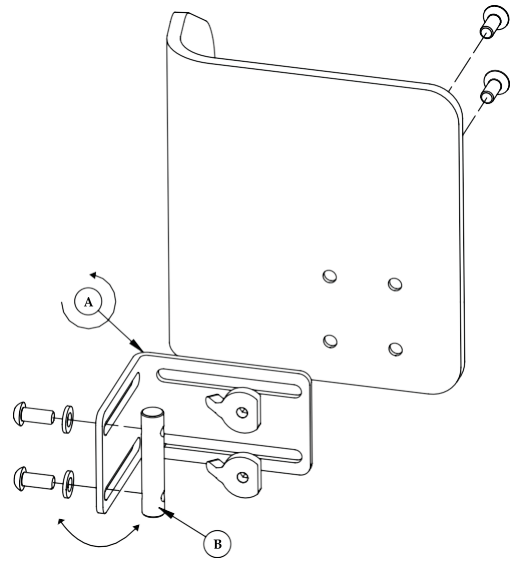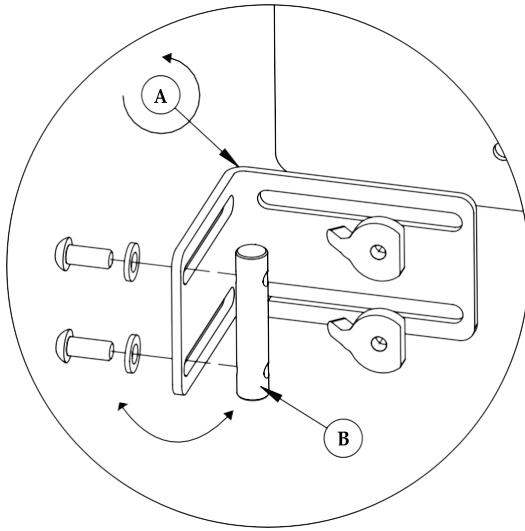

Tekniset tiedot

Yhten./erill.	Koko	Kork. (A)	Syvyys (B)
990043 / 990048	3	205 mm	190 mm
990044 / 990049	4	235 mm	240 mm

Pohjetuki

Pohjetuen asentaminen

Ennen pohjetuen asentamista on mahdolliset asennetut jalkatuet poistettava jalkatuen kannattimesta. Poista ensin päätysuojus (G) ja avaa sitten vipua (F), jolla jalkatuki kiinnittyy profiiliin. Vedä jalkatuki sitten alakautta irti.

Pohjetuki asennetaan painamalla vastamutterit (C) jalkatuen kannatinprofiiliin, säätämällä halutulle korkeudelle ja kiristämällä ruuvit (E) tiukalle. Tämän jälkeen jalkatuki asennetaan takaisin paikalleen päätysuojuksineen (G).



Jalkatuen asentaminen neuvotaan kappaleessa Jalkatuki.

Korkeuden ja syvyyden säätäminen



Pohjetuen korkeutta ja syvyyttä säädetään avaamalla ruuveja (E) hieman, minkä jälkeen tuki säädetään halutulle korkeudelle, ja kiristetään ruuvit (E).

Leveyden säätäminen


Pohjetuen leveyttä säädetään avaamalla ruuveja (A) hieman, minkä jälkeen tuki säädetään halutulle leveydelle, ja kiristetään ruuvit (A).




Muista kiinnittää jalkatuki ja päätysuojukset pohjetukea jälkikäteen asennettaessa.

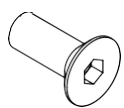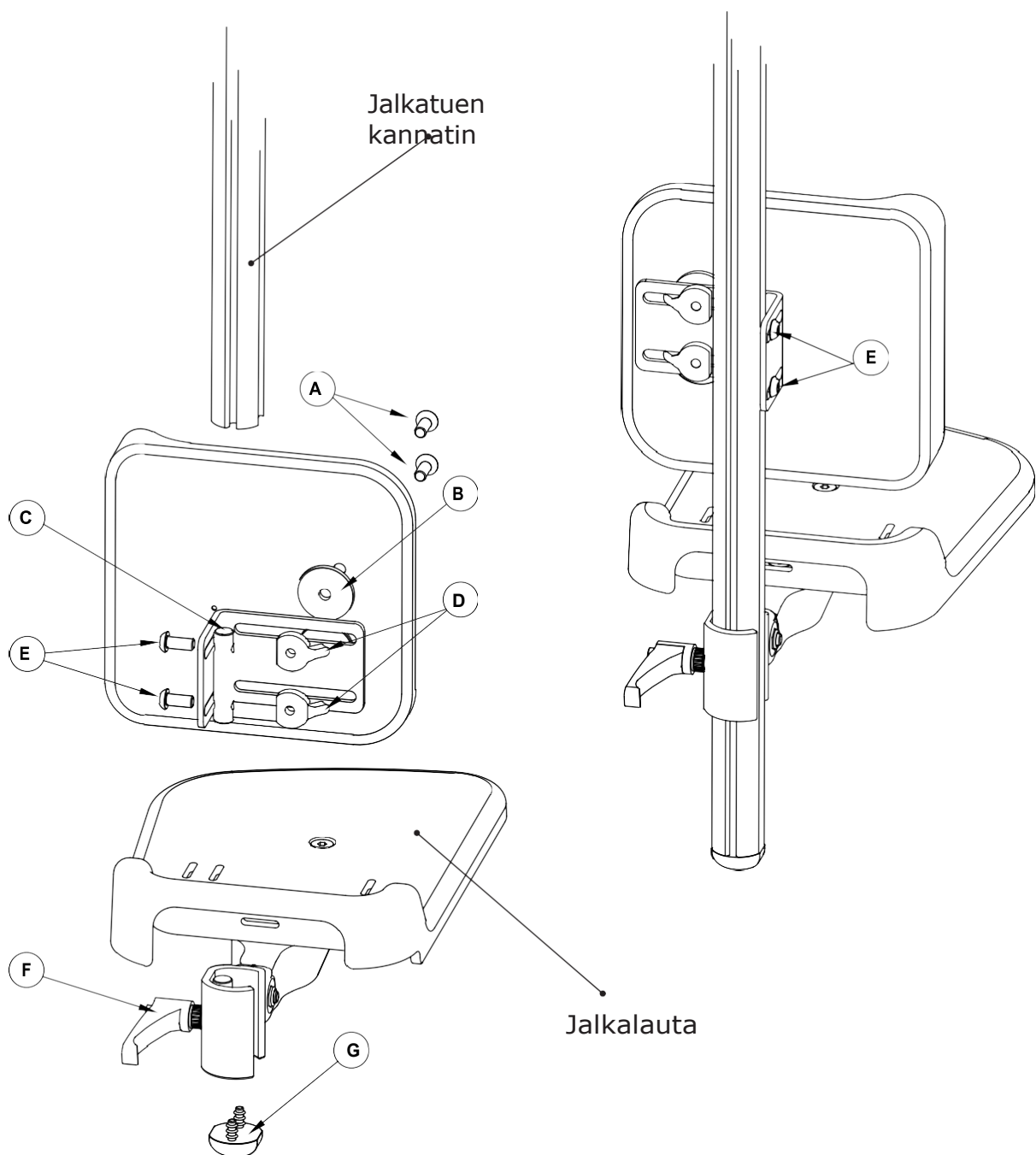


M6 uppokanta (A)
4 kpl

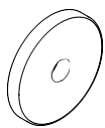


Välike (B)
4 kpl

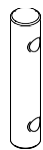

Vastamut-
-teri (C)
2 kpl

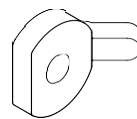

Kiskomutteri
(D) 4 kpl

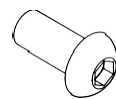


M6 ruuvi (E)
4 kpl

Työntökahva

Työntökahvan asentaminen

Ennen työntökahvan asentamista on kuusiokoloavain ja mahdolliset muut jo asennetut osat ensin poistettava. Näihin osiin voivat kuulua esimerkiksi päätuki ja yläkannattimet.

Liu'uta työntökahvan vastamutterit selkänoprofiilin kiskoihin. Kun kahva on halutulla korkeudella, kiristä ruuvit (A). Asenna aiemmin irrotetut osat takaisin paikoilleen.

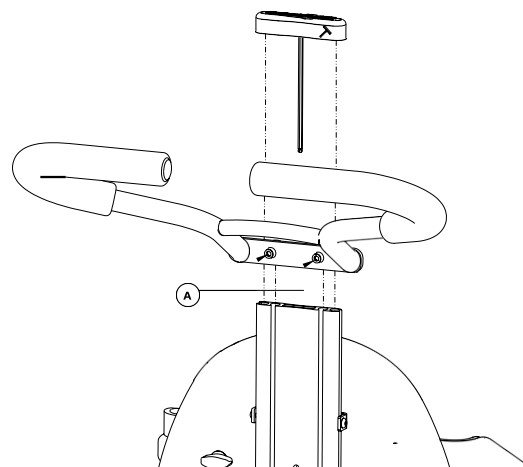

Korkeuden säätäminen


Työntökahvan korkeuden säätämiseksi avataan ruuveja (A) hieman ja kahva säädetään halutulle korkeudelle. Tämän jälkeen ruuvit (A) kiristetään.



Ruuveja ei tarvitse koskaan irrottaa kokonaan työntökahvan säätämiseksi, niiden avaaminen hieman riittää.

Alaselän tuki

- A) Poista selkänojan verhoilu.
- B) Kiinnitä alaselän tuki (merkitylle alueelle) mukana toimitetulla tarraliuskalla.
- C) Pane selkänojan verhoilu takaisin paikalleen.

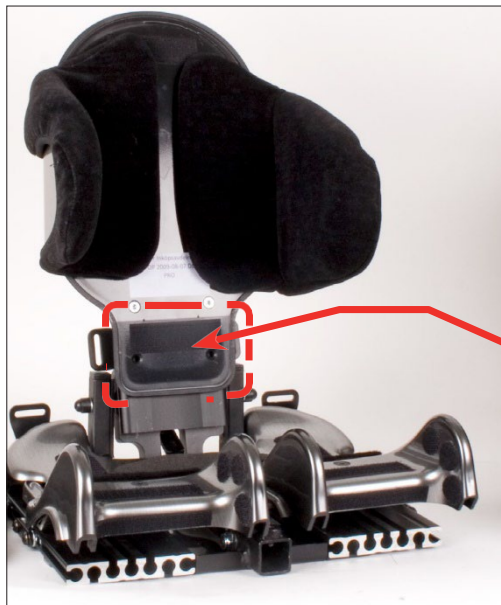

Alaselän tuki

Lämpötyyny

Lämpötyyny

Lämpötyyny ylläpitää kehon lämpötilan automaattisesti ja estää jäähtymisen kylmällä ilmalla. Kun kehon lämpötila on saavutettu, lämmitys kytkeytyy automaattisesti pois energian säästämiseksi. Jos lämpötila laskee, lämmitys kytkeytyy päälle ja lämmittää kehon uudelleen ruumiinlämpötilaan. Liittimet on huolella valikoitu niiden väärän kytkennän mahdollisuuden minimoimiseksi. Liittimiä, akkua tai laturia ei missään olosuhteissa saa altistaa vedelle tai kosteudelle.

Lämmitystyynyjen asentaminen

Lämpötyyny asennetaan istuimen ja selkänojaverhoilun väliin tarrakiinnityksellä.

Lämmitystyyny

Lämmitystyynyissä on sisäänrakennettu lämpötilakontrolli alueella +27 °C - +32 °C. Eriste sietää alhaisia ja korkeita lämpötiloja ja kestää auringonvaloa, kosteutta ja kemikaaleja. Tyynyn materiaali on tulenkestävää (FMVSS 302). Tiivistymisen ehkäisemiseksi lämmitystyyny on valmistettu hengittävästä materiaalista.

Akku

Akku on uudelleenladattava (Ni-MH), ja se saadaan ladata ainoastaan mukana toimitetulla laturilla. Akun tyhjennyttyä se tulee toimittaa kierrätykseen paikalliselle kierrätysasemalle.



Akun tyhjennyttyä ja tultua käyttökelvottomaksi se tulee toimittaa kierrätykseen paikalliselle kierrätysasemalle.

Akun lataaminen

Akun lataaminen oikein tapahtuu seuraavasti.

1. Liitä laturi seinäpistokkeeseen, 230V, 50 Hz.
2. Liitä laturi ohjainkoteloon.
3. Kun lataamaton akku liitetään, laturin ilmaisins-LED vilkkuu hitaasti keltaisena. Tämä tarkoittaa hidasta latautumista. Jonkin ajan kuluttua laturi vaihtaa pikalataukseen, ja ilmaisins-LED alkaa vilkkua nopeasti vihreänä.
4. Jätä akku liitettyksi laturiin, kunnes ilmaisins-LED palaa jatkuvana vihreänä. Tämä osoittaa akun latautuneen täydellisesti ja laturin siirtyneen ylläpitolataustoimintoon.
5. Irrota virtajohto seinäpistokkeesta.
6. Irrota laturi ohjainkotelosta.

Tietoja ja ohjeita lämpötyynystä ja sen käytöstä löytyy erillisestä käyttöohjeesta.

Akku vilkkuu keltaista

Jos akku on rikki, laturissa oleva valo vilkkuu nopeasti keltaista.

Yhteenveto ja tarkastukset

Asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on tarkastettava, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja toimivat moitteettomasti.

Tarkasta tuotteen ja sen lisävarusteiden säädöt varmistaen, että käyttäjän istuma-asento on oikea.

Kaikkien asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on kaikki nupit, kiinnitysruuvit ja -mutterit tarkastettava ja kiristettävä.

Varmista, että apuväline on tasapainossa siten, että kaatumisvaaraa ei ole.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää. Käänny apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Kuljettaminen ajoneuvoissa

Sharky Pro -istuinta autossa kuljetettaessa alustalle kiinnitettynä on noudatettava alustan valmistajan antamia erityisohjeita.

Turvahihna

Istuimen mukana toimitetaan erityinen hihna, joka on tarkoitettu asentaa selkänojaprofiilista alustan työntökaaren ympärille. Varmista, että turvahihna on kuljetuksen aikana kireällä.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Sharky Pro on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 -standardin mukaisesti.

Tämän standardin mukaisesti istuinjärjestelmä voidaan asentaa kaikille alustoille, jotka on hyväksytty ISO 7176-19 -standardin mukaisesti, jolloin hyväksyntä yhdistelmälle säilyy.



Törmäystestauksen hyväksyntä pätee korkeintaan 75 kg:n käyttäjäpainolle.

Huolto ja kunnossapito

Tarkastus ennen käyttöä

Apuvälineen moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta.

Tarkastukset on suoritettava aina ennen käyttöä seuraavien seikkojen osalta:

- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Tarkasta etenkin ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa.
- Tarkista tuotteen vakaus.
- Tarkista tuotteen liikkuvat osat ja toiminnot, kuten selkänöjan kallistus jne., liikkeen ja lukittumisen osalta.
- Tarkista voiden ja valjaiden kiinnitys ja toiminta ja mahdollinen kuluneisuus.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää. Käänny apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Hoito

Hoidon tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Tarve riippuu tuotteesta mutta vähintään kerran viikossa tehtävää hoitoa suositellaan.

Puhdista muovi- ja metalliosat kostealla liinalla ja miedolla antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Tyynyt, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelasussa olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän käyttöohjeesta.

Huolto ja kunnossapito

Tuote on huollettava säännöllisesti turvallisen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Huollon tarve vaihtelee ja voidaan arvioida tapauskohtaisesti tuotteen käytöstä ja kulumisesta riippuen, mutta vähintään kerran puolessa vuodessa tehtävää huoltoa suositellaan.

Huoltotoimenpiteet kuuluvat aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäviksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvallisuus”. Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia.

Jokaisen huollon yhteydessä on varmistettava, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että tuotteen käyttäminen on turvallista. Mikäli ilmenee puutteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen eivätkä ole korjattavissa, on tuote otettava pois käytöstä. Tuotteen puhdistamisen osalta ks. kappaleet Hoito ja Kunnostaminen.

Tarkista seuraavat seikat ja korjaa tarvittaessa:

- Tarkista kaikki tuotteen toiminnot.
- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, vääntymiä, kuluneisuutta ja vaurioita.
- Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty tiukalle.
- Tarkista, että kaikki nupit ovat ehjiä ja toimivia.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa.
- Tarkista, että selkänojassa oleva turvahihna ei ole vaurioitunut ja lukittuu.
- Tarkista tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojan kulma jne. liikkeen ja lukittumisen osalta.
- Tarkista, että kaasujousi lukittuu valittuun asemaan.
- Tarkista kaikkien nivelten, hammasliitosten ja kannattimien kuluneisuus. Varmista, että ne lukittuvat tulevasti.
- Tarkista vöiden ja valjaiden kuluneisuus, toiminta ja kiinnitys.
- Tarkista merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit; niiden on oltava ehjät ja luettavissa.

Jälkitarkastus

Huollon jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti.

Kunnostaminen

Kunnostaminen tehdään normaalisti, mikäli apuväline on ollut henkilökohtaisessa käytössä ja se on tarkoitus luovuttaa uudelle käyttäjälle tai varastoida pidempään. Työ kuuluu aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäväksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvallisuusohjeet”.

Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia.

Tietoja tuotteesta ja sen toiminnoista löytyy käyttöohjeesta osoitteessa www.anatomicsitt.com. Tuotteen käyttöikää koskevien tietojen osalta katso tämän käyttöohjeen kappale ”Rajoitukset”.

Kunnostuksen yhteydessä on aina tarkistettava ennen sen lähettämistä uudelle käyttäjälle, että apuväline ei ole erityisesti mukautettu (adaptaatio).

Aina kunnostuksen yhteydessä tulee varmistaa, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että se on turvallinen käyttää. Mikäli siinä on vikoja, joita ei voida kunnostuksella korjata, on tuote poistettava käytöstä ja kierrätettävä.

Puhdistaminen

Puhdista muovi- ja metalliosat sienellä/liinalla ja antibakteerisilla miedoilla puhdistusaineilla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat. Pehmusteet ovat kulutustavaraa, jotka voidaan tarvittaessa uusia.

Tyynyt, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelman olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän käyttöohjeesta.

Tuote voidaan pestä pesukaapissa: 65 °C korkeintaan 10 minuutin ajan. Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat ennen istuinjärjestelmän puhdistamista tällä tavalla.

Kuivaus

Istuinjärjestelmä voidaan kuivata kuivauskaapissa korkeintaan 70 °C:ssa korkeintaan 10 minuutin ajan.

Kunnostukseen liittyvät tarkastukset

Puhdistamisen ja kuivauksen jälkeen tuote on tarkastettava vaurioiden/kuluneisuuden osalta. Tuotteen soveltuvuutta kunnostamiselle arvioitaessa on pidettävä mielessä, että tuotteen käyttöikä on rajallinen (ks. kappale ”Rajoitukset” tässä käyttöohjeessa).

Rikkinäiset, kuluneet ja murtuneet osat on vaihdettava uusiin. Käytä ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia. Varaosia voidaan tilata erillisen varaosaluettelon/hajotuskuvan perusteella. Tuotteen CE-merkinnän säilyttäminen edellyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamien alkuperäisosien käyttämistä.

Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Varmista, että kaikki käyttöohjeet ja alkuperäiset kilvet/etiketit sisältyvät uuteen määräykseen.

Kilvet/tarrat

Mikäli tarvitsette uusia kilpiä tai tarroja, ottakaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen. Niiden sijainti apuvälineessä neuvotaan osoitteessa www.anatomicsitt.com, josta löytyy myös käyttöohje.

Tarkistusten luettelo

Yleistarkastus:

- ☐ Tarkista tuote kokonaisuudessaan lisävarusteineen rikkoutuneiden, murtuneiden tai kuluneiden osien havaitsemiseksi, jotka on vaihdettava uusiin.
- ☐ Tarkista kaikki tuotteen toiminnot.

Istuin/selkänoja:

- ☐ Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä.
- ☐ Tarkista, että istuimen säätö toimii.
- ☐ Tarkista, että selkänoja kallistussäätö toimii ja että kaasujousi lukittuu oikeaan kohtaan.
- ☐ Tarkista verhoilu ja korvaa tarvittaessa uudella.

Jalkatuki:

- ☐ Tarkista korkeus- ja kallistussäädön toiminta.
- ☐ Tarkista kaikkien hammastusten kuluneisuus ja varmista niiden lukittuminen.

Päätuki:

- ☐ Tarkista verhoilu ja korvaa tarvittaessa uudella.
- ☐ Tarkista, että päätuen nivelet lukittuvat.
- ☐ Tarkista päätuen kannattimen lukittuminen.

Käsinoja:

- ☐ Tarkista käsinojen korkeus-, syvyys- ja leveyssäädöt.
- ☐ Tarkista, että käsinojen kannattimet lukittuvat kunnolla.

Adapterijärjestelmä:

- ☐ Tarkista järjestelmän lukittuminen.

Turvahihna:

- ☐ Tarkista, ettei selkänojan turvahihna ole vaurioitunut ja että se lukittuu.

Muut lisävarusteet:

- ☐ Tarkista kaikki osat kuluneisuuden osalta, tarvittaessa vaihda uusiin.
- ☐ Tarkista lukot ja säätövaihtoehdot.

Jälkitarkastus

Kunnostuksen jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti. Tarkista myös, että merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit ovat ehjät ja luettavissa.

Kierrättäminen

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityypin mukaan ja toimittaa kierrätysasemalle. Akut ja kaasujousi luokitellaan vaaralliseksi materiaaliksi.

Takuu ja vaatimukset

Takuu ja vaatimukset

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä tai sopimuksen mukaisesti. Takuuta ei myönnetä, jos tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai vääränlaista tai huolimattontaa käsittelyä. Virheellinen tuote on palautettava takuukäsittelyä varten. Liitä mukaan alkuperäisen toimituksen lähetysluettelo.

Takuuvaatimuksen arviointia helpottaa, että se on palautettaessa kuiva ja puhdistettu.

Kuvaile virhe ja mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi korjauksia tai korvaus takuun alaisena. Liitä aina mukaan kopio laskusta ja pyydä tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Takuuvaatimuskaavake on ladattavissa verkkosivuiltammme.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Palautukset

Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuote tulee palauttaa 20 päivän sisällä toimituspäivästä. Liitä aina mukaan kopio lähetysluettelosta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy. Palautuskaavake on saatavissa verkkosivuiltamme.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Tulee huomioida, että kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa!

Käyttöohjeen tarkistukset

Käyttöohjeiden tähän versioon on tehty seuraavat muutokset.

Yhteydenpito - merkinnät

Kuvaus tuotekilven sijainnista

Tekniset tiedot

- Lisätty sivu 2, jossa lisää mittoja

Tarkistusten luettelo

ver. 2.0 - 2021-03-09

ver. 2.1 - 2021-05-26

ver. 2.2 - 2021-10-08



Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

Anatomic Sitt AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Ruotsi
Puhelin +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Käyntiosoite

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Ruotsi

World wide

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

