



Käyttöohje

Käyttöohje, asennus- ja säätämisohjeet, huolto,
kunnossapito ja kunnostaminen



Tämä käyttöohje koskee istuinjärjestelmää Anatomic Motion Seat lisävarusteineen. Lisävarusteiden osalta viittaamme tilauskaavakkeeseen.

Sisällysluettelo

Valmistaja	3
Kustomonti	3
Johdanto	4
Yleistä	4
Yhteydenotto - merkinnät	4
CE-merkintä - luokitus	4
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	4
Käyttötarkoitus	4
Symbolien luettelo	5
Tuotteessa olevat merkinnät	6
Turvallisuusvarotoimet	7
Koulutus ja pätevyysvaatimukset	7
Varoituksia ja varotoimenpiteitä	8
Käyttöä edeltävä tarkastus	9
Rajoitukset	9
Muut vaaratekijät	10
Hyväksytyt yhdistelmät	10
Poikkeustilanteet/onnettomuudet	10
Tekniset tiedot/toimintakyky	11
Adaptaatio ja kustomointi	12
Asennus- ja säätöohjeet	13
Asentaminen alustalle	14
Istuinsa Motion – Istuimen syvyys	15
Istuinsa Advanced – Istuimen syvyys ...	16
Selkänöjan asentaminen/irrotus	17

Selkänöjan kaasujousen vaihtaminen....	18
Puristumissuojus	19
Selkänöjan korkeuden säätäminen	20
Selkänöjan kulman säätäminen.....	20
Dynaaminen toiminto - kiertolukitsin	21
Säädettävä sivutuki	22
Taitettava sivutuki	22
Päätuki	23
Sivuttaissuunnassa säädettävä päätuen kannatin.....	23
Taitettava päätuki.....	24
Ylävartalovyöt	25
Lantiovyö	26
Käsinoja	27
Olkavarren tuki	28
Lantiotuki	29
Polvikulman säätäminen.....	30
Pöytä.....	31
Jalkatuki	32
Nilkkamansetti	33
Jalkahihna	33
Pohjetuki.....	34
Yhteenveto ja tarkastukset	35
Kuljettaminen ajoneuvoissa	36
Huolto ja kunnossapito	37
Tarkastus ennen käyttöä.....	37
Huolto ja kunnossapito	38
Kunnostaminen	39
Kierrätys	42
Takuu ja vaatimukset	42
Käyttöohjeen tarkistukset.....	43

Valmistaja

Tämän tuotteen valmistaja on Anatomic Sitt i Norrköping AB

Postiosoite	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping
Puhelin	+46 11-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Internet	anatomicsitt.com
Opastusvideot	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-rekeisteröintinumero/SRN: SE-MF-000002240

Kustomointi



Rastita tämä ruutu, mikäli tuote on KUSTOMOITU.

CE-merkintä ei tällöin ole enää voimassa ja tulee poistaa.



Johdanto

Yleistä

Onnittelut apuvälinevalinnastanne. Toivomme teidän saavan suurta hyötyä tuotteemme käytöstä. Sen täydelliseksi ja turvalliseksi hyödyntämiseksi on tärkeätä, että luate tämän käyttöohjeen perinpohjaisesti. Tämä pätee kaikkiin henkilöihin, jotka ovat läheisissä tekemisissä käyttäjän kanssa.

Säilyttäkää käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Uusia versioita on ladattavissa verkkosivuiltamme www.anatomicsitt.com. Tietoja uusimmasta versiosta löytyy etusivulta päivämäärän kanssa.

Yhteydenotto - merkinnät

Tuotekilvessä ja tuotteen pakkauksessa on tuotteen viitenumero (REF) ja sarjanumero (SN - päätuotteille) tai eränumero (LOT - lisävarusteille). Nämä numerot tarvitaan yhteydenotoissa Anatomic Sitt -yhtiöön. Sarjanumero löytyy istuinlevyn takaosasta istuintyyntyjen alta.

CE-merkintä - luokitus

Laite lisävarusteineen on asetuksen (EU) 2017/745, Liite VIII luokituksen mukainen CE-merkinnällä varustettu Luokan I lääkinällinen väline.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite täyttää lääkinällisiä välineitä koskevan asetuksen (EU) 2017/745 säädösten vaatimukset. Tarkista tämänhetkinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tuotevaihtoehtoilta ja lisävarusteille osoitteessa www.anatomicsitt.com/documents.



Käyttötarkoitus

Anatomic Motion Seat on modulaarinen dynaaminen istuinjärjestelmä lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on istumiseen liittyviä ongelmia ja rajoitettu liikkeen hallinta, ojennusspastisuutta tai muita hallitsemattomia liikkeitä.

Istuimessa ja selkänojjassa on useita säätövaihtoehtoja ja ne voidaan varustaa erilaisin lisävarustein määrätynlaisen istuma-asennon aikaansaamiseksi.


Istuinjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi Anatomic Sitt i Norrköping AB -yhtiön valmistaman kuljetusalustan kanssa. Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi.

Symbolien luettelo

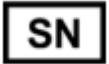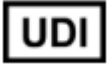
	Tätä symbolia käytetään käyttö-ohjeessa kiinnittämään käyttäjän huomio esim. tärkeisiin turvahuomautuksiin yms.		Ilmoittaa valmistuserän numeron, jolloin erä voidaan tunnistaa.
	Tämä symboli varoittaa puristuksiin joutumisen vaarasta.		Ilmoittaa tuotteen olevan lääkinällinen väline.
	Tämä symboli viittaa ohjeisiin ja vinkkeihin, jotka helpottavat tuotteen käyttöä.		Ilmoittaa valmistajan viitenumeron/ tuotenumeron, joiden avulla lääkinällinen väline on tunnistettavissa.
 www.anatomicsitt.com	Ilmoittaa, että käyttöohjeet tulee aina lukea ennen käyttöä. Verkko-osoite ilmoittaa sivuston, jossa asiakirja löytyy sähköisessä muodossa.		Ilmoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka avulla tekninen tuote on tunnistettavissa.
	Ilmoittaa, että käyttöohje tulee lukea tärkeiden turvallisuustietojen saamiseksi esim. varoituksista, joita ei löydy tuotekilvestä.		Yksilöllinen tuotetunniste, jonka avulla lääkinällinen väline on tunnistettavissa yksiselitteisesti.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistajan (EU) MDR 2017/745 -säädöksessä määritellyllä tavalla. Voidaan myös käyttää yhdessä valmistuspäivän kanssa.		Ilmoittaa tuotteen olevan CE-merkitty sovellettavien EU-direktiivien mukaisesti.
	Ilmoittaa lääkinällisen välineen valmistuspäivämäärän.		

Tuotteessa olevat merkinnät

Päätuotteen tuotekilpi

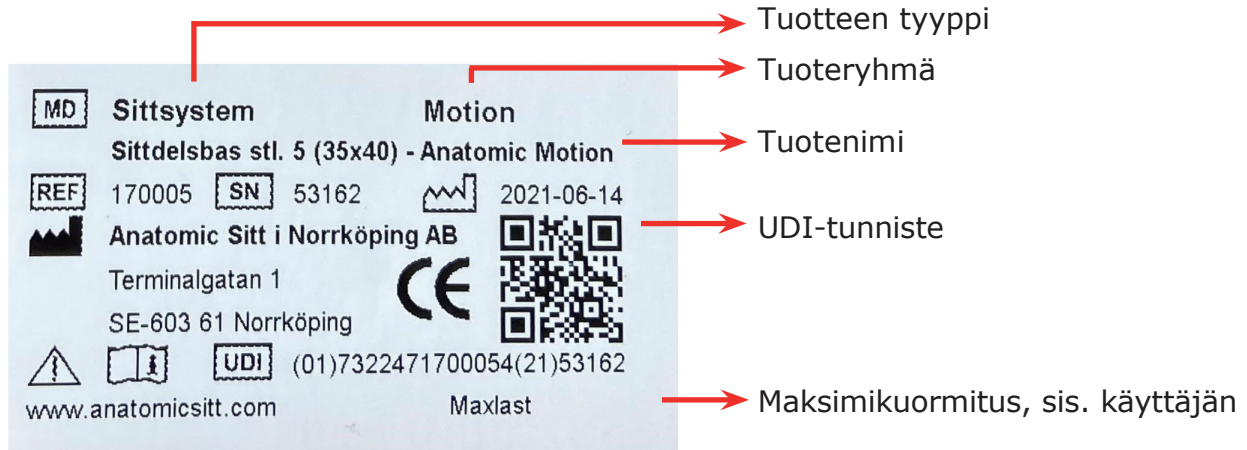

Lisävarusteiden tuotekilpi

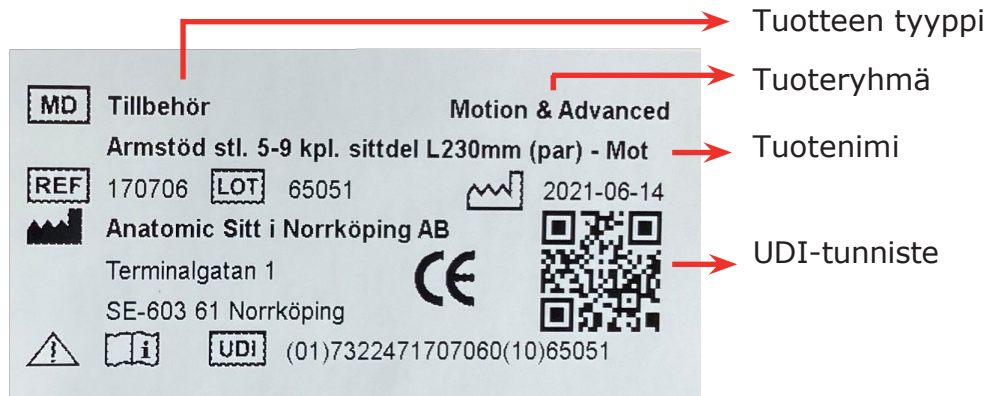

Turvallisuusvarotoimet

Koulutus ja pätevyysvaatimukset

- Asentaminen, huolto ja kunnostus kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Mukauttamista/erityissovituksia (adaptaatio) koskevat päätökset kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi ja sovitusten suorittaminen pätevän ammattihenkilöstön tehtäväksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen asetukset, säädöt ja testaaminen kuuluvat pätevän lääkintähenkilöstön tehtäväksi (erikoishenkilöstö apuvälinekeskuksessa tai vastaavat).
- Apuvälineen määränneen tahon tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, tulee aina suorittaa riskinarviointi ennen käyttöä.

Varoituksia ja varotoimenpiteitä

-  Käyttöohje tulee aina lukea ennen käyttöä.
-  Säädöt kuuluvat yksinomaan pätevien ammattilaisten tehtäväksi. Säätojen tekeminen on sallittua vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Tuotteen toiminta on tarkastettava ennen sen luovuttamista käyttäjälle.
-  Apuvälineen määrännyt henkilö on vastuussa käyttäjän ja/tai muiden välittömässä yhteydessä olevien henkilöiden opastamisesta välineen turvalliseen käyttöön. Tuotteen toiminta on aina varmistettava ennen käyttöä.
-  Määrääjän tai henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja käyttäjän tuntemus, on varmistettava valitun istuimen tasapaino siten, että kaatumisriskiä ei synny.
-  Säätoja saa tehdä vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Kaikkien asennus-, säätö- ja huoltotoimenpiteiden jälkeen on kaikki kiristysruuvit ja -mutterit tarkistettava ja kiristettävä.
-  Varmista aina, että istuinjärjestelmä on tukevasti kiinni alustassa ennen käyttäjän sijoittamista istuinjärjestelmään! Istuimessa on turvahihna, joka on tarkoitus kiristää istuimen selkänojaprofiilista ja työntökaaren ympärille. Tätä hihnaa on aina käytettävä universaaliadapterin kanssa ja ajoneuvoissa kuljetettaessa. Varmista, että hihna on tukeva ja tiukalla.
-  Jalkalautaa ei saa käyttää apuvälineeseen siirtymiseen tai siitä poistumiseen.
-  Laitetta ei saa milloinkaan ylikuormittaa, suurimman sallitun kuormituksen osalta ks. kappale Rajoitukset.
-  Jos käyttäjä kurkottaa liian pitkälle apuvälineestä, saattaa painopiste siirtyä ja aiheuttaa kaatumisvaaran.
-  Nostamisen tulee aina tapahtua alustasta – ei istuimesta.
-  Istuinjärjestelmää ei saa milloinkaan nostaa käyttäjän istuessa siinä.
-  Tuotteen huoltamista ei tule tehdä käytön aikana.
-  Käyttäjää ei koskaan saa jättää ilman valvontaa apuvälinettä käytettäessä.
-  Käytön jälkeen on aina tarkistettava esiintyykö potilaalla punoitusta tai painejälkiä
-  Varmista, että jousilukot ovat lukitut tuoliin siirryttäessä ja siitä poistuttaessa.

Käyttöä edeltävä tarkastus

Tarkastus tulee suorittaa ennen jokaista käyttöä seuraavasti:

- Tarkasta, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Erityisesti on tarkastettava ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkasta, että istuin on tukevasti kiinni alustassa.
- Tarkasta tuotteen tukevuus.
- Tarkasta tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojan kallistus, niiden toiminnan ja lukittumisen osalta.
- Tarkasta esiintyykö voissä ja liiveissä kuluneisuutta ja varmista niiden toimivuus ja kiinnitys.

Mikäli havaitaan vikaa, ei tuotetta tule käyttää. Käänny apuvälineiden jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Rajoitukset

Maksimikuormitus

Maksimikuormitus on: 90 kg, koskee kaikkia kokoja.

Kuormituspainolla tarkoitetaan suurinta painoa, jolla istuinjärjestelmää voidaan kuormittaa, so. käyttäjä ja mahdollinen muu paino yhteensä. Maksimikuormitus ajoneuvoissa kuljettamiselle on 75 kg.

Käyttöikä

Tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä normaalikäytössä on 5 vuotta, kun sitä käytetään tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti ja näitä käyttöohjeita noudattaen. Todellinen käyttöikä voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, miten usein ja miten intensiivisesti sitä käytetään, mutta on korkeintaan 10 vuotta.

Kaasujousi

Kaasujousta tulee käyttää säännöllisesti sen toimivuuden ylläpitämiseksi. Jousi tulisi aktivoida vähintään 6 kuukauden välein. Kaasujousi tulee säilyttää niin, että männän tanko osoittaa alaspäin. Muutoin kaasujousen tiiviste voi rikkoutua ja jousen toiminta lakata.

Muut vaaratekijät

On huolehdittava siitä, että tuote ja sen lisävarusteet on oikein säädetty siten, ettei käyttäjä tunne oloaan epämukavaksi tai vahingoitu käytön aikana. Mikäli näin ei ole, on tuote säädettävä uudelleen tai asennettava sopivat lisävarusteet.

Hyväksytyt yhdistelmät

Tuotteen CE-merkinnän säilyminen edellyttää, että apuvälinettä käytetään vain sellaisten lisävarusteiden kanssa ja varaosin, jotka ovat Anatomic Sitt AB:n toimittamia. Tuotteen tilauskaavakkeesta löytyvät tiedot mahdollisista lisävarusteista sekä varaosia koskevat hajotuskuvat.

Poikkeustilanteet/onnettomuudet


Mikäli tuote ei ole toimintakuntoinen, kääntykää apuvälinemyyjän tai valmistajan puoleen.

Mikäli tapahtuu vakava onnettomuus, siitä tulee tehdä ilmoitus Anatomic Sitt AB:lle ja käyttömaan viranomaisille.

Tekniset tiedot/toimintakyky Motion Seat / Seat Advanced

	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4	Koko 5	Koko 6	Koko 7	Koko 8	Koko 9
Käyttäjän pituus noin cm:	115-140	135-160	135-160	155-180	155-180	175-200	175-200	195-205	195-205
Istuimen leveys (A) cm:	25	25	30	30	35	35	40	40	45
Istuimen syvyys (B) cm:	30-35	35-40	35-40	40-45	40-45	45-50	45-50	50-55	50-55
Käyttäjän paino kaikki koot: max 90 kg.									
Törmäystestin hyväksyntää: max 43 kg (koot 1-4), max 75 kg (koot 5-9).									
Lantiokulma, kaikkia koot: 0° - +15°									


SELKÄNOJAPEHMUSTE

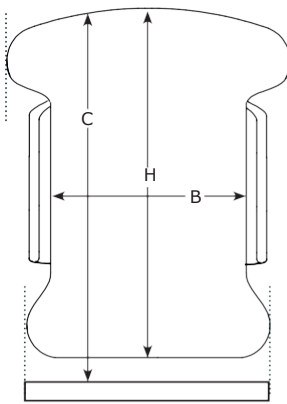

	H & B	C min*	C max*
Koko 1	35 x 16 cm	37 cm	43 cm
Koko 2	40 x 19 cm	42 cm	50 cm
Koko 3	45 x 22 cm	47 cm	56 cm
Koko 4	50 x 25 cm	52 cm	60 cm
Koko 5	55 x 28 cm	57 cm	66 cm
Koko 6	60 x 31 cm	62 cm	70 cm

*Mitta istuinyntä selkänöjan yläreunaan. Selkänöjapehmuste on korkeussäädettävä.

SIVUTUET

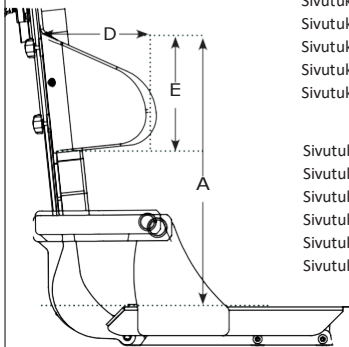

	E x D
Sivutuki koko 1	12 x 10,5 cm
Sivutuki koko 2	13,5 x 12 cm
Sivutuki koko 3	15 x 13,5 cm
Sivutuki koko 4	16,5 x 15 cm
Sivutuki koko 5	18 x 16,5 cm
Sivutuki koko 6	19,5 x 18 cm

A - Kainalokork* Vartalolev.*

Sivutuki koko 1	18-28 cm 15-23 cm
Sivutuki koko 2	22-32 cm 20-26 cm
Sivutuki koko 3	26-36 cm 22-29 cm
Sivutuki koko 4	30-40 cm 24-32 cm
Sivutuki koko 5	34-42 cm 27-35 cm
Sivutuki koko 6	38-46 cm 30-38 cm

*Mitat pätevät valittaessa sama sivutuen ja selkänöjan koko.



KÄSINOJA

Käsinojalevy A x B


Koko 1	230 x 75 mm
Koko 2	330 x 75 mm
Koko 3	330 x 75 mm

Käsinojan korkeus C


Koko 1	160 - 220 mm
Koko 2	190 - 250 mm
Koko 3	230 - 290 mm

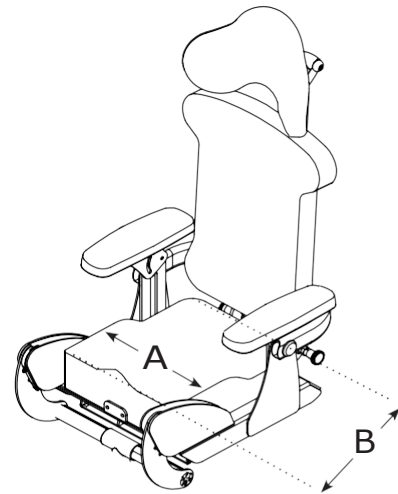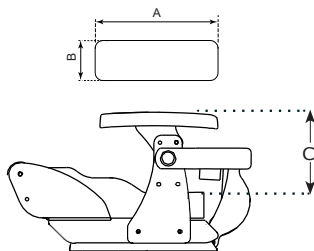


JALKATUKI

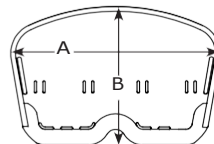

	A x B
Yhten. koko 2	345 x 225 mm
Yhten. koko 3	380 x 260 mm
Yhten. koko 4	380 x 310 mm
Yhten. koko 5	430 x 310 mm

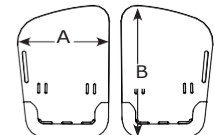


	A x B
Erill. koko 2	160 x 220 mm
Erill. koko 3	175 x 255 mm
Erill. koko 4	175 x 305 mm

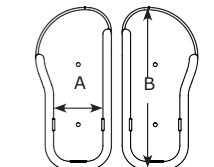

	A x B
Reunuksella, koko 3	90 x 260 mm
Reunuksella, koko 4	100 x 290 mm
Reunuksella, koko 5	110 x 320 mm

PÖYTÄ

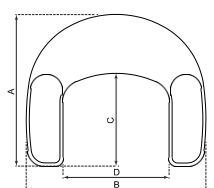

	A	B	C	D
Koko 1	380	450	230	260
Koko 2	430	510	260	300
Koko 3	490	580	300	340
Koko 4	540	640	330	380
Koko 5	540	640	330	380

Adaptaatio ja kustomointi

Suositukses

Aina kun tuotteeseen tehdään muutoksia, on tehtävä arviointi sen määrittämiseksi, onko kyseessä adaptaatio vai kustomointi.

Adaptaatio on CE-merkinnän puitteissa tehty muutos. Kaikki muut muutostyöt ovat kustomointeja. Adaptaation voi tehdä ainoastaan tehtävään päteväksi katsottu henkilö ja se tulee tehdä ammatimaisesti.

CE-merkinnän puitteissa sallitut adaptaatiot

Jalkatukiprofiilia voidaan lyhentää käyttäjälle paremmin sopivaksi.

Selkänojabrofiilia voidaan lyhentää. Profiiliin pituuden pitää kuitenkin aina mahdollistaa kaikkien selkänojabrovyyn kiinnitettävien kannattimien asennus.

Riskianalyysi


Tulee huomioida, että lääkinällisen apuvälineen adaptaatiolle ja kustomoinnille tulee aina tehdä riskinarviointi. Tuote ei milloinkaan saa muuttua käyttäjälle vaaralliseksi kustomoinnin jälkeen.

Merkintä

Tuote on merkittävä tietyille käyttäjälle mukautetuksi siten, ettei sitä voida sekoittaa tuotteen perusmalliin.

Asennus- ja säätöohjeet

Asentaminen kuuluu aina pätevän henkilöstön suoritettavaksi (mekaanikot apuvälinekeskuksessa tai vastaavassa). Käyttäjää ja muita käyttäjän lähipiiriin kuuluvia henkilöitä tulee opastaa tuotteen toimintoihin siten, että apuvälinettä voidaan käyttää turvallisesti.

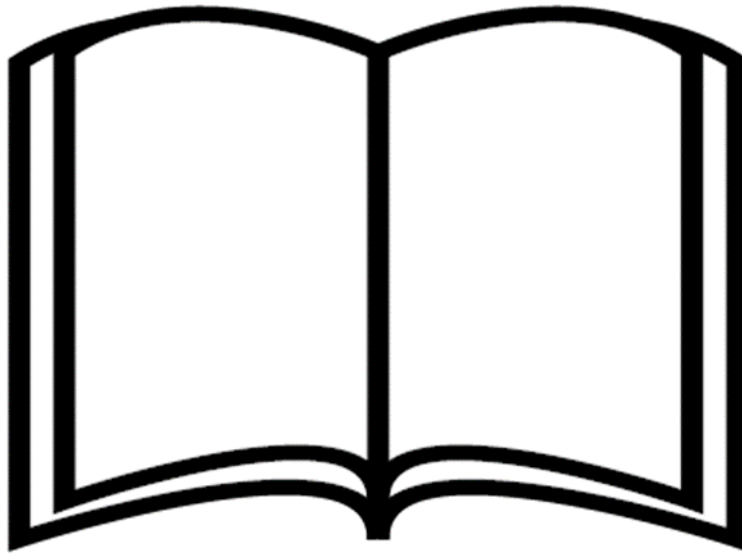

Työkalu

Säätöjen tekemiseen tarvittava kuusiokoloavain (4 mm) on sijoitettu selkänojaprofiilin yläosan sisään.




Asentaminen alustalle

Kiinteä asennus

Kiinteä asennus tarkoittaa istuinjärjestelmän kiinnittämistä suoraan alustalle. Tällä tavalla tehtävä asennus on tehtävä mukana toimitetulla asennussarjalla, 4 ruuvilla, aluslevyillä ja lukkomuttereilla.

Istuin kiinnitetään ruuveilla alustan ylälevyn alapuolelta ylös istuimeen.

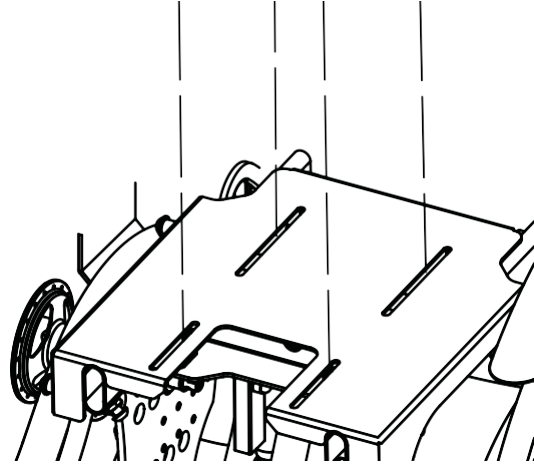

Tulee varmistaa, etteivät jalkatuet osu alustaan tai käännettäessä aiheuta puristuksiin joutumisen vaaraa.





Tasapaino

Tarkista istuinjärjestelmän tasapainopiste siten, ettei se pääse kaatumaan.

Istuinosa Motion – Istuimen syvyys


Istuimen syvyys

Istuimen säätämiseksi syvyyssuunnassa avataan neljää ruuvia (A) hieman. Istuinlevy työnnetään eteenpäin haluttuun syvyyteen (ks. mitta-asteikko istuimen sivulla). Istuinsyvyyden määrää painikkeen (B) sijainti. Kiristä ruuvit.

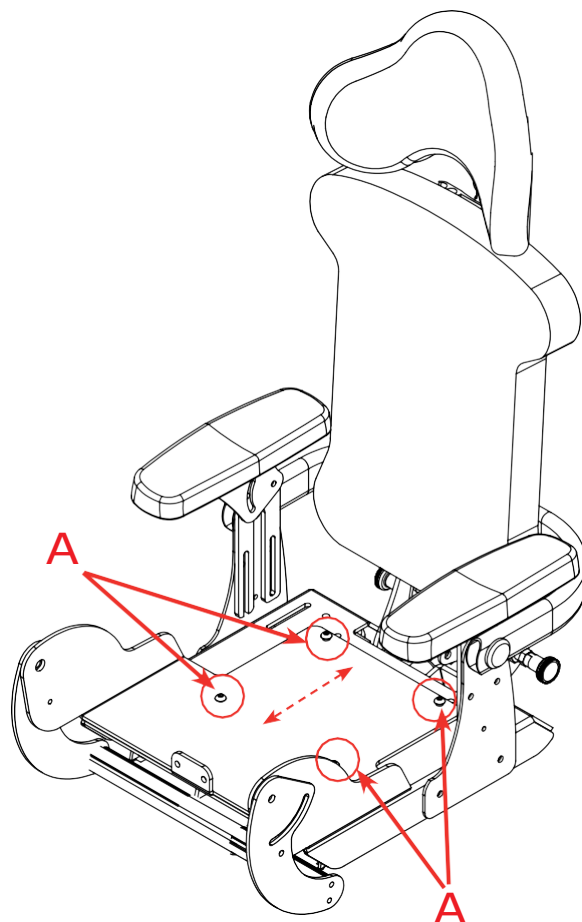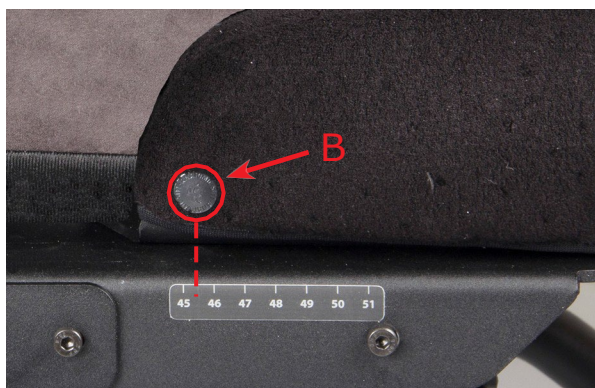

Istuimen kallistus

Istuimen kaltevuutta voidaan säätää siirtämällä koko istuintyynyä eteen- tai taaksepäin, istuinsyvyydestä riippuen. Suurimman istuinsyvyyden yhteydessä suositellaan, että istuintyynyä siirretään taaksepäin kallistuksen säilyttämiseksi. Tämä tehdään siirtämällä pidäkekappaletta (C), joka estää tyynyä liukumasta eteenpäin. Avaa kahta ruuvia, jotka kiinnittävät osan (C) ja siirrä osaa taaksepäin kahden reiän verran. Kiristä ruuvit.

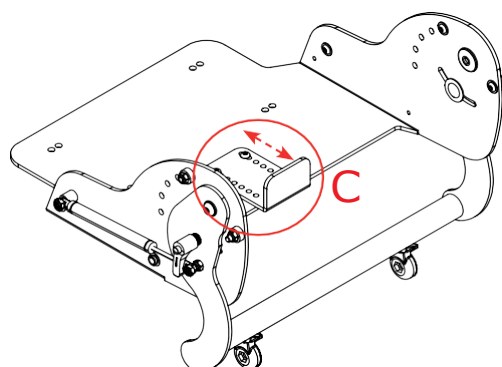


Istuinosa Advanced – Istuimen syvyys

Motion Seat Advanced -mallissa jalkaosia voidaan säätää helposti erikseen. Istuimen syvyyttä, kallistusta ja abduktiota/adduktiota/asentotukea voidaan säätää.


Istuimen syvyys

Istuimen syvyyden säätämiseksi avataan neljää ruuvia (A). Etupuolisiin ruuveihin päästään käsiksi muovisuojuksessa olevien reikien läpi. Jalkaosaa siirretään eteenpäin haluttuun syvyyteen (ks. istuimen sivulla oleva mitta-asteikko). Istuinsyvyyden määrää painikkeen (B) sijainti. Kiristä ruuvit.

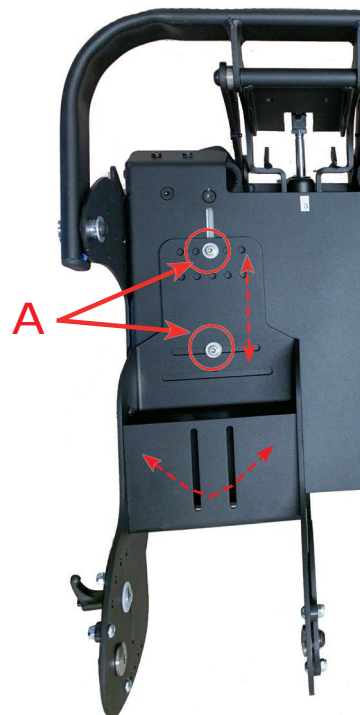



Mitta-asteikko näyttää asetuksen jalkaosien ollessa normaalissa, noin 5°:n loitonnuksessa.

SEAT DEPTH = ISTUIMEN SYVYYS

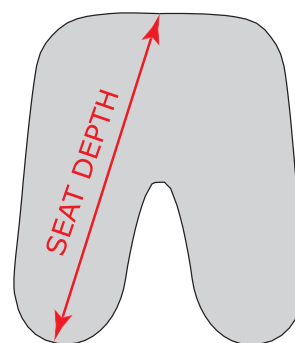

Istuimen kallistus

Avaa ruuveja (C), joilla istuinkallistuksen muovi on kiinnitetty. Istuimen kallistusasetman osoittaa ura (D) istuimen päällä olevan asteikon muovissa. Vihreä merkintä on istuinkallistuksen perusasema/koko. Siirrä istuinkallistuksen määräävä muoviosa haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvit (C).

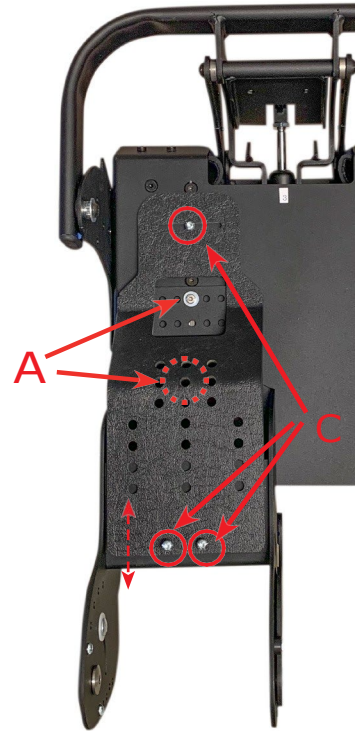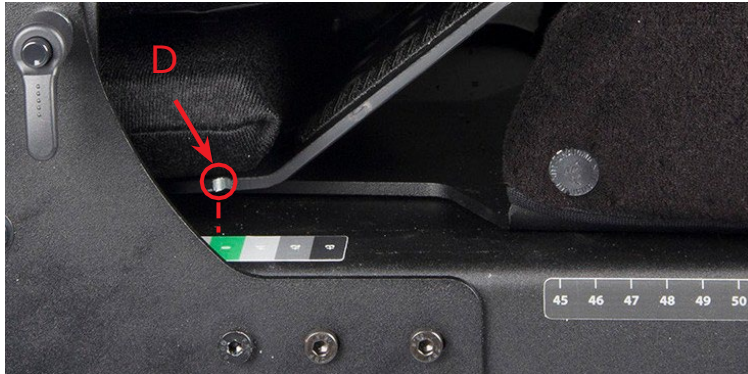

Selkänojan asentaminen/irrotus

Selkänoja kiinnitetään 4 ruuvilla. Työnnä selkänojaprofiili paikalleen ja kiristä neljä mukana toimitettua ruuvia (merkitty kuvassa punaisella). Selkänojaprofiilin ruuvit ruuvataan selkänojan etupuolelta istuimen koosta riippuen.




Selkänojan kaasujousen vaihtaminen

Kaasujousen vaihtaminen



Poista puristumissuojus selkänojan alaosasta.

Selkänojakallistuksen lukitussalpojen alla on kaasujousen kiinnityskohta (A) ruuvilla ja lukkomutterilla, joka kiinnittää kaasujousen (joissakin malleissa on kaksi kaasujoustusta). Avaa ruuvia ja vedä jousi irti.

Sovita uusi kaasujousi etutukeen (B) siten, ettei kaasujousi pääse liikkumaan sivusuunnassa. Istuimen alla oleva puristumissuojus voidaan taittaa edestä sivuun tarkistusta varten (ks. alla oleva kuva).

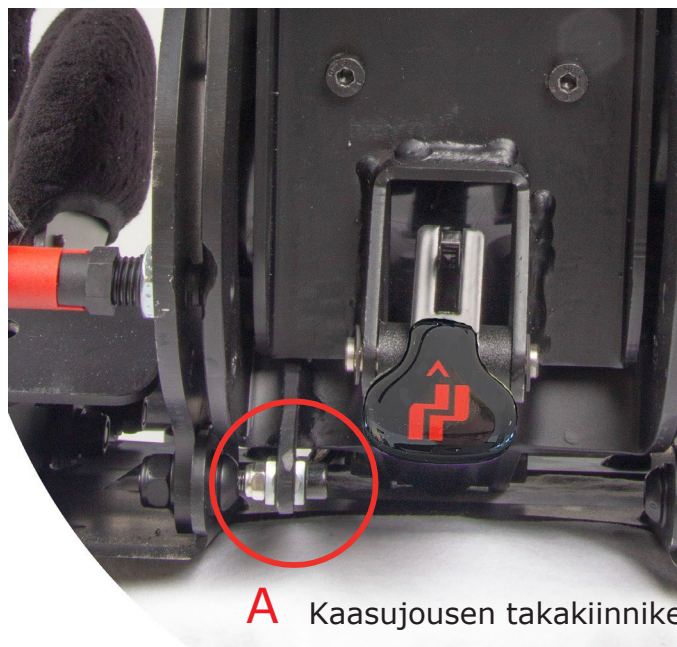

Kiinnitä kaasujousi ruuvilla ja lukkomutterilla takakannattimeen ja asenna puristumissuojus takaisin paikalleen.

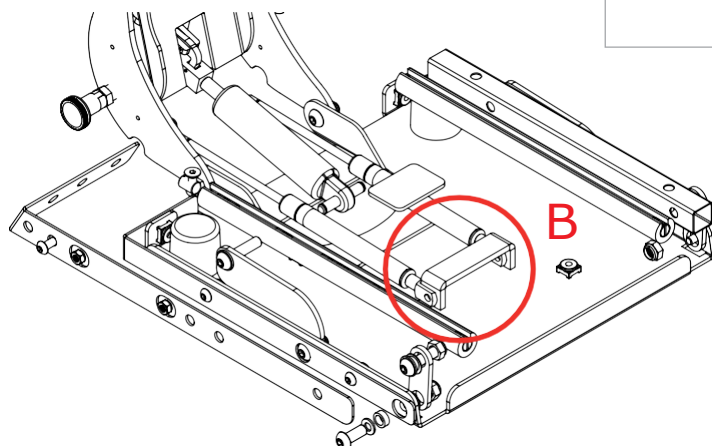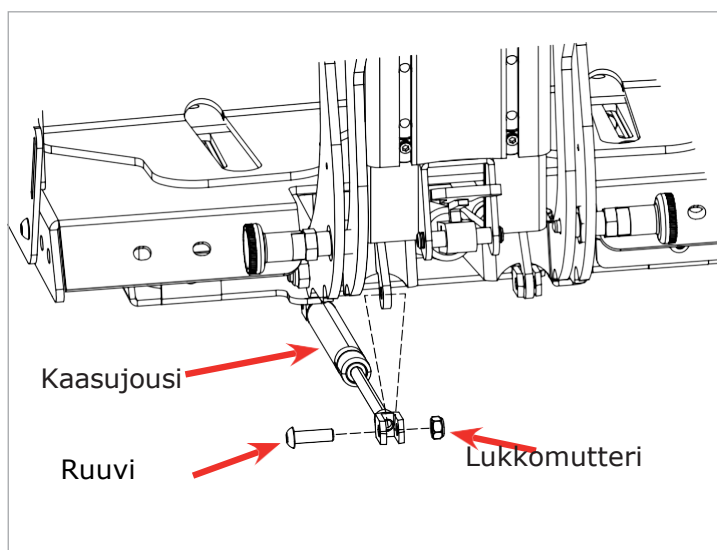


Puristumissuojus


Puristumissuojus on suunniteltu vähentämään riskiä muiden henkilöiden käsien ym. joutumisesta puristuksiin käyttäjän ollessa aktiivisena tuolissa.

Puristumissuojus (D) asennetaan selkänojan alaosan päällä oikealla olevissa kuvissa esitetyllä tavalla. Varmista, että suojus istuu moitteettomasti istumen alle.

Istuinosan alla olevaa puristumissuojusta (E) ei tule milloinkaan poista, ellei se ole vaurioitunut ja joudutaan vaihtamaan uuteen. Suojus voidaan avata edestä näkymän parantamiseksi kaasujoustu vaihdettaessa.

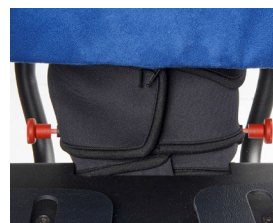

Tuolia käytettäessä on tärkeätä, että puristumissuojus on paikallaan.

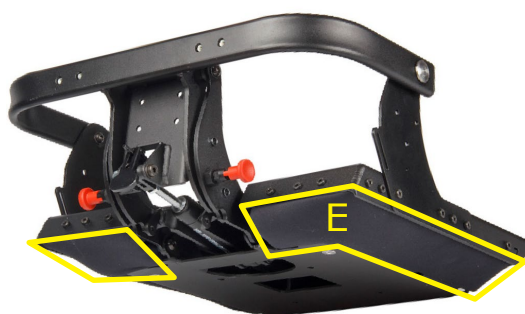


Selkänojan korkeuden säätäminen

- Avaa neljää ruuvia (A) selkänojaprofiilin molemmin puolin (2 kummallakin puolella).
- Sääda selkänojan korkeus.
- Kiristä ruuvit (A).

○ = Säätopultti



Selkänojan kulman säätäminen

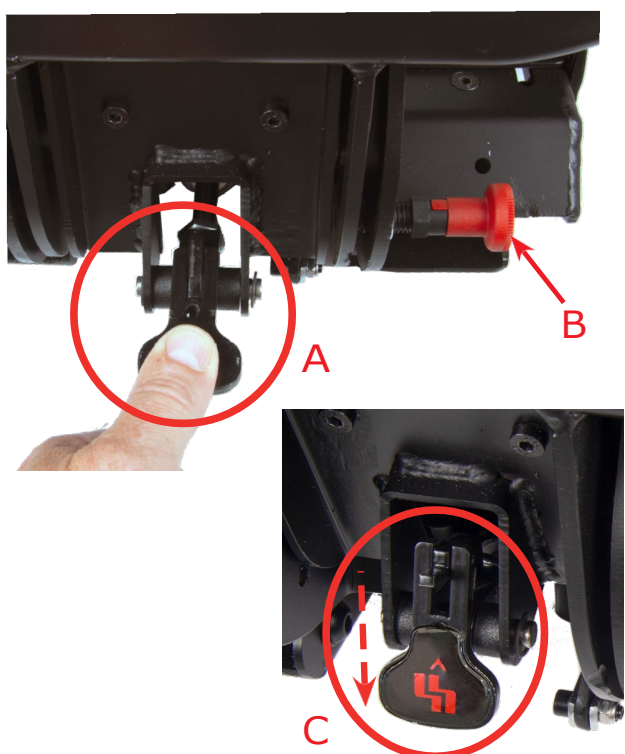


Varmista, että nostotoiminnon salpa (B) on lukittu ennen selkänojan kulman säätämistä. Mikäli puristumissuojus on asennettuna, salpa on piilossa. Poista suojus tai käännä salpa ulos suojuksessa olevan aukon läpi. Käännä salpa toiminta-asentoon vetämällä se suoraan ulos ja sitten ylöspäin. Vipua (A) painetaan alaspäin, jolloin selkänoja vapautuu lukituksesta ja kallistusta voidaan säätää. Kallistuskulman tultua säädetyksi vipu vapautetaan ja se palautuu ala-asentoon (C). Puristumissuojus asennetaan paikalleen ja vipu peitetään siten, ettei kukaan pääse koskettamaan sitä vahingossa.



On tärkeää, että vipu käännetään selkänojan kulman säätämisen jälkeen turva-asentoon alaspäin (C).

Dynaaminen toiminto - kiertolukitsin

Dynaamisen pystyasennon lukitsemiseen käytetään kahta istuimen takana olevaa kiertolukitsinta (yksi kummallakin puolella).

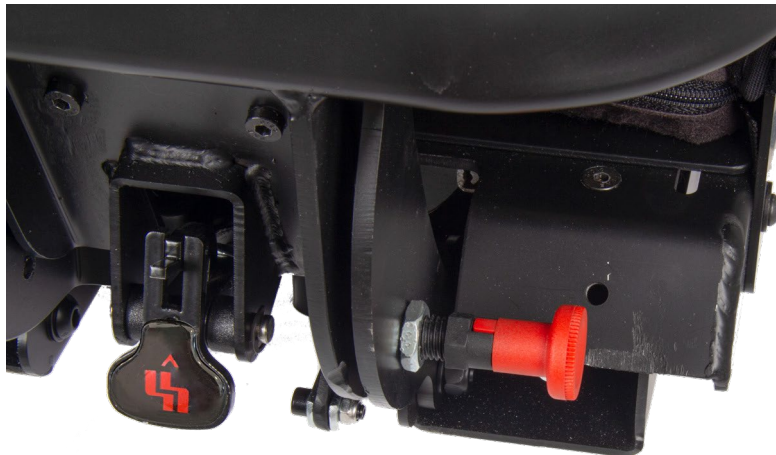

Tulee huomioida, että molempien lukitsimien on oltava lukitut tuoliin siirryttäessä ja siitä poistuttaessa sekä ajoneuvoissa kuljetettaessa.



Kiertolukitsin - lukittu



Kiertolukitsin - auki
(vedä ja kierrä 90°, kunnes lukitsin menee pieneen uraan, joka pitää sen auki-asennossa.)


Säädettävä sivutuki

Sivutuen säätäminen

Avaa ruuveja (A) sivutukien peruskorkeuden säätämiseksi.

Avaa vipuja (B) (kaksi kummallakin puolella), ja säädä tämän jälkeen sivutukien leveys ja korkeus.

Kun säätö on tullut suoritetuksi, kiristä ruuvit (A) ja vivut (B).

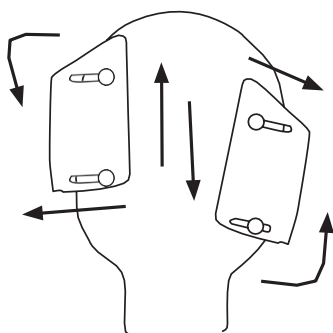


Taitettava sivutuki

Vaihtoehtoinen sivutuki

Saatavissa on myös vahvistettu kiinteä sivutuki ja taitettava sivutuki vaihtoehtona kiinteille sivutuille.

Taitettavan sivutuen avaaminen

Tuki avataan punaista painiketta painamalla (ks. kuva).

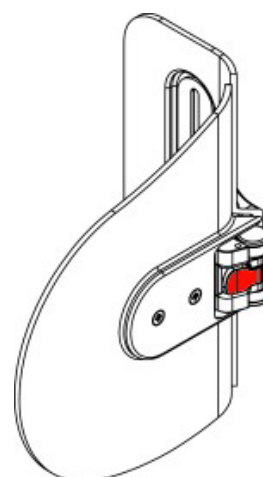

Päätuki

A – Päätuen kannattimen

asentaminen Ensin poistetaan selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva kuusiokoloavain.

Sitten päätuen kannatin työnnetään haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin kiskoissa. Kiristä ruuvit!

B – Sitten asennetaan päätuki

kannattimeensa ja säädetään halutulle korkeudelle.

Kiristä vipu!

C – Päätuen säätäminen

Avaa säätöruuveja C riittävästi voidaksesi säätää päätukea käsin haluttuun asentoon, ja lukitse sitten ruuvit C.

Jos päätukea on tarpeen kohottaa, se tapahtuu avaamalla vipua B ja siirtämällä päätuki halutulle korkeudelle.

Kiristä vipu B tämän jälkeen.



(A) Headrest bracket,
4 screws with rail pins.

(B) Korkeudensäätövipu

Sivuttaissuunnassa säädettävä päätuen kannatin

Sivuttassuunnassa säädettävän kannattimen asentaminen

Ensin poistetaan selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva kuusiokoloavain. Sitten sivuttaissuunnassa säädettävän päätuen kannatin työnnetään haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin kiskoissa.


Kiristä ruuvit!

Sitten päätuki sovitetaan kannattimeensa ja säädetään haluttuun asentoon. Kiristä vipu!

Päätuen säätäminen

Päätuun säätämiseksi sivuttaissuunnassa avataan ruuvia A (2 kpl). Mikäli lisäsäätäminen on tarpeen, avataan ruuveja B (4).

Kiristä ruuvit!

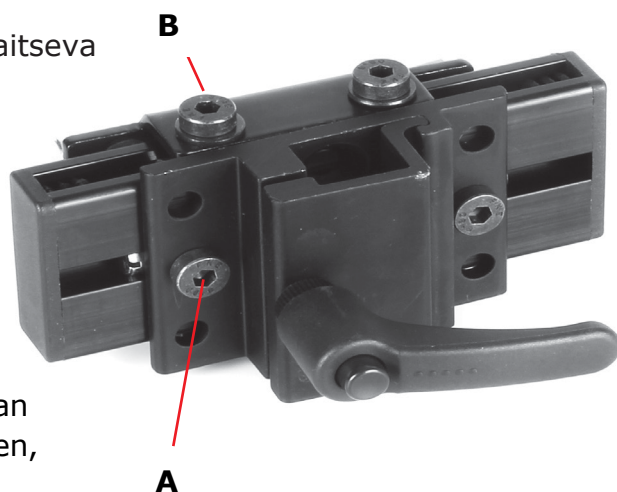

Taitettava päätuki


Taitettavan päätuen kannattimen asentaminen

Ensin poistetaan selkänojaprofiilin yläosassa sijaitseva kuusiokoloavain. Sitten taitettavan päätuen kannatin (A) työnnetään haluttuun kohtaan selkänojaprofiilin kiskoissa. Kiristä ruuvit!

B – Sitten asennetaan päätuki kannattimeensa ja säädetään halutulle korkeudelle. Kiristä vipu!

C – Päätuen säätäminen

Avaa kiertolukitusta päätuen taittamiseksi sivuun. Kannatinta lukittaessa tulee varmistaa, että kiertolukitus lukkiutuu.

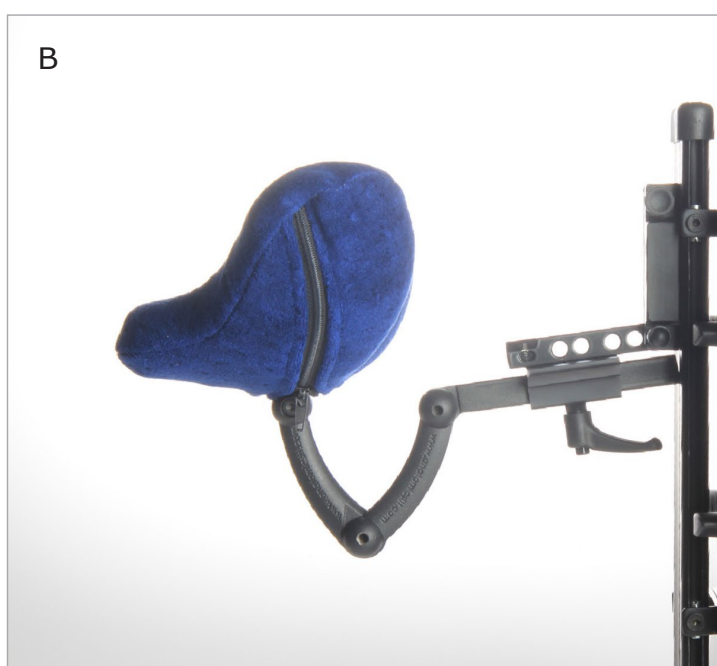

Ylävartalovyöt



Yläkiinnikkeiden (A) asentaminen

Aloita poistamalla selkänojaprofiilin yläosassa oleva kuusiokoloavain. Työnnä päätuen kannatin haluttuun kohtaan selkänojaprofiilissa ja lukitse pultit (B).

Yläkiinnikkeiden säätäminen


Avaa pultteja (B) ja suorita säätö. Yläkiinnikkeiden korkeus tulee säätää hieman hartiatason yläpuolelle. Kiristä pultit.

Vöiden kiinnittäminen

Vedä vöiden ylähihnat yläkiinnikkeiden (A) hahlojen läpi ja kiristä lukitussolkeen. Vedä vöiden alahihnat alakiinnikkeiden (C) läpi ja kiristä Tri-glide soljilla (E).

Vetosuunnan ja leveyden säätäminen

Löysää yläkiinnikkeen pulttia ja säädä haluttu korkeus ja kulma ja kiristä pultti.

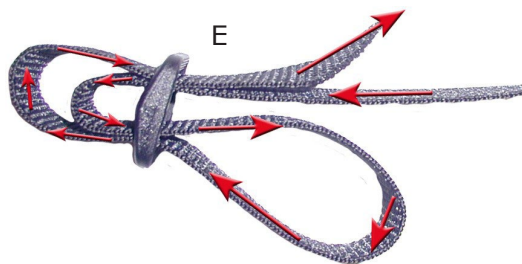

Varmista, että niskalle jää tarpeeksi tilaa ja että pehmusteet ovat oikeilla paikoillaan ja että vyön paine on sopiva!


Lantiovyö

Lantiovyön asentaminen

Kaksipiste-lantiovyö viedään vastaavan hahlon (D) tai (F) läpi käyttäen Triglide-menetelmää (E) ja mukana toimitettuja solkia.

Nelipiste-lantiovyö viedään istuimen sivulla olevan kiinnityshahlon (F) + (G) läpi käyttäen Triglide-menetelmää (E) ja mukana toimitettuja solkia.

Hahloihin (D) ja (F) sopivat korkeintaan 40 mm:n hihnat ja hahloon (G) korkeintaan 25 mm:n hihnat. Kiinnike (F) voidaan irrottaa ja kääntää eteenpäin. Kiinnikkeet (F) + (G) voidaan myös sovittaa istuimen takana oleviin reikiin (H).

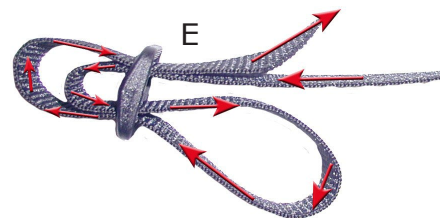




Käsinoja

Syvyyssäätö: irrota pultti B ja C ja säädä haluttuun kohtaan. Asenna pultit takaisin ja kiristä.

Korkeussäätö, käsinojan levy: avaa vipua (D) ja säädä haluttuun kohtaan (kuva 1). Kiristä vipu.

Käsinojan levyn kallistus: avaa vipua (E) ja kallista ylös/alas haluttuun asentoon (kuva 2). Kiristä vipu. Käsinojan kulman yksilölliseksi asentamiseksi kiinteästi voidaan porata reikä ja käyttää ruuvia ja lukkomutteria.

Sivuttaiskallistus, käsinojan levy: avaa ruuveja (B ja C) ja säädä haluttuun asentoon (kuva 3). Kiristä ruuvit.

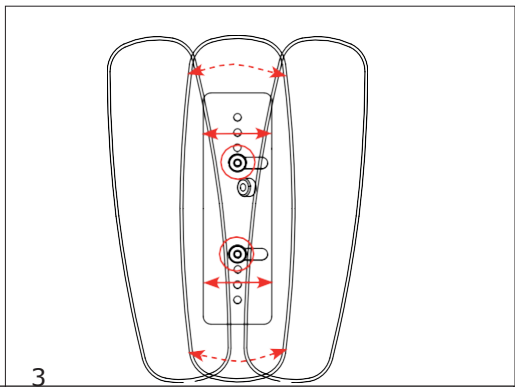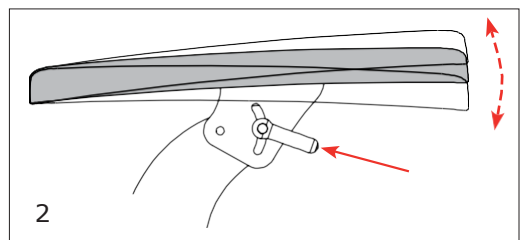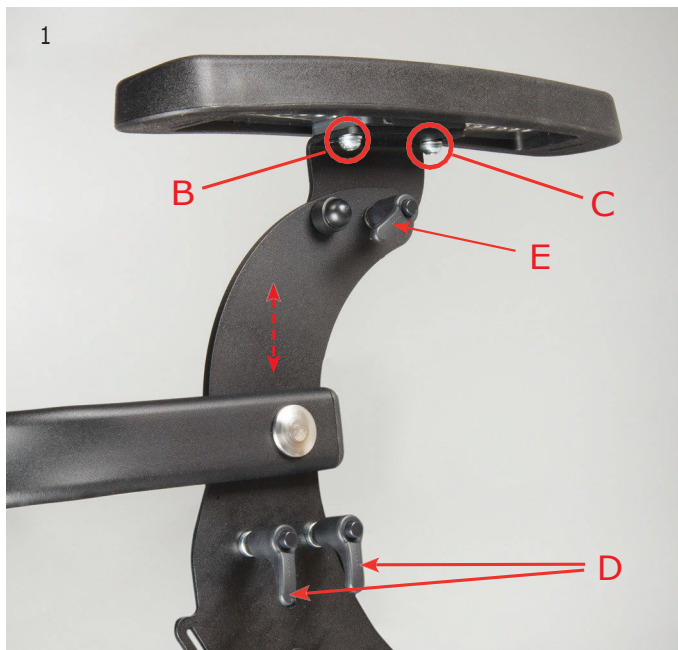

Säätämisen jälkeen tulee kangaspäälliset aina asentaa käsinojan kannattimen päälle puristumisvaaran välttämiseksi.



Verhoilu: sovita alapuolinen verhoilu aluksi kuvassa 4 esitetyllä tavalla ja sitten ylempi verhoilu kuvassa 5 esitetyllä tavalla. Kiiltävien painikkeiden tulee olla sivuista näkyvissä.

Olkavarren tuki

Asentaminen

Avaa sivutuen vipukahva (A) ja aseta olkavarren tuen levy (B) kannattimen ja sivutuen väliin. Korvaa vipukahva toimitukseen kuuluvilla kiinnityspulteilla. Liitä pehmuste olkavarren tukeen (B) ja käsinojan levyyn ennen kiristämistä.

Korkeuden säätäminen

Säädä aluksi käsinojan levyn korkeus käyttäjälle sopivaksi. Säädä sitten olkavarren tuen korkeus sellaiseksi, että pehmuste muodostaa loivan mutkan kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Käsivarsi tai kyynärpää ei saa päästä jäämään puristuksiin käsinojan ja olkavarren tuen väliin. Olkavarren tuen korkeutta voidaan säätää sivutuesta riippumattomasti.

Kiristä vipukahvat (A).



Lantiotuki

Asentaminen käsinojan kanssa

Irrota käsinojien alapuolinen verhoilu.

Avaa vipu ja aluslevyt. Sovita lantiotuen kannatin sivupaneelin ulkopuolelle kuvassa esitetyllä tavalla kahta ruuvia (C) käytettävissä oleviin reikiin käyttäen.

Asenna vipu takaisin paikalleen, mutta poista kiiltävä aluslevy ja jätä musta aluslevy paikalleen.

Asenna pehmuste toisen puolen käsinojaan. Ohuin pehmuste saadaan näin sisäänpäin, mikä antaa paremman tilaa lantiotukien pehmusteille.

Säätäminen

Säätäminen ei ole mahdollista.



Polvikulman säätäminen



Lukitus dynaamisen toiminnon polvinivelessä.

Polvinivelen koukistuksen/ojennuksen helpottamiseksi polvinivel lukitaan tai avataan vipukahvasta (C).



Polvinivelen koukistusalue

Siirrä ruuvi (D) sopivaan reikään. Koukistuksen aloituspiste on säädettävissä viidessä vaiheessa 5 asteen välein.



Polvinivelen ojennusalue

Siirrä ruuvi (E) sopivaan reikään. Koukistuksen maksimiasento on säädettävissä viidessä vaiheessa 5 asteen välein.



Vastus ojennettaessa

Käytettävissä on kaksi paksuudeltaan erilaista joustavaa hihnaa, jotka voidaan vaihtaa tai yhdistää vastuksen säätämiseksi. Joustava hihna kiristetään vaimennusjousten ruuvien (F) ympärille.

Pienin vastus:

- Käytä ohutta joustohihnaa

Lisää vastusta:

- Käytä paksua joustohihnaa

Suurin vastus:

- Käytä molempia joustohihnoja




Pöytä

Pöydän asentaminen

Aseta pöytä käsinojalevjen päälle ja kiristä pöydän lukitusosat (A) käsinojalevyn (B) alle.

Lukitusosia on käännettävä niin pitkälle, että ne ovat käsinojalevyn reunan sisäpuolella.

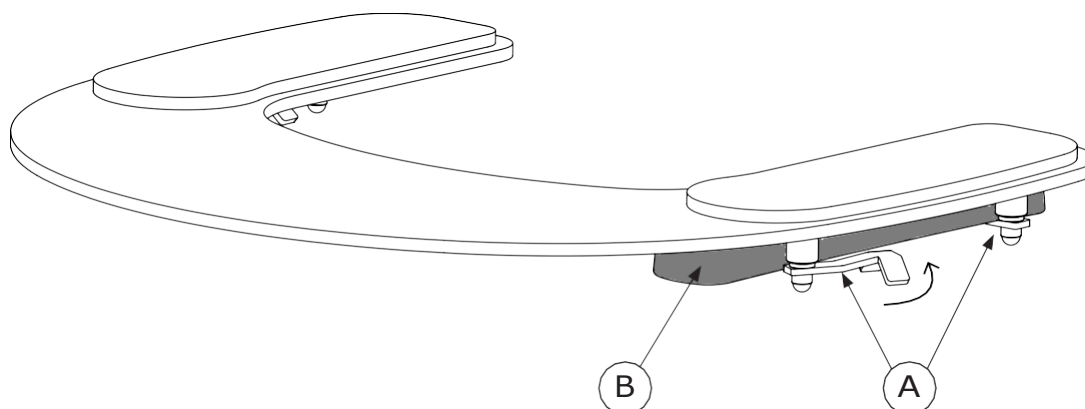

Jalkatuki

Erilliset jalkatuet

Kallistussäätö

Avaa ruuveja (A) nivelessä ja säädä haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit ja varmista, että "hampaat" menevät kunnolla vastakkain. Kiristä ruuvi!

Korkeussäätö

Avaa vipukahvaa (B) ja säädä halutulle korkeudelle. Kiristä vipu, kun haluttu korkeus on saavutettu.

Jalkalaudan kulman säätäminen

Avaa ruuvia (C) nivelessä ja säädä haluttuun kulmaan. Kiristä ruuvit ja varmista, että "hampaat" menevät kunnolla vastakkain. Kiristä ruuvi!




Nilkkamansetti

Jalkalaudassa on asennusvalmius nilkkamansetille.

Säädettävän jalkatuen yhteydessä nilkkamansetin asentaminen tapahtuu jalkatuen alle.



Varmista, että pehmuste on oikeassa asennossa!

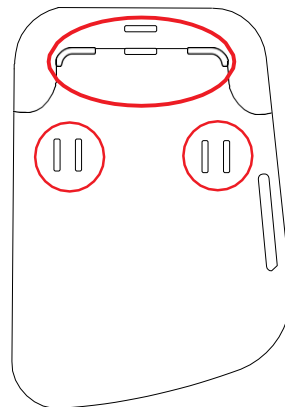

Nilkkamansetin asentamiseen käytetään jalkalaudssa olevia hahloja.


Jalkahihna

Jalkahihnat asennetaan jalkalautoihin vetämällä hihna alas ja edelleen ylös kahden jalkalaudassa tätä varten tarkoitetun hahlon läpi. Jalkahihna voidaan asentaa etummaisiin (A) tai takimmaisiin (B) hahloihin.

Jalkahihnoille tarkoitettuja hahloja tulee aina käyttää ensisijaisesti. Mikäli valmiita hahloja ei ole, saattaa olla tarpeen porata reiät. Oikean vetosuunnan aikaansaamiseksi hihnat tulee asentaa mahdollisimman lähelle jalkaa.

Jalkahihnojen säätäminen

Kiristä hihna kunnolla. Hihnat ovat sopivan kireällä, kun hihnan ja jalan väliin saa mahtumaan yhden tai kaksi sormea. Huomioi aina käyttäjän tuen tarve ja mukavuus.

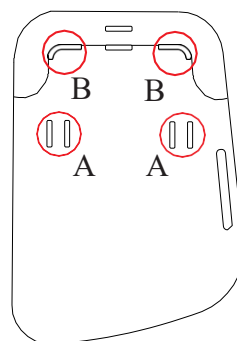

Pohjetuki

Avaa ruuveja (A) ja siirrä niitä haluttuun asentoon kiskolla. Säädä pohjetukien syvyys ennen ruuvien (A) kiristämistä. Avaa ruuveja (B) tukilevyjen leveyden säätämiseksi, ja kiristä ruuvit, kun säätö on tullut suoritetuksi.



○ = Säätöpultit 

Yhteenveto ja tarkastukset

Asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on tarkastettava, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeessa neuvotulla tavalla ja toimivat moitteettomasti.

Tarkasta tuotteen ja sen lisävarusteiden säädöt varmistaen, että käyttäjän istuma-asento on oikea.

Kaikkien asennus- ja/tai säätötoimenpiteiden jälkeen on kaikki nupit, kiinnitysruuvit ja -mutterit tarkastettava ja kiristettävä.

Varmista, että apuväline on tasapainossa siten, että minkäänlaista kaatumisvaaraa ei ole.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää. Käänny apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Kuljettaminen ajoneuvoissa

Motion Seat -istuinta autossa kuljetettaessa alustalle kiinnitettynä on noudatettava alustan valmistajan antamia erityisohjeita.

Turvahihna

Istuimen mukana toimitetaan erityinen hihna, joka on tarkoitus asentaa selkänojaprofiilista alustan työntökaaren ympärille. Varmista, että turvahihna on kuljetuksen aikana kireällä.

Törmäystestattu ja hyväksytty

Motion Seat on törmäystestattu ja hyväksytty ISO 16840-4 -standardin mukaisesti.

Tämän standardin mukaisesti istuinjärjestelmä voidaan asentaa kaikille alustoille, jotka on hyväksytty ISO 7176-19 -standardin mukaisesti, jolloin hyväksyntä yhdistelmälle säilyy.



Törmäystestauksen hyväksyntä pätee korkeintaan 75 kg:n käyttäjäpainolle.



Tulee huomioida, että molempien kiertolukitsimien tulee olla lukittuna ajoneuvoissa kuljetettaessa.

Huolto ja kunnossapito

Tarkastus ennen käyttöä

Apuvälineen moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta.

Tarkastukset on suoritettava aina ennen käyttöä seuraavien seikkojen osalta:

- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, kuluneisuutta tai vaurioita. Tarkasta etenkin ruuvit ja mutterit sekä nupit.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa.
- Tarkista tuotteen vakaus.
- Tarkista tuotteen liikkuvat osat ja toiminnot, kuten selkänojan kallistus jne., liikkeen ja lukittumisen osalta.
- Tarkista võiden ja valjaiden kiinnitys ja toiminta ja mahdollinen kuluneisuus.

Mikäli havaitaan vikoja, ei tuotetta saa käyttää, vaan tulee kääntyä apuvälineen jälleenmyyjän puoleen korjauksen saamiseksi.

Hoito

Hoidon tarve vaihtelee ja on arvioitava tapauskohtaisesti. Tarve riippuu tuotteesta mutta vähintään kerran viikossa tehtävää hoitoa suositellaan.

Puhdista muovi- ja metalliosat kostealla liinalla ja miedolla antibakteerisella nesteellä tai vastaavalla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Tyyny, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelmassa olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän käyttöohjeesta.

Huolto ja kunnossapito

Tuote on huollettava säännöllisesti turvallisen ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Huollon tarve vaihtelee ja voidaan arvioida tapauskohtaisesti tuotteen käytöstä ja kulumisesta riippuen, mutta vähintään kerran puolessa vuodessa tehtävää huoltoa suositellaan.

Huoltotoimenpiteet kuuluvat aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäviksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvallisuus”. Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosa.

Jokaisen huollon yhteydessä on varmistettava, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että tuotteen käyttäminen on turvallista. Mikäli ilmenee puutteita, jotka vaikuttavat turvallisuuteen eivätkä ole korjattavissa, on tuote otettava pois käytöstä. Tuotteen puhdistamisen osalta ks. kappaleet Hoito ja Kunnostaminen.

Tarkista seuraavat seikat ja korjaa tarvittaessa:

- Tarkista kaikki tuotteen toiminnot.
- Tarkista, onko tuotteessa ja sen lisävarusteissa löysällä olevia osia, vääntymiä, kuluneisuutta ja vaurioita.
- Tarkista, että kaikki ruuvit, mutterit ja pultit on kiristetty tiukalle.
- Tarkista, että kaikki nupit ovat ehjiä ja toimivia.
- Tarkista, että istuin on tukevasti kiinni alustassa.
- Tarkista, että selkänojassa oleva turvahihna ei ole vaurioitunut ja lukittuu.
- Tarkista tuotteen liikkuvat toiminnot, kuten selkänojan kulma jne. liikkeen ja lukittumisen osalta.
- Tarkista, että kaasujousi lukittuu haluttuun asemaan.
- Tarkista kaikkien nivelten, hammasliitosten ja kannattimien kuluneisuus. Varmista, että ne lukittuvat tulevasti.
- Tarkista vöiden ja valjaiden kuluneisuus, toiminta ja kiinnitys.
- Tarkista merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit; niiden on oltava ehjät ja luettavissa.

Jälkitarkastus

Huollon jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti.

Kunnostaminen

Kunnostaminen tehdään normaalisti, mikäli apuväline on ollut henkilökohtaisessa käytössä ja se on tarkoitus luovuttaa uudelle käyttäjälle tai varastoida pidempään. Työ kuuluu aina pätevän ja ammattimaisen henkilöstön tehtäväksi, ks. tämän käyttöohjeen kappale ”Turvaohjeet”.

Varaosina tulee käyttää ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosa.

Tietoja tuotteesta ja sen toiminnoista löytyy käyttöohjeesta osoitteessa www.anatomicsitt.com. Tuotteen käyttöä koskevien tietojen osalta katso tämä käyttöohjeen kappale ”Rajoitukset”.

Kunnostuksen yhteydessä on aina tarkistettava ennen lähettämistä uudelle käyttäjälle, että apuväline ei ole erityisesti mukautettu (adaptaatio).

Jokaisen kunnostuksen yhteydessä tulee varmistaa, että tuotteen toiminnot ovat luotettavia ja että se on turvallinen käyttää. Mikäli siinä on vikoja, joita ei voida kunnostuksella korjata, on tuote poistettava käytöstä ja kierrätettävä.

Puhdistaminen

Puhdista muovi- ja metalliosat sienellä/liinalla ja antibakteerisilla miedoilla puhdistusaineilla. Älä käytä pesuaineita, jotka sisältävät hankausaineita, syövyttäviä aineita tai liuottimia.

Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat. Pehmusteet ovat kulutustavaraa, jotka voidaan tarvittaessa uusia.

Tyynyt, kankaat ja vyöt/valjaat pestään 60 °C:ssa. Noudata pesuohjelmassa olevia erityisiä pesuohjeita. Lisätietoja löytyy kunkin asentotukijärjestelmän käyttöohjeesta.

Tuote voidaan pestä pesukaapissa: 65 °C korkeintaan 10 minuutin ajan. Poista pehmusteet, verhoilu ja vyöt/valjaat ennen istuinjärjestelmän puhdistamista tällä tavalla.

Kuivaus

Istuinjärjestelmä voidaan kuivata kuivauskaapissa korkeintaan 70 °C:ssa korkeintaan 10 minuutin ajan

Kunnostukseen liittyvät tarkastukset

Puhdistamisen ja kuivauksen jälkeen tuote on tarkastettava vaurioiden/kuluneisuuden osalta. Tuotteen soveltuvuutta kunnostamiselle arvioitaessa on pidettävä mielessä, että tuotteen käyttöikä on rajallinen (ks. kappale "Rajoitukset" tässä käyttöohjeessa).

Rikkinäiset, kuluneet ja murtuneet osat on vaihdettava uusiin. Käytä ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia. Varaosia voidaan tilata erillisen varaosaluettelon/hajotuskuvan perusteella. Tuotteen CE-merkinnän säilyttäminen edellyttää, että käytetään ainoastaan Anatomic Sitt AB:n toimittamia alkuperäisosia.

Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä. Varmista, että kaikki käyttöohjeet ja alkuperäiset kilvet/etiketit sisältyvät uuteen määräykseen.

Kilvet/tarrat

Mikäli tarvitsette uusia kilpiä tai tarroja, ottakaa yhteyttä Anatomic Sitt AB:hen. Niiden sijainti apuvälineessä neuvotaan osoitteessa www.anatomicsitt.com, josta löytyy myös käyttöohje.

Tarkistusten luettelo

Yleistarkastus:

- ☐ Tarkasta tuote kokonaisuudessaan lisävarusteineen rikkoutuneiden, murtuneiden tai kuluneiden osien havaitsemiseksi, jotka on vaihdettava uusiin.
- ☐ Tarkasta kaikki tuotteen toiminnot.

Istuin/selkänoja:

- ☐ Tarkasta, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.
- ☐ Tarkasta, että istuimen säädöt toimivat.
- ☐ Tarkasta, että selkänojan kallistussäätö toimii ja että kaasujousi lukittuu oikeaan kohtaan.
- ☐ Tarkasta verhoilu ja vaihda tarvittaessa uuteen.

Jalkatuki:

- ☐ Tarkasta korkeus- ja kallistussäädön toiminta.
- ☐ Tarkasta kaikkien hammasnivekten kuluneisuus ja varmista niiden lukittuminen.

Päätuki:

- ☐ Tarkasta verhoilu ja vaihda tarvittaessa uuteen.
- ☐ Tarkasta, että päätuen nivelet lukittuvat.
- ☐ Tarkasta päätuen kannattimen lukittuminen.

Käsinoja:

- ☐ Tarkasta käsinojen korkeus-, syvyys- ja leveyssäätöjen toiminta.
- ☐ Tarkasta, että käsinojen kannattimet lukittuvat tukevasti.

Adapterijärjestelmä:

- ☐ Tarkasta toiminta ja lukittuminen.

Turvahihna:

- ☐ Tarkasta, ettei selkänojan turvahihna ole vaurioitunut ja että se lukittuu.

Muut lisävarusteet:

- ☐ Tarkasta kaikki osat kuluneisuuden osalta, tarvittaessa vaihda uusiin.
- ☐ Tarkasta lukot ja säätövaihtoehdot.

Jälkitarkastus

Kunnostuksen jälkeen tulee tarkistaa, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) on asennettu oikein käyttöohjeiden mukaisesti ja että ne toimivat moitteettomasti. Tarkista myös, että merkinnät, kilvet ja varoitussymbolit ovat ehjät ja luettavissa.

Kierrättäminen

Kierrätys

Käytetty osa tai tuote tulee purkaa ja hävittää. Osat tulee erotella materiaalityypin mukaan ja toimittaa kierrätysasemalle. Kaasujousi luokitellaan vaaralliseksi materiaaliksi.

Takuu ja vaatimukset

Takuu ja siihen liittyvät vaatimukset

Takuu valmistusvirheiden osalta on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä tai sopimuksen mukaisesti. Takuuta ei myönnetä, jos tuotteeseen on kohdistunut ulkoisia tekijöitä tai vääränlaista tai huolimatonta käsittelyä. Virheellinen tuote on palautettava takuukäsittelyä varten. Liitä mukaan alkuperäisen toimituksen lähetysluettelo.

Takuuvaatimuksen arviointia helpottaa, että se on palautettaessa kuiva ja puhdistettu.

Kuvaile virhe ja mahdollinen syy mahdollisimman tarkasti. Vaadi korjauksia tai korvaus takuun alaisena. Liitä aina mukaan kopio laskusta ja pyydä tuotteen palauttamista korjausten jälkeen. Liitä mukaan toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Takuuvaatimuskaavake on ladattavissa verkkosivuiltammne.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Palautukset

Virheellisten tilausten tai toimitusten tapauksessa tuote tulee palauttaa 20 päivän sisällä toimituspäivästä. Liitä aina mukaan kopio lähetysluettelosta ja laskusta. Mainitse palautuksen syy. Palautuskaavake on saatavissa verkkosivuiltamme.

Pakkaa kuiva ja puhdistettu tuote hyvin sen suojaamiseksi iskuilta/vaurioilta kuljetuksen aikana. Muista ottaa ylös kuljetuksen seurantakoodi tai vastaava, jolloin voit seurata lähetystä mahdollisten ongelmien varalta.

Tulee huomioida, että kustomoituja tuotteita ei voida palauttaa!

Käyttöohjeen tarkistukset

Käyttöohjeiden tähän versioon on tehty seuraavat muutokset.

Tekniset tiedot

Istuimen syvyyden tiedot: tekstiä ja kuvaa muutettu s. 11

Asennus- ja säätöohjeet

Asennus- ja säätöohjeet	s. 16
Kaasujousen vaihtaminen: uusi teksti + kuva	s. 18
Puritumissuojus on uusi	s. 19
Selkänojan kulman säätäminen: uusi teksti + kuva	s. 20
Lantiovyön asentaminen: uusi teksti + kuva	s. 26
Lantiotuki on uusi	s. 29

Tarkistusten luettelo
ver. 2.2 - 2022-03-10



Rehaco Oy
Haaransuontie 6 A 7, 90240 Oulu
040 705 5886
info@rehaco.fi

S

Anatomic Sitt AB (valmistaja)
Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden
Tel +46 11 16 18 00
Fax +46 11 16 20 05

Käyntiosoite
Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com
facebook.com/anatomicsitt
youtube.com/anatomicsitt

