



R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

VIRIKE HÖJ- OCH SÄNKBART SKRIVBORD

BRUKSANVISNING





R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

CE



INNEHÅLL

ALLMÄN BESKRIVNING AV DET HÖJ- OCH SÄNKBARA SKRIVBORDET VIRIKE.....	3
BRUKS- OCH SÄKERHETSANVISNING.....	4
TEKNISK INFORMATION	5
MODELLER	6
MONTERINGSANVISNINGAR	7
Montering av stomme.....	7
Montering av lutande skiva	8
Montering av fast skiva	9
Montering av styrenhet och batterikabel.....	10
Montering av tillbehör	11
ANVISNINGAR FÖR JUSTERING AV BORDSSKIVANS LUTNING OCH NOLLSTÄLLNING AV STYRENHETEN	12
Justering av bordsskivans lutning	12
Nollställning av styrenheten	12



Det höj- och sänkbara bordet Virike har utformats för att möta olika användares behov. Virike har utvecklats ur en terapeutisk aspekt för att uppfylla ergonomiska krav.

Virike-bordet har funktioner som inte finns i andra terapi- och arbetsbord; t.ex. batteridrift, flexibel modifierbarhet och individuellt skräddarsydd helhet inkl. bordsskivans form, mekanik och höjd.

Virike-bordet kan användas på många olika sätt. Det kan bland annat användas i skolor, hemma, på sjukhus och i terapi.




- Produkten ska endast användas tillsammans med strömkälla som hör till den.
- Den som monterar, sköter och använder bordet bör läsa dessa anvisningar noggrant. Anvisningarna ska förvaras tillsammans med bordet.
- Se alltid till innan bordets höjd justeras, att bordet kan höjas och sänkas utan hinder.
- Virike är ett funktionellt höj- och sänkbart bord. Det får inte användas som personlyft.
- Beakta maxbelastningen som anges i den tekniska informationen. Överbelasta inte bordet.
- När bordet används eller justeras ska hjulens bromsar vara låsta.
- Tänk på att hålla ett säkert avstånd när du justerar bordet för att undvika att klämmas mellan den rörliga bordsskivan och närliggande fasta hinder. Se även till att inte personer eller föremål skadas när du höjer eller sänker bordet. Dra ut eventuell stol från närheten av bordet innan du höjer eller sänker bordet. När bordsskivan lyfts och sänks får det inte stöta emot något fast hinder, för då kan den tippa.
- När du justerar bordsskivans lutning, se till så att inte någons fingrar hamnar i kläm.
- Bordet får inte modifieras eller omvandlas på något sätt.
- Vid underhåll eller reparation av bordet ska strömsladden alltid dras ut från kontakten. Det är förbjudet att modifiera strömkällan.
- Kontrollera efter ungefär en veckas användning att skruvarna är tillräckligt hårt åtdragna. Om det inte går att höja och sänka bordet, kontrollera sladdarnas anslutningar och att nätsladden är på plats.
- Endast en yrkesutbildad person inom elbranschen får reparera bordets elsystem. En felaktig enhet kan orsaka elektriska stötar om underhållet utförs försumligt. Innan bordets elektriska system börjar repareras, måste nätsladden dras ut från uttaget. Sätt tillbaka sladden i uttaget först när reparationen är klar.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. När du kasserar produkten, lämna in den till lämplig insamlings- eller återvinningspunkt.
- Bordsskivan tål användning av kemikalier som är avsedda för rengöring av hemmet. Bordsskivan tål inte slipande rengöringsmedel, inte heller hård mekanisk rengöring, t.ex. med stålull. Bordet rengörs på samma sätt som andra möbelytor men om det rör sig om en svår fläck kan den tas bort från laminatytan med en rengöringsduk som fuktats med T-sprit, aceton eller thinner. Tänk på att endast torka av och inte gnugga.



Produkt	Virike høj- och sänkbart bord Modeller A, B, C, D, E, F, G Bänkskivor: 90x60 cm & 120x60 cm
Produktkoder	13183-XXXX
Höjjustering	58,5–110 cm (tillsammans med skiva)
Stommens material	Stål Plastkomponenter
Bordsskiva	Laminat
Strömkälla	230VAC / 5A / 50Hz
Strömförbrukning i viloläge	0,1 W
Styrspänning	24VDC
Användningsgrad/-tid	10 %, max. 2 min / 18 min
Hastighet	ca 38 mm / sek.
Höjningstid	ca 10 sek.
Driftstemperatur	+10– +40°C
Luftfuktighet	20–80 %
Ytbehandling av stommens delar	Grå RAL9006 pulverlackering
Skivans maxbelastning vid jämnt fördelad last i viloläge	70 kg
Skivans maxbelastning vid jämnt fördelad last vid lyft	50 kg
Maxbelastning för fastmonterad skiva	30 kg
Maxbelastning för lutad skiva	6 kg
Maxbelastning för kroppsstöd (tillbehör)	8 kg
Garanti	2 år Garantin uppfyller de allmänna garantivillkoren för handelssektorn.
Tillverkare av lyftpelare	LINAK Oy
Tillverkare av høj- och sänkbart bord	R Mokki Oy Teollisuustie 13 60100 Seinäjoki




Modell	Beskrivning	Storlek	Produktkod
Virike Basic 90	Utan bordsskivans lutning	90x60cm	13183-90A
Virike Basic 120	Utan bordsskivans lutning	120x60cm	13183-120A

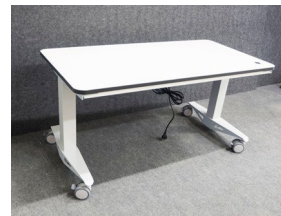

Modell	Beskrivning	Storlek	Produktkod
Virike Basic Plus 90	Hela skivan lutar	90x60cm	13183-90B
Virike Basic Plus 120	Hela skivan lutar	120x60cm	13183-120B



Modell	Beskrivning	Storlek	Produktkod
Virike Double 60/30 Right	Delad bordsskiva, lutning på höger sida	90x60cm Fast skiva: 30cm Justerbar skiva: 60cm	13183-30/60
Virike Double 90/30 Right	Delad bordsskiva, lutning på höger sida	120x60cm Fast skiva: 30cm Justerbar skiva: 90cm	13183-30/90
Virike Double 60/30 Left	Delad bordsskiva, lutning på vänster sida	90x60cm Fast skiva: 30cm Justerbar skiva: 60cm	13183-60/30
Virike Double 90/30 Left	Delad bordsskiva, lutning på vänster sida	120x60cm Fast skiva: 30cm Justerbar skiva: 90cm	13183-90/30

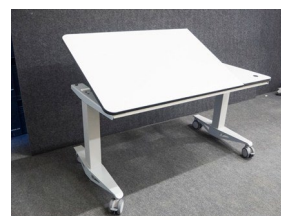

Modell	Beskrivning	Storlek	Produktkod
Virike Middle	Delad bordsskiva, lutning i mitten	120x60cm Fast skiva: 30cm Justerbar skiva: 60cm Fast skiva: 30cm	13183-30/60/30



Modell	Beskrivning	Storlek	Produktkod
Virike Double 60/60 Right	Delad bordsskiva, lutning på vänster sida	120x60cm Fast skiva: 60cm Justerbar skiva: 60cm	13183-60/60o
Virike Double 60/60 Left	Delad bordsskiva, lutning på vänster sida	120x60cm Fast skiva: 60cm Justerbar skiva: 60cm	13183-60/60v



MONTERING AV STOMME

1. Vänd golvstativet upp och ned, lås bromsreglarna och säkra hjulen genom att rotera fast dem i golvstativet.



2. Dra slutligen åt hjulen med en skiftnyckel.



3. Montera lyftpelaren i golvstativet genom att dra åt de fyra M6x12 mm-skruvarna mitt i golvstativet med en insexnyckel.



4. Vrid benen åt rätt håll så att sladdarna hamnar inåt och golvstativets långa sidor pekar åt samma håll.



5. Placera skivstativet ovanpå benet så att lyftpelarens sladd hamnar inåt och att skiv- och golvstativets långa sidor är mittemot varandra.



6. Montera skivstativet i benet med fyra försänkta skruvar av typ M6x12mm.



7. Montera det andra benet på samma sätt.
Bordets stomme är nu färdigmonterad!



MONTERING AV LUTANDE SKIVA

1. Skruva fast skivans lutningsmekanism med två M4-skravar i bordets stomme. Observera den korrekta platsen; mekanismen ska placeras i mitten i förhållande till gångjärnen.



2. Skruva fast gångjärnen i den främre profilen med försänkta skruvar av typ M4.



3. Utför vid behov en djupjustering av skivan med skruven i mitten.



4. Sänk ned skivan och skruva den andra sidan av skivans lutningsmekanism i bordet med försänkta skruvar.



5. Bordsskivans lutningsmekanism är nu monterad. Säkerställ att bordsskivan låses i olika lägen och att lutningsmekanismen fungerar felfritt.



6. Bordet är klart att användas!





MONTERING AV FAST SKIVA

1. När du har monterat den lutande skivan, placera de svarta hylsorna noggrant i skruvhålen på det sätt som visas på bilden.




2. Placera försiktigt bordsskivan ovanpå hylsorna så att bordets kanter är placerade mot varandra och att det finns ett mellanrum om 5 mm mellan bordsskivorna. Vi rekommenderar att du monterar bordet så att hålet i styrenheten hamnar i bordets högra kant.



3. Skruva bordsskivan på plats med de fyra skruvarna. Skruvpunkterna (2 och 3) i skivans ytterkant är alltid desamma oavsett bordets modell. De inre skruvpunkterna (1 och 4) är placerade efter skivornas mellanrum.

4. Montera den andra fasta bordsskivan på samma sätt, om bordet har två fasta skivor på den lutande delens båda sidor (Modell Middle).

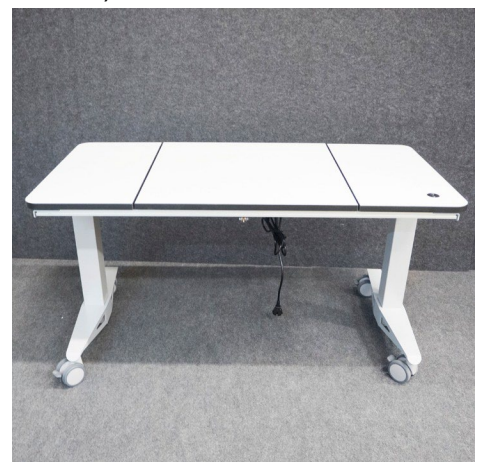



MONTERING AV STYRENHET OCH BATTERIKABEL

1. Trä in styrenhetens kabel genom hålet.



2. Ta bort tejpskyddet som finns bakom styrenheten.




3. Limma fast enheten så att pilen i Linaks logotyp pekar uppåt.



4. Trä kabeln via skivstativets hål och fäst i kraftenheten. Fäst sladden med buntband och klipp av överflödigt buntband. OBS! Om bordsskivan är försedd med lutning, lämna sladden något lös så att skivan kan luta.

5. Nysta ihop resten av sladden och fäst med buntband. OBS! Se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan kabelbunten och lyftpelaren så att sladden inte hamnar i kläm när bordet höjs.

6. Koppla in motorkabeln, som har varit bortkopplad under transporten.

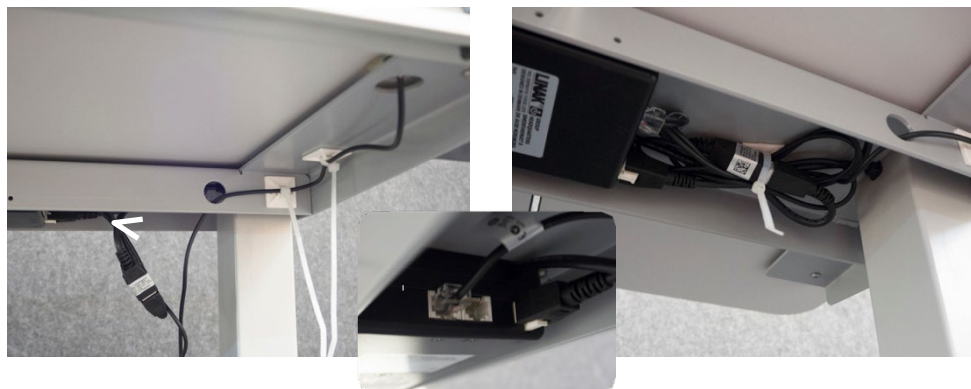

7. Fäst motorkabeln med ett buntband.





MONTERING AV TILLBEHÖR

Kroppsstöd

För att montera kroppsstödet, placera det i fåran i bordets frandel.



Bokstöd

Bokstödet placeras ovanpå bordsskivan och justeras till lämplig position.



Bluetooth

Bluetooth-stickan placeras i den andra porten i kraftenheten. (I den andra finns sladden till styrenheten.)



JUSTERING AV BORDSSKIVANS LUTNING


1. Luta bordsskivan och höj den till önskad vinkel.



2. När du släpper taget, låses skivan på plats.



3. När du vill sänka tillbaka skivan, höj först bordsskivan ända upp och sänk den därefter försiktigt ned.

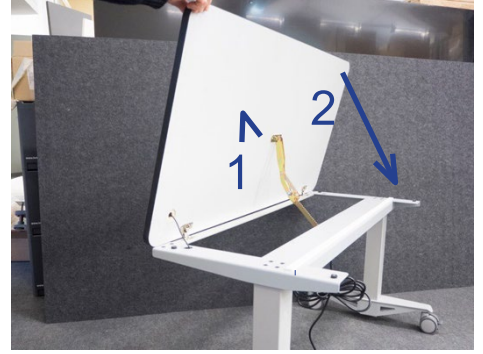

NOLLSTÄLLNING AV STYRENHETEN

Innan ibruktagning eller på grund av en eventuell felsituation ska centralenheten nollställas enligt följande:

1. Se till att bordet kan höjas och sänkas utan hinder.
2. Kör lyftpelarna till det lägsta läget med nedåtpilen på kontrollpanelen.
3. Släpp nedåtpilen och tryck ner den igen i cirka 5 sekunder.
4. Lyftpelarna går ner i sin lägsta nollställningsnivå och återgår sedan till normal lägre nivå.
5. Bordet är nu redo att börja användas.

Centralenheten kan under drift hamna i felläge av olika orsaker, såsom exempelvis strömavbrott eller överspänning i elnätet, överbelastningsläge i lyftpelarna, fränkopplad eller lös motorkabel. Om centralenheten är i felläge, flyttas bordet endast nedåt och med lägre hastighet. Nollställningsåtgärden avlägsnar dessa normala fellägen.