



## PELVI.LOC PL-KG-GO - S, - M, - L



Tämän tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi lue nämä asennusohjeet ja käyttöohjeet ja noudata niitä ennen ensimmäistä käyttöä.

### 1 Käyttötarkoitus

The Pelvi.Loc on tarkoitettu liikuntarajoitteisille, erityisesti jalkojen asettamiseen jalkalevyille ja estää eteenpäin liukumisen.

### 2 Tuotteen vastaanotto

Pura tuote kokonaan pakkauksesta ja tarkista toimituksen täydellisyys ja kuljetusvauriot. Jos huomaat – vastoin odotuksia – toimitetussa tuotteessa virheen, niin:

1. Tee välittömästi valitus rahdinkuljettajalle
2. Kirjaa vaurio/vika muistiin
3. Ilmoita välittömästi meille tai jälleenmyyjällesi

### 3 Pakkauksen sisältö

- 1) 1 x PELVI.LOC nilkkamansetti (pari)
- 2) 1 x Kiinnitysosat
- 3) 1 x Asennusohje ja käyttöohje

### 4 Nilkkamansettien asennus painesoljilla

- Asennuksen saa suorittaa henkilö, jolla on asiantuntemusta.
  -
1. Kiinnitä nilkkahihnan kaksi hihnaa jalkalevyyn kiinnityssarjan avulla.
  2. Aseta pehmusteet (a) jokaiselle nilkka-alueelle. – Hihna (b) osoittaa eteenpäin.
    - Pehmusteen logo tulee olla sivulta luettavissa!
  3. Säädä pehmusteiden etäisyys (b) kiristämällä hihnaa räikällä.(e)
    - Räikkä tulee olla pehmusteiden sisäpuolella ja osoittaa eteen.
  4. Hihnan voi lyhentää tarvittaessa. Leikkaa päästä puoliympyrän muotoinen ja siisti reunat. – Vaara hankaumille jos reunaa ei siisti.
  5. Tarkista hihnan kiinnitys molemmilta puolilta ja räikän lukitus.

## Käyttöohje

### 5 Turvaohjeet

Vakaasta rakenteestaan huolimatta osat, kuten reikähihnat, nauhat, räikät ja pehmusteet, ovat alttiina kulumiselle. Siksi on suositeltavaa suorittaa PELVI.LOC:n perusteellinen tarkastus 6 kuukauden välein. Sekä on tärkeää varmistaa, että niitti- ja ruuviliitokset ovat tiukasti kiinni!

- Varmista ennen tuotteen käyttöä, että se on käyttökunnossa ja sopiva -> Onnettomuusvaara
- Älä paikkaa ja/tai liimaa äläkä käytä uudelleen vaurioituneita osia, kuten nauhaa/reikähihnaa, räikkää (b) tai pehmustetta (a). – Onnettomuusvaara!
- Älä nosta pyörätuolia PELCI.LOC:sta. Onnettomuusvaara!
- Varo, etteivät kätesi jää puristuksiin reikähihnan ja etupyörien väliin!
- Älä käytä PELVI.LOC:ia, jos pehmustealueella on mustelmia, haavoja tai muita huonosti parantuneita vammoja. – Loukkaantumisvaara!
- Älä käytä PELVI.LOC:ia, jos sinulla on osteoporoosi, hauras luusairaus tai vakavia verenkiertohäiriöitä. – Loukkaantumisvaara!
- Varmista puhdistuksen jälkeen, että PELVI.LOC toimii oikein!
- Vaurioitunut PELVI.LOC on vaihdettava välittömästi. – Onnettomuusvaara!

### 6 Huomio:

PELVI.LOC ei ole osa pyörätuolin ja/tai käyttäjän turvajärjestelmää vammaisten henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetussa ajoneuvossa kuljetuksen aikana.

Valmistaja tai jakelija eivät ole vastuussa tuotevastuussa vahingoista tai riskeistä, jotka lapset ovat aiheuttaneet tuotteelle ilman valvontaa.

### 7 Käsittely

1. Käytä PELVI.LOC:ia asettamalla pehmusteet (a) nilkkojen ympärille.  
Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tämä estää kivuliaita mustelmia.
2. Ohjaa sen jälkeen räikkä (b) vastaavan salvan läpi. Käytä tätä varten vastaavaa painelukkoa (e).
3. Kiristä sitten räikkä (b) niin, että nilkan ja pehmusteen väliin jää riittävästi tilaa litteälle kädelle.
4. Varmista, että salvat (e) tarttuvat räikkälaitteen hampaisiin!
  - a. Tarkista jännitys!

### 8 Avaa PELVI.LOC painamalla salpaa (c) ja vetämällä räikkä ulos.

Varmista, että pehmusteet eivät jää tukipyörien haarukoiden väliin!

### 9 Puhdistus ja desinfiointi

5. Konepestävä 40 asteessa.
6. Termokemiallinen desinfiointi mahdollista lisäämällä ELTRA 40 pesun yhteydessä
7. Ei linkousta
8. Ei kuivausrumpua kestävä

### 10 Huolto

Tarkasta PELVI.LOC vaurioiden varalta ja tarkista toiminta säännöllisesti.

### 11 Korjaus

Vaihda vialliset PELVI.LOC-järjestelmät välittömästi.

## 12 Hävittäminen

- Pakkaus on kierrätettävä.
- Metalliosat voidaan hävittää metalliromun kierrätyksellä.
- Muoviosat soveltuvat muovin kierrätykseen.
- Hävitys on suoritettava kansallisten lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Tiedustele kaupunkisi tai kuntasi viranomaisilta paikallisia jätehuoltopalveluita.

## 13 Tekniset tiedot:

Koko	S	17-23 cm
Hihna	S	R-19-VI-BL-210

Koko	M	20-26 cm
Hihna	M	R-19-VI-BL-275

Koko	L	24-30 cm
Hihna	L	R-19-VI-BL-300

## 14 Takuu

Annamme tuotteelle lainmukaisen takuun. Tämä takuu sisältää materiaali- ja käsittelyvirheet. Tämä ei sisällä kuluvia osia ja komponentteja/kokoonpanoja, jotka ovat alttiina tarkoitetulle kulumiselle, eikä vaurioita, jotka ovat seurausta liiallisesta rasituksesta, virheellisestä käsittelystä, pakkovaurioista tai luvattomista muutoksista/korjauksista. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Tuotevastuuseen liittyvistä syistä vain valtuutetut erikoisliikkeet saavat suorittaa korjauksia ja huoltotöitä käyttäen alkuperäisiä varaosia.

## 15 Valmistaja ja maahantuojaja

Valmistaja  
A2J GmbH  
Am Fuchsberg 13  
87452 Altusried, Germany  
Phone: +49 (08373) 987269  
Fax: +49 (08373) 987276  
email: [info@a2j-intl.com](mailto:info@a2j-intl.com)  
Internet: [www.a2j-intl.com](http://www.a2j-intl.com)  
As of 01/01/2017 subject to technical modifications

This product complies with  
the fundamental requirements  
of EC Directive 93/42/ECC  
concerning medical devices

Maahantuojaja  
Rehaco Oy  
[info@rehaco.fi](mailto:info@rehaco.fi)  
P. +358 040 705 5886

**rehaco.**