



Zitzi
Zlider

Anatominen luistelukelkka

Käyttöohje

Käyttöohjeet, kokoonpano-/säätöohjeet, huolto-/hoito-ohjeet.



Tämä käyttöohje koskee Zitzi Zlider -luistelukelkkaa lisävarusteineen.
Täydellinen katsaus lisävarusteisiin on tuotteen tilauslomakkeessa.

Sisällysluettelo

Valmistaja	3	Yhteenveto ja tarkastus	13
Esittely	3	Huolto- ja hoito-ohjeet	13
Johdanto	3	Käyttöä edeltävä tarkastus	14
Kirjeenvaihto-merkintä	3	Hoito- ja pesuohjeet	14
Turvallisuusohjeet	4	Takuu ja palautus	15
Varoitukset ja varotoimet	4	Tarkastus	15
Käyttötarkoitus	5		
Ajotekniikka	5		
Kokoonpano- ja säätöohjeet	6		
Istuimen asentaminen	6		
Istuimen korkeussäätö	7		
Istuimenkulmansäätö/kallistus	7		
Jalkalevy	8		
Vuori	9		
Ajojousi	10		
Liukuesteet	11		
Sukset	12		

Valmistaja

Tuotteen valmistaja on **Anatomic Sitt i Norrköping AB**

Postiosoite	Anatomic Sitt AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Käyntiosoite	Anatomic Sitt AB, Terminalgatan 1, 603 61 Norrköping
Puhelin	011-161800
E-mail	info@anatomicsitt.com
Web	anatomicsitt.com
Opastusvideoita	youtube.com/anatomicsitt
Seuraa meitä	facebook.com/anatomicsitt

Eudamed-rekisteröintinumero/**SRN**: SE-MF-000002240

Johdanto

Johdanto

Onnittelut tuotevalintasi johdosta. Toivomme, että hyödynnätte tuotetta hyvin.

Jotta voisit hyödyntää sitä täysimääräisesti, on tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen huolellisesti.

Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Uudet painokset voit ladata verkkosivuiltamme:

www.anatomicsitt.com. Uudistus löytyy etusivulta yhdessä päivämäärän kanssa.

Kirjeenvaihto - merkinnät

Tuotetarra sisältää tuotteen artikkelinumeron ja sarjanumeron. Nämä numerot on mainittava tuotteita koskevassa kirjeenvaihdossa Anatomic Sittin kanssa.

Turvallisuusmääräykset

Varoitukset ja varotoimet

-  Asetuksia saa tehdä vain aikuinen. Asetuksia saa tehdä vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
-  Tuotetta ei saa muokata tai muuttaa millään muulla tavalla kuin käyttöohjeissa määritellyllä tavalla.
-  Aikuisen on koottava ja tarkistettava tuote ennen käyttöä.
-  Lasten tulisi käyttää tuotetta vain aikuisen valvonnassa.
-  Käytä aina kypärää.
-  Hiihto tapahtuu omalla vastuulla.
-  Tuotetta ei saa hinata tai vetää ajoneuvolla.
-  Pidä jalat ja kädet siellä, minne ne kuuluvat.
-  Kaikkien asennus-, säätö- tai huoltotöiden jälkeen kaikki kiinnitysruuvit ja mutterit on tarkistettava ja kiristettävä.
-  Nosta aina alustasta - älä koskaan istuinyksiköstä.
-  Älä koskaan tee säätöjä tuotteen ollessa käytössä.
-  Älä aja löysät vaatteet, kuten huivi, päällä. Ota huomioon tukehtumisvaara.
-  Ohjeet on säilytettävä valituksen varalta.
-  Varo, että sormesi eivät jää renkaiden alle ajon aikana.
-  Ole varovainen ajaessasi luonnonjäällä, jonka paksuus voi vaihdella.
-  Ennen käyttöä tuote on tarkistettava ja mahdolliset viat korjattava. Vain Anatomic Sittin alkuperäisiä osia saa käyttää.
-  Huomaa, että luistelukengät ovat terävät ja voivat vahingoittaa kuljetuksen ja käsittelyn aikana.
-  Jos matkustat luonnollisella jäällä, älä kiinnitä itseäsi kelkkaan tai istuimeen ja ota riski, että putoat jään läpi.



Mukana on oltava vähintään kaksi henkilöä, ja ota aina mukaan turvavarusteet siltä varalta, että putoat jään läpi.



Älä nosta kelkkaa henkilön ollessa istuimella



Älä seiso ulkonevien takarungon putkien päällä.

Käyttötarkoitus

Tuote on 7-100 - vuotiaille tarkoitettu vapaa-ajan apuväline.

Kuorman enimmäispaino on 110 kg.

Ajotekniikka

- - Käytä aina asianmukaisia sauvoja ajaessasi itse.
- Pyri löytämään hyvä sauvatekniikka ja tasapaino niin, että jalkaterän kannatin ei osu tarpeettomasti maahan.
- Zliderissä ei ole sisäänrakennettua jarrua, mutta sauvoja voidaan käyttää kelkan jarruttamiseen ja kääntämiseen.
- Tuotetta voi ajaa toinen henkilö ajojousen avulla.

Kokoonpano- ja säätöohjeet

Asennuksen on aina oltava aikuisen suorittama näiden ohjeiden mukaisesti.

Istuimen kokoaminen

Istuimen kokoaminen



Aktiiviluistimen istuin asennetaan neljällä ruuviliitoksella (A).

Istuimen kiinnityslevyssä on viisi eri kiinnityspaikkaa/reikää (B).

Istuinta voidaan myös säätää 7 cm istuinlevyissä olevien urien (C) avulla. Yritä löytää sopiva tasapaino luistelukenkien päälle.

Kiristä ruuvit, kun olet tyytyväinen säätöön.

Istuin voidaan varustaa rungon ympärille kiinnitettävällä hihnalla, joka lisää vakautta.

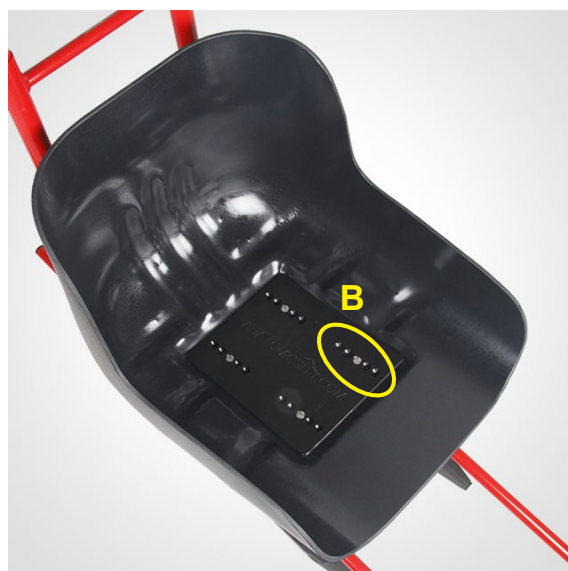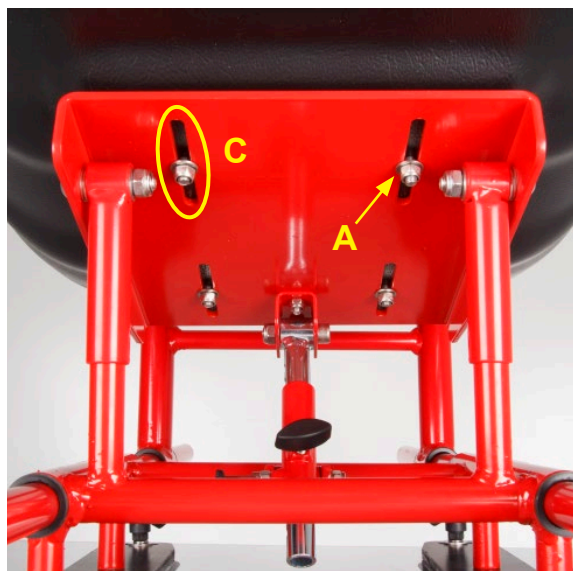


Varmista, ettet ripusta liian painavia tavaroita ohjaustankoon, jolloin keltasta tulee takapainoinen.

Istuimen korkeuden säätö

Istuimen korkeutta voidaan säätää käyttäjän toiveiden mukaan.
Löysää kaksi kuusioruuvia (D) ja nosta/laske istuinlevyä halutulle korkeudelle.
Ruuvaa ruuvit sopivaan reikään.



Säätöä ei saa tehdä käyttäjän ollessa istuimessa.

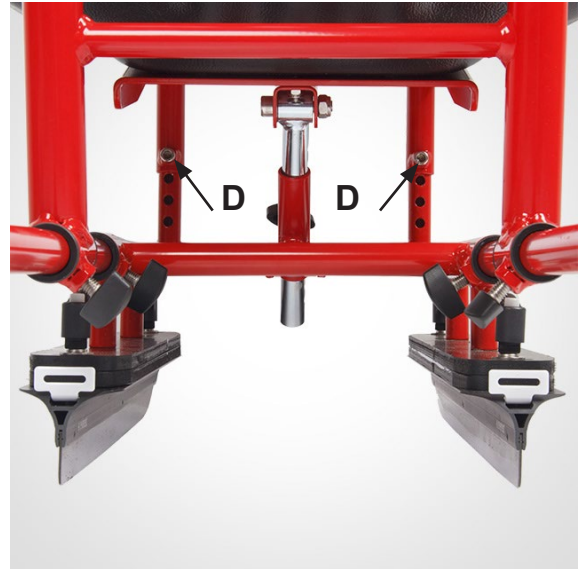

Istuimen kulman säätö / kallistus

Istuinkulmaa voidaan säätää -13° ja $+23^{\circ}$ välillä.
Löysää sorminuppi (E) ja vedä lukitustappi (F) ulos.
Käännä istuin haluttuun asentoon ja varmista, että lukitustappi sopii yhteen reikään. Kiristä sorminuppi (E).



Säätöä ei saa tehdä käyttäjän ollessa istuimessa.



Jalkalauta

Säätö

Kun haluat säätää istuimen ja jalkalaudan välistä pituutta, löysää sorminuppia (A) ja liu'uta istuinosa halutulle etäisyydelle jalkalevystä. Kiristä nuppi.

Jalkalaudan asennus


Paina jalkalauta runkoputkeen ja asenna ruuviliitokset (B).

Jalkahihnan asentaminen

Jalkahihna voidaan pujottaa aukkojen (C) läpi ja pingottaa jalkojen päälle.



Jos istuimen ja jalkalevyn välinen etäisyys on lyhyt, ulkonevia takarungon putkia voidaan lyhentää. Jätä kuitenkin vähintään 10 cm rungon taakse.

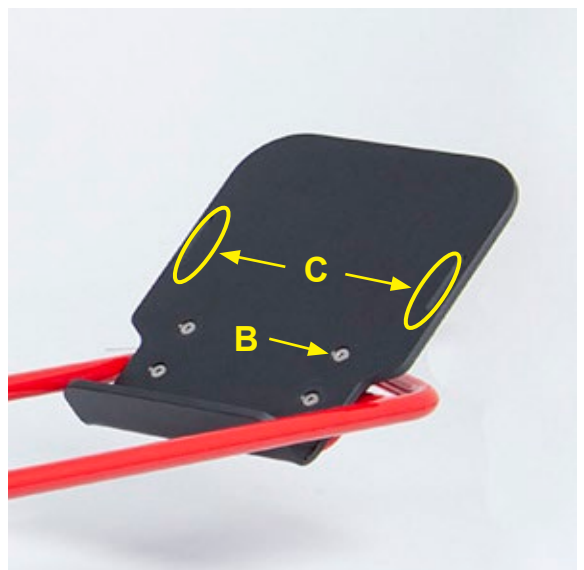

Vuoripehmuste

Vakiovarusteena istuimessa on aina kaksi vuori pehmustetta, mutta istuinta voidaan käyttää tarpeen mukaan yhdellä tai kahdella vuorella.



Lisävuori

Painetta keventävä verkkovuori, joka voidaan sijoittaa vartalon viereen tai istuinvuoren alle mieltymyksestä riippuen.



Työntökahva

Asennus


Alustan runko työnnetään istuinyksikön takana oleviin runkoputkiin. Liu'uta runko kohti istuinta ja kiristä kaksi sormiliitosta (A).

Korkeuden säätö

Löysää kaksi sormilukkoa (B).
Säädä kahvat halutulle korkeudelle.
Kiristä sitten sormilukot.



Työnkahvan yläreunan on laskeuduttava putkeen vähintään 5 cm sormikahvan (B) alapuolelle.

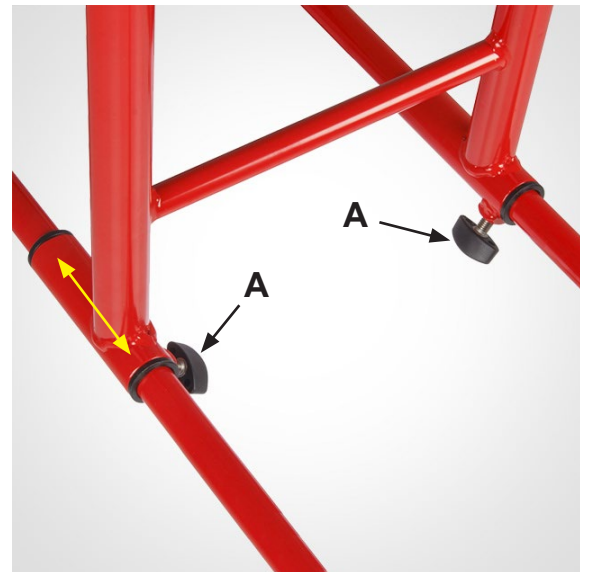

Luistelukengät

Asennus

Sovitin koostuu kahdesta levystä ja ruuvisarjasta runkoon ja luistinkiskoon kiinnittämistä varten. Asenna alempi sovitinlevy kahdella ruuvilla (C) vastaavaan luistinkiskoon. Asenna ylempi sovitinlevy ruuveilla (D) kierteitettyissä putkissa. Kokoa sitten sovitinlevyt aluslevyllä (F), jousialuslevyllä (G) ja vipunupilla (H).

Ylemmässä sovitinlevyssä on sivusuunnassa kolme reikäsarjaa (E) kapeampaa tai leveämpää kiinnitystä varten. Valitse asento käyttäjän mukaan ja ota huomioon tasapainopiste.



Muista asentaa levy samaan asentoon, jotta kisko ei ole vinossa.



Tarkista ennen käyttöä, että luistelukengien kiskot on asennettu oikein.



Adapteri

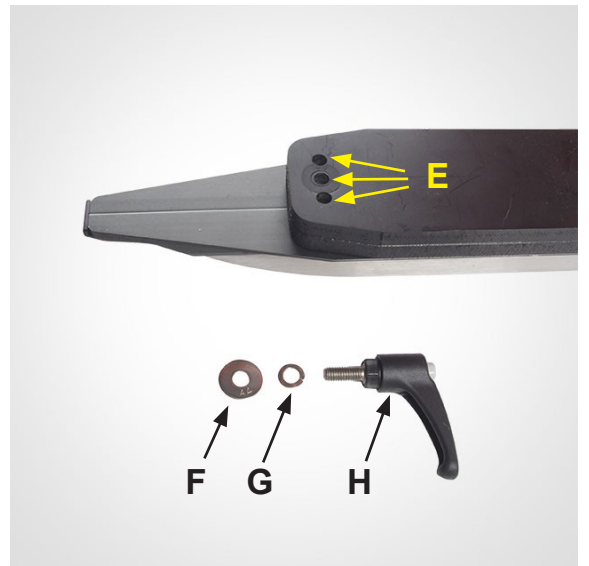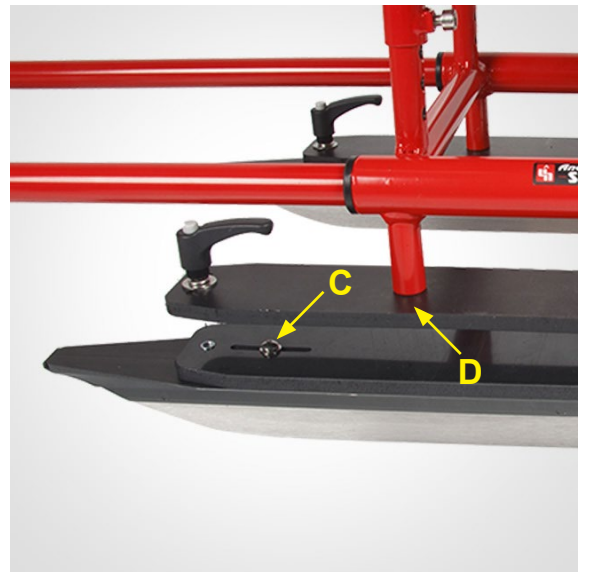

Sukset

Kokoonpano

Adapteri koostuu kahdesta levystä ja ruuvisarjasta runkoon kiinnittämistä varten.

Suksien luonteesta riippuen on käytettävä suksien toimittajan ohjeita ja ruuveja. Ruuvit on valittava siten, että sovitinlevyn paksuus on 10 mm.

Mittaa ja poraa ruuvinreiät (A) sukseen sen mukaan, mihin kohtaan suksen tasapaino halutaan. Asenna alempi sovitinlevy kahdella ruuvilla (B) kumpaankin sukseen.

Asenna ylempi sovitinlevy ruuveilla C) kierteitetuille putkille.


Kokoa sitten sovitinlevyt aluslevyllä (E), jousialuslevyllä (F) ja vipunupilla (G).

Ylemmässä sovitinlevyssä on kolme reikäsarjaa (D), jotka sijaitsevat 1 cm:n välein sivusuunnassa kapeampaa tai leveämpää asennusta varten. Näin saadaan aikaan eri raideleveydet hiihtoradalle 21-25 cm.

Muista asentaa levy samaan reikäpariin, jotta sukksi ei ole vinossa.



Adapterit

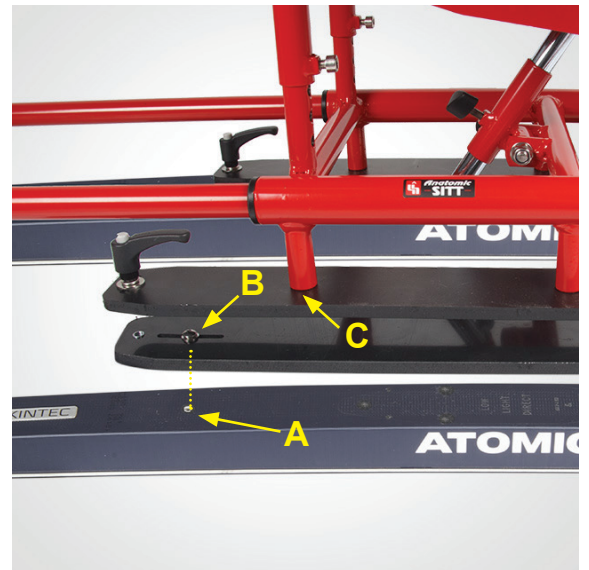

Yhteenveto ja jälkitarkastus

Kun kokoonpano ja/tai säätö on suoritettu, tarkista, että tuotteet (päätuote ja lisävarusteet) ovat kunnossa.

(päätuote ja lisävarusteet) on koottu oikein käyttöohjeen mukaisesti ja ne toimivat tarkoitetulla tavalla.

Tarkista tuotteen ja sen lisävarusteiden asetukset niin, että käyttäjällä on oikea istuma-asento.

Tarkista ja kiristä kaikki nupit, kiinnitysruuvit ja mutterit kaikkien kokoonpano-, säätö- tai huoltotöiden jälkeen.

Jos puutteita havaitaan, älä käytä tuotetta. Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään korjausta varten.

Huolto- ja hoito-ohjeet

Tarkastus ennen käyttöä

Jotta tuote toimisi turvallisesti ja varmasti, on tarkastaminen ja puhdistaminen välttämätöntä.

Tarkastus ja tarkastus on suoritettava ennen jokaista käyttökertaa alla olevien kohtien mukaisesti:

- - Tarkista tuote ja sen lisävarusteet löystyneiden osien, kulumisen ja vaurioiden varalta.
Tarkista erityisesti ruuvit, mutterit ja nupit.
 - Tarkista, että istuin on kiinnitetty kunnolla alustaan.
 - Tarkista tuotteen vakaus.
 - Tarkista tuotteen liikuteltavat toiminnot, kuten istuintyylin liikkuvuus ja lukitus.
 - Tarkista mahdollisten vöiden kulumisen, toiminta ja kiinnitys.

Jos havaitset vikoja, älä käytä tuotetta.

Ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään toimenpiteitä varten.

Hoito- ja pesuneuvoja

Poista vuori käytön jälkeen, jotta se voi kuivua. Pese muovi sienellä tai pehmeällä harjalla. Voit tarvittaessa käyttää mietoa pesu- tai desinfiointiainetta.

Vuori

Suosittelemme käsinpesua (max 60°), jos vuori ei ole liian likainen, sillä se pidentää vuoren käyttöikää. Tämän jälkeen voit käyttää pehmeää sieniä.

Vuoraukset on kuivattava huoneenlämmössä tai kuivauskaapissa alhaisessa lämpötilassa, eikä niitä saa asettaa suoraan lämmönlähdettä vasten. Niitä ei saa kuivata kuivausrummussa, koska ne voivat menettää muotonsa.

Noudata Anatomic Sitt AB:n lantiovöiden ja lisävuorien osalta ommellun pesuohjeen suosituksia, ks. symbolin selitys alla.

Pesusymbolit



Käsinpesu



Ei rumpukuivausta



Konepesu 60°C



Ei silitystä



Ei kloorivalkaisua



Ei kuivapesua

Jätehuolto

Käytetty osa tai tuote puretaan ja romutetaan.

Osat on lajiteltava materiaalityypeittäin ja vietävä paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Takuu

Takuu ja reklamaatiot

Takuu on yleensä yksi (1) vuosi valmistusvirheiden varalta toimituspäivästä tai sopimuksen mukaan. Takuuta ei myönnetä ulkoisten vaikutusten tai epänormaalien käsittelyjen varalta. Takuukäsittelyä varten viallinen tuote on palautettava. Liitä aina mukaan lähetysluettelo.

Jotta reklamaatio voidaan arvioida parhaiten, tuotteen on oltava kuiva ja puhdas, kun se palautetaan.

Kuvaa vika ja sen syy mahdollisimman perusteellisesti. Vaadi takuukorjausta tai mahdollista takuuvaihtoa. Liitä mukaan kopio laskusta ja ilmoita, että tuote palautetaan sinulle korjauksen jälkeen. Ilmoita toimitusosoite, yhteyshenkilö ja puhelinnumero. Reklamaatiolomake on saatavilla verkkosivuillamme.

Pakkaa kuiva ja puhdas tuote hyvin, jotta se on suojattu mahdollisilta iskuilta kuljetuksen aikana. Älä unohda merkitä lähetysnumeroa tai vastaavaa asiakirjoihin. Näin voit seurata lähetystä, jos jotain tapahtuu kuljetuksen aikana.

Tarkastus

Luettelo tarkastuksista

Tähän käsikirjan versioon on tehty seuraavat muutokset:

Sukset lisätty sivulle 12

Luettelo tarkastuksista
Rev. 1 - 2021-12-13

SE

Anatomic Sitt AB (valmistaja)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Katuosoite

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

