

Käyttöohje Istuin





VAROITUS : ISTUIMESTA PUTOAMINEN TAI LIUKUMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN

LASTA EI SAA MILLOINKAAN JÄTTÄÄ ILMAN VALVONTAA ISTUIMEEN.

NÄKÖYHTEYS LAPSEEN TULEE AINA SÄILYTTÄÄ.

TÄRKEÄÄ : SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

LAPSEN TURVALLISUUS ON SINUN VASTUULLASI.

ISTUINVÖITÄ TULEE AINA KÄYTTÄÄ.

KIRISTÄ HIIHNAT SOPIVAN TIUKALLE.

PYÖRÄT TULEE AINA LUKITA, KUN ISTUIMEN KULJETUSALUSTAA EI LIIKUTETA.

ESTÄ VAKAVA LOUKKAANTUMINEN TA KUOLEMA - ÄLÄ KÄYTÄ

MOOTTORIAJONAUVOISSA.

OSAT

- 1 istuin pulttikiinnitteisellä kiinnityshihnalla
- 1 rintavyö
- 1 haaravyö
- 1 lantiovyö
- 1 lisäkiinnitysvyö

yleiskiinnitysvyöt



5 TAPAA KÄYTTÄÄ SPECIAL TOMATO - ISTUINTA

*käytä yleiskiinnitysvyötä istuimen kiinnittämiseksi seuraaviin käyttötapoihin :



Tuolissa



Liikkumaton alusta



Liikkuva alusta




Lattiaistuin



Rattaissa

ISTUINVÖIDEN ASENNUS JA KIINNITYS

Vöiden rakenne

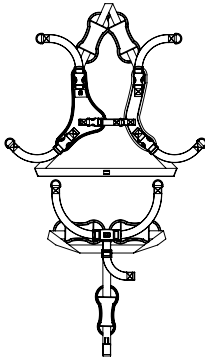

Vyöt asennettuina



Rintavyöt
5-pistevyö

3-piste lantiovyö
Vyötärö- ja haaravyöt

Kiinnityshihna
tuoliin
yms.kiinnittämiseksi.



LANTIOVYÖN ASENTAMINEN




Vaihe 1
Haaravyö ylös pohjan keskellä olevan aukon läpi.



Vaihe 2
Oikeanpuoleinen hihna ylös oikeanpuoleisen aukon läpi.



Vaihe 3
Vasen hihna ylös vasemman aukon läpi

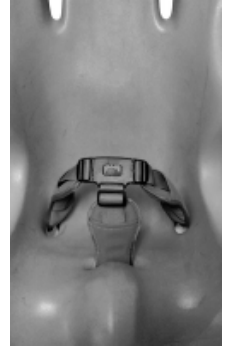

Vaihe 4
Solkikiinnitys.

RINTAVYÖN ASENTAMINEN



Vaihe 1
Avaa oikeanpuoleisen rintavyön solki ja vie hihnan vasemman yläaukon läpi.



Vaihe 2
Vedä hihna selkänöjan poikki ja ulos oikeanpuoleisesta yläaukosta.



Vaihe 3
Kiinnitä rintavyön oikeanpuoleinen olkahihna.



Vaihe 4
Avaa oikeanpuoleinen vaakahihna ja vie se vasemmanpuoleisen keskiaukon läpi.



Vaihe 5
Pujota hihna alas haara-aukon läpi ja ylös oikeanpuoleisesta aukosta.



Vaihe 6
Kiinnitä rintavyön uudelleen vyön oikeanpuoleiseen alaosaan.




Vaihe 1
Vie hihna alas vasemman keskiaukon läpi.




Vaihe 2
Vie hihna istuimen ali ja ylös oikeanpuoleisesta keskiaukosta.

KIINNITYSHIHNAT JA KÄYTTÖTAVAT


Kiinnitys tuoliin

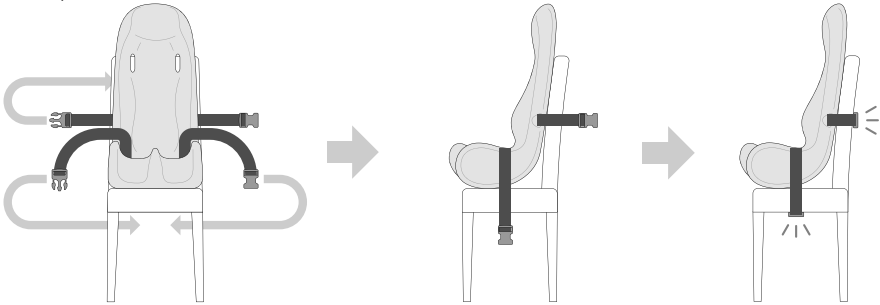


Kiinnitys puiseen Special Tomato - alustaan

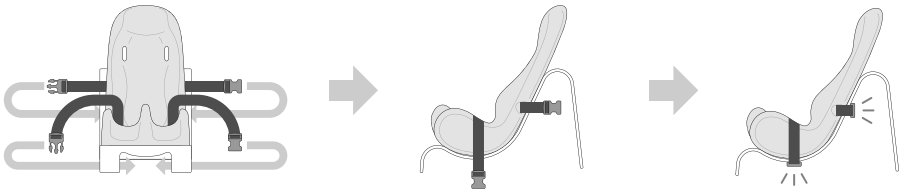

Kiinnitys Special Tomato - lattia-alustaan

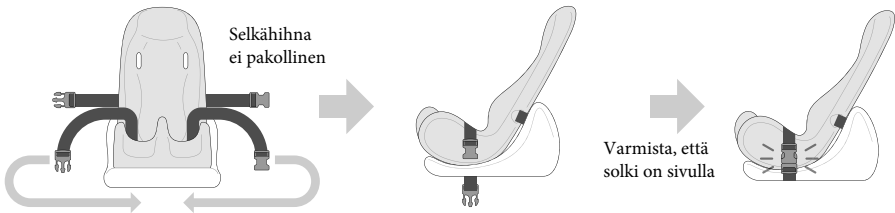

Kiinnitys Special Tomato - rattaisiin

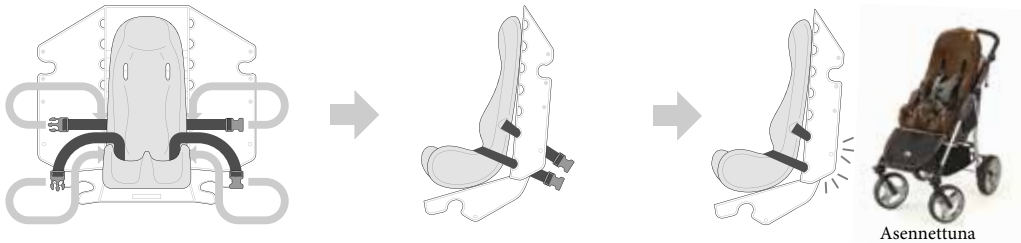

ISTUINVÖIDEN SOVITUS

Oikea säätötekniikka



Käytä olkasuojuksia estämään muovisolkia hankaamasta lapsen kaulaa ja kasvoja.

Rintavyön oikean sijoituksen varmistamiseksi tulee varmistaa, että rintavyö on rintakehän keskellä (nännien tasolla).

Lantiovyössä on lukko, joka estää vyön löystymisen lantion oikean asentotuen säilyttäen.

Lantiovyössä on yksi pika-avauspainike, joka avaa vyön molemmilta puolin lapsen siirtämistä nopeuttaen ja helpottaen.

Säädä haaravyön pituus sellaiseksi, että lantiovyö kulkee lantion päältä. Tämä estää lantiovyön kulkemisen alavatsan päältä.



Lantiovyössä on lukko, jonka avulla se pysyy halutun pituisena. Kasvun myötä lukon sijaintia hihnassa voidaan säätää.

25 °:N KALLISTUS

Kaikkia alustoja voidaan kallistaa 25°



Vaihe 1
Avaa kiinnityshihnat.

Vaihe 2
Säädä kallistus halutunlaiseksi.

Vaihe 3
Kiinnitä hihnat uudelleen.

5 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Special Tomato takaa Soft-Touch Sitter -tuotteen alkuperäiselle vähittäisostajalle, että jos jossakin osassa tai komponentissa ilmenee materiaali- tai valmistusvirhe viiden vuoden kuluessa ostopäivästä, viallinen osa korjataan tai vaihdetaan (Special Tomaton harkinnan mukaan) veloituksetta. Takuuhuolto voidaan suorittaa valtuutetussa huollossa tai Special Tomaton harkinnan mukana tehtaalla.

Tämä takuu ei kata normaalia kulumista eikä onnettomuuden tai väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja.

Tämän rajoitetun takuun käyttämiseksi käyttäjän on ensin hankittava Special Tomatolta palautuslupanumero.

Tuote on toimitettava tehtaalle tai valtuutettuun huoltoon ennakoon maksettuna (UPS suositeltava) yhdessä alkuperäisen laskun, palautusvaltuutusnumeron ja kirjallisen ongelmakuvauksen kanssa.

KUNNOSSAPITO & HOITO

Special Tomato -tuotteet ovat nesteitä läpäisemättömiä, mutta niitä ei tule upottaa veteen. Pyyhi tuoli säännöllisesti miedolla pesu-/puhdistusaineella.

Tarraliuskojen käyttöikä voidaan pidentää kampaamalla koukkuosa (kova puoli) nukan ja muiden roskien poistamiseksi

ISTUINVÖIDEN HOITO

Laita istuinvöyt pesupussiin ja pese koneessa kylmällä vedellä, sitten ilmaukuvaus.

ASIAKASPALVELU

Ota yhteyttä suoraan jälleenmyyjään tai valtuutettuun edustajaan Euroopassa.

HUOMAUTUS

Käytä Special Tomato -tuotteissa ainoastaan Special Tomato -lisävarusteita ja osia. Special Tomato -osat eivät ole yhteensopivia muiden valmistajien tuotteiden kanssa.

Kuluneet osat on turvallisuussyistä vaihdettava välittömästi.



IMPORTANT- WARRANTY WILL BE VOID IF DEFACED OR REMOVED

Istumella on valmistusvirheitä koskeva takuu 5 vuoden ajan ostopäivästä normaalissa käytössä edellyttäen, että sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä jälleenmyyjää ja on voimassa vain, kun se osoitetaan ostotodistuksella. Säilytä tämä rajoitetun takuun osoittava ostotodistus.

HUOMIO, TAKUU EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI :

- Vika johtuu väärinkäytöstä tai puutteellisesta huollosta.
- Korjauksia on tehnyt kolmas osapuoli.
- Istuin on viallinen jokapäiväisen käytön aiheuttaman kulumisen johdosta.
- Istuin on vaurioitunut onnettomuuden johdosta.
- Valmistaja ei hyväksy selvitystä takuehtojen noudattamisesta.

TÄRKEÄÄ - TAKUU MITÄTÖITYY, JOS MERKINTÄÄ TURMELLAAN TAI SE POISTETAAN



MANUFACTURED BY
BERGERON HEALTH CARE
15 SOUTH SECOND STREET
DOLGEVILLE, NY 13329

PRODUCT CODE:

PRODUCT DESCRIPTION:

COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

**AUTHORISED
EUROPEAN
REPRESENTATIVE**

GLOBAL CAREHAB
ROSENWANGS ALLE 32
8260 VIBY J
DENMARK

TELEPHONE: +45 24 65 55 50
WEB SITE: www.globalcarehab.com



DATE OF MANUFACTURE:

Bergeron By Design
15 South Second Street
Dolgeville, New York 13329
T 1 315 429 8407
F 1 315 429 8862



© 2009 Bergeron By Design
Tässä esitetyt tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Bergeron By Design ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen teknisistä virheistä tai puutteista