

JAKELUKETJUN TOIMIJA / TUNNISTUSKAAVIO

 PATRON Bohemia a.s. Českolipská 3419, Mělník, CZ (www.patron.eu)	Tuotteen tunnustekilpi:
Valmistaja—tuotteen lopputarkastus / nimi:	
Allekirjoitus:	

<u>Maahantuoja / EU-jakelija:</u> <u>(nimi, osoite, yhteystiedot)</u>	Maahantuoja / EU-jakelija (leima):

<u>Myyntipaikka / Huoltoedustus:</u> <u>(nimi, osoite, yhteystiedot)</u>	Myyntipaikka / Huoltoedustus (leima):
 Rehaco Oy Haaranvuontie 6 A 7, 90240 Oulu 040 705 5886 info@rehaco.fi	

Myyntipäivä (pv, kk, v):	Myyjän nimi (painokirjaimin), puhelinno, leima ja allekirjoitus:
____ . ____ . ____	




KÄYTTÖOHJE (Fi)
 => lääkinällinen laite: kuntoutusrattaat (lastenrattaat)

CORZO
 (ver. Xcountry / koot: 30, 34, 38, 42)



Valmistus ja jakelu:
 PATRON Bohemia a.s.
 Českolipská 3419, CZ- 27601 Mělník, Česká Republika
 tel.: +420-315 630 111
 http:// www.patron.eu


KAAPAKUVA

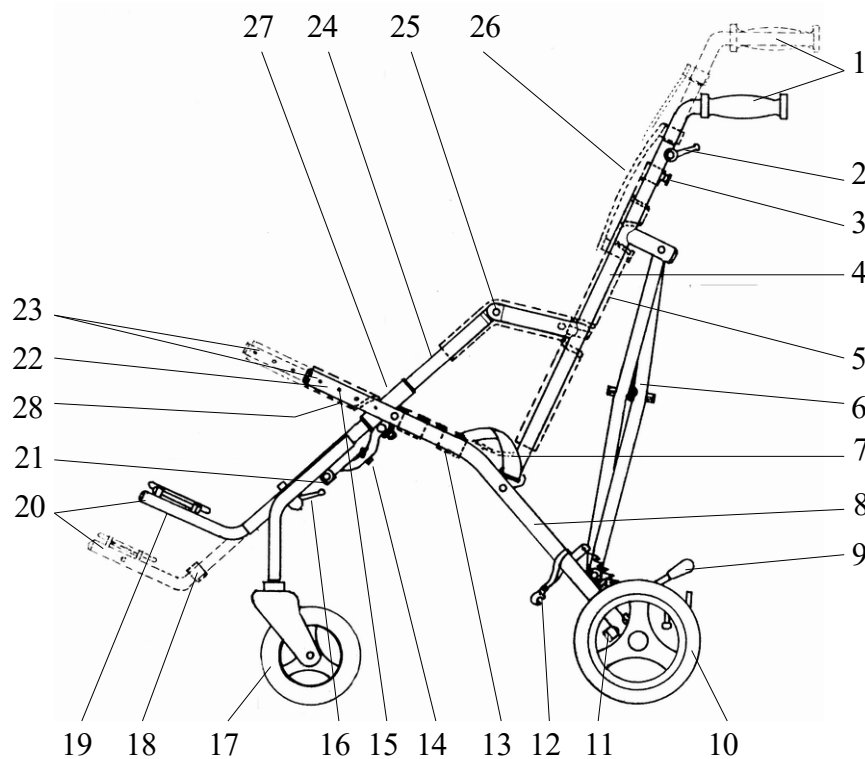

TEKNISEET TIEDOT

Tekninen tieto:	CRX30	CRX34	CRX38	CRX42
Selkänojan korkeus (mm)	550-650	580-690	660-930	660-930
Istuimen syvyys (mm)	280-340	290-350	320-390	330-400
Istuimen leveys (mm)	300	340	380	420
Istuimesta jalkatukeen (mm)	310-440	320-460	290-450	350-520
Selkänojan kulma	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Istuinkulma	20°	25°	25°	21°
Kokonaispituus (mm)	960	1010	980	1050
Kokonaisleveys (mm)	520	570	620	650
Kokonaiskorkeus sis. kahvan (mm)	1010/1000- 1110	1070/960- 1040	1170/920	1170/920
Kokonaispaino (kg)	12,7	13,0	14,0	14,7
Maksimikuormitus (kg)	45,0	55,0	75,0	75,0
Pituus kokoonlaitettuna (mm)	1140	1160	1180	1260
Leveys kokoonlaitettuna (mm)	320	310	320	370
Korkeus kokoonlaitettuna (mm)	340	360	330	320


MERKINTÖJÄ :

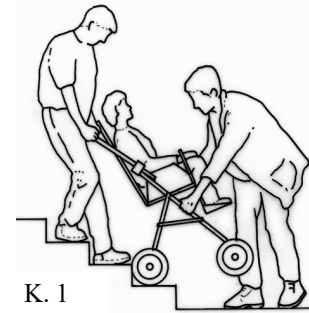

K. 1



K. 2

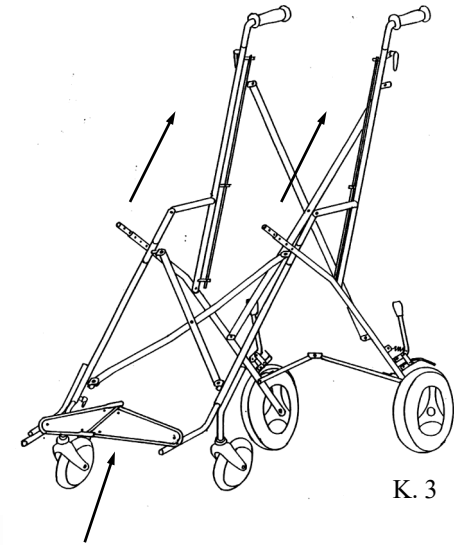

K. 3

KAAVION SELITYS

- 1 Kahva
- 2 Kahvan säätövipu
- 3 Kahvan säädön varmistussokka
- 4 Selkänojan runko
- 5 Selkänoja
- 6 Ristikkotuki
- 7 Turvavyö
- 8 Istuinkehikko
- 9 Pysäköintijarru
- 10 Takapyörä
- 11 Takapoikittaistanko
- 12 Kuljetuslukitus
- 13 Istuinvahvike
- 14 Istuimen poikittaistanko
- 15 Istuimen varminstussokka
- 16 Jalkatuen säätövipu
- 17 Etupyörä
- 18 Pohjetuki

- 19 Jalkatuen pohja
- 20 Jalkatuki
- 21 Pidätyslaitteen jousi
- 22 Istuin
- 23 Istuimen pidennyssäätö
- 24 Sivurunko
- 25 Sivurungon suoju
- 26 Selkänojan pidennys
- 27 Runko
- 28 Istuinvahvistusklipsi

JOHDANTO:

Hyvä asiakas, lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Noudata kaikkia tässä asiakirjassa annettuja turvallisuusohjeita. Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta ja sen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä ammattihenkilökuntaan tai huoltoon. Ilmoita tuotteeseen liittyvästä vakavasta haittatapahtumasta tai tuotteen käyttöön liittyvästä käyttäjän terveydentilan heikkenemisestä välittömästi tuotteen viralliselle jälleenmyyjälle maassasi tai tuotteen valmistajalle. Tämän tuotteen viimeisimmät turvallisuus- ja/tai takaisinvetotiedot sekä tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat saatavissa ottamalla yhteyttä tuotteen viralliseen jälleenmyyjään maassasi tai tuotteen valmistajaan. Säilytä tämä asiakirja turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.



..... **VAROITUS, HUOMIO:**

- ① **HUOMIO! Kahvaan ripustettu kuorma (laukku, ...) vaikuttaa rattaiden vakauteen!**
- ② **Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa!**
- ③ **Suosittelun rengaspaine: 180 kPa**



.....maksimikuormitus.

VAROITUS! Sormet ja suojus on pidettävä erillään liikkuvista osista rattaita käytettäessä.

VAROITUS! Lasta ei milloinkaan saa jättää ilman valvontaa, vaikka käytettäisiin vöitä ja jarruja.

VAROITUS! Ennen käyttöä tulee varmistaa, että kaikki lukitukset ja turvalaitteet ovat toiminnassa.

VAROITUS! Tarkasta ennen käyttöä, että istuin on tukevasti lukittunut runkoon.

VAROITUS! Istuin ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.

VAROITUS! Tätä tuotetta ei tule käyttää lenkkeillessä eikä luisteluradalla.

HUOMIO! Tämä käyttöohje tulee lukea huolellisesti ennen rattaiden ensimmäistä käyttökertaa ja säilyttää myöhempää tarvetta varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, mikäli käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja turvahuomautuksia ei noudateta.

TUOTE - KUVAUS, OMINAISUUDET, TUNNISTAMINEN:

Hankkimanne tuote on tarkoitettu monipuoliseen jokapäiväiseen käyttöön ulkosalla sekä sisätiloissa kotona. Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa tulee loukkaantumisvaaran välttämiseksi huolellisesti tutustua sen käyttöön, käsittelyyn ja kaikkien ominaisuuksien toimintaan. Erityisesti tulee huomioida seuraavat ohjeet:

- Pätevän henkilöstön tulee opastaa kaikki käyttäjät ja heidän avustajansa tuotteen käyttöön. Käyttäjien ja/tai avustajien velvollisuutena on lukea ja saada opastus etenkin tähän tuotteeseen liittyvistä erityisistä riskeistä, joita käsitellään tähän asiakirjaan sisältyvissä turvaohjeissa.
- Tuote on säädetty käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. Lisämuutokset kuuluvat ainoastaan pätevän henkilöstön tehtäväksi.
- Suosittelemme tuotteen kustomoinnin tarkistamista kerran vuodessa tuotteen käyttäjälle optimaalisten säätöjen varmistamiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa anatomia muuttuu (esim. vartalon mitat ja paino), jolloin säätämistä suositellaan puolivuositain.

- Varmista, että olet perehtynyt rattaiden toimintaan. Niiden tulisi aina avautua ja taittua kokoon vaivatta. Mikäli näin ei ole, älä pakota mekanismia – pysähdy ja lue ohjeet.
- Pyörät, muovi- ja metalliosat voidaan pyyhkiä pyhtaaksi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Istuinkangas voidaan pestä käsin (max. 30 °C).
- Älä käytä hankaavia, ammoniakkipohjaisia, valkaisevia tai alkoholityyppisiä puhdistusaineita.
- Kosteille olosuhteille altistumisen jälkeen rattaat tulee pyyhkiä kuivaksi pehmeällä liinalla ja jättää kokonaan avattuna lämpimään.
- Säilytä rattaat kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Tarkista ja kiristä ruuviliitokset säännöllisesti.
- Mikäli rattaissa on käyttövajereita (jarrut, teleskoopit, kallistus), ne tulee tarkastaa säännöllisesti ja tarvittaessa säätää ja voidella.

Tuotteen toimintaikä: odotettavissa oleva toimintaikä on 5 vuotta. Tuotteen odotettavissa olevaa toimintaikää käytettiin pohjana tuotekehitykselle ja tuotteen käyttöä tiettyyn tarkoitukseen koskevien vaatimusten määrittelylle. Näihin tietoihin sisältyvät myös kunnossapitoa koskevat vaatimukset tuotteelta vaaditun tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hävittämisohjeet: tuotteen hävittämisessä on noudatettava käyttömaan paikallisesti voimassa olevia ympäristönsuojelusäädöksiä.

TAKUUEHDOT:

1. Tähän tuotteeseen sovelletaan 24 kuukauden takuuta myyntipäivästä lukien. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä.
2. Tuotetta on käytettävä ainoastaan suunniteltuun käyttötarkoitukseen käyttöohjeessa annettuja ohjeita noudattaen.
3. Tuotetta on käytettävä, pidettävä kunnossa, puhdistettava ja säilytettävä asianmukaisesti käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Tunnistuskilpeä ei saa vetää irti. Sen on oltava luettavissa ja vahingoittumaton koko takuuajan.
5. Takuuvaatimus tulee esittää myyjälle, jolta tuote on ostettu. Asianmukaisesti täytetty “takuukaavake” ja ostotodistus on liitettävä takuuhakemukseen. Vioista tulee ilmoittaa välittömästi.
6. Takuuvaatimusmenettely voidaan käynnistää, kun tuote on lähetetty täydellisenä alkuperäisessä pakkauksessa huolellisesti pakattuna ja vaurioilta suojattuna. Omistaja on velvollinen toimittamaan tuotteen puhtaana yleisten hygieniatoimenpiteiden mukaisesti. Perushuoltoa ja puhdistusta ei voida vaatia takuuvaatimuksen yhteydessä.
7. Takuu ei kata: vikoja, jotka aiheutuvat tuotteiden ylikuormittamisesta, onnettomuudesta, tahallisesta vaurioittamisesta, tuotteeseen ja/tai sen lisävarusteisiin ilman valtuutusta tehdyistä muutoksista, osien kulumisesta, etenkin verhoiluun likaantumisesta ja vaurioitumisesta, muoviosien, renkaan kulutuspinnan kulumisesta, renkaan puhkeamisesta jne.
8. Takuu lakkaa olemasta voimassa, mikäli jokin seuraavista ehdoista täyttyy: käyttäjä jättää noudattamatta tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja valmistajan ehdottamia säilytys- ja kunnossapitotoimenpiteitä, tai mikäli tuotetta on huoltanut muu kuin valtuutetut huoltokeskukset, tai kun tunnistuskilpi ei ole paikallaan rattaissa sekä takuukaavakkeessa.
9. Takuuaikaa ei voi vaihtaa käyttöaikaan, eli käyttöikään, vaikka tuotetta olisi käytetty oikein ja huollettu käyttöohjeen mukaisesti.
10. Valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa mahdollisista tappioista ja vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen manipuloinnista ja käytöstä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesti.

Valmistaja, PATRON Bohemia a.s., varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin.

MERKINTÖJÄ:

- Nimenomainen tuotteenne saattaa poiketa tässä esitetyistä vaihtoehdoista. Etenkin kaikkia tässä kuvattuja lisävarusteita ei välttämättä ole asennettu tuotteeseen.
- Valmistaja varaa oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tässä käyttöohjeessa kuvattuun rakenteeseen.

Tuotteen ominaisuudet:

Tämä tuote luokitellaan luokan 1 ei-invasiiviseksi hoitolaitteeksi. Tuote on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. Tuotetta hallitsee avustava henkilö ja sitä käytetään lasten kuljettamiseen toisen henkilön avustamana. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kiinteällä pinnalla sisä- ja ulkotiloissa. Tuotetta käyttävät lapset, joilla on tilapäisesti tai pysyvästi rajoittunut kävelykyky, jotka eivät pysty kävelemään tai seisomaan. Tuote sopii käyttäjille, joiden anatomia (esim. kehon mitat ja paino) mahdollistaa tuotteen käytön tiettyyn tarkoitukseen ja joiden iho on ehjä. Tuotetta saa käyttää vain tilauslomakkeessa mainittujen lisävarusteiden kanssa. Tämän tuotteen valmistaja ei ole vastuussa yhdistelmistä muiden valmistajien lääkinnällisten laitteiden ja/tai lisävarusteiden kanssa. Vain tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta arvioidut tuoteyhdistelmät ovat sallittuja. Tämä tuotteen ja lisävarusteen yhdistelmä on sallittava ja mainittava tuoteyhdistelmäsopimuksessa. Käyttöaiheet: käyttäjän liikuntarajoite, joka on asteeltaan lievistä vaikeaan tai täydellinen. Vasta-aiheet: ehdottomia vasta-aiheita ei ole tiedossa. Suhteelliset vasta-aiheet – fyysisten tai henkisten edellytysten puuttuminen, pintakudoksen (esim. iho yms.) huomattava pintavaurio. Liitännäisilmiöt: seuraavia liitännäisilmiöitä voi poikkeustapauksissa ilmetä tuotetta käytettäessä – kipu niskalihaksissa, lihas- ja nivelkipu, verenkiertohäiriöt, painehaavojen riski. Tällaisten liitännäisilmiöiden tai ongelmien tapauksessa tulee kääntyä lääkäriin tai terapeutin puoleen.

Tuotteen tunnistaminen:

Tuotekilvissä olevat tiedot:

	Kauppanimikkeiden maailmanlaajuinen yksilöintinumero. GS1-standardin mukainen = UDI-DI – Unique Device Identifier - Device Identifier.
	Sarjanumero. GS1-standardin mukainen = UDI-PI – Yksilöllinen laitetunniste - Tuotetunniste.
	Valmistajan tunniste – tuoteversio
Mod.:	Tuoteversio / teksti
Spec.:	Tuoteversio / väriversio
	Valmistaja – osoite

Valmistuspäivä: sarjanumeroon sisältyy (ensimmäiset 3 numeroa) valmistuspäivämäärä („253“ = 253 kuukautta 01.01.2000 jälkeen = Tammikuu 2021).

TURVALLISUUS JA SUOJAUS:

- Avustajan tulee olla perehtynyt tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin.
- Ennen käyttöä on kysyttävä ammatillista lääkärin neuvoa tämän tuotteen sopivuudesta.
- Aina ennen liikkeelle lähtöä on varmistettava, että lapsi istuu mukavasti ja että vaatteet, peitot, yms. eivät riipu irrallaan siten, että ne voivat tarttua pyöriin.
- Varmista ennen säätöjen tekemistä loukkaantumisen välttämiseksi, etteivät lapsen ruumiinosat joudu liikkuviin osiin.
- Istuimen ja selkänöjan kallistus- ym. säätöjä tehtäessä on varottava äkillisiä hallitsemattomia liikkeitä.
- Rattaita EI TULE käyttää lapsen istuimena moottoriajoneuvossa tai bussissa matkustettaessa, mikäli ajoneuvo ei ole varustettu tätä varten ja rattaat eivät ole törmäystestattua mallia ISO 7176-19 -standardin tai lisäksi ANSI/RESNA WC-4:2012, kappale 19, liite A:n mukaisesti.
- Älä anna lapsen kiivetä rattaisiin ja niistä pois ilman avustajaa.
- Rattaisiin siirryttäessä ja niistä poistuttaessa tulee pysäköintijarrut aina kytkeä päälle.
- Rattaita ei ole suunniteltu ajettavaksi alas portaita.
- Varmista, että kiinnitysosat, turvatanko ja muut varusteet on asennettu ja säädetty oikein.

- Älä seiso jalkatuen päällä.
- Jarrut on aina kytkettävä päälle rattaiden ollessa paikoillaan.
- Reunakiveyksen ylittämistä tulee harjoitella ensin tyhjiillä ratteilla.
- Avustajan tulee varautua tulipalon riskiin. Rakennusten sisällä tulee selvittää hätäpoistumistiet ja varmistaa, että poistumismenettely tulee ymmärretyksi.
- Lasten ei tule antaa leikkiä ratteilla tai roikkua niissä.
- Kuljetuksen aikana tulee huomioida ympäristöä vaarallisten tilanteiden tai törmäysten välttämiseksi.
- Rattaita ei saa ylikuormittaa. Rungon, istuimen, laukun tai korin ylikuormittaminen heikentää rattaiden vakautta.
- Rattaiden käsittelyssä on ehdottomasti vältettävä aiheuttamasta lapsen tai avustajan loukkaantumista.
- Käytä aina ajoluiskia tai hissiä sen ollessa mahdollista.
- Rattaiden nostaminen tulee tehdä kahden henkilön toimesta.
- Rattaita ei milloinkaan saa kuljettaa, mikäli kuljettaminen vaarantaa lapsen turvallisuuden.
- Rattaita yleisellä tiellä käytettäessä on noudatettava liikennesääntöjä.
- Rattaita ei tule käyttää mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Rattaat on suunniteltu vain yhden lapsen kuljettamiseen.
- Ainoastaan tätä tuotetta varten suunniteltuja alkuperäisiä PATRON-lisävarusteita tulee käyttää.
- Rattaita kokoon ja auki taitettaessa tulee huolellisesti seurata käyttöohjetta rakenteelle aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi, jotka voisivat vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Mikäli havaitaan ilmeinen vika, joka rajoittaa tuotteen turvallista käyttöä (esim. rungon vaurio, osan irtoaminen tai muu näkyvä vaurio, halkeamat yms.), on tuotteen käyttö välittömästi lopetettava ja käännyttävä paikallisen jälleenmyyjään tai huoltokeskuksen puoleen.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat muiden kuin yhtiön toimittamien alkuperäisten PATRON-lisävarusteiden käytöstä.
- PATRON-yhtiö ei ole vastuussa vaurioista ja onnettomuuksista, jotka aiheutuvat tämän tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä.

KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUT, KÄYTTÖ:

Rattaiden taittaminen auki – aseta rattaat pyöriin, avaa taittolukitus, tartu kahvasta ja paina vastakkaista istuinputkea päin. Paina voimakkaasti istuinputkien päälle varmistaen, että rattaat ovat kokonaan avautuneet. Lukitse takakiristin jalalla suoraan asentoon. Kierrä käsinojan pehmuste käsinojen päälle. Kiinnitä jalkatuki ja lukitse istuimen kiristin.

Jalkatuki:

Asentaminen – aseta rattaat lattialle jarrut kytkettyinä ja avaa molemmat lukitusvivut. Ota jalkatuki, paina putken yläpäässä olevaa jousipainiketta, vapauta lukitusokka ja vedä molemmat putket vastaaviin kannattimiin, kunnes takimmainen jousipainike lukitsee ne alimpaan asentoonsa. Korkeuden säätäminen – avaa molemmat lukitusvivut, vedä molempia jalkatuen jousipainikkeita ja säädä haluttuun asemaan. Kiristä molemmat lukitusvivut Jalkatuen lukitsemiseksi paikalleen.

Irrottaminen - aseta rattaat lattialle jarrut kytkettyinä. Säädä jalkatuki alimpaan asemaan, paina takimmaisista jousipainikkeita, avaa lukitusokka ja vedä jalkatuen molempia putkia samanaikaisesti.

Istuimen syvyysäättö:

istuimen tulisi tukea reisiä niiden koko pituudelta. Istuimen syvyyden säätämiseksi avata istuimen ja selkänöjan yhdistävä tarraliuska ja rattaita taitetaan osittain kokoon kankaan kireyden löysentämiseksi. Tartu istuinputken päähän, paina istuimen jousipainiketta ja siirrä istuinputkea, kunnes jousipainike menee haluttuun reikään. Toista istuimen toiselle puolelle. Taita rattaat kokonaan auki ja kiinnitä tarraliuska.

Selkänöjan ja kahvojen korkeusäättö:

avaa selkänöjan jatkeen tarrahihnat ja taita rattaita osittain kokoon kankaan kireyden löysentämiseksi. Tartu kahvasta, avaa kahvaan lukitusvipu, vedä kahvan pikalukitusta ja siirrä kahvaa haluttuun kohtaan. Vapauta kahvan pikalukitus kahvaa liikuttamalla. Kiristä kahvaan lukitusvipu. Toista sama toiselle kahvalle ja taita rattaat kokonaan auki. Kiinnitä kaikki selkänöjan jatkeen tarrahihnat.

Jarrut:

Jarru kytketään päälle painamalla jarruvipu molemmilta puolin pääteasentoonsa. Pysäköintijarrun kytkemiseksi pois päältä molempia jarruvipuja vedetään ylös.

Viisipistevyö:

avaa kaikki pikakiinnitykset (haarukkatyypiset), aseta lapsi ratteisiin ja säädä vyöt halutun pituisiksi. Valitse selkänöjassa oleva reikä olkavöiden saamiseksi sopivalle korkeudelle. Reiän tulisi olla olkapäiden yläosan tasalla tai yläpuolella. Olkahihnat tulee kiinnittää selkänöjaan ja selkänöjan jatkeeseen heti sen ollessa mahdollista.

Rattaisiin nouseminen:

varmistaa, että jarrut ovat päällä. Jalkatuki voidaan irrottaa pääsyn helpottamiseksi; mikäli mahdollista, rattaiden selkäpuoli sijoitetaan seinää tai liikkumatonta esinettä vasten (vaihtoehtoisesti toinen henkilö; aseta lapsi

varovasti ratteisiin, kiinnitä turvavyö ja asenna jalkatuki. Lapsen tulee aina tuntea olonsa miellyttäväksi.

Rattaista pois siirtyminen - varmista, että jarrut ovat päällä. Mikäli mahdollista, rattaiden selkäpuoli sijoitetaan seinää tai liikkumatonta esinettä vasten (vaihtoehtoisesti toinen henkilö voi tukea rattaita); avaa turvavyö ja nosta lapsi varovasti pois ratteista.

Reunakiveysten ja matalien esteiden ylittäminen:

Alas – siirrä etupyörät kiveyksen reunalle, pidä tukeva ote kahvoista ja kallista rattaita hieman taaksepäin. Paino takapyörillä pitäen laske rattaat reunakiveykseltä takapyörilleen. Rattaita ei milloinkaan saa kallistaa eteenpäin reunakiveyksellä.

Ylös – nosta takapyörät reunakiveykselle. Tukeva ote kahvoista pitäen kallista rattaita taaksepäin ja aseta takapyörät reunakiveyksen päälle. Sijoita etupyörät reunakiveyksen pohjalle ja nosta ylemmälle tasolle.

– **Rattaiden manuaalinen kuljettaminen:**

– Hyödynnä luiskia ja hissejä, kun niitä on tarjolla

– Portaita tulee mahdollisuuksien mukaan välttää. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tarvitaan ainakin yksi avustaja toimimaan apuna

– Rattaita ei tule yrittää ajaa ylös tai alas portaikkoja, ellei työntäjä avustajineen pysty hallitsemaan rattaita ja käyttäjän painoa

– Avustajien tulee tämän toimenpiteen aikana säilyttää tasapainonsa hyvin ja säilyttää tukeva ote ratteista

– Avustajien käsien tulee pysyä kädensijoilla kaikkina aikoina

– Pidä lepotauko säännöllisin välein

– Älä nosta rattaita jalkatuesta

Laskeutuminen portaissa – sijoita rattaat kohtisuoraan etupyörät ylimmällä portaalla, kallista kahvoista taaksepäin ja työnnä rattaita eteenpäin, kunnes takapyörät ovat yläportaan päällä; avustaja seisoo etupuolella rattaita tukien ja laskee ne alas eturungosta tarttuen; painoa kantaen takapyörät lasketaan alas portaalta ja jatketaan porras portaalta alas asti (kuva nro. 1)

Portaiden nouseminen - sijoita rattaat kohtisuoraan etupyörät alinta porrasta vasten, kallista rattaita taaksepäin ja nosta seuraavalle askelmalle; avustaja seisoo etupuolella rattaita tukien ja nostaa rattaita erurungosta tarttuen, ja jatketaan porras portaalta ylös asti (kuva nro. 2)

Rattaiden taittaminen kokoon – avaa käsinojapehmusteen vetoketju ja takakiristin sen keskiosaa ylös nostamalla. Avaa istuimen kiristin (koko 38). Tartu yhdestä kahvasta ja vedä istuinputkea ylös toisella kädellä. Varmista, että selkänöja kaartuu rattaita kohden taittomekanismin suojaamiseksi. Lukitse säilytysklipsi. Rattaiden kokoontaittaminen ei edellytä jalkatuen irrottamista (kuva nro.3)

Verhoilu – istuin vahvikkeineen, selkänöja ja selkänöjan poidennysosa eivät ole irrotettavissa. Ne voidaan pestä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella.

Käsinoja – avaa tarrakiinnitys ja painike käsinojapehmusteiden irrottamiseksi.

Pesu käsin korkeintaan 40 °C:ssa miedolla pesuaineella.

Istuinvahvike – istuimen jäykkyyttä voidaan lisätä tai vähentää istuinvahviketta säätämällä. Jäykkyyttä vähennetään istuinvahvikkeen hihnoja pidentämällä, ja lisätään niitä lyhentämällä. Jäykkyyttä muutettaessa ei istuinleveyttä saa koskaan muuttaa.

KUNNOSSAPITO, HÄVITTÄMINEN:

- Nämä rattaat ovat korkealaatuisen suunnittelun tulosta ja oikein käytettynä ja huollettuna tarjoavat vuosien ongelmatonta käyttöä.
- Tarkasta lukituslaitteet, salvat, jalkatuki, nivelliitokset niiden tukevuuden ja toimintakunnon varmistamiseksi.
- Jarrut, pyörät ja renkaat ovat alttiita kulumiselle ja ne tulee tarvittaessa vaihtaa rattaiden toimittajan valtuuttaman korjaajan toimesta.
- Suosittelemme rattaiden tarkastamista ja hyväksyntää valtuutetulla korjaajalla vuosittain.
- Suosittelemme käyttämistä huollossa 24 kuukauden käytön jälkeen.
- Mikäli rattaat ovat vaurioituneet tai korjauksen tarpeessa, valtuutettu korjaaja pystyy neuvomaan mitä toimenpiteitä tarvitaan.
- Tuotetta koskevaa tietoa on vaihtoehtoisesti saatavissa PATRON Bohemia a.s.:n asiakaspalvelusta.
- Rattaissa tulee käyttää ainoastaan PATRON Bohemia a.s.:n toimittamia varaosia.
- Mikäli rattaiden osissa ilmenee jäykkyyttä tai niiden käyttäminen on vaikeaa (6 kuukauden sisällä), tulee varmistaa, ettei synnä ole lika; tällöin voidaan käyttää voitelusuihketta, esim. WD 40 (ei öljyä tai rasvaa). Varmista, että voiteluaine tunkeutuu komponenttien väliin kuitenkin liiallista suihkutusta välttäen, sillä se voi lisätä lian kertymistä. Pyyhi kaikkia ylimääräinen suihke pois. Liikkuvien osien säännöllinen voitelu pidentää rattaiden toimintaa ja helpottaa rattaiden taittamista auki ja kokoon.