

boris.



Käyttöohje.

boris. Mukava WC- ja suihkutuoli.




schuchmann®

Paljon kiitoksia.



Hyvä asiakas,

haluamme tässä yhteydessä kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme ostosta. Pyydämme sinua lukemaan ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolellisesti läpi ja noudattamaan siinä olevia ohjeita. Ota huomioon, että tämän käyttöohjeen ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta sen varustuksesta riippuen. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen läheisyydessä.

schuchmann-tiimisi



1. Valmistelut.	05
1.1 Toimitus	05
1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä	05
1.3 Turvallinen hävittäminen	05
1.3.1 Pakkaus	05
1.3.2 Tuote	05
1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka	05
2. Tuotekuvas.	06
2.1 Yleisiä tietoja	06
2.2 Käsittely / Kuljetus	06
2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö	06
2.3.1 Indikaattiot	07
2.3.2 Vastaindikaattiot	07
2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset	07
2.5 Perusmallin varusteet	08
2.6 Lisävarusteluettelo	08
2.7 Tuotteen yleiskuvaus	08
3. Säädot.	09
3.1 Istumakulman säätäminen	09
3.2 Pyörät	09
3.3 Istumakorkeuden säätäminen	10
4. Lisätarvikkeet.	10
4.1 Lisätarvikkeiden asennus ja purkaminen	10
4.2 WC-astia	10
4.3 Päätuki	11
4.4 Jalkatuki	11
4.5 Pöytä pehmustetulla käsinojalla, käännettävä	12
4.6 Abduktiolohko integroidulla roiskesuojalla	12
4.7 PU-tyyny, kaksiosainen	13
4.8 PU-pohjelevy	13
5. Ylläpito ja puhdistus.	14
5.1 Puhdistus ja desinfiointi	14
5.1.1 Puhdistus	14
5.1.2 Desinfiointi	14
5.2 Kunnossapito	14
5.3 Huolto	14
5.3.1 Huoltomääräykset	15
5.3.2 Huoltosuunnitelma	15
5.4 Varaosat	16
5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö	16



6. Tekniset tiedot.	17
7. Takuu.	18
8. Tunniste.	19
8.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä.....	19
8.2 Tuoteversio.....	19
8.3 Asiakirjan painos	19
8.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike.....	19

1. Valmistelut.

1.1 Toimitus

Tarkista, kun tuotetta luovutetaan, että kaikki osat ovat mukana, tuote on virheetön ja ilman kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan läsnäollessa. Mikäli kuljetusvaurioita ilmenee, järjestä niiden tarkastus (puutteiden toteaminen) toimittajan läsnäollessa. Lähetä kirjallinen reklamaatio tuotteesta vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä

Tuotteen virheetön käyttö edellyttää käyttäjän tai vastuussa olevan henkilön tarkkaa ja huolellista opastusta. Pyydämme sinua lukemaan ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohje huolellisesti läpi ja noudattamaan siinä olevia ohjeita. On mahdollista, että tuotteen osat, jotka voivat joutua kosketuksiin ihoa kanssa, kuumentuvat auringon lämmössä. Auringon lämmön vaikutuksen kestosta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittäisten osien pintojen lämpötila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokosketuksessa lieviä palovammoja. Peitä sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen

Ympäristön säästämiseksi ja suojaamiseksi, ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen edistämiseksi noudata **kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2** annettuja hävittämisohteja.

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten. Jos joudut toimittamaan tuotteen korjattavaksi tai lähettämään sen takaisin meille, käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäispakkausta, jotta tuote on optimaalisesti pakattu. Toimita muuten pakkausmateriaalit käytäntöjenne mukaisesti kierrätykseen.



Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat olla mahdollisten vaarojen aiheuttajia.

1.3.2 Tuote

Toimita tuotteen käyttöiän umpeutumisen jälkeen tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit käytännön mukaisesti kierrätykseen (katso materiaalitiedot **kohdasta 2.1**).

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka

Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotetta mahdollisesti edelleen käytettäessä tuotteen yhteydessä. Jos käyttöohje häviää, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivulta www.schuchmann.de.



2. Tuotekuvaus.

2.1 Yleisiä tietoja

Istuinkaukalo on valmistettu UV-säteilyn kestävästä, syvävedetystä PE-muovista. Kaikki metalliosat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja osittain jauhemaalattuja. PU-vahto täyttää standardin DIN EN 1021-1 ja 2 vaatimukset palamisen hidastamisesta. **boris.** on tukeva WC- ja suihkutuoli märkätiloihin niin kotiin kuin myös laitoksiin. Tuolin anatomisesti muotoiltu istuinkaukalo tarjoaa hyvän asennon lapsille ja nuorille. Sitä voidaan käyttää sekä WC-tuolina että suihkutuolina, ja siitä on saatavilla 5 eri kokoa. WC-tuolina se voidaan asettaa WC-istuimen yläpuolelle tai sitä voidaan käyttää vapaasti WC-astian kanssa.

2.2 Käsittely / Kuljetus

WC- ja suihkutuoli **boris.** on varustettu 4 kaksoispyörällä (lukituksella). Näin sitä voidaan siirtää ja kääntää paikoillaan. Työntöä ja kääntämistä varten istuinkaukalon takapuolella on työntökahva. **boris.** ei sovellu kantamiseen. Jos kantamista ei esteiden vuoksi voi välttää, varmista, että kaikki liikkuvat osat on kiristetty kiinni. Asetu sen jälkeen WC- ja suihkuistuimen viereen, ota kiinni edestä ja takaa istuinkaukalon alapuolelta ja kanna se haluttuun paikkaan.

Aseta WC- ja suihkutuolin kuljettamiseksi kaikki säädöt pienimpään mittaansa (käännä jalkataso ylös, säädä istuinsyvyys alimpaan asentoon jne.).

2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö

WC- ja suihkutuoli **boris.** on riskiluokan 1 lääkinällinen laite ja se soveltuu ainoastaan käyttöön suihkutuolina suihkussa tai WC-tuolina WC-istuimen yläpuolella tai vapaana WC-tuolina. Se tukee käyttäjiä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää tavanomaisia WC-istuinta tai lasten WC-istuinta. Toisenlainen ja tästä määrityksestä poikkeava käyttö ei ole sallittua käyttää. Huomioi käytössä seuraavat ohjeet:

WC-istuimen yläpuolella

Avaa WC:n kansi ja istuinrenkas. Sovita istuinkaukalon korkeus WC:n korkeuteen. Poista WC-astia (jos käytössä). Siirrä WC-tuoli takaperin WC-istuimen ylle ja lukitse pyörät.

Käyttö vapaana

Vapaana **boris.**-WC-tuolia voidaan käyttää ainoastaan WC-astian kanssa.

Suihkutuolina

boris. on valmistettu vedenkestävistä materiaaleista ja sitä voidaan sen vuoksi ongelmitta käyttää suihkutuolina.

2. Tuotekuvaus.

2.3.1 Indikaatiot

WC- ja suihkutuoli **boris.** soveltuu käyttäjille, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää tavanomaisia WC-istuimia tai lasten WC-istuimia seuraavista syistä:

- Lihastoimintojen vauriot rajoitetulla tai täysin menetetyllä istumisen hallinnalla ja ollen samanaikaisesti pienempikokoisia (lapset, nuoret ja pienikokoiset aikuiset)
- Hermostovauriot, vaurioituneet neuromuskuloskeetaaliset ja liikkeisiin liittyvät toiminnot

2.3.2 Vastaindikaatiot

Yleensä indikaatio tulisi tarkistaa lääkintä-ortopediseltä kannalta. Sen vuoksi pitää ennen kuntoutuksen aloittamista selvittää, onko potilaan suhteen vastaindikaatioita. Yleisesti ottaen kaikenlaiset kivut ovat vastaindikaatioita.



2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset

- Tuotteen oikea käyttö edellyttää, että vastuussa oleva hoitava henkilö saa tähän tarkan ja huolellisen ohjeistuksen.
- WC- ja suihkutuolia saa käyttää vain tasaisella ja tukevalla alustalla.
- Ota huomioon tämän käyttöohjeen kohta "Tekniset tiedot" koskien potilaan enimmäispainoa.
- WC- ja suihkutuolia ei saa käyttää ilman valvontaa.
- WC- ja suihkutuoli ei sovellu henkilöiden kuljettamiseen.
- Sädön aikana potilas ei saa voida koskea liikkuviin osiin.
- Raskaiden laukkujen yms. ripustaminen voi vaikuttaa kielteisesti vakauteen.
- Käytä vain Schuhmannin alkuperäisiä lisätarvikkeita ja varaosia, muuten vaarannat käyttäjän turvallisuutta.
- Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlaisten säätötoiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat eivät ole säätöalueella.
- Käyttäjille, joilla on lukuhäiriöitä käyttöohje täytyy lukea ääneen, jotta he ymmärtävät, miten tuotetta käytetään.

- anatomisesti muotoiltu istuinkaukalo PE-muovista, väri metallinsininen
- alarunko ruostumattomasta teräksestä
- istuinkulman säätö kaasupainejousella 200N
- mekaaninen korkeudensäätö
- 4 kaksoispyörää (100 mm) lukituksella

- PU-pääntuki
- PU-tyyny
- pöytä

Alla esitetyn kuvan tarkoitus on näyttää sinulle tärkeimmät rakenneosat sekä käsitteet, jotka löydät käyttöohjetta lukiessasi.




3. Säädöt.

Tuotteen tai lisävarusteiden säädöt saa tehdä vain henkilöt, jotka ovat saaneet vastaavan opastuksen lääkinällisten laitteiden neuvojan toimesta. Loukkaantumisvaaran minimoimiseksi käyttäjän on varottava kaikenlaisten säätötoiden yhteydessä, että säätöjä tekevän tai käyttäjän raajat eivät ole säätöalueella. Asetusten ja säätöjen (esim. istumakulma ja -korkeus) myötä painopiste siirtyy ja vaikuttaa siten myös tuolin vakauteen. Istuimen vakaus on taattu myös maksimiasetuksissa. Kaikki säädöt voi tehdä tavallisella työkalulla (esim. kuusiokolovain tai ruuviavain).

3.1 Istumakulman säätäminen



Voit säätää istuinkaukaloa portaattomasti aktiivisesta (-) 5° enintään passiiviseen 30°. Tätä varten sinun on käytettävä jalkapedaalia (A) edessä oikealla alarungossa ajosuuntaan ja painettava tai vedettävä istuinkaukaloa kevyesti haluttuun kulmaan. Vapauta säädön jälkeen yksinkertaisesti jalkapedaali.

Jalkapedaalin (A) tahattoman liikkumisen voi estää lukitsemalla sen vetosokalla, joka löytyy jalkapedaalin sisäpuolelta. Pyöritä vetosokkaa, kunnes se lukittuu paikalleen. Voit tarvittaessa edesauttaa lukitsemista liikuttamalla jalkapedaalia hiukan. Lukitus avataan vetämällä vetosokan ulos ja kääntämällä sitä neljäsosakierroksen verran.

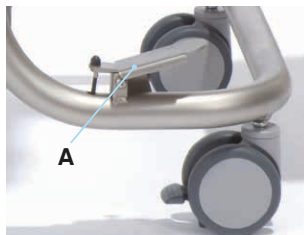

3.2 Pyörät

WC- ja suihkutuoli tulisi aina varmistaa tahatonta liikkumista vastaan kaikilla 4 pyörän jarruilla. Pyörät on varustettu suunnanlukitsimella varustetulla täyslukituksella, joka estää tahattoman liikkumisen ja kääntymisen. Paina tätä varten jalkaterällä jokaisen pyörän lukitus (B) alas (C). Pyörien lukituksen vapauttamiseksi paina lukitusta jalkaterällä jälleen ylös (D).

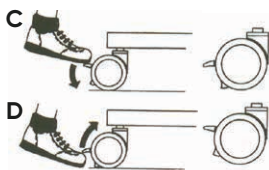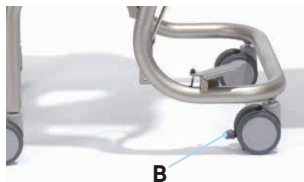


Jarrut toimivat luotettavasti vain tasaisella alustalla!

3. Säädöt.

3.3 Istumakorkeuden säätäminen

Voit säätää istuinkaukalon korkeutta 2,5 cm:n askelin. Tätä varten sinun on ensin irrotettava molemmat hattumutterit (A) molemmin puolin kaukalon ja alarungon välisissä kiinnityksissä. Tämän jälkeen voit säätää istuinkaukalon korkeutta reikäriivin avulla. Kiristä taas mutterit tämän jälkeen. Lisäksi sinun on vielä säädettävä kaasupainejousi, jotta istumakulma on jälleen säädetty oikein. Tätä varten ruuvaa kaasupainejousen kiinnityksen ruuvi (B) kokonaan irti kierrelevystä ja aseta taas paikoilleen vaadittavaan korkeuteen.

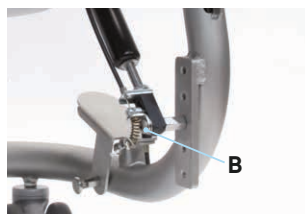

Säädön saa suorittaa vain tuolin ollessa tyhjä.

4. Lisätarvikkeet.

4.1 Lisätarvikkeiden asennus ja purkaminen

Kaikki lisätarvikkeet voidaan asentaa ja poistaa niille tarkoitettuihin kohtiin mukana toimitettujen alkuperäisten kiinnitysmateriaalien kanssa. Tämän saa suorittaa ainoastaan tehtävään pätevä henkilökunta. Lisätietoja asennuksesta ja purkamisesta saat varaosalistoistamme ja niiden räjäytyskuvista (katso www.schuchmann.de/mediathek).

4.2 WC-astia

WC-astia työnnetään takakautta istuinkaukaloon vasteeseen asti. Tarkan sopivuuden vuoksi astiassa on automaattinen varmistus irtaamista vastaan.



WC-astian käytön jälkeen se ja istuinkaukalo on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti. Käytä tavanomaisia desinfiointiaineita.

4. Lisätarvikkeet.

4.3 Pääntuki

Kulma- ja korkeussäädettävä pääntuki voidaan sovittaa potilaiden tarpeiden mukaan.

Korkeudensäätö:

Irrota tätä varten ruuvi (A) ja säädä korkeus.

Kulmansäätö:

Irrota tätä varten ruuvit (B) ja aseta pääntuki sopivaksi.



4.4 Jalkatuki

Jalkatuessa voidaan säätää polven ja jalkaterän kulmat sekä sen korkeus. Se voidaan kääntää ylös, jotta tuoliin istuminen ja siitä pois nouseminen on helpompaa.

Korkeudensäätö:



Irrota tätä varten molemmat pidätinruuvit (C) ja säädä haluttu korkeus.

Polven kulman säätö:

Vapauta kiristysvipu (D) tätä varten.

Jalkaterän kulman säätö:

Irrota ensin vastamutterit (E) jalkatuen alapuolelta, käännä sen jälkeen säätöruuvi (F) jalkaterän kulman säätämiseksi sisään tai ulos ja kiristä jälleen vastamutterit.

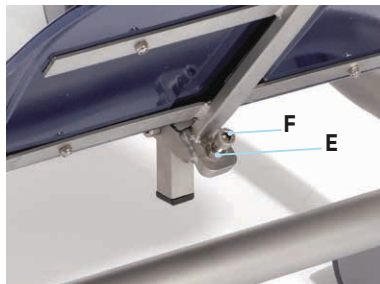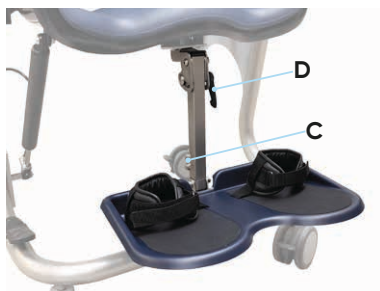


Kiristä kaikkien säätöjen jälkeen taas kaikki avatut ruuvit huolellisesti!

4. Lisätarvikkeet.

4.5 Pöytä pehmustetulla käsinojalla, käännettävä

Pöydän kääntämiseksi, esim. helpomman tuolille istumiseen tai siitä nousemiseen, vedä vetosalpaa (A) ja käännä pöytä kiinnityksen ympäri kaukalo-ruunon vasemmalle puolelle sivuun tai ota se kokonaan irti. Tarkaisin käännettäessä varmistaa, että pöytä lukittuu kunnolla paikoilleen. Pöydän korkeutta voidaan myös säätää. Tätä varten avaa ruuvit (B) molemmin puolin, säädä korkeus reikälevyn avulla ja ruuvaa ruuvit jälleen kiinni. On helpompaa, jos otat ensin tukipöydän kokonaan irti ja säädät kiinnitykset yksittäin.

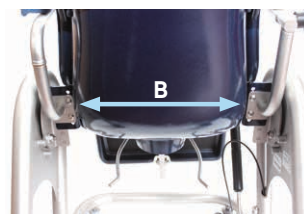

Huomio, puristumisvaara! Kun pöytä on asennettu, varmista, ettei pöytää avattaessa ja suljettaessa sen alueella ole tekstiilejä eikä ruumiinosia (sormia). Pöydän pidikkeen ja rungon välillä on alue, jota on vältettävä sormien kanssa!

4.6 Abduktiolohko integroidulla roiskesuojalla

Abduktiolohko kiinnitetään tapilla (C) istuinkaukalon edessä keskellä olevaan pyöreään aukkoon ja painetaan niin kauan, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Vedä roiskesuoja irti työntämällä sitä kevyesti ylöspäin.



4. Lisätarvikkeet.

4.7 PU-tyyny, kaksiosainen

Huonosti painetta kestäville henkilöille on tarjolla kaksiosainen PU-tyyny, joka voidaan irrottaa tuolista helposti esim. pesua varten (miedolla saippuavedellä).

Poistaaksesi tyynyn paina tyynyn (A) nypyt ulkopuolelta istuinkaukalon reikien läpi.

Paikalleen asetettaessa paina tyynyn nypyt jälleen istuinkaukalon reikiin.



Älä vedä tyynystä sitä poistaessa, koska tyynyn kiinnitykseen tarkoitetut nypyt voivat vaurioitua!

4.8 PU-pohjelevy

Parempaa säären ohjausta varten voidaan käyttää yhdessä jalkatuen kanssa korkeus-säädettävää PU-säärilevyä.



Säärilevyä voidaan käyttää ainoastaan yhdessä jalkatuen kanssa!



5. Ylläpito ja puhdistus.

5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus

Puhdista säännöllisesti kaikki runko-osat sienellä tai kostealla liinalla. Varsinkin vesipisaroita tulisi poistaa. Jos lika on pinttynyt, puhdistuksen voi suorittaa miedolla talouspuhdistusaineella. Tärkeää on kuivata puhdistetut kohdat huolellisesti.

Kaikki kankaat, joita ei voida irrottaa, voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Kaikissa irrotettavissa kankaissa huomioi kiinni ommellut hoito- ja pesuohjeet (esim. **A+B**) kyseisissä elementeissä.

Ota tässä yhteydessä huomioon myös yleiset puhdistus- ja hygieniaohteemme. Näitä löytyy osoitteella www.schuchmann.de/mediathek.



5.1.2 Desinfiointi

Erilaisia tuotteita voi käyttää metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin. Juoksevia desinfiointiaineita löytyy valmiina liuoksina, joita ruiskutetaan pintojen päälle ja levitetään tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoehtoisesti voidaan myös käyttää valmiiksi desinfiointiaineella kostutettuja liinoja, joilla tuotteiden pinnat pyyhitään kaikkialla. Molemmissa tapauksissa täytyy kostuttaa kaikki pinnat. Desinfiointi täysautomaattisessa desinfiointilaitteessa on myöskin mahdollista sekä suositeltavaa.

Vaikutusajat voivat vaihdella ja löytyvät käytetyn aineen valmistajan informaatiosta.

5.2 Kunnossapito

Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus ja tarkasta säännöllisesti, että tuotteessa ei ole säröjä, murtumia, puuttuvia osia tai virhetoimintoja. Jos ilmenee vikoja tai virhetoimintoja, ota suoraan yhteyttä toimituksesta vastaavaan erikoisliikkeeseen (katso **kohta 8.4**).

5.3 Huolto

Käyttäjän turvallisuuden vuoksi ja jotta takuu jäisi voimaan, erikoisliikkeen (katso **kohta 8.4**) suorittama huolto vaaditaan ainakin kerran vuodessa. Suoritettut huollot täytyy dokumentoida huoltosuunnitelmaan (katso **kohta 5.3.2**).

5. Ylläpito ja puhdistus.

5.3.1 Huoltomääräykset

- Peruspuhdistus valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Tarvittaessa desinfiointi valmistajan ohjeiden mukaisesti
- Rungon, osien ja tarvikkeiden vaurioita (halkeamia, repeämiä, korroosio, väentyneet tai puuttuvat osat)
- Liitosten lujuus (kiristä löysät ruuvit, korvaa puuttuvia ruuveja)
- Tarkista säätöelementtien toiminta (ruuvit, laukaisuvipu, jalkapedaali)
- Muiden säätöelementtien (selkä, pääntuki, jalkatuki, pöytä ja abduktio-kiila) toimivuus
- Kaasupainejousien toiminta (tarvittaessa vaijereiden säätö)
- Kuljetuspyörien toiminta (tasainen ja kevyt pyöriminen, jarrut)
- Väiden tarkastus vaurioiden varalta (kiinnitysjärjestelmät, lukitukset, saumat)
- Tyynyjen vaurioiden tarkastus
- Tyypikilven luettavuus
- Apuvälinen toimintojen täydellinen lopputarkistus
- Tarkistus että kaikki osat ja tarvikkeet ovat kunnolla kiinni

5.3.2 Huoltosuunnitelma

Valmistajan huoltosuunnitelma (katso kohta 5.3.1) on suoritettu:

Pvm	Yritys	Nimi	Allekirjoitus



Ennen kuin käyttää jatketaan löydetyt viat tai vahingot täytyy korjata erikoisliikkeen tai valmistajan toimesta.



5. Ylläpito ja puhdistus.

5.4 Varaosat

Käytä ainoastaan Schuchmannin alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia, koska muuten käyttäjän turvallisuus vaarantuu ja takuun voimassaolo lakkaa. Käännä varaosatilauksia varten toimittaneen erikoisliikkeen puoleen ilmoittamalla tuotteen sarjanumero (katso **kohta 8.4**). Välttämättömät varaosat ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö

Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä on käyttöiheydestä ja uudelleenkäytöstä riippuen "8" vuotta, mikäli käyttö tapahtuu tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voi käyttää vielä tämän ajan jälkeenkin, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva käyttöikä ei koske kuluvia osia kuten esim. kuljetuspyöriä, kaasupainejousia,... . Huollosta ja kunnan arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä vastaa erikoisliike.


Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi. Suorita ennen edelleen luovuttamista **kohdassa 5.1** mainitut puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet. Toimitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tämä käyttöohje, ovat tuotteen osa ja ne pitää luovuttaa yhdessä tuotteen kanssa uudelle käyttäjälle. Uudelleenkäyttöä varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoidaan, on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.



Mikäli sen aikana kun tuotetta käytetään käyttötarkoituksen mukaisesti tapahtuu vakava välikohtaus, tästä täytyy viipymättä ilmoittaa valmistajalle sekä vastuussa oleville viranomaisille.

6. Tekniset tiedot.

Mitat

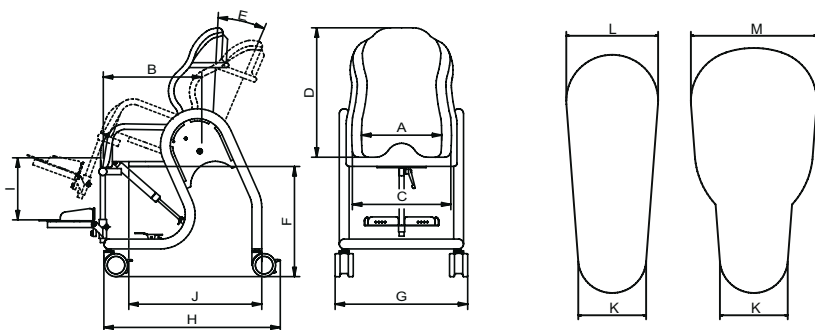

		Koko 0	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
A	Istuimen leveys (takana)	26 cm	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm
B	Istuimen syvyys	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	48 cm
C	Kaukalon leveys (edessä)	31 cm	36 cm	41 cm	46 cm	51 cm
D	Selkäosan korkeus	49 cm	51 cm	56 cm	61 cm	65 cm
E	Istuimen kulma	(-)5°-30°	(-)5°-30°	(-)5°-30°	(-)5°-30°	(-)5°-30°
F	Päälle ajettavan WC-istui- men maksimikorkeus	47-57 cm	45-55 cm	42-52 cm	42-52 cm	42-52 cm
G	Kokonaisleveys	56 cm	61 cm	63 cm	71,5 cm	74 cm
H	Kokonaispituus	65 cm	65 cm	65 cm	70 cm	70 cm
I	säärän enimmäispituus	38 cm	38 cm	48 cm	48 cm	48 cm
J	Hygienia-aukon etureunas- ta ala-rungon takareunaan	47 cm	49 cm	51 cm	54 cm	57 cm
K	aukon leveys edessä	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
L	aukon leveys takana	12 cm	12 cm	13,5 cm	13,5 cm	13,5 cm
M*	aukon leveys takana	-	-	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
	Maks. kuormitus	60 kg	80 kg	100 kg	100 kg	150 kg
	Paino	28 kg	30 kg	33 kg	35 kg	38 kg
*pätee vain kokoihin 2b, 3b ja 4b						


7. Takuu.

Kaikkiin tuotteisiin pätee kaksi vuotta kestävä lakisääteinen takuu aika. Tämä alkaa tuotteen toimituksesta tai luovutuksesta. Jos tällä aikavälillä ilmenee toimittamassamme tuotteessa todistettavasti materiaali- tai valmistusvirheitä, tarkastamme ilmoitetun vaurion rahdittoman palautuslähetyksen jälkeen ja korjaamme sen tarvittaessa maksuttomasti valintamme mukaisesti tai toimitamme uuden tuotteen.

8. Tunniste.

8.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä

Sarjanumero, valmistuspäivämäärä sekä muut tiedot on ilmoitettu tyyppikilvessä, joka on kiinnitetty jokaiseen tuotteeseemme (**A**) (sisäpuolella).

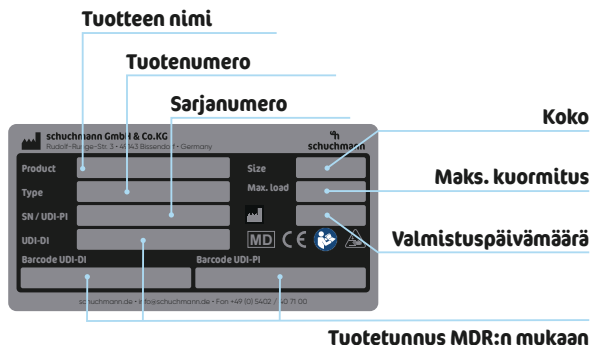

8.2 Tuoteversio

WC- ja suihkutuoli **boris**. on saatavana viidessä koossa ja sitä voidaan täydentää monilla lisävarusteilla (katso **kohta 4**).

8.3 Asiakirjan painos

Käyttöohje **boris**. – Muutettu versio D; painos 2026-03-06

8.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike

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
Tämän tuotteen on valmistanut:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Tämän tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:





schuchmann.de