

smilla.



Käyttöohje.

smilla. Käytännöllinen hoitotuoli arkipäivään.


schuchmann®

Kiitos.



Hyvä asiakas,

haluamme tässä yhteydessä kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta ja tuotteemme hankinnasta. Pyydämme, että luet ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohjeen huolellisesti läpi ja noudatat siinä esitettyjä ohjeita. Ota huomioon, että tämän käyttöohjeen ohjeet ja kuvaukset voivat poiketa hankkimastasi tuotteesta varusteiden perusteella. Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.

Tärkeää tietoa!

Varmista, että tämä käyttöohje säilytetään tuotteen läheisyydessä.

schuchmann-tiimisi



1. Esivalmistelut.	05
1.1 Toimitus	05
1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä.....	05
1.3 Turvallinen hävittäminen.....	05
1.3.1 Pakkaus.....	05
1.3.2 Tuote	05
1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka.....	05
2. Tuotekuvaus.	06
2.1 Materiaalitiedot	06
2.2 Käsittely / Kuljetus.....	06
2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö.....	06
2.3.1 Käyttöaiheet	06
2.3.2 Vasta-aiheet	06
2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset.....	07
2.5 Perusmallin varusteet	08
2.6 Lisätarvikkeet.....	09
2.7 Tuotteen yleiskuvaus lisävarusteilla.....	09
3. Säädot.	10
3.1 Työkaluton korkeuden, kulman- ja syvyyden säätö istuimelle.....	10
3.3 Jalkalevy.....	11
3.3 Käsinojen korkeuden säätö ilman työkaluja	11
3.4 Selkänojan säätö ilman työkaluja	12
3.5 Työkaluton korkeudensäätö selälle.....	12
4. Lisävarusteet.	13
4.1 Päätuki.....	13
4.2 Selkä- ja istunalueen turvavöiden asennussarjat.....	13
4.3 Ylävartaloguet	14
4.4 Reisituki	14
4.5 Puu-hoitopöytä	15
4.6 Pyörät.....	15
4.7 Abduktiokiila	16
4.8 Kiinnityshihnat	16
5. Puhdistus ja kunnossapito.	17
5.1 Puhdistus ja desinfiointi.....	17
5.1.1 Puhdistus	17
5.1.2 Desinfiointi.....	17
5.2 Kunnossapito	17
5.3 Huolto.....	17
5.3.1 Huoltomääräykset	18
5.3.2 Huoltosuunnitelma.....	18
5.4 Varaosat	19
5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö.....	19



6. Tekniset tiedot.	20
7. TAKUU.	21
8. Tunnistus	22
8.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä.....	22
8.2 Tuoteversio.....	22
8.3 Asiakirjan painos	22
8.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike.....	22

1. Esivalmistelut.

1.1 Toimitus

Tarkista tuotteen vastaanoton yhteydessä, että kaikki osat ovat mukana toimituksessa, tuote on virheetön eikä siinä ole kuljetusvaurioita. Tarkasta tuote sen toimittajan läsnäollessa. Mikäli havaitset kuljetusvaurioita, järjestä niiden tarkastus (puutteiden toteaminen) toimittajan läsnäollessa. Lähetä kirjallinen reklamaatio vastaavaan erikoisliikkeeseen.

1.2 Turvallisuustoimenpiteet ennen käyttöä

Tuotteen virheetön käyttö edellyttää käyttäjän tai tukihenkilön tarkkaa ja huolellista opastamista. Pyydämme, että luet ennen tuotteen käyttöönottoa käyttöohjeen huolellisesti läpi ja noudatat siinä esitettyjä ohjeita. Ihon kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat tuoteosat voivat kuumentua auringon lämmöstä. Auringon lämmön vaikutusajasta ja voimakkuudesta riippuen voi yksittäisten osien pintojen lämpötila nousta yli 41 °C:seen ja aiheuttaa siten suorassa ihokosketuksessa lieviä palovammoja. Peitä sen vuoksi kyseiset osat ja suojaa laite suoralta auringonvalolta.

1.3 Turvallinen hävittäminen

Ympäristön säästämiseksi ja suojaamiseksi, ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi ja raaka-aineiden kierrätyksen edistämiseksi noudata kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 annettuja hävittämisohjeita. **Kohdat 1.3.1 ja 1.3.2.**

1.3.1 Pakkaus

Tuotteen pakkaus tulee säilyttää tulevaa kuljetusta varten, mikä saattaa olla tarpeen. Jos sinun on lähetettävä tuote takaisin meille korjattavaksi tai taakkuvaatimuksen yhteydessä, käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä laatikkoa, jotta tuote on pakattu optimaalisesti. Muussa tapauksessa kierrätä pakkausmateriaalit niiden tyyppin mukaan.



Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, koska ne voivat aiheuttaa vaaroja.

1.3.2 Tuote

Toimita tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit käytäntönne mukaisesti kierrätykseen (katso materiaalitiedot **kohdasta 2.1**).

1.4 Käyttöohjeen sijoituspaikka

Säilytä käyttöohje huolellisesti ja varmista, että se pysyy tuotetta mahdollisesti edelleen käytettäessä tuotteen yhteydessä. Jos käyttöohje häviää, ajankohtainen versio voidaan ladata milloin tahansa sivustolta .



2. Tuotekuvaus.

2.1 Materiaalitiedot

Hoitotuolin **smilla** puiset osat ovat pyökkiä ja lakattu. Lakasta lähtevät formalidihydriipäästöt alittava vaatimukset E1 mukaan. Päälysteiden materiaali on 100 % polyesteriä ja ne ovat vaikeasti syttyviä (DIN EN 1021-1+2 mukaisesti).

2.2 Käsittely / Kuljetus

Hoitotuolia ei ole tarkoitettu kannettavaksi. Jos et voi välttää sen kantamista esteiden vuoksi, noudata alla olevia ohjeita kohdasta "Hoitotuolin nostaminen". Kun kuljetat hoitotuolia, aseta kaikki säädöt pienimpiin mitoihin.

Hoitotuolin nostaminen

Ota huomioon, että hoitotuolia voi käyttää vain yksi käyttäjä. Varmista, että kaikki ruuviliitokset ja nupit on ruuvattu tiukasti ennen hoitotuolin nostamista. Nostaminen on sallittu vain jalka- tai istuinlevyn pidikkeistä tai päärungosta.

2.3 Käyttöalueet, määrityksen mukainen käyttö

Hoitotuoli **smilla**. On riskiluokan 1 lääkinällinen tuote ja se kompensoi selkeitä huonoja istuma-asentoja ja/tai istuma-asennon epävakautta. Siinä on mahdollista istua jatkuvasti ja mukavasti toiminnallisesti ja fysiologisesti edullisessa asennossa.

2.3.1 Käyttöaiheet

Hoitotuoli **smilla**. on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on istumavamma, toiminnallisia ja/tai rakenteellisia vaurioita vartalossa tai vartalossa ja mahdollisesti niskalihaksissa (esim. neurologisista/neuromuskulaarisista sairauksista, selkärangan epämuodostumista) ja huonosta asenteesta. Hoitotuolit ovat hyödyllisiä silloin, kun ei ole mahdollista istua pidempään vakioistuinkalusteilla, kun istuinkuoreen ei ole tarvetta ja kun on tarpeen säilyttää mahdollisimman fysiologinen istuma-asento ja varmistaa vakaa istuma, kun tarvitaan toistuvia säätöjä vastaavien kehitysvaiheiden kasvupyrähdysten vuoksi (erityisesti taaperoilla).

2.3.2 Vasta-aiheet

Yleensä kuntoutus tulee aloittaa ortopedia-alan kävelykuntouttajan avustuksella. Siksi ennen hoitoa on selvitettävä, onko potilaalle odotettavissa vastaindikaatioita. Periaatteessa kaikenlaisilla kivuilla on haitallinen vaikutus.



2.4 Määrityksen vastainen käyttö / Varoitukset

- Varmista, että hoitotuoli säilytetään kuivassa paikassa.
- Huolehdi siitä, että useat käyttäjät eivät käytä tuotetta samanaikaisesti.
- Varmista, ettei siinä ole pieniä osia tai kuumia myrkyllisiä aineita, hoitotuolin lähellä olevat esineet, sähkölaitteet jne ovatpoissa käyttäjän ulottuvilta, koska tämä voi johtaa tukehtumiseen, myrkytykseen tai muihin vammoihin.
- Paloturvallisuussyistä terapiatuolia ei saa sijoittaa avotulen tai muun voimakkaan lämmönlähteen, kuten sähkö- tai kaasulämmittimen, läheisyyteen.
- Hoitotuolia ei ole tarkoitettu skolioosipotilaille.
- Terapiatuolin virheetön käyttö edellyttää tukihenkilön tarkkaa ja huolellista opastamista.
- Hoitotuoli ei sovellu ulko käyttöön.
- Maksimikuorma (katso **kohta 6**) ei saa ylittyä.
- Kaksi tai kolme viikkoa hoitotuolin toimittamisen jälkeen kaikki ruuvi-liitokset on kiristettävä. Myöhemmin niitä pitäisi kiristää säännöllisesti esim. kahden kuukauden välein, tarkastaa ja kiristää tarvittaessa.
- Huomioi, että käyttäjä voi raskaan pöydän ääressä helposti työntää jalkansa pöydän runkoon kallistaa hoitotuolia taaksepäin.
- Älä koskaan jätä käyttäjää istumaan hoitotuolissa ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki turvavyöt on kiristetty.
- Älä anna käyttäjän leikkiä hoitotuolin ympärillä, kun se ei ole käytössä asennossa.
- Käytä hoitotuolia vain tasaisella ja tukevalla alustalla.
- Älä käytä hoitotuolia, jos siinä on viallisia, kuluneita tai puuttuvia osia.
- Käytä vain Schuhmannin alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia, muuten vaarannat käyttäjän turvallisuuden.
- Älä käytä hoitotuolia nousutikkaina.
- Jos käyttäjä istuu hoitotuoliin itsenäisesti, tulee valita pidennetty jalusta, muuten kaatumisvaara kasvaa.
- Käytä hoitotuolia vain, kun sen kaikki rakenneosat on asennettu ja säädetty oikein. Kiinnitä erityistä huomiota varmistamaan, että istuin ja jalkalevy ovat kunnolla kiinni, ennen kuin käyttäjän istuu tuoliin.
- Hoitotuolia säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara.

2. Tuotekuvaus.

- Jos käyttäjillä on lukuvaikeuksia, toisen henkilön pitää lukea heille käyttöohje, jotta he osaavat käsitellä hoitotuolia turvallisesti.
- Säästöjä saa tehdä vain, kun käyttäjä ei ole hoitotuolissa.

2.5 Perusmallin varusteet

- Vakaa puurunko integroiduilla alumiiniprofileilla
- **nyt heti työkalun vaihto asetettavissa**
 - korkeus ja kulma säädettävä selkänoja
 - korkeussäädettävät käsinojat
 - korkeus, kulma ja syvyys säädettävä istuin
- mukaan lukien 2 työntöpyörää
- sisältää työntökahvan ja rahin
- mukaan lukien istuin- ja selkätyyny
- Materiaali: lakattu pyökki

Muoviset liu'ut

Estämään, että **smilla.** ei kaadu taaksepäin työnnettäessä, takaosaan jalkojen alle on kiinnitetty muoviset liukulaudat. Näiden avulla **smilla.** voi taaksepäin työnnettäessä liikkua turvallisesti ja jäädä pystyasentoon. Varmistaaksesi, että liu'ut toimivat tarkoitetulla tavalla, hoitotuoli tulee sijoittaa alustalle, jossa se voi liukua taaksepäin. Liukut ja pinta on pidettävä puhtaana.

Päälliset

smilla. hoitotuolin istuin- ja takapehmuste. Ovat perusmallissa varustettu kestäväällä ja hengittäväällä pehmusteella. Tämä voidaan poistaa verhoilusta puhdistusta varten (katso **kohta 5.1**) vetoketjulla.

Työntöpyörät

Hoitotuolissa on työntöpyörät, mitkä helpottavat istuintuen sijoittamista. Työntörullia ei pidä sekoittaa juoksurullien kanssa (katso **koh'ta 4.6**). Jotta **smilla.** sijoitetaan oikein (esim. Käyttäjän sijoittamiseen pöydän äärelle tai alle) kallista tuolia hieman eteenpäin. Työntörullat sijaitsevat etuosassa jalkojen alla. Nyt voit siirtää istuintukea haluamaasi suuntaan.

2. Tuotekuvaus.

2.6 Lisätarvikkeet

- Päätuki
- Ylävartalotuet
- Reisituki
- Anatoominen istuimen pehmuste
- abduktiokiila
- Puu-hoitopöytä
- Suuri r puinen reunallinen hoitopöytä
- abduktiokiila
- Pitkä jalusta
- Kaksoisjuoksupyörät
- Vyösarja istuinalueelle
- Vyösarja selkäalueelle
- Rinnanpuoleinen vyö
- Kiinnityслиivi
- Isuinhoukut (Standardi / T-muoto)
- Lantiovyö
- 4-Piste lantiovyö

2.7 Tuotteen yleiskuvaus lisävarusteilla



3. Säädöt.



Tuotteen tai lisävarusteiden säädöt saavat tehdä vain henkilöt, jotka lääkinnällisten laitteiden neuvoja on opastanut. Kaikenlaisia asetuksia ja säätöjä tehtäessä on tärkeää varmistaa, että mikään käyttäjän raajoista ei ole säädettävällä alueella, jotta loukkaantumisriski minimoidaan. Kaikki säädöt voi tehdä tavallisella työkalulla (esim. kuusiokolovain, ruuviavain tai jakoavain).

Hoitotuoli **smilla**. on sädetettävissä käyttäjän koon mukaisesti. Jos mahdollista, pitäisi ylä- ja alaraajat muodostaa vähintään suorakulman. Jalkojen pitäisi olla kunnolla jalkalevyllä ja käsivarsien rennosti käsinojalla.

3.1 Työkaluton korkeuden, kulman- ja syvyyden säätö istuimelle.

Istuinlevyn oikea korkeus on säädettävä käyttäjän koon ja vastaavan pöydän korkeuden/tilanteen mukaan. Kun olet säätänyt istuinlevyn, aseta käsinojat siten, että käyttäjän kyynärvarret lepäävät niissä mukavasti. Jalkalevy on oikealla korkeudella, kun jalkapohjat lepäävät sen päällä ja reidet istuinlevyn päällä.

Istuimen korkeutta, kulmaa ja syvyyttä voidaan säätää ilman työkaluja. Korkeuden säätämiseen paina van painiketta (A) ja aseta istuinalue halutulle korkeudelle. Istuimen on naksahdus kuultavasti paikalleen, jotta se lukittuu kunnolla. Istuimen kulman säätämiseen käännä kiertokahvaa (B). Säädä istuimen syvyyttä löysäämällä kiertokahvoja (C), vie istuin haluttuun syvyyteen ja kiristä kiertokahvat (C) uudelleen.

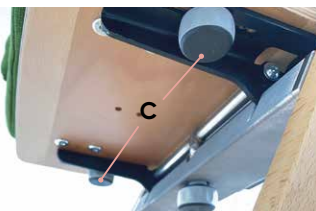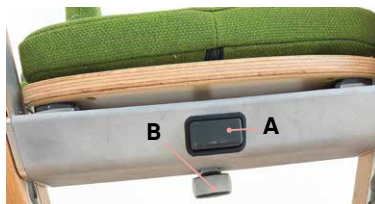


Säätöjä saa tehdä vain, kun käyttäjä ei istu hoitotuolissa.



Hoitotuolia säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara. Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!




3 Säädot.

Käytä istuimen toista kierreholkkia (A) saadaksesi enemmän syvyyttä istumen säätämisessä. Löysää tätä varten kiertokahvat ruuvilla (B) ja vedä istuin enimmäissyvyyteen. Aseta kiertokahvat ruuvilla (B) taaempaan kierreholkiin (A). Nyt voit siirtää istuinta haluamaasi suuntaan.

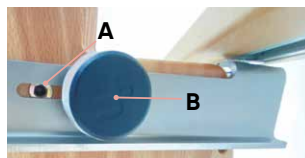


3.3 Jalkalevy

smilla. hoitotuolissa on käytävissä kaksi erilaista jalkalevyä. Molemmat ovat säädettävissä syvyydessä ja korkeudessa. Nopeasti korkeussäädettävän jalkalevyn version korkeutta säädetään painamalla painiketta (C), jalkalevy asetetaan haluttuun asentoon ja tarkastetaan, että korkeus napsahtaa paikalleen++. Avaa, jaetun jalkalevyn syvyyden säätämiseksi, kiertokahva (D) ja aseta jalkalevy haluttuun syvyyteen. Kierrä kiertokahva (A) ruuvaa se taas kireälle. Jalkalevyn korkeus lattiakorkeudella*, mikä voidaan laskea lattiatasolle, asetetaan, kun sen neijä ruuvia (E) löysätään. Aseta jalkalevy halutulle korkeudelle ja kierrä ruuvite (E) taas kireälle. "Jalkalevy lattiakorkeudella" syvyys säädetään löysäämällä ruuvit (F), ja asettamalla jalkalevyn syvyys haluttuun asentoon ja ruuvaa ruuvit (C) taas kireälle.

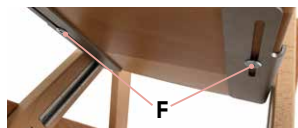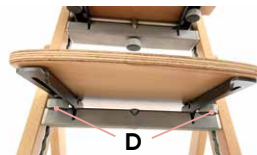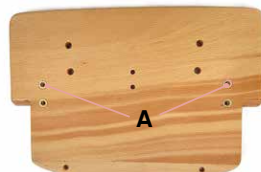

3.3 Käsinojien korkeuden säätö ilman työkaluja

Käsinojien korkeus voidaan myös säätää ilman työkaluja. Kierrä vain kiertokahvaa (G) ja aseta käsinoja halutulle korkeudelle ja kierrä kiertokahva (G) taas takaisin.

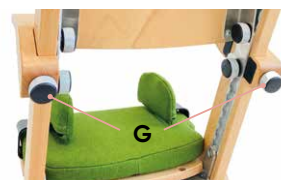


Säätöjä saa tehdä vain, kun käyttäjä ei istu hoitotuolissa.

3 Säädot.

3.4 Selkänöjan säätö ilman työkaluja

Selkänöjan itäisi sijaita selkää tukevasti ja sitä varten se on säädettävä sen mukaisesti. Selkänöjan voi säätää -3° – $17,5^{\circ}$. Selkänöjan kulman säätämisen löysää kiertokahva (A) rungon molemmin puolin ja säädä selkänöja oikeaan asentoon. Kiristä sen kiertokahvoja taas.

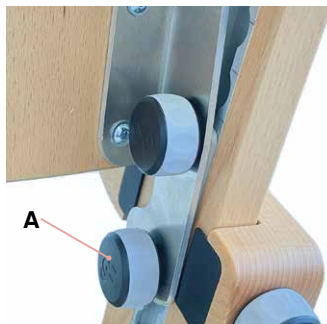


Selkänöjaa säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara.



Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!

3.5 Työkaluton korkeudensäätö selälle.

Selkänöja voidaan säätää portaattomasti. Löysää iertokahvat (B) ja (C) rungon molemmin puolel. Aseta selkänöja halutulle korkeudelle ja kiristä kiertokahvat (B) ja taas molemmin puolin.

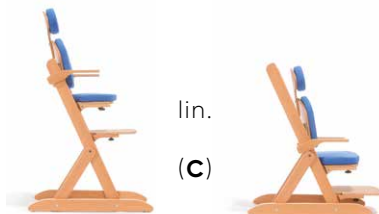

Selkänöjaa säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara. Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!



Säätöjä saa tehdä vain, kun käyttäjä ei ole hoitotuolissa.

4. Lisävarusteet.

4.1 Pääntuki

Oikeassa asennossa pääntuki toimii pään kosketuspintana niin, että tuen keskikohta koskettaa tangentiaalisesti päähän. Varmista, että pääntuen yläreuna on samalla tasolla kuin pään yläreuna. Pääntuen korkeutta voidaan säätää 3 cm:n välein reikäkuvion avulla. Aseta niskatuki oikeaan asentoon irrottamalla kiinnitetty selkätyyny (A), löysää kuusiokoloruuvit (B) pääntuen takana ja irrota holkin mutterit. Pidä pääntukea halutussa asennossa, työnnä holkimutterit jälleen reikien läpi edestä ja kiristä kuusiokantaruuvit (B) tuen takana.



Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!




4.2 Selkä- ja istunalueen turvavöiden asennussarjat

Valinnaisia turvavyön kiinnityssarjoja on saatavilla selkä- ja istuinalueille. Pujottaaksesi valjaat t. (katso kohta 4.8) taittosolkiin (C), avaa ne, ohjaa vyö taittosolkien läpi (C) ja sulje ne uudelleen.

Vyösarja selkänojaa varten asennetaan pääntukeen (D) ja istuimen alle. Löysää pääntuen ruuvit (E) aseta niskatuen ja turvavyön kiinnityssarjan reikäkuviot (D) päällekkäin ja kiristä ruuvit (E) taas. Vyösarja istuinalueelle asennetaan istuimessa.



Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!

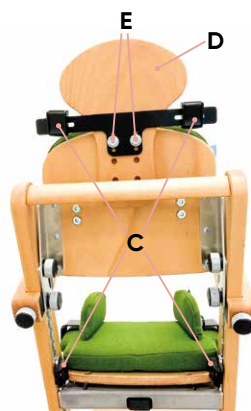
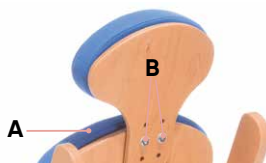
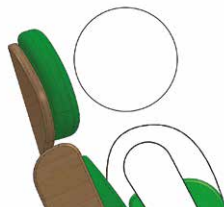


4. Lisävarusteet.

4.3 Ylävartalotuet



Niiden leveys ja kulma voidaan säätää. Korkeus säädetään poistamalla selkäpehmuste ja löysäämällä takana neljä kuusiokulmaruuvia (A). Irrota neljä holkkimutteria (B) edestä ja työnnä ne halutulle korkeudelle pitkänomaisten reikien läpi oleviin reikiin ja kiristä neljä kuusioruuvia (A). Nyt voit kiinnittää selkätyynyn takaisin, työntää rintakehän pehmusteen haluamaasi asentoon ja kiristä sitten neljä holkkimutteria (B) taas. Kulman ja leveyden säätämiseksi

löysää neljä kuusioruuvia (A), säädä tynny haluttuun kulmaan tai leveyteen ja kiristä neljä kuusioruuvia uudelleen.

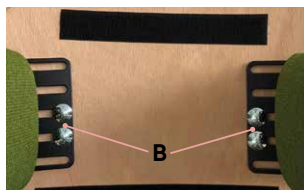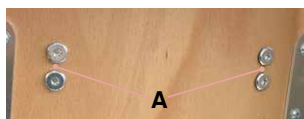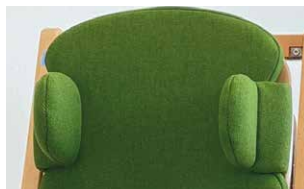

4.4 Reisituki

Niiden leveys ja kulma voidaan säätää. Reisituen kulma säädetään löysäämällä kuusiokulmaruuvit (C) istuinlevyn alla. Aseta reisituki haluttuun asentoon ja kiristä ruuvit (C) taas. Reistuen syvyys säädetään työntämällä päällystä vähän ylös, löysäämällä molemmat ruuvit (D) reisituen sivulla ja viemällä tämä haluttuun asentoon. Kiristä jokaisen säädön jälkeen ruuvit uudelleen kireälle.

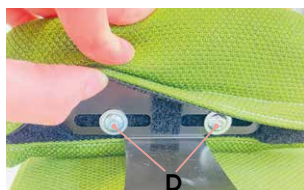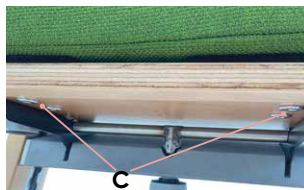

Hoitotuoliaa säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara. Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!



Säätöjä saa tehdä vain, kun käyttäjä ei istu hoitotuolissa.

4. Lisävarusteet.

4.5 Puu-hoitopöytä

Puinen hoitopöytä on saatavana kahtena versiona: kiinnitettävä (A) ja iso, kiinnitettävällä reunalla (B). Kokoamista varten löysää puisen hoitopöydän alapuolella olevien kiinnityslaitteiden ruuvit (C) ja liu'uta se käsinsojiin haluttuun asentoon. Varmista, että pöytäkiinnikkeet ovat täysin paikoillaan käsinsojissa ja kiristä sitten ruuvit (C) uudelleen. Hoitopöydän korkeus säädetään käösinojan kautta (katso kohta 3.3).



Puinen hoitopöytä ei kestä yli 10 kg suurista kuormaa!



Hoitopöytää säädettäessä on olemassa raajojen puristumis- ja ruhjoutumisvaara. Kiristä jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit!

4.6 Pyörät

smilla. Voidaan varustaa vaihtoehtoisesti 4 pyörällä, joista 2 jarrulla. Jarruttaaksesi/lukittaaksesi takapyörät paina jarrua alas kengän kärjellä. Vapauta jarru nostamalla uudelleen jalkasi kärjellä.



Jarrut toimivat luotettavasti vain tasaisella alustalla!



Bremse fest




Bremse gelöst

4. Lisävarusteet.

4.7 Abduktiokiila

Abduktiokiila mahdollistaa reiden mahdollisen lääkinällisen abduktion. Abduktiokiila poistetaan painamalla akselia (A) ja vetämällä kiila itsesi kohti. Kiinnitä kiila asettamalla pikalukitusakseli (A) kiinnikkeen reikään (B). Kiila on paikallaan kuuluvan napsahduksen jälkeen.


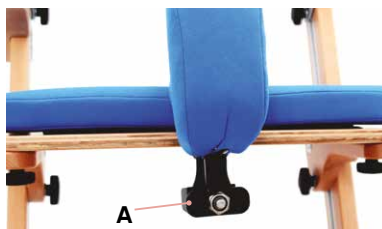


4.8 Kiinnityshihnat

smilla. on varustettu lukuisilla valjaila, jotka huolehtivat käyttäjän paremmasta asemoinnsta tuoliin. Valjaat on asennettava käyttämällä istuimen tai selkänojan alueen valjaiden kiinnitysarjoja.



Voit valita rintahihnan, istuinhousten (vakio) tai T-muotoisten istuinhousten (C) lantiovyön (D) ja 4-piste-lantiovyön (E) välillä. Asemointiapua saatavana moniin eri kokoihin. Oa löydät tilauslomakkeesta / sovitusslomakkeesta osoitteesta www.schchmann.de/smilla.

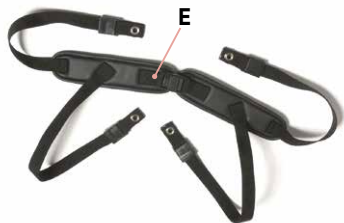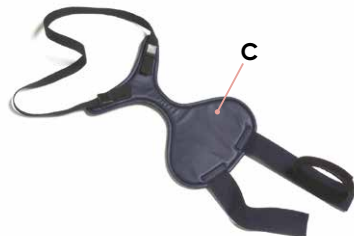

Varmista, että vastaavat valjaat on aina asetettava oikein ja pidettävä lähellä kehoa.



Jos valjaat käytetään väärin, on olemassa loukkaantumis- tai jopa kuristumisvaara käyttäjälle!



Käyttäjiä ei saa jättää yksin edes turvavyön ollessa kiinni! hoitotuolia saa käyttää vain koulutettujen henkilöiden valvonnassa!

5. Puhdistus ja kunnossapito.

5.1 Puhdistus ja desinfiointi

5.1.1 Puhdistus

Puhdista kaikki rungon osat säännöllisesti sienellä tai kostealla liinalla, erityisesti vesipisarat tulee poistaa. Piintyneen lian voi poistaa miedolla pesuaineella. Tärkeää on perusteellinen kuivaaminen puhdistuksen jälkeen.

Kaikki kankaat, joita ei voi poistaa, voi pyyhkiä kostealla liinalla. Huomioi kaikkien irrotettavien kankaiden kohdalla ommeltu hoitotarra (kuten esim. **A+B**) vastaavissa eläimenetissä.

Ota tässä yhteydessä huomioon myös yleiset puhdistus- ja hygieniaohjeemme. Ne löytyvät osoitteesta

www.schuchmann.de/mediathek



5.1.2 Desinfiointi

Erilaisia tuotteita voi käyttää puu-, metalli- ja muoviosien pintojen desinfiointiin.

Nestemäisiä desinfiointiaineita on saatavana valmiina liuoksina, jotka voidaan suihkuttaa ja levittää tasaisesti pehmeällä liinalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää desinfiointiaineeseen kostutettuja liinoja ja pyyhkiä koko tuotteen alue. Molemmissa tapauksissa onvarmistettava täydellinen kostutus. Myös täysautomaattisissa desinfiointijärjestelmissä desinfiointi on mahdollista ja suositeltavaa.

Vaikutusaika voi vaihdella ja se löytyy käytettyjen tuotteiden valmistajan ohjeista.

5.2 Kunnossapito

Suorita päivittäin silmämääräinen tarkastus ja tarkasta säännöllisesti, että tuotteessa ei ole säröjä, murtumia, puuttuvia osia tai virhetointoja. Jos laitteessa on vika tai toimintahäiriö, ota yhteyttä suoraan toimittaneeseen erikoisliikkeeseen (katso **kohta 8.5**).

5.3 Huolto

Turvallisuussyistäö käyttäjälle tuoli on annettava myyntiliikkeen huollettavaksi vähintään kerran vuodessa (katso **kohta 8.5**). Suoritetut huollot on dokumentoitava huoltokaavioon (katso **kohta 5.3.2**).



5. Puhdistus ja kunnossapito.

5.3.1 Huoltomääräykset

- Ntamata periaattellinen puhdistus (katso kohta 5.1.1)
- Desifiinti valmistajan ohjeiden mukaan (katso kohta 5.1.2)
- Rungon, osien ja tarvikkeiden vaurioita (halkeamia, repeämiä, siruja, vääntyneet tai puuttuvat osat)
- Liitosten lujuus (kiristä löysät ruuvit, korvaa puuttuvat ruuvit)
- Säätoelementtien toimivuus (liukulaakeri, selkä, pääntuki, tuet, käsivarsituet, jalkatuet, pöytä ja ohjaukset jalkojen alueella)
- Kuljetuspyörien toiminta (tasainen ja kevyt pyöriminen, ohjattavuus) ja jarrut
- Valjaiden vaurioiden tarkistaminen (puristimet, kiinnikkeet, saumat)
- Tarkista pehmusteet ja päälliset vaurioiden varalta
- Tyypikilven luettavuus
- Apuvälineen lopullinen täydellinen toimintatarkastus
- Tarkista, että kaikki liitteet ja niihinliittyvät lisävarusteet on kiinnitetty oikein

5.3.2 Huoltosuunnitelma

Valmistajan huoltomääräyksiä (katso kohta 5.3.1) on noudatettu.

Pvm	Yritys	Nimi	Allekirjoitus



Ennen käytön jatkamista havaitut viat tai vauriot täytyy korjata erikoisliikkeen tai valmistajan toimesta.

5. Puhdistus ja kunnossapito.

5.4 Varaosat

Käytä ainoastaan Schuchmannin alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia, koska muuten käyttäjän turvallisuus vaarantuu ja takuu raukeaa.

Varaosien tilaamiseksi ota yhteyttä toimittajan erikoisliikkeeseen ja mainitse hoitotuolin sarjanumero (katso **kohta 8.5**). Välttämättömät varaosat ja lisävarusteet saa asentaa vain koulutettu henkilöstö.

5.5 Käyttöikä ja uudelleenkäyttö

Tuotteemme odotettavissa oleva käyttöikä on "8" vuotta määräytyen käytötiheyden ja uudelleen käyttöönottojen mukaan edellyttäen, että käyttö tapahtuu tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen mukaisesti. Tuotetta voidaan käyttää tämän ajanjakson jälkeen, jos se on turvallisessa kunnossa. Odotettavissa oleva käyttöikä ei koske kuluvia osia kuten esim. pyöriä, kaasujousia,... . Huollosta ja kunnan arvioinnista ja mahdollisesta uudelleenkäytettävyydestä vastaa erikoisliike.

Tuote soveltuu uudelleenkäytettäväksi. Suorita ennen luovuttamista **kohdassa 5.1** mainitut puhdistus- ja desinfiointityöt. Toimitukseen kuuluvat asiapaperit, kuten esim. tämä käyttöohje, ovat tuotteen osa ja ne pitää luovuttaa yhdessä tuotteen kanssa uudelle käyttäjälle. Uudelleenkäyttöä varten tuotetta ei tarvitse purkaa. Jos tuote varastoidaan, on suositeltavaa taittaa tuote pienimpiin mittoihinsa.



Jos tuotetta käytettäessä tarkoituksenmukaisesti tapahtuu vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava välittömästi valmistajalle ja vastuuviranomaiselle

The figure contains two technical drawings of an office chair. The left drawing is a front view showing the chair's seat, backrest, and base. It includes dimensions: 'A' for the seat width, 'D' for the seat depth, and 'C' for the total height from the floor to the top of the backrest. The right drawing is a side view showing the chair's profile, including the backrest, seat, and base. It includes dimensions: 'B' for the backrest height, 'E' for the backrest depth, 'G' for the seat height, and 'H' for the total height from the floor to the top of the backrest. The base is shown as a five-pointed star shape.

		Koko 0 KITA	Koko 0	Koko 1 KITA	Koko 1	Koko 2
A	Istuimen leveys	17 - 28 cm	17 - 28 cm	20 - 35 cm	20 - 35 cm	30 - 40 cm
B	Istuimen syvyys	16 - 26 cm	16 - 26 cm	25 - 35 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
C	Istuimen korkeus maks.	42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	65 cm
D	Selkäosan korkeus	25 cm	25 cm	29 cm	29 cm	34 cm
E	Selkäreunan kulma	(-) 3 - 17,5 cm				
F	Istuimen kulma	(-) 5 - 15 cm				
G	Jalkalevyn korkeuden säätö mn.	Vakio	12 cm			
		50 mm kaksoispyörällä	17 cm			
		75 mm kaksoispyörällä	20 cm			
G*	Jalkalevyn korkeus lattiataso min.	Vakio	2,5 cm			
		50 mm kaksoispyörällä	7,5 cm			
		75 mm kaksoispyörällä	10,5 cm			
Maks. kuormitus		30 kg	30 kg	45 kg	45 kg	60 kg
Paino		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg

* säädettävä alareisipituus maks. = valittu/tarvittava istumakorkeus - jalkalevyn korkeus min (G)

7. TAKUU.


Kaikille tuotteilla annetaan lakisääteinen kahden vuoden takuu. Tämä alkaa tavarantoimituksesta tai luovutuksesta. Mikäli toimittamassamme tavaramme tässä ajassa voidaan osoittaa materiaali- tai valmistusvirhe, tarkastamme ilmoitetun vaurion, jos se palautetaan meille rahtivapaasti ja tarvittaessa korjaamme tai toimitamme uuden maksutta ja harkintamme mukaan.



8. Tunnistus

8.1 Sarjanumero / valmistuspäivämäärä

Sarjanumero, valmistuspäivämäärä ja muut tiedot löytyvät jokaisen tuotteen tyyppikilvestä (A).

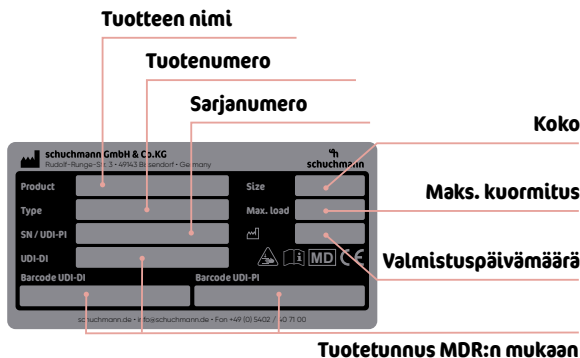

8.2 Tuoteversio

Hoitotuolia **smilla.** on saatavana viisi eri kokoa ja se voidaan varustee lukuisilla lisävarusteilla (**katso kohta 4**).

8.3 Asiakirjan painos

Käyttöohje **smilla.** - Muutettu tila A, julkaisu 08.2024

8.4 Valmistajan nimi ja osoite, toimittava erikoisliike

Tämän tuotteen on valmistanut:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Saksa
Puh. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Faksi +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Tämän tuotteen on toimittanut seuraava erikoisliike:







schuchmann.de